


«УТВЕРЖДАЮ»

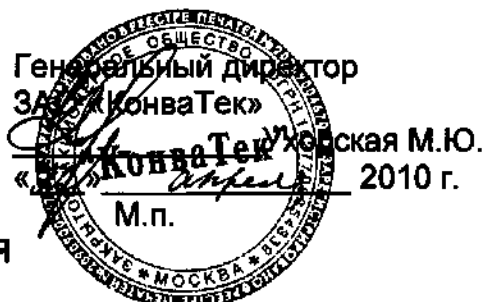

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделий медицинского назначения:
Средства реабилитации при колостомах и илеостомах.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Используются при сборе содержимого из стомы.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Уникальные гидроколлоидные материалы Стомагезив®/«Stomahesive»/ «Дурагезив»/ «Durahesive» обладают выраженными адгезивными и защитными свойствами, способствуют заживлению, надежно прикрепляются к коже вокруг стомы, эффективно защищают ее от повреждений, связанных с воздействием на кожу содержимого из стомы.
2. Большое разнообразие пластин и мешков различных типов, форм и размеров, удовлетворяющее потребности пациентов со всеми типами стом.
3. Технология пластичных пластин, позволяющая моделировать внутреннее отверстие пластины в соответствии с формой стомы, без использования ножниц и шаблонов.
4. Полный комплект вспомогательных принадлежностей для более эффективного ухода за стомой.
5. Удобная анатомическая форма мешков («Esteem»/«Эстим», «Esteem Synergy» /«Эстим Синерджи»)
6. Угольные фильтры (в том числе регулируемые) для устранения неприятного запаха из мешка, конструкция фильтров позволяет регулировать поток воздуха, что препятствует раздуванию или слипанию мешка.
7. Механизмы фиксации пластины к мешку – фланцевое и бесфланцевое соединения, надежно фиксируют мешок к пластине, не допуская случайного разъединения.
8. Система «Инвизиклоуз» /«Invisiclose» для илеостомных (открытых) мешков-уникальный двойной запирающий механизм, встроенный в удлиненную горловину, исключает случайное открытие мешков во время использования.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЙ

Руки и кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, не должна подвергаться воздействию растворителей или жиросодержащих веществ.

Перед подготовкой пластины к наложению, прочитайте инструкцию.

1. Убедитесь в выборе пластины подходящего размера.

2. Откройте индивидуальную упаковку пластины. Не удаляйте прозрачную пленку с обратной стороны пластины и белую защитную бумагу с адгезивной стороны.

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫРЕЗАННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Выберите мешок с предварительно вырезанным отверстием, диаметр которого равен наибольшему диаметру стомы. Не увеличивайте предварительно вырезанное отверстие.

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ, СТАРТОВОЕ ОТВЕРСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДОВЫРЕЗАТЬ

Используя маркировку на защитной бумаге пластины, начертите точный контур стомы.

Вырезайте по нанесенному контуру. Не пересекайте последнюю линию на защитной бумаге. Удалите защитную бумагу. Убедитесь, что кожа вокруг стомы остается чистой и сухой.

Для пластичных пластин: Для формирования отверстия пластины необходимо поместить пальцы на края стартового отверстия пластины и начать раскатывать адгезив от центра до получения отверстия необходимого размера и формы.

Внимание: Пластину рекомендуется накладывать немедленно после моделирования отверстия. Не рекомендуется использование ножниц на пластичных пластинах.

После моделирования отверстия для стомы удалите прозрачную пленку с обратной стороны пластины и немедленно приступить к наложению пластины. Не удалять белую защитную бумагу на данном этапе.

Наложение пластины

Руки и кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, не должна подвергаться воздействию растворителей или жиросодержащих веществ.

При необходимости обработайте кожу вокруг стомы порошком и выдавите небольшое количество пасты на края отверстия для стомы на пластине или на кожу вокруг стомы.

Приложите пластину к стоме и прижмите к коже. Разгладьте внутреннюю сторону пластины пальцем, прижимая на 30 секунд для плотного прилегания вокруг стомы.

Для пластичных пластин:

1. Поместите середину отверстия над стомой и прижмите пластину к коже.

2. Начинайте раскатывать адгезив, скатанный в валик, по направлению к стоме для получения плотного контакта стомы с пластиной. Круговыми движениями прижимать адгезив между фланцевым кольцом и стомой для обеспечения плотного контакта с кожей.

3. Прижимать пластину не менее 30 секунд.

4. Удалите белую защитную бумагу и прижмите наружный гибкий край пластины к коже, не допуская образования морщин.

Присоединение мешка

Возьмите мешок соответствующего размера. Необходимо пропустить некоторое количество воздуха в мешок перед его соединением путем аккуратного расправления мешка.

Крепление мешка с пластиной начать снизу и соединить мешок с пластиной по всей окружности фланца.

Присоединение мешка с бесфланцевым соединением

Перед примеркой мешка убедитесь в том, что «стыковочная площадка» пластины и адгезивное кольцо являются сухими и чистыми. Если адгезивное кольцо мешка является влажным или запачканным – мешок не подлежит использованию. Если «стыковочная площадка» пластины является влажной или испачканной – необходимо ее очистить и высушить насухо.

Перед приклеиванием мешка отделите переднюю и заднюю части мешка друг от друга.

Приклеить мешок подходящего размера следующим образом:

Удалить защитную бумагу с адгезивного кольца мешка.

Сопоставить нижний край адгезивного кольца на мешке с нижним краем «стыковочной площадки» пластины, после чего приклеить мешок к пластине прижимая его снизу вверх для обеспечения полной фиксации адгезивного кольца мешка к «стыковочной площадке» пластины. Что бы убедиться в полной фиксации адгезивного кольца мешка к пластине необходимо пальцем обогнуть вокруг мешка и установить, что адгезивное кольцо является гладким, без пузырей и морщин. Пузыри и морщины являются потенциальным путем утечки содержимого. При отсутствии уверенности в полной фиксации мешка, мешок необходимо отклеить и приклеить еще раз.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ

Все отверстия фильтра должны быть заклеены специальной бумагой во время контакта с водой (принятие душа, ванной). Необходимо освобождать отверстия фильтра после высыхания мешка. Наклейки необходимо использовать для регулировки выхода газов. Избегайте слипания или чрезмерного раздувания мешка. Во избежание слипания мешка необходимо оставлять незаклеенным как минимум одно отверстие фильтра.

Внимание: Фильтр не функционирует при намокании.

Уход за изделиями.

Для выпуска газов необходимо отогнуть мешок за специальное ушко. Перед обратным приклеиванием мешка убедитесь в том, что пластина и адгезивное кольцо являются сухими и чистыми.

В течение первых восьми часов использования возможно возникновение прокрашивания между адгезивным кольцом мешка и пластиной. Осмотр контактной зоны позволяет отслеживать степень прокрашивания для определения времени замены мешка. Замену мешка рекомендуется производить при распространении прокрашивания на 2/3 адгезивного кольца мешка.

Для смены мешка, необходимо отделить мешок от пластины придерживая его за специальное ушко на адгезивном кольце. Удалить мешок путем скатывания его сверху вниз. Мешок не удаляется тянущим движением от пластины.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности изделий 5 лет с даты изготовления.

Хранить в сухом месте при температуре 10-30° С.

Всего прошнуровано,
пронумеровано, прошито
_____ листа(ов)

