

УТВЕРЖДЕНА


«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_г. № _____

Генеральный директор

Задорожний В.Ю.
«26» _____ 2008г.

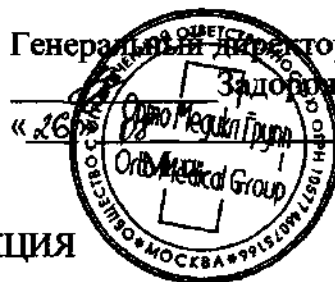

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стельки ортопедические лечебно-профилактические
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стельки ортопедические лечебно-профилактические предназначены для коррекции деформаций стоп и разгрузки болезненных участков на плантарной поверхности стопы.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стельки ортопедические лечебно-профилактические характеризуются:

- По покрытию

Наименование	Артикул	Покрытие, материал
Лезер (Leather)	OS 187	Волчья кожа + слой активированного угля
Лезер софт (Leather soft)	OS 187 2	Волчья кожа + слой ударопоглощающего материала
Спорт (Sport)	OS 183	Высоковспененный латекс
Комфорт (Comfort)	OS 142	Велюр-микрофибра + пенополиуретан
Холидей (Holiday)	OS 179	Волчья кожа + слой активированного угля
Кидс (Kids)	OS 192	Волчья кожа + слой ударопоглощающего материала
Леди (Lady)	OS 121	Волчья кожа + слой активированного угля
Диабетик (Diabetic)	OS 183	Специальный материал для диабетиков
Винтер (Winter)	OS 198	Шерсть

- По каркасу – по степени жесткости (мягкий, средний, жесткий) и по высоте (низкий, средний, высокий)
- Размеры от 20 до 47
- Вес 0,120 кг

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Стельки ортопедические лечебно-профилактические устанавливаются в обувь пациента после предварительного извлечения из обуви вкладной стельки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Порядок ношения стелек ортопедических лечебно-профилактических назначается лечащим врачом. Возможно использование в течение всего дня. В первые две недели вследствие привыкания к изделию возможно ношение стелек ограниченное время.

первые две недели вследствие привыкания к изделию возможно ношение стелек ограниченное время.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предназначены для использования в обуви с закрытой пяточной частью, после ношения вынуть из обуви, просушить на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей.

При хранении стелек не допускается прямого попадания солнечных лучей, а также размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов, расстояние до изделия должно быть не менее 1 метра.

Должность ответственного за
производство

