

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО
«Унوميдал»
Ухорская М.Ю.
2009 г.
М.П.



ИНСТРУКЦИЯ

**по применению изделия медицинского назначения:
Ретракторы хирургические абсорбирующие Дизарп/Disarp**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в хирургии для защиты, отведения и удержания тканей и внутренних органов, с целью обеспечения хорошего обзора области операции, а также поглощения содержимого операционной раны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал – нержавеющая сталь, полиамид, полиуретановая пена
Упаковка – двойная стерильная. Стерилизация оксидом этилена.
Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия. Представлен в двух размерах 250х50х50 мм и 450х50х50 мм. Поглощающая способность 100 и 200 куб. м соответственно.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1. Визуальным осмотром определить целостность индивидуальной упаковки (блистера). В случае повреждения индивидуальной упаковки или сомнений в ее целостности использование ретрактора хирургического абсорбирующего Дизарп/Disarp запрещается, изделие подлежит уничтожению.
- 3.2. Вскрыть лепестки блистера со стороны несклеенного участка.
- 3.3. Извлечь ретрактор из внутренней бумажной упаковки (пакета).
- 3.4. Один из двух одинаковых стикеров, размещенных на бумажной упаковке, с уникальным номером, присвоенным исключительно данному ретрактору, вклеить в операционный журнал.
- 3.5. Ретрактор хирургического абсорбирующий Дизарп/Disarp погрузить в емкость со стерильным физиологическим раствором для пропитывания.
- 3.6. Избыток физиологического раствора удалить, отжав ретрактор механическим отжиманием
- 3.7. Придать ретрактору желаемую форму, изогнув его в соответствии со спецификой проводимой хирургической операции

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1. Уложить ретрактор хирургический абсорбирующий Дизарп/Disarp в операционном поле, так чтобы обеспечить оптимальную визуализацию.

- 4.2. Второй стикер с уникальным номером, присвоенным исключительно данному ретрактору, приклеить к операционному белью.
- 4.3. Перед окончанием операции извлечь Ретрактор из операционного поля.
- 4.4. Стикер уникальным номером, присвоенным исключительно данному ретрактору, отклеить с операционного белья и переклеить в операционный журнал (историю болезни пациента) для контроля проведения манипуляции.
- 4.5. Утилизация использованного изделия обязательна в соответствии с правилами утилизации изделий и материалов, потенциально загрязненных биологическими материалами.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева. Не допускайте длительного воздействия ультрафиолета и флуоресцентного света. Храните, не допуская смятия. Срок годности 5 лет.



Принудовано,
Принудовано
и прошито
2 листов