



Unomedical

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор ЗАО

Уорская М.Ю.
2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по применению изделия медицинского назначения:
Устройство для контроля внутрибрюшного давления.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Устройство для контроля внутрибрюшного давления применяется для получения четких диагностических данных относительно уровня внутрибрюшного давления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Безигольный порт "Комбикон" для взятия проб мочи.
Невозвратные клапаны.
Встроенные гидрофобные антибактериальные фильтры.
Система удобных измерительных шкал.
Индивидуальная стерильная упаковка.
Полностью закрытая система.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Отсутствуют.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений – изделие уничтожьте.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките из неё изделие.
2. При необходимости – зафиксируйте изделие на раме кровати с помощью системы креплений.
3. Убедитесь, что сливной кран закрыт и повернут вверх.
4. Избегайте провисания приводной трубки с образованием петель.
5. Соедините систему с катетером Фолея через коннектор.
6. Определите значение ВБД по наглядной шкале.
7. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи шприца возьмите через порт образцы для анализа.
8. Во время транспортировки больного положите устройство на кровать лицевой стороной вверх.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Не допускайте повторной обработки изделия после окончания его использования.

Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева.

Не допускайте длительного воздействия УФ-лучей.

Стерилизация оксидом этилена. Срок годности (стерилизации) 5 лет.