

Генеральный директор
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»

Тяги С.

2008г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Набор магистралей для интенсивной терапии Dialines for Diapact CRRT/ Диалайнс для Диапакт CRRT в исполнении

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р ИСО 8638-99, СТАНДАРТЫ СЕРИИ ГОСТ Р ИСО 10993, СБОРНИК РУКОВОДЯЩИХ
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор магистралей для интенсивной терапии Dialines for Diapact CRRT/ Диалайнс для Диапакт СРРТ в исполнении:

1. HF/HD-Kit (Haemofiltration / Haemodialysis - Kit)
2. HF/HD-Kit pre-assembled (Haemofiltration / Haemodialysis - Kit pre-assembled)
3. Recirculation HD/HFD-Kit (Recirculation Haemodialysis / High - Flux - Dialysis Kit)
4. PEX-Kit (Plasma Exchange Kit)
5. PAP-Kit (Plasma Adsorbition Kit)
6. SCUF-Kit (Slow Continuous Ultrafiltration Kit)
7. HF/HD-Kit High Volume (Haemofiltration / Haemodialysis - Kit High Volume)

1. Назначение.

Применяется в нефрологии для обеспечения циркуляции крови в экстракорпоральном контуре аппарата Диапакт.

2. Основные технические характеристики

Насосные сегменты – 7 X 10 мм

Воздушные ловушки – артериальная, венозная и фильтра.

3. Противопоказания к применению

Отсутствуют.

4. Подготовка к работе изделия

Внимание! Магистралы находятся в стерильной заводской упаковке. Сборка системы магистралей, подключение фильтра и подключение к больному должны проводиться в асептических условиях.

- 1) Извлеките магистралы из заводской упаковки.
- 2) Навесьте магистралы на аппарат Диалайт в соответствии с цветовой маркировкой на аппарате.
- 3) Вставьте воздушную ловушку в детектор воздуха.
- 4) Вставьте насосные сегменты в соответствующие им насосы.
- 5) Вставьте артериальную и венозную расширительные камеры в держатели.
- 6) Вставьте венозную магистраль в зажим.
- 7) Подключите датчики давления забора и возврата, системного давления, давления раствора «до» и «после» фильтра.
- 8) Подключите магистраль к диализатору в соответствии с цветовой маркировкой разъемов магистралы и диализатора.
- 9) Вставьте нагревательный сегмент в нагреватель.
- 10) Навесьте на весы пакеты с замещающим раствором и пакет для сбора фильтра.
- 11) Подсоедините емкость с двумя литрами стерильного физиологического раствора к артериальному концу магистралы и навесьте ее на весы.
- 12) Переведите аппарат Диалайт в режим «заполнение».
- 13) После окончания заполнения магистралы убедитесь, что воздух в венозной магистрале ниже воздушной ловушки отсутствует.
- 14) Подключите венозный и артериальный порты магистралы к сосудистому доступу больного.
- 15) Начните процедуру СРРТ.

5. Порядок работы изделия

После заполнения магистрали стерильным раствором артериальный насос останавливается и порты магистрали подключаются к сосудистому доступу больного.


После запуска артериального насоса начинается циркуляция крови в экстракорпоральном контуре аппарата.

6. Правила хранения и использования

Хранить при температуре 0 – 30° и относительной влажности не более 85 %.

Срок хранения – 36 месяцев.

Генеральный директор
(должность)

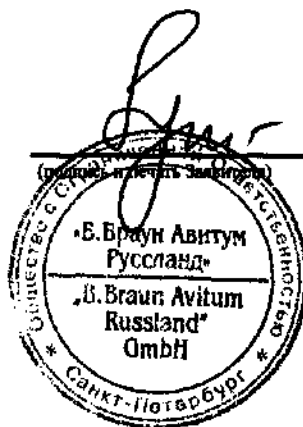

С. Тйаги
(И.О. Фамилия)