

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200_ г. № _____

Генеральный директор
ЗАО «НИЦФ»



Плинер Е.Г.
200_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению питательного бульона для культивирования микроорганизмов сухого (ГМФ-бульона)

Назначение: ГМФ-бульон применяется для культивирования различных микроорганизмов, включая коринеформные бактерии, некоторые виды стрептококков из клинического материала, пищевых продуктов, пищевого сырья и объектов внешней среды.

Основные технические характеристики.

Препарат представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный аморфный порошок желтого цвета, расфасованный по 250 и 500 г в банки из полиэтилена высокого давления со светозащитной добавкой, с самогерметизирующейся крышкой.

Состав (г/л):

Гидролизат мяса ферментативный15,0
Натрия хлорид.....5,0

Противопоказания к применению. Не использовать для лечебных целей. Только для диагностических целей *in vitro*.

Подготовка к работе изделия.

20 г питательного бульона сухого размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 2 мин. Фильтруют через складчатый бумажный фильтр, разливают по 10 мл в стерильные пробирки (ГОСТ 25336-82 Е). Пробирки закрывают ватно-марлевыми пробками и стерилизуют автоклавированием при температуре 121 °С в течение 15 мин. Срок годности питательного бульона - 10 суток при температуре от 2 до 8 °С.

Порядок работы изделия.

Посев и интерпретация результатов должны проводиться согласно Отраслевым нормативным документам, например, Приказ Минздрава СССР от 22.04.85 г., № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования,

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».

Правила хранения и использования. Препарат необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25 °С, в соответствии с СП 3.3.2-1248-03.

Препарат транспортируют при температуре от 2 до 25 °С, в соответствии с СП 3.3.2-1248-03.

Срок годности препарата – 3 года. Препарат с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Начальник отдела питательных сред
ЗАО «НИЦФ»

 Сухаревич М.Э.

Ректор СПбГМА им. И.И. Мечникова
академик РАН, профессор



 А.В.Шабров

