

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200_ г. № _____

Генеральный директор
ЗАО «НИЦФ»



Плинер Е.Г.
200_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению пептона для бактериологических питательных сред сухого

Назначение: Пептон применяется для приготовления бактериологических питательных сред при выделении, культивировании и идентификации различных микроорганизмов.

Основные технические характеристики.

Препарат представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный аморфный порошок от белого до желтого цвета, расфасованный по 250 и 500 г в банки из полиэтилена высокого давления со светозащитной добавкой, с самогерметизирующейся крышкой.

Пептон для бактериологических питательных сред сухой – препарат, получаемый из рубцов, летошки крупного рогатого скота и мяса кур путем ферментативного гидролиза.

Противопоказания к применению. Не использовать для лечебных целей. Только для диагностических целей *in vitro*.

Подготовка к работе изделия.

Для приготовления широко используемых для большинства микроорганизмов питательных сред (мясо-пептонного агара и мясо-пептонного бульона) применяют 10 г препарата на 1 л среды. Количественное содержание препарата пептона в составе других питательных сред определяется их рецептурой.

Порядок работы изделия.

Посев и интерпретация результатов должны проводиться согласно Отраслевым нормативным документам, например, Приказ Минздрава СССР от 22.04.85 г., № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинко-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».

Правила хранения и использования. Препарат необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25 °С, в соответствии с СП 3.3.2-1248-03.

Препарат транспортируют при температуре от 2 до 25 °С, в соответствии с СП 3.3.2-1248-03.

Срок годности препарата – 3 года. Препарат с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Начальник отдела питательных сред

ЗАО «НИЦФ»

 Сухаревич М.Э.

Ректор СПбГМА им. И.И. Мечникова
академик РАМН, профессор



А.В.Шабров

