

## 6. Утилизация

6.1 Утилизация контейнера после истечения срока службы должна проводиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», как отходы по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам).

## 7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Контейнер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды  $-50^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$ ;
- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ . При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;

7.2. Контейнер должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 100% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ .

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок службы - 1,5 года со дня реализации. Гарантийный срок хранения 1,5 года.

8.2. При обнаружении дефекта в гарантийный период, дефектный контейнер и/или его составная часть заменяются. Дефектное изделие и акт о наличии дефекта направляются на предприятие-изготовитель.

8.3. Претензии не принимаются: при наличии на контейнере и/или его составных частях повреждений, полученных в результате нарушения режимов дезинфекции и стерилизации, применения изделия не по назначению.

## 9. Техническое обслуживание

9.1. Проверку контейнера и его составных частей на механические повреждения проводить визуально: наличие трещин, сколов - не допускается. При обнаружении повреждений контейнер должен быть утилизирован, или заменен на его составная часть.

Адрес предприятия-изготовителя: АО «КРОНТ-М»  
141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом. 1

Тел. факс: (495) 500 48 84 (многоканальный)  
E-mail: [info@kront.com](mailto:info@kront.com), Internet: [www.kront.com](http://www.kront.com).

Сервисный центр: телефон 8(985)861-30-56, E-mail: [service@kront.com](mailto:service@kront.com)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРОНТ - М»

## ПАСПОРТ

Ред. 01.23

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой  
для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и  
стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-  
2001



### 1. Назначение изделия

1.1. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» (далее по тексту «контейнер») предназначены для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов и т.п.

Дезинфекцию и стерилизацию с использованием химических средств проводить способом погружения изделий в раствор, содержащийся в контейнере, в соответствии с МУ-287-113.

Противопоказания и побочные эффекты при применении контейнеров - не выявлены.

1.2. Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/06144

### 2. Основные параметры контейнеров и комплектность

| Исполнение контейнера | Рабочий объем, л | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры перфорированного поддона, мм (±10) | Нагрузка, выдерживаемая поддоном, кг | Масса не более, кг | Температура, выдерживаемая контейнером, °C | Ванна | Перфорированный поддон | Утопитель | Крышка | Паспорт |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------|--------|---------|
| КДС-0,2               | 0,2±0,05         | (Ø96xh72)±5            | Ø55xh52                                               | 0,25                                 | 0,08/0,11          | +134                                       | 1     | 1                      | -         | 1      | 1       |
| КДС-1                 | 1±0,2            | (280x155x105)±10       | 180x75x50                                             | 1,2                                  | 0,5                | +134                                       | 1     | 1                      | 1         | 1      | 1       |
| КДС-3                 | 3±0,4            | (370x185x120)±10       | 240x110x90                                            | 1,8                                  | 0,8                | +134                                       | 1     | 1                      | 1         | 1      | 1       |
| КДС-5                 | 5±1,0            | (400x285x165)±20       | 260x175x120                                           | 3,0                                  | 1,2                | +134                                       | 1     | 1                      | 1         | 1      | 1       |
| КДС-10                | 10±1,6           | (450x325x205)±20       | 290x200x160                                           | 6,0                                  | 2,0                | +134                                       | 1     | 1                      | 1         | 1      | 1       |
| КДС-11                | 11±2,0           | (775x285x170)±30       | 630x175x130                                           | 8,0                                  | 2,6                | +134                                       | 1     | 1                      | -         | 1      | 1       |
| КДС-20                | 20±4,0           | (760x460x190)±30       | 600x270x150                                           | 15,0                                 | 5,5                | +65                                        | 1     | 1                      | -         | 1      | 1       |
| КДС-30                | 30±6,0           | (845x475x235)±30       | 560x230x190                                           | 15,0                                 | 6,0                | +65                                        | 1     | 1                      | -         | 1      | 1       |
| КДС-35                | 35±7,0           | (880x475x240)±30       | 680x320x190                                           | 15,0                                 | 7,0                | +65                                        | 1     | 1                      | -         | 1      | 1       |
| КДС-6                 | 15±2,0           | (450x450x180)±20       | -                                                     | 12,0*                                | 1,8                | +65                                        | 1     | -                      | -         | 1      | 1       |

|           |       |                 |   |      |     |     |   |   |   |   |   |
|-----------|-------|-----------------|---|------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| КДС-6Л-1К | 6±1,2 | (420x360x70)±10 | - | 5,0* | 1,2 | +65 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| КДС-6Л-2К | 6±1,2 | (420x360x70)±10 | - | 5,0* | 1,1 | +65 | 1 | - | - | 1 | 1 |

\* - для контейнеров КДС-6, КДС-6Л-1К и КДС-6Л-2К нагрузка, выдерживаемая ванной контейнера.

### 2.1 Принадлежности (по заказу):

- Комплект – 1 комп.:
    - Карман пластиковый предназначен для размещения бумажного носителя сопроводительной информации- 1 шт.;
    - Держатель кармана – 1 шт.;
    - Комплект бумажных носителей (10 шт.)  
(поставляется по заказу в комплекте с контейнерами исполнений КДС-1, КДС-3, КДС-5, КДС-10, КДС-11)
  - Пинцет – 2 шт. (поставляется по заказу для всех исполнений)
  - Устройство слива боковое/нижнее - 1 комплект;  
(поставляется по заказу в комплекте с контейнерами исполнений КДС-30, 35)\*\*
  - «Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1 (ПУ № ФСР 2011/0996)- 1 шт.  
(поставляется по заказу в комплекте с контейнерами исполнений КДС-30, 35)\*\*
- \*\*Контейнеры КДС-30 и КДС-35 оснащаются боковым или нижним устройством слива по заказу потребителя. Состав устройства слива (боковое, нижнее): устройство слива - 1 шт., фиксатор устройства слива на контейнере - 1 шт., запасная часть - фиксатор наконечника – 1 шт., схема установки устройства слива на контейнер. Контейнеры с нижним сливным устройством рекомендуются устанавливать на тележку ТБ-01-«КРОНТ»-1 (по заказу).
- Контейнеры выполнены из полимерных материалов: ударопрочного полистирола, полипропилена; полиамида, АБС-пластика.
  - Срок службы 3 года.

### 3. Подготовка и порядок работы

- Провести распаковку составных частей контейнера, протереть детали контейнера моющим раствором, ополоснуть водой, высушить и провести обработку в соответствии с Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения № МУ-287-113 (далее МУ).
  - Обработка инструментов и изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с МУ дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ. Для проведения обработки изделий следует:
    - поместить обрабатываемые изделия в перфорированный поддон (кроме КДС-6, КДС-6Л-1К и КДС-6Л-2К) и опустить в ванну;
    - залить ванну раствором до полного погружения обрабатываемых изделий, добиться полного заполнения полостей раствором (для обеспечения полного погружения легких изделий использовать утопитель);
    - закрыть ванну с поддоном крышкой и выдержать экспозицию согласно режиму обработки;
    - извлечь поддон из ванны, установить его для стекания раствора согласно конструктивным возможностям исполнения контейнера.
  - Для химической дезинфекции медицинских изделий использовать контейнеры всех исполнений по режимам согласно МУ при температуре раствора, не выше 65°C.
- При стерилизации медицинских изделий растворами химических средств исполнения КДС-0,2, КДС-1, КДС-3, КДС-5, КДС-10, КДС-11, выдерживающие стерилизацию паровым методом в соответствии с режимами, указанными в МУ при температуре, не выше 134°C.

3.4. По окончании работы провести обработку составных частей контейнера в соответствии с МУ и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств.

### 4. Техника безопасности

- К работе по дезинфекции и стерилизации допускаются лица, ознакомленные с действующими правилами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами.
- При работе с использованием химических средств строго следовать инструкциям по применению средств, соблюдать меры предосторожности при работе с химическими средствами, все работы проводить с использованием средств защиты рук и дыхательных путей.
- Не наполнять контейнер раствором свыше указанного рабочего объема.
- Оберегать контейнер от ударов и контакта с открытым огнем.
- Не ставить контейнер на край рабочего места.
- Не хранить химические средства в контейнерах.

### 5. Свидетельство о приемке

5.1. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 9451-009-11769436-2001 и признаны годными к эксплуатации.

#### Принадлежности (по заказу):

| Наименование                                                                                                                                                                                                              | Отметка о наличии        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Комплект – 1 комп.:<br>- Карман пластиковый предназначен для размещения бумажного носителя сопроводительной информации- 1 шт.;                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| - Держатель кармана – 1 шт.;                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| - Комплект бумажных носителей (10 шт.)                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 2. Пинцет – 2 шт.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 3. Устройство слива боковое - 1 комплект;                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 4. Устройство слива нижнее - 1 комплект;                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 5. «Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1 (ПУ № ФСР 2011/0996)-1 шт. | <input type="checkbox"/> |

Месяц/год изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп предприятия



В.П. СИЗИКОВ