

Limited liability company

«INNOSTOM PLUS»

scientific & production enterprise
Komsomolskaya str., 4A, cabinet 14
Novочебоксарск,
Chuvash Republic, 429952, Russian Federation.
Tel. 8(927)8580803, 8(917)6763895
Tel/fax 74-99-36
e-mail: innostom_plus@mail.ru



Общество с ограниченной ответственностью

«ИННОСТОМ ПЛЮС»

научно-производственное предприятие
Россия, 429952 Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, 4А, каб.14
тел. 8(927)8580803, 8(917)6763895
тел/факс: 74-99-36
e-mail: innostom_plus@mail.ru

Исх. № 6 от 12.02. 2013

Инструкция по применению биологической индифферентной наноструктурированной пластмассы горячего отверждения для базисов зубных протезов ОЛАКРИЛ:

Биологическая индифферентная наноструктурированная пластмасса горячего отверждения для базисов зубных протезов «ОЛАКРИЛ» предназначена для изготовления ортопедических стоматологических конструкций, съемных полных или частичных пластинчатых протезов.

Препарат выпускается ООО Научно-производственным предприятием «ИННОСТОМ ПЛЮС» почтовый адрес: Российская Федерация, Чувашская Республика, 429952, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, 4А, каб.14. тел.: 8-917-676-38-95, (8352) 74-99-36. Место производства: Российская Федерация, Чувашская Республика, 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 76.

Изделие состоит из двух компонентов: Жидкость и порошок.

Технические характеристики: Компонент №1 - Жидкость – олигомер метилового эфира метакриловой кислоты представляет собой слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным эфирным запахом. Компонент №2 - порошок полиметилакрилата, представляет собой гранулы одинакового диаметра до 10 мкм.

Противопоказания отсутствуют, кроме индивидуальной непереносимости.

Безопасен для детей и взрослых, имеющих хронические заболевания.

Требования изготовления и эксплуатация изделия согласно ГОСТу Р 51889 и ТУ 9391-001-83042571-2013.

Приготовление полимерного теста производится в резиновых перчатках и вентиляционном шкафу. Идеальные пропорции смешивания - 21 грамм порошка полиметилакрилата на 10 мл жидкости - олигомер метилового эфира метакриловой кислоты (2:1).

Полимеризацию материала проводят на водяной бане. Погрузить кювету с бюгелем в водяную баню при комнатной температуре. Довести до кипения в течение 15 минут. Кипятить 30 минут.

При не соблюдении соотношений порошок – жидкость, возможны ожоги слизистой оболочки.

Медицинское изделие ОЛАКРИЛ инертен, то есть не входит в реакцию с другими материалами при изготовлении зубных протезов.

Компоненты для получения ОЛАКРИЛа хранить в прохладном темном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей при t от 5° до 20° .

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения 2 года.

Утилизация и уничтожение вышедшего из срока годности продукта производится специальными службами.

Генеральный директор
ООО НПП «ИнноСтом плюс»



Андреев О. В.

Пронумеровано, пронумеровано
и сериально негата
2 (два) листа

Генеральный директор
ООО "Импульс" состоит и/или

