

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МА «LUOMMA» ПО ТУ 9396-002-63055870-2014

Варианты исполнения:

1. Матрац ортопедический противопролежневый МА—40/80 (ширина 40 см, длина 80 см)
2. Матрац ортопедический противопролежневый МА—50/100 (ширина 50 см, длина 100 см)
3. Матрац ортопедический противопролежневый МА—60/120 (ширина 60 см, длина 120 см)
4. Матрац ортопедический противопролежневый МА—80/190 (ширина 80 см, длина 190 см)
5. Матрац ортопедический противопролежневый МА—90/190 (ширина 90 см, длина 190 см)
6. Матрац ортопедический противопролежневый МА—110/190 (ширина 110 см, длина 190 см)
7. Матрац ортопедический противопролежневый МА—120/190 (ширина 120 см, длина 190 см)
8. Матрац ортопедический противопролежневый МА—140/190 (ширина 140 см, длина 190 см)
9. Матрац ортопедический противопролежневый МА—160/190 (ширина 160 см, длина 190 см)
10. Матрац ортопедический противопролежневый МА—180/190 (ширина 180 см, длина 190 см)
11. Матрац ортопедический противопролежневый МА—90/200 (ширина 90 см, длина 200 см)
12. Матрац ортопедический противопролежневый МА—110/200 (ширина 110 см, длина 200 см)
13. Матрац ортопедический противопролежневый МА—120/200 (ширина 120 см, длина 200 см)
14. Матрац ортопедический противопролежневый МА—140/200 (ширина 140 см, длина 200 см)
15. Матрац ортопедический противопролежневый МА—160/200 (ширина 160 см, длина 200 см)
16. Матрац ортопедический противопролежневый МА—180/200 (ширина 180 см, длина 200 см)
17. Матрац ортопедический противопролежневый МА—190/200 (ширина 190 см, длина 200 см)

Памятка по применению

Матрац ортопедический противопротезный МА «LUOMMA» (далее матрац), предназначен для разгрузки позвоночника, уменьшения давления на мягкие ткани, суставы и сосуды, улучшения кровообращения, равномерной поддержке тела с учетом его физиологических форм.

Условия применения: лечебные, реабилитационные, профилактические медицинские учреждения, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские и дошкольные учреждения, а также домашние условия.

Показанию к применению:

- пассивная терапия при профилактике и лечении заболеваний опорно - двигательного аппарата
- реабилитация после травм опорно – двигательного аппарата на поздних сроках восстановления
- профилактика возникновения пролежней при палатном восстановительном режиме
- смягчение симптомов при гипертонусе мышц
- хроническая усталость мышц
- пассивный массажный эффект
- улучшение общего кровообращения

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость на комплектующие материалы изделия.

Основные особенности:

- конструкция матраца позволяет оказывать расширенный пассивный массажный эффект на тело: технология прошива камер матраца обеспечивает условно случайное распределение зон давления, естественным образом изменяющееся во время непосредственного использования.
- благодаря технологии прошивки камер матраца происходит более равномерное распределение шариков наполнителя, уменьшается их сваливание и смещение от зон постоянного давления, матрац дольше сохраняет свои эксплуатационные качества.
- размер и размещение «волн» камер матраца способствует более выраженному ортопедическому эффекту

- изготовлен из:

Жаккард (поликоттон) – 20% х/б, 80% п/э

Синтепон – 100 п/э

Гранула пенополистирольная – 100% полистирол

Спанбонд - 100% полипропилен

- поставляется в удобной для хранения и транспортировке сумке из ПВХ пленки или коробке из гофрированного картона.

Технические характеристики матраца:

Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг.

Податливость матраца: 1,7 мм.


Габаритная толщина матраца: (70 ± 10) мм.

Остаточная деформация при нагрузке массой 70 кг – не более 10 %.

Мягкость матраца: категории I

Размер и возможные варианты размещения камер матраца:

Все матрацы стегаются поперек параллельными строчками с шагом 12 см:

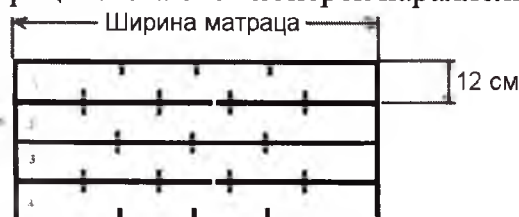

Затем добавляются поперечные строчки общей длиной 5 см (по 2,5 см в стороны от основной строчки).

Шаг добавочных строчек в зависимости от размера:

Артикул	Расстояние от края матраса в нечетных рядах, см	Шаг в нечетных рядах, см	Расстояние от края матраса в четных рядах, см	Шаг в четных рядах, см
МА 40/80, МА 60/120	12,5	15	5	15
МА 50/100	17,5	15	10	15
МА 80/190	24	15,5	15,5	15,5
МА 90/190, МА 90/200	27	17,5	17,5	17,5
МА 110/190, МА 110/200	27	17,5	17,5	17,5
МА 120/190, МА 120/200	20	20	10	20
МА 140/190, МА 140/200	21	13,5	13,5	13,5
МА 160/190, МА 160/200	24	15,5	15,5	15,5
МА180/190, МА 180/200	22	27	8,5	27
МА190/200	27	27	13,5	27

Условное обозначение, размеры, масса, в зависимости от исполнения матраса:

Артикул	Длина матраса, (мм)	Ширина матраса, (мм)	Масса, кг, не более
МА—40/80	800	400	0,6
МА—50/100	1000	500	0,9
МА—60/120	1200	600	1,3
МА—80/190	1900	800	2,7
МА—90/190	1900	900	3
МА—110/190	1900	1100	3,6
МА—120/190	1900	1200	4
МА—140/190	1900	1400	4,6
МА—160/190	1900	1600	5,2
МА—180/190	1900	1800	5,9
МА—90/200	2000	900	3,1
МА—110/200	2000	1100	3,8
МА—120/200	2000	1200	4,2
МА—140/200	2000	1400	4,8
МА—160/200	2000	1600	5,5
МА—180/200	2000	1800	6,2
МА—190/200	2000	1900	6,5

Инструкция по подбору матраса

Матрас подбирается либо соразмерно спального места, на котором он будет использоваться, либо по параметрам пользователя – рост, обхват талии.

Рекомендации по применению:

- перед применением проконсультируйтесь с врачом;
- матрас может использоваться как дополнительный элемент при оборудовании спального места (поверх постоянно используемого матраса).
- при пользовании матрасом рекомендуется использовать наматрасники, либо простыни для сохранения и продления его эксплуатационных характеристик
- в случае использования лежащими больными рекомендуется накрывать матрас влагонепроницаемыми простынями/наматрасниками, дабы избежать проникновения биологических жидкостей и впитывание их наполнителем матраса (В случае проникновения биологических

Внимание! При использовании матраца возможно скатывание наполнителя, рекомендуется не реже одного раза в неделю встряхивать матрац и переворачивать его на другую сторону.

Рекомендации по уходу:

рекомендуется ручная чистка при температуре 30°C с применением поролоновой губки, и щадящих моющих средств (не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку), не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде, вдали от нагревательных приборов, не гладить. После сушки рекомендуется основательно протрясти матрац для равномерного распределения наполнителя.

Не вскрывать матрац.

Условия хранения, транспортирования

Хранить в сухом месте, беречь от воздействия прямых солнечных лучей, при транспортировке избегать избыточного давления на матрац – это может привести к порче гранул наполнителя. Транспортирование матраца может осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

Комплектность:

- матрац – 1 шт.;
- памятка по пользованию (вложенная либо нанесенная на потребительскую тару) – 1 шт.;
- упаковка (сумка из ПВХ пленки или коробка из гофрированного картона) – 1 шт.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации матраца – 6 месяцев со дня приобретения.

Предприятие-изготовитель безвозмездно проводит ремонт или замену матрацев, вышедших из строя в течение гарантийного срока не по вине пользователя.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за выход из строя матрацев в результате их неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Установленный срок службы матраца – 3 года.

Утилизация

Утилизацию матраца проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790 или как твердые бытовые отходы.

Адрес и наименование производителя: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.18, лит.А, телефон (812 325 -09 -04), сайт www.ecoten.ru



РУ № _____ от _____
Дата изготовления: _____

штриховой код товара
Штамп ОТК

Макет ленты с изображением товарного знака



Наполнитель из полистирольных гранул.

Синтепон.

Поліестер.....80%

Жаккард (поликотон): хлопчатобумажный.....20%

состав:

Утилизация: с бытовыми отходами. Гарантийный срок эксплуатации 1 год

По TV 9396-002-63055870-2014

тел.: (812) 325 - 09 - 04

Константиновский пр. 18А, Санкт - Петербург,

Произведено: ООО «Экотен»,



арт.: МА – 80/190

размер: 80/190 см

www.ecoten.ru

www.luomma.fi

Генеральный директор
ООО «Экотен»

А.Г. Осипов

Пронумеровано и прошнуровано 4 листов



Генеральный директор

А.Г.Осипов