

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭВЕРС»

Хорунжин И.О.

М.П. (подпись)

« 01 » ноября 2022 г.



**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ**  
**по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Дата выпуска 01.11.2022

# 1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

## 1.1 Наименование

«Индивидуальный перевязочный пакет по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022» (далее – ИПП, пакет, изделие, Индивидуальный перевязочный пакет)

В вариантах исполнения:

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-2;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-3;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-4;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-5;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-6;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-7;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-8;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-9;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-10;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11;

Инструкция по применению.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-12;

Инструкция по применению.

## 2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эверс» (ООО «Эверс»).

Юридический адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13.

Адрес производства: 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13.

Контактные телефоны: 8 (499)707-10-09

E-mail: evers@evers.ru

## 3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Индивидуальный перевязочный пакет предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Пакет ИПП-1 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, неподвижной сорбционной подушечки и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-2 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, неподвижной сорбционной подушечки и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-3 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, неподвижной разворачивающейся сорбционной подушечкой и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-4 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, неподвижной разворачивающейся сорбционной подушечкой и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-5 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, подвижной сорбционной подушечки и неподвижной сорбционной подушечки, и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-6 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, подвижной сорбционной подушечки и неподвижной сорбционной подушечки, и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-7 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, неподвижной сорбционной подушечки и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-8 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, неподвижной сорбционной подушечки и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-9 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, подвижной сорбционной подушечки и неподвижной сорбционной подушечки, и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-10 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, подвижной сорбционной подушечки и неподвижной сорбционной подушечки, и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-11 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт) с карманом, неподвижной разворачивающейся сорбционной подушечкой и устройством фиксации в виде скобы.

Пакет ИПП-12 представляет собой комбинированное изделие, состоящее из основы особого плетения с фиксацией разматывания на протяжении длины ленты с помощью фиксирующей нити (эластичный бинт), аппликатора давления в виде дополнительного марлевого бинта, вложенного в карман, неподвижной разворачивающейся сорбционной подушечкой и устройством фиксации в виде скобы.

Область применения: десмургия при наружных повреждениях в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Потенциальные пользователи: пакет предназначен для оказания первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи), в том числе доврачебной и первой врачебной помощи, физическим лицом, военным, медицинским работником, обязанным оказывать первую помощь и имеющими соответствующую подготовку, при ранениях.

Условия применения: пакет может быть использован пользователями как в медицинских помещениях, так и вне медицинских помещений, в том числе в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

## 4 РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания для применения: Предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной первой и доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Побочные эффекты: Отсутствуют.

Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях – 2а по ГОСТ 31508, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н.

Пакет кратковременно (менее 24 ч) контактирует непосредственно с повреждёнными или подверженными опасности повреждения поверхностями.

## 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Пакет должен изготавливаться в вариантах исполнения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Вариант исполнения | Отличительная особенность         |                                                     |                                 |                                                            |       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                    | неподвижная сорбционная подушечка | Разворачивающаяся неподвижная сорбционная подушечка | Подвижная сорбционная подушечка | Аппликатор давления в виде дополнительного марлевого бинта | Скоба |
| ИПП-1              | +                                 | -                                                   | -                               | -                                                          | +     |
| ИПП-2              | +                                 | -                                                   | -                               | +                                                          | +     |
| ИПП-3              | -                                 | +                                                   | -                               | -                                                          | +     |
| ИПП-4              | -                                 | +                                                   | -                               | +                                                          | +     |
| ИПП-5              | +                                 | -                                                   | +                               | -                                                          | +     |
| ИПП-6              | +                                 | -                                                   | +                               | +                                                          | +     |
| ИПП-7              | +                                 | -                                                   | -                               | -                                                          | +     |
| ИПП-8              | +                                 | -                                                   | -                               | +                                                          | +     |
| ИПП-9              | +                                 | -                                                   | +                               | -                                                          | +     |
| ИПП-10             | +                                 | -                                                   | +                               | +                                                          | +     |
| ИПП-11             | -                                 | +                                                   | -                               | -                                                          | +     |
| ИПП-12             | -                                 | +                                                   | -                               | +                                                          | +     |

5.2 По внешнему виду пакет должен соответствовать следующим требованиям:

5.3 Пакет должен представлять собой эластичный бинт, на котором расположены:

- для вариантов исполнений ИПП-1,2,7,8, неподвижная сорбционная подушечка – 1 шт.;
- для варианта исполнения ИПП-3,4,11,12 разворачивающаяся неподвижная сорбционная подушечка – 1 шт.
- для вариантов исполнения ИПП-5,6,9,10 подвижная сорбционная подушечка – 1 шт. и неподвижная сорбционная подушечка -1 шт.

5.4 Дополнительно для вариантов исполнения ИПП 5,6,9,10 на подвижную подушечку должна быть нашита накладка (шлевка) из того же материала, который применяется для изготовления пакета. Подвижная подушечка на шлевке свободно перемещается по всей длине эластичного бинта.

- 5.5 Неподвижная подушечка пришита с двух сторон к эластичному бинту на расстоянии  $6 \text{ см} \pm 2 \text{ см}$  от конца бинта.
- 5.6 При изготовлении неподвижной сорбционной подушечки полотно нетканое термоскрепленное из целлюлозных и синтетических волокон для всех исполнений укладывается в основу подушечки послойно в количестве двух слоёв.
- 5.7 Пакет не должен иметь складок, загрязненных участков, посторонних включений.
- 5.8 На 1,5 м фиксирующей ленты допускается не более двух дефектов, в том числе один продольный (утолщение нити основы не более 20 см) и один поперечный дефект по всей ширине бинта (утолщение нити не более 2-х кратной толщины нити или забоины, или недосеки не более 2 мм).
- 5.9 Обработку концов эластичного бинта и подушечки сорбционной осуществляется оверлочным швом по ГОСТ 10399.
- 5.10 Пакет должен соответствовать размерам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Вариант исполнения | Размеры фиксирующей ленты |                | Размеры подушечек сорбционных<br>(в готовом виде, неподвижные –Н и подвижные-П) |                   | Ширина кармана, см |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                    | Ширина, см                | Длина, м       | Ширина, см                                                                      | Длина, см         |                    |
| ИПП 1 – 2          | $10,0 \pm 1,0$            | $1,5 \pm 0,16$ | $10,0 \pm 1,0$                                                                  | $15,0 \pm 1,5$    | $5 \pm 1$          |
| ИПП 3 – 4          | $10,0 \pm 1,0$            | $1,5 \pm 0,16$ | $20,0 \pm 1,0$                                                                  | $15,0 \pm 1,5$    |                    |
| ИПП 5 - 6          | $10,0 \pm 1,0$            | $1,5 \pm 0,16$ | Н- $10,0 \pm 1,0$                                                               | Н- $15,0 \pm 1,5$ |                    |
|                    |                           |                | П- $10,0 \pm 1,0$                                                               | П- $10,0 \pm 1,0$ |                    |
| ИПП 7 - 8          | $15,0 \pm 1,5$            | $1,5 \pm 0,16$ | $15,0 \pm 1,5$                                                                  | $17,0 \pm 2,0$    |                    |
| ИПП 9 - 10         | $15,0 \pm 1,5$            | $1,5 \pm 0,16$ | Н- $15,0 \pm 1,5$                                                               | Н- $17,0 \pm 2,0$ |                    |
|                    |                           |                | П- $15,0 \pm 1,5$                                                               | П- $15,0 \pm 2,0$ |                    |
| ИПП 11-12          | $15,0 \pm 1,5$            | $2,4 \pm 0,25$ | $30,0 \pm 3,0$                                                                  | $30,0 \pm 3,0$    |                    |

- 5.11 Основные параметры и характеристики Скобы должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Размер       | Значение | Допустимое отклонение не более |
|--------------|----------|--------------------------------|
| Длина        | 100,0 мм | 10 %                           |
| Ширина       | 9,0 мм   |                                |
| Высота       | 12,0 мм  |                                |
| Длина зубцов | 1,0 мм   |                                |
| Масса        | 4 г      |                                |

- 5.12 Пакет должен соответствовать массе, указанной в таблице 4.

Таблица 4

| Вариант исполнения | Масса, $\pm 20\%$ , гр |
|--------------------|------------------------|
| ИПП 1              | 39                     |
| ИПП 2              | 52                     |
| ИПП 3              | 43                     |
| ИПП 4              | 56                     |
| ИПП 5              | 46                     |
| ИПП 6              | 59                     |

|        |     |
|--------|-----|
| ИПП 7  | 58  |
| ИПП 8  | 83  |
| ИПП 9  | 75  |
| ИПП 10 | 101 |
| ИПП 11 | 102 |
| ИПП 12 | 127 |

5.13 Пакет по техническим параметрам должен соответствовать показателям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| №пп | Наименование показателя                                           | Величина параметра            |                               |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                   | Исполнение 1-6                | Исполнение 7-10               | Исполнение 11,12              |
| 1   | Поверхностная плотность эластичного бинта, г/м <sup>2</sup> .     | (175±50)                      | 175±50                        | 175±50                        |
| 2   | Поверхностная плотность сорбционной подушечки, г/м <sup>2</sup> . | 270÷430                       | 270÷430                       | 270÷430                       |
| 3   | Поглотительная способность подушечки, г/г.                        | не менее 8,0                  | не менее 8,0                  | не менее 8,0                  |
| 4   | Растяжимость эластичного бинта, %                                 | не менее 250, но не более 350 | не менее 250, но не более 350 | не менее 250, но не более 350 |
| 5   | Разрывная нагрузка эластичного бинта, Н (кгс)                     | не менее 88,2 (9)             | не менее 88,2 (9)             | не менее 88,2 (9)             |

5.14 Пакет должен быть стерильным после стерилизации радиационным способом по ГОСТ ISO 11137-2 – стерилизующая доза 20-60 кГр. Максимальная допускаемая поглощенная доза 60 кГр.

5.15 Индивидуальная упаковка пакета должна быть герметичной и вскрываться без помощи дополнительных устройств.

5.16 Пакет должен быть устойчив к климатическим воздействиям в процессе эксплуатации для исполнения У1 по ГОСТ 15150.

5.17 Пакет в транспортной упаковке должен быть устойчив к климатическим воздействиям в процессе транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, устойчив к климатическим воздействиям в процессе хранения по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

5.18 Пакет в транспортной упаковке должен быть устойчив к механическим воздействиям в процессе эксплуатации и транспортирования по группе 3 в соответствии с ГОСТ 20790.

5.19 Срок годности пакета – 5 лет с даты стерилизации.

5.20 Пакет должен быть изготовлен из материалов:

Полотно нетканое термоскрепленное из целлюлозных и синтетических волокон, ООО «Технология пленки» Россия. Лента ХБ, ООО «Фи-текс», Россия. Спанбонд. Плотность 17 г/м<sup>2</sup>, ООО «КЗНМ» (Россия). Скоба, ООО "Новопласт-М", Россия. Бинт марлевый медицинский стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, ООО «Эвтекс», Россия. Нити швейные из синтетических волокон (полиэфир) Ningbo MH Industry Co., LTD (Китай). Пакет из полимерных пленок комбинированных материалов, ООО «Производственно торговая компания Праймпарк» (Россия), Пакет 130\*205 «КБП-О».

## 6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



НЕДОПУСТИМО накладывать пакет в качестве жгута!

## 7 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Для вариантов исполнения ИПП-1-10:

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) Придерживая свободный край повязки наложить её сорбционной подушечкой вниз (к коже);
- 3) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить в область раны;
- 4) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

Примечание: аппликатор давления в виде дополнительного марлевого бинта, для вариантов исполнения ИПП-2,4,6,8,10,12 располагается с противоположной стороны подушечки и является средством локального давления на рану.

Для вариантов исполнения ИПП-11

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) При обширной ране раскройте разворачивающуюся сорбционную подушечку
- 3) Придерживая свободный край повязки наложить неподвижную разворачивающуюся сорбционную подушечку вниз (к коже);
- 4) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить его в область раны;
- 5) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

Для вариантов исполнения ИПП-12

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) При обширной ране раскройте разворачивающуюся сорбционную подушечку
- 3) Извлеките бинт из кармана и затампонируйте рану бинтом
- 4) Придерживая свободный край повязки наложить неподвижную разворачивающуюся сорбционную подушечку вниз (к коже);
- 5) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить его в область раны;
- 6) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

Для вариантов исполнения ИПП 2,4,6,8,10 при глубокой ране

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) Извлеките бинт из кармана и затампонируйте рану бинтом.
- 3) Придерживая свободный край повязки наложить неподвижную сорбционную подушечку вниз (к коже);
- 4) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить его в область раны;
- 5) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

Для вариантов исполнения ИПП-3,4 при обширной ране:

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) При обширной ране раскройте разворачивающуюся сорбционную подушечку
- 3) Придерживая свободный край повязки наложить неподвижную разворачивающуюся сорбционную подушечку вниз (к коже);
- 4) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить его в область раны;
- 5) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

Для вариантов исполнения ИПП-6,10 сильное кровотечение

- 1) Вскрыть упаковку ИПП;
- 2) Сдвинуть подвижную подушечку на неподвижную подушечку
- 3) Наложить подушечку на выходное отверстие раны
- 4) Растянуть эластическое полотно повязки и циркулярными турами наложить его в область раны;
- 5) Свободный конец повязки фиксируется за предыдущий тур при помощи скобы.

## **8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

8.1 Пакет является стерильным медицинским изделием однократного применения. Ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

## **9 ИНФОРМАЦИЯ О СТЕРИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

Пакет является стерильным медицинским изделием однократного применения. Стерилизация осуществляется радиационным способом, значение стерилизующей дозы должно быть (20-60) кГр. Максимальная допускаемая поглощенная доза 60 кГр. Требования к валидации и текущему контролю процесса стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11137-1-2011. При изготовлении пакета не используются лекарственные средства, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

## **10 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

11.1 Пакет должен поставляться в следующей комплектации:

| Наименование                                                 | Количество (шт.) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Индивидуальный перевязочный пакет одного варианта исполнения | 1                |
| Инструкция по применению                                     | 1                |

## **11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Транспортировать пакет следует в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

## **12 ХРАНЕНИЕ**

Пакет должен храниться в транспортной упаковке в условиях хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 не более 5 лет с даты стерилизации.

## **13 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Эксплуатацию пакета осуществлять в условиях У1 по ГОСТ 15150.

## **14 МАРКИРОВКА**

На упаковке указано следующее:

- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия и его исполнение;
- размер изделия;
- обозначение настоящих ТУ;
- указание на радиационную стерилизацию (допускается использование символа);
- указание на запрет повторной стерилизации (допускается использование символа);

- дата стерилизации «мм.гг»;
- срок годности (допускается использование символа);
- номер партии или серии (допускается использование символа);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- назначение;
- показания к применению;
- побочные эффекты;
- меры предосторожности;
- противопоказания к применению;
- условия хранения;
- условия утилизации.
- надпись «Нетоксично»;
- Символ «Не использовать при поврежденной упаковке»
- инструкция по использованию выполненная пиктограммами.

## 15 РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

15.1 При маркировке пакета могут быть использованы следующие символы:




указание на запрет повторной  
стерилизацией



указание на запрет использования при  
повреждении упаковки



указание на запрет повторного  
применения

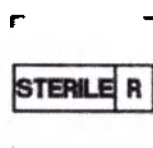

указание на радиационную стерилизацию

## 16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок хранения изделий - 5 лет с даты стерилизации.

## 17 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

17.1 Использованные пакеты перевязочные утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2020 г. № 3)..

17.2 Неиспользованные пакеты перевязочные непригодные к использованию по причине нарушения стерильности и (или) по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2020 г. № 3).

## **18 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ**

18.1 Отсутствуют национальные стандарты предъявляющие требования к пакету для проверки правильности установки (монтажа) медицинского изделия и его готовности к безопасной работе/эксплуатации.

## **19 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

По вопросам качества медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022, производства ООО «ЭВЕРС» обращаться в адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Эверс» (ООО «Эверс»).

Юридический адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13.

Адрес производства: 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13.

Контактные телефоны: 8 (499)707-10-09

E-mail: [evers@evers.ru](mailto:evers@evers.ru).

Прошито, пронумеровано и заверено печатью

10 (десять) ) листа (ов)



Генеральный директор  
ООО «Эверс»

Хорунжин И.О.