

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ

Корсеты ортопедические мягкой, полужесткой, жесткой фиксации

ПРР – «Экотен»

Генеральный директор
ООО «Экотен»



А.Г. Осипов

Варианты исполнения:

1. Корсет ортопедический поясничный мягкой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т1 (высота корсета от 14 до 21 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
2. Корсет ортопедический поясничный полужесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т1 (высота корсета от 14 до 21 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
3. Корсет ортопедический поясничный жесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т1 (высота корсета от 14 до 21 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
4. Корсет ортопедический пояснично-крестцовый мягкой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т2 (высота корсета от 22 до 29 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
5. Корсет ортопедический пояснично-крестцовый полужесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т2 (высота корсета от 22 до 29 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
6. Корсет ортопедический пояснично-крестцовый жесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т2 (высота корсета от 22 до 29 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
7. Корсет ортопедический груднопояснично-крестцовый мягкой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т3 (высота корсета от 30 до 37 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
8. Корсет ортопедический груднопояснично-крестцовый полужесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т3 (высота корсета от 30 до 37 см), размеры: S, M, L, XL, XXL
9. Корсет ортопедический груднопояснично-крестцовый жесткой фиксации: ПРР – «Экотен» - Т3 (высота корсета от 30 до 37 см), размеры: S, M, L, XL, XXL

Памятка по применению

ecotenTM

идеи для движения

Корсеты ортопедические мягкой, полужесткой, жесткой фиксации ПРР – «Экотен» (далее – корсеты) предназначены для разгрузки, стабилизации и фиксации поясничного, пояснично-крестцового и грудо - пояснично-крестцового отделов позвоночника при его заболеваниях, а также для реабилитации после перенесённых операций и травм.

Вид корсета и режим ношения (длительность, частота ношения, использования) строго по назначению врача. Рекомендуются строго соблюдать режим ношения корсета.

Показанию к применению корсетов поясничных мягкой фиксации:

умеренная фиксация поясничного отдела позвоночника
профилактика, лечение и реабилитация после травм и операций
люмбаго, люмбалгия
миозит, остеохондроз, остеоартроз
боли в пояснице
поясничный спондилез, остеоартрит
грыжи Шморля
заболевания связок позвоночника
легкая структурная недостаточность позвоночного столба
статические нагрузки на поясничный отдел позвоночника
после мануальной терапии и лечебной гимнастики
профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках

Показания к применению корсетов поясничных полужесткой фиксации:

радикулит, люмбаго, люмбалгия
боли в пояснице
прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
межпозвонковые грыжи
заболевания связок позвоночника
структурная недостаточность позвоночного столба
после дискэктомии
после операций на поясничном отделе позвоночника
после мануальной терапии и лечебной гимнастики
профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках

Показания к применению корсетов поясничных жесткой фиксации:

хронические и прогрессирующие: радикулит, люмбаго, люмбалгия
хронические и прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
хронические и прогрессирующие: межпозвонковые грыжи
заболевания связок позвоночника
структурная недостаточность позвоночного столба
после дискэктомии
после операций на поясничном отделе позвоночника

Показанию к применению корсетов пояснично-крестцовых мягкой фиксации:

поздние сроки реабилитации после операций на крестцовом и поясничном отделах позвоночника
после дискэктомии
боли вследствие травм позвоночника
неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков
пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии

поясничного спондилеза, остеоартрит
грыжи межпозвонковых дисков
воспаление крестцово-подвздошного сочленения
структурная недостаточность позвоночного столба
дегенеративное смещение позвонков
после мануальной терапии и лечебной гимнастики
профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках
Показания к применению корсетов пояснично-крестцовых полужесткой фиксации:

реабилитация после операций на крестцовом и поясничном отделах позвоночника
после дискэктомии

острые и хронические боли в следствии травм позвоночника
неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков
пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии
боли в пояснице

прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит
грыжи межпозвонковых дисков

воспаление крестцово-подвздошного сочленения
структурная недостаточность позвоночного столба
дегенеративное смещение позвонков
после мануальной терапии и лечебной гимнастики
профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках

Показания к применению корсетов пояснично-крестцовых жесткой фиксации:

первичная реабилитация после операций на крестцовом и поясничном отделах позвоночника
после дискэктомии

прогрессирующие, острые и хронические боли в следствии травм позвоночника
неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков
прогрессирующие, острые и хронические: пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии

прогрессирующие, острые и хронические: поясничный спондилез, остеоартрит
грыжи межпозвонковых дисков

воспаление крестцово-подвздошного сочленения
структурная недостаточность позвоночного столба
дегенеративное смещение позвонков

Показанию к применению корсетов грудно-пояснично-крестцовых мягкой фиксации:

поздние сроки реабилитации после операций на крестцовом, поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника

после дискэктомии

боли вследствие травм позвоночника

неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков

пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии

поясничный спондилез, остеоартрит

грыжи межпозвонковых дисков

воспаление крестцово-подвздошного сочленения

структурная недостаточность позвоночного столба

дегенеративное смещение позвонков

после мануальной терапии и лечебной гимнастики

профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках

Показания к применению корсетов грудно-пояснично-крестцовых полужесткой фиксации:

реабилитация после операций на крестцовом, поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника

после дискэктомии

хронические и прогрессирующие боли вследствие травм позвоночника

неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков

хронические: пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии

хронические: поясничный спондилез, остеоартрит

грыжи межпозвонковых дисков
воспаление крестцово-подвздошного сочленения
структурная недостаточность позвоночного столба
дегенеративное смещение позвонков
после мануальной терапии и лечебной гимнастики

Показания к применению корсетов грудно-пояснично-крестцовых жесткой фиксации:

первичная реабилитация после операций на крестцовом, поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника
после дискэктомии
острые, хронические и прогрессирующие боли вследствие травм позвоночника
несложные переломы отростков тел поясничных позвонков
прогрессирующие, острые и хронические: пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии
прогрессирующие, острые и хронические: поясничный спондилез, остеоартрит
грыжи межпозвонковых дисков
воспаление крестцово-подвздошного сочленения
структурная недостаточность позвоночного столба
дегенеративное смещение позвонков

Противопоказания к применению: не выявлены

Основные особенности:

Модели мягкой и полужесткой фиксации состоят из центральной детали, выполненной из эластичной резины и симметричных ушей из нерастяжимого триплированного полотна с застежкой велькро.

В моделях мягкой фиксации использованы пластиковые ребра жесткости (4, 6 или 8 штук).

В моделях полужесткой фиксации использованы пластиковые (2 или 4 штуки) и металлические (2 или 4 штуки) ребра жесткости.

Модели жесткой фиксации имеют нерастяжимую центральную деталь из триплированного полотна и симметричные уши из эластичной резины с застежкой велькро. В моделях жесткой фиксации использованы металлические ребра (4 или 6 штуки).

Для лучшей фиксации на всех корсетах имеются стяжки из эластичной резины, так же на застежке велькро.

Инструкция по подбору корсета

Корсет подбирается по мерке обхвата талии покупателя. Размеры корсетов соответствуют принятому размерному ряду в соответствии с заявленными размерами обхвата талии (см):

S	65 – 85
M	83 – 100
L	98 – 115
XL	113 – 130
XXL	128 – 140

Рекомендации по применению:

- перед применением проконсультируйтесь с врачом;
- высота корсета подбирается в зависимости от места расположения проблемных зон и роста;
- для наилучшей фиксации моделируйте ребра жесткости по фигуре;
- надевать корсет на нижнее белье, лежа на спине. Для лучшей фиксации корсета застегните эластичные стяжки;
- снимать корсет рекомендуется лежа на спине.

Внимание! Не использовать корсет с металлическими ребрами жесткости в рентгеновских аппаратах, обратить внимание при прохождении зон досмотра и контроля.

Рекомендации по уходу:

рекомендуется ручная стирка при температуре 30°C нейтральными моющими средствами, стирку осуществлять только с застегнутыми контактными липучками типа «велькро», не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде, вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку.

Корсет ортопедический мягкой, полужесткой фиксации ПРР – «Экотен»

Размеры: S, M, L, XL, XXL

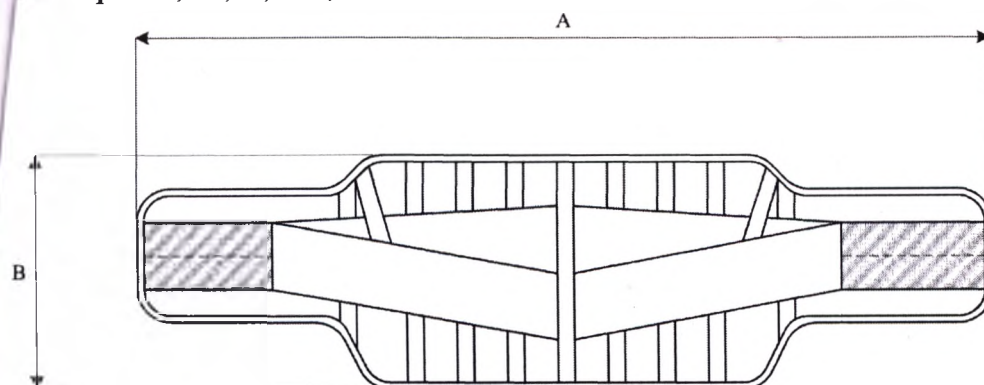


ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ (А)

Размер корсета	Длина корсета (А), мм
S	910±10
M	1030±10
L	1140±10
XL	1280±10
XXL	1360±10

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ (В)

Высота корсета (В), мм		
T1	T2	T3
(140-210) ± 5	(220-290) ± 5	(300-370) ± 5

Корсет ортопедический жесткой фиксации ПРР – «Экотен», размеры: S, M, L, XL, XXL

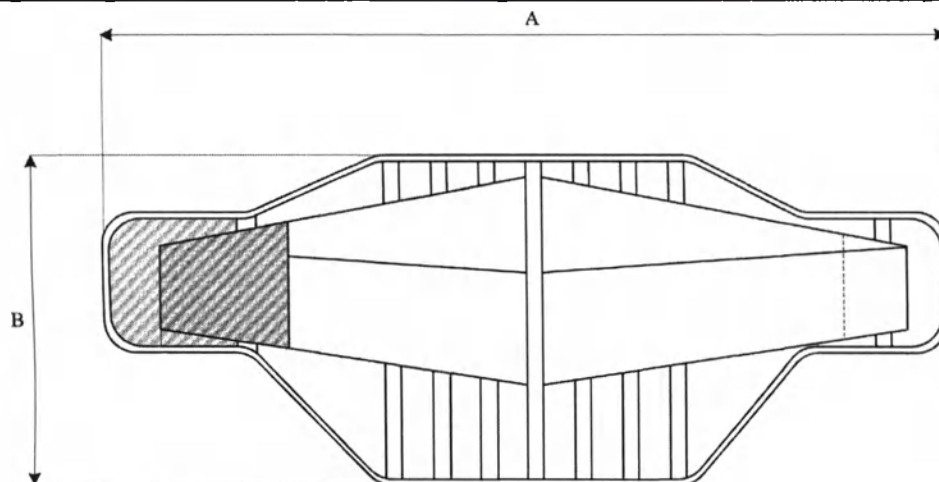


ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ (А)

Размер корсета	Длина корсета, мм (А)		
	T1	T2	T3
S	860±10	860±10	880±10
M	1010±10	1010±10	1040±10
L	1100±10	1100±10	1110±10
XL	1240±10	1240±10	1250±10
XXL	1300±10	1300±10	1320±10

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ (В)

Высота корсета (В), мм		
T1	T2	T3
(140-210) ± 5	(220-290) ± 5	(300-370) ± 5

Пакетность:

корсет – 1 шт.;

подкладка по пользованию (вложенная либо нанесенная на потребительскую тару – картонную коробку) – 1 шт.;

упаковка (полиэтиленовый пакет) – 1 шт.

упаковка (картонная коробка) - 1 шт.

Хранение: от плюс 15 до плюс 40°C и относительной влажности от 50 до 80% вдали от отопительных приборов с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортирование должно производиться в закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых негерметичных отсеков самолётов) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида в диапазоне значений температур от минус 0 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 98 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации корсетов – 6 месяцев со дня приобретения.

Предприятие-изготовитель безвозмездно проводит ремонт или замену корсетов, вышедших из строя в течение гарантийного срока не по вине пользователя.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за выход из строя корсетов в результате их неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Установленный срок службы корсетов мягкой фиксации и корсетов полужесткой фиксации – 6 месяцев.

Установленный срок службы корсетов жесткой фиксации – 2 года (для детей-инвалидов – 1 год).

Утилизация

Утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Адрес и наименование производителя: ООО «Экотен», Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.18, лит.А.



РУ № _____ от _____
Дата изготовления: _____


штриховой код товара
Штамп ОТК

Макет ленты с изображением товарного знака

 идеи для движения ПРР – «Экотен» - T1 (высота 14 см) размер/size: S	Фирма-изготовитель: ООО «Экотен» Manufacturer: «Ecoten» LTD т: (812) 325-09-04 www.ecoten.ru Страна-изготовитель: Россия Made in Russia	    
---	--	---

Пронумеровано и прошнуровано 6 листов

Генеральный директор

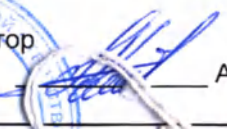 А.Г.Осипов

