

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Жизнь гражданина»

Дулин В.С.
« 29 » ноября 2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения (руководство
пользователя)

Наименование: Средства перемещения медицинские MIKIRAD с принадлежностями

Производства:

MIKIRAD s.c. Wytwornia Artykulow z Metalu I Tworzyw Sztucznych, Польша

НАЗНАЧЕНИЕ. Изделия, предназначенные для улучшения мобильности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Название изделия	Тип изделия
Ходунки: - переставные - с пошаговым передвижением: 21/MR	- 20/ MR, - 21/MR,
Кресло-туалет: - Кресло-туалет с опорами для рук, регулируемый по высоте - Кресло-туалет с опорами для рук, складной, регулируемый по высоте - Кресло-туалет с опорами для рук, складной, с 4-мя колесами и 2-мя тормозами	-KS/MR - KS/MR/Sk - KS/MR/Sk.4k

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

-Для чистки и дезинфекции следует использовать деликатные препараты, получившие оценку Государственного управления гигиены. Не использовать абразивные средства!

Внимание: для чистки мягкой поверхности нельзя использовать средства на основе бензина, растворителей, кислот, хлора и т.п.!

-Стандартные изделия предназначены для лиц ростом от 155 до 185см и весом не более 120кг

-Ходунки выполнены из профилей из алюминиевых сплавов, соединенных морозоустойчивой синтетической резиной с высокими механическими свойствами

-Рекомендуются при отсутствии или значительном повреждении одной ноги

-Механизмы блокирования, при регулировке высоты, обеспечивают полную безопасность и гарантируют, что трубки не будут двигаться при эксплуатации

Соответствующая регулировка высоты и правильная эксплуатация наших изделий значительно продлевает срок годности изделий, а также обеспечивает пользователю чувство безопасности и комфорта.

-Использовать изделия по назначению. Возможные изгибы металлических элементов с видимыми трещинами поверхности, возникшие в результате неправильной эксплуатации, делают изделие непригодным к использованию.

-Изготовлены из экологически чистых материалов в соответствии с требованиями ЕЕС.

-Изделия предназначены для использования, как в помещении, так и на улице, на горизонтальной поверхности.

-Стандартные изделия предназначены для лиц ростом не выше 185см и весом не более 120кг.

-Изделия приспособляются к росту пользователя путем ступенчатого выдвижения регулировочных трубок из корпуса, каждые 20 мм.

-Два комплекта отверстий для фиксатора увеличивают диапазон регулировки вдвое.

-Высота изделий считается правильно установленной, если во время эксплуатации пользователь может выпрямиться, а изделие работает в вертикальном положении. Способ регулировки подробно указан во II части инструкции.

-Правильно отрегулированная высота значительно продлевает срок эксплуатации ходунков. Использование двойного фиксатора, амортизирующей втулки и амортизирующей пробки в верхней части регулирующих трубок полностью исключают появление каких-либо звуков при эксплуатации.

-Регулировочные отверстия, расположенные в регулировочных трубках, значительно повышают прочность ходунков.

-Соответствующая регулировка высоты и правильная эксплуатация наших изделий значительно продлевает срок годности изделий, а также обеспечивает пользователю чувство безопасности и комфорта.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Использовать по назначению.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

наклеен на трубке центрального крыла, находился на передней части ходунков. Затем расставить два боковых крыла и соединить шарнирно закрепленные трубки таким способом, чтобы после того, как более тонкая трубка вставлена, и штырь фиксатора опустился, обе трубки заблокировались. Таким же образом следует поступить с соединением на другом крыле. Складывание ходунков происходит обратным способом. После ослабления фиксатора следует раскрыть крылья ходунков для разъединения скошенных трубок. Одно из крыльев следует наклонить вперед, а другое в обратную сторону таким образом, чтобы они разложились.



IV. Ходунки с пошаговым передвижением

Складывание ходунков (21/MR) происходит путем совмещения пружинного штыря фиксатора, который находится в ступенчато установленных трубках, шарнирно прикрепленных к боковым крыльям ходунков. После того, как фиксатор вставлен, следует придерживать трубку с фиксатором, одновременно поворачивая при этом крылья с закрепленной более тонкой трубкой в направлении центрального крыла, до тех пор, пока они не совместятся. Второе крыло следует вращать в направлении, которое приведет к тому, что ходунки можно будет сложить.

При раскладывании ходунков следует действовать обратным способом, с тем, что если в последней фазе штырь с фиксатором не попадет в отверстие, следует трубки этого соединения двигать до тех пор, пока они не защелкнутся.



Рис. 1 Виды насадок

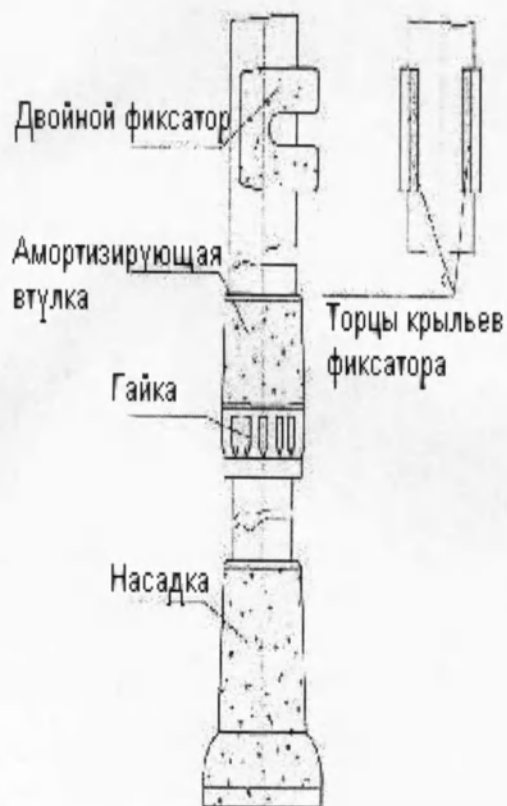


Рис.2 Бесступенчатая регулировка с внутренней и наружной блокировкой

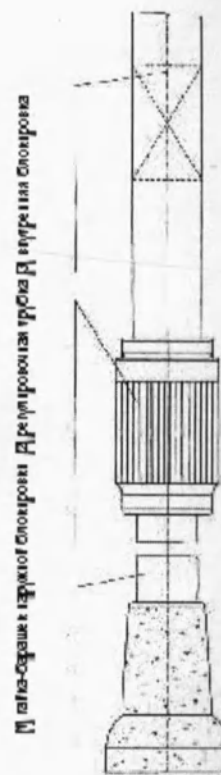


Рис.3 Ступенчатая регулировка

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, выставить высоту, зафиксировать блокировочный механизм (см. п.3).

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Использовать по назначению. Чистку изделий производить согласно рекомендациям.

Генеральный директор ООО «Жизнь гражданина»



(Дулин В.С.)

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5

1 1876

) листов

цифрами прописью
Должность ин. директор Рунин В.И.О.
личная подпись
Жизнь гражданина 20 12 г.

