


№ 32114-01


Фотографии общего вида медицинского изделия:
«Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon»
производства
«ZAVI MEDICARE LLP» (ТОО «ЗАВИ МЕДИКЭА»), Индия

Фотографии общего вида медицинского изделия:

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 14G

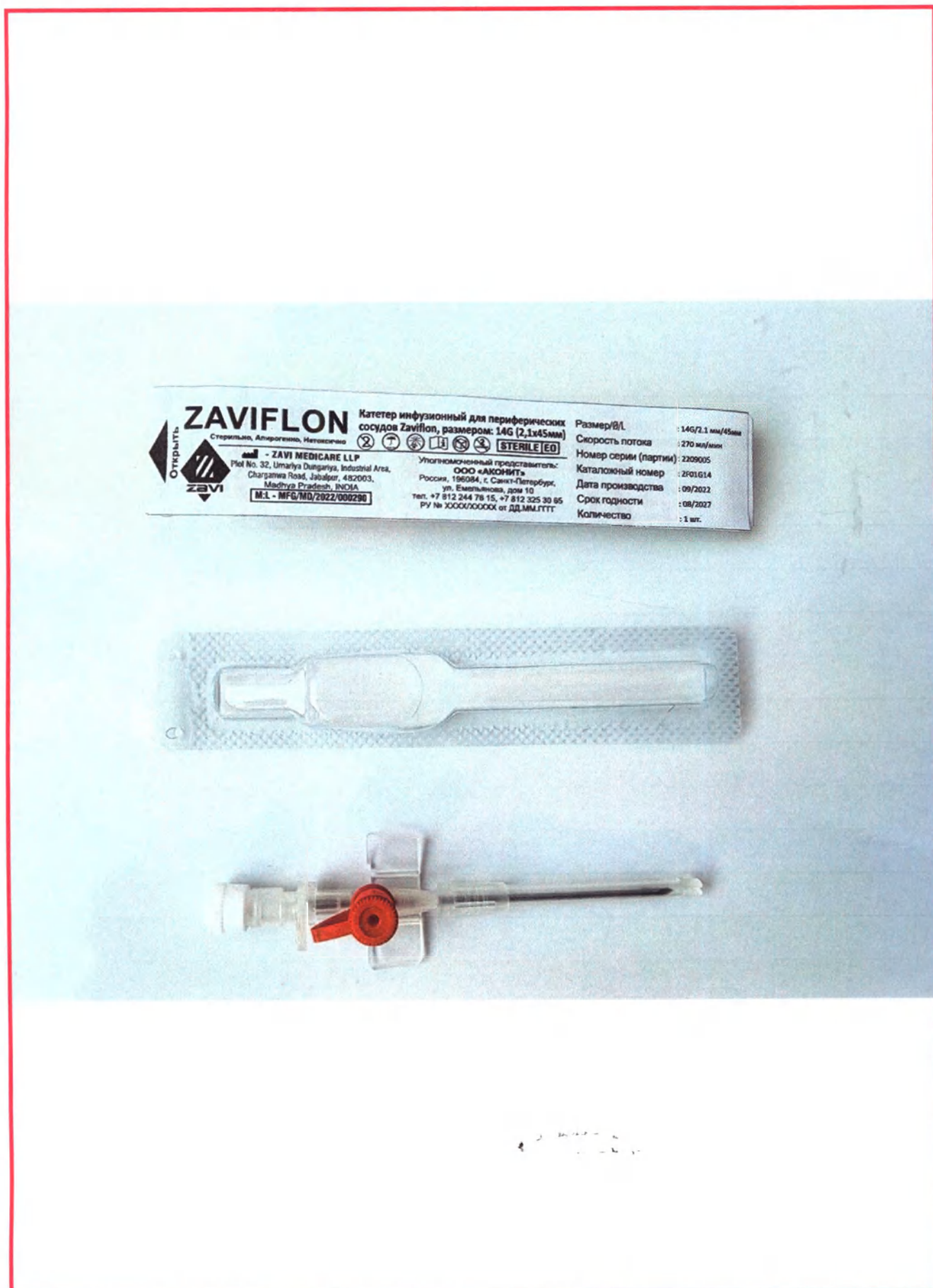

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 16G.

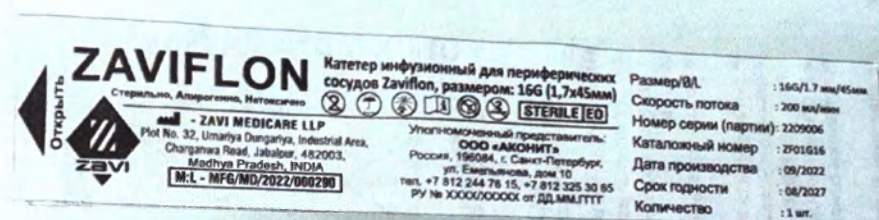

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 17G



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 18G



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 20G



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 22G



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 24G



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размер 26G



ZAVIFLON

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 14G (2,1x45мм)



STERILE EO

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Размер/Ø/L	: 14G/2.1 мм/45мм
Скорость потока	: 270 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209005
Каталожный номер	: ZF01G14
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть



ZAVIFLON

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично

- ZAVI MEDICARE LLP
Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA
M:L - MFG/MD/2022/000290

**Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 16G (1,7x45мм)**








STERILE EO

Уполномоченный представитель:
ООО «АКОНИТ»
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Размер/Ø/L	: 16G/1.7 мм/45мм
Скорость потока	: 200 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209006
Каталожный номер	: ZF01G16
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

ZAVIFLON

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 17G (1,5x45мм)



STERILE EO

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

table
Размер/Ø/L	: 17G/1.5 мм/45мм
Скорость потока	: 125 мл/мин
Номер серии (партии):	2209007
Каталожный номер	: ZF01G17
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть

ZAVIFLON

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично




- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 18G (1,3x45мм)

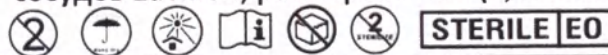

STERILE EO

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

table
Размер/Ø/L	: 18G/1.3 мм/45мм
Скорость потока	: 90 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209008
Каталожный номер	: ZF01G18
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть

ZAVIFLON

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично




- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 20G (1,1x32мм)

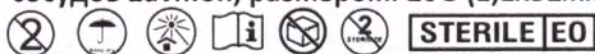

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

table
Размер/Ø/L	: 20G/1.1 мм/32мм
Скорость потока	: 55 мл/мин
Номер серии (партии):	2209009
Каталожный номер	: ZF01G20
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть

Открыть



ZAVIFLON

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично

- ZAVI MEDICARE LLP
Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

**Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 22G (0,9x25мм)**








STERILE EO

Уполномоченный представитель:
ООО «АКОНИТ»
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Размер/Ø/L	: 22G/0.9 мм/25мм
Скорость потока	: 36 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209010
Каталожный номер	: ZF01G22
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть

ZAVIFLON

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично



- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 24G (0,7x19мм)



STERILE EO

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Размер/Ø/L	: 24G/0.7 мм/19мм
Скорость потока	: 18 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209011
Каталожный номер	: ZF01G24
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Открыть

ZAVIFLON

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично



- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

M:L - MFG/MD/2022/000290

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 26G (0,6x19мм)



STERILE EO

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65
РУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ


table
Размер/Ø/L	: 26G/0.6 мм/19мм
Скорость потока	: 13 мл/мин
Номер серии (партии)	: 2209012
Каталожный номер	: ZF01G26
Дата производства	: 09/2022
Срок годности	: 08/2027
Количество	: 1 шт.

Макеты маркировки групповой упаковки (4 стороны упаковки):

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 14G (2,1х45мм):



**Катетер инфузионный
для периферических сосудов Zaviflon**

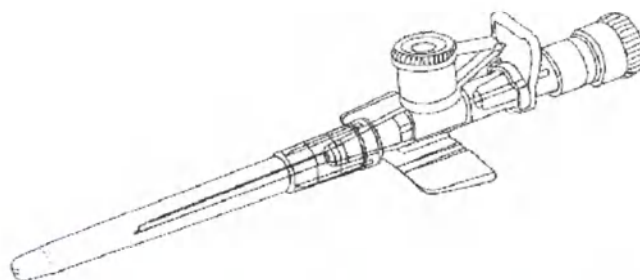

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP



Инструкция по применению

Назначение:

Катетеры инфузионные для периферических сосудов ZaviKon предназначены для введения в кровеносные сосуды лекарственных растворов для местного введения (т.е. периферического доступа), с целью осуществления многократного доступа к сосудистой системе (до 48-х часов) для введения (или выведения) раздражающих жидкостей (лекарственных средств, медицинских растворов, электролитов, витаминов, некоторых видов анестетиков, а также для переливания крови и/или ее компонентов), в (или из) периферическую сосудистую систему пациента. Чаше всего используются с инфузионными устройствами.

Область применения – анестезиология и реаниматология.

Условия применения – отделения лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Потенциальный потребитель – медицинский работник с достаточной квалификация для выполнения катетеризации сосудов.

Показания к применению:

- Необходимость внутривенного введения препаратов длительного курса
- Необходимость поддержки или коррекции водного баланса в случаях, когда пациент не в состоянии принимать жидкость пероральным путем
- Необходимость переливания крови и ее компонентов
- Необходимость частого введения в вену лекарственных препаратов или растворов
- Поддержка гидратации и/или коррекции для терапии у пациентов, не способных принимать необходимое количество жидкости перорально или другими способами периферического введения

Проведение периферического питания;
Обеспечение и поддержание венозного доступа в экстренных ситуациях.

Наркоз при хирургическом вмешательстве.

Противопоказания:

- Введение лекарственных средств, имеющих выраженное раздражающее действие (например, растворы с высокой осмотической);
- Введение сильнодействующих жидкостей;
- Наличие больших объемов крови и ее компонентов;
- Нервно-мышечная слабость пациента к любому из используемых материалов.

Во внимание побочные действия:

- Флебит: развитие воспалительного процесса в венозной стенке;
- Интрузия: попадание инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающими свойствами, в окружающие вену ткани;
- Экстравазация: попадание препаратов, обладающих

раздражающим свойством в окружающие вену ткани;
Инфильтрация: воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровяной поток синих микрорезантов;

- Гематома: кровоизлияние под кожу;
- Тромбоз: образование тромба в вене;
- Тромбофлебит: воспаление стенок вены с образованием тромба в ее просвете.

Порядок применения:

1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Запрещается использовать катетер в поврежденной индивидуальной упаковке.

- Проверить срок годности. Срок годности указывается на индивидуальной упаковке.
- Измерить подходящий размер катетера.
- Осторожно выбрать и продезинфицировать место для вентурикации.
- Накопить жгу.
- Извлечь катетер из упаковки.
- Снять защитный колпачок и ввести катетер за инъекционный порт или вступив на корпус и палочкой упер средним пальцем вверх.
- Ввести катетер в вену под малым углом и проверить наличие крови в камере обратного тока крови, чтобы удостовериться в попадании в вену.
- Продвинуть катетер в вену и одновременно аккуратно извлечь иглу быстрым непрерывным движением параллельно поверхности кожи. Избегать вращения иглы при ее удалении.
- Избегать утечки крови, нажимая пальцем на вену или выше канюли катетера.
- Не пытаться повторно ввести частично или полностью введенную иглу.
- Выбросить иглу в предназначенный для этого контейнер для отходов.
- После удаления иглы наклеивать инфузионную систему или установить зажим джуг-лок.
- Прикрепить крышечку катетера к коже пациента.
- Наклеить на место введения стерильную повязку.
- Препарат может вводиться длительно с помощью шприца через инъекционный порт после снятия канюли порта.
- Канюлю инъекционного порта должен оставаться закрытым, когда он не используется.
- Повторно осматривайте место прокола вены на наличие канюли реакции и проверяйте все соединения.

На трубку каждого катетера нанесены рентгеноконт. рисунки полой в следующие количества: для размера 14G - 4 полой, 16G - 4 полой, 17G - 4 полой, 18G - 4 полой, 20G - 4 полой, 22G - 3 полой, 24G - 4 полой, 26G - 4 полой.

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 14G (2,1x45мм)

LOT : 2209005
: 09/2022
: 08/2027
Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G14

14 G

Скорость

потока : 270 мл/мин

Ø : 2.1 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,

Industrial Area, Charganwa Road,

Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dungariya ,

Industrial Area,

Chargawan Road , Jabalpur,

482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15,

+7 812 325 30 65




STERILE EO

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 16G (1,7x45мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

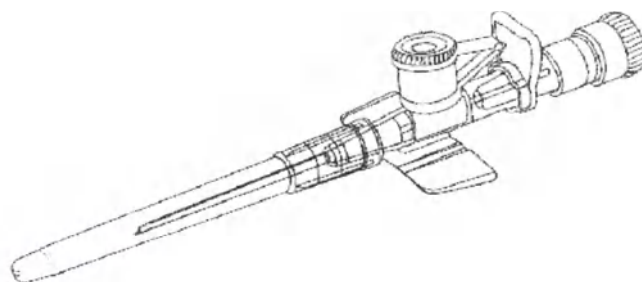

100 штук



Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP

Стерильно, Анисорбентно, Нетоксично

раздражающим свойством в окружающие вены тканей; инфитирование: воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровотоки патогенных микроорганизмов; гематома: кровоизлияние под кожу; тромбоз: образование тромба в вене; тромбофлебит: воспалительный процесс венозной стенки с образованием тромба в ее просвете.

Правила применения:

1. Проверить целостность инфузионной упаковки. Запечатывается упаковка в ее просвете.
2. Проверить срок годности. Срок годности указывается на инфузионной упаковке.
3. Проверить целостность упаковки катетера.
4. Осторожно вынуть и протереть инфузионный мешок для дезинфекции.
5. Наложить жгут.
6. Наложить катетер из упаковки.
7. Снять защитный колпачок и ввести катетер за инфузионный порт в вену.
8. Ввести катетер в вену под малым углом и провернуть на 180°.
9. Проверить катетер в вену и одновременно аккуратно нагнать инфузионную жидкость в вену.
10. Проверить потерю крови, нажав пальцем на вену или выше конечной катетера.
11. Не вытаскивать повторно введенный катетер или полностью извлекать из вены.
12. Выбросить шприц в предназначенный для этого контейнер для отходов.
13. После улаживания инфузии подключить инфузионную систему или установить запорную муфту.
14. Проверить катетер к коже пациента.
15. Наложить на место введения катетера повязку.
16. Аппарат может вводиться свободно с помощью шприца через инфузионный порт после снятия колпачка порта.
17. Катетер инфузионного порта должен оставаться закрытым, когда он не используется.
18. Регулярно осматривайте место прокола вены на наличие катетера, либо реакции и проверяйте все соединения.

На трубку катетера нанесены рентгеноконтрастные порошки в следующем количестве: для размера 14G - 4 порошка, 16G - 4 порошка, 17G - 4 порошка, 18G - 4 порошка, 20G - 4 порошка, 22G - 3 порошка, 24G - 4 порошка, 26G - 4 порошка.

Назначение: Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaydon предназначены для введения в венозные сосуды концентрированных растворов для введения (т.е. периферическое введение), с целью осуществления многократного доступа к сосудам, с целью осуществления многократного доступа к периферическим жилам (внутривенная инфузия), в (или из) растворов, эликсиров, витаминных, некоторых видов анестетиков, и также для переливания крови и/или ее компонентов, в (или из) периферическую систему пациента. Чаше всего используются с инфузионными устройствами.

Область применения: – анестезиология и реаниматология, хирургия, травматология, ожоговая, дерматология, акушерство-гинекология, педиатрия, онкология, гематология, трансплантология.

Показания к применению:

- Необходимость внутривенного введения препаратов длительного курса.
- Необходимость поддержания или коррекции артериального давления, не способных принимать необходимое количество жидкости перорально или другим способом периферического введения.
- Проверка переносимости и/или коррекции артериального давления при переливании крови и ее компонентов.
- Необходимость переливания крови и ее компонентов.
- Необходимость частого введения в вену лекарственных препаратов или растворов.
- Поддержка питания и/или коррекции артериального давления при переливании крови и ее компонентов.
- Осуществление и поддержание венозного доступа в экстренных ситуациях.
- Наряду с хирургическим вмешательством.

Противопоказания:

- Выявление лекарственных средств, имеющих выраженные раздражающие действие (внутривенно, растворы с высокой осмоляльностью).
- Выявление сильных венозных заболеваний.
- Преливание больших объемов крови и ее компонентов.
- Нарушение целостности тканей к любому из используемых материалов.
- Флебит: воспалительный процесс в венозной стенке.
- Инфильтрация: попадание инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающим свойством, в окружающие вены тканей.
- Экстравазация: попадание препаратов, обладающих раздражающим свойством, в окружающие вены тканей.



Инструкция по применению



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 16G (1,7x45мм)

LOT : 2209006



: 09/2022



: 08/2027

Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G16

16 G

Скорость

потока : 200 мл/мин

Ø : 1.7 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,

Industrial Area, Charganwa Road,

Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



XXXXXXXXXX



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,

Industrial Area,

Chargawan Road , Jabalpur,

482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15,

+7 812 325 30 65




STERILE EO

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 17G (1,5х45мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

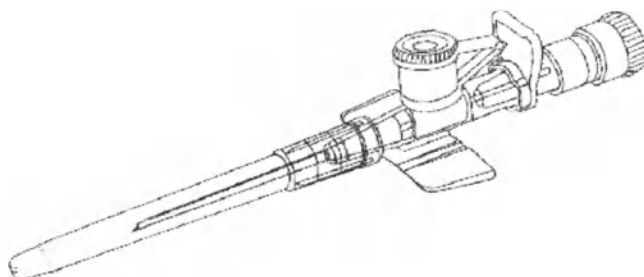

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviion безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42°C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP

Инструкция по применению



Назначение:

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zavillon предназначены для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), с целью осуществления многократного доступа к сосудистой системе (до 48-х часов) для введения (или выведения) раздражающих жидкостей (лекарственных средств/медицинских растворов, электролитов, витаминов, некоторых видов анестетиков, а также для переливания крови и/или её компонентов), в (или из) периферическую сосудистую систему пациента. Чаще всего используются с инфузионными устройствами.

Область применения – анестезиология и реаниматология.

Условия применения – отделения лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Потенциальный потребитель – медицинский работник с достаточной квалификацией для выполнения катетеризации сосудов.

Показания к применению:

- Необходимость внутривенного введения препаратов длительными курсами;
- Необходимость поддержки или коррекции водного баланса в случаях, когда пациент не в состоянии принимать жидкость пероральным путем;
- Необходимость переливания крови и ее компонентов;
- Необходимость частого введения в вену лекарственных препаратов и/или растворов;
- Поддержка гидратации и/или коррекция дегидратации у пациентов, не способных принимать необходимое количество жидкости перорально или другими способами парентерального введения;
- Проведение парентерального питания;
- Обеспечение и поддержание венозного доступа в экстренных ситуациях;
- Наркоз при хирургическом вмешательстве.

Противопоказания:

- Введение лекарственных средств, имеющих выраженное раздражающее действие (например, растворы с высокой осмолярностью);
- Введение сильновяжущих жидкостей;
- Переливание больших объемов крови и ее компонентов;
- Гиперчувствительность пациента к любому из используемых материалов.

Возможные побочные действия:

- Флебит: развитие воспалительного процесса в венозной стенке;
- Инфильтрация: попадание инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающими свойствами, в окружающие вену ткани;
- Экстравазация: попадание препаратов, обладающих

раздражающим свойством в окружающие вену ткани;

Инфицирование: воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровяные потоки патогенных микроорганизмов;

Гематома: кровоизлияние под кожу;

Тромбоз: образование тромба в вене;

Тромбофлебит: воспаление стенок вены с образованием тромба в ее просвете.

Порядок применения:

1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Запрещается использовать катетер в поврежденной индивидуальной упаковке.
2. Проверить срок годности. Срок годности указывается на индивидуальной упаковке.
3. Подобрать подходящий размер катетера.
4. Осторожно выбрать и продезинфицировать место для венопункции.
5. Наложить жгут.
6. Извлечь катетер из упаковки.
7. Снять защитный колпачок и взять катетер за инъекционный порт или выступы на корпусе и пальцевой упор срезом иглы вверх.
8. Ввести катетер в вену под малым углом и проверить наличие крови в камере обратного тока крови, чтобы удостовериться в попадании в вену.
9. Продвинуть катетер в вену и одновременно аккуратно извлечь иглу быстрым непрерывным движением параллельно поверхности кожи. Избегать вращения иглы при ее удалении.
10. Избегайте потери крови, нажимая пальцем на вену или выше кончика катетера.
11. Не пытайтесь повторно ввести частично или полностью извлеченную иглу.
12. Выбросить иглу в предназначенный для этого контейнер для отходов.
13. После удаления иглы подсоединить инфузионную систему или установить зажим Леруэ-Лок.
14. Приклеить крылышки катетера к коже пациента.
15. Наложить на место пункции стерильную повязку.
16. Препарат может вводиться медленно с помощью шприца через инъекционный порт после снятия колпачка порта.
17. Колпачок инъекционного порта должен оставаться закрытым, когда он не используется.
18. Регулярно осматривайте место прокола вены на наличие каких-либо реакций и проверяйте все соединения.

На трубку каждого катетера нанесены рентгеноконтрастные полосы в следующем количестве: для размера 14G - 4 полосы, 16G - 4 полосы, 17G - 4 полосы, 18G - 4 полосы, 20G - 4 полосы, 22G - 3 полосы, 24G - 4 полосы, 26G - 4 полосы.

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 17G (1,5x45мм)

LOT : 2209007
: 09/2022
: 08/2027
Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G17

17 G

Скорость

потока : 125 мл/мин

Ø : 1.5 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,
Industrial Area, Charganwa Road,
Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,
Industrial Area,
Chargawan Road , Jabalpur,
482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15,
+7 812 325 30 65




STERILE EO

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 18G (1,3х45мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

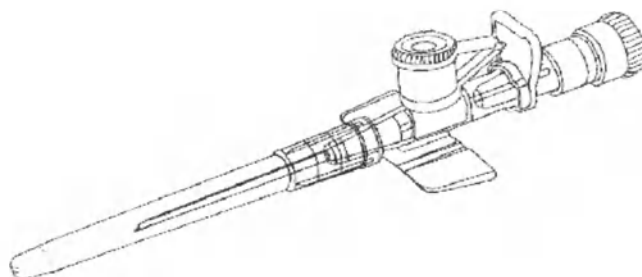

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP

Инструкция по применению



Назначение:

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon предназначены для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), с целью осуществления многократного доступа к сосудистой системе (до 48-х часов) для введения (или вывода) раздражающих жидкостей (лекарственных средств/медицинских растворов, электролитов, витаминов, некоторых видов анестетиков, а также для переливания крови и/или ее компонентов), в (или из) периферическую сосудистую систему пациента. Чаще всего используются с инфузионными устройствами.

Область применения – анестезиология и реаниматология.

Условия применения – отделения лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Потенциальный потребитель – медицинский работник с достаточной квалификацией для выполнения катетеризации сосудов.

Показания к применению:

- Необходимость внутривенного введения препаратов длительными курсами;
- Необходимость поддержки или коррекции водного баланса в случаях, когда пациент не в состоянии принимать жидкость пероральным путем;
- Необходимость переливания крови и ее компонентов;
- Необходимость частого введения в вену лекарственных препаратов и/или растворов;
- Поддержка гидратации и/или коррекция дегидратации у пациентов, не способных принимать необходимое количество жидкости перорально или другими способами парентерального введения;
- Проведение парентерального питания;
- Обеспечение и поддержание венозного доступа в экстренных ситуациях;
- Наркоз при хирургическом вмешательстве.

Противопоказания:

- Введение лекарственных средств, имеющих выраженное раздражающее действие (например, растворы с высокой осмолярностью);
- Введение сильновяжущих жидкостей;
- Переливание больших объемов крови и ее компонентов;
- Гиперчувствительность пациента к любому из используемых материалов.

Возможные побочные действия:

- Флебит: развитие воспалительного процесса в венозной стенке;
- Инфильтрация: попадание инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающими свойствами, в окружающие вену ткани;
- Экстравазация: попадание препаратов, обладающих

раздражающим свойством в окружающие вену ткани;

Инфицирование: воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровоток патогенных микроорганизмов;

Гематома: кровоизлияние под кожу;

Тромбоз: образование тромба в вене;

Тромбофлебит: воспаление стенок вены с образованием тромба в ее просвете.

Порядок применения:

1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Запрещается использовать катетер в поврежденной индивидуальной упаковке.
2. Проверить срок годности. Срок годности указывается на индивидуальной упаковке.
3. Подобрать подходящий размер катетера.
4. Осторожно выбрать и продезинфицировать место для венопункции.
5. Наложить жгут.
6. Извлечь катетер из упаковки.
7. Снять защитный колпачок и взять катетер за инъекционный порт или выступы на корпусе и пальцевой упор срезом иглы вверх.
8. Ввести катетер в вену под малым углом и проверить наличие крови в камере обратного тока крови, чтобы удостовериться в попадании в вену.
9. Продвинуть катетер в вену и одновременно аккуратно извлечь иглу быстрым непрерывным движением параллельно поверхности кожи. Избегать вращения иглы при ее удалении.
10. Избегайте потери крови, нажимая пальцем на вену или выше кончика катетера.
11. Не пытайтесь повторно ввести частично или полностью извлеченную иглу.
12. Выбросить иглу в предназначенный для этого контейнер для отходов.
13. После удаления иглы подключать инфузионную систему или установить зажимку лuer-лок.
14. Приклеить крыльшом катетера к коже пациента.
15. Наложить на место пункции стерильную повязку.
16. Препарат может вводиться дробно с помощью шприца через инъекционный порт после снятия колпачка порта.
17. Колпачок инъекционного порта должен оставаться закрытым, когда он не используется.
18. Регулярно осматривайте место прокола вены на наличие каких-либо реакций и проверяйте все соединения.

На трубку каждого катетера нанесены рентгеноконтрастные полосы в следующем количестве: для размера 14G - 4 полосы, 16G - 4 полосы, 17G - 4 полосы, 18G - 4 полосы, 20G - 4 полосы, 22G - 3 полосы, 24G - 4 полосы, 26G - 4 полосы.

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 18G (1,3x45мм)

LOT : 2209008

: 09/2022

: 08/2027

Количество : 100 ШТУК

REF ZF01G18

18 G

Скорость

потока : 90 мл/мин

Ø : 1.3 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,

Industrial Area, Charganwa Road,

Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,

Industrial Area,

Chargawan Road , Jabalpur,

482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15,


+7 812 325 30 65



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 20G (1,1х32мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

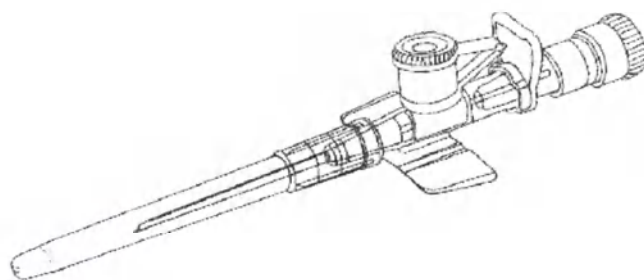

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP

Стерильно, Априорно, Нейтрально

на 100% каждого из этих пяти контрольных
насосов в среднем коэффициент: 1,40 - 4 насоса,
1,60 - 4 насоса, 1,70 - 4 насоса, 1,80 - 4 насоса, 2,00 - 4 насоса,
2,20 - 3 насоса, 2,40 - 4 насоса, 2,60 - 4 насоса.

1. Проверить целостность интимирующей утяжки. Запрещается использовать катетер в поврежденной интимирующей утяжке.
2. Проверить срок годности. Срок годности утяжки составляет интимирующей утяжке.
3. Подобрать подходящий размер катетра.
4. Осторожно выбрать и прозондировать место для вскинутия.
5. Наклонить голову.
6. Наложить катетер на утяжку.
7. Снять защитный колпачок и ввести катетер за интимирующую порт или вывести на корпус и пальцевой упор сжать катетер.
8. Ввести катетер в вену под малым углом и провернуть на 180° в направлении обратного тока крови, чтобы устроиться в поперечнике катетра в вену и одновременно аккуратно изогнуть катетер в одну сторону.
9. Продвинуть катетер в вену и одновременно аккуратно изогнуть катетер в одну сторону.
10. Проверить потерю крови. Введенная игла при ее удалении повреждает кожную мембрану. Иглы при удалении иглы при удалении иглы.
11. Не пытаться повторно ввести иглу полностью.
12. Выбросить иглу в предназначенный для этого контейнер для отходов.
13. После удаления иглы подключить инфузионную систему или установить катетер для инфузии.
14. Проверить, насколько катетер в месте интимирующей иглы.
15. Наклонить на место интимирующей иглы.
16. Препарат может вводиться повторно с помощью иглы через интимирующую порт после снятия катетера.
17. Катетер интимирующей иглы должен оставаться закрытым, когда он не используется.
18. Регулярно осматривать место прокола вены на наличие кровотечения и проверять все соединения.

Категория инфузионная для периферических сосудов Zависит от периферических сосудов для введения в кровяное русло конечностей, доступные для кровяного введения (т.е. периферические сосуды), с целью осуществления многократного доступа к сосудистой системе (4-8 часов) для введения (или выведения) препаратов, экстрактов жидкостей (экстрактивных средств/медицинских препаратов, вытяжков, растворов, эмульсий, инфузий), в (или из) инфузионной системы (или инфузионной системы) для введения инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающими свойствами, в организм вены, ткани, экстракты, конечные препараты, обладающие свойствами.



Иностранцы по применению



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 20G (1,1x32мм)

LOT : 2209009
: 09/2022
: 08/2027
Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G20

20 G

Скорость
потока : 55 мл/мин
Ø : 1.1 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290
Производитель :
ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR
Plot No. 32, Umariya Dungariya,
Industrial Area, Charganwa Road,
Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :
ZAVI MEDICARE LLP,
Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,
Industrial Area,
Chargawan Road , Jabalpur,
482003, Madhya Pradesh, India


Уполномоченный представитель:
ООО «АКОНИТ»,
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15,
+7 812 325 30 65



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 22G (0,9х25мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

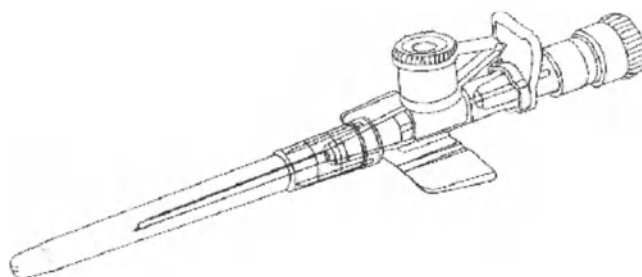

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviflon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 22G (0,9x25мм)

LOT : 2209010

: 09/2022

: 08/2027

Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G22

22 G

Скорость

потока : 36 мл/мин

Ø : 0.9 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,

Industrial Area, Charganwa Road,

Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,

Industrial Area,

Chargawan Road , Jabalpur,

482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15,

+7 812 325 30 65




STERILE EO

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 24G (0,7x19мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

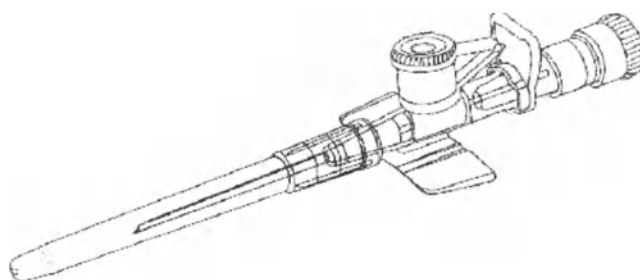

100 штук

**Условия эксплуатации:**

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviion безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP



Инструкция по применению

Konzepte und Modelle zur Verbesserung des Zivildienstes

- **разрабатываемый стандарт** в окружающем нас мире;
- **информирование**: воспитательный процесс, развивающийся в результате познания в конкретизированных микропроективах;
- **государство**: предоставление под юрисдикцией;
- **проектирование**: образовательная среда;
- **проектирование**: воспитательная среда с образовательными проектами.

Парадокс проектирования:

1. Проектирование деятельности (включая учебный процесс) предполагает использование методов проектирования, которые являются частью проектирования.

Успешное решение – от участия родителей, учителей, специалистов образовательных учреждений.

2. Проверить срок годности. Срок годности указывается на индивидуальной упаковке.
3. Проверить целостность упаковки.
4. Определить вид грибов и правильно определить место для их выращивания.

Необходимость внедрения принципиально новых технологий и процессов

6. Извлечь катетер из улитки.
7. Снять шпательный скребок и вставить катетер за шпательный скребок или вставить на корпус и пилочкой укоротить среднюю часть катетера.
8. Вставить катетер в рот под углом 45° и протолкнуть пилочкой в носовую полость, обработав тогда носовую щель указательным в

Необходимость предотвращения кризиса и ее последствия:

9. Проводить катетер в вену и одновременно асепрично ввести в катетер в камере обратного тока крови, чтобы доставлять в кровь плазму и растворенные в ней вещества.

10-14 октября по поручению Правительства Республики Беларусь в составе делегации в составе:

Обеспечение и поддержание постоянного доступа в систему сигнализации;

Happy & Healthy Women's Health Care

13. Провести установку и/или подключение инфрависочного спектру (или установившего) спектру дур-дур.
14. Провести установку и/или подключение инфрависочного спектру (или установившего) спектру дур-дур.
15. Провести установку и/или подключение инфрависочного спектру (или установившего) спектру дур-дур.
16. Провести установку и/или подключение инфрависочного спектру (или установившего) спектру дур-дур.

Преступление ботыших «бл-м» в крови и се. бл-м. Контент:

17 Косилков не исключают торты, дающие ощущение сытости, но не являются таковыми.

Фабрикт. рамитне мислвствено протиско в кочинал
стенке.

На тубусы издалека катятся наиссеи. Рентгеном растительных тканей выясняют количество: для янтаря 1,40 - 4 изотопов, 16,0 - 4 изотопы, 17,0 - 4 изотопы, 18,0 - 4 изотопы, 20,0 - 4 изотопы, 22,0 - 3 изотопы, 24,0 - 4 изотопы, 26,0 - 4 изотопы.

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 24G (0,7x19мм)

LOT : 2209011

: 09/2022

: 08/2027

Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G24

24 G

Скорость

потока : 18 мл/мин

Ø : 0.7 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,

Industrial Area, Charganwa Road,

Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



XXXXXXXXXX



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,

Industrial Area,

Chargawan Road , Jabalpur,

482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15,

+7 812 325 30 65




STERILE EO

Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon, размером: 26G (0,6x19мм):



Катетер инфузионный для периферических сосудов Zaviflon

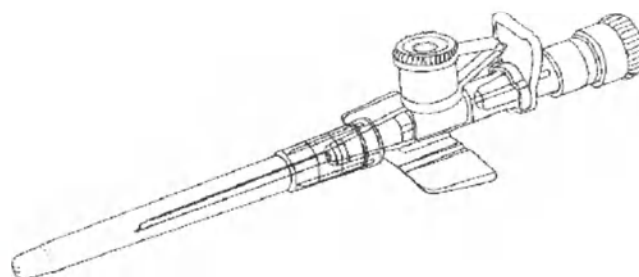

100 штук



Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: от 10% до 85%.

Катетеры инфузионные для периферических сосудов Zaviilon безопасны и исправны в условиях эксплуатации в теле человека при номинальных температурах от +32 °C до +42 °C.

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96%.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

14G	16G	17G	18G	20G	22G	24G	26G

ZAVI MEDICARE LLP



Инструкция по применению

Назначение:

Катетры инфузионные для периферических сосудов Zaviib® предназначены для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), с целью осуществления многократного доступа к сосудистой системе (до 48-х часов) для введения (или выведения) раздражающих жидкостей (лекарственных средств/медицинских растворов, электролитов, витаминов, настоек, инфузий анестетиков, а также для переливания крови и/или ее компонентов), в (или из) периферическую сосудистую систему пациента. Чаше всего используются с инфузионными устройствами.

Условия применения – отделение лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Потенциальный потребитель – медицинский работник с достаточной подготовкой для выполнения катетризации сосудов.

Показания к применению:

Необходимость внутривенного введения препаратов длительными курсами.

Необходимость поддержки или коррекции водного баланса в случаях, когда пациент не в состоянии принимать жидкость пероральным путем.

Необходимость переливания крови и ее компонентов.

Необходимость частого введения в вену лекарственных препаратов и/или растворов.

Поддержка гидратации и/или коррекции объема дефицита у пациентов, не способных принимать необходимое количество жидкости перорально или другим способом парентерального введения.

Проведение парентерального питания;

Обеспечение и поддержание венозного доступа в экстренных случаях.

Наркоз при хирургическом вмешательстве.

Противопоказания:

Введение лекарственных средств, имеющих выраженное раздражающее действие (например, растворы с высокой осмолярностью);

Введение сильноосмотических жидкостей;

Переливание больших объемов крови и ее компонентов;

Гиперчувствительность пациента к любому из компонентов материала.

Важные побочные действия:

Флебит, развитие воспалительного процесса в венозной стенке;

Инфильтраты: попадание инфузионных растворов или лекарственных препаратов, не обладающих раздражающими свойствами, в окружающие вену ткани;

Экстремация: попадание препаратов, обладающих

раздражающим свойством в окружающие вену ткани;

Инфицирование: воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровяной поток патогенных микроорганизмов;

Гематома: кровоизлияние под кожу;

Тромбоз: образование тромба в вене;

Тромбофлебит: воспаление стенок вены с образованием тромба в ее просвете.

Порядок применения:

1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Запрещается использовать катетер в поврежденной индивидуальной упаковке.

2. Проверить срок годности. Срок годности указывается на индивидуальной упаковке.

3. Подобрать подходящий размер катетера.

4. Осторожно выбрать и простерилизовать место для вентуляции.

5. Наложить жгут.

6. Наложить катетер из упаковки.

7. Снять защитный колпачок и катетр за инъекционный порт или вставить на корпус и палочкой упор средним пальцем вверх.

8. Ввести катетер в вену под малым углом и проверить наличие крови в камере обратного тока крови, чтобы удостовериться в попадании в вену.

9. Подвинуть катетер в вену и одновременно аккуратно нажимать на быстрый непрямой движением полностью поверхности кожи. Избегать введения иглы при ее удалении.

10. Избегать потерь крови, нажимая пальцем на вену или выше корпуса катетера.

11. Не пытайтесь повторно ввести частично или полностью ивованную иглу.

12. Выбросить иглу в предназначенный для этого контейнер для отходов.

13. После удаления иглы подложить инфузионную систему или установить запястью лугу-лок.

14. Присоединить крылатки катетера к коже пациента.

15. Наложить на место пункции стерильную повязку.

16. Пациент может вводиться дробно с помощью шприца через инъекционный порт после снятия колпачка порта.

17. Капелька инъекционного порта должна оставаться закрытой, когда он не используется.

18. Регулярно осматривайте место прокола вены на наличие каких-либо реакций и проверяйте все соединения.

На трубку каждого катетера нанесены рентгеноконтрастные метки в следующем количестве: для размера 14G - 4 поперечных, 16G - 4 поперечных, 17G - 4 поперечных, 18G - 4 поперечных, 20G - 4 поперечных, 22G - 3 поперечных, 24G - 4 поперечных, 26G - 4 поперечных.

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично



ZAVIFLON

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon, размером: 26G (0,6x19мм)

LOT : 2209012

: 09/2022

: 08/2027

Количество: 100 ШТУК

REF ZF01G26

26 G

Скорость

потока : 13 мл/мин

Ø : 0.6 mm

STERILE EO

M.L. MFG/MD/2022/000290

Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP, JABALPUR

Plot No. 32, Umariya Dungariya,
Industrial Area, Charganwa Road,
Jabalpur, 482003, Madhya Pradesh, INDIA



Производитель :

ZAVI MEDICARE LLP,

Plot No. 32 , Umariya Dangariya ,
Industrial Area,
Chargawan Road , Jabalpur,
482003, Madhya Pradesh, India

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»,

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10
тел. +7 812 244 76 15,
+7 812 325 30 65



STERILE EO



ZAVI MEDICARE LLP

Катетер инфузионный для периферических
сосудов Zaviflon



Количество: 1000 штук



- ZAVI MEDICARE LLP

Plot No. 32, Umariya Dungariya, Industrial Area,
Charganwa Road, Jabalpur, 482003,
Madhya Pradesh, INDIA

Уполномоченный представитель:

ООО «АКОНИТ»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Емельянова, дом 10

тел. +7 812 244 76 15, +7 812 325 30 65

ПУ № XXXX/XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ



ZAVI MEDICARE LLP

Условия хранения:

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5°C до +35°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.



STERILE EO

Количество: 1000 штук

Условия транспортировки:

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

- Температура: от -50°C до +50°C;
- Относительная влажность воздуха: до 96 %.

Групповая упаковка (внешний вид коробки)



Транспортная упаковка (внешний вид коробки):



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 53 лист(-а,-ов)

Управляющий ООО «АКОНИТ»

Ботвиник П.В.

