

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

«09» февраля 2024 г.

Этикетка

на медицинское изделие

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РИФЛЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ

ЖКРС

по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022

СМАН.123.000.000.000 ЭТ

2024

Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС

по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,

НЕСТЕРИЛЬНО

ПУ № РЗН 2022/18768 от 13 января 2023 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: при температуре воздуха от минус 45°C до 40°C и относительной влажности до 100 % при 25 °C.

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ: Неиспользованные жгуты непригодные к использованию по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные жгуты, непригодные к дальнейшей эксплуатации, утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



ООО «Спецмедтехника», Россия.

Юр.адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, пом. 25Н, тел. +7 (812)

329-54-80. info@spmt.ru

Партия: _____

Дата изготовления: _____

Годен до: _____



ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РИФЛЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ

по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,

варианты исполнения:

- «Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 105 см»;
- «Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 105 см»;
- «Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 145 см»;
- «Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 145 см»

Назначение

для наложения на конечность пациента (руку или ногу) и затягивания вручную для снижения циркуляции крови и временной остановки артериального или венозного кровотечения для предотвращения кровопотери при оказании скорой и первой помощи.

Принцип действия жгута заключается в пережатии определенного участка тела человека для остановки кровотока с фиксацией жгута. Временная остановка артериального или венозного кровотечения достигается за счет надежной фиксации жгута на участках тела. Допускается наложение жгута на голую кожу – за счет рифленой поверхности жгут не повреждает подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы.

Показания к применению необходимость временной остановки артериального или венозного кровотечения на участках тела для предотвращения кровопотери при оказании скорой и первой помощи.

Противопоказания к применению

- индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.
- открытая травма или перелом конечности в области наложения жгута (жгут может вызвать еще большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- гнойный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (жгут может выдавить гной в лимфо- и кровоток и вызвать генерализацию инфекции);
- выраженный атеросклероз. Следует учитывать, что твердые стенки сосудов, артерий плохо сдавливаются, что ведет к переполнению вен и при наличии в них тромбов - к тромбозам.

Побочные явления

Неправильное использование жгута может привести к следующим осложнениям:

- 1) Чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности.
- 2) Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения.
- 3) Продолжительное сдавливание конечности жгутом (более 1 часа в летнее время или 30 минут в зимнее время) может привести к омертвлению конечности.
- 4) Наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.
- 5) Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы изготовления жгута.

Общие рекомендации по применению

Запрещено использование изделий для отработки (тренировки) навыков наложения жгута

Жгут необходимо накладывать выше места кровотечения для оттока венозной крови.

В случае неправильного или слабого наложения жгута, кровотечение продолжается, а кожные покровы приобретают цианотичную (синюшную) окраску.

Слишком тугое наложение жгута может привести к повреждению нервных стволов, сдавливанию мышц и сосудов, результатом подобных патологий является паралич конечностей.

Допускается наложение жгута на голую кожу – за счет рифленой поверхности жгут не повреждает подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы.

После наложения жгута необходимо поместить записку под жгут с указанием времени фиксации жгута. В случае невозможности оставить записку данную информацию рекомендуется указывать на свободном участке кожи.

Время нахождения жгута на конечности должно составлять не более 1 часа (ишемия от 2 до 3 часов приводит к поражениям периферических нервов; нахождение жгута более 6 часов приводит к необратимым поражениям мышечной ткани и частым ампутациям).

В зимнее время года при низкой температуре окружающей среды рекомендованное время нахождения жгута на конечности не более 30 минут.

После эвакуации раненого в относительно безопасную зону рекомендуется провести замену жгута на давящую повязку.

Критерии правильного применения жгута

- Остановка кровотечения.
- Бледная окраска кожных покровов.
- Отсутствие пульса на периферии травмированной конечности.

ВНИМАНИЕ!!! При получении изделия рекомендуется произвести подгонку изделия путем расположения фиксирующей пряжки (при наличии) с любой стороны от края ленты жгута на расстоянии одного оборота ленты вокруг бедра.

Порядок применения

Кровотечение при ранении верхних конечностей	
Придать/занять пострадавшему удобное положение и приподнять конечность	
Жгут необходимо разместить на верхней трети плеча	
ВЗАИМОПОМОЩЬ	
Вариант 1	Вариант 2
Взять жгут двумя руками в средней части изделия	Взять жгут двумя руками, разделив изделие на два неравных участка. По одну руку должен остаться наименьший свободный край ≈ 10 см
Растянуть жгут	
Расположить жгут на передней/задней области плеча	
Совершить полный тугой оборот конечности, соединив оставшиеся части изделия анахлест	Совершить полный тугой оборот конечности так, чтобы короткий конец жгута оказался прижат к телу пострадавшего длинным концом жгута
В зависимости от объема мышечной массы совершить необходимое количество оборотов (туров) с более слабым натяжением, каждый последующий тур должен заходить на предыдущий	
Закрепить концы жгута специальным фиксатором (при наличии) или двойным узлом	
Оценить правильность наложения жгута	
В завершении манипуляции обязательно вложить записку о времени фиксации жгута или отметить время на свободном участке кожи	
САМОПОМОЩЬ	
Зафиксировать конец жгута между зубов таким образом, чтобы остался свободный край в несколько сантиметров	
Максимально сократить расстояние между травмированной конечностью и головой	
Здоровой рукой растянуть жгут и произвести первый полный тугой оборот	
Выполнить необходимое количество оборотов в зависимости от объема мышечной массы	
Закрепить концы жгута специальным фиксатором (при наличии) или двойным узлом	
Оценить правильность наложения жгута	
В завершении манипуляции обязательно вложить записку о времени фиксации жгута или отметить время на свободном участке кожи	
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя накладывать жгут в нижней трети плеча, так как возникает вероятность повреждения лучевого нерва, а также недопустимо накладывать жгут ниже места кровотечения.	
Кровотечение при ранении нижних конечностей	
Придать/занять пострадавшему удобное положение и приподнять конечность	
Разместить жгут на средней трети бедра	
ВЗАИМОПОМОЩЬ/САМОПОМОЩЬ	
Вариант 1	Вариант 2
Взять жгут двумя руками в средней части изделия	Взять жгут двумя руками, разделив изделие на два неравных участка. По одну руку должен остаться наименьший свободный край ≈ 10 см
Растянуть жгут	
Расположить жгут на передней/задней области бедра	
Совершить полный тугой оборот конечности, соединив оставшиеся части изделия анахлест	Совершить полный тугой оборот конечности так, чтобы короткий конец жгута оказался прижат к телу пострадавшего длинным концом жгута
В зависимости от объема мышечной массы совершить необходимое количество оборотов (туров) с более слабым натяжением, каждый последующий тур должен заходить на предыдущий	
Закрепить концы жгута специальным фиксатором (при наличии) или двойным узлом	
Оценить правильность наложения жгута	
В завершении манипуляции обязательно вложить записку о времени фиксации жгута или отметить время на свободном участке кожи	
ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендуется накладывать жгут на нижней трети бедра, так как для верификации артерии необходимо значительное сдавливание тканей, а также недопустимо накладывать жгут ниже места кровотечения.	
Кровотечение при ранении сонной артерии	
Придать пострадавшему удобное положение	
К месту кровотечения приложить валик (можно использовать бинт)	
Согнуть противоположную ранению руку пострадавшего в локте и приложить предплечьем к голове для предохранения неповрежденной артерии	
Один конец жгута приложить к валику, расположенному на области ранения, оставив свободный край в несколько сантиметров	
Совершить полный тугой оборот конечности так, чтобы короткий конец жгута оказался прижат к телу пострадавшего длинным концом жгута	
Закрепить концы жгута специальным фиксатором (при наличии) или двойным узлом	
Оценить правильность наложения жгута	
В завершении манипуляции обязательно вложить записку о времени фиксации жгута или отметить время на свободном участке кожи	
ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендуется проводить фиксацию жгута на месте ранения.	

Срок годности (службы) жгута - 5 лет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

1. Гарантийный срок хранения жгутов - 5 лет с даты изготовления.

2. Гарантийный срок эксплуатации жгутов - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Прекращение гарантий предприятия-изготовителя наступает по истечении любого из указанных в п.1, 2 гарантийных обязательств.

Прошито и пронумеровано

3 (три) листов

Директор
ООО «Спецмедтехника»

А.В. Миляев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спейсмедтехника»



А.В. Миляев

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

общего вида медицинского изделия

**Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС
по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022**

Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ
21.20.24-123-58379990-2022,
ИСПОЛНЕНИЕ
ПУ № РЭИ 2022/18768 от 13 января 2023 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: при температуре воздуха от минус 50°C до 50°C и относительной влажности до 80 %.

ХРАНЕНИЕ: хранить на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50°C, при относительной влажности от 40 до 98%.

УТИЛИЗАЦИЯ: неиспользованные жгуты непригодные к использованию по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные жгуты, непригодные к дальнейшей эксплуатации, утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



ООО «Спелмелтехника», Россия.
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунина, д. 20,
лит. А, пом. 25Н, тел. +7 (812) 329-54-80. info@spmi.ru

Партия: 014-23
Дата изготовления: 09.2023
Годен до: 09.2028



ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РИФЛЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ
по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,
варианта исполнения:
«Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС
по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 145 см»

Назначение

для наложения на конечность пациента (руку или ногу) и затягивания вручную для снижения циркуляции крови и временной остановки артериального или венозного кровотечения для предотвращения кровопотери при оказании скорой и первой помощи.

Принцип действия жгута заключается в пережатии определенного участка тела человека для остановки кровотечения с фиксацией жгута. Временная остановка артериального или венозного кровотечения достигается за счет надежной фиксации жгута на участках тела. Допускается наложение жгута на голую кожу – за счет рифленой поверхности жгут не повреждает подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы.

Показания к применению необходимость временной остановки артериального или венозного кровотечения на участках тела для предотвращения кровопотери при оказании скорой и первой помощи.

Противопоказания к применению

- индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия;
- открытая травма или перелом конечности в области наложения жгута (жгут может вызвать еще большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- гнойный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (жгут может выдвинуть гной в лимфо- и кровоток и вызвать генерализацию инфекции);
- выраженный атеросклероз. Следует учитывать, что твердые стенки сосудов, артерий легко сдавливаются, что ведет к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбоэмболии.

Побочные явления

Неправильное использование жгута может привести к следующим осложнениям:

- 1) Чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности.
- 2) Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения.
- 3) Продолжительное сдавливание конечности жгутом (более 1 часа в летнее время или 30 минут в зимнее время) может привести к омертвлению конечности.
- 4) Наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.
- 5) Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы изготовления жгута.

Общие рекомендации по применению

Изделие, используемое для оттока конечностей кровя, может быть использовано по назначению.

Жгут необходимо накладывать выше места кровотечения для оттока конечностей кровя.

В случае незначительного или слабого кровотечения жгута, кровотечение прекращается, а

низкие порывы придают конечности (синюшную) окраску.

Наложение жгута может привести к повреждению нервных стволов,

возможны побочные патологии является причиной

ФОТО 1 Общий вид медицинского изделия, потребительская упаковка, маркировка.

Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, варианты исполнения:

«Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 105 см»

«Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 145 см»

(на примере варианта исполнения: «Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 145 см»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: при температуре воздуха от минус 50°С до 50°С и относительной влажности до 80 %.

ХРАНЕНИЕ: хранится на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50°С, при относительной влажности от 40 до 95%.

УПАКОВКА: Пенополикарбонатные плиты перевозятся и используются без ограничения срока хранения упакованные как отцом класса А в соответствии с СпбНПД 2.1.3684.21. Ископользованные плиты, использованные с длительной эксплуатацией, утилизируются как отцом класса Б в соответствии с СпбНПД 2.1.3684.21.

Партия: 008-23
Дата исполнения: 09.2021
Срок: 09.2028

[illegible]

Противопоказания к применению: с осторожностью следует применять у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями печени и почек, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями крови, с заболеваниями нервной системы, с заболеваниями органов дыхания, с заболеваниями органов зрения, с заболеваниями органов слуха, с заболеваниями органов вкуса, с заболеваниями органов обоняния, с заболеваниями органов осязания, с заболеваниями органов движения, с заболеваниями органов дыхания, с заболеваниями органов зрения, с заболеваниями органов слуха, с заболеваниями органов вкуса, с заболеваниями органов обоняния, с заболеваниями органов осязания, с заболеваниями органов движения.

1) Чрезвычайное затопление южной оконечности Евразийского материка, вызванное сдвигами тектонических плит, вызвало образование океана, моря, озера и стало причиной парникового эффекта.

- 2) Слабо развитый мозг не оставляет отрицательных критических и субъективных оценок для внешнего мира и развития личности;
- 3) Предназначение и сложение личности мутит (более 1 часа в летнее время или 36 минут в зимнее время) может привести к ослеплению личности;
- 4) Нормальное зрение на среднюю часть глаза может привести к травмированию лучевого нерва;
- 5) Всплески недолгие, длительные ощущения на материалы животного зрительного

Итак, если вы планируете использовать для отработки (тренировки) навыки нахождении пути — не может быть использовано по назначению.

Жгут необходимо накладывать выше места кровотечения для оттока артериальной крови. В случае неглубокого или слабого кровотечения жгут, артериальным пережимателем, 4 концы которого прибинтовывают к конечности (конвертеру) обкрутку. С помощью тупого напальчика жгут можно провести к травмированному перелому участку, сдавившему конечность, и шариком, регулирующим подвижность конечности, сделать шариком конечности.

Допускается использование юзта на твёрдую кожу — за счёт рефлексной иннервации юзта не поддерживает повышенное давление воздуха, сосиски и твёрдые.

После окончания юзта необходимо немедленно засыпать лад юзта с увеличением времени фиксации юзта. В случае необходимости оставить ладку ладку инфракрасно-различительная табличка на свободном участке кожи.

Допускается использование юзта на твёрдую кожу — за счёт рефлексной иннервации юзта не поддерживает повышенное давление воздуха, сосиски и твёрдые.

Среднее количество жуков на единицу площади давало соотношение: не более 1 жук (личинка) на 20 см² и менее; личинки в паразитирующих шерофитических явках; среднее число жуков более 10 тысяч жуков на 1 квадратный метр; среднее количество личинок жуков в явках (взрослых жуков). В период сбора жуков при низкой температуре окружающей среды рекомендуется использовать жаростойкие жуки на единицу площади не более 30 минут.

Легко поддаются ремонту и относительно бесшумную работу рекомендуются проводить
мелкие работы на давящую поверхность
Применяя различные приспособления могут
• Служат для прокатки

А. И. Мещеряков, доктор физико-математических наук, профессор

Одговорно дулаг на професионалном нивоу

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА"

ны расстояния фиксировались (при наличии) с любой стороны от края и несут на расстоянии одного оборота нити вокруг себя.

(на примере варианта исполнения: «Жгут кровоостанавливающий рифленный силиконовый ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022, длина 105 см»)

Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКУ
по ТУ 21.20.24-123-5837990-2022,
НЕСТЕРИЛЬНО
РУ № РЗН 2022/18768 от 13 января 2023 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: при температуре воздуха от минус 50°C до 75°C в относительной влажности до 80 %.

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50°C, при относительной влажности от 40 до 98%.

УТИЛИЗАЦИЯ: Неиспользованные жгуты непригодные к использованию по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные жгуты, непригодные к дальнейшей эксплуатации, утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



ООО «Спецмелтехника», Россия.
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20,
лит. А, пом. 25Н, тел. +7 (812) 329-54-80. info@zpm.ru

Партия: **608-23**
Дата изготовления: **02.2023**
Годен до: **02.2028**

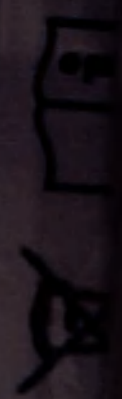


ФОТО 3 Общий вид медицинского изделия, потребительская упаковка, маркировка.

Жгут кровоостанавливающий
рифленный силиконовый ЖКРС
по ТУ 21.20.24-123-88079990-2022, длина 145 см
СТЕРИЛЬНО

50 шт. в упаковке

Номер партии 011.23
Дата изготовления 09.2022
Годен до 09.2028

ХРАНИТЬ: хранить на складе изотермически и
герметично при температуре окружающего воздуха
от минус 20 до 30°C, при относительной влажности
от 40 до 90%.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: вестить в упаковке
транспортировать герметично в соответствии с правилами
перевозки жидкостями на транспорте, при
температуре окружающего воздуха от минус 20 до
30°C, при относительной влажности от 40 до 90%.

Продукция ООО «Синтекс-Мед»
2355 000 000, e-mail: info@synmed.ru
190044, Санкт-Петербург, ул. Черушев,
д. 20, тел. факс: +7 (812) 326-64-80

Масса нетто 0,1 кг
Масса брутто 0,1 кг

100x50x100 мм

ФОТО 4 Транспортная упаковка, маркировка

15.05.2023 г.
(Дата упаковки)

Прошито и пронумеровано

6 (шесть)

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2024 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ
Жгут кровоостанавливающий рифленный силиконовый ЖКРС
по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022



Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый
ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,
длина 105 см
НЕСТЕРИЛЬНО

50 шт. в упаковке

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.



Производитель: ООО «Спецмедтехника»
www.spmr.ru, e-mail: info@spmr.ru
194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
тел./факс: +7 (812) 329-54-80

Масса нетто _____ кг

Масса брутто _____ кг



**Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый
ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,
длина 105 см
НЕСТЕРИЛЬНО**

50 шт. в упаковке

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °C.



Производитель: ООО «Спецмедтехника»

www.spmr.ru, e-mail: info@spmr.ru

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20

тел./факс: +7 (812)-329-54-80

Масса нетто _____ кг

Масса брутто _____ кг



Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый
ЖКРС по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,
длина 145 см
НЕСТЕРИЛЬНО

50 шт. в упаковке

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.



Производитель: ООО «Спецмедтехника»

www.spmr.ru, e-mail: info@spmr.ru

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20

тел./факс: +7 (812) 329-54-80

Масса нетто _____ кг

Масса брутто _____ кг



**Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый
ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022,**

**длина 145 см
НЕСТЕРИЛЬНО**

50 шт. в упаковке

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

ХРАНЕНИЕ: храниться на складах изготовителя и потребителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: всеми видами транспорта без ограничения расстояния в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при 25 °С.



Производитель: ООО «Спецмедтехника»

www.spmr.ru, e-mail: info@spmr.ru

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20

тел./факс: +7 (812) 329-54-80

Масса нетто _____ кг

Масса брутто _____ кг

прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Директор
ООО «Спецмедтехника»

А.В. Милин



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

02 2024 г.

МАКЕТ УПАКОВОЧНОГО ЛИСТА

медицинского изделия

**Жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС
по ТУ 21.20.24-123-58379990-2022**

Изготовитель ООО «Спецмедтехника»

Упаковочный лист № _____

Наименование, обозначение изделия	Номер партии	Количество
Жгут кровоостанавливающий рифленный силиконовый ЖКРС без фиксатора по ТУ 21.20.24-123- 58379990-2022, длина 105 см	_____	50 шт.
Этикетка, СМАН.123.000.000.000 ЭТ	Без номера	50 шт.
Паспорт качества	Без номера	1 шт.
Инструкция по применению	Без номера	1 шт.

Упаковщик _____

« » 202 г.
(Дата упаковки)

Прошито и пронумеровано

2 (двa) листов

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Мильяев