

WORLD
HUMAN
DIMENSION
FOUNDATION



ФОНД
«МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения

Уборы головные медицинские (тип А и тип Б, модель VI и модель II)

НАЗНАЧЕНИЕ

Уборы головные медицинские предназначены для ежедневного (постоянного) ношения медицинским персоналом лечебных и лечебно-профилактических учреждений в качестве специального (рабочего) головного убора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры уборов головных медицинских соответствуют измерениям головы типовой фигуры человека (ГОСТ 23134-1978). При необходимости и в зависимости от области применения уборы головные медицинские могут быть изготовлены с нестандартными размерами, с деталями из тканей разных цветов, со складками. Стежки, строчки и швы соответствуют ГОСТ 12807-1988, сортность изделия соответствует ГОСТ 12.4.031-1984. Маркировка изделий соответствует ГОСТ 19159 – 1985. Маркировка изделий соответствует ГОСТ 19159 – 1985.

Уборы головные медицинские изготавливаются из сертифицированных материалов: ткань – ГОСТ 11518-1988, ГОСТ 29298-1992, ТУ 8388-019-00321098-1998, тесьма эластичная – ТУ 17.09-14-310-1990, нитки швейные – ГОСТ 6309-1993, ГОСТ 17-921-1988. Уборы головные медицинские устойчивы к санитарно-гигиенической обработке, в том числе, к многократной стирке в воде с добавлением моющих средств.

Гарантийный срок использования уборов головных медицинских – не менее 12 месяцев.

Класс уборов головных медицинских в зависимости от потенциального риска применения -I (ГОСТ 51609-2000).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (НОШЕНИЮ) ИЗДЕЛИЯ

При подготовке к ношению уборов головных медицинских производится их осмотр и, при необходимости, устранение замечаний (глажение), ремонт (восстановление) швов.

После окончания периода ношения или после загрязнения осуществляется санитарно-гигиеническая обработка халатов медицинских мужских, в том числе, стирка в воде с добавлением моющих средств. Сушка изделий может производиться на открытом воздухе и в специально оборудованных помещениях, в том числе, с использованием специального оборудования. Допускается химическая обработка и чистка изделий.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Уборы головные медицинские должны храниться в сухих проветриваемых помещениях, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей. Допускается хранение изделий в транспортной таре, а также – в подготовленном для ношения виде – на вешалках в шкафах медицинского персонала.

Продолжительность этапов ношения уборов головных медицинских и их потребное количество на период определяется персоналом лечебно-профилактических учреждений самостоятельно на основе опытных данных (в зависимости от загрязнений и интенсивности деятельности медицинского персонала разных специальностей).

Целесообразно иметь резерв уборов головных медицинских для обеспечения деятельности персонала в экстренных случаях.

Генеральный директор ООО «Дирекция фонда «МГИ»



Б.В. Шмелькин