



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МТЭС»

Логинев С.Ю.

«9» февраля 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Шприцы инъекционные однократного применения инсулиновые с иглами и без игл

1. Назначение

Шприцы инъекционные однократного применения инсулиновые с иглами и без игл предназначены для проведения инъекций инсулина в амбулаторных, стационарных и домашних условиях.

Изделия относятся к одноразовым стерильным изделиям. Стерилизация осуществляется оксидом этилена.

2. Основные технические характеристики

Для обозначения концентрации инсулина применяется цветовое кодирование:

оранжевый цвет защитных колпачков для шприцев U-100 (INSULIN U-100). Номинальная вместимость - 1 мл

Шприцы могут иметь наконечник с присоединительным конусом Луер или без конуса Луер (шприцы с неразъемным соединением наконечника с иглой), могут изготавливаться с защитным колпачком для штока.

3. Противопоказания к применению

Не использовать с нарушенной упаковкой и истекшим сроком годности.

4. Подготовка к работе, порядок работы изделия

Проверить целостность потребительской тары и срок годности.

Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.

Снять колпачок, набрать в шприц лекарственный препарат.

Расположить шприц с иглой вертикально, выдавить, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.

Выполнить инъекцию.

5. Правила хранения и использования

Шприцы должны храниться при температуре от плюс 5° до плюс 40° С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25° С.

Срок хранения – 5 лет от даты изготовления.

После применения шприцы утилизировать в соответствии с национальными стандартами.