

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.

«18» апреля 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного
применения 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50/60 мл, 100 мл с
иглами и без игл»
производства Shandong Protos Medical Products Co., Ltd.

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ 24861-91, ГОСТ 25046-81

2008г.

1. Назначение

Шприцы малого объема (1мл) предназначены для точного введения лекарственного средства в эндокринологии (инсулиновые шприцы), фтизиатрии (туберкулиновые шприцы), неонатологии, а также для вакцинации и проведения аллергологических внутрикожных проб.

Шприцы стандартного объема (2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл и 20 мл) предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций.

Шприцы большого объема (50мл, 100мл) предназначены для отсасывания биологических жидкостей, введения питательных сред, промывания полостей.

2. Технические характеристики.

Шприц трехкомпонентный, состоит из цилиндра, поршня, уплотнителя. Цилиндр, изготовленный из полипропилена, предназначенного для изготовления медицинских изделий, имеет высокую степень прозрачности. На внешнюю стенку нанесена четкая шкала градуировки объема. Шприц малого объема (1мл) оснащен двойной шкалой, что позволяет использовать его как для введения инсулина U-100 (0 - 100 единиц), так и туберкулина (0 – 1мл). Нижняя часть цилиндра снабжена канюлей типа «Луэр слип». В верхней части цилиндра располагается стопорное кольцо, препятствующее случайному извлечению поршня. Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины. Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения соскальзывания пальцев при проведении инъекции. Резиновый уплотнитель имеет 3 кольца контакта, исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня. В шприцах малого объема (1мл) особая форма уплотнителя минимизирует «мёртвое пространство» и обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. Инъекционная игла изготовлена из нержавеющей стали. Имеется международная цветовая кодировка пластиковой канюли, в зависимости от диаметра трубки иглы. Трёхгранная (атравматическая) заточка кончика иглы. Игла обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления.

Изделие не содержит латекс. Стерильно, стерилизовано оксидом этилена, апиrogenно, не токсично. Предназначено для однократного применения. Непригодно для повторной стерилизации.

3. Противопоказания к применению.

При соблюдении условий хранения и использования противопоказаний к применению не имеет.

4. Подготовка к работе и порядок работы изделия.

Осмотреть упаковку шприца, не применять при обнаружении нарушения целостности упаковки. Вскрыть упаковку в указанном стрелкой месте, извлечь шприц, снять колпачок с иглы, использовать изделие по назначению. После использования изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными стандартами.

5. Хранение и срок годности

Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности. Срок годности 3 года.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
3 листов.

