

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 231300B0/005995

兹证明：在所附文件上的河北普康医疗设备有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Liu Yichao

日期: 2023年11月20日

(Date: Nov. 20, 2023)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

_____ (_____)
Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.

(Хэбэй Пукал Медикал Инструментс Ко., Лтд.), Китай

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Описание медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия

Тележки медицинские

Варианты исполнения:

1. Тележка медицинская BLQ 002 -9 в составе:

- 1.1. Тележка BLQ 002 -9 -1 шт.;
- 1.2. Ящик из нержавеющей стали – 2 шт.;
- 1.3. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 1.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

2. Тележка медицинская BLQ 002 -18 в составе:

- 2.1. Тележка BLQ 002 -18 – 1 шт.;
- 2.2. Емкость из нержавеющей стали 1,5 л – 1 шт.;
- 2.3. Пластиковое ведро 2,5 л – 1 шт.;
- 2.4. Ящик из нержавеющей стали – 1 шт.;
- 2.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 2.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

3. Тележка медицинская BLQ 002 -20/1 в составе:

- 3.1. Тележка 002 -20/1 – 1 шт.;
- 3.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 3.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

4. Тележка медицинская BLQ 002 -21 в составе:

- 4.1. Тележка BLQ 002 -21 – 1 шт.;
- 4.2. Ящик из нержавеющей стали – 1 шт.;
- 4.3. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 4.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

5. Тележка медицинская BLQ 002 -30/1 в составе:

- 5.1. Тележка BLQ 002 -30/1 – 1 шт.;
- 5.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 5.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

6. Тележка медицинская BLQ 002 -30/2 в составе:

- 6.1. Тележка BLQ 002 -30/2 – 1 шт.;
- 6.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 6.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

7. Тележка медицинская BLQ 002 -30/3 в составе:

- 7.1. Тележка BLQ 002 -30/3 – 1 шт.;
- 7.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 7.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

8. Тележка медицинская BLQ 002 -30/4 в составе:

- 8.1. Тележка BLQ 002 -30/4 – 1 шт.;
- 8.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 8.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

9. Тележка медицинская BLQ 002 -30/5 в составе:

- 9.1. Тележка BLQ 002 -30/5 – 1 шт.;
- 9.2. Емкость из нержавеющей стали 2,5 л – 1 шт.;

- 9.3. Ведро пластиковое 3,5 л – 1 шт.;
- 9.4. Ящик из ABS-пластика – 1 шт.;
- 9.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 9.6. Инструкция по применению – 1 шт.;
- 10. Тележка медицинская BLQ 002 -30/6 в составе:**

- 10.1. Тележка BLQ 002 -30/6 – 1 шт.;
- 10.2. Емкость из нержавеющей стали 2,5 л – 1 шт.;
- 10.3. Ведро пластиковое 3,5 л – 1 шт.;
- 10.4. Ящик из ABS-пластика – 1 шт.;
- 10.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 10.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

11. Тележка медицинская BLQ 002 -1 в составе:

- 11.1. Тележка BLQ 002 -1 – 1 шт.;
- 11.2. Емкость пластиковая 2,5 л – 1 шт.;
- 11.3. Ящик металлический – 9 штук;
- 11.4. Стойка инфузионная – 1 шт.
- 11.5. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 11.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

12. Тележка медицинская BLQ 002 -2 в составе:

- 12.1. Тележка BLQ 002 -2 – 1 шт.;
- 12.2. Емкость пластиковая 2,5 л – 1 шт.;
- 12.3. Ящик металлический – 6 шт.;
- 12.4. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 12.5. Инструкция по применению – 1 шт.;

13. Тележка медицинская BLQ 002 -3 в составе:

- 13.1. Тележка BLQ 002 -3 – 1 шт.;
- 13.2. Держатели пластиковые для документов – 2 шт.;
- 13.3. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 13.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

14. Тележка медицинская BLQ 002 -6 в составе:

- 14.1. Тележка BLQ 002 -6 – 1 шт.;
- 14.2. Емкость пластиковая 1,5 л – 1 шт.;
- 14.3. Стойка инфузионная – 1 шт.;
- 14.4. Ящики металлические – 3 шт.;
- 14.5. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 14.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

15. Тележка медицинская BLQ 002 -24 в составе:

- 15.1. Тележка BLQ 002 -24 – 1 шт.;
- 15.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 15.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 15.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 15.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 15.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 15.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

16. Тележка медицинская BLQ 002 -25 в составе:

- 16.1. Тележка BLQ 002 -25 – 1 шт.;
- 16.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 16.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 16.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 16.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 16.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 16.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

17. Тележка медицинская BLQ 002 -26 в составе:

- 17.1. Тележка BLQ 002 -26 – 1 шт.;
- 17.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 17.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 17.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.
- 17.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 17.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 17.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

18. Тележка медицинская BLQ 002 -27 в составе:

- 18.1. Тележка BLQ 002 -27 – 1 шт.;
- 18.2. Емкость пластиковая 2,5 литра – 1 шт.;
- 18.3. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 18.4. Ящики из ABS-пластика – 4 шт.;
- 18.5. Поддон пластиковый – 1 шт.;
- 18.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 18.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

19. Тележка медицинская BLQ 002 -28 в составе:

- 19.1. Тележка BLQ 002 -28 – 1 шт.;
- 19.2. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 19.3. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 19.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 19.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 19.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 19.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

20. Тележка медицинская BLQ 002 -29 в составе:

- 20.1. Тележка BLQ 002 -29 – 1 шт.;
- 20.2. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 20.3. Стойка инфузионная – 1 шт.;
- 20.4. Ящики из ABS-пластика – 2 шт.;
- 20.5. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 20.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 20.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

21. Тележка медицинская BLQ 002 -34 в составе:

- 21.1. Тележка BLQ 002 -34 – 1 шт.;
- 21.2. Емкости пластиковые с крышками по 9 литров – 2 шт.;
- 21.3. Емкость для использованных игл – 1 шт.;
- 21.4. Держатель для емкости для использованных игл – 1 шт.;
- 21.5. Ящики металлические – 5 шт.;
- 21.6. Держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью – 1 шт.;
- 21.7. Колеса диаметром 125 мм – 4 шт.;
- 21.8. Инструкция по применению – 1 шт.;

22. Тележка медицинская BLQ 002 -36 в составе:

- 22.1. Тележка BLQ 002 -36 – 1 шт.;
- 22.2. Емкости пластиковые с крышками по 9 литров – 2 шт.;
- 22.3. Емкость для использованных игл – 1 шт.;
- 22.4. Стойка инфузионная – 1 шт.;
- 22.5. Ведро пластиковое 2,5 л – 1 шт.;
- 22.6. Ящики из ABS-пластика – 2 шт.;
- 22.7. Держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью – 1 шт.;
- 22.8. Колеса диаметром 125 мм – 4 шт.;
- 22.9. Инструкция по применению – 1 шт.;

1.2. Назначение медицинского изделия

Тележки медицинские предназначены для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения.

Тележки относятся к 3 группе в зависимости от воспринимаемых механических воздействий (п. 4.3 ГОСТ 50444-20)

1.3. Область применения медицинского изделия/показания к применению

В лечебных учреждениях.

Показания к применению: для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения

1.4. Функциональное назначение/принцип действия

Тележки медицинские обеспечивают выполнение следующих функций: транспортировка.

Функциональное назначение и принцип действия для каждого варианта указаны в таблице 1.

1.5. Условия эксплуатации медицинского изделия

- температура: +10 ... +40 °С
- относительная влажность: $\leq 85\%$
- атмосферное давление: 86...106 кПа

1.6. Возможные побочные действия

Возможные побочные действия отсутствуют.

1.7. Противопоказания

Отсутствуют.

1.8. Предупреждения

1. Внимание, тележка не предназначена для использования на улице. Во избежание повреждения частей тележки рекомендуется использование только внутри помещения, имеющего гладкие, ровные полы, без порогов и значительных загрязнений.
2. Не оставляйте тележку в коридорах /блоках медучреждений с незаблокированными колесами с целью предотвращения травм пациентов/персонала, порчи имущества в результате столкновений.
3. Производитель не несет ответственности за повреждение частей изделия, по причине нарушения условий эксплуатации.
4. В случае подозрения в наличие повреждений или неисправности изделие должно быть немедленно выведено из эксплуатации для устранения неисправностей.
5. "ВНИМАНИЕ! Модификация этого изделия без разрешения изготовителя не допускается.
6. Емкости для использованных игл, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации по классу Б (СанПиН 2.1.3684-21).

1.9. Инструкция по безопасности

Необходимо использовать в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации.

1.10. Класс риска и применимые классификационные правила

Класс потенциального риска применения 1.

1.11. Производитель медицинского изделия

Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.


(Хэбэй Пукал Медикал Инструментс Ко., Лтд.), Китай

Dongshidian Town Xushui County, Hebei Province, 072550, China

1.12. Общее описание основных функциональных элементов, частей, состав, функциональные возможности

Основные элементы конструкции и принадлежности (в зависимости от модели и комплектации):

1. Колёса антистатические с блокировкой - 4
2. Емкость - 1
3. Ящики выдвижные - 5
4. Раздвижная столешница - 1
5. Распашные дверцы - 2
6. Ручка для перевозки - 1
7. Дополнительная емкость - 1

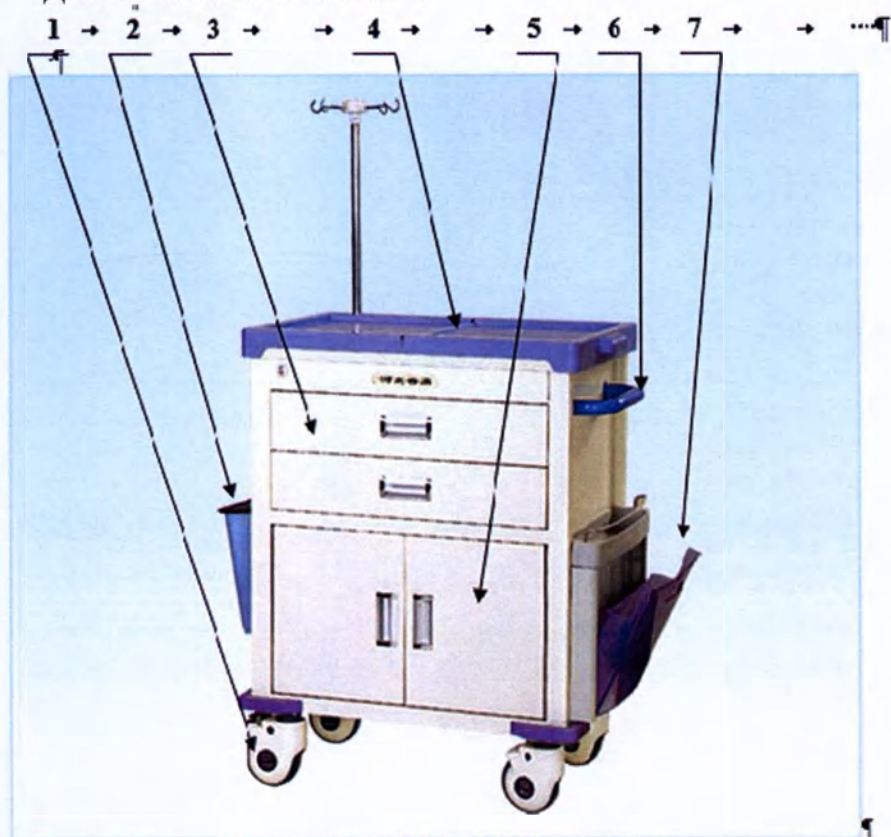

Изделия изготовлены на одном предприятии – изготовителе, выполнены по одному конструктивному принципу.

Изделия идентичны по схемному решению и применяемым компонентам.

Изделия имеют одинаковое назначение.

Изделия предназначено для многократного использования и допускает повторение циклов работы через интервалы времени, значения которых установлены в общих стандартах.

Исполнения изделия отличаются размерами и функциями как рассмотрено ниже в таблице 1:

Таблица № 1.

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
1.	BLQ 002 -1		Тележка из АБС пластика. 9 ящиков, емкость пластиковая 2,5 л, стойка инфузионная Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки.
2.	BLQ 002 -2		Тележка из нержавеющей стали. 6 ящиков, емкость пластиковая 2,5 л. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки.

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
3.	BLQ 002 -3		Тележка из АБС пластика. 4 ящика, 2 пластиковых держателя для документов. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Пластиковый файл предназначен для размещения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.
4.	BLQ 002 -6		Тележка из АБС пластика. 3 металлических ящика, пластиковая емкость 1,5 л. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки.

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
5.	BLQ 002 -9		Тележка медицинская из нержавеющей стали. 2 ящика из нержавеющей стали и открытая полка. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Открытая полка предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов.
6.	BLQ 002 -18		Тележка из нержавеющей стали. 2 открытые полки, ящик из нержавеющей стали, емкость из нержавеющей стали и пластиковое ведро для отходов. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость и ведро для отходов предназначены для возможности медицинского персонала быстрой утилизации отходов не отходя

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			от тележки.
7.	BLQ 002 -20/1		Тележка медицинская из нержавеющей стали. 2 полки из нержавеющей стали Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов.
8.	BLQ 002 -21		Тележка из нержавеющей стали. 2 открытых полки и ящик из нержавеющей стали. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги
9.	BLQ 002 -24		Тележка из АБС пластика. 5 ящиков из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, пластиковый держатель для документов. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости. - Пластиковый держатель предназначен для размещения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.
10.	BLQ 002 -25		Тележка из АБС пластика. 5 ящиков из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, пластиковый держатель для документов. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости. - Пластиковый держатель предназначен для хранения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.
11.	BLQ 002 -26		Тележка из АБС пластика. 5 ящиков из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, пластиковый держатель для документов. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости. - Пластиковый держатель предназначен для хранения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
12.	BLQ 002 -27		Тележка из АБС пластика. 4 ящика из АБС пластика, открытая полка с пластиковым поддоном, емкость для отходов. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов. - Поддон предназначен для перевозки и быстрого доступа к инструментам
13.	BLQ 002 -28		Тележка из АБС пластика. 5 ящиков из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, пластиковый держатель для документов. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию

Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
		держателя инфузионной стойки. - Ящик предназначен для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости. - Пластиковый держатель предназначен для хранения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.
14.	BLQ 002 -29	Тележка из АБС пластика. 2 ящика из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, пластиковый держатель, отсек для хранения с распашными дверцами. Возможность присоединения дополнительно инфузионной стойки.  Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения, а также выполнять функцию держателя инфузионной стойки. - Ящик и отсек с распашными дверцами предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			предотвращает выпадения отходов из емкости - Пластиковый держатель предназначен для хранения и быстрого доступа к медицинской документации не отходя от тележки.
15.	BLQ 002 -30/3 BLQ 002 -30/4		Тележка из ABS. 2 открытые полки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов.
16.	BLQ 002 -30/1 BLQ 002 -30/2		Тележка из ABS. 3 открытые полки. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов.
17.	BLQ 002 -30/5 BLQ 002 -30/6		Тележка медицинская из АБС. 2 открытых полки, ящик из АБС пластика, емкость из нержавеющей стали для отходов, пластиковое ведро для отходов. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения.

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			- Открытые полки предназначена для размещения различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость и ведро для отходов предназначены для возможности медицинского персонала быстрой утилизации отходов не отходя от тележки.
18.	BLQ 002 -34		Тележка из АБС пластика. 5 ящиков из АБС пластика, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, выдвижная столешница, емкость для использованных игл, держатель для емкости для использованных игл, держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью. Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости - Емкость для использованных игл предназначена для утилизации использованных

	Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
			игл - Держатели предназначены для емкости для использованных игл и емкости с дезинфицирующей жидкостью - Ведро предназначено для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки
19.	BLQ 002 -36		- Тележка медицинская. 2 ящика из ABS пластика, выдвижная столешница, полка с прозрачными пластиковыми емкостями, 2 емкости с плотно закрывающимися крышками, открытая полка, держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью, емкость для использованных игл, держатель для емкости для использованных игл, держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью, ведро пластиковое, стойка инфузионная Тележка предназначена для транспортировки медицинских изделий в пределах отделения или лечебного учреждения. - Ящики и прозрачные емкости предназначены для размещения медикаментов и медицинских инструментов в защищенном от воздействия солнечных лучей и попадания пыли и влаги. - Емкость с крышкой предназначена для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки, а крышка предотвращает выпадения отходов из емкости - Открытые полки предназначена для размещения

Наименование исполнения	Вид изделия	Характеристики
		различных необходимых медицинских инструментов, емкостей и материалов - Емкость для использованных игл предназначена для утилизации использованных игл - Держатели предназначены для емкости для использованных игл и емкости с дезинфицирующей жидкостью - Ведро предназначено для быстрой утилизации отходов не отходя от тележки.

Тележки должны стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между одним из колес и полом не должен превышать - 3 мм. Колеса тележек должны вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания. Тормоза колес должны включаться при приложении на педаль усилия не более 150 Н (15 кгс).

Тележки должны выдерживать двухкратную номинальную нагрузку, равномерно распределенную по панели, установленной в нижнее положение, либо (при перевозках малых грузов) распределенную по верхней или нижней полкам.

За номинальную принимают следующую нагрузку, кг, на тележки- (30±0,5)

Тележки, упакованные в транспортную тару, должны сохранять вибропрочность и ударпрочность (работоспособность после транспортной тряски).

Ящики должны выдвигаться по направляющим и иметь устройство для предотвращения выпадения их из корпуса. Усилия при выдвигании ящиков- не более 50 Н.

Таблица № 2. Общие спецификации:

Наименование изделия	Наименование параметра							
	Масса, кг, Допуск $\pm$ 1 кг	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Максимальная нагрузка, кг, не более	Диаметр колес, мм, $\pm$ 1 мм	Усилие, необходимое для перемещения тележек с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать:	Усилие, необходимо для фиксации съемных элементов тележек (ограждения и т.п.) в рабочем положении, должно быть не более	Габаритные размеры упаковки, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Габаритные размеры ящиков/полок, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 10 мм.
BLQ 002 -1	69	650*420*1020	20	121	120 Н (12 кгс)	50 Н (5 кгс) - для ручек управления и рукояток зажимов тележек;	820*500*920	9 ящиков 1,2,3: 630*400*90 4,5,6,7: 315*400*180 8,9: 630*400*180
BLQ 002 -2	74	650*420*1020		121	120 Н (12 кгс)	80 Н (8 кгс) - для рукояток зажимов тележек для перевозки взрослых пациентов и грузов.	800*530*930	6 ящиков: 1-5: 630*400*145 6: 630*400*290
BLQ 002 -3	64	650*420*1020		121	120 Н (12 кгс)		930*600*990	4 ящика 1,2,3: 630*400*200 4: 630*400*400
BLQ 002 -6	56	800*490*960		121	120 Н (12 кгс)		910*600*930	3 ящика 760*470*150

Наименование изделия	Наименование параметра							
	Масса, кг. Допуск ± 1 кг	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм. Допуск ±20 мм.	Максимальная нагрузка, кг, не более	Диаметр колес, мм, ± 1 мм	Усилие, необходимое для перемещения тележек с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать:	Усилие, необходимое для фиксации съемных элементов тележек (ограждения и т.п.) в рабочем положении, должно быть не более	Габаритные размеры упаковки, мм. Допуск ±20 мм.	Габаритные размеры ящиков/полок, Д*Ш*В, мм. Допуск ±10 мм.
BLQ 002 -9	25	640*450*850		121	100 Н (10 кгс)	50 Н (5 кгс) - для ручек управления и рукояток зажимов тележек; 80 Н (8 кгс) - для рукояток зажимов тележек для перевозки взрослых пациентов и грузов.	870*730*960	2 ящика 620*430*150
BLQ 002 -18	16	660*470*970		101	100 Н (10 кгс)		840*490*370	2 полки: 640 х 450 х 15 Ящик: 330*250*70
BLQ 002 -20/1	14	730*470*970		101	100 Н (10 кгс)		850*500*200	2 полки 710*450*15
BLQ 002 -20/2	14	730*470*970		101	100 Н (10 кгс)		850*500*220	3 полки 710*450*15
BLQ 002 -21	20	640*450*990		101	100 Н (10 кгс)		660*470*880	Ящик 620*430*150 Полка 620*430*15

Наименование изделия	Наименование параметра							
	Масса, кг, Допуск $\pm$ 1 кг	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Максимальная нагрузка, кг, не более	Диаметр колес, мм, $\pm$ 1 мм	Усилие, необходимое для перемещения тележек с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать:	Усилие, необходимое для фиксации съемных элементов тележек (ограждения и т.п.) в рабочем положении, должно быть не более	Габаритные размеры упаковки, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Габаритные размеры ящиков/полок, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 10 мм.

BLQ 002 -24	87	850*520*1040			120 Н (12 кгс)		930*600*990	5 ящиков: 1,2:830*500*100 3,4:830*500*200 5:830*500*250
BLQ 002 -25	62	820*505*980		121	120 Н (12 кгс)		910*600*930	5 ящиков: 1,2:800*500*100 3,4:800*500*200 5:800*500*250
BLQ 002 -26	69	820*505*980		121	120 Н (12 кгс)		910*600*930	5 ящиков: 1,2:800*500*100 3,4:800*500*200 5:800*500*250
BLQ 002 -27	56	780*530*1020		121	120 Н (12 кгс)		930*600*990	4 ящика: 760*510*100

Наименование изделия	Наименование параметра							
	Масса, кг, Допуск ± 1 кг	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм. Допуск ±20 мм.	Максимальная нагрузка, кг, не более	Диаметр колес, мм, ± 1 мм	Усилие, необходимое для перемещения тележек с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать:	Усилие, необходимо для фиксации съемных элементов тележек (ограждения и т.п.) в рабочем положении, должно быть не более	Габаритные размеры упаковки, мм. Допуск ±20 мм.	Габаритные размеры ящиков/полок, Д*Ш*В, мм. Допуск ±10 мм.
BLQ 002 -28	79	850*520*1040		121	120 Н (12 кгс)		930*600*990	5 ящиков: 1,2:830*500*100 3,4:830*500*200 5:830*500*250
BLQ 002 -29	72	820*505*980		121	120 Н (12 кгс)		910*600*930	2 ящика: 800*490*150
BLQ 002 -30/1	15	820*510*970		101	100 Н (10 кгс)		860*530*240	3 полки 800*490*15
BLQ 002 -30/2	15	720*460*970	20	101	100 Н (10 кгс)		860*530*240	3 полки 700*440*15
BLQ 002 -30/3	14	820*510*970		101	100 Н (10 кгс)		860*530*145	2 полки 800*490*15
BLQ 002 -30/4	14	720*460*970		101	100 Н (10 кгс)		860*530*145	2 полки 700*440*15

Наименование изделия	Наименование параметра							
	Масса, кг, Допуск $\pm$ 1 кг	Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Максимальная нагрузка, кг, не более	Диаметр колес, мм, $\pm$ 1 мм	Усилие, необходимое для перемещения тележек с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать:	Усилие, необходимое для фиксации съемных элементов тележек (ограждения и т.п.) в рабочем положении, должно быть не более	Габаритные размеры упаковки, мм. Допуск $\pm$ 20 мм.	Габаритные размеры ящиков/полок, Д*Ш*В, мм. Допуск $\pm$ 10 мм.
BLQ 002 -30/5	22	820*510*970		101	100 Н (10 кгс)	50 Н (5 кгс) - для ручек управления и рукояток зажимов тележек; 80 Н (8 кгс) - для рукояток зажимов тележек для перевозки взрослых пациентов и грузов.	890*490*300	2 полки 800*490*15 ящик 400 x 330 x 80
BLQ 002 -30/6	22	720*460*970		101	100 Н (10 кгс)		890*490*300	2 полки 700*440*15 ящик 400 x 330 x 80
BLQ 002 -34	33	695*567*1010		125	100 Н (10 кгс)		730*630*970	5 ящиков: 1-4: 675*550*160 5: 675*550*320
BLQ 002 -36	33	695*567*1010		125	100 Н (10 кгс)		730*630*970	2 ящика 675*550*100 1 полка 675*550*15

3. Комплектность

1. Наименование медицинского изделия

Тележки медицинские

Варианты исполнения:

23. Тележка медицинская BLQ 002 -9 в составе:

- 1.1. Тележка BLQ 002 -9 -1 шт.;
- 1.2. Ящик из нержавеющей стали – 2 шт.;
- 1.3. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 1.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

24. Тележка медицинская BLQ 002 -18 в составе:

- 2.1. Тележка BLQ 002 -18 – 1 шт.;
- 2.2. Емкость из нержавеющей стали 1,5 л – 1 шт.;
- 2.3. Пластиковое ведро 2,5 л – 1 шт.;
- 2.4. Ящик из нержавеющей стали – 1 шт.;
- 2.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 2.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

25. Тележка медицинская BLQ 002 -20/1 в составе:

- 3.1. Тележка 002 -20/1 – 1 шт.;
- 3.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 3.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

26. Тележка медицинская BLQ 002 -21 в составе:

- 4.1. Тележка BLQ 002 -21 – 1 шт.;
- 4.2. Ящик из нержавеющей стали – 1 шт.;
- 4.3. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 4.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

27. Тележка медицинская BLQ 002 -30/1 в составе:

- 5.1. Тележка BLQ 002 -30/1 – 1 шт.;
- 5.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 5.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

28. Тележка медицинская BLQ 002 -30/2 в составе:

- 6.1. Тележка BLQ 002 -30/2 – 1 шт.;
- 6.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 6.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

29. Тележка медицинская BLQ 002 -30/3 в составе:

- 7.1. Тележка BLQ 002 -30/3 – 1 шт.;
- 7.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 7.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

30. Тележка медицинская BLQ 002 -30/4 в составе:

- 8.1. Тележка BLQ 002 -30/4 – 1 шт.;
- 8.2. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 8.3. Инструкция по применению – 1 шт.;

31. Тележка медицинская BLQ 002 -30/5 в составе:

- 9.1. Тележка BLQ 002 -30/5 – 1 шт.;
- 9.2. Емкость из нержавеющей стали 2,5 л – 1 шт.;
- 9.3. Ведро пластиковое 3,5 л – 1 шт.;
- 9.4. Ящик из ABS-пластика – 1 шт.;
- 9.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 9.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

32. Тележка медицинская BLQ 002 -30/6 в составе:

- 10.1. Тележка BLQ 002 -30/6 – 1 шт.;
- 10.2. Емкость из нержавеющей стали 2,5 л – 1 шт.;

- 10.3. Ведро пластиковое 3,5 л – 1 шт.;
- 10.4. Ящик из ABS-пластика – 1 шт.;
- 10.5. Колеса диаметром 101 мм – 4 шт.;
- 10.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

33. Тележка медицинская BLQ 002 -1 в составе:

- 11.1. Тележка BLQ 002 -1 – 1 шт.;
- 11.2. Емкость пластиковая 2,5 л – 1 шт.;
- 11.3. Ящик металлический – 9 штук;
- 11.4. Стойка инфузионная – 1 шт.
- 11.5. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 11.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

34. Тележка медицинская BLQ 002 -2 в составе:

- 12.1. Тележка BLQ 002 -2 – 1 шт.;
- 12.2. Емкость пластиковая 2,5 л – 1 шт.;
- 12.3. Ящик металлический – 6 шт.;
- 12.4. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 12.5. Инструкция по применению – 1 шт.;

35. Тележка медицинская BLQ 002 -3 в составе:

- 13.1. Тележка BLQ 002 -3 – 1 шт.;
- 13.2. Держатели пластиковые для документов – 2 шт.;
- 13.3. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 13.4. Инструкция по применению – 1 шт.;

36. Тележка медицинская BLQ 002 -6 в составе:

- 14.1. Тележка BLQ 002 -6 – 1 шт.;
- 14.2. Емкость пластиковая 1,5 л – 1 шт.;
- 14.3. Стойка инфузионная – 1 шт.;
- 14.4. Ящики металлические – 3 шт.;
- 14.5. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 14.6. Инструкция по применению – 1 шт.;

37. Тележка медицинская BLQ 002 -24 в составе:

- 15.1. Тележка BLQ 002 -24 – 1 шт.;
- 15.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 15.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 15.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 15.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 15.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 15.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

38. Тележка медицинская BLQ 002 -25 в составе:

- 16.1. Тележка BLQ 002 -25 – 1 шт.;
- 16.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 16.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 16.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;
- 16.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 16.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;
- 16.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

39. Тележка медицинская BLQ 002 -26 в составе:

- 17.1. Тележка BLQ 002 -26 – 1 шт.;
- 17.2. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;
- 17.3. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;
- 17.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.
- 17.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;
- 17.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;

17.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

40. Тележка медицинская BLQ 002 -27 в составе:

18.1. Тележка BLQ 002 -27 – 1 шт.;

18.2. Емкость пластиковая 2,5 литра – 1 шт.;

18.3. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;

18.4. Ящики из ABS-пластика – 4 шт.;

18.5. Поддон пластиковый – 1 шт.;

18.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;

18.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

41. Тележка медицинская BLQ 002 -28 в составе:

19.1. Тележка BLQ 002 -28 – 1 шт.;

19.2. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;

19.3. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;

19.4. Стойка инфузионная (при необходимости) – 1 шт.;

19.5. Ящики из ABS-пластика – 5 шт.;

19.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;

19.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

42. Тележка медицинская BLQ 002 -29 в составе:

20.1. Тележка BLQ 002 -29 – 1 шт.;

20.2. Емкости пластиковые с крышками по 6 литров – 2 шт.;

20.3. Стойка инфузионная – 1 шт.;

20.4. Ящики из ABS-пластика – 2 шт.;

20.5. Держатель пластиковый для документов – 1 шт.;

20.6. Колеса диаметром 121 мм – 4 шт.;

20.7. Инструкция по применению – 1 шт.;

43. Тележка медицинская BLQ 002 -34 в составе:

21.1. Тележка BLQ 002 -34 – 1 шт.;

21.2. Емкости пластиковые с крышками по 9 литров – 2 шт.;

21.3. Емкость для использованных игл – 1 шт.;

21.4. Держатель для емкости для использованных игл – 1 шт.;

21.5. Ящики металлические – 5 шт.;

21.6. Держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью – 1 шт.;

21.7. Колеса диаметром 125 мм – 4 шт.;

21.8. Инструкция по применению – 1 шт.;

44. Тележка медицинская BLQ 002 -36 в составе:

22.1. Тележка BLQ 002 -36 – 1 шт.;

22.2. Емкости пластиковые с крышками по 9 литров – 2 шт.;

22.3. Емкость для использованных игл – 1 шт.;

22.4. Стойка инфузионная – 1 шт.;

22.5. Ведро пластиковое 2,5 л – 1 шт.;

22.6. Ящики из ABS-пластика – 2 шт.;

22.7. Держатель для емкости с дезинфицирующей жидкостью – 1 шт.;

22.8. Колеса диаметром 125 мм – 4 шт.;

22.9. Инструкция по применению – 1 шт.;

1.14. Общее описание принадлежностей, состав, функциональные возможности

Колеса антистатические, выполнены из противоударного ABS пластика, ролики изготовлены из немаркой серой резины.

Количество блокируемых колёс – 4.

- Колеса блокируются посредством установленной на них педали тормоза (рис 1; 2)

с.1 (положение для транспортировки) поднимите педаль вверх.



Рис.2 (фиксация колеса) опустите педаль вниз.



Металлическая ручка для транспортировки, покрытая эпоксидной краской.
Противоударные бамперы по углам тележки.

Емкости из нержавеющей стали объемом $1,5\text{л} \pm 0,1\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-18) и объемом $2,5\text{л} \pm 0,2\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-30/5 и BLQ 002-30/6)



Рис. Емкость из нержавеющей стали для вариантов исполнения: BLQ 002-18, BLQ 002-30/5, BLQ 002-30/6

Ведро пластиковое объемом $2,5\text{ л} \pm 0,2\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-18) и объемом $3,5\text{л} \pm 0,2\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-30/5 и BLQ 002-30/6) - предназначены для утилизации медицинских отходов класса А.



Рис. Ведро пластиковое для вариантов исполнения: BLQ 002-18, BLQ 002-30/5, BLQ 002-30/6

Емкости из пластика объемом $2,5\text{л} \pm 0,2\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-1, BLQ 002-2, BLQ 002-27) и объемом $1,5\text{л} \pm 0,1\text{л}$ (модели тележек BLQ 002-6) – предназначены для утилизации медицинских отходов класса А.



Рис. Емкость пластиковая для вариантов исполнения: BLQ 002-1, BLQ 002-2 BLQ 002-27



Рис. Емкость пластиковая для вариантов исполнения: BLQ 002-6

Емкости пластиковые с крышками объемом $6\text{л} \pm 0,2\text{л}$ - предназначены для утилизации медицинских отходов класса А.



Рис. Емкость пластиковая для вариантов исполнения: BLQ 002-24; BLQ 002-25; BLQ 002-26; BLQ 002-28; BLQ 002-29

Емкость пластиковая с крышкой объемом $9\pm 0,3$ л - предназначены для утилизации медицинских отходов класса А.



Рис. Емкость пластиковая для вариантов исполнения: BLQ 002-34 и BLQ 002-36

Пластиковые держатели для документов $230*310*70$ мм $\pm 5\%$ - предназначены для размещения документов



Емкости для использованных игл объемом $1\pm 0,2$ л - предназначены для утилизации медицинских отходов класса Б.



Рис. Емкость для использованных игл

Поддон для BLQ 002 -27: $760*510*100$ мм $\pm 5\%$



Инфузионная стойка

Стойка-держатель для внутривенных инъекций предназначена для фиксации капельниц, инфузионных баллонов.

Изготовлена из нержавеющей стали.

Состоит из 2-х труб (нерж. сталь) диаметрами 14 и 12 мм $\pm 5\%$, вторая труба служит телескопическим удлинителем второй. Вторая труба - основание, скрывающее удлинитель. Стык между основанием и удлинителем имеет пластиковый корпус, внутри которого скрыт механизм фиксации удлинителя на желаемой высоте. Механизм регулировки удлинителя - трубчатый растомат (гребенка), фиксация осуществляется с помощью кнопки. Длина основания - 1000 мм $\pm 5\%$, длина удлинителя - 600 мм $\pm 5\%$, общая длина штатива в разложенном до максимальной длины состоянии - 1800 мм $\pm 5\%$, в сложенном - 1200 мм $\pm 5\%$. В верхней части штатива на пластиковом круглом основании закреплены 4 крючка из нерж. стали для подвеса инфузионных емкостей.

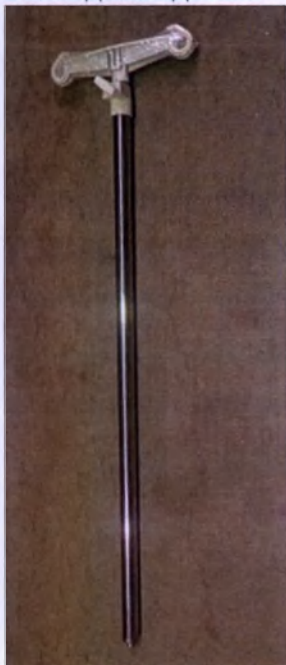


Рис. Стойка инфузионная для вариантов исполнения:
BLQ 002-6; BLQ 002-25; BLQ 002-26; BLQ 002-36
BLQ 002-27; BLQ 002-28; BLQ 002-29



Рис. Стойка инфузионная для вариантов исполнения:

1.15. Описание основных материалов

Сталь с эпоксидным покрытием (с ПВХ-напылением): корпус, ящики

Нержавеющая сталь: корпус, ящики, полки

АБС пластик (акрилонитрилбутадиенстирол): защитные кожухи, полки, ручки

Колеса-Материал: пластик+ сталь

6. Меры предосторожности

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать меры предосторожности. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации медицинских изделий в учреждениях здравоохранения.

Меры предосторожности:

1. Пользователям необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом работы с медицинским изделием.
2. При перемещении тележки соблюдайте правила безопасности.
3. Запрещается нагружать тележку выше норм, установленных производителем.
4. Запрещается подвергать поверхности тележек воздействию предметов, вызывающих появление царапин на поверхности.
5. При очистке тележки необходимо следовать рекомендациям, указанным в инструкции.

2. Техническое описание медицинского изделия

2.1. Текущий ремонт

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2. Т. (812) 326 59 25, факс: (812) 325-58-64, E-mail: medmeb@nnz.ru.

2.2. Техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание должно проводиться один раз в год квалифицированными специалистами.

Изношенные и поломанные части тележки должны быть отремонтированы или заменены.

Поверхность тележки должна содержаться в чистоте. Компоненты, изготовленные из ABS запрещается чистить углеводородными или химическими растворителями, используйте нейтральное моющее средство.

Конструкция тележек должна обеспечивать ремонтпригодность, в том числе свободный доступ к отдельным сборочным единицам и деталям и их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

2.3. Чистка и дезинфекция

Каркас тележки, ящики, емкости из нержавеющей стали для отходов следует обрабатывать чистящими средствами, рекомендуемыми для стали с эпоксидным напылением. Для очистки пластиковых частей следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода). Не рекомендуется пользоваться для чистки содой, наждачной бумагой и средствами, содержащими абразивные материалы. Тележки должны быть устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644, либо 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

2.4. Требования охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации. Защита окружающей среды.

Изделия должны быть нетоксичными и соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1.

При производстве, хранении, транспортировке и эксплуатации (употреблении) изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают (при непосредственном контакте) вредного влияния на организм человека. Работа с изделиями не требует особых мер предосторожности.

Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва. Материалы изделий таковы, что в случае пожара его можно тушить всеми доступными средствами.

тележка в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 относится к классу А.

Емкости для использованных игл, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации по классу Б (СанПиН 2.1.3684-21).

Емкости и пластиковые ведра, емкости для использованных игл, которые не использовались и/или не имели контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации по классу А (СанПиН 2.1.3684-21).

Утилизируйте тележку и её компоненты по истечении срока их службы в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительной информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

2.5. Данные по сроку службы

Средний срок службы - не менее 10 лет.

2.6. Требования к транспортированию и хранению

Хранение

Храните тележку в сухом месте, свободном от губительного воздействия температуры, влажности, вентиляции, солнечных лучей, пыли и воздуха, содержащего соль и т.д.

1. Избегайте мест, где хранятся химические препараты или образовывается газ.
2. Берегите от попадания влаги.
3. Условия хранения/транспортировки:
4. - температура: $+5^{\circ} \dots +40^{\circ} \text{C} / -10^{\circ} \dots +50^{\circ}$
5. - относительная влажность: $\leq 70 \%$
6. - атмосферное давление: 86...106 кПа
7. Транспортировка
8. Транспортировка тележки и принадлежностей допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температурном режиме указанном выше и соблюдением следующих условий:



Верх;



Осторожно хрупкое;



Беречь от влаги;



Предел по количеству ярусов в штабеле



Не катить

Маркировка на транспортной упаковке должна быть четкой и содержать:

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;
7. обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное) (лот или серийный номер);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование и местонахождение изготовителя;
 - наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
 - дату изготовления;
 - гарантийный срок;
 - срок службы, установленный изготовителем;
 - номер и дата ру

Так же используются следующие символы



- изготовитель



- дата изготовления



- см. инструкцию

Мебель медицинские, с принадлежностями
Исполнение: Тележка медицинская BLQ 002-30/5



202205/PU-264-31032022-3

«Хебэй Пуканг Медикал Инструментс Ко., Лтд», Китай
Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.
Dongshidian Town Xushui Country, Hebei Province,
072550, China



Завод-изготовитель: «Хебэй Пуканг Медикал Инструментс Ко.,
Лтд», Китай, Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.
Dongshidian Town Xushui Country, Hebei Province, 072550,
China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Альфа
Мобили», 93318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 2.
Тел: +7495 782 80 11, Эл. Почта medmed@nnz.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/8640 от 22.07.2019



05.2022

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы – не менее 10 лет

2.7. Гарантии изготовителя

12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3. Маркировка и упаковка изделия

3.1. Описание маркировки МИ

Каждое изделие мебели должно иметь маркировку на русском и (или) другом национальном языке.

Маркировка должна быть выполнена в виде таблички или надписи на МИ.

Надписи должны быть устойчивы к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации (после многократной дезинфекции) согласно ГОСТ Р 50444-20.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка штампом или печатным способом.

Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное) (лот или серийный номер);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;

- дату изготовления;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- номер и дату ру

Так же используются следующие символы



- изготовитель



- дата изготовления



- см. инструкцию

Маркировка должна наноситься:

на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены; на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок, деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

Тележки медицинские, с принадлежностями		
Исполнение: Тележка медицинская BLQ 002-30/5		
202205/PU-264-31032022-3		
«Хебэй Пуканг Медицинские Инструменты Ко., Лтд», Китай		
Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.		
	Dongshidian Town Xushui County, Hebei Province, 072550, China	
Завод-изготовитель: «Хебэй Пуканг Медицинские Инструменты Ко., Лтд», Китай, Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd. Dongshidian Town Xushui County, Hebei Province, 072550, China		
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Альфа Мобили», 93318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 2. Тел: +7495 782 80 11, Эл. Почта medmed@nnz.ru		
Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/8640 от 22.07.2019		
	05.2022	
Гарантийный срок 12 месяцев		
Срок службы – не менее 10 лет		

2. Описание маркировки от производителя

Маркировка выполнена в виде таблички.

Маркировка должна содержать:

- наименование и адрес производителя и производственной площадки
- страна производителя
- наименование медицинского изделия
- модель медицинского изделия
- максимальная нагрузка
- дата изготовления
- серийный номер



Маркировка наносится:

на верхний правый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и

шки. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок, стеллажей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

Уполномоченный представитель производителя в РФ (наименование, адрес, телефон, почта)

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Мобили»
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)	ООО «Альфа Мобили»
Адрес (место нахождения) юридического лица	Россия, 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 2.
Номера телефонов	Тел.: (812) 326-59-25, факс (812) 325-58-64
Адрес электронной почты юридического лица (в случае, если имеется)	medmeb@nnz.ru
Идентификационный номер налогоплательщика	7811359153

5. Условия и правила эксплуатации
Сборка и подготовка к эксплуатации

Открыв упаковку, проверьте целостность деталей и наличие составных частей.

Инструкция по сборке

Тележки медицинские моделей: BLQ 002 версии исполнения: 18, 20/1, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6:
Общая информация

Оборудование: Тележки медицинские модели BLQ 002 версии исполнения: 18, 20/1, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6.

Упаковка оборудования: картонная коробка.

Таблица № 3. Комплектация оборудования:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Версии исполнения
1	Полка пластик	2	версии 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
2	Полка пластик	3	версии 30/1, 30/2
3	Полка нержавеющая сталь	2	версии 18, 20/1
4	U-образные стойки	2	все версии
5	Основание	1	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
6	Трубки ограждения длинные	4	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
7	Трубки ограждения длинные	6	версии 30/1, 30/2
8	Трубки ограждения короткие	8	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
9	Трубки ограждения короткие	12	версии 30/1, 30/2
10	Соединительные элементы угловые	4	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
11	Соединительные элементы угловые	6	версии 30/1, 30/2
12	Соединительные элементы торцевые	4	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6

Соединительные элементы торцевые	6	версии 30/1, 30/2
Центральный фиксатор бокового ограждения	2	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
Центральный фиксатор бокового ограждения	3	версии 30/1, 30/2
Конусные полувтулки с у упором	8	версии 20/1, 30/3, 30/4
Конусные полувтулки с у упором	10	версии 18, 30/5, 30/6
Конусные полувтулки с у упором	12	версии 30/1, 30/2
Конусные полувтулки без упора	8	версии 20/1, 30/3, 30/4
Конусные полувтулки без упора	10	версии 18, 30/5, 30/6
Конусные полувтулки без упора	12	версии 30/1, 30/2
Кольца пластиковые	8	версии 20/1, 30/3, 30/4
Кольца пластиковые	10	версии 18, 30/5, 30/6
Кольца пластиковые	12	версии 30/1, 30/2
Соединительные элементы основания	4	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
Шайбы плоские, сталь	2	версии 18, 30/5, 30/6
Винты для фиксации пластиковых колец	16	версии 20/1, 30/3, 30/4
Винты для фиксации пластиковых колец	20	версии 18, 30/5, 30/6
Винты для фиксации пластиковых колец	24	версии 30/1, 30/2
Винты для крепления центральных фиксаторов боковых ограждений	2	версии 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6
Винты для крепления центральных фиксаторов боковых ограждений	3	версии 30/1, 30/2
Винты для крепления ящиков	6	версии 18, 30/5, 30/6
Пружины	2	версии 18, 30/5, 30/6
Шплинты	2	версии 18, 30/5, 30/6
Основание ящика	1	версии 18, 30/5, 30/6
Опора ящика	1	версии 18, 30/5, 30/6
Ящик	1	версии 18, 30/5, 30/6
Колеса с тормозом	2	все версии
Колеса без тормоза	2	все версии
Ведро (пластик)	1	версии 18, 30/5, 30/6
Таз (нержавеющая сталь)	1	версии 18, 30/5, 30/6
Разделители для ящика	комплект	версии 18, 30/5, 30/6
Бампера	4	версии 20/1, 30/5, 30/6
Направляющие ящиков	комплект	18, 30/5, 30/6
Элемент для установки ведра и таза, пластик	2	18, 30/5, 30/6
Опора для установки ведра и таза, сталь	2	18, 30/5, 30/6

Подготовка к проведению работ

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, плоскогубцы, рожковые ключи 17, 19 мм., киянка.

Работы по сборки рекомендуется проводить на ровной чистой поверхности (при необходимости на дополнительной подложке) в целях снижения риска случайного повреждения поверхности изделия

Порядок проведения работ

- Осмотреть упаковку, убедиться в отсутствии повреждений после транспортировки.
- Открыть коробку, извлечь комплектующие, удалить остатки транспортной упаковки.
- Ознакомиться с внешним видом готового изделия в соответствии с приложением 1.
- Установить торцевые соединительные элементы в угловые отверстия полок.

- Вставить короткие трубки боковых ограждений в торцевые соединительные элементы.
- Установить угловые соединительные элементы
- Вставить длинные трубки боковых ограждений между угловыми соединительными элементами, предварительно соединив их центральным фиксатором над соответствующими отверстиями в полках.
- Закрепить центральные фиксаторы винтами.
- Для версий исполнения 18, 30/5, 30/6:
- Перевернуть одну из полок
- Закрепить опору ящика в соответствующие отверстия на нижней стороне полки
- Установить направляющие
- Установить ящик на направляющие
 - Продеть U-образные опоры резьбовыми отверстиями вниз через отверстия в соединительных элементах полок в сборе. Для версий исполнения 18, 30/5, 30/6 верхняя полка – полка с ящиком.
 - Установить на уровне верхней полки конусные полувтулки, таким образом, чтобы фаска была обращена вверх при нормальном расположении тележки, а упор был установлен в соответствующем отверстии на опоре.
 - Опустить полку на конусные втулки. Убедиться, что конусные втулки установлены в отверстиях полки заподлицо.
 - Надеть на опоры пластиковые кольца. Закрепить их финтами в соответствующие отверстия на нижней поверхности полки.
 - Для версий 18, 30/5, 30/6:
- Надеть на опору элемент для установки таза.
- Установить опору стального кольца для установки таза в отверстие пластикового элемента
- С нижней стороны на опору стального кольца надеть пружину, прижать металлической шайбой, зафиксировать шплинтом.
 - Для версий 18, 30/5, 30/6:
- Надеть на опору элемент для установки ведра.
- Установить опору стального кольца для установки ведра в отверстие пластикового элемента
- С нижней стороны на опору стального кольца надеть пружину, прижать металлической шайбой, зафиксировать шплинтом.
 - Для версий 18, 20/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6:
- Установить крепежные элементы основания на основании.
- Основание в сборе надеть на U-образные опоры снизу.
 - Для версий 20/1, 30/5, 30/6: надеть бампера на U-образные опоры в сборе.
 - Установить колеса при помощи рожкового ключа в резьбовые отверстия U-образных опор в сборе, таким образом, чтобы колеса с тормозом были расположены по диагонали относительно друг друга.
 - Установить тележку в нормальное положение.
 - Для версий 18, 30/5, 30/6:
- Установить таз и ведро на соответствующие опоры.
- Установить в ящики разделители в соответствии с текущими потребностями пользователя.
 - Проверить работоспособность механизмов выдвижения, тормозов колес, колес.

Тележки медицинские моделей: BLQ 002 версии исполнения: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 21, 24, 25, 26,

28, 29, 34, 36

Упаковка оборудования: деревянный ящик.

Таблица № 4. Комплектация оборудования:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Версии исполнения
1	Корпус тележки (в сборе)	1	все версии
2	Колеса с тормозом	4	все версии
3	Ведро открытое (пластик)	1	версии 1,2, 6, 27
4	Ведро с крышкой (пластик)	2	версии 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36
5	Стакан (нержавеющая сталь)	1	версия 1
6	Разделители ящиков	комплект	все версии
7	Ключи	комплект	все версии
8	Инфузионная стойка	1	версии 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36
9	Емкость для дезинфекции	1	версии 28, 29
10	Поддон (пластик)	1	версия 27
11	Полка для дефибриллятора	1	версии 28, 29
12	Подложка для проведения СЛР	1	версии 28, 29
13	Держатель кислородного баллона	1	версии 28, 29

Подготовка к проведению работ

Перед проведением работ специалисту, проводящему работы, следует ознакомиться с текстом настоящей инструкции, а также информацией о комплектации (раздел 1.3) и внешнем виде Оборудования в зависимости от версии исполнения.

Необходимые инструменты: молоток, шлицевая отвертка, плоскогубцы, рожковые ключи 17, 19, 22 мм, перчатки.

Порядок проведения работ

- Осмотреть упаковку, убедиться в отсутствии повреждений после транспортировки.
- Разобрать ящик при помощи молотка, шлицевой отвертки, плоскогубцев. Внимание! Обязательно использование перчаток для защиты рук.
- Извлечь комплектующие из ящика, удалить остатки транспортной упаковки.
- Разместить корпус тележки задней стенкой на ровной чистой поверхности (при необходимости на дополнительной подложке в целях снижения риска случайного повреждения порошкового покрытия в процессе выполнения работ) таким образом, чтобы обеспечить доступ к резьбовым отверстиям на нижней поверхности корпуса.
- Установить колеса в соответствующие отверстия на корпусе тележки при помощи рожкового ключа. Убедиться в их надежной фиксации
- Перевернуть тележку в вертикальное положение колесами вниз.
- Разблокировать ящики при помощи ключей

- Извлечь из ящиков дополнительные комплектующие в соответствии с версией исполнения.
- Установить дополнительные комплектующие на соответствующие подвесы на внешних боковых поверхностях корпуса в соответствии с изображением, приведенным в Приложении 1 и моделью оборудования.
- Установить разделители ящиков в соответствии с текущими потребностями пользователя.
- Проверить работоспособность механизмов выдвижения, тормозов колес.

Использование по назначению

Тележка должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию.

Не рекомендуется устанавливать/хранить тележку вблизи отопительных приборов, близко к сырым стенам, на влажные /сильно загрязненные полы.

Тележка предназначена для использования персоналом медучреждений только в помещениях, имеющих гладкие, ровные полы, без порогов и значительных загрязнений.

Движение, и тормоз

Тележка оснащена колесами, которые могут удовлетворить функцию движения, поворота и торможения.



2023 г.
Версия 01.3

/Обложка/

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ССРП

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА КИТАЯ

ТИСНЕНАЯ ПЕЧАТЬ:

[УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ССРП

(11)]

(ССРП)

01969702

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА КИТАЯ

(QR-код)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 231300B0/005995

ВЫДАНО В ТОМ, ЧТО: печать компании «ХЭБЭЙ ПУКАН МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО., ЛТД.» на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

ТИСНЕНАЯ ПЕЧАТЬ:

[УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ССРП

(11)]

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ПЕЧАТЬ:

[УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ССРП

(11)]

ПЕЧАТЬ:

[УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДЛИННОСТИ

КИТАЙСКИЙ СОВЕТ ПО

СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Уполномоченное лицо с правом подписи:

Лю Ичао /подпись/

Дата: 20 ноября 2023 г.

Веб-сайт для проверки свидетельства: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Стр. 3-41

/Текст документа на русском языке/

Стр. 42

/Текст документа на русском языке/

Овальная печать: Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.
(Хэбэй Пукал Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

переводчик

Контиевская Юлия Алексеевна



Российская Федерация

Город Москва.

Четвертого декабря две тысячи двадцать третьего года.

Я, **Теребков Алексей Владимирович**, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Контиевской Юлии Алексеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/684-н/77-2023- *14-924*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

А.В. Теребков



Всего прошито и пронумеровано
на 44 листах
Нотариус _____

Агентство переводов «Лингво Про», метро Тимирязевская, ул. Всеволода Вишневского, дом 2/7

Телефоны: 8-499-976-11-06 (факс), 8-499-755-56-49,

Site: www.lingvopro.info

Часы работы: пн-чт с 10.00 до 19.00, пт с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00

выходной: воскресенье, прием документов он-лайн.

E-mail: lingvopro@lingvopro.info