

Form No. 2

טופס מס' 2'

**AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF A PERSON
SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATE OR IN THE
NAME OF ANOTHER PERSON**

I, the undersigned Harel Perlmutter Notary holding license no. 220263, hereby certify that on March 18th 2024, appeared before me at my offices located at 58 HaRakevet St, Tel-Aviv-Yafo **Ms. Natalya Goldberg** whose identity has been proven to me by an Israeli ID card number 317843951 issued on December 10th 2017.

And I am convinced that the person standing before me understood fully the significance of the action and voluntarily signed the attached document marked with the letter **A'** on behalf of corporation **MEDEREN NEOTECH LTD** an Israeli private company number 515505329, located at 58 HaRakevet St' Tel-Aviv-Yafo, Israel.

I confirm that I have been submitted with the board of directors resolution dated March 18th 2024, together with an attorney letter issued by Anat Even-Chen, Adv. as written evidence, to my satisfaction, for the purpose of proving her competence to sign as aforesaid.

The enclosed document is drawn up, *intern alia*, in the Russian language and I also certify that a translation of said document into the English language, that is known to me, accompanied by an affidavit by the translator, Anat Even-Chen, Adv. of as to the faithfulness of the translation has been furnished me for inspection and safekeeping.

In witness whereof, I hereby authenticate the signature of **Ms. Natalya Goldberg** by my own signature and seal this day March 18th, 2024

Notary fee 290 NIS (VAT included)

Signature.....

Notary's seal

**אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר**

אני החתום מטה הרצל פרלמוטר נוטריון בעל רישיון מספר 220263 אשר כי ביום 18 במרץ 2024, יצבה לפני כמשדרי שכמען הרכבת 58 תל-אביב-יפו הגבי גולדבג נטליה, שזהותה הוכחה לי על פי תעודת זהות 317843951, שהונפקה ביום 10 בדצמבר 2017.

ושוכנעתי כי הכיצבת בפני הביכה הכנה מלאה אה משמעות וחתמה מרצונה החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות **א'** בשם התאגיד **מדן ואוסק בעיימ ח.פ** 515505329, כתובת הרכבת 58 תל אביב-יפו.

אני מאשר שהוגש לי פרוטוקול ישיבת החברה מיום 18 ביוני 2024, בצירוף אישור עוייד שהוצא על ידי עוייד עות אבו-חן בכתב, להוחת דעתי, לשם הוכחת רשותה לחתום כאמור.

מאשר ואני הרוסית בשפה, היתר בין, ערוד המצורף המסמך הידועה, האוגלית לשפה האמור המסמך שתרגום לי, המלווה בתצהיר של המתורגמות עוייד עות אבו-חן, מרכתובת הרכבת 58 תל-אביב-יפו בדבר ואמנות התרגום, נמסר לי לעיון ולמשמרת.

לראיה אני מאמת את חתימתה של הגבי גולדבג נטליה, בחתימת ידי ובחותמי, היום 18 במרץ, 2024.

שכר נוטריון 290 שייח (כולל מ עיימ).



חתימה

ותם הנוטריון



Mederen Neotech Ltd.
Adress: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ
Mederen Neotech Ltd.
515505329

General Manager Natalya Goldberg
(Генеральный директор Наталья Голдберг)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катетер урологический MEDEREN, стерильный одноразовый, в вариантах исполнения
Версия 5 от 14.03.2024

Оглавление

1 Наименование медицинского изделия	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия	35
3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем....	36
4 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий	36
5 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	36
6 Материалы	93
7 Указания по применению	96
8 Инструкция по применению	96
9 Комплектность	100
10 Упаковка	100
11 Маркировка.....	102
12 Макеты маркировок по группам вариантов исполнения.	105
13 Нормативная документация.....	119
14 Техническое обслуживание, текущий ремонт	120
15 Условия эксплуатации	120
16 Транспортирование	120
17 Хранение	121
18 Гарантийные обязательства	121
19 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	121
20 Контактная информация	121

1 Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия – Катетер урологический MEDEREN,
стерильный одноразовый, в вариантах исполнения

Варианты исполнения:

I Катетер урологический Фолея латексный двухходовой (вид 155670)

1. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 3 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - проводник – 1 шт.;
 - инструкции по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
2. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - проводник – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
3. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - проводник – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
4. Катетер урологический Фолея двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
5. Катетер урологический Фолея двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
6. Катетер урологический Фолея двухходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
7. Катетер урологический Фолея двухходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
8. Катетер урологический Фолея двухходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
9. Катетер урологический Фолея двухходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

10. Катетер урологический Фолея двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт
11. Катетер урологический Фолея двухходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
12. Катетер урологический Фолея двухходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
13. Катетер урологический Фолея двухходовой 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
14. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
15. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
16. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
17. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
18. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
19. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
20. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
21. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

22. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

23. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

24. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

25. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

26. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

27. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

28. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

29. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

30. Катетер урологический Фоля двухходовой с концом по Тиманну, 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

31. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

32. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, 6 Ch/Fr, объем баллона 3 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

33. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием 8 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

34. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

35. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

36. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

37. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

38. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

39. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
40. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
41. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
42. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
43. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
44. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
45. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
46. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
47. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

48. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

49. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

50. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

51. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

52. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

II Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой (вид 155670)

53. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 1,5 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

54. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

55. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- проводник – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

56. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
57. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
58. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
59. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
60. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
61. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
62. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
63. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
64. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

65. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
66. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
67. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
68. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
69. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
70. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
71. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
72. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
73. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

74. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
75. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
76. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
77. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
78. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
79. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
80. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
81. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
82. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

83. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
84. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
85. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
86. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
87. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
88. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
89. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
90. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
91. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

92. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
93. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
94. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
95. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
96. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
97. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
98. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
99. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
100. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

101. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
102. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
103. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
104. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
105. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
106. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
107. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
108. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
109. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

110. Катетер урологический Фоля двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

111. Катетер урологический Фоля двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

112. Катетер урологический Фоля двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

113. Катетер урологический Фоля двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

III Катетер урологический Фоля латексный трехходовой (вид 155670)

114. Катетер урологический Фоля трехходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

115. Катетер урологический Фоля трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

116. Катетер урологический Фоля трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

117. Катетер урологический Фоля трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

118. Катетер урологический Фоля трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

119. Катетер урологический Фоля трехходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

120. Катетер урологический Фолея трехходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
121. Катетер урологический Фолея трехходовой 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
122. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
123. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
124. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
125. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
126. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
127. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
128. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
129. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

130. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном 14 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

131. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном 16 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

132. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 18 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

133. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 20 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

134. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 22 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

135. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 24 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

IV Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой (вид 155670)

136. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

137. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

138. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
139. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
140. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
141. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
142. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
143. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 50 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
144. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
145. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
146. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 70 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

147. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

148. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 60 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

149. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 60 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

150. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 70 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

151. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

152. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 60 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

153. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 60 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

154. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 70 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

155. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

156. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
157. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
158. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 70 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
159. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
160. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
161. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
162. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
163. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
164. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

165. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
166. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
167. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
168. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
169. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
170. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
171. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
172. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
173. Катетер урологический Фоля трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фоля – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

174. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
175. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
176. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
177. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
178. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
179. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
180. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
181. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
182. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

183. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

184. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

185. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

186. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

187. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

188. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

189. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

190. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

191. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

192. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

193. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

194. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

V Катетер урологический для эпицистостомы (вид 125880)

195. Катетер урологический для эпицистостомы 12 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

196. Катетер урологический для эпицистостомы 14 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

197. Катетер урологический для эпицистостомы 16 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

198. Катетер урологический для эпицистостомы 18 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

199. Катетер урологический для эпицистостомы 20 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

200. Катетер урологический для эпицистостомы 22 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

201. Катетер урологический для эпицистостомы 24 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

202. Катетер урологический для эпицистостомы 26 Ch/Fr, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

VI Катетер урологический для нефростомии (вид 125880)

203. Катетер урологический для нефростомии 8Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 1 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
204. Катетер урологический для нефростомии 10 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 1,5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
205. Катетер урологический для нефростомии 12 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 2 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
206. Катетер урологический для нефростомии 14 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 3 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
207. Катетер урологический для нефростомии 16 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
208. Катетер урологический для нефростомии 18 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
209. Катетер урологический для нефростомии 20 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
210. Катетер урологический для нефростомии 22 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
211. Катетер урологический для нефростомии 24 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 5 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
212. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 8 Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 1 мл
- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

213. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 10 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 1,5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

214. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 12 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 2 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

215. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 14 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 3 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

216. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 16 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

217. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 18 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

218. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 20 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

219. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 22 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

220. Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием 24 Ch/Fr
длина 40 см, объем баллона 5 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

VII Катетер урологический Нелатона (вид 209920)

221. Катетер урологический Нелатона 6 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

222. Катетер урологический Нелатона 8 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

223. Катетер урологический Нелатона 10 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

224. Катетер урологический Нелатона 12 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

225. Катетер урологический Нелатона 14 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

226. Катетер урологический Нелатона 16 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

227. Катетер урологический Нелатона 18 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

228. Катетер урологический Нелатона 20 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

229. Катетер урологический Нелатона 22 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

230. Катетер урологический Нелатона 24 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

231. Катетер урологический Нелатона 6 Ch/Fr женский

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

232. Катетер урологический Нелатона 8 Ch/Fr женский

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

233. Катетер урологический Нелатона 10 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
234. Катетер урологический Нелатона 12 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
235. Катетер урологический Нелатона 14 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
236. Катетер урологический Нелатона 16 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
237. Катетер урологический Нелатона 18 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
238. Катетер урологический Нелатона 20 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
239. Катетер урологический Нелатона 22 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
240. Катетер урологический Нелатона 24 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
241. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 6 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
242. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 8 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
243. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 10 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
244. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 12 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

245. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 14 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

246. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 16 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

247. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 18 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

248. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 20 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

249. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 22 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

250. Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 24 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

251. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 6 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

252. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 8 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

253. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 10 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

254. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 12 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

255. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 14 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 256. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 16 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 257. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 18 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 258. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 20 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 259. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 22 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 260. Катетер урологический Нелатона лубрицированный 24 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 261. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 6 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 262. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 8 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 263. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 10 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 264. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 12 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 265. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 14 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
- 266. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 16 Ch/Fr
 - катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

267. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 18 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
268. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 20 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
269. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 22 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
270. Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 24 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
271. Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
272. Катетер урологический Нелатона 8Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
273. Катетер урологический Нелатона 10Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
274. Катетер урологический Нелатона 12Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.
275. Катетер урологический Нелатона 14Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

276. Катетер урологический Нелатона 16Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

277. Катетер урологический Нелатона 18Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

278. Катетер урологический Нелатона 20Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

279. Катетер урологический Нелатона 22Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

280. Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

281. Катетер урологический Нелатона 8Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

282. Катетер урологический Нелатона 10Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

283. Катетер урологический Нелатона 12Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

284. Катетер урологический Нелатона 14Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

285. Катетер урологический Нелатона 16Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

286. Катетер урологический Нелатона 18Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

287. Катетер урологический Нелатона 20Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

288. Катетер урологический Нелатона 22Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

289. Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

290. Катетер урологический Нелатона 8Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

291. Катетер урологический Нелатона 10Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

292. Катетер урологический Нелатона 12Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

293. Катетер урологический Нелатона 14Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

294. Катетер урологический Нелатона 16Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

295. Катетер урологический Нелатона 18Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

296. Катетер урологический Нелатона 20Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

297. Катетер урологический Нелатона 22Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

298. Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

299. Катетер урологический Нелатона 8Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

300. Катетер урологический Нелатона 10Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

301. Катетер урологический Нелатона 12Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

302. Катетер урологический Нелатона 14Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

303. Катетер урологический Нелатона 16Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

304. Катетер урологический Нелатона 18Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

305. Катетер урологический Нелатона 20Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

306. Катетер урологический Нелатона 22Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

2 Сведения о производителе медицинского изделия
Mederen Neotech Ltd. (Медерен Неотех Лимитед),

Address: Harakevet St. 58, Tel-Aviv-Jaffa, Israel, postal code: 6777016,
Corporation number: 515505329, e-mail: info@mederen.com, www.mederen.com (Медерен
Неотек Лтд., ул. Харакевет, 58, Тель-Авив-Яффа, 6777016, Израиль,
Регистрационный номер компании: 515505329, e-mail: info@mederen.com,
www.mederen.com).

3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Изделие предназначено для эвакуации мочи из мочевыводящих путей, когда самостоятельный ее отход невозможен или очень сильно затруднен в связи с травмами или заболеваниями.

Катетеры предназначены для индивидуального применения в условиях медицинских учреждений, машинах скорой помощи, а также в домашних условиях.

4 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

4.1 Показания к применению:

- острая или хроническая задержка мочи;
- недержание мочи;
- необходимость промывания мочевого пузыря, введения в него лекарственных веществ или рентгеноконтрастных веществ;
- диагностические процедуры по измерению объема остаточной мочи;
- необходимость забора мочи в диагностических целях;
- подготовка к оперативным вмешательствам.

4.2 Противопоказания к применению

- травмы, стриктуры, спаечные процессы уретры;
- острый простатит;
- инфекции мочеполовых путей;
- аллергическая реакция на материал изделия.

4.3 Возможные побочные действия – аллергическая реакция на материал изделия.

5 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

5.1 Катетер Фолея

Общая характеристика всех разновидностей катетера Фолея – наличие дистального конца с отверстиями, форма конца, количество отверстий зависит от конфигурации катетера. Также имеется дополнительный тонкий канал для раздувания баллона на конце катетера, предназначенного для фиксации катетера в мочевом пузыре или почечной лоханке. Канал

для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер.
Присоединительный диаметр соединения Луер – $4,0 \pm 0,5$ мм.

Катетер Фолея педиатрический имеет проводник, представляющий собой гибкую направляющую. Длина проводника катетера Фолея силиконового двухходового педиатрического $350,0 \pm 30,0$ мм, диаметр 6 Fr – $0,5 \pm 0,05$ мм, 8 Fr, 10 Fr – $0,7 \pm 0,07$ мм.

Используют этот вид катетеров для выполнения следующих основных задач:

- отведение мочи;
- удаление кровяных сгустков;
- промывание мочевого пузыря;
- введение лекарственных веществ.

Введение в баллон большого количества жидкости позволяет использовать катетер для остановки уретральных кровотечений. При дренировании им почки, для фиксации в баллон нагнетают 4 – 6 мл жидкости. Катетер Фолея выполненный из силикона имеет рентгенконтрастный наконечник и полосу вдоль стержня катетера. Катетер Фолея педиатрический имеет предустановленный проводник, который облегчает его установку. Цветовая маркировка коннектора выполнена согласно международной классификации размеров для всего размерного ряда, что позволяет проводить легкий подбор нужного размера:

- 6 Ch/Fr - розовый
- 8 Ch/Fr - черный
- 10 Ch/Fr - серый
- 12 Ch/Fr - белый
- 14 Ch/Fr - зеленый
- 16 Ch/Fr - оранжевый
- 18 Ch/Fr - красный
- 20 Ch/Fr - желтый
- 22 Ch/Fr - фиолетовый
- 24 Ch/Fr - голубой
- 26 Ch/Fr - розовый
- 28 Ch/Fr - коричневый
- 30 Ch/Fr - серый

Наконечник катетера Фолея может быть стандартным (закрытый конец, два дренажных отверстия), либо иметь иную конфигурацию, см. рис. 1 - 22.


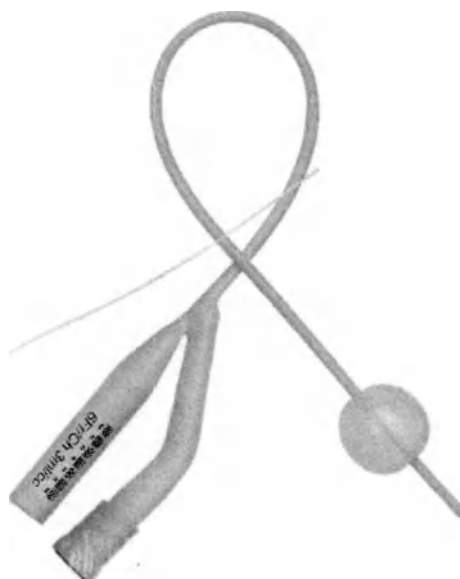


Рисунок 1 – Фотографическое изображение катетера Фолея двухходового педиатрического

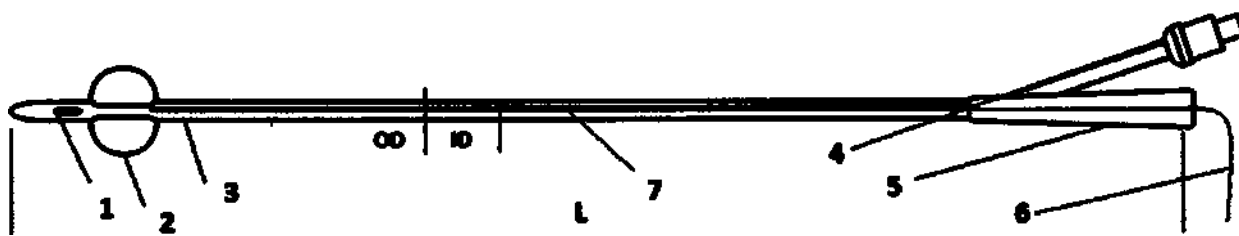

- 1 – Дренажные отверстия
- 2 - Баллон
- 3 – Трубка катетера
- 4 – Канал для раздувания баллона
- 5 – Воронка
- 6 – Проводник
- 7 – Центральный канал
- L – Длина
- OD – Внешний диаметр
- ID – Внутренний диаметр

Рисунок 2 – Схематическое изображение катетера Фолея двухходового педиатрического


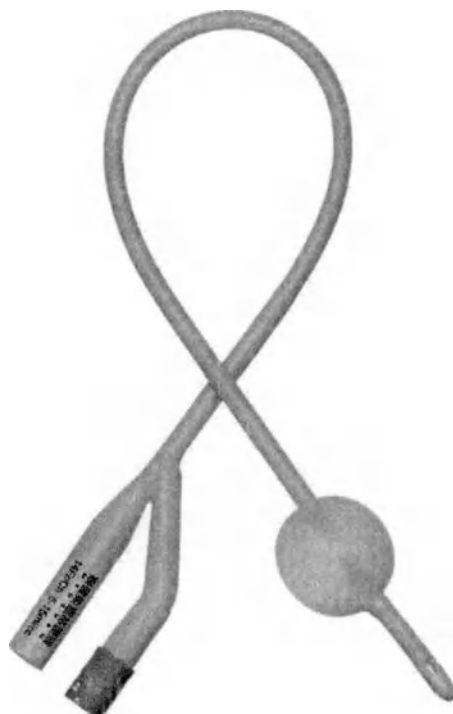


Рисунок 3 – Фотографическое изображения катетера Фолея двухходового

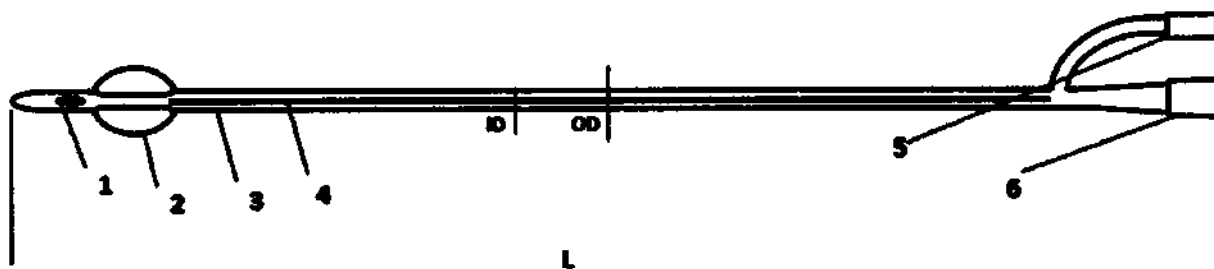

- 1 - Дренажные отверстия
- 2 - Баллон
- 3 - Трубка катетера
- 4 - Центральный канал
- 5 - Канал для раздувания баллона
- 6 - Воронка
- L - Длина
- OD - Внешний диаметр
- ID - Внутренний диаметр

Рисунок 4 – Схематическое изображение катетера Фолея двухходового

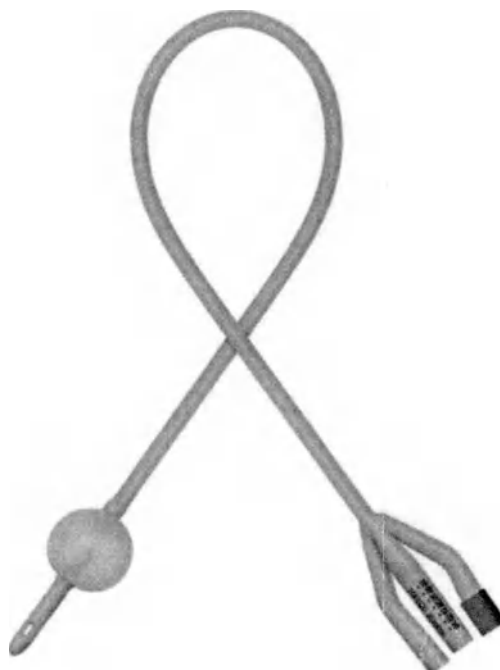


Рисунок 5 – Фотографическое изображение катетера Фолея трехходового




- 1 - Дренажные отверстия
- 2 - Баллон
- 3 - Трубка катетера
- 4 - Центральный канал
- 5 - Воронка
- 6 - Канал для раздувания баллона
- L - Длина
- OD - Внешний диаметр
- ID - Внутренний диаметр

Рисунок 6 – Схематическое изображение катетера Фолея трехходового



Рисунок 7 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея двухходового, тип наконечника Дюфура

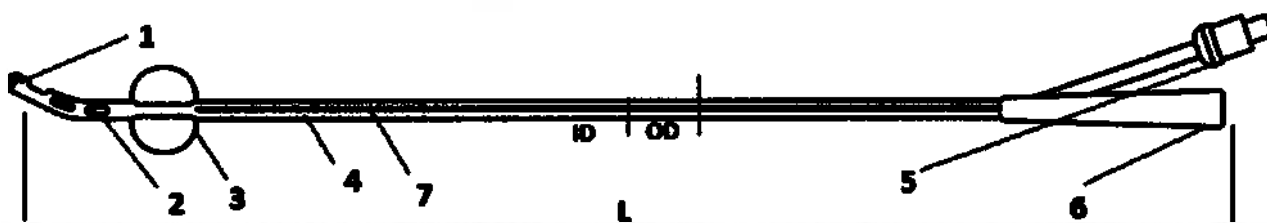


- 1 – Тип дистального конца - Дюфур
- 2 - Дренажные отверстия
- 3 – Баллон
- 4 - Трубка катетера
- 5 - Канал для раздувания баллона
- 6 – Воронка
- 7- Центральный канал
- L – Длина
- OD – Внешний диаметр
- ID – Внутренний диаметр

Рисунок 8 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея двухходового, тип наконечника Дюфура



Рисунок 9 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, тип наконечника Дюфура

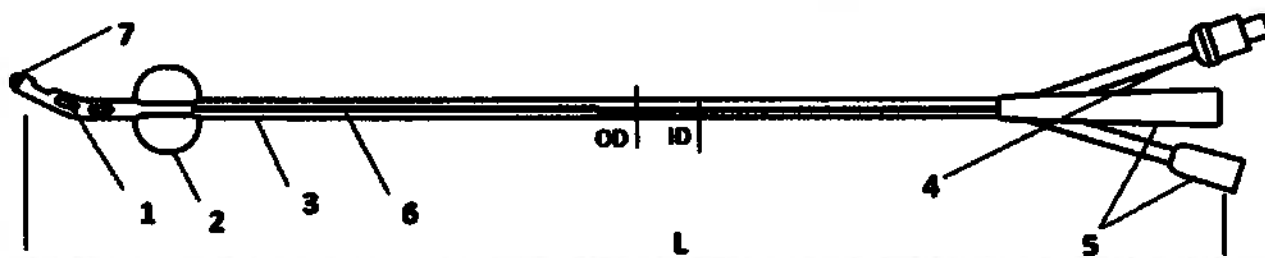


- 1 – Дренажные отверстия
- 2 - Баллон
- 3 – Трубка катетера
- 4 - Канал для раздувания баллона

- 5 - Воронка
 6 – Центральный канал
 7 - Тип дистального конца - Дюфура
 L – Длина
 OD – Внешний диаметр
 ID – Внутренний диаметр

Рисунок 10 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, тип наконечника Дюфура



Рисунок 11 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея двухходового, тип наконечника Кувелера закрытый

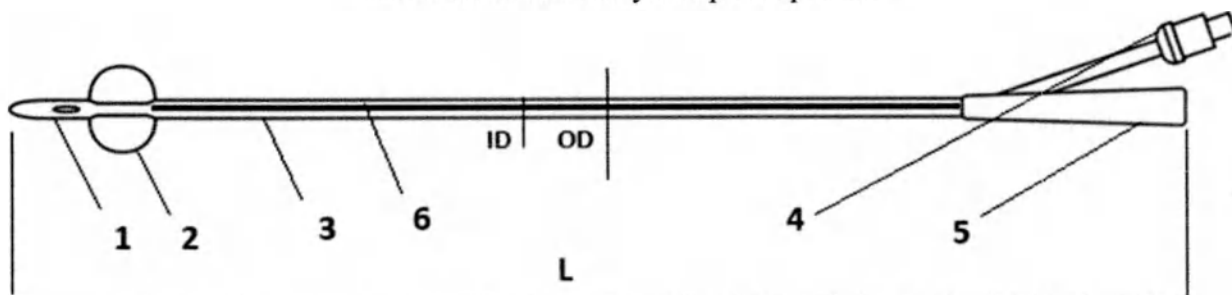


- 1 – Дренажные отверстия
 2 - Баллон

- 3 – Трубка катетера
- 4 - Канал для раздувания баллона
- 5 - Воронка
- 6 – Центральный канал
- L – Длина
- OD – Внешний диаметр
- ID – Внутренний диаметр

Рисунок 12 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея двухходового, тип наконечника Кувелера закрытый



Рисунок 13 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, тип наконечника Кувелера открытый

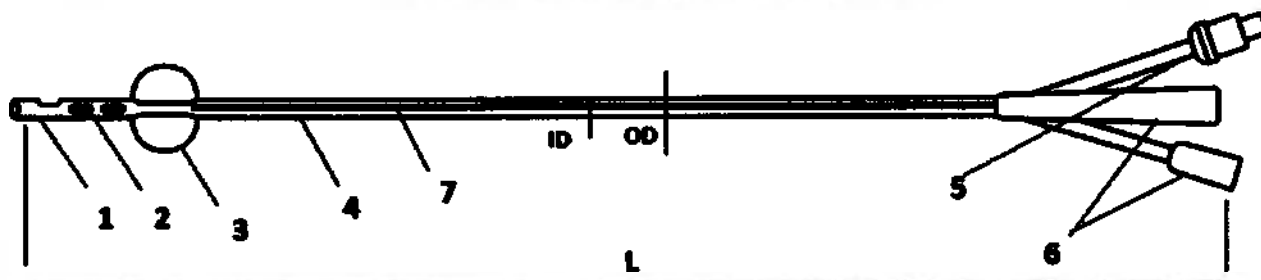

- 1 – Тип дистального конца - Кувелера открытый
- 2 - Дренажные отверстия
- 3 – Баллон
- 4 - Трубка катетера
- 5 - Канал для раздувания баллона

6 – Воронка

7 - Центральный канал

L – Длина


OD – Внешний диаметр

ID – Внутренний диаметр

Рисунок 14 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, тип наконечника Кувелера открытый



Рисунок 15 – Фотографическое изображение катетера урологический Фолея трехходового, тип наконечника Мерсье

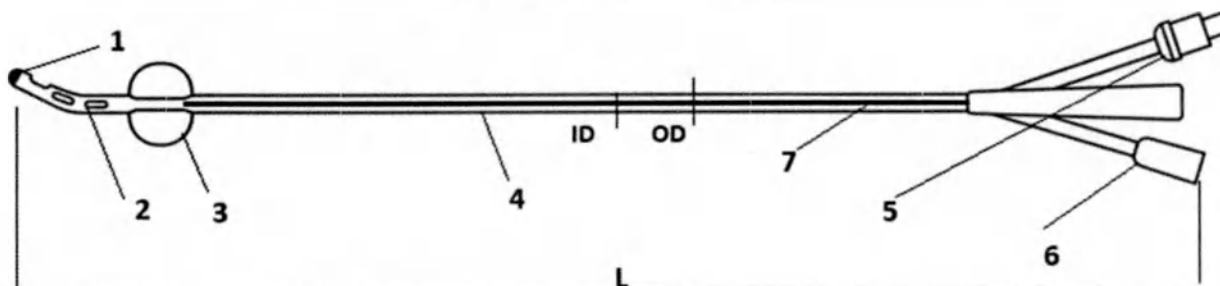

1 – Тип дистального конца - Мерсье

2 - Дренажные отверстия

3 – Баллон

4 - Трубка катетера

5 - Канал для раздувания баллона

6 – Воронка

7 - Центральный канал

L – Длина


OD – Внешний диаметр

ID – Внутренний диаметр

Рисунок 16 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, тип наконечника Мерсье



Рисунок 17 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея трехходового с дополнительным баллоном, объем баллона №1, объем баллона №2

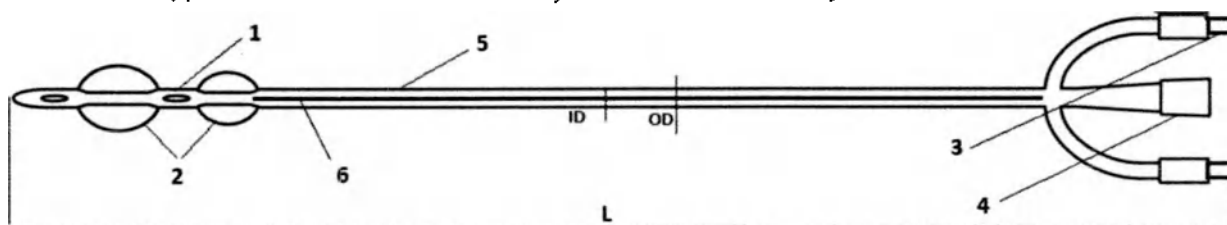

1 - Дренажные отверстия

2- Баллон №1 и №2

3 - Канал для раздувания баллона

4 – Воронка

5 – Трубка катетера

6 – Центральный канал

L – Длина


OD – Внешний диаметр

ID – Внутренний диаметр

Рисунок 18 – Схематическое изображение катетера урологического Фоля трехходового с дополнительным баллоном, объем баллона №1, объем баллона №2



Рисунок 19 – Фотографическое изображение катетера урологического Фоля двухходового с концом по Тиманну

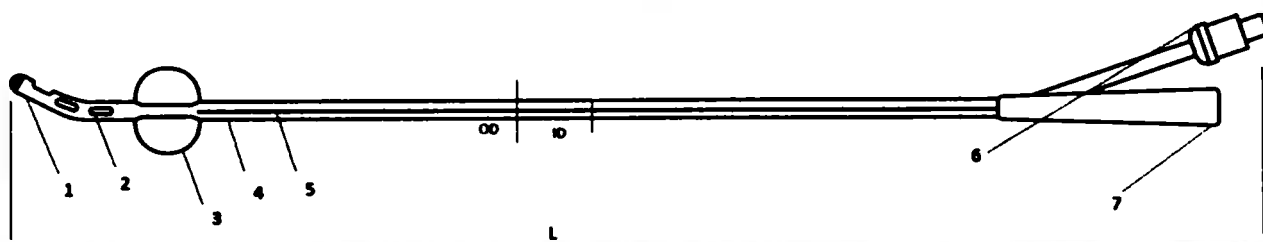

1 – Тип дистального конца - по Тиману

2 – Дренажные отверстия

3 – Баллон


4 - Трубка катетера

- 5 - Центральный канал
- 6 - Канал для раздувания баллона
- 7 - Воронка
- L - Длина
- OD - Внешний диаметр
- ID - Внутренний диаметр

Рисунок 20 – Схематическое изображение катетера урологического Фолея двухходового и трехходового с концом по Тиманну



Рисунок 21 – Фотографическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, цилиндрический наконечник

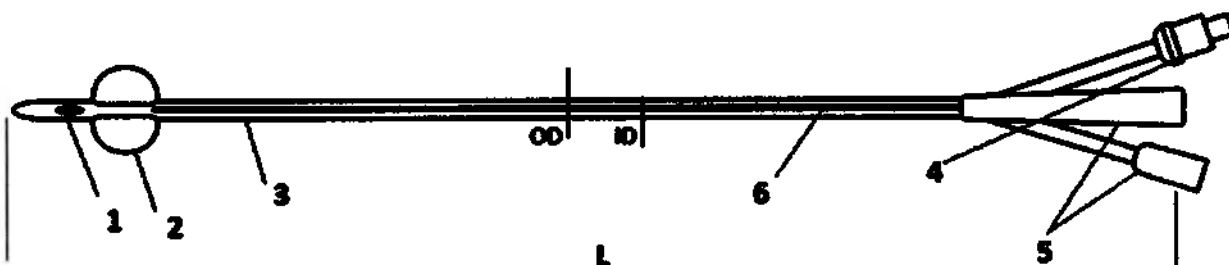

- 1 - Дренажные отверстия
- 2 - Баллон
- 3 - Трубка катетера

- 4 – Центральный канал
 5 – Канал для раздувания баллона
 6 – Воронка
 L – Длина
 OD – Внешний диаметр
 ID – Внутренний диаметр

Рисунок 22 - Схематическое изображение катетера урологического Фолея трехходового, цилиндрический наконечник

5.2 Технические характеристики вариантов исполнения

Таблица 1 - Технические параметры и характеристики катетеров Фолея

Вариант исполнения	Размер по шкале Шарье ра/ Френч, CH/Fr	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Рабочий объем баллона, мл	Скорость потока мл/мин, не менее	Кол-во дренажных отверстий и их габаритные размеры, не менее	Расстояние до дистального конца, мм, не более
I Катетер урологический Фолея латексный двухходовой								
1. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 3 мл	6	0,9±0,09	2,0±0,2	270,0±25,0	3	10	2 отверстия, 2х0,5	5
2. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл	8	1,0±0,1	2,7±0,2	270,0±25,0	3 – 5	15	2 отверстия, 2х0,5	5
3. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл	10	1,1±0,1	3,3±0,3	270,0±25,0	3 – 5	30	2 отверстия, 2х0,5	5
4. Катетер урологический Фолея двухходовой	12	1,5±0,1	4,0±0,4	400,0±40,0	5 – 15	50	2 отверстия, 3х1	9

12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл								
5. Катетер урологический Фолея двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	1,7±0,1	4,7±0,4	400,0±40,0	5 –15	70	2 отверстия, 3х1	9
6. Катетер урологический Фолея двухходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	2,2±0,2	5,3±0,5	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
7. Катетер урологический Фолея двухходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	3,0±0,3	6,0±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
8. Катетер урологический Фолея двухходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	3,5±0,3	6,7±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
9. Катетер урологический Фолея двухходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	3,7±0,3	7,3±0,7	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
10. Катетер урологический Фолея двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	4,0±0,4	8,0±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 6х3	10
11. Катетер урологический Фолея двухходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	4,1±0,4	8,7±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 6х3	10
12. Катетер урологический Фолея двухходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	4,2±0,4	9,3±0,9	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 7х3	10

13. Катетер урологический Фолея двухходовой 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	30	4,2±0,4	10,0±1, 0	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 7х3	10
14. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	1,5±0,1	4,0±0,4	260,0±25,0	5 – 15	50	2 отверст ия, 3х1	10
15. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	1,7±0,1	4,7±0,4	260,0±25,0	5-15	70	2 отверст ия, 3х1	10
16. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	2,2±0,2	5,3±0,5	260,0±25,0	30	100	2 отверст ия, 4х2	10
17. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	3,0±0,3	6,0±0,6	260,0±25,0	30	100	2 отверст ия, 4х2	10
18. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	3,5±0,3	6,7±0,6	260,0±25,0	30	100	2 отверст ия, 4х2	10
19. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	3,7±0,3	7,3±0,7	260,0±25,0	30	100	2 отверст ия, 4х2	10
20. Катетер урологический Фолея двухходовой женский 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	4,0±0,4	8,0±0,8	260,0±25,0	30	100	2 отверст ия, 6х2	10
21. Катетер урологический	26	4,1±0,4	8,7±0,8	260,0±25,0	30	100	2	

Фолея двухходовой женский 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл							отверстия, 6х2	10
22. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	1,5±0,1	4,0±0,0	420,0±40,0	5 –15	50	2 отверстия, 3х1,5	15
23. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	1,7±0,1	4,7±0,4	420,0±40,0	5 –15	70	2 отверстия, 3х1,5	14
24. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	2,2±0,2	5,3±0,5	420,0±40,0	30	100	2 отверстия, 3х1,5	25
25. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	3,0±0,3	6,0±0,6	420,0±40,0	30	100	2 отверстия, 3х1,5	25
26. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	3,5±0,3	6,7±0,6	420,0±40,0	30	100	2 отверстия, 3х1,5	25
27. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	3,7±0,3	7,3±0,7	420,0±40,0	30	100	2 отверстия, 5х2	25
28. Катетер урологический Фолея двухходовой	24	4,0±0,4	8,0±0,8		30	100	2 отверст	25

с концом по Тиманну, 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл				420,0±40,0			ия, 5x2	
29. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	4,1±0,4	8,7±0,8	420,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 5x2	35
30. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	4,2±0,4	9,3±0,9	420,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 5x2	35
31. Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну, 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	30	4,2±0,4	10,0±1, 0	420,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 5x2	35
32. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, 6 Ch/Fr, объем баллона 3 мл	6	0,9±0,0 9	2,0±0,2	270,0±20,0	3	10	2 отверст ия, 2x0,5	5
33. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием 8 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл	8	1,0±0,1	2,7±0,2	270,0±20,0	3 – 5	15	2 отверст ия, 2x0,5	5
34. Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл	10	1,1±0,1	3,3±0,3	270,0±20,0	3 – 5	30	2 отверст ия, 2x0,5	5

35. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	1,5±0,1	4,0±0,4	400,0±40,0	5 –15	50	2 отверстия, 3х1	9
36. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	1,7±0,1	4,7±0,4	400,0±40,0	5 –15	70	2 отверстия, 3х1	9
37. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	2,2±0,2	5,3±0,5	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
38. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	3,0±0,3	6,0±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
39. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	3,5±0,5	6,7±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
40. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	3,7±0,3	7,3±0,7	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 4х2	9
41. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	4,0±0,4	8,0±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 6х3	10

42. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	4,1±0,4	8,7±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 6х3	10
43. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	4,2±0,4	9,3±0,9	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 7х3	10
44. Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	30	4,2±0,4	10,0±1,0	400,0±40,0	30	100	2 отверстия, 7х3	10
45. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	1,5±0,1	4,0±0,4	260,0±25,0	5 – 15	50	2 отверстия, 3х1	10
46. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 14 Ch/Fr, объем баллона 5 – 15мл	14	1,7±0,1	4,7±0,4	260,0±25,0	5 – 15	70	2 отверстия, 3х1	10
47. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	2,2±0,2	5,3±0,5	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 4х2	10
48. Катетер урологический Фолея двухходовой	18	3,0±0,3	6,0±0,6	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 4х2	10

женский с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30мл								
49. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	3,5±0,3	6,7±0,6	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 4x2	10
50. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	3,7±0,3	7,3±0,7	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 4x2	16
51. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	4,0±0,4	8,0±0,8	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 6x2	10
52. Катетер урологический Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	4,1±0,4	8,7±0,8	260,0±25,0	30	100	2 отверстия, 6x2	10
II Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой								
53. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 1,5 мл	6	1,0±0,1	2,0±0,2	310,0±30,0	1,5	10	2 отверстия, 1,5x2	8
54. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой	8	1,8±0,2	2,7±0,2	310,0±30,0	3	15	2 отверстия,	8

педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3 мл							1,5x2	
55. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл	10	2,1±0,2	3,3±0,3	310,0±30,0	3 – 5	30	2 отверст ия, 1,5x2	8
56. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	2,6±0,2	4,0±0,4	400,0±40,0	5 – 15	70	2 отверст ия, 1,5x2	8
57. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	3,1±0,3	4,7±0,4	400,0±40,0	5 – 15	100	2 отверст ия, 4x2	8
58. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
59. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
60. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
61. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 22	22	5,3±0,5	7,3±0,7	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15

Ch/Fr, объем баллона 30 мл								
62. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
63. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	400,0±40,0	30	100	2 отверст ия, 6x2	15
64. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	2,6±0,2	4,0±0,4	240,0±20,0	5 – 15	50	2 отверст ия, 1,5x2	8
65. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	3,1±0,3	4,7±0,4	240,0±20,0	5 – 15	70	2 отверст ия, 4x2	8
66. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	240,0±20,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
67. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	240,0±20,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
68. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой	20	4,7±0,4	6,7±0,6	240,0±20,0	30	100	2 отверст	15

женский, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл							ия, 4x2	
69. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	240,0±20,0	30	100	2 отверст ия, 4x2	15
70. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	12	2,6±0,2	4,0±0,4	400,0±40,0	5 – 15	50	1 отверст ие, 3x2	25
71. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл	14	3,1±0,3	4,7±0,4	400,0±40,0	5 – 15	70	1 отверст ие, 3x2	25
72. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 3x2	25
73. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 3x2	25
74. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 5x2	25

75. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 5x2	25
76. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 6x2	25
77. Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	400,0±40,0	30	100	1 отверст ие, 6x2	25
78. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x2	35
79. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x2	35
80. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x2	35

Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл								
81. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x2	35
82. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x2	35
83. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x2	35
84. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 6x1,5	35
85. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый,	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 6x1,5	35

объем баллона 30 мл								
86. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверстия, 6x1,5	35
87. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 6x1,5	35
88. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверстия, 6x1,5	35
89. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 6x1,5	35
90. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±40,0	5-10	100	3 отверстия, 3x1	35

91. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 3x1	35
92. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверстия, 3x1	35
93. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 3x1	35
94. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверстия, 3x2	35
95. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 3x2	35
96. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22	22	5,3±0,5		450,0±40,0	5-10		3 отверстия	35

Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл			7,3±0,7			100	ия, 3x2	
97. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 3x2	35
98. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x2	40
99. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x2	40
100. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x2	40
101. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x2	40

102. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35
103. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,7	5,3±0,5	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x1	35
104. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35
105. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x1	35
106. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35
107. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 20	20	4,7±0,4		450,0±40,0	30		3 отверст	

Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл			6,7±0,6			100	ия, 2x1	35
108. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35
109. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x1	35
110. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35
111. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверст ия, 2x1	35
112. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	5-10	100	3 отверст ия, 2x1	35

113. Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±40,0	30	100	3 отверстия, 2x1	35
III Катетер урологический Фолея латексный трехходовой								
114. Катетер урологический Фолея трехходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,8	5,3	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4x2	9
115. Катетер урологический Фолея трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,5±0,5	6,0±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4x2	9
116. Катетер урологический Фолея трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	5,1±0,5	6,7±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4x2	9
117. Катетер урологический Фолея трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	5,6±0,5	7,3±0,7	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 4x2	9
118. Катетер урологический Фолея трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	6,2±0,5	8,0±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 6x3	10

119. Катетер урологический Фолея трехходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	6,9±0,6	8,7±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 6х3	10
120. Катетер урологический Фолея трехходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	7,6±0,7	9,3±0,9	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 7х3	10
121. Катетер урологический Фолея трехходовой 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	30	8,3±0,8	10,0±1,0	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 7х3	10
122. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,8±0,3	5,3±0,5	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4х2	9
123. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,5±0,4	6,0±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4х2	9
124. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30мл	20	5,1±0,5	6,7±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 25	2 отверстия, 4х2	9
125. Катетер урологический	22	5,6±0,5	7,3±0,7		30	Ход дренажа		

Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл				400,0±40,0		а - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 4х2	9
126. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	6,2±0,6	8,0±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 6х3	10
127. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	6,9±0,6	8,7±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 6х3	10
128. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	7,6±0,7	9,3±0,9	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 7х3	10
129. Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	30	8,3±0,8	10,0±1,0	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	2 отверстия, 7х3	10
130. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном 14 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл	14	3,3±0,3	4,7±0,4	400,0±40,0	№1 – 30 №2 - 50	100	2 отверстия, 3х1	8
131. Катетер урологический Фолея трехходовой с	16	3,8±0,3	5,3±0,5		№1 – 30 №2 -		2	

дополнительным баллоном 16 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл				400,0±40,0	50	100	отверстия, 3x1	8
132. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 18 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл	18	4,5±0,5	6,0±0,6	400,0±40,0	№1 – 30 №2 - 50	100	2 отверстия, 4x2	8
133. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 20 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл	20	5,1±0,5	6,7±0,6	400,0±40,0	№1 – 30 №2 - 50	100	2 отверстия, 4x2	8
134. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 22 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл	22	5,6±0,5	7,3±0,7	400,0±40,0	№1 – 30 №2 - 50	100	2 отверстия, 4x2	8
135. Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 24 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл	24	6,2±0,6	8,0±0,8	400,0±40,0	№1 – 30 №2 - 50	100	2 отверстия, 4x2	8
IV Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой								
136. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	400,0±40,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации -	2 отверстия 3x1, 1 отверстие	25

						30	0,5x0,5 мм	
137. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	2 отверст ия 3x1, 1 отверст ие 0,5x0,5 мм	25
138. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	2 отверст ия 3x1, 1 отверст ие 1x1 мм	
139. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	22	5,6±0,5	7,2±0,7	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	2 отверст ия 3x1, 1 отверст ие 1x1 мм	25
139. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	24	6,2±0,6	8,0±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	2 отверст ия 3x1, 1 отверст ие 1x1 мм	25
140. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	26	6,9±0,6	8,7±0,8	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	2 отверст ия, 5x2, 1 отверст ие 1x1 мм	30
141. Катетер урологический Фоля силиконовый трехходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл	28	7,6±0,7	9,3±0,9	400,0±40,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции -	2 отверст ия, 5x2, 1 отверст ие 1x1	30

						30	мм	
142. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 50 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	400,0±40,0	50	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	3 отверстия, 3x1	30
143. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 60 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	60	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	3 отверстия, 3x1	30
144. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 60 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	60	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	3 отверстия, 3x1	30
145. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 70 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	70	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	3 отверстия, 3x1	30
146. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 50 мл	26	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	50	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	3 отверстия, 3x1	30

147. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 60 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	30
148. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 60 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	30
149. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера открытый, объем баллона 70 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	70	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	30
150. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 50 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	50	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
151. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 60 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
152. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход	3 отверст	35

Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 60 мл						иррига ции - 30	ия, 3x1	
153. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 70 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	70	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
154. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 50 мл	26	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	50	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
155. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 60 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
156. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 60 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	60	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35
157. Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 70 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	70	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 3x1	35

158. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	5-10	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
159. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
160. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
161. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
162. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35

163. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
164. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	5-10	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
165. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
166. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35
167. Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренажа - 100 Ход ирригации - 30	4 отверстия, 2х2	35

168. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2x2	35
169. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2x2	35
170. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x1	35
171. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x1	35
172. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x1	35
173. Катетер урологический Фолея треходовой	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100	4 отверст	

силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл						Ход иррига ции - 30	ия, 3x1	35
174. Катетер урологический Фоля треходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x2	35
175. Катетер урологический Фоля треходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x2	35
176. Катетер урологический Фоля треходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x2	35
177. Катетер урологический Фоля треходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 3x2	35
178. Катетер урологический Фоля треходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2x2	40

баллона 5-10 мл								
179. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	40
180. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х1	45
181. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Дюфура, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х1	45
182. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
183. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	16	3,7±0,3	5,3±0,5	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35

184. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
185. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	18	4,2±0,4	6,0±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
186. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
187. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 20 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	20	4,7±0,4	6,7±0,6	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
188. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 22 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	4 отверст ия, 2х2	35
189. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 22	22	5,3±0,5	7,3±0,7	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход	4 отверст	35

Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл						иррига ции - 30	ия, 2x2	
190. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 2x2	35
191. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 24 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	24	5,7±0,5	8,0±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 2x2	35
192. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 5-10 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	5-10	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 2x2	35
193. Катетер урологический Фолея треходовой силиконовый 26 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл	26	6,0±0,6	8,7±0,8	450,0±45,0	30	Ход дренаж а - 100 Ход иррига ции - 30	3 отверст ия, 2x2	35

Баллон (если имеется) должен раздуваться максимально равномерно, с отклонением не более 50% при заполнении на обозначенный объем.

Для латексных катетеров:

- длина воронки (воронкообразного катетера) – 50±5 мм
- внутренний диаметр воронки - 7±0,5 мм
- конусность – 1:20

Для силиконовых катетеров:

- длина воронки (воронкообразного катетера) – 50 ± 5 мм
- внутренний диаметр $9 \pm 0,5$ мм
- конусность воронки – 1:15

5.2 Катетер урологический для нефростомии

Катетер предназначен для выведения мочи из почки при невозможном отведении мочи из мочевого пузыря при различных заболеваниях. Его конструкция схожа с катетером Фолея - имеется ход для отведения мочи, канал для раздувания баллона и клапан. Наконечник у катетера для нефростомы открытый, с двумя дренажными отверстиями. Для фиксации катетера в почке, в баллон нагнетают 4-6 мл жидкости. Технические параметры и характеристики на катетеры урологические для нефростомии представлены в таблице 2.


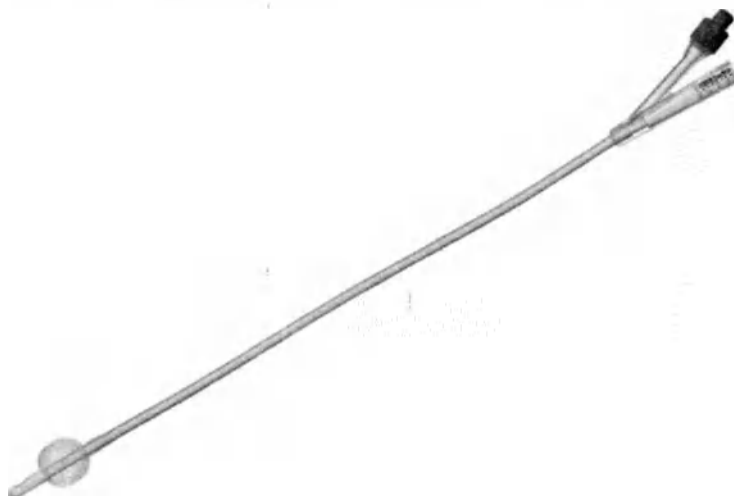


Рисунок 23 – Фотографическое изображение катетера урологического для нефростомии

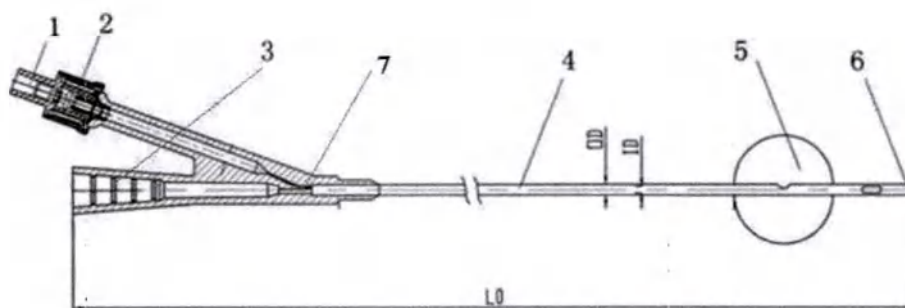

- 1 – Клапан
- 2 – Канал для раздувания баллона
- 3 – Воронка
- 4 – Трубка катетера
- 5 – Баллон
- 6 – Наконечник
- 7 – Проводник
- L0 – Длина

OD – Внешний диаметр

ID – Внутренний диаметр

Рисунок 24 – Схематическое изображение катетера урологического для нефростомии

Таблица 2 - Технические параметры и характеристики на катетеры урологические для нефростомии

CH/Fr	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Параметры									
Внешний диаметр, мм, ±10% мм	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,2	4,7	5,3	5,7
Внутренний диаметр, мм, ±10% мм	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0
Длина, мм	400,0±40,0								
Рабочий объем баллона, мл	1	1,5	2	3	5				
Скорость потока мл/мин, не менее	15	30	50	70	100				

Кол-во дрен.отверстий и их габаритные размеры, не менее	2 отверстия, 1х1		2 отверстия, 1,5х3
Расстояние до дистального конца, не более, мм	8		12
Кол-во дрен.отверстий и их габаритные размеры, не менее*	3 отверстия, 1х1	3 отверстия, 1,5х1,5	
Расстояние до дистального конца, не более, мм*	60		


*Для вариантов исполнения «Катетер урологический для нефростомии с дополнительным отверстием»

5.3 Катетер для эпицистостомы

Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через отверстие в нем методом надлобковой пункции, в случае если введение катетера невозможно через естественные мочевые пути – уретру. Его конструкция схожа с катетером Фолея - имеется ход для отведения мочи, канал для раздувания баллона и клапан. Наконечник у катетера для эпицистостомы открытый, с двумя дренажными отверстиями. Технические параметры и характеристики на катетеры для эпицистостомы представлены в таблице 3.



Рисунок 25 – Фотографическое изображение катетера для эпицистостомы

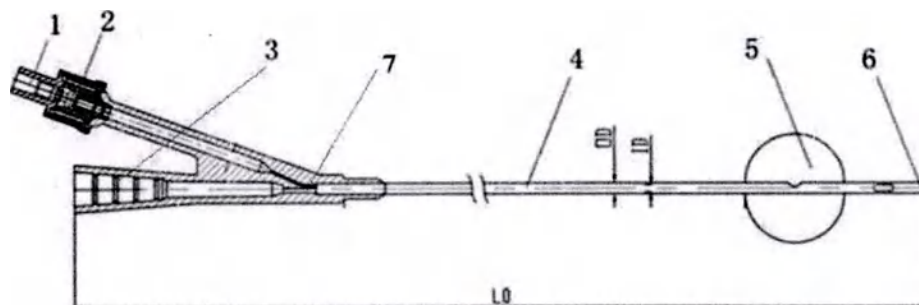

- 1 – Клапан
- 2 – Канал для раздувания баллона
- 3 – Воронка
- 4 – Трубка катетера
- 5 – Баллон
- 6 – Наконечник
- 7 – Центральный канал
- L0 – Длина
- OD – Внешний диаметр

ID – Внутренний диаметр

Рисунок 26 – Схематическое изображение катетера для эпицистостомы

Таблица 3 - Технические параметры и характеристики на катетеры для эпицистостомы

CH/Fr	12	14	16	18	20	22	24	26
Параметры								
Внешний диаметр, мм, ±10% мм	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	8,7	9,2	9,7
Внутренний диаметр, мм, ±10% мм	2,6	3,1	3,7	4,2	4,7	5,3	5,7	6,0
Длина, мм	400,0±40,0							
Рабочий объем баллона, мл	5,0							
Скорость потока мл/мин, не менее	50	70	100					
Кол-во дрен.отверстий и их габаритные размеры, не менее	2 отверстия, 1,5х3 мм					2 отверстия, 4х1	2 отверстия, 6х2	
Расстояние до дистального конца, не более, мм	8	12						

5.4 Катетер урологический Нелатона.

Катетер Нелатона изготовлен из термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) который обладает свойством размягчаться под воздействием температуры тела пациента и тем самым принимает анатомическую форму канала. Катетер Нелатона имеет мягкий закругленный "атравматичный" дистальный конец с двумя боковыми отверстиями-глазками, расположенных "уступом", что обеспечивает наилучший дренаж без риска обтурации катетера. Проксимальный конец катетера состоит из пластикового цветного коннектора для присоединения мочеприемника или типового коннектора. Цветовая

маркировка коннектора выполнена согласно международной классификации размеров для всего размерного ряда, что позволяет проводить легкий подбор нужного размера:

6 Ch/Fr - светло-зеленый

8 Ch/Fr - голубой

10 Ch/Fr - черный

12 Ch/Fr - белый

14 Ch/Fr - зеленый

16 Ch/Fr - оранжевый

18 Ch/Fr - красный

20 Ch/Fr - желтый

22 Ch/Fr - фиолетовый

24 Ch/Fr - темно-синий

Лубрицированные катетеры Нелатона предназначены для более комфортной и безопасной катетеризации интермиттирующего типа и временной катетеризации на срок до 24 часов людям, страдающим нарушением оттока мочи. В качестве лубриканта используется поливинилпирролидон – гидрофильное вещество, облегчающее скольжение. Для вариантов исполнения готовых к использованию упаковка катетера заполнена водой, что позволяет применять изделие без подготовительных процедур. Также существует вариант исполнения катетера лубрицированного с пакетиком-саше с водой, где пакетик расположен внутри упаковки - в этом случае активация гидрофильного покрытия происходит внутри посредством заливания воды из пакетика. Пользователь самостоятельно надавливает на пакетик-саше внутри закрытой упаковки. Для катетеров Нелатона с пакетиком-саше в упаковке имеется полиэтиленовая манжета, предназначенная для более комфортного удерживания катетера. Технические параметры и характеристики для катетеров Нелатона представлены в таблице 4-7.



Рисунок 27 – Схематическое изображение катетера урологического Нелатона

1 – Коннектор (воронкообразный)

2 – Трубка катетера



Рисунок 28 – Схематическое изображение манжеты

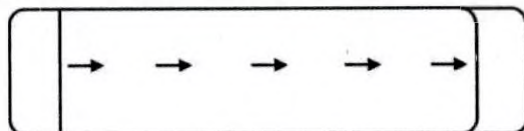


Рисунок 29 – Схематическое изображение пакетика-саше.

Таблица 4 – Технические параметры для катетеров урологических Нелатона женских лубрицированных, пакетик-саше с водой / Катетеров урологических Нелатона женских лубрицированных, готовых к использованию

Наименование параметра	Катетер урологический Нелатона женский лубрицированный, пакетик-саше с водой / Катетер урологический Нелатона женский лубрицированный, готовый к использованию								
Размер трубки, Fr	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Внешний диаметр, мм, ±10% мм	1,05	1,7	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	4,70	5,1
Внутренний диаметр, мм, ±10% мм	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3
Общая длина, мм	180,0±18,0								
Скорость потока мл/мин, не менее	10	15	30	70	100				
Кол-во дрен. Отверстий	2								
Габаритные размеры отверстий, не менее, мм	1,4x1,0			3,3x1,2			4,0x1,2		
Расстояние до дистального конца, не более,	16,0							30,0	

мм		
Длина воронки (воронкообразно го коннектора), мм	37,0±3,5	
Внутренний диаметр коннектора, мм	9,5±1,0	
Габаритные размеры манжеты (длина х ширина), мм*	76,0х20,0 допустимые отклонения ± 10%	
Габаритные размеры пакетика-саше (длина х ширина), мм*	74,0х28,0 допустимые отклонения ± 10%	
Объем воды в пакетике саше, мл	4,0 ± 1,0	
Объем воды в индивидуальной упаковке катетера готового к использованию, мл	4,0 ± 1,0	

* Для вариантов исполнения «Катетер урологический Нелатона женский лубрицированный, пакетик-саше с водой»

Таблица 5 - Технические параметры для Катетеров урологических Нелатона лубрицированных женских / Катетеров урологических Нелатона женских

Наименование параметра	Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский / Катетер урологический Нелатона женский									
Размер трубки, Fr	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Внешний диаметр,	1,05	1,7	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	4,7	5,1	5,6

мм, ±10% мм										
Внутренний диаметр, мм, ±10% мм	2	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0
Общая длина, мм	180,0±18,0									
Скорость потока мл/мин, не менее	10	15	30	70	100					
Кол-во дрен. Отверстий	2									
Габаритные размеры отверстий, не менее, мм	1,4x1,0			3,0x1,0				4,2x1,4		
Расстояние до дистального конца, не более, мм	25							50		
Длина воронки (воронкообразного коннектора), мм	37,0±3,5									
Внутренний диаметр коннектора, мм	9,5±1,0									

Таблица 6 - Технические параметры для Катетов урологических Нелатона лубрицированных, готовых к использованию/ Катетеров урологических Нелатона лубрицированных / Катетеров урологических Нелатона лубрицированных, пакетик-саше с водой

Наименование параметра	Катетер урологический Нелатона лубрицированный, готовый к использованию/ Катетер урологический Нелатона лубрицированный / Катетер урологический Нелатона лубрицированный, пакетик-саше с водой									
Размер трубки, Fr	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Внешний диаметр, мм, $\pm 10\%$ мм	1,05	1,7	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	4,70	5,1	5,6
Внутренний диаметр, мм, $\pm 10\%$	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0

мм										
Общая длина, мм	400±40,0									
Скорость потока мл/мин, не менее	10	15	30	70	100					
Кол-во дрен. Отверстий	2									
Габаритные размеры отверстий, не менее	1,4x1,0			3,0x1,3						
Расстояние до дистального конца, не более	20							40		
Длина воронки (воронкообразного коннектора), мм	37,0±3,5									
Внутренний диаметр коннектора, мм	9,5±1,0									
Габаритные размеры манжеты (длина x ширина), мм*	76,0x20,0 допустимые отклонения ± 10%									
Габаритные размеры пакетика- саше (длина x ширина), мм*	103,0x28,0 допустимые отклонения ± 10%									
Объем воды в пакетике саше, мл	10,0 ± 1,0									
Объем воды в индивидуальной упаковке катетера готового к использованию, мл	10,0 ± 1,0									

* Для вариантов исполнения «Катетер урологический Нелатона лубрицированный, пакетик-саше с водой»

Таблица 7 - Технические параметры для Катетеров урологических Нелатона/ Катетеров урологических Нелатона с концом по Тиманну

Наименование параметра	Катетер урологический Нелатона/ Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну									
Размер трубки, Fr	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Внешний диаметр, мм, ±10% мм	1,05	1,65	2,1	2,7	3,2	3,7	4,3	4,7	5,1	5,6
Внутренний диаметр, мм, ±10% мм	2	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0
Общая длина, мм	400,0±40,0									
Скорость потока мл/мин, не менее	10	15	30	50	70	100				
Кол-во дрен. Отверстий	2									
Габаритные размеры отверстий, не менее, мм	3x1							4x2		
Расстояние до дистального конца, не более, мм	25							50		
Длина воронки (воронкообразного коннектора), мм	37,0±3,5									
Внутренний диаметр коннектора, мм	9,5±1,0									

Прочностные характеристики

Твердость по Шору для силиконовых катетеров – не менее 55 А, для латексных – не менее 30 А, для катетеров Нелатона – не менее 60 А.

Для катетеров, изготовленных из силикона:

- прочность при растяжении не менее 50 Н;
- относительное удлинение при разрыве не менее 200 %;
- прочность соединения деталей не менее 40 Н.
- давление разрыва для катетера 70 ± 10 (кН/м)

Для катетеров, изготовленных из латекса:

- прочность при растяжении не менее 40 Н;
- относительное удлинение при разрыве не менее 100 %;
- прочность соединения деталей не менее 40 Н.
- давление разрыва для катетера 70 ± 10 (кН/м)

Для катетеров Нелатона:

- прочность при растяжении, не менее: для размеров $\geq 12\text{Fr}$ – 10Н, для размеров $\leq 10\text{Fr}$ – 7.5Н
- относительное удлинение при разрыве не менее 200 %;
- прочность соединения деталей не менее 40 Н.
- давление разрыва для катетера - 70 ± 10 (кН/м)

6 Материалы

Материалы, из которых изготовлены катетеры в соответствии с таблицей ниже.

	Материал	Марка	Изготовитель
Катетеры Фолея (латексные)			
Клапан	Поливинилхлорид	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Полипропилен	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Акрилбутадиенстирол	PA-757	Chi mei corporation, Taiwan
	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
	Нержавеющая сталь	AISI 304	China Yangzhou Guotai Co., Ltd., China
Канал для раздувания баллона	Латекс	CTO3	Revultex, Malaysia

Воронка	Латекс	CTO3	Revultex, Malaysia
Трубка катетера	Латекс	CTO3	Revultex, Malaysia
Силиконовое покрытие	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
Баллон	Латекс	CTO3	Revultex, Malaysia
Проводник	Полипропилен	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
Катетеры Фолея (силиконовые), катетеры для эпицистостомы, катетеры для нефростомии			
Клапан	Поливинилхлорид	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Полипропилен	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Акрилбутадиенстирол	PA-757	Chi mei corporation, Taiwan
	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
	Нержавеющая сталь	AISI 304	China Yangzhou Guotai Co., Ltd., China
Канал для раздувания баллона	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
Воронка	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
Трубка катетера	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
Баллон	Силикон	SAG-RT	Shenzhen Square Co.,Ltd, China
Проводник	Полипропилен	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
Общая информация для катетеров Фолея			
Рентгеноконтрастная линия (для катетеров из латекса рентгеноконтрастный материал присутствует в	Бария Сульфат	3MSA05532S0FS1	NANYA (НАНЬЯ), Тайвань

материале катетера)			
Лубрикант	Поливинилпирролидон	NKY-21	NKY, Pharmaceuticaks Ltd., USA
Катетеры Нелатона			
Коннектор	Поливинилхлорид	M-3082	British Plastics Federation, UK
Трубка катетера	Поливинилхлорид	M-3082	British Plastics Federation, UK
Лубрикант	Поливинилпирролидон	NKY-21	NKY, Pharmaceuticaks Ltd., USA
Наполнитель для саше	Вода	NKY-21	NKY, Pharmaceuticaks Ltd., USA
Манжета	Полиэтилен	Ruiqian	Jiangshu Ruiqian Plastic Factory, China.
Красители (приведена информация для основных ветов, дополнительные образуются путем смешивания данных красителей)			
Черный	Pigment Black 7 (Black L 32)	Clariant, Швецария	
Белый	Pigment White 6 (Colanyl White R 100)		
Красный	Pigment red 285 (Red HGR)		
Желтый	pigment yellow 191 (Yellow H2GR)		
Синий	pigment blue 15:1 (BlueA4R)		

7 Указания по применению

Общие положения

1. Перед работой с изделием ознакомьтесь с данным руководством.
2. Изделия предназначены для использования врачом-специалистом.

Требования безопасности

1. Не используйте после истечения срока годности.
2. Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена.
3. Не используйте, если видны какие-либо признаки повреждения изделия или имеются какие-либо загрязнения.
4. Не используйте повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.
5. Повторная обработка или повторная стерилизация могут повредить изделие и повлиять на его целостность, что при повторном использовании может привести к возможному ухудшению здоровья и угрожать безопасности пациентов.
6. При применении совместно с рентгенконтрастным веществом или совместно с другим инструментарием, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений медицинского изделия.
7. Методы использования могут быть скорректированы врачом-специалистом.

Установка и способ применения

Подготовка к использованию

1. Произведите антисептику кожи рук и наденьте перчатки.
2. Перед использованием необходимо внимательно осмотреть изделие, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо видимых повреждений.
3. При использовании катетера Нелатона с саше-пакетиком, перед началом его применения необходимо водный раствор из саше-пакетика вылить в блистер с катетером, тем самым активируя покрытие катетера.

8 Инструкция по применению

1. После предварительной обработки наружных половых органов произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым урологическим катетером, взяв стерильный катетер в руку ближе к дистальному концу (4-5 см);
2. Свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки;
3. Обработать вводимый конец катетера смазкой на водной основе (для катетеров с гидрофильным покрытием (лубрицированный) необходимо активировать покрытие при помощи дистиллированной воды или лубрикантом);
4. Ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
5. После введения катетера, необходимо присоединить свободный конец к мочеприемнику или же опустить в емкость для сбора мочи;

6. Шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема используя дистиллированную воду или физиологический раствор (при использовании катетера Нелатона, данное действие не проводится);
7. По окончании выведения мочи шприцем убрать дистиллированную воду или физраствор из фиксирующего баллона;
8. Катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки;
9. Промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном.



ВНИМАНИЕ! При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации дистиллированной воды или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяет беспрепятственно извлечь катетер.



Применять с осторожностью у лиц с повышенной чувствительностью к натуральному латексу (предупреждение для катетеров, изготовленных из натурального латекса).

7.1 Инструкция по применению катетеров урологических для эпицистостомии:

1. Катетер урологический для эпицистостомии устанавливается чрескожно, (напрямую в мочевого пузыря методом надлобковой пункции);
2. После того как провели необходимые манипуляции формирования канала в мочевого пузыря через надлобковую пункцию, или уже ранее был этот канал, необходимо ввести сам катетер;
3. После введения катетера, необходимо присоединить свободный конец к мочеприемнику или же опустить в емкость для сбора мочи;
4. Далее при помощи шприца присоединить его к каналу для раздувания баллона и «раздуть» фиксирующий баллон до соответствующего объема указанного на канале катетера, используя дистиллированную воду или физиологический раствор;
5. После того, как при помощи катетера отвели мочу из почки, необходимо шприцем «сдуть» фиксирующий баллон и извлечь жидкость из него. При длительном использовании катетера для нефростомии необходимо наложить специальную фиксирующую стерильную повязку, которая будет препятствовать смещению катетера.
6. Как только баллон будет сдут, необходимо извлечь катетер;



7. После того как извлекли катетер, необходимо отверстие на коже от нефростомического катетера закрыть пластырем, или сшить шовной нитью края раны.

7.2 Инструкция по применению катетеров урологических для нефростомии.

1. Катетер урологический для нефростомии устанавливается чрескожно, (напрямую в почку), по методике установки нефростомического дренажа. Устанавливается катетер для нефростомии совместно с использованием, к примеру струны-проводника, дилататоров и других изделий;

2. После того, как провели необходимые манипуляции формирования канала в почку, необходимо ввести сам катетер;

3. После введения катетера, необходимо присоединить свободный конец к мочеприемнику или же опустить в емкость для сбора мочи;

4. Далее при помощи шприца присоединить его к каналу для раздувания баллона и «раздуть» фиксирующий баллон до соответствующего объема указанного на канале катетера, используя дистиллированную воду или физиологический раствор;

5. После того, как при помощи катетера отвели мочу из почки, необходимо шприцем «сдуть» фиксирующий баллон и извлечь жидкость из него.

6. Как только баллон будет сдут, необходимо извлечь катетер;

После того как извлекли катетер, необходимо отверстие на коже от нефростомического катетера закрыть пластырем, или сшить шовной нитью края раны.

7.3 Инструкция по применению катетеров урологических Нелатона

1. После предварительной обработки наружной части мочеполовой системы произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым урологическим катетером, взяв стерильный катетер в руку ближе к дистальному концу (4-5 см);

2. Обработайте вводимый конец катетера смазкой на водной основе

- при использовании катетеров Нелатона лубрицированных необходимо активировать поверхность катетера при помощи жидкости или лубриканта;

- при использовании катетеров Нелатона лубрицированных с пакетиком-саше необходимо активировать покрытие, нажав внутри упаковки на пакетик с жидкостью. Таким образом жидкость разольется внутри закрытой упаковки катетера и поверхность катетера после вскрытия будет уже скользкой, что позволит сразу ввести в мочеиспускательный канал;



- при использовании катетеров Нелатона лубрицированных, готовых к использованию, жидкость для активации гидрофильного покрытия уже находится внутри упаковки, поэтому после вскрытия его сразу же можно вводить в мочеиспускательный канал.

3. Вводите катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи из проксимального конца катетера.

4. После введения катетера, необходимо присоединить свободный конец к мочеприемнику или же опустить в емкость для сбора мочи;

5. После того, как при помощи катетера отвели мочу из мочевого пузыря, необходимо извлечь катетер.

6. После извлечения катетера, необходимо промокнуть отверстие мочеиспускательного канала стерильным тампоном.

После того как изделие будет использовано, утилизируйте его в соответствии с разделом «Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия».

Рекомендации по уходу за установленным катетером:

1. После того, как катетер был установлен и присоединен к мочеприемнику, для сбора выделяемой мочи в мешок. Соединение катетера с мочеприемником происходит посредством универсального коннектора типа «елочка» на трубке мочеприемника и универсального воронкообразного коннектора у катетера.

2. После того, как катетер и мочеприемник присоединены друг к другу необходимо следить за тем, чтобы трубка катетера и трубка мочеприемника были плотно соединены друг с другом, не перекручивались и не перегибались, не было разрывов или подтеканий.

3. Кожа в месте установки катетера должна быть сухой, чистой, без воспалений. Для этого необходимо несколько раз в день обмывать участок около катетера водой и мылом, либо же использовать растворы антисептиков и мази по назначению лечащего врача.

4. Пациентам с установленным катетером для цистостомы необходимо следить, чтобы мочеприемник был расположен ниже мочевого пузыря. Если пациент мобилен и ведет активную жизнь, рекомендуется использовать мочеприемники носимые/ножные с фиксацией на ноге при помощи эластичных ремней. Для лежачих пациентов или для ночного сна можно использовать мочеприемники прикроватные, расположенные ниже мочевого пузыря. Они должны быть прочно зафиксированы.

5. Пациентам с установленным катетером для нефростомии необходимо следить, чтобы катетер не был «выдернут». Необходимо следить за движениями, рывками и активной физической нагрузкой, чтобы исключить риск самостоятельного удаления катетера.

6. Гигиена: только душ. Пациентам категорически не рекомендуется принимать ванны, плавать, посещать бани и сауны.

7. Пациентом должен соблюдаться питьевой режим – пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день.

8. Пациенты или лица, отвечающие за их уход, ни в коем случае не должны самостоятельно вводить какие-либо растворы в полость мочевого пузыря или почки. Это может привести к развитию инфекционно-воспалительных заболеваний и тяжелым осложнениям.

9. Если катетер стал плохо работать или стал непроходим, следует обратиться к лечащему врачу.

10. Мочеприемник необходимо регулярно опустошать, не допуская его максимального наполнения. В среднем, мочеприемники объемом более 1,5 л следует сливать каждые 8 часов, малые (объемом 0,5-1 л) – каждые 3-4 часа. Мочу из мочеприемника нужно сливать через специальный клапан.

11. Катетер урологический необходимо регулярно менять. Оптимально – 1 раз в неделю. Главное – не реже 1 раза в 30 дней, в зависимости от материала изготовления катетера.

12. Мочеприемник тоже рекомендуется менять – каждые 24-48 часов. Если такой возможности нет – не реже 1 раза в неделю.

После того как изделие будет использовано, утилизируйте его в соответствии с разделом «Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия».

9 Комплектность

Наименование	Количество, шт.
1 Катетер урологический MEDEREN в зависимости от варианта исполнения	1
2 Пакетик-саше*	1
3 Инструкция по применению	1 шт на каждые 10 шт
4 Индивидуальная упаковка	1 шт

* Для вариантов исполнения катетеров с пакетиком-саше

10 Упаковка

8.1 Упаковка для катетеров урологических Фоля

Катетеры укладываются во внутреннюю индивидуальную упаковку, изготовленную из ПЭ, далее изделие укладывается в индивидуальную упаковку, изготовленную из бумаги медицинской и полиэтилена, в количестве 1 шт.

Габаритные размеры и масса индивидуальной упаковки:

- габаритные размеры (длина × диаметр × толщина), мм, не более – 550,0×80,0×1,0
- масса упаковки с изделием, не более – 60 г.

Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в групповую упаковку на основе картона в количестве не более 30 шт. Габаритные размеры и масса групповой упаковки:

- габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более – 550,0×110,0×60,0 мм;
- масса, не более – 1800 г.

Упакованное в групповую упаковку изделия, укладывают в транспортную тару представляющую собой коробку из трехслойного гофрированного картона (толщиной 0,4 – 1,0 мм), в количестве не более 400 шт. Габаритные размеры и масса транспортной тары:

- габаритные размеры (длина × ширина × толщина), мм, не более – 580,0×400,0×500,0 мм;
- масса, не более – 24 кг.

9.2 Упаковка катетеров урологических Нелатона (за исключением готовых к использованию).

Катетеры укладываются в индивидуальную упаковку, изготовленную из бумаги медицинской и полиэтилена, в количестве 1 шт.

Габаритные размеры и масса индивидуальной упаковки:

- габаритные размеры (длина × диаметр × толщина), мм, не более – 510,0×60,0×1,0
- масса упаковки с изделием, не более – 60 г.

Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в групповую упаковку на основе картона в количестве не более 30 шт. Габаритные размеры и масса групповой упаковки:



- габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более – 600,0×130,0×100,0 мм;
- масса, не более – 1800 г.

Упакованное в групповую упаковку изделия, укладывают в транспортную тару представляющую собой коробку из трехслойного гофрированного картона (толщиной 0,4 – 1,0 мм), в количестве не более 400 шт. Габаритные размеры и масса транспортной тары:

- габаритные размеры (длина × ширина × толщина), мм, не более - 600×350×530 мм;
- масса, не более – 24 кг.

9.3 Упаковка катетеров урологических Нелатона готовые к использованию.

Катетеры укладываются в индивидуальную упаковку, изготовленную из фольги, в количестве 1 шт.

Габаритные размеры и масса индивидуальной упаковки:

- габаритные размеры (длина × диаметр × толщина), мм, не более – 510,0×62,0×1,0
- масса упаковки с изделием, г., не более – 60 г.

Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в групповую упаковку на основе картона в количестве не более 30 шт. Габаритные размеры и масса групповой упаковки:

- габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более – 600,0×130,0×100,0 мм;
- масса, не более – 1800 г.

Упакованное в групповую упаковку изделия, укладывают в транспортную тару представляющую собой коробку из трехслойного гофрированного картона (толщиной 0,4 – 1,0 мм), в количестве не более 400 шт. Габаритные размеры и масса транспортной тары:

- габаритные размеры (длина × ширина × толщина), мм, не более - 620×350×400 мм;
- масса, не более – 24 кг.

11 Маркировка



11.1 На медицинское изделие нанесена следующая маркировка (для всех медицинских изделий, кроме всех вариантов исполнения катетеров Нелатона):

- информацию о производителе МИ;
- размер катетера;
- объем баллона.

11.2 На индивидуальную упаковку изделия нанесена следующая маркировка:

- наименование изделия;
- адрес и наименование производителя и изготовителя (обозначено соответствующим символом);
- код партии (обозначено соответствующим символом);
- размер изделия;
- количество изделий в упаковке;
- дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
- маркировка "Изделие рентгеноконтрастно" (только для катетеров Фоля силиконовых);
- сведения о стерильности (обозначено соответствующим символом);
- сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);
- информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии при декларировании соответствия (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

11.3 На групповую упаковку изделия нанесена следующая маркировка:

- наименование изделия;
- адрес и наименование производителя и изготовителя (обозначено соответствующим символом);
- код партии (обозначено соответствующим символом);
- размер изделия;
- количество изделий в упаковке;



- дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
- маркировка "Изделие рентгеноконтрастно" (только для катетеров Фолея силиконовых);
- сведения о стерильности (обозначено соответствующим символом);
- сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);
- информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии при декларировании соответствия (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

11.4 На транспортную упаковку нанесена следующая маркировка:

- наименование изделия;
- адрес и наименование производителя и изготовителя (обозначено соответствующим символом);
- код партии (обозначено соответствующим символом);
- размер изделия;
- количество изделий в упаковке;
- дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- маркировка "Изделие рентгеноконтрастно" (только для катетеров Фолея силиконовых);
- дата истечения срока годности (обозначено символом «Использовать до ...»);
- сведения о стерильности (обозначено соответствующим символом);
- сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом);
- информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);



- информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- информация о соответствии при декларировании соответствия (обозначено соответствующим символом);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

12 Макеты маркировок по группам вариантов исполнения.

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
 Катетер урологический Фолея двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт




Производитель: «Медерен Никотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel; info@mederen.com. Завод-производитель: Ningbo Grinicare Trading Co., Ltd. Адрес: Unit 55, Building 12, No. 818, Gaoxing Road, Youshi, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея двухходовой



Кол-во: 1 шт.
 РУ № РЗН 2022/18426 от 04.10.2022

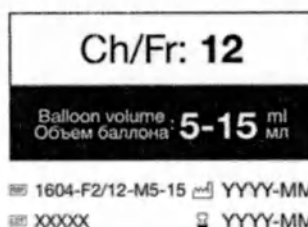

Open here
 Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
 Катетер урологический Фолея двухходовой женский 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт






Проектирование: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd.
 Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel.
 info@mederen.com. Завод-производитель: Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 816, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY FEMALE FOLEY CATHETER

RUS Катетер Фолея двухходовой женский

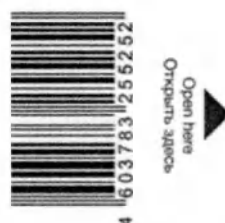


Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
 Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Проектирование: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd.
 Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel.
 info@mederen.com. Завод-производитель: Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 816, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY FOLEY CATHETER WITH TIEMANN TIP

RUS Катетер урологический Фолея двухходовой с концом по Тиманну

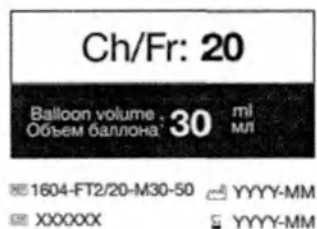

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
 Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;







Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com



Производитель: «Медерен Нестек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Заказ-контракт: «Нинбо Грейтсэя Трейдиг Ко. Лтд.» Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой




Изделие
рентгено-
контрастно

Кол-во: 1 шт.
ПУ № РЗН 2022/18426
от 04.10.2022

Ch/Fr: 22

Balloon volume . 30 ml
Объем баллона

1604-SF2/22-M30-50 YYY-MM
XXXXX YYY-MM

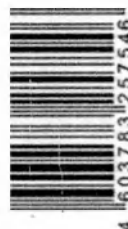

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский, 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Производитель: «Медерен Нестек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Заказ-контракт: «Нинбо Грейтсэя Трейдиг Ко. Лтд.» Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY FEMALE SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой женский




Изделие
рентгено-
контрастно

Кол-во: 1 шт.
ПУ № РЗН 2022/18426
от 04.10.2022

Ch/Fr: 16

Balloon volume . 30 ml
Объем баллона

1604-SF2/16-F30-50 YYY-MM
XXXXX YYY-MM

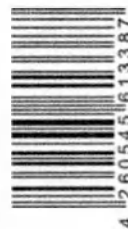

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну, 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



лист 108
из листов 121



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com



2-WAY SILICONE FOLEY CATHETER WITH TIEMANN TIP

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Медерен Неотек Лтд, Адрес: Харакевет Ст. 58, Тел: Ашд-Яффа, 6777016, Israel, info@mederen.com, Завод-производитель: «Нинбо Гринтекс Трединг Ко. Лтд.» Ningbo Greintex Trading Co., Ltd., Адрес: Уни 93, Building 12, No. 818, Gaoxing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника
Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



2-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Медерен Неотек Лтд, Адрес: Харакевет Ст. 58, Тел: Ашд-Яффа, 6777016, Israel, info@mederen.com, Завод-производитель: «Нинбо Гринтекс Трединг Ко. Лтд.» Ningbo Greintex Trading Co., Ltd., Адрес: Уни 93, Building 12, No. 818, Gaoxing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый, тип наконечника Кувелера закрытый



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника
Дюфура, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



лист 109
из листов 121



Mederen Neotech Ltd.

Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Corporation number: 515505329



www.mederen.com • info@mederen.com



Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Закупщик/поставщик: «Нинбо Грейскаре Трейдинг Ко. Лтд.» Ningbo Greiscare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Gensing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый, тип наконечника Дюфура

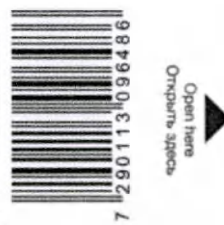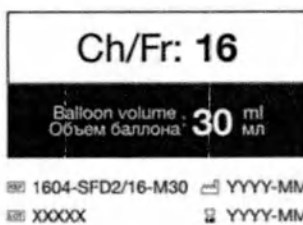

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье, объем баллона 30 мл



- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Закупщик/поставщик: «Нинбо Грейскаре Трейдинг Ко. Лтд.» Ningbo Greiscare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Gensing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

2-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея двухходовой силиконовый, тип наконечника Мерсье

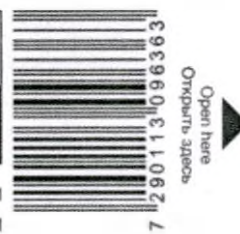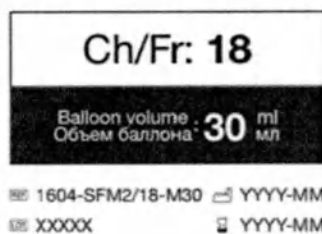

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.





3-WAY FOLEY CATHETER

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Закупщик/поставитель: «Нинбо Грейскаре Трейдинг Ко. Лтд.» Ningbo Greiscare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл



- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



FOLEY CATHETER 3-WAY WITH HYDROPHILIC COATING

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Закупщик/поставитель: «Нинбо Грейскаре Трейдинг Ко. Лтд.» Ningbo Greiscare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием

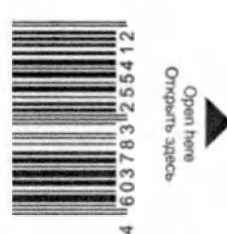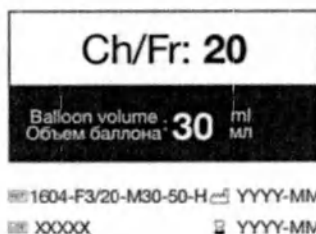

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 20 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл

- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com





3-WAY 2 BALLOON FOLEY CATHETER

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd., Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Заполнитель: Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Gaoxing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном



Кол-во: 1 шт.
ПУ № P3H 2022/18426 от 04.10.2022

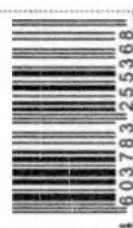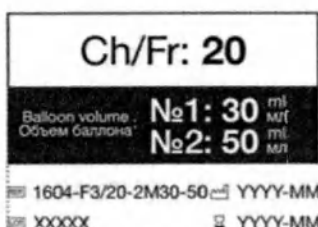

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.





3-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd., Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Заполнитель: Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Gaoxing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

RUS Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой



Изделие рентгено-контрастно
Кол-во: 1 шт.
ПУ № P3H 2022/18426 от 04.10.2022

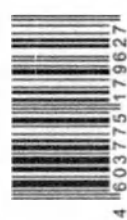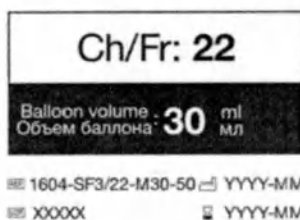

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, цилиндрический наконечник, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



лист 112
из листов 121




Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com



Продукция: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd.
Лст. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel,
info@mederen.com, Заказ-накладная: «Наско Трейдинг» Trading Co. Ltd.,
Ningbo Greentree Trading Co., Ltd. Адрес: Unit 53, Building 12, No. 818, Gaoqing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

3-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой, цилиндрический наконечник

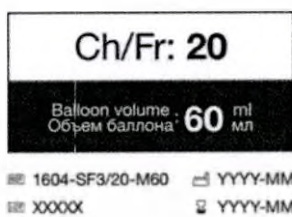



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, тип наконечника Мерсье,
объем баллона 50 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт



Продукция: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd.
Лст. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel,
info@mederen.com, Заказ-накладная: «Наско Трейдинг» Trading Co. Ltd.,
Ningbo Greentree Trading Co., Ltd. Адрес: Unit 53, Building 12, No. 818, Gaoqing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

3-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый, тип наконечника Мерсье

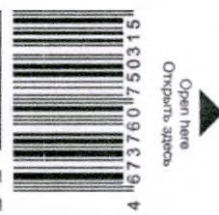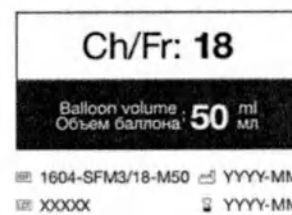

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовый 22 Ch/Fr, тип наконечника
Дюфура, объем баллона 60 мл
- катетер урологический Фолея – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



лист 113
из листов 121



Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd., Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com, Завод-производитель: «Нинбо Гринтек Трединг Ко. Лтд.», Ningbo Greintek Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

3-WAY SILICONE FOLEY CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый, тип наконечника Дюфура



Ch/Fr: 22
 Balloon volume / Объем баллона: 60 ml
 1604-SFD3/22-M60
 XXXXX
 YYYY-MM
 YYYY-MM



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый 16 Ch/Fr, тип наконечника Кувелера закрытый, объем баллона 30 мл
 - катетер урологический Фолея – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd., Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com, Завод-производитель: «Нинбо Гринтек Трединг Ко. Лтд.», Ningbo Greintek Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

3-WAY FOLEY SILICONE CATHETER

RUS Катетер урологический Фолея трехходовой силиконовый, тип наконечника Кувелера закрытый



Ch/Fr: 16
 Balloon volume / Объем баллона: 30 ml
 1604-SFK3/16-M30-C
 XXXXX
 YYYY-MM
 YYYY-MM



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия Катетер урологический для эпицистостомы 12 Ch/Fr, объем баллона 5 мл
 - катетер урологический для эпицистостомы – 1 шт.;




- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия Катетер урологический для нефростомии 8Ch/Fr длина 40 см, объем баллона 1 мл

- катетер урологический для нефростомии – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

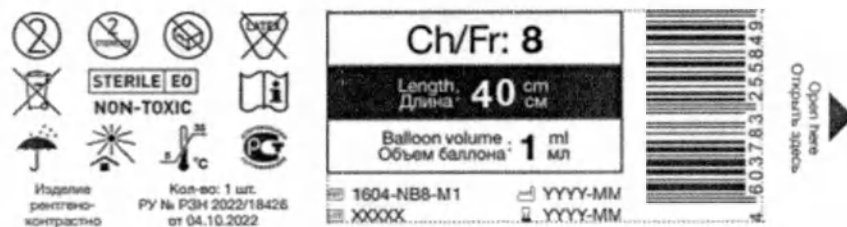

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия Катетер урологический Нелатона 6 Ch/Fr

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code:
6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Производитель: «Медерен Неотех Лимитед»,
Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel
Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-
изготовитель: "Нинбо Грейткас Трейдинг Ко. Лтд." Ningbo
Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No.
818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

NELATHON CATHETER

RUS Катетер урологический Нелатона



Ch/Fr: 6
Length, Длина: 40 cm
CM
REF 1604-N6-M



Кол-во: 1 шт. РУ № РЗН 2022/18426 от 04.10.2022

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Нелатона 6 Ch/Fr женский
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



FEMALE NELATHON CATHETER

RUS Катетер урологический Нелатона женский



Производитель: «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель:
"Нинбо Грейткас Трейдинг Ко. Лтд." Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.



Ch/Fr: 6
Length, Длина: 18 cm
CM
REF 1604-N6-F



16, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель:
ing Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну 6 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



Производитель: «Медерен Неотех Лимитед»,
Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel
Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-
изготовитель: "Нинбо Грейткас Трейдинг Ко. Лтд." Ningbo
Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No.
818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

NELATHON CATHETER WITH TIEMANN TIP

RUS Катетер урологический Нелатона с концом по Тиманну





лист 116
из листов 121



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com



Кол-во: 1 шт. ПУ № P3H 2022/18426 от 04.10.2022

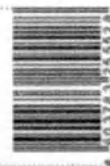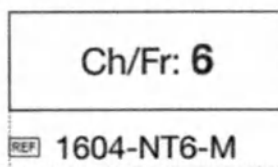

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Нелатона лубрицированный 6 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.





Производитель: «Медерен Нехотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: «Ханчжоу Джиншань Медитек Ко., Лтд.» Hangzhou Jinshu Meditech Co., Ltd., Адрес: Building 1, No. 12 Longtan Road, Cangqian Street, Yuhang District 311121 Hangzhou, Zhejiang, China.

NELATON CATHETER LUBRICATED

RUS Катетер урологический Нелатона лубрицированный



Кол-во: 1 шт. ПУ № P3H 2022/18426 от 04.10.2022

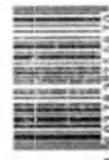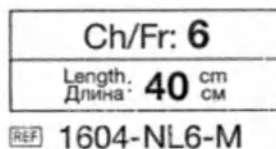

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский 6 Ch/Fr
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт




FEMALE NELATHON CATHETER

Катетер урологический Нелатона лубрицированный женский


Производитель: «Медерен Нехотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: «Ханчжоу Джиншань Медитек Ко., Лтд.» Hangzhou Jinshu Meditech Co., Ltd., Адрес: Building 1, No. 12 Longtan Road, Cangqian Street, Yuhang District 311121 Hangzhou, Zhejiang, China.



Кол-во: 1 шт. ПУ № P3H 2022/18426 от 04.10.2022

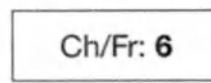

XXXXX
YYYY-MM
YYYY-MM

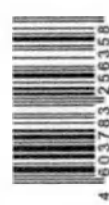

Open here
Открыть здесь

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия
Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr лубрицированный, пакетик-саше с водой
- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт;
- манжета – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.



лист 117
из листов 121

M E D E R E N

NELATHON CATHETER

Катетер урологический Нелатона
 лубрицированный, пакетик-саше
 с водой

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: "Нинбо Грейткэа Трейдинг Ко. Лтд." Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Адрес: Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

STERILE EO
NON-TOXIC



Коп-во: 1 шт.
 PY № P3H 2022/18426
 от 04.10.2022

Ch/Fr: 6

REF 1604-NP6-M
 LOT XXXXX
 EXP YYY-MM
 YYY-MM



4 603783 256280

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Нелатона 8Ch/Fr женский лубрицированный, пакетик-саше с водой

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- пакетик-саше с водой – 1 шт.;
- манжета – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

M E D E R E N

FEMALE NELATHON CATHETER

Катетер урологический Нелатона женский
 лубрицированный, пакетик-саше с водой

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: "Ханчжоу Джиншань Медитек Ко., Лтд." Hangzhou Jinshu Meditech Co., Ltd., Адрес: Building 1, No. 12 Longtan Road, Gangqian Street, Yuhang District 311121 Hangzhou, Zhejiang, China.


STERILE EO
NON-TOXIC



Коп-во: 1 шт.
 PY № P3H 2022/18426
 от 04.10.2022

Ch/Fr: 6

REF 1604-NP6-F
 LOT XXXXX
 EXP YYY-MM
 YYY-MM

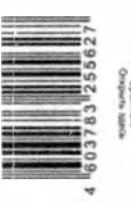

4 603783 255627

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

M E D E R E N

NELATHON CATHETER

Катетер урологический Нелатона
 лубрицированный, готовый
 к использованию

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: "Ханчжоу Джиншань Медитек Ко., Лтд." Hangzhou Jinshu Meditech Co., Ltd., Адрес: Building 1, No. 12 Longtan Road, Gangqian Street, Yuhang District 311121 Hangzhou, Zhejiang, China.

STERILE R
NON-TOXIC



Коп-во: 1 шт.
 PY № P3H 2022/18426
 от 04.10.2022

Ch/Fr: 6

REF 1604-NR6-M
 LOT XXXXX
 EXP YYY-MM
 YYY-MM



4 603783 255955

Увеличенная версия макета маркировки на примере медицинского изделия

Катетер урологический Нелатона 6Ch/Fr женский лубрицированный, готовый к использованию

- катетер урологический Нелатона – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт на каждые 10 шт.

M E D E R E N

FEMALE NELATHON CATHETER

Катетер урологический Нелатона женский
 лубрицированный, готовый к использованию

Производитель: «Медерен Неотек Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com. Завод-изготовитель: "Ханчжоу Джиншань Медитек Ко., Лтд." Hangzhou Jinshu Meditech Co., Ltd., Адрес: Building 1, No. 12 Longtan Road, Gangqian Street, Yuhang District 311121 Hangzhou, Zhejiang, China.

STERILE R
NON-TOXIC



Коп-во: 1 шт.
 PY № P3H 2022/18426
 от 04.10.2022

Ch/Fr: 6

REF 1604-NR6-F
 LOT XXXXX
 EXP YYY-MM
 YYY-MM



4 603783 256372



13 Нормативная документация

- ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;
- ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ ISO 10993-18-2022 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов»;
- ГОСТ ISO 11603-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам. Для стерилизации и упаковочным системам»;
- ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний» (п. 5.3 «Санитарно-химические испытания»);
- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».
- ГОСТ ISO 14971-2021 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к



медицинским изделиям»

- ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023 «Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.»
- ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»
- ГОСТ ISO 11135-2017 «Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий»
- ГОСТ 11137-1-2011 «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»
- ГОСТ ISO 11137-2-2011 «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы»

14 Техническое обслуживание, текущий ремонт

Изделие однократного применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Перед непосредственным использованием, а также после транспортирования изделия при минусовых температурах, следует его распаковывать и использовать только выдержав в транспортной упаковке в течение не менее 6 ч при температуре от +25°C. Не использовать при поврежденной стерильной упаковке.

15 Условия эксплуатации

Перед непосредственным использованием, а также после транспортирования изделия при минусовых температурах, следует его распаковывать и использовать только выдержав в транспортной упаковке в течение не менее 6 ч при температуре от +25°C. Не использовать при поврежденной стерильной упаковке.

- температура тела пациента: от плюс 32 до 42 °C;
- температура воздуха: от плюс 5°C до 35 °C;
- относительная влажность воздуха: 35-85%;

16 Транспортирование

Упакованные изделия транспортируют всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортируются изделия в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от минус 5 до плюс 50 °C;



- относительная влажность воздуха: 25-95%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

17 Хранение

Хранение изделий осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от плюс 5 до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха: 35-85%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Хранение изделий должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

18 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям стандартов и документации производителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Срок годности изделия указан на упаковке и составляет 5 лет.

19 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

При истечении срока годности и/или нарушения целостности герметичной упаковки изделие относится к классу А и утилизируется как эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенных к твердым бытовым отходам, в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

После применения изделие по назначению, оно относится к классу Б и утилизируется как эпидемиологически опасные (потенциально инфицированные) отходы, в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

20 Контактная информация

По вопросам качества медицинского изделия обращаться в общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕДЭКС» (ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»),
Россия, 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 113, лит. А, офис 2,
Тел.: +7 (812) 627-21-41, e-mail: info@alfamedex.com.



Перевод с английского языка на русский язык

Серийный номер 255/2024

Форма № 2

**УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА С
ПРАВОМ ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ОТ ИМЕНИ
ДРУГОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Я, нижеподписавшийся Харел Перлмуттер, нотариус с действительной лицензией № 220263, настоящим удостоверяю, что 18 марта 2024 года мой офис, расположенный по адресу: г. Тель-Авив-Яффа, ул. Харакевет, д. 58, посетила г-жа Наталья Голдберг, которая подтвердила свою личность предоставленным паспортом гражданина Израиля № 317843951, выданным 10 декабря 2017 года.

И я убежден, что человек, стоящий передо мной, полностью понимает значение осуществляемых действий и добровольно подписывает прилагаемый документ, обозначенный литерой А, от имени корпорации **MEDEREN NEOTECH LTD (МЕДЕРЕН НЕОТЕХ ЛТД)**, израильской частной компании, зарегистрированной под № 515505329, расположенной по адресу: Израиль, г. Тель-Авив-Яффа, ул. Харакевет, д. 58.

Я подтверждаю, что в качестве письменного доказательства мне было представлено решение совета директоров от 18 марта 2024 года вместе с доверенностью, выданной адвокатом Анат Эвен-Чен, чтобы я мог удостовериться в ее праве подписи указанного выше документа.

Прилагаемый документ составлен, среди прочего, на русском языке, и я также удостоверяю, что перевод указанного документа на английский язык, сопровождаемый подтверждением переводчика, нотариально заверенным адвокатом Анат Эвен-Чен, относительно верности перевода, был мне предоставлен для проверки и хранения.

В удостоверение чего я настоящим удостоверяю подпись г-жи Натальи Голдберг своей подписью и печатью 18 марта 2024 года.

Нотариальный сбор: 290 шекелей (включая НДС)

Печать и подпись нотариуса

\\подпись\\

ПЕЧАТЬ: ПЕРЛМУТТЕР ХАРЕЛ * НОТАРИУС
ПЕЧАТЬ: ПЕРЛМУТТЕР ХАРЕЛ * НОТАРИУС

Перевод с английского языка на русский язык

A

МЕДЕРЕН НЕОТЕХ ЛТД. (MEDEREN NEOTECH LTD.)

Адрес: 6777016, Израиль, г. Тель-Авив-Яффа, ул. Харакевет, д. 58

Регистрационный номер компании: 515505329

www.mederen.com info@mederen.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Катетер урологический MEDEREN, стерильный одноразовый, в вариантах исполнения
Версия 5 от 14.03.2024**

/ текст представлен на русском языке, в переводе не нуждается /

Генеральный директор

Наталья Голдберг

/подпись/

Штамп: Медерен Неотех Лтд. (Mederen Neotech Ltd.) * 515505329

Я, **Затонских Екатерина Максимовна**, дипломированный переводчик, владеющая русским и английским языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик *Затонских Екатерина Максимовна*

Санкт-Петербург, Российская Федерация,

двадцать шестого апреля две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Радомирова Мария Сергеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Затонских Екатерины Максимовны**.

Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *78/749-4/78-2024-1-522*

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.

М. С. Радомирова



[Handwritten signature of Maria S. Radomirova]



Итого в настоящем документе

124 (сто двадцать четыре) листа

Нотариус

М. С. Радомирова

[Handwritten signature of Maria S. Radomirova]