

ОКПД2 32.50.22.129

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «ТРЕЛАКС»
Т.К. Максимова**



«10» октября 2023 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Версия № 1.2**

Подушка ортопедическая по ТУ 32.50.22-029-88419706-2022, моделей

**Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЛАКС»,
125239, г. Москва, пр-д Черепановых, д. 6, стр. 1, э 5 пом I к I**

**Москва
2023**

№	Изм.№	Дата пересмотра	Изменения
1	1	29.03.2023 г.	Пересмотр проводился в связи с внесением изменений в техническую и эксплуатационную документации, на основании запроса Росздравнадзора № 10-4721/23 от 31.01.2023. Приведенную по тексту информацию и данные считать актуальными.
2	2	10.10.2023 г.	Пересмотр проводился в связи с внесением изменений в регистрационное досье.
Пересмотр проведен. Иных изменений не выявлено.			

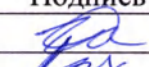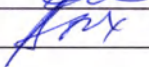ФИО	Должность	Дата	Подпись
Иванов А.Н.	Сотрудник	10.10.2023	
Выходцева А.П.	Руководитель отдела	10.10.2023	

1. Введение

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и указаниями по применению. Несоблюдение или нарушение настоящей инструкции по применению ведет к аннулированию гарантии и может представлять опасность для пациента. При использовании с другими продуктами, должны обязательно учитываться инструкция по применению и заявления о совместимости данных продуктов, если таковые имеются. Перед применением проверьте комплектность и целостность продукта и упаковки. Не используйте продукт в случае сомнений в его комплектности и/или целостности.

2. Назначение и область применения

Подушка ортопедическая по ТУ 32.50.22-029-88419706-2022, моделей (далее – подушка, изделие) предназначена для предупреждения обострения ортопедической патологии шейного отдела позвоночника: профилактики обострений дорсопатий шейного отдела позвоночника, а также для придания физиологически правильного положения позвоночника во время сна и отдыха, в положении лежа (далее по тексту – подушка, изделие).

Область применения – лечебно-профилактические учреждения, в домашних условиях.

Изделие нестерильное многократного использования, не стерилизуемое.

Потенциальные пользователи - пациенты, имеющие показания к применению

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

Показания к применению:

Предупреждение и профилактика обострения дорсопатий шейного отдела позвоночника и связанных с ней состояний, таких как:

Дискомфорт, мышечное напряжение, умеренно-выраженные боли в шейном отделе позвоночника.

Головные боли напряжения, в том числе функционального характера, на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (остеохондроза, деформирующего спондилеза, спондилоартроза, остеоартроза, а также других форм и их сочетаний),

Умеренно-выраженные признаки хронической недостаточности мозгового кровообращения, (без ИММК в течение последних 3-6 мес).

Расслабление шейных мышц при миозите.

Противопоказания к применению:

- индивидуальные аллергические реакции на материалы, используемые при изготовлении подушки.

Возможные побочные действия:

- индивидуальные аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие и его составные части.

Принцип действия.

Во время использования ортопедических подушек позвоночнику на время сна и отдыха, в положении лежа придается физиологически правильное положение, за счет заложенной в конструкцию изделия надежной комфортной фиксации позвоночника. Физиологически правильное положение позвоночника приводит к постепенному расслаблению мышц шейного отдела позвоночника и как следствие предупреждается сдавление сосудов шейного отдела позвоночника.


Ортопедическая подушка не используется для лечения ортопедической патологии шейного отдела позвоночника. Ортопедическая подушка используется для предупреждения обострения ортопедической патологии шейного отдела позвоночника: профилактика обострений дорсопатий шейного отдела позвоночника. Дорсопатии шейного отдела позвоночника — это группа заболеваний шейного отдела позвоночника и близлежащих тканей, которые вызывают боли в туловище и конечностях, не связанные с патологиями внутренних органов. Предупреждение обострения ортопедической патологии шейного отдела позвоночника предусмотрено только во время использования ортопедической подушки.

3. Конструкция изделия

Подушка ортопедическая по ТУ 32.50.22-029-88419706-2022, арт. 1001, 1007:

СОЗДАНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО СНА

ИННОВАЦИОННАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТОМ

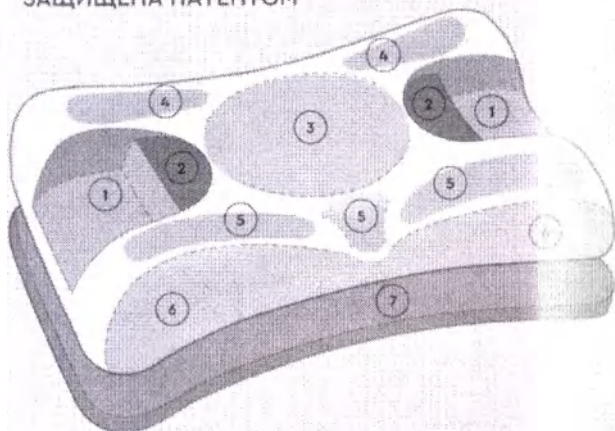

- 1 ВЫЕМКА ДЛЯ ЛИЦА ПРИ СНЕ НА БОКУ
- 2 ЗОНА ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
- 3 ВЫЕМКА ДЛЯ СНА НА СПИНЕ
- 4 ВЕРХНИЙ ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ГОЛОВЫ
- 5 ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ШЕИ
- 6 ВЫЕМКА ПОД ПЛЕЧИ
- 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД ВАЛИКОВ:

- 4 БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ ВАЛИК — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЛБА
- 5 БОЛЕЕ ТОНКИЙ — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ШЕИ



Подушка ортопедическая по ТУ 32.50.22-029-88419706-2022, арт. 1002, 1008:

СОЗДАНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО СНА

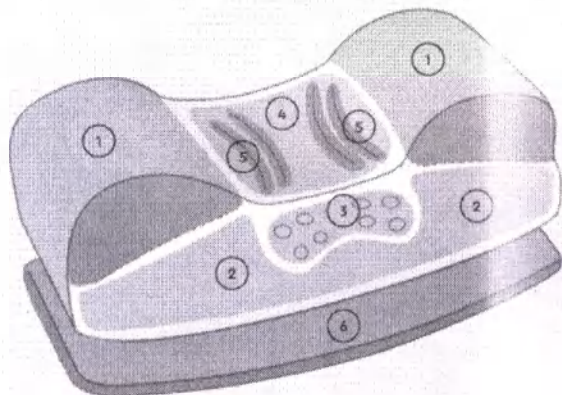


РАЗРАБОТАНА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
В ОБЛАСТИ СНА И ОРТОПЕДИИ

- 1 БОКОВЫЕ ВАЛИКИ ПОДДЕРЖКИ ГОЛОВЫ
- 2 ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ШЕИ
- 3 МАССАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЗОНЕ ШЕИ
- 4 АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЫЕМКА ПОД ГОЛОВУ
- 5 РЕЛЬЕФНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
- 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ



СОЗДАНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО СНА

ИННОВАЦИОННАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТОМ

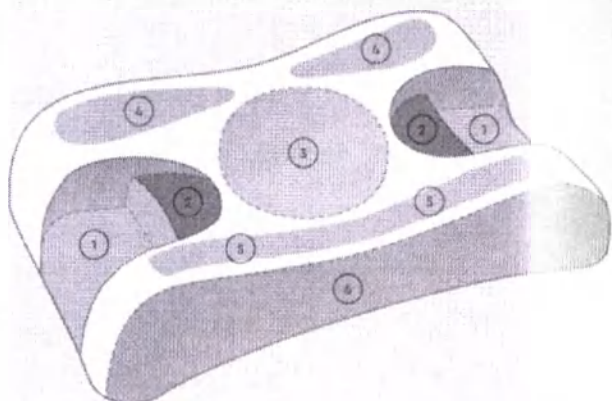

- 1 ВЫЕМКА ДЛЯ ЛИЦА ПРИ СНЕ НА БОКУ
- 2 ЗОНА ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
- 3 ВЫЕМКА ДЛЯ СНА НА СПИНЕ
- 4 ВЕРХНИЙ ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ГОЛОВЫ
- 5 ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ШЕИ
- 6 ВЫЕМКА ПОД ПЛЕЧИ


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД ВАЛИКОВ:

- 4 БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ ВАЛИК — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЛБА
- 5 БОЛЕЕ ТОНКИЙ — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ШЕИ



СОЗДАНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО СНА

ИННОВАЦИОННАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТОМ

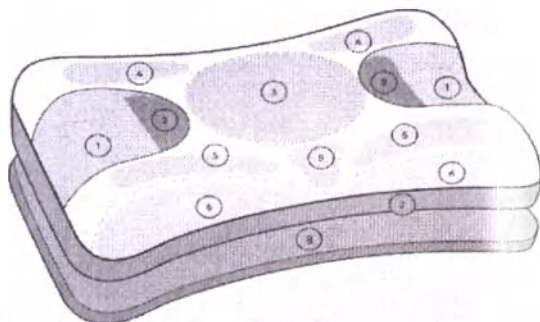

- 1 ВЫЕМКА ДЛЯ ЛИЦА ПРИ СНЕ НА БОКУ
- 2 ЗОНА ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
- 3 ВЫЕМКА ДЛЯ СНА НА СПИНЕ
- 4 ВЕРХНИЙ ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ГОЛОВЫ
- 5 ВАЛИК ПОДДЕРЖКИ ШЕИ
- 6 ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОДУШКИ, БОЛЕЕ МЯГКИЙ
- 7 НИЖНИЙ СЛОЙ ПОДУШКИ, БОЛЕЕ ПЛОТНЫЙ
- 8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД ВАЛИКОВ:

- 4 БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ ВАЛИК — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЛБА
- 5 БОЛЕЕ ТОНКИЙ — РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ШЕИ



4. Технические требования

4.1 Основные параметры и характеристики

4.1.1 Внешний вид, цвет и качество изготовления подушки должны соответствовать ТУ 32.50.22–029–88419706–2022.

4.1.2 Подушка по классификации ГОСТ 31508 и Приказа МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. (с изменениями от 25.09.2014 г.), относится к неинвазивным, неактивным медицинским изделиям длительного применения степени потенциального риска 1. По ГОСТ Р ИСО 9999 она относится к подклассу 04 33.

Вид медицинского изделия: 185030.

4.1.3 Подушка должна иметь специальную форму и выемки, способствующие наиболее удобному расположению головы и лица во время сна на боку или на спине, за счёт распределения нагрузки.

4.1.4 Подушка должна изготавливаться с размерами, в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Наименование изделия	Модель (артикул)	Количество слоев подушки, в зависимости от плотности пены, из которой изготавливается подушка	Габаритные размеры ДхШхВ, см	Общая масса подушки с подложкой, г	Материал и цвет наволочек
Подушка ортопедическая	1001	однослойная	54х35х11,5	1080	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань бельевая из искусственных волокон, с маркировкой «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7, цвет Белый. Нижняя часть наволочки – полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
	1001	однослойная	54х35х11,5	1080	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань бельевая, для пошива наволочек и постельного белья, из искусственных волокон и нитей (50% тенсель, 30% вискоза, 20% медь), окрашенная, артикул Savour #31 grey, цвет Бежевый. Нижняя часть наволочки – полотно трикотажное из

					синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, артикул УН23020401, цвет Белый.
	1007	однослойная	54x35x11,5	1080	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань шелковая, модель 19802, цвет Белый. Нижняя часть наволочки - полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
Подложка (собственная масса 110 г) для арт 1001, 1007		однослойная	54x35x1,5	-	-
Подушка ортопедическая	1002	однослойная	53x30x14	1120	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань бельевая из искусственных волокон, с маркировкой «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7, цвет Белый. Нижняя часть наволочки - полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
	1008	однослойная	53x30x14	1120	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань шелковая, модель 19802, цвет Белый. Нижняя часть наволочки - полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
Подложка (собственная масса 95 г), для арт 1002, 1008		однослойная	53x30x1,5	-	-
Подушка ортопедическая	1003	однослойная	54x36x12	1600	Наволочка изготовлена из ткани бельевой из искусственных волокон, с маркировкой «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7, цвет Белый.
Подушка ортопедическая	1004	двухслойная	54x35x11,5	1020	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань бельевая из

ческая					искусственных волокон, с маркировкой «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7, цвет Белый. Нижняя часть наволочки - полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
	1009	двухслойная	54x35x11,5	1020	Наволочка изготовлена из: Верхняя часть наволочки – ткань шелковая, модель 19802, цвет Белый. Нижняя часть наволочки - полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, цвет Молочный.
Подложка (собственная масса 110 г) для арт 1004, 1009		однослойная	54x35x1,5	-	-

Плотность подушки должна быть 50 ± 10 кг/м³. Плотность слоев подушек (арт. 1004, 1009) должна быть: нижнего слоя - 50 ± 10 кг/м³, верхнего слоя - 40 ± 10 кг/м³. Слои подушек (арт 1004, 1009) выполнены из идентичного по составу материала, отличие заключается в: более плотный нижний слой и более мягкий верхний слой для дополнительного комфорта. Верхний слой более мягкий за счет того, что в форму складается меньше вещества. Меньше пены, больше воздуха.

Допускаемые отклонения по длине и ширине- $\pm 3,5$ см, по высоте $\pm 1,3$ см, по общей массе ± 100 г.

Допускаемые отклонения по собственной массе подложки ± 5 г

4.1.5 Материалы наволочек должны быть устойчивы к стирке при температуре 30°C, в соответствии с указаниями по уходу. Количество стирок – неограниченное количество, до окончания срока эксплуатации, с учётом соблюдения режима стирки. Подушку без наволочки следует протирать влажной тряпкой, не использовать абразивные средства и жесткие материалы, способные нанести порчу и дефект подушке. В случае использования в условиях ЛПУ - смоченной в растворе хлоргексидина и предварительно отжатой тряпкой. После протирки обязательно проветрить подушку в течение 15 минут в темном месте, исключающем проникновение солнечных лучей.

4.1.6 Требования к изготовлению

4.1.6.1 Методы обработки подушки должны соответствовать промышленной технологии изготовления продукции медицинского назначения методы обработки наволочки должны соответствовать промышленной технологии изготовления швейной продукции медицинского

назначения. Подушка выпускается из цельного материала, предварительно сформированной в индивидуальной пресс-форме, раскрой деталей и требования швейной технологии только для наволочек.

4.1.6.2 Раскрой деталей должен производиться в направлении нитей основы в тканях или петельных столбиков в трикотажных полотнах.

Примечание – Допускается отклонение от указанных направлений согласно технологической документации.

4.1.6.3 Виды и параметры стежков, строчек и швов, применяемых при пошиве, а также их внешний вид должны соответствовать требованиям ГОСТ 29122.

Количество стежков на 5 см машинной строчки должно быть при пошиве не менее 18.

4.1.6.4 Открытые края наволочки должны быть зашиты накладным швом с двумя закрытыми срезами шириной от 0,2 до 0,4 см, концы ниток в строчках должны быть закреплены или отрезаны.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества; допустимое отклонение строчек от прямолинейности – не более 5 мм на длине 200 мм.

4.1.6.5 Наполнитель в подушке должен быть распределён равномерно.

4.1.6.6 Швы не должны иметь пропусков стежков и дефектов прорубки полотна. Срезы швов должны быть обмётаны.

Измерение ширины шва производится от среза или края (обметанного или необметанного, подогнутого или неподогнутого) деталей до строчки, включая ее.

4.1.6.7 Поверхность подушки должна быть без видимых дефектов, разрывов, пятен. Допустимы небольшие воздушные включения (пузырьки), которые не считаются дефектами.

Резко выраженные пороки тканей наволочки: засоренность, мушковатость, разноотеночность по основе и по утку, подплетины, близны по всему полотну не допускаются.

Затянута нить, мест – не более 2.

4.1.7 Подушка должна быть пригодна к эксплуатации в условиях УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 4.2, при температуре окружающей среды от 10 до 35 °С и относительной влажности до 80% при плюс 25 °С.

4.1.8 Подушка должна быть устойчива к воспринимаемым механическим воздействиям по группе 2 ГОСТ Р 50444.

4.1.9 Наполнитель подушки должен сохранять и легко восстанавливать свой объём при длительной эксплуатации, иметь низкую теплопроводность.

4.1.10 Конструкция наволочки должна обеспечивать ее беспрепятственное снятие с возможностью стирки и/или дезинфекции. Длина молнии наволочки должна быть 40 ± 10 см.

4.1.11 Поверхности наволочки должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала, обеспечивающего циркуляцию воздуха.

4.1.12 Нагрузка разрывная для швов по длине 50 мм – не менее 98 Н.

4.1.13 Максимальная нагрузка на подушку не должна превышать 15 кг.

4.1.14 Мягкость подушки должна характеризоваться следующими показателями:

4.1.14.1 Деформация подушки под нагрузкой 70 даН должна составлять от 50 до 60 мм.

4.1.14.2 Податливость подушки должна составлять от 1,7 до 2,3 мм/даН.

4.1.15 Жесткость подушки должна быть $4,5 \pm 2,5$ кПа.

4.1.16 Воздухопроницаемость подушки должна быть $0,01 \pm 0,002$ кг/м²*ч.

4.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям.

4.2.1 При производстве подушки должны применяться:

При производстве наволочек подушек должны применяться следующие материалы:

- материал текстильный бельевой: полотно трикотажное из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс (90% полиэстер, 10% эластан), артикул YH 19060101, производства «Shanghai Zebra International Trade Co., Ltd», Китай (Декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-CN.АБ87.В.01961/20, Протокол контрольных испытаний № 200803-018-03/ИП от 19.08.2020 г.);

- материал текстильный бельевой: ткань шелковая, модель 19802, (92% шелк, 8% эластан), производства Zibo Daranfang Silk Group», Китай (Декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-CN.АБ87.В.01800/20, Протокол контрольных испытаний № 200617-006-03/ИП от 03.07.2020 г.);

- материал текстильный: ткань бельевая из искусственных волокон (100% тенсель), с маркировкой SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7, производства «Shanghai Zebra International Trade Co., Ltd», Китай (Декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ47.В.05965/19, Протокол испытаний № DX8IUCL от 16 января 2019 г.).

- материалы текстильные: ткань бельевая, для пошива наволочек и постельного белья, из искусственных волокон и нитей (50% тенсель, 30% вискоза, 20% медь), окрашенная, артикул Savour #31 grey, производства «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», Китай. Декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.41073/23, Протокол испытаний № 2210-053 ДА от 13.10.2022, Протокол испытаний № 410-09-23-7 от 06.10.2023 г.)

- материалы текстильные бельевые: полотна трикотажные из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, артикул YH23020401 (100% полиэфир), производства «Shanghai Zebra International Trade Co., Ltd», Китай. (Декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.59530/23, Протокол испытаний № 51-05-23-7 от 22.05.2023 г.)

Подушка и подложка изготавливаются из вязко-эластичного пенополиуретана (Полиол Dow-Изолан А ВЭЛ 1004 с ионами серебра (Ag+), Изоционат Dow Specflex NE 141), производства ООО «Производственное объединение Новый Стандарт – ППУ», Россия (Сертификат соответствия,

Красители, используемые при изготовлении наволочек изделия: для материала текстильного бельевого: полотна трикотажного из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс: Молочный TRANSFAR / bleached TF-901, производства «Shanghai Zebra International Trade Co., Ltd», Китай (Информационное письмо № 07/04/01 от 07.04.2023);

Для ткани шелковой: Белый Everzol Yellow LX, производства «Zibo Daranfeng Silk Group Co. Ltd.», Китай (Заявление о безопасности красителей);

Для материала текстильного: ткани бельевой из искусственных волокон (100% тенсель), с маркировкой «SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», артикул Savour № 7: Белый Colorsol/ Yellow SPL (very little), производства «Shanghai Zebra International Trade Co., Ltd», Китай (Информационное письмо № 07/04/02 от 07.04.2023)

Для материалов текстильных: ткани бельевой, для пошива наволочек и постельного белья, из искусственных волокон и нитей (50% тенсель, 30% вискоза, 20% медь), окрашенной, артикул Savour #31 grey: Бежевый (item number: 0251) Colorsol/ Yellow SPL (very little), производства SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», Китай. (Информационное письмо от 09.09.2023)

Для материалов текстильных бельевых: полотна трикотажного из синтетических волокон и нитей, модель Бифлекс, артикул YH23020401: Белый TRANSFAR/bleached TF-901, производства SHANGHAI ZEBRA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», Китай. (Информационное письмо от 09.09.2023)

4.2.2 Поверхностная плотность тканей и полотен должна быть не менее 30 г/м².

Допустимые отклонения поверхностной плотности – по ГОСТ 10138.

4.2.3 Нормативная влажность наполнителя не должна быть более 9%.

4.2.4 Настрачивание, соединение деталей должно проводиться иглами по ГОСТ 22249.

4.2.5 Качество используемых материалов должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве (декларациями, сертификатами соответствия, паспортами).

При отсутствии документов о качестве на конкретный материал все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении подушек на предприятии-производителе.

4.2.6 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов должны находиться в пределах допустимых норм.

Содержание свободного формальдегида не должно превышать 75 мкг/г.

4.2.7 Материалы наволочек должны обладать стойкостью к биологическим жидкостям согласно МУ 25.1-001-86 (слюны, пота).

4.2.8 Материалы подушек должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 51632.

4.2.9 Материалы должны обладать отсутствием токсичности (водная вытяжка из материалов не должна обладать раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожные покровы, уровень выделения химических веществ из материалов в воздушную среду при насыщенности $0,3 \text{ м}^2/\text{м}^3$ не должна превышать допустимый).

Индекс токсичности, определяемый в водной среде, должен быть в пределах от 70 до 120%, в воздушной среде – от 80 до 120%.

4.2.10 Материалы не должны оказывать местного кожно-раздражающего, сенсибилизирующего, а также недопустимого биологического воздействий.

4.2.11 Интенсивность запаха образца материалов в естественных условиях не должна превышать 2 баллов.

4.2.12 Устойчивость окраски текстильных полотен, контрастных отделок к физико-химическим воздействиям (пота, стирки, сухого трения) должна быть не ниже норм для группы крашения «прочная» (не менее 4 баллов).

4.2.13 Гигроскопичность материалов должна быть не менее 6%.

4.2.14 Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности должен быть не более 15 В/м.

4.2.15 Материалы для изготовления подушек должны пройти входной контроль, исходя из норм ГОСТ 297, в порядке, установленном на предприятии-изготовителе.

5 Использование изделия

арт. 1001, 1007:

Подготовка к использованию

Подушка требует определенного времени для привыкания (до 2-х недель). В процессе адаптации вы можете испытывать некоторый дискомфорт в мышцах, но он быстро проходит.

Некоторым людям требуется чуть больше времени, чтобы поменять привычную позу на обычной подушке на правильное и здоровое положение.


Перед первым использованием постирайте наволочку. Так она даст небольшую усадку и сразу примет форму подушки.

Всегда полностью расстегивайте молнию на наволочке. Сначала наденьте наволочку на одну сторону подушки так, чтобы этикетка оказалась на верхнем, большом валике подушки. Затем сожмите руками вторую сторону подушки и аккуратно вставьте ее в наволочку.

Внимание! Пожалуйста, внимательно следуйте рекомендациям на бирке — стирайте наволочку при температуре не более 30°C и не сушите ее в барабане. Мы рекомендуем гладить наволочку при температуре не выше 110°C .

Использование.

Подушка размещается на спальном месте так, чтобы голова комфортно располагалась на подушке, опираясь головой на зоны 2, 3, 4 или только 3 (для сна на спине), при этом валик 5 обеспечивает ортопедическую поддержку шеи. Расположите подушку правильно: валик шеи 5 должен быть ниже по высоте, чем валики лба 4. Голова и шея должны находиться на одной прямой с позвоночником. Следите, чтобы плечи не свисали на подушку.

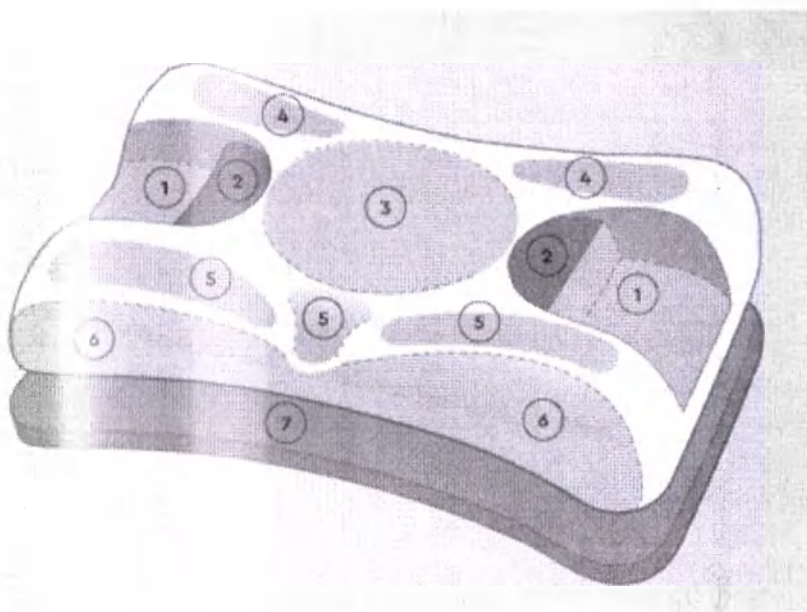

Не стоит спать сразу на двух подушках — голова будет запрокинута слишком высоко, от этого ухудшается кровообращение в головном мозге. Во время сна под ортопедическую подушку нельзя складывать руки. На размещайте подушку по диагонали. Спать нужно только на выпуклой стороне — подушку нельзя переворачивать.

м. 1002, 1008

Подготовка к использованию

Подушка подходит только для сна на спине за счёт высоких боковых валиков 1.

Подушка требует определенного времени для привыкания (до 2-х недель). В процессе адаптации вы можете испытывать некоторый дискомфорт в мышцах, но он быстро проходит.

Перед первым использованием постирайте наволочку. Так она даст небольшую усадку и сразу примет форму подушки.

Всегда полностью расстегивайте молнию на наволочке. Сначала наденьте наволочку на одну сторону подушки так, чтобы этикетка оказалась на верхнем, большом валике подушки. Затем сожмите руками другую сторону подушки и аккуратно вставьте ее в наволочку.


Внимание! Пожалуйста, внимательно следуйте рекомендациям на бирке — стирайте наволочку при температуре не более 30°C и не сушите ее в барабане. Мы рекомендуем гладить наволочку при температуре не выше 110°C.

Использование.

Ложитесь на спину так, чтобы голова лежала полностью в зоне 4, а шея поддерживалась валиком 2. Можно подвигаться выше или ниже по подушке и найти максимально удобное положение.

Вы можете наклонить голову немного вправо или влево, чтобы опереться на валики 1. Это поможет вам найти баланс и расслабиться.

Очень важно найти удобное положение рук, когда вы спите в позе на спине. Попробуйте, например, положить руки вдоль тела, сложить руки на животе или раскинуть руки в стороны.

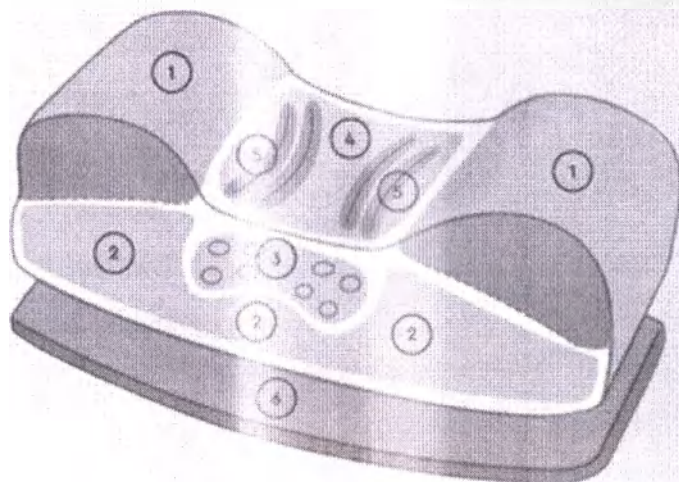

Следите, чтобы плечи не попадали на подушку. Не стоит спать сразу на двух подушках — голова будет прокинута слишком высоко, от этого нарушается кровообращение в головном мозге. Во время сна под ортопедическую подушку нельзя подкладывать руки. На размещайте подушку по диагонали. Спать нужно только на выпуклой стороне — подушку нельзя переворачивать.

арт. 1003

Подготовка к использованию

Подушка требует определенного времени для привыкания (до 2-х недель). В процессе адаптации вы можете испытывать некоторый дискомфорт в мышцах, но он быстро проходит.

Некоторым людям требуется чуть больше времени, чтобы поменять привычную позу на обычной подушке на правильное и здоровое положение.


Перед первым использованием постирайте наволочку. Так она даст небольшую усадку и сразу примет форму подушки.

Всегда полностью расстегивайте молнию на наволочке. Сначала наденьте наволочку на одну сторону подушки так, чтобы этикетка оказалась на верхнем, большом валике подушки. Затем сожмите руками другую сторону подушки и аккуратно вставьте ее в наволочку.

Внимание! Пожалуйста, внимательно следуйте рекомендациям на бирке — стирайте наволочку при температуре не более 30°C и не сушите ее в барабане. Мы рекомендуем гладить наволочку при температуре выше 110°C.

Использование.

Подушка размещается на спальном месте так, чтобы голова комфортно располагалась на подушке, опираясь головой на зоны 2, 3, 4 или только 3 (для сна на спине), при этом валик 5 обеспечивает ортопедическую поддержку шеи. Расположите подушку правильно: валик шеи 5 должен быть ниже по высоте, чем валики лба 4. Голова и шея должны находиться на одной прямой с туловищем. Следите, чтобы плечи не попадали на подушку.

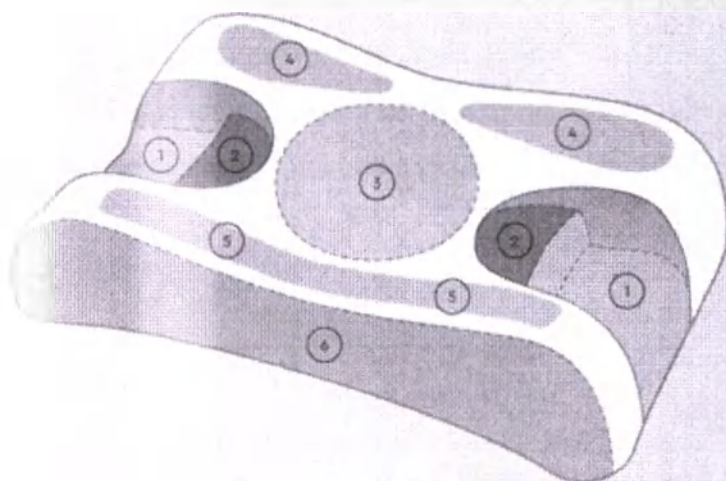

Не стоит спать сразу на двух подушках — голова будет запрокинута слишком высоко, от этого нарушается кровообращение в головном мозге. Во время сна под ортопедическую подушку нельзя складывать руки. На размещайте подушку по диагонали. Спать нужно только на выпуклой стороне — подушку нельзя переворачивать.

арт. 1004, 1009:

Подготовка к использованию

Подушка требует определенного времени для привыкания (до 2-х недель). В процессе адаптации вы можете испытывать некоторый дискомфорт в мышцах, но он быстро проходит.

Некоторым людям требуется чуть больше времени, чтобы поменять привычную позу на обычной подушке на правильное и здоровое положение.


Перед первым использованием постирайте наволочку. Так она даст небольшую усадку и сразу примет форму подушки.

Всегда полностью расстегивайте молнию на наволочке. Сначала наденьте наволочку на одну сторону подушки так, чтобы этикетка оказалась на верхнем, большом валике подушки. Затем сожмите руками другую сторону подушки и аккуратно вставьте ее в наволочку.

Внимание! Пожалуйста, внимательно следуйте рекомендациям на бирке — стирайте наволочку при температуре не более 30°C и не сушите ее в барабане. Мы рекомендуем гладить наволочку при температуре не выше 110°C.

Использование.

Подушка размещается на спальном месте так, чтобы голова комфортно располагалась на подушке, опираясь головой на зоны 2, 3, 4 или только 3 (для сна на спине), при этом валик 5 обеспечивает ортопедическую поддержку шеи. Расположите подушку правильно: валик шеи 5 должен быть ниже по высоте, чем валики лба 4. Голова и шея должны находиться на одной прямой с туловищем. Следите, чтобы руки не попадали на подушку.

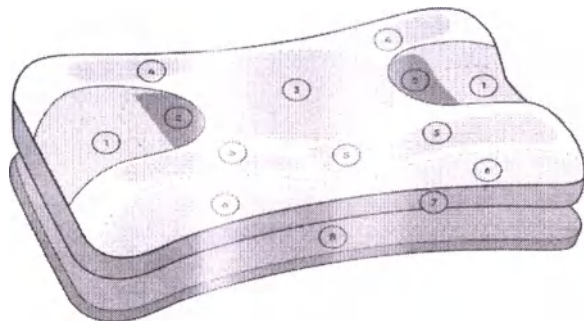

Верхний слой подушки – более мягкий, что сказывается на легкости деформации и более плотном прилегании к голове и шеи. Не стоит спать сразу на двух подушках — голова будет запрокинута слишком высоко, от этого нарушается кровообращение в головном мозге. Во время сна под ортопедическую подушку нельзя подкладывать руки. На размещайте подушку по диагонали. Спать нужно только на выпуклой стороне подушки нельзя переворачивать.

Уход за наволочкой:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не выше 40°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.

Не использовать отбеливатели и органические растворители.

Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C.

Сушка при температуре 110°C

Уход за заготовкой подушки: Пенополиуретан не рекомендуется стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ АРТИКУЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Нельзя сушить изделия вблизи открытого огня или на горячей батарее. Не допускается прикосновение изделий с острыми предметами, с красящими веществами, растворителями и маслами.

- Запрещается использовать подушку в случае потери функциональных свойств, связанных с нарушением целостности, изменением геометрии изделия вследствие неправильной эксплуатации или механических повреждений.

Поврежденные изделия утилизируют.

6 Комплект поставки

Подушка ортопедическая по ТУ 32.50.22-029-88419706-2022, моделей:

Подушка ортопедическая арт. 1001, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1007, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1002, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1008, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1003, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1004, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

Подушка ортопедическая арт. 1009, в составе:

- Подушка в съёмной наволочке – 1 шт.;
- Подложка – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.;

7. Маркировка

7.1 Маркировку наносят на этикетку, вкладываемую в потребительскую упаковку с изделием

и наклеивают снаружи на потребительскую упаковку.

Маркировка этикетки должна содержать следующую информацию:

- наименование изделия, модель;
- наименование производителя и/или его логотип;
- уполномоченный представитель производителя;
- дата изготовления (месяц, год);
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок эксплуатации наволочки;
- срок эксплуатации подушки;
- номер партии;
- температура транспортирования и хранения;
- информация об уходе за наволочкой подушки;
- штриховой код (при наличии);
- обозначение настоящих технических условий;
- сведения об утилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения;

Допускается вшивание ярлыка в шов наволочки подушки с указанием символов информации об уходе и логотипа производителя.

Символы по уходу должны соответствовать ГОСТ ISO 3758.

Таблица 2. Расшифровка символов информации об уходе*.

	максимальная температура стирки 30°C обычный режим
	не отбеливать
	не применять барабанную сушку
	сухая чистка запрещена
	гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, без пара глажение с паром может вызывать необратимые повреждения

*Информация об уходе указана для наволочки.

7.2 Требования к маркировке подушек, к способу и месту ее нанесения – по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 10581. Символы маркировки – по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ГОСТ Р ИСО 15223-2.

7.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ 34757.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Верх", "Беречь от влаги".

8. Упаковка

8.1 Подушка упаковывается поштучно в потребительскую упаковку (коробка из гофрированного картона по ГОСТ 13514 или ГОСТ 9142) и укладывается в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514 или ГОСТ 9142.

Ящики должны оклеиваться липкой лентой по ГОСТ 18251 или обвязываются шпагатом по ГОСТ 17308. Масса транспортной тары не должна превышать 50 кг.

8.3 При отгрузке подушек в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

9. Требования безопасности

9.1 Подушка должна быть нетоксична и экологически безопасна, не должна содержать веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека.

9.2 Использование синтетического наполнителя должно соответствовать требованиям действующих санитарных норм.

9.3 Показатели санитарно-гигиенических свойств подушки должны соответствовать ГОСТ Р 50700, ГОСТ ISO 10993-1 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 г. № 299), глава II, раздел 18.

10 Требования охраны окружающей среды

10.1 При изготовлении подушки отходы, представляющие опасность для окружающей среды, не используются. Технические и промывные воды после очистки возвращаются в начало технологического цикла.

10.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (россыпей) применяемых материалов;
- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя и вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

10.3 Подушка и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после ее использования.

10.4 Отходы утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 и СП 2.1.7.1386-03.

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 59053, ГОСТ Р 59061, ГОСТ Р 58577 и ГОСТ Р 59061.

10.5 Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30167, ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

10.6 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

10.7 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируются в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 и СанПиН 1.2.3685-21.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581.

Транспортирование готовой продукции производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта в условиях, предусмотренных для группы 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.2 Подушку хранят в крытых сухих и хорошо вентилируемых складских помещениях, в условиях, предусмотренных для группы 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия хранения должны исключать возможность воздействия на подушки влаги и агрессивных веществ.

11.3 При погрузке, выгрузке, хранении и транспортировании должны быть приняты меры, обеспечивающие подушку от повреждений и загрязнений.

11.4 Отправка подушки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности должна осуществляться согласно ГОСТ 15846.

12 Указания по использованию

12.1 Подушка должна применяться в целях, установленных в технических условиях, в строгом соответствии с инструкцией по применению изготовителя.

Общие требования – согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

12.2 Показания и противопоказания при применении подушки устанавливаются в инструкции по применению изготовителя.

12.3 Указания по способам ухода оформляются символами согласно ГОСТ 16958 применительно к материалам, используемым в подушке.

12.4 Изделие при температуре -5 °С дубеет, замораживается, поэтому прежде чем ею пользоваться необходимо ей дать разморозиться и для выравнивания температуры изделия с

температурой помещения его надлежит выдерживать в упаковке при температуре не ниже 18°C не менее 24 часов, иначе воздушные включения (пузырьки) могут полопаться.

13. Сведения о техническом обслуживании и ремонте

Подушка не требует сервисного, технического обслуживания и ремонта.

14 Требования к утилизации

14.1 Подушку с истекшим сроком хранения и не бывшую в употреблении утилизируют по классу опасности А по СанПиН 2.1.3684-21, а пришедшую в негодность в процессе использования – по классу опасности Б.

Порядок утилизации устанавливается согласно СП 2.1.3678-20.

14.2 Требования к безопасному хранению перед утилизацией – по ГОСТ Р 55838.

14.3 Сдача подушки во вторичное сырьё – по ГОСТ 10590.

15. Гарантии изготовителя

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подушки требованиям ТУ 32.50.22-029-09706-2022 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

15.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

15.3 Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделий в случае обнаружения дефектов производственного характера.

15.4 Срок эксплуатации подушки 5 лет.

Срок эксплуатации наволочки 12 месяцев со дня изготовления.

15.5 Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил ухода за изделием;
- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию изделия.

15.6 В течение гарантийного срока изготовитель принимает претензии по качеству изделий, одновременно вышедших из строя не по вине потребителя. Не использовать по истечении срока годности.

11. Сведения о рекламациях

Рекламации направлять: Индивидуальный Предприниматель Полупанов Григорий Васильевич, адрес: 156007, Кострома, ул. Комбинатовская д. 25, кв. 4, info@beautysleep.ru, 8-930-384-46-24, 8-222-46-24.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Категория изделия _____

Производитель _____

Вариант исполнения _____

Серийный номер/арт. _____

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Штамп

о продаже

Индивидуальная упаковка проверена, повреждений не имеет. С инструкцией по применению
знакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Гарантийный срок эксплуатации— 12 месяцев.

По вопросам гарантии обращаться: Индивидуальный Предприниматель Полупанов Григорий
Ильевич, юр. адрес: 156007, Кострома, ул. Комбинатовская д. 25, кв. 4, info@beautysleep.ru, 8-930-
46-24, 8-800-222-46-24.

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер
изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. При неточном или
неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Перечень ссылочной документации

Обозначение документа	Наименование документа
1	2
ГОСТ 4.45-86	Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей
ГОСТ 15.101-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 2228-81	Бумага мешочная. Технические условия
ГОСТ 3816-81	Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 5530-2004	Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия
ГОСТ 6309-93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9733.0-83	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.4-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.6-83	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»
ГОСТ 9733.27-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 10138-93	Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия
ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 10590-75	Сырье вторичное текстильное сортированное из смешанных волокон. Технические условия
ГОСТ 11207-65	Ткани текстильные. Классификация норм изменения размеров после мокрой обработки
ГОСТ Р 50779.12-2021	Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия факторов внешней среды
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
ГОСТ 16504-81	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 17037-85	Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
ГОСТ 17308-88	Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 17922-72	Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения раздирающей нагрузки
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 19616-74	Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
ГОСТ 22249-82	Иглы к швейным машинам. Типы и основные размеры
ГОСТ 23948-80	Изделия швейные. Правила приемки
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25617-2014	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 28073-89	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей тканей в швах


ГОСТ 29122-91	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам
ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ 30157.1-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
ГОСТ 30167-2014	Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ Р 1.3-2018	Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению
ГОСТ Р 15.013-2016	Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия
ГОСТ Р 15.111-2015	Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов
ГОСТ Р 27.403-2009	Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы
ГОСТ Р 27.301-2011	Надежность в технике. Управление надежностью. техника анализа безотказности. Основные положения
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ Р 50729-95	Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида
ГОСТ Р 51293-99	Идентификация продукции. Общие положения
ГОСТ 34757-2021	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р 51632-2021	Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51909-2002	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 55306-2012	Технология швейного производства. Термины и определения
ГОСТ Р 55838-2013	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к безопасному хранению списанных изделий перед утилизацией
ГОСТ Р 57502-2017	Изделия медицинские. Промышленный регламент производства
ГОСТ Р 58577-2019	Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов
ГОСТ Р 58987-2020	Оценка соответствия. Исследования типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов евразийского экономического союза
ГОСТ ISO 3758-2014	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

	городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СП 2.1.7.1386-03	Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
МУ 2.1.7.730-99	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Изделий медицинского назначения


Схематические изображения подушек

пускаемые отклонения по длине и ширине- $\pm 3,5$ см, по высоте $\pm 1,3$ см, для остальных мер ± 1 см.)


Модели (артикулы) 1001, 1007

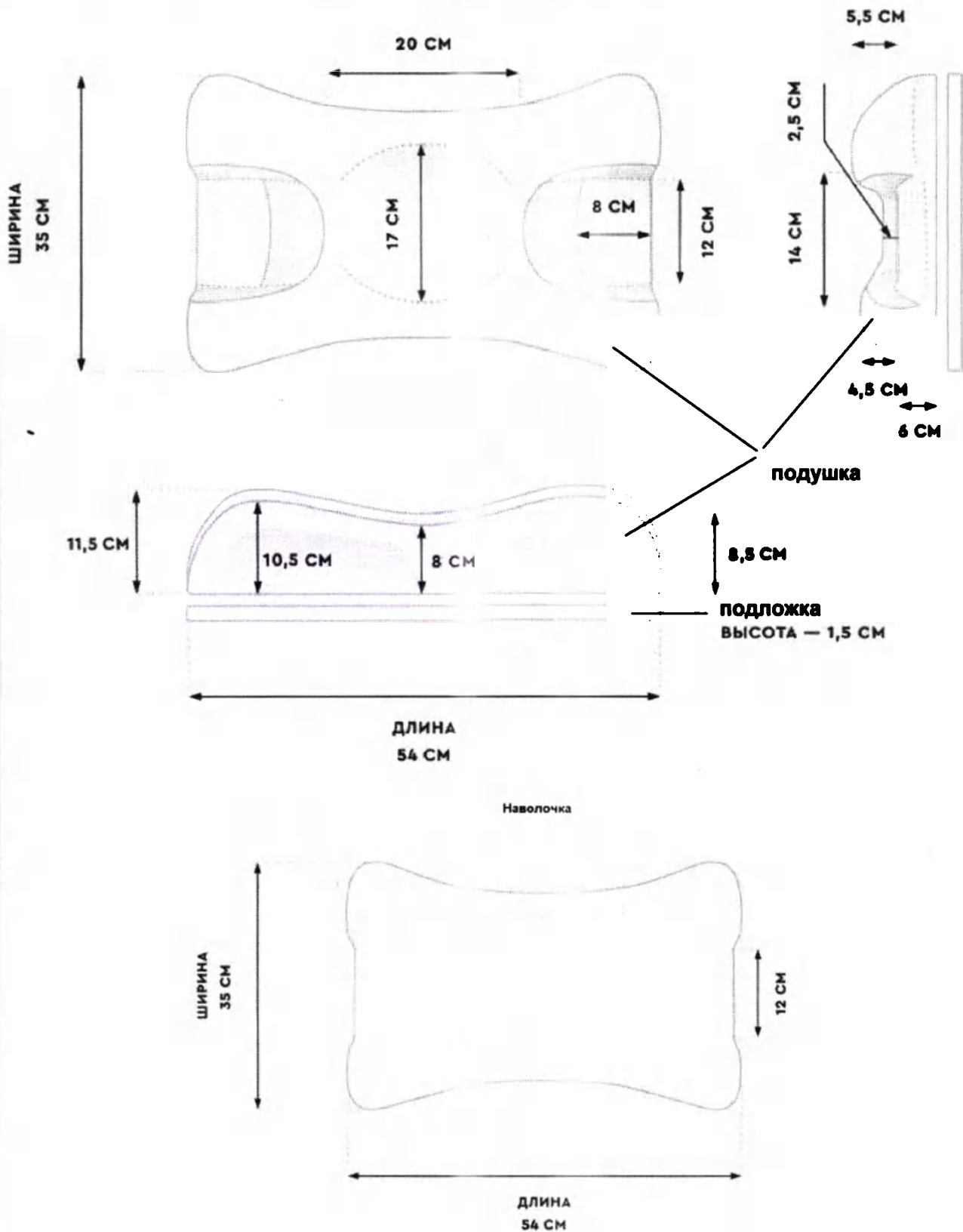



Модели (артикулы) 1004, 1009

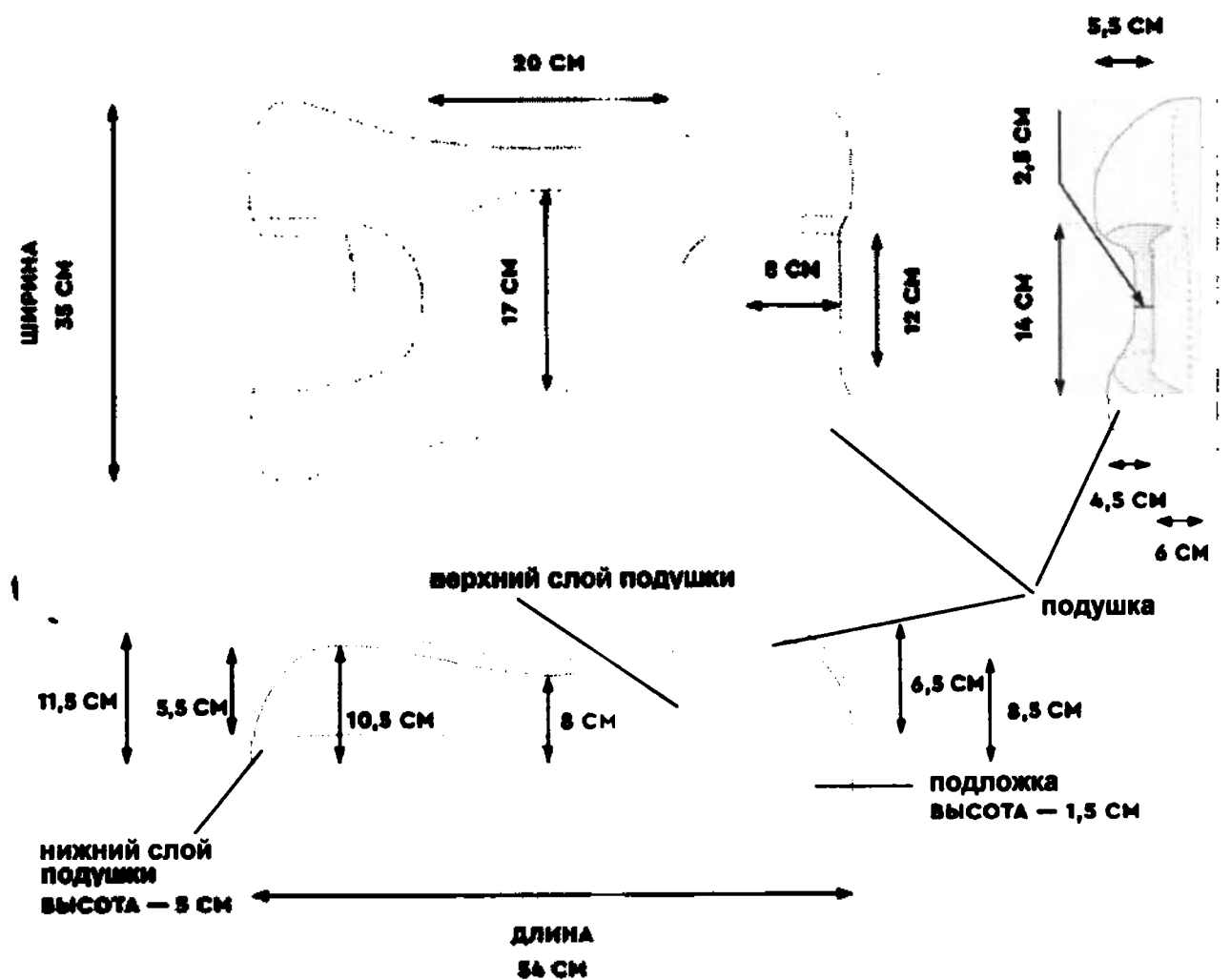


Наволочка

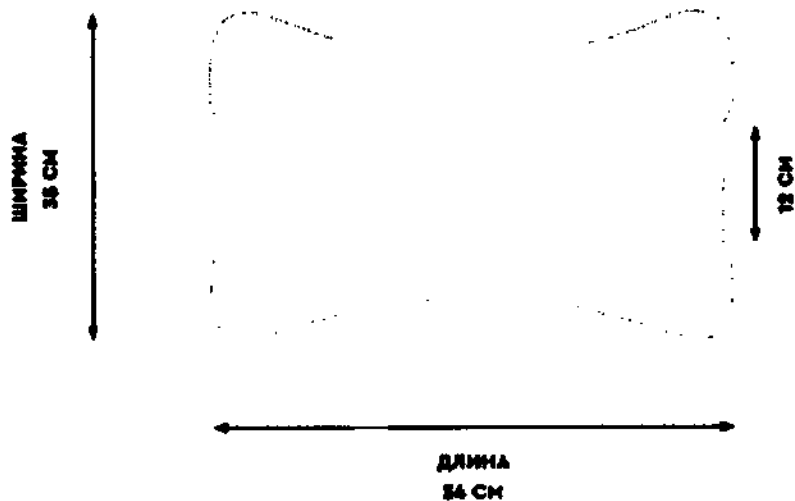


Модели (артикулы) 1002, 1008

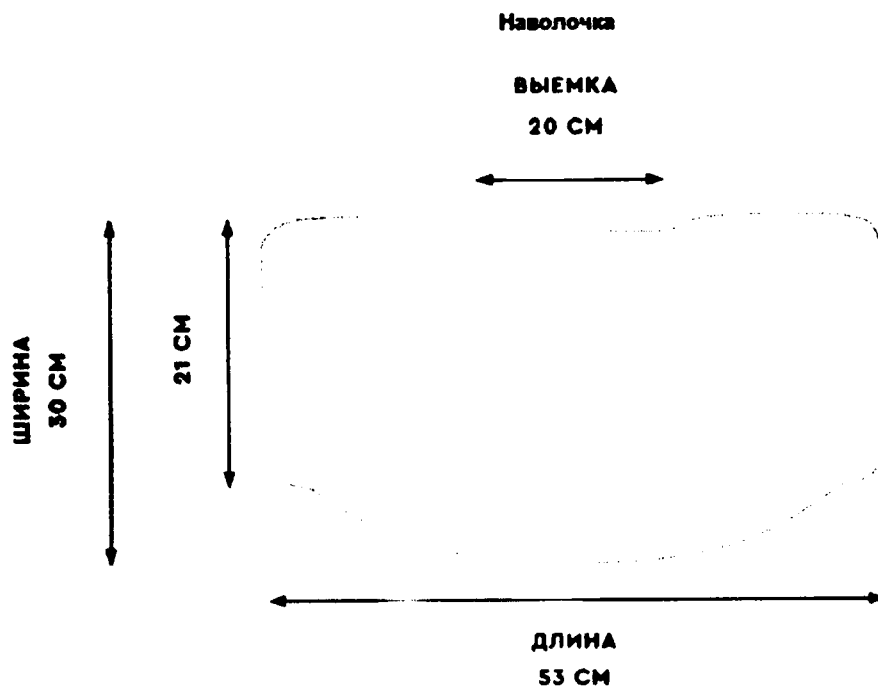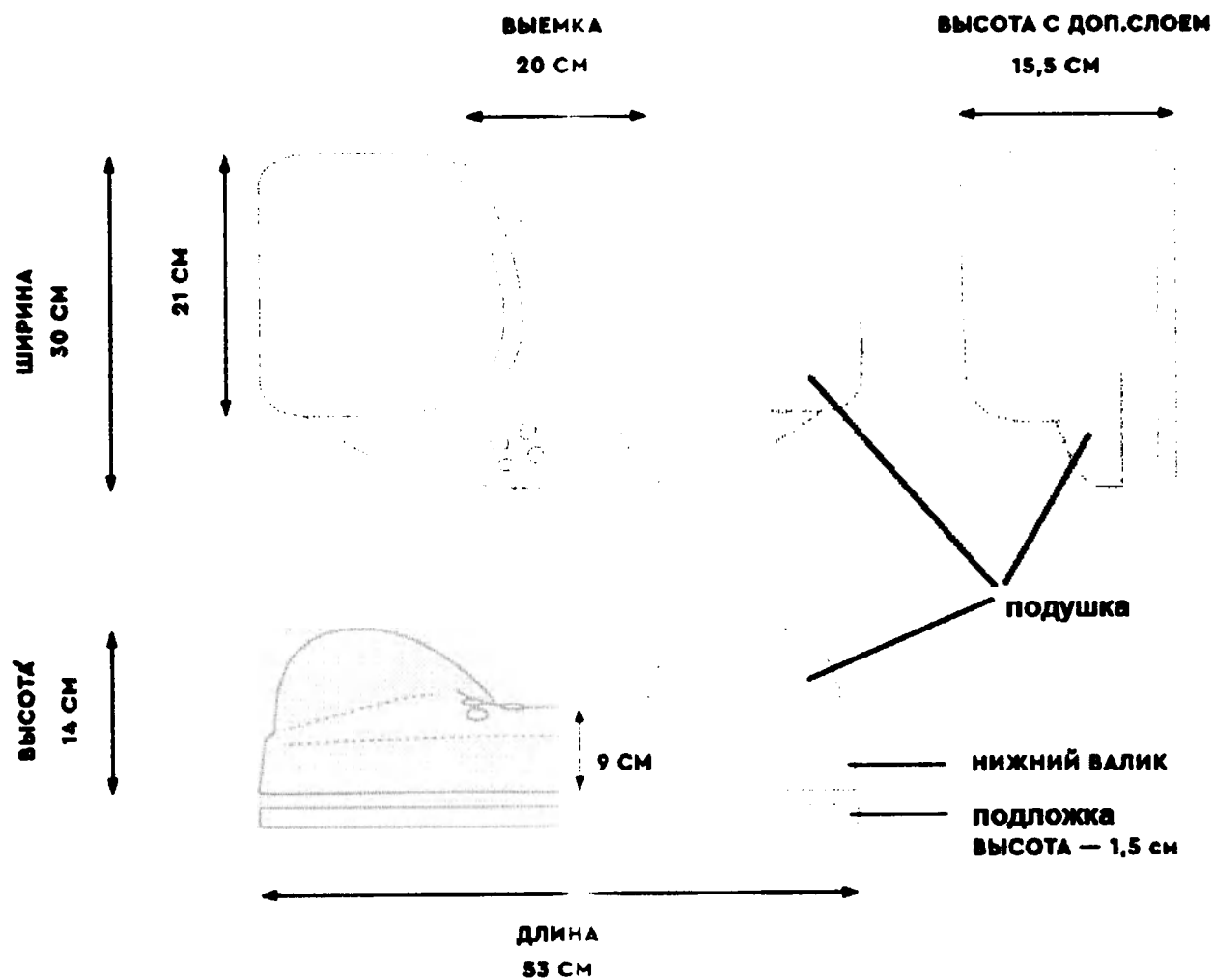

Модель (артикул) 1003

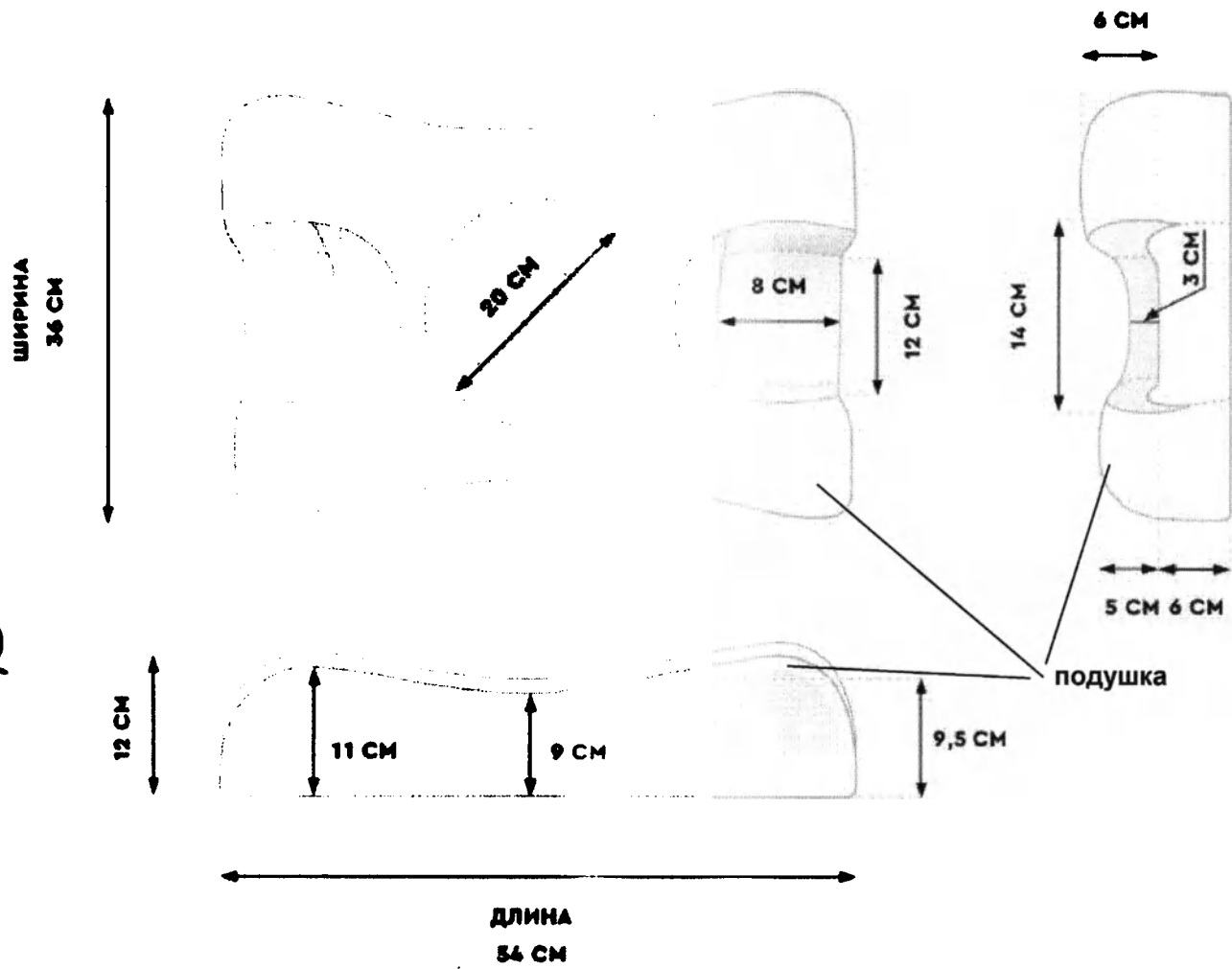

Наволочка

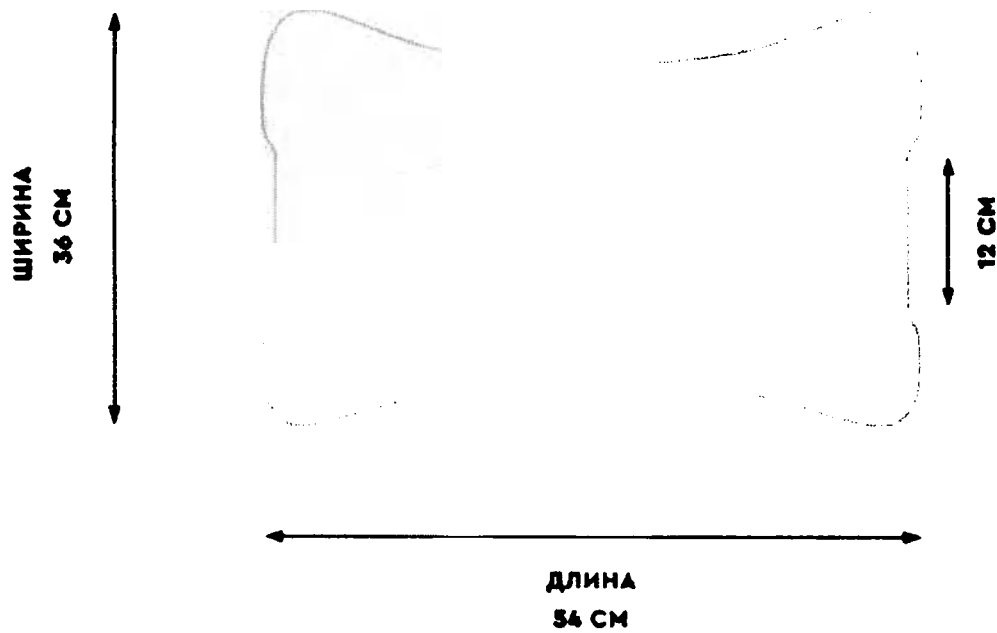

Прошито, пронумеровано и

Скреплено 30 листов

ООО «ТРЕЛАКС»

Генеральный директор Максимова Т.К.

Подпись

«10 Октября 2023г.

