


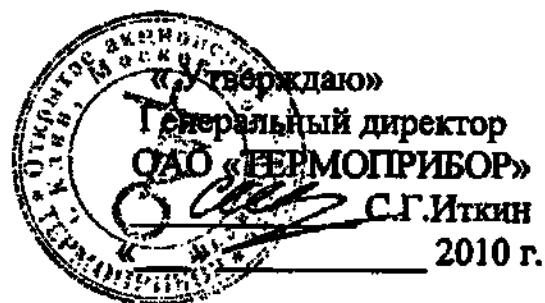

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ**
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**
- 4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ**
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. Назначение.

Термометр предназначен для измерения температуры тела человека в учреждениях здравоохранения и для личного использования.

2. Основные технические характеристики.

Термометр изготовлен в следующих исполнениях:

- термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный;
- термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный, на резервуар которого нанесено защитное полимерное покрытие;
- термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный, на весь корпус которого нанесено защитное полимерное покрытие.

Начальное значение шкалы термометра - от 32 до 35°C.

Конечное значение шкалы термометра - 42°C.

Цена деления шкалы - 0,1°C;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра - от плюс 0,1°C до минус 0,15°C.

3. Противопоказания к применению.

Нарушение целостности термометра.

4. Подготовка изделия к работе.

- извлечь термометр из футляра;
- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз;
- встряхнуть рукой термометр так, чтобы мениск столбика ртути оказался ниже цифровой отметки 35,3°C по шкале.

5. Порядок работы изделия.

- установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины/ паха человека и прижать рукой/ ногой для фиксации термометра. Избегать сильного давления на термометр;
- выдержать термометр около 5 минут;
- удалить термометр из подмышечной впадины/паха и отсчитать температуру по шкале.

6. Правила хранения и использования.

Термометры транспортируются любым видом закрытого транспорта. Перевозки авиатранспортом - по согласованию с авиаперевозчиком.

Термометры транспортируют и хранят в транспортной таре в защищенном от атмосферных осадков месте при температуре окружающей среды от минус 35 до плюс 42°C.

Гарантийный срок хранения термометров - 18 мес. с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации термометров - 12 мес. с даты продажи.