

Roche

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(INSTRUCTION FOR USE)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24)»

производства Roche Molecular Systems, Inc, 1080 U.S. Highway 202 South Branchburg, New Jersey 08876, USA

РАЗРАБОТЧИК:

Roche Molecular Systems, Inc, 1080 U.S. Highway 202 South Branchburg, New Jersey 08876, USA

Approved by

Roche Molecular Systems, Inc.

Date: February 8, 2023

Patricia Thompson
Patricia Thompson
Sr. Regulatory Specialist I



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 U.S. Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA

2023

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of

Alameda

On

2/8/23

before me,

Lynell Pratt, Notary Public

(Date)

(Here Insert Name and Title of the Officer)

personally appeared

Patricia Thompson

(Name(s) of Signer(s))

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.


WITNESS my hand and official seal.

Signature

Lynell Pratt

(Seal)

(Signature of Notary Public)

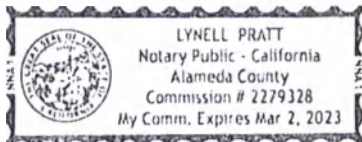



cobas omni Liquid Waste Plate 24

Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24)

REF	CONTENT	SYSTEM
08413983001	60 шт./упаковка	cobas® 5800

Русский

Назначение

Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24) предназначен для контролируемого сброса жидких отходов, а также для парковки наконечников для элюатов для их последующего использования. Для in vitro диагностики.

Показания

Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24) предназначен для контролируемого сброса жидких отходов, а также для парковки наконечников для элюатов для их последующего использования. Для in vitro диагностики.

Противопоказания

Не применимо, т.к. изделие предназначено для лабораторной диагностики.

Побочные действия

Не применимо, т.к. изделие предназначено для лабораторной диагностики.

Меры предосторожности и предупреждения

- Только для диагностики in vitro.
- Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые для работы со всеми лабораторными медицинскими изделиями.
- Не использовать повторно. Программное обеспечение систем cobas® 5800 отслеживает использование планшетов и отвергает использованные ранее планшеты.
- Используйте индивидуальные средства защиты.
- Во избежание загрязнения планшетов, рекомендуется вскрывать первичную упаковку непосредственно перед загрузкой.
- Убедитесь в том, что планшеты не повреждены, и что нет следов истирания или загрязнения. В противном случае утилизируйте планшеты.
- Если планшет упал на пол, его необходимо утилизировать.
- Перед загрузкой планшетов их необходимо всегда доводить до комнатной температуры.
- Утилизация использованных планшетов должна проводиться в соответствии с локальными правилами ликвидации отходов.
- Строго следуйте указаниям инструкции по применению.

Подробную информацию по работе с системой cobas® 5800 см. в соответствующем руководстве пользователя и инструкциях по применению тест-специфичных реагентов.

Принцип работы

Планшет для жидких отходов представляет собой плашку с 2 типа лунок, которые используется для различных функций:

- Утилизация жидких отходов
- Парковка наконечников для элюатов

Каждый планшет для жидких отходов состоит из 48 лунок (3 ряда, по 8 отверстий в форме воронок): 24 лунки для парковки наконечников и 24 лунки для сброса жидких отходов.

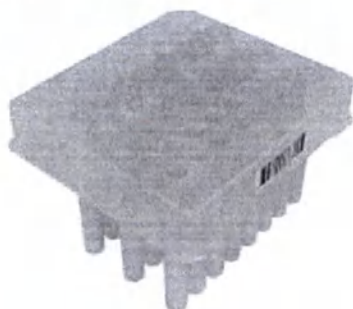


Рис. 1. Планшет для жидких отходов cobas omni Liquid Waste Plate 24.

Загрузка

Планшет для жидких отходов загружаются в секцию для планшетов для жидких отходов (максимально 4 планшета).

Загрузите планшет для жидких отходов так, чтобы скошенный угол находился сзади слева.

Этикетка со штрих-кодом должна быть с правой стороны. Использованные плашки автоматически выбрасываются в секцию для твердых отходов.


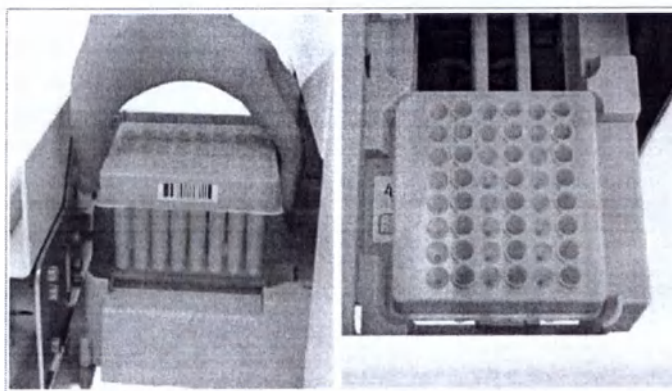


Рис. 2. Загрузка Планшет для жидких отходов в cobas 5800.

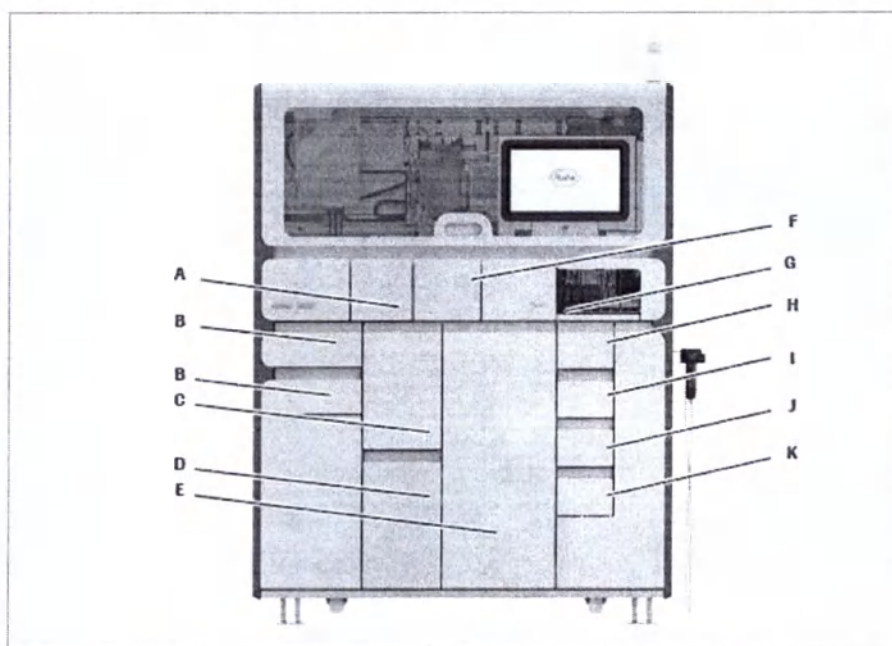

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| A Секция кассет MGP | E Секция твердых отходов | I Секция планшетов для жидких отходов |
| B Секция реагентных кассет | F Секция амплификационных планшетов | J Секция лотков наконечников элюата |
| C Секция объемных реагентов | G Секция мини-штативов контролей | K Секция лотков наконечников обработки |
| D Секция жидких отходов | H Секция планшетов обработки | |

Рис. 3. Общий вид системы cobas 5800 с секциями. I – секция планшетов для жидких отходов.

Информация о материалах

Планшет для жидких отходов Liquid waste plate 24: полипропилен, прозрачный

Первичная упаковка: полипропилен, прозрачный.

Вторичная упаковка: картон.

Изделие не содержит материалов растительного, животного и человеческого происхождения.

Комплект поставки

Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24).

Продукция Рош, обязательно снабжена инструкцией по применению. Инструкция по применению предоставляется пользователю отдельно. Печатная версия инструкции по применению не вложена физически в состав каждой упаковки изделия, при этом она печатается отдельно и предоставляется пользователю вместе с отгрузочными документами и иными. Дополнительно, пользователь всегда имеет возможность скачать инструкцию на нужном языке с сайта, ссылка на который указана на упаковке медицинского изделия.

Для получения дополнительного экземпляра печатной версии инструкции по применению необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2, тел.: (495) 229-69-99, факс: (495) 229-62-64.

Для получения электронной версии инструкции необходимо перейти на сайт, указанный на маркировке изделия, выбрать интересующий каталожный номер изделия и использовать ту версию инструкции, которая предназначена для использования на территории РФ (в наименовании такой версии указано «RU»).

Спецификация

cobas omni Liquid Waste Plate 24 - планшет для жидких отходов, предназначен для утилизации жидких отходов в Р-наконечниках и парковки Е наконечников (наконечников для элюатов).

Планшет для жидких отходов и парковки наконечников маркирован штрихкодом, состоит из 24 лунок в форме воронок для сброса отходов и 24 лунок для парковки наконечников. В коробке cobas omni Liquid Waste Plate 24 находится 60 штабелированных маркированных планшетов Liquid Waste Plate 24 в индивидуальной упаковке, разделенных картонными прокладками.

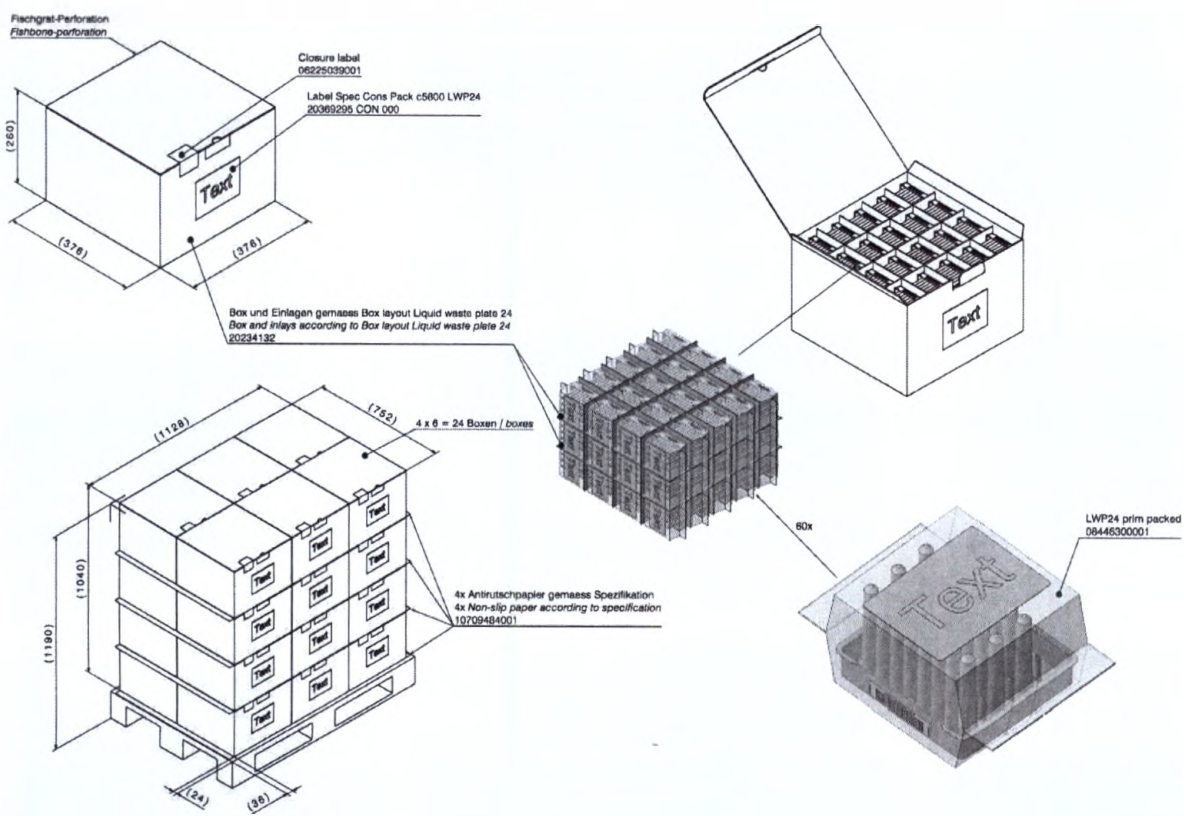

Closure label 06225039001	Запечатывающая этикетка 06225039001
Fishbone – perforation	Перфорация «рыбья кость»
Label Spec Cons Pack c5800 LWP24 20369295 CON 000	Спецификация маркировки Потребительская упаковка c5800 LWP24 20369295 CON 000
Box and inlays according to Box layout Liquid waste plate 24	Коробка и вкладыши согласно схеме компоновки коробки для Liquid waste plate 24
4 x 6 - 24 boxes	4 x 6 - 24 коробки
LWP24 prim packed	LWP24 в первичной упаковке
4x Non-slip paper according to specification	4x листов противоскользящей бумаги согласно спецификации

Рис. 4. Общий вид изделия в сборе cobas omni Liquid Waste Plate 24.

Необходимые материалы (не входят в комплект поставки)

- системы автоматизированные для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas
- Тест-специфичные реагенты

Дополнительные материалы более подробно см. в инструкции по применению тест-специфичных реагентов, а также в руководстве пользователя к аналитической системе.

Условия и сроки хранения

Планшет для жидких отходов cobas omni Liquid Waste Plate 24 стабилен при 2 – 32°C до окончания указанного срока годности (максимально 36 месяцев с даты изготовления, дату изготовления см. на упаковке). Планшет амплификационный предназначен для однократного применения.

Упаковка

Картонная упаковка содержит 60 планшетов для жидких отходов. Каждый планшет для жидких отходов состоит из 24 лунок в форме воронок для сброса отходов и 24 лунок для парковки наконечников (3 ряда, по 8 отверстий в форме воронок для сброса отходов и отсеков для парковки наконечников).

Каждый планшет для жидких отходов упакован в пакет из полипропилена.

Параметры планшета для жидких отходов:

длина 85,48 мм ± 0.5 мм,
ширина 77,0 мм ± 0.5 мм,
высота 56,21 мм ± 0.6 мм
вес: 33 г $\pm 10\%$

Параметры лунок для жидких отходов

Верхний внутренний диаметр: 7,3 мм $\pm 10\%$
Нижний внутренний диаметр: 1,77 мм $\pm 10\%$
Длина: 21,95 мм $\pm 10\%$

Параметры лунок для парковки наконечников

Верхний внутренний диаметр: 7,15 мм $\pm 10\%$
Нижний внешний диаметр: 6,89 мм $\pm 10\%$
Длина: 56,21 мм $\pm 10\%$

Тип размещения на приборе: Размещается в соответствующих секциях систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas 5800.

Вторичная упаковка:



Картонная коробка, размеры (длина x ширина x высота): 376 мм $\pm 10\%$ x 376 мм $\pm 10\%$ x 260 мм $\pm 10\%$.
Общий вес: 2657 г $\pm 10\%$

Упаковка изделия обеспечивает достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии соблюдения правил транспортировки. Упаковка не герметична.

Маркировка

Этикетки и процесс маркировки соответствуют требованиям, устанавливаемым Регламентом ЕС 2017/746 для медицинских изделий in vitro диагностики и стандартами EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1.

В соответствии с Регламентами EC Roche Diagnostics использует следующие символы и знаки:

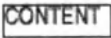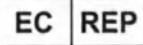Символ	Определение	Символ	Определение
	Содержимое		Срок годности
	Каталожный номер		Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Номер лота		Внимание, см. инструкцию по применению
	Производитель		Не допускать воздействия солнечного света
	Температурный диапазон		Не использовать повторно
	СЕ-маркировка		Глобальный номер товара (GTIN)
	QR-код		Уникальный идентификатор товара
	Импортер		Дата изготовления
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе		

Маркировка картонной упаковки для планшета

- 1. Наименование
- 2. Наименование аналитической системы
- 3. Каталожный номер
- 4. Глобальный номер товара (GTIN)
- 5. Номер лота
- 6. Срок годности
- 7. Дата изготовления
- 8. Содержимое: 60 планшетов
- 9. СЕ-маркировка
- 10. Медицинское изделие для диагностики in vitro
- 11. Предупреждение: Обратитесь к инструкции по применению, ссылка на электронный ресурс с эксплуатационной документацией
- 12. Температурный диапазон
- 13. Обозначение: планшет для жидких отходов
- 14. Наименование и адрес производителя
- 15. Наименование и адрес Уполномоченного представителя в ЕС
- 16. Импортер
- 17. Страна происхождения
- 18. Логотип производителя
- 19. QR-код
- 20. Уникальный идентификатор товара

Маркировка планшета

- 1. Наименование
- 2. Содержимое 1 шт.
- 3. Каталожный номер
- 4. Номер лота
- 5. Температурный диапазон
- 6. Срок годности
- 7. Медицинское изделие для диагностики in vitro
- 8. Логотип производителя
- 9. Предупреждение: Не допускать воздействия солнечного света

10. Предупреждение: Обратитесь к инструкции по применению, ссылка на электронный ресурс с эксплуатационной документацией
11. Предупреждение: Не использовать повторно
12. Знак CE
13. Обозначение: планшет для жидких отходов
14. Штрих-код

Макет маркировки на русском языке

Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc», 1080 US Highway 202 South, Branchburg, NJ, 08876, United States

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 08413983001

Требования к маркировке групповой упаковки (транспортной тары), установленные изготовителем

Товар с транспортной (групповой) маркировкой упаковки используется только для перемещения изделия с производственной площадки до собственного склада производителя на территории страны изготовителя. Т.о. товар с транспортной маркировкой не поставляется на территорию РФ. На транспортной маркировке указаны сведения, имеющиеся на регулярной маркировке, в том числе дата производства продукта фиксирована.

Условия транспортировки

Перед отправкой с завода продукт проходит контрольные проверки. Международные символы на упаковке и специальные инструкции по обращению указывают транспортировщику, как следует обращаться с этим продуктом. При получении продукта внимательно осмотрите упаковку. При наличии любых следов неправильного обращения или повреждения немедленно обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Roche Molecular Systems, Inc» («Рош Молекуляр Системс, Инк.») или к региональному поставщику.

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура при транспортировке 2 – 32 °C, влажность 10 – 95 %.

Стерилизация

Изделие поставляется нестерильным. Не подлежит повторному использованию и/или стерилизации пользователем.

Требования к охране окружающей среды

Медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду при соблюдении условий применения и мер предосторожности, указанных в инструкции.

Утилизация

Во избежание возможного загрязнения окружающей среды использованные планшеты должны утилизироваться в соответствии с местными государственными и / или больничными нормативными требованиями.

Правильное уничтожение и утилизация будет поддерживать сохранение природных ресурсов и содействовать защите здоровья человека и окружающей среды.

Утилизация отходов упаковки.

Упаковка продукции Roche Molecular Systems, Inc» («Рош Молекуляр Системс, Инк.») разработана с целью сведения к

минимуму загрязнения окружающей среды при сохранении целостности продукта во время транспортировки и хранения. Упаковочные отходы должны утилизироваться в местных пунктах сбора упаковки, в специализированные контейнеры, расположенные в муниципалитетах.

Утилизация изделия с истекшим сроком годности.

При утилизации и уничтожении планшета с истекшим сроком годности необходимо действовать в соответствии с гигиеническими нормативами и следовать официальным инструкциям по утилизации и уничтожению потенциально инфекционного и химического материала, принятым на территории Российской Федерации и в данном ЛПУ.

Ключевыми вопросами в стратегии управления отходами является оптимизация тактик и подходов к конечным продуктам, а также минимизация возможного загрязнения окружающей среды.

Более подробную информацию можно получить у производителя / уполномоченного представителя производителя.

Утилизация должна проводиться в соответствии с местными нормами законодательства, а также в соответствии с протоколами медицинского учреждения, где используются данные медицинские изделия.

Не утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства

Производитель Roche Molecular Systems, Inc» («Рош Молекуляр Системс, Инк.») гарантирует, что Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24) соответствуют спецификациям, заявленным на этикетке. Производитель несет ответственность за работу изделий только в случае их правильного использования в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил хранения и транспортировки.

Изделия должны использоваться только до истечения срока годности, который указан на упаковке.

НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ОДНОЗНАЧНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

По вопросам, связанным с качеством изделий, а также с их работой, нужно обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2, тел.: +7 (495) 229-69-99, факс: +7 (495) 229-62-64.

Претензии по качеству (рекламация)

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя.

В случае рекламации обращаться к производителю и / или уполномоченному представителю производителя.

Примечание:

Предназначен для совместного применения на:

- Система автоматизированная cobas® 5800 для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции с принадлежностями (cobas® 5800), производства производства Roche Molecular Systems, Inc. (Рош Молекуляр Системс, Инк.), 1080 US Highway 202 South, Branchburg, NJ, 08876, USA (США).

2022-05-31, версия 1

[Логотип: «Рош»]

Текст на русском языке Инструкции по применению на медицинское изделие: «Планшет для жидких отходов для систем автоматизированных для проведения анализа нуклеиновых кислот с помощью полимеразной цепной реакции cobas (cobas omni Liquid Waste Plate 24)»

производства «Рош Молекуляр Системс, Инк.» (Roche Molecular Systems, Inc.), 1080 ЮС Хайвей 202 Саус Бранчбург, Нью-Джерси, 08876, США (1080 U.S. Highway 202 South Branchburg, New Jersey 08876, USA)

РАЗРАБОТЧИК

**«Рош Молекуляр Системс, Инк.» (Roche Molecular Systems, Inc.),
1080 ЮС Хайвей 202 Саус Бранчбург, Нью-Джерси, 08876, США
(1080 U.S. Highway 202 South Branchburg, New Jersey 08876, USA)**

Утверждено

«Рош Молекуляр Системс, Инк.» (Roche Molecular Systems, Inc.)

Дата: 08 февраля 2023 года

[подпись]

Патрисия Томпсон (Patricia Thompson)

Старший специалист I отдела нормативно-правового регулирования

[Логотип: «Рош»]

[Штамп: «Рош Молекуляр Системс, Инк.» (Roche Molecular Systems, Inc.)
1080 ЮС Хайвей 202 Саус Бранчбург, Нью-Джерси, 08876, США
(1080 U.S. Highway 202 South Branchburg, NJ 08876 USA)]

2023

Нотариус или другое должностное лицо, составляющее настоящий Сертификат, удостоверяет исключительно идентичность лица, подписавшего документ, к которому прилагается настоящий Сертификат, а не правдивость, точность или достоверность этого документа.

Штат Калифорния

}

Округ АЛАМЕДА

}

08.02.2023 ко мне, Линелль Пратт (Lynell Pratt), нотариусу,

Дата

(Имя и должность уполномоченного лица)

лично явилась Патрисия Томпсон (Patricia Thompson),

Имя (имена) подписывающей стороны

которая предоставила мне достаточное подтверждение того, что она является лицом, чье имя указано на прилагаемом документе, и подтвердила, что он/она оформила указанный документ в соответствии с его/ее полномочиями, и его/ее подпись на прилагаемом документе подтверждает, что документ был совершен физическим лицом, либо юридическим лицом, от имени которого действует заявитель.

Осознавая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ, предусмотренную законодательством штата Калифорния, я свидетельствую верность заявления, содержащегося в предыдущем абзаце.

УДОСТОВЕРЕНО моей подписью и печатью.

/Подпись/

Подпись нотариуса

(печать нотариуса)

[Штамп: Линелль Пратт (Lynell Pratt)
Нотариус - Калифорния
Округ Аламеда
Лицензия № 2279328
Полномочия действительны до 02 марта 2023 года]

Перевод выполнил переводчик
Ремыга Семен Юрьевич

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

Российская Федерация

Город Москва

Пятого октября две тысячи двадцать третьего года

Я, Бабушкин Максим Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Туминой Веры Андреевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ремыги Семена Юрьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2347-н/77-2023- 7-3624.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

М.А. Бабушкин



[Handwritten signature]

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов



М.А. Бабушкин

[Handwritten signature]

