

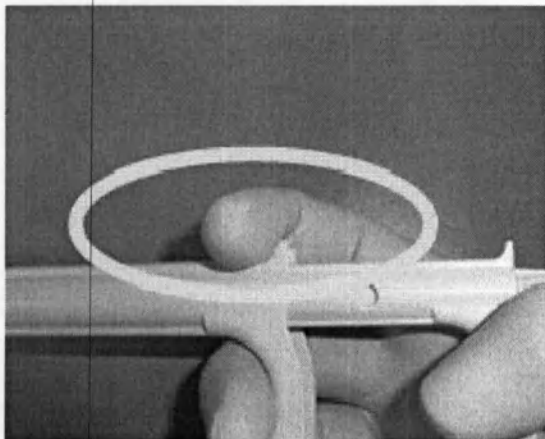


рис. 7

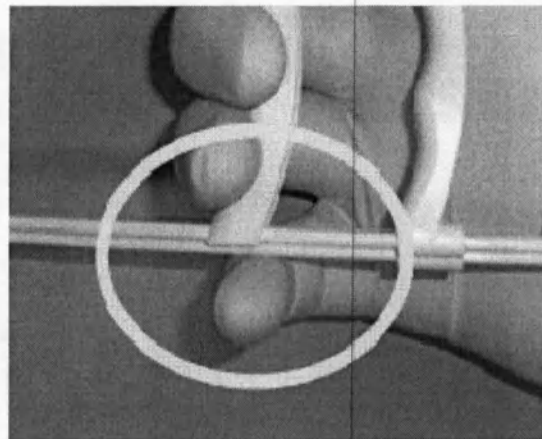


рис. 8

5. **После установки стента.**

- a. Извлеките систему доставки из организма пациента.
- b. Если требуется дополнительная репозиция стент-сосуд, выберите баллонный катетер, размер которого соответствует размеру сосуда, но не превышает диаметр самого стента.
- c. Удалите проводник и интродьюсер из организма пациента.
- d. Закройте входное отверстие раны по мере необходимости.
- e. Утилизируйте систему доставки стента, проводник, и интродьюсер.

Примечание: соответствующий режим медикаментозного лечения устанавливается индивидуально для каждого пациента на основе опыта врача и по его усмотрению.

14. **Описание и функциональное применение принадлежностей**

Для проведения стандартной процедуры транскутанной транслюминальной баллонной ангиопластики необходимо использование дополнительных принадлежностей:

- устройство раздувающее Angioflux,
- коннектор Y-образный.

14.1. **Описание и функциональное применение устройства раздувающего AngioFlux.**

Устройство раздувающее AngioFlux является инструментом однократного применения, представляет собой моноблок, включающий 30 мл колбу шприца с плунжером, который может быть соединен с колбой вращением рукоятки, манометр и коннектор высокого давления с вращающимся люеровским соединением. Манометр имеет градуировку от 0 до 30 атм с точностью измерения 3%. Единица измерения манометра – атмосфера. Это шкала эквивалентна шкале в PSI.

Назначение. Устройство раздувающее AngioFlux используется во время процедуры ангиопластики для раздувания баллонного катетера, контроля давления и сдувания баллона.

Функционирование. Плунжер свободен, когда нажаты кнопки манометра. В этой позиции вы можете продвинуть плунжер для аспирации или для введения контраста. Выключение кнопок блокирует плунжер. Поверните рукоятку по часовой стрелке для введения контраста. Давление в баллоне проецируется на экране манометра.

Подготовка:

1. Подготовьте емкость с контрастом для баллонного катетера, который рекомендован производителем.
2. Возьмите систему с манометром, повернув в нижнюю позицию и установите конец коннектора в емкость с контрастом.