

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные
текстурированные по ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 5.5, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 5,5

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



03.2023



03.2026

LOT 202

Артикул 222



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул.
Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8

ПУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 5,5, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:


5,5

ЛЕВАЯ

РАЗМЕР До стерил. - ГОЛУБОЙ После - КОРИЧНЕВЫЙ
15см x 200см
СЕРИЯ: 00160009
ЛОТ: 251022
ГАЗ.30
ПАР. В
До стерил. - КРАСНЫЙ После - ЖЕЛТЫЙ
До стерил. - ГОЛУБОЙ После - КОРИЧНЕВЫЙ
ГАЗ.ФОРМ

РУЛОНОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
EUROTYPE
10.2022
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ
ПОВРЕЖДЕН
ISO 11607
EN 858
CE
РУЛОНОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ПЛОСКИЕ (БУМАГА - ПЛЕНКА)
Хартия Теллерхейм Пакирование Техносервис Ко., Лтд.
Р/У №РРН 20150391 от 20.07.2020 г.

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 5,5, в индивидуальной внешней упаковке

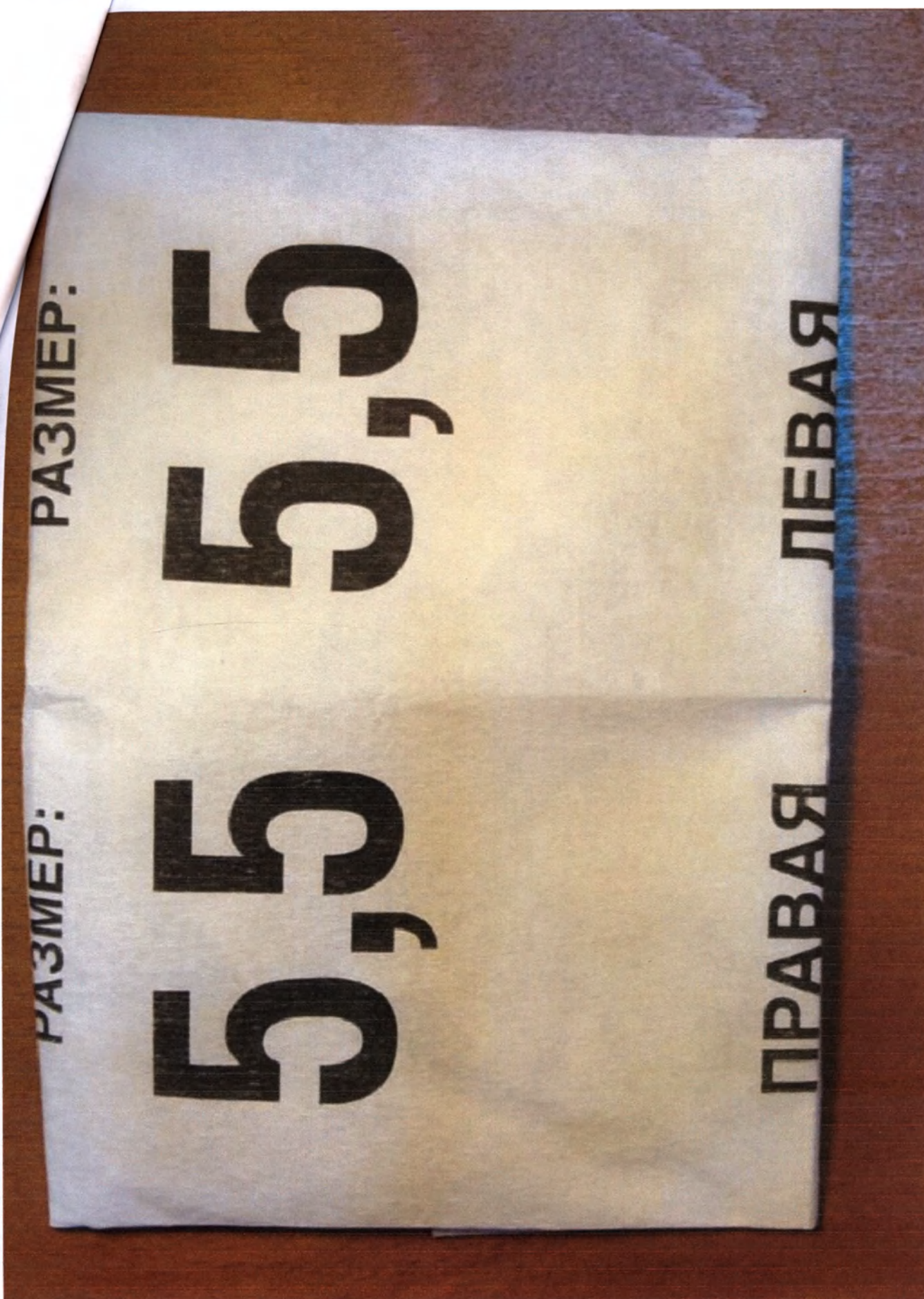

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 5,5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 5,5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.0, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 6.0

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



STERILE EO

03.2023



03.2026

LOT 202

Артикул 222



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с. п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
РУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.0, в индивидуальной внешней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.0, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

6,0

ПРАВАЯ

РАЗМЕР:

6,0

ПРАВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.5, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 6.5

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стянуть перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



03.2023



03.2026



202

АРТИКУЛ 222



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,

с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8

РУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.5, в индивидуальной внешней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.5, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

6,5

ЛЕВАЯ

РАЗМЕР:

6,5

ПРАВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 6.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.0, без упаковки

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
ПУ № _____

РАЗМЕР:

7,0

ПЕРВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.0, в индивидуальной внешней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.5, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТИРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 7.5

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТИРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



03.2023

03.2026

LOT 202

АРТИКУЛ 222



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

**Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
ПУ № _____**

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.5, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

7,5

ЛЕВАЯ

РАЗМЕР:

7,5

ПРАВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 7.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.0, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 8.0

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «П» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



03.2023 03.2026 LOT 202 АРТИКУЛ 222

ООО «Ройал Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
ПУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.0, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

8,0

ЛЕВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.0, в индивидуальной внешней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.5, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТИРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 8.5

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 4. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТИРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



ООО «Ройал Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
РУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.5, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

8,5

ЛЕВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.5, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

8,5

ПРАВАЯ

РАЗМЕР:

8,5

ЛЕВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 8.5, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 9.0, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: 9.0

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



03.2023



03.2026



202

Артикул 222



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
РУ № _____

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 9.0, в индивидуальной внешней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 9.0, в индивидуальной внешней упаковке

РАЗМЕР:

9,0

ЛЕВАЯ

РАЗМЕР:

9,0

ПРАВАЯ

Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, размер 9.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер 9.0, в индивидуальной внутренней упаковке



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, в сложенном состоянии



Перчатки хирургические из латекса гевей стерильные неопудренные текстурированные, в сложенном состоянии



Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные во вторичной групповой упаковке



Макет вторичной групповой упаковки

ООО «Ройал Краун»
671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский,
с.п. Турунтаевское с. Турунтаево, ул. Комсомольская,
дом 30, квартира 2
Место производства: 671260, Республика Бурятия,
р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 52238-2004 В ЧАСТИ п. 6, п. 7, п. 8

РУ № _____



LOT

Артикул

Дата изготовления

Срок годности: 3 года



STERILE

EO

Маркировка вторичной групповой упаковки

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 6. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

 **ВНИМАНИЕ** Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

**СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ! ПЕРЧАТКИ
ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!
ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ**

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

ПО ТУ 22.19.60-006-47211359-2023



Размер: 5,5 ● 6,0 ● 6,5 ● 7,0 ●
7,5 ● 8,0 ● 8,5 ● 9,0 ●

Количество: 25 пар ● 50 пар ●

Цвет: натуральный



ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: 5.5 ☐ 6.0 ☐ 6.5 ☐ 7.0 ☐ 7.5 ☐ 8.0 ☐ 8.5 ☐ 9.0 ☐

Количество упаковок: 18 штук по 25 пар ☐ 9 штук по 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Вес брутто 16,5 кг

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ



LOT

XXXXXX АРТИКУЛ XXXX



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 п.6, п.7, п.8

РУ № _____

Транспортная упаковка с маркировкой

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 49 листов

Директор ООО «Ройал Краун»
Бурдуковский А.Е.



Проекты маркировки медицинского изделия

**Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные
неопудренные текстурированные по ТУ 22.19.60-006-
47211359-2023**

Проект маркировки индивидуальной внешней стерилизационной упаковки
медицинского изделия

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-006-47211359-2023**

Дата изготовления XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: 5.5

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ

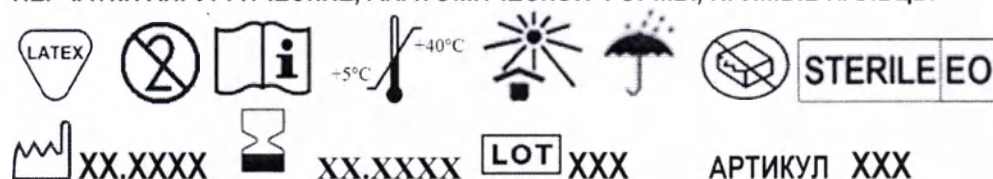

ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул.
Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 в части п.6, п.7, п.8
ПУ № _____

Проект маркировки индивидуальной внутренней стерилизационной упаковки
медицинского изделия

РАЗМЕР: 5,5 ПРАВАЯ	РАЗМЕР: 5,5 ЛЕВАЯ
---	--

Проект маркировки групповой упаковки медицинского изделия

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО

ТУ 22.19.60-006-47211359-2023

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: 5.5 ☐ 6.0 ☐ 6.5 ☐ 7.0 ☐ 7.5 ☐ 8.0 ☐ 8.5 ☐ 9.0 ☐

Количество: 25 пар ☐ 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала и пациента от различной взаимной контаминации при проведении хирургических операций.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть внешнюю упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки вместе с внутренней упаковкой. 4. Последовательно надеть перчатки, обращая внимание на маркировку внутренней упаковки: перчатку с маркировкой «Л» на левую руку, перчатку с маркировкой «П» на правую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 6. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ

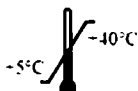

STERILE EO



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXx ARTIKUL XXXX



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский. с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 п.6, п.7, п.8

РУ № _____

Проект маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО

ТУ 22.19.60-006-47211359-2023

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: 5.5 ☐ 6.0 ☐ 6.5 ☐ 7.0 ☐ 7.5 ☐ 8.0 ☐ 8.5 ☐ 9.0

☐

Количество упаковок: 18 штук по 25 пар ☐ 9 штук по 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Вес брутто 16,5 кг


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

**СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ
УПАКОВКИ!**

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,
ПРЯМЫЕ ПАЛЬЦЫ**

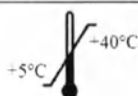

LOT

XXXXXX АРТИКУЛ XXXX



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п.

Турунтаевское, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н

Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52238-2004 п.6, п.7, п.8

РУ № _____

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 листов

Директор ООО «Ройал Краун»
Бурдуковский А.Е.

