



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подушки ортопедические по ТУ 9396 - 004- 97965187 – 2013

2013 г.
г. Уфа

1. Описание и работа.....	стр.3
1.1. Назначение изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.3
1.3. Состав изделия.....	стр.4
1.4. Устройство и работа.....	стр.4
1.5. Маркировка.....	стр. 5
1.6. Упаковка.....	стр.5
2. Показания к применению.....	стр.5
3. Противопоказания к применению.....	стр.6
4. Использование по назначению.....	стр.6
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.6
4.2. Подготовка изделия к работе.....	стр.6
4.3. Использование изделия.....	стр.6
5. Техническое обслуживание.....	стр.6
6. Хранение.....	стр.6
7. Транспортирование.....	стр.6
8. Утилизация.....	стр.6
9. Гарантии производителя	стр.6
10. Контактные данные производителя.....	стр.7

Подушки ортопедические (далее подушки) – медицинское изделие, применяемое в восстановительной и профилактической медицине (больницы, лечебно-профилактические учреждения, домашние условия) для медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функций.

1)Описание и работа

1.1)Назначение изделия

- **Подушка на сидение ортопедическая №1 и №2**

Подушка на сидение ортопедическая №1 и №2 используется для коррекции нарушений осанки и уменьшения нагрузки на мышцы поясницы при длительной работе в положении «сидя». Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

- **Подушка ортопедическая (под голову)**

Подушка ортопедическая (под голову) обеспечивает полноценный отдых для шеи и спины, незаменима при заболеваниях позвоночника и суставов, таких, как остеохондроз, сколиоз, смещение позвонков, а также для реабилитации после травм шейного отдела позвоночника. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

- **Подушка ортопедическая (под шею)**

Подушка ортопедическая (под шею) для умеренной фиксации и стабилизации шейного отдела позвоночника во время сна, мягкой опоры головы, релаксации связочного аппарата и мышц шейного отдела позвоночника, массажного воздействия на них. Конструкция в форме подковы учитывает анатомо-физиологические особенности шейного отдела при моделировании позиции головы. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

- **Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая)**

Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая) позволяет расслабиться перенапряженным мышцам ног. Снимает избыточную нагрузку и отеки ног. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

1.2)Технические характеристики

Основные размеры подушек представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование изделия	Длина, мм	Ширина, мм / Диаметр (для валиков)	Высота, мм	Масса, гр.
Подушка на сидение ортопедическая №1	350	350	100/50	260
Подушка на сидение ортопедическая №1	400	400	60	250
Подушка ортопедическая (под голову)	500	330	80/110	600
Подушка ортопедическая (под шею)	300	300	50 - 90	150
Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая)	700	400	50/150	600

Подушки имеют категорию мягкости I - III по ГОСТ 19917:

Наименование подушки	Категория мягкости
Подушка на сидение ортопедическая №1	I
Подушка на сидение ортопедическая №2	I
Подушка ортопедическая (под голову)	III
Подушка ортопедическая (под шею)	I
Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая)	II

1.3) Состав изделия

Модификации подушек отличаются между собой формой, наполнителями и чехлами. Основные модификации подушек представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование подушек	Нап./чех.	Используемые материалы
1	2	3	4
1	Подушка на сидение ортопедическая №1	Наполнитель	Пенополиуретан высокоэластичный марка HR
		Чехол	ТК-1 или Поликоттон
2	Подушка на сидение ортопедическая №2	Наполнитель	Пенополиуретан высокоэластичный марка HR
		Чехол	ТК-1 или Поликоттон
3	Подушка ортопедическая (под голову)	Наполнитель	Пенополиуретан вязкоэластичный марка VE
		Чехол	Трикотажное полотно или ТК-1 или Поликоттон
4	Подушка ортопедическая (под шею)	Наполнитель	Гранулы силиконовые
		Чехол	Ткань трикотажная
5	Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая)	Наполнитель	Пенополиуретан стандартный марка ST
		Чехол	ТК-1 или ТК-3 или Поликоттон

1.4) Устройство и работа

- **Подушка на сидение ортопедическая №1 и №2**

Подушка на сидение ортопедическая №1 и №2, ортопедический эффект получается от равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела достигается благодаря упруго перетекающим элементам, расположенным внутри подушки.

- **Подушка ортопедическая (под голову)**

Подушка ортопедическая (под голову) снижает тонус мышц шеи, улучшает кровоснабжение головного мозга, ликвидирует чувство онемения в руках. Поддерживает позвоночник и шею в анатомически правильном положении, распределяет нагрузку между разными группами мышц, идеально приспосабливается к форме и весу головы и предоставляет максимальный комфортный и здоровый сон. После пробуждения, подушка вновь приобретает свою исходную естественную форму.

- **Подушка ортопедическая (под шею)**

Подушка ортопедическая (под шею) - форма изделия, специальный материал, используемый при производстве данного изделия, снижает утомляемость, нормализует кровообращение шейного отдела и создает дополнительный комфорт при поездках в автомобиле, просмотре телепередач, чтении книг и т.д. Подушка особенно подходит для пациентов с заболеваниями и посттравматическими патологиями шейного отдела позвоночника.

- **Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая)**

Подушка ортопедическая (под ноги разгружающая) благодаря клиновидной форме, позволяет расслабить перенапряженные мышцы ног.

1.5)Маркировка

Маркировка подушек содержит следующую информацию:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- тип подушки;
- дата изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.

Также допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (например, массу нетто, сведения о сертификации и др.).

Маркировка может выполняться на самом изделии, пришиваться к кромке подушки, а также на бирке, прикрепляемой к упаковочным пакетам, таре.

На транспортной таре нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение подушки;
- количество подушек в упаковке;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Беречь от влаги".

1.6)Упаковка

Упаковка подушек обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.

Подушки упакованы в упаковочный рукав из полиэтилена и запаяны.

2)Показания к применению

Показания к применению для **подушек на сидение ортопедических №1 и №2:**

- болевые синдромы в области крестца, крестцово-подвздошных сочленений, копчика, седалищных бугров;
- дискомфорт и мышечное напряжение в области ягодиц и задней поверхности бедер при длительном сидении.

Показания к применению для **подушки ортопедической (под голову):**

- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- головные боли;
- хронические боли в шее;
- головокружение;
- травмы шейного отдела позвоночника;
- смещение позвонков;
- вертебро-базиллярная недостаточность;
- повышенный тонус мышц шеи, нарушение мышечного баланса;
- комплексное лечение заболеваний шеи с помощью методов мануальной терапии, Физиолечения и других методов воздействия;
- нарушения сна;
- миозиты и неврологические боли различной этиологии.

Показания к применению для **подушки ортопедической (под шею):**

- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- хронические боли в шее.

Показания к применению для **подушки ортопедической (под ноги разгружающая):**

- обеспечение оттока крови и межклеточной жидкости из нижних конечностей;

- варикозная болезнь вен нижних конечностей;
- хроническая венозная недостаточность;
- состояние после травм нижних конечностей (особенно при наличии отёка);
- повышенная утомляемость.

3)Противопоказания к применению

- Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены подушки, острые воспалительные заболевания кожи в области применения;

4)Использование по назначению

4.1)Эксплуатационные ограничения

- при первичном использовании изделия возможен период привыкания к изделию, но не более 2-х недель;
- при температуре воздуха ниже 1°C возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать подушку при температуре ниже 1°C более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки до комнатной температуры. Эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 85% (при +25°C);
- для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать

4.2)Подготовка изделия к использованию

- перед использованием снимите с подушки полиэтиленовый мешок;
- пройти дезинфекцию наружных поверхностей 2х кратным протираанием подушки с салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос". Салфетки должны быть отжаты.

4.3)Использование изделия

- поместите подушку на предназначенное для неё основание.

5)Техническое обслуживание

- подушки требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и сушки.

6)Хранение

6.1)Условия хранения

Подушки должны храниться в закрытом сухом помещении вдали от солнечных лучей, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 10 до плюс 40 °C и относительной влажности не более 85 %.

7)Транспортирование

Подушки допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта. Не допускается выгружать подушки сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

8)Утилизация

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.

9)Гарантии

- гарантийный срок на подушку 1 год;
- срок службы не менее 1 года;

- при использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта;
- эксплуатация согласно руководству по эксплуатации обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки.

10) Контактные данные

ООО "Компания ВиЦыАн"

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 44, офис 143.

Адрес производства: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д. 15/2
тел/факс (347) 223-39-23, 223-57-75, 282-80-49

E-mail: office@vitsyan.ru

Адрес в сети интернет: www.vitsvan.ru

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 7 (семь) листа (ов)

Директор

ООО «Компания ВиЦыАн»

ЦА

В.Ю.Цыганков

