

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Инмедикс»

Костева М.В.

«19» «Июль» 2023 г.



Руководство по эксплуатации
Мебель медицинская для лечебных учреждений в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

г. Москва 2023

Настоящее руководство по эксплуатации на Мебель медицинская для лечебных учреждений в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019, предназначено для ознакомления с ними и их работой, и содержит сведения по установке, регламенту работы и паспортные данные на изделия.

1. Наименование медицинского изделия.

Мебель медицинская для лечебных учреждений в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Варианты исполнения:

1. Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019,

варианты исполнения:

1. Модель T01 в составе:

- 1.1 стойка – 1 шт.
- 1.2 сиденье – 1 шт.
- 1.3 опора – 1 шт.
- 1.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 1.5 колесики – 4 шт.
- 1.6 заглушки – 4 шт (при необходимости)
- 1.7 фурнитура (саморез) – 4 шт.
- 1.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Модель T02 в составе:

- 2.1 стойка – 1 шт.
- 2.2 сиденье – 1 шт.
- 2.3 опора – 1 шт.
- 2.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 2.5 заглушки – 5 шт.
- 2.6 фурнитура (саморез, винт) – 7 шт.
- 2.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Модель T02/К в составе:

- 3.1 стойка – 1 шт.
- 3.2 сиденье – 1 шт.
- 3.3 опора – 1 шт.
- 3.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 3.5 колесики – 5 шт.
- 3.6 фурнитура(саморез,винт) – 7 шт.
- 3.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Модель T03 в составе:

- 4.1 стойка – 1 шт.
- 4.2 сиденье – 1 шт.
- 4.3 опора – 1 шт.
- 4.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 4.5 заглушки – 5 шт.
- 4.6 фурнитура (саморез. винт) – 7 шт.

4.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Модель T03/К в составе:

5.1 стойка – 1 шт.

5.2 сиденье – 1 шт.

5.3 опора – 1 шт.

5.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.

5.5 колесики – 5 шт.

5.6 фурнитура (саморез, винт) – 7 шт.

5.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Модель T05 в составе:

6.1 стойка – 1 шт.

6.2 сиденье – 1 шт.

6.3 опора – 1 шт.

) 6.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.

6.5 колесики – 5 шт.

6.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)

6.7 фурнитура: винт М6х20– 4 шт., ключ – 1 шт.

6.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Модель T06 в составе:

7.1 стойка – 1 шт.

7.2 сиденье – 1 шт.

7.3 опора – 1 шт.

7.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.

7.5 колесики – 5 шт.

7.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)

7.7 фурнитура: винт М6х20– 4 шт., ключ – 1 шт.

9.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Модель T08 в составе:

8.1 стойка – 1 шт.

8.2 сиденье – 1 шт.

8.3 опора – 1 шт.

8.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.

8.5 колесики – 4 шт.

8.6 заглушки – 4 шт. (при необходимости)

8.7 фурнитура (винт) – 5 шт.

8.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Модель T09 в составе:

9.1 стойка – 1 шт.

9.2 сиденье – 1 шт.

9.3 опора – 1 шт.

- 9.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 9.6 заглушки – 5 шт.
- 9.7 фурнитура (винт) – 7 шт.
- 9.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Модель T09/К в составе:

- 10.1 стойка – 1 шт.
- 10.2 сиденье – 1 шт.
- 10.3 опора – 1 шт.
- 10.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 10.5 колесики – 5 шт.
- 10.6 фурнитура (винт) – 12 шт.
- 10.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Модель T10 в составе:

- 11.1 стойка – 1 шт.
- 11.2 сиденье – 1 шт.
- 11.3 опора – 1 шт.
- 11.4 колесики – 5 шт.
- 11.5 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 11.6 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 11.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Модель T10-B в составе:

- 12.1 стойка – 1 шт.
- 12.2 сиденье – 1 шт.
- 12.3 опора – 1 шт.
- 12.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 12.5 колесики – 5 шт.
- 12.6 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 12.7 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 12.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Модель T11 в составе:

- 13.1 стойка – 1 шт.
- 13.2 сиденье – 1 шт.
- 13.3 опора – 1 шт.
- 13.4 колесики – 5 шт.
- 13.5 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 13.6 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 13.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Модель T11-B в составе:

- 14.1 стойка – 1 шт.
- 14.2 сиденье – 1 шт.

- 14.3 опора – 1 шт.
- 14.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 14.5 колесики – 5 шт.
- 14.6 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 14.7 фурнитура (винт) – 6 шт.
- 14.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

15.Модель Т16 в составе:

- 15.1 стойка– 1шт.
- 15.2 сиденье – 1 шт.
- 15.3 опора – 1 шт.
- 15.4 колесики – 5 шт.
- 15.5 фурнитура (винт) – 5шт.
- 15.6 руководство по эксплуатации - 1шт.

16.Модель Т16/Н в составе:

- 16.1 стойка – 1шт.
- 16.2 сиденье – 1 шт.
- 16.3 опора – 1 шт.
- 16.4 колесики – 5 шт.
- 16.5 фурнитура (винт) – 5шт.
- 16.6 руководство по эксплуатации - 1шт.

17.Модель Т17 в составе:

- 17.1 стойка – 1шт.
- 17.2 сиденье – 1 шт.
- 17.3 опора – 1 шт.
- 17.4 колесики – 5 шт.
- 17.5 фурнитура (винт) – 5шт.
- 17.6 руководство по эксплуатации - 1шт.

18.Модель Т17/Н в составе:

- 18.1 стойка – 1шт.
- 18.2 сиденье – 1 шт.
- 18.3 опора – 1 шт.
- 18.4 колесики – 5 шт.
- 18.5 фурнитура (винт) – 5шт.
- 18.6 руководство по эксплуатации - 1шт.

2.Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019, варианты исполнения:

1.Модель КР01 в составе:

- 1.1 стойка – 1шт.
- 1.2 сиденье – 1 шт.
- 1.3 опора – 1 шт.

- 1.4 спинка- 1 шт.
- 1.5 колесики – 4 шт.
- 1.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 1.7 заглушки– 4 шт. (при необходимости)
- 1.8 фурнитура (саморез) – 8 шт.
- 1.9 руководство по эксплуатации - 1шт.

2.Модель КР02 в составе:

- 2.1 стойка – 1шт.
- 2.2 сиденье – 1 шт.
- 2.3 опора – 1 шт.
- 2.4 спинка- 1 шт.
- 2.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 2.6 заглушки– 5 шт.
- 2.7 фурнитура (саморез) – 11 шт.
- 2.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

3.Модель КР02/К в составе:

- 3.1 стойка – 1шт.
- 3.2 сиденье – 1 шт.
- 3.3 опора – 1 шт.
- 3.4 спинка- 1 шт.
- 3.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 3.6 колесики – 5 шт.
- 3.7 фурнитура (саморез) – 11 шт.
- 3.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

4.Модель КР02-1 в составе:

- 4.1 стойка – 1шт.
- 4.2 сиденье – 1 шт.
- 4.3 опора – 1 шт.
- 4.4 спинка- 1 шт.
- 4.5 подлокотник – 2 шт.
- 4.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 4.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 4.8 колесики – 5 шт.
- 4.9 фурнитура (саморез, винт) – 17 шт.
- 4.10 руководство по эксплуатации - 1шт.

5.Модель КР02-1/Н в составе:

- 5.1 стойка – 1шт.
- 5.2 сиденье – 1 шт.
- 5.3 опора – 1 шт.
- 5.4 спинка- 1 шт.
- 5.5 подлокотник – 2 шт.

- 5.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 5.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 5.8 колесики– 5 шт.
- 5.9 фурнитура (саморез, винт) – 17 шт.
- 5.10 руководство по эксплуатации - 1шт.

6.Модель КР03 в составе:

- 6.1 стойка – 1шт.
- 6.2 сиденье – 1 шт.
- 6.3 опора – 1 шт.
- 6.4 спинка- 1 шт.
- 6.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 6.6 заглушки– 5 шт.
- 6.7 фурнитура (саморез, винт) – 11 шт.
- 6.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

7.Модель КР03/К в составе:

- 7.1 стойка – 1шт.
- 7.2 сиденье – 1 шт.
- 7.3 опора – 1 шт.
- 7.4 спинка- 1 шт.
- 7.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 7.6 колесики– 5 шт.
- 7.7 фурнитура (саморез, винт) – 11 шт.
- 7.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

8.Модель КР04 в составе:

- 8.1 стойка – 1шт.
- 8.2 сиденье – 1 шт.
- 8.3 опора – 1 шт.
- 8.4 спинка- 1 шт.
- 8.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 8.6 колесики – 5 шт.
- 8.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 8.8 фурнитура: винт М6х25 – 4 шт., ключ – 1 шт.
- 8.9 руководство по эксплуатации - 1шт.

9.Модель КР04/Б в составе:

- 9.1 стойка – 1шт.
- 9.2 сиденье – 1 шт.
- 9.3 опора – 1 шт.
- 9.4 спинка- 1 шт.
- 9.5 фурнитура: винт М6х25- 4 шт., ключ – 1 шт.
- 9.6 руководство по эксплуатации – 1 шт.

10. Модель КР06 в составе:

- 10.1 стойка – 1 шт.
- 10.2 сиденье – 1 шт.
- 10.3 опора – 1 шт.
- 10.4 спинка- 1 шт.
- 10.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 10.6 колесики – 5 шт.
- 10.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 10.8 фурнитура: винт М6х25 – 4 шт., ключ – 1 шт.
- 10.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Модель КР09 в составе:

- 11.1 стойка – 1 шт.
- 11.2 сиденье – 1 шт.
- 11.3 опора – 1 шт.
- 11.4 спинка- 1 шт.
- 11.5 подлокотник – 2 шт.
- 11.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 11.7 колесики – 4 шт.
- 11.8 заглушки– 4 шт. (при необходимости)
- 11.9 фурнитура (саморез) – 12 шт.
- 11.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Модель КР10-1 в составе:

- 12.1 стойка – 1 шт.
- 12.2 сиденье – 1 шт.
- 12.3 опора – 1 шт.
- 12.4 спинка- 1 шт.
- 12.5 подлокотник – 2 шт. (при необходимости)
- 12.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 12.7 колесики – 4 шт.
- 12.8 заглушки– 4 шт. (при необходимости)
- 12.9 фурнитура (винт) – от 8 до 14 шт.
- 12.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Модель КР10-2 в составе:

- 13.1 стойка – 1 шт.
- 13.2 сиденье – 1 шт.
- 13.3 опора – 1 шт.
- 13.4 спинка- 1 шт.
- 13.5 подлокотник – 2 шт. (при необходимости)
- 13.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 13.7 заглушки – 5 шт.
- 13.8 фурнитура (винт) – от 11 до 17 шт.
- 13.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Модель КР10-2К в составе:

- 14.1 стойка – 1 шт.
- 14.2 сиденье – 1 шт.
- 14.3 опора – 1 шт.
- 14.4 спинка- 1 шт.
- 14.5 подлокотник– 2 шт. (при необходимости)
- 14.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 14.7 колесики – 5 шт.
- 14.8 фурнитура (винт) – от 11 до 17 шт.
- 14.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Модель КР11 в составе:

- 15.1 стойка – 1 шт.
- 15.2 сиденье – 1 шт.
- 15.3 опора – 1 шт.
- 15.4 спинка- 1 шт.
- 15.5 колесики – 5 шт.
- 15.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 15.7 фурнитура (винт, гайка) – 15 шт.
- 15.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Модель КР11/П в составе:

- 16.1 стойка – 1 шт.
- 16.2 сиденье – 1 шт.
- 16.3 опора – 1 шт.
- 16.4 спинка- 1 шт.
- 16.5 подлокотник – 2 шт.
- 16.6 колесики – 5 шт.
- 16.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 16.8 фурнитура (винт, саморез, гайка) – 25 шт.
- 16.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Модель КР11-В в составе:

- 17.1 стойка – 1 шт.
- 17.2 сиденье – 1 шт.
- 17.3 опора – 1 шт.
- 17.4 спинка- 1 шт.
- 17.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 17.6 колесики – 5 шт.
- 17.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 17.8 фурнитура (винт, гайка) – 16 шт.
- 17.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Модель КР11-В/П в составе:

- 18.1 стойка – 1 шт.
- 18.2 сиденье – 1 шт.
- 18.3 опора – 1 шт.
- 18.4 спинка- 1 шт.
- 18.5 подлокотник – 2 шт.
- 18.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 18.7 колесики – 5 шт.
- 18.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 18.9 фурнитура (винт,саморез, гайка) – 26 шт.
- 18.10 руководство по эксплуатации - 1шт.

19.Модель КР12 в составе:

- 19.1 стойка– 1шт.
- 19.2 сиденье – 1 шт.
- 19.3 опора – 1 шт.
- 19.4 спинка- 1 шт.
- 19.5 колесики – 5 шт.
- 19.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 19.7 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 19 шт.
- 19.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

20.Модель КР12/П в составе:

- 20.1 стойка– 1шт.
- 20.2 сиденье – 1 шт.
- 20.3 опора – 1 шт.
- 20.4 спинка- 1 шт.
- 20.6 подлокотник – 2 шт.
- 20.7 колесики – 5 шт.
- 20.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 20.9 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 25 шт.
- 20.10 руководство по эксплуатации - 1шт.

21.Модель КР12-В в составе:

- 21.1 стойка – 1шт.
- 21.2 сиденье – 1 шт.
- 21.3 опора – 1 шт.
- 21.4 спинка- 1 шт.
- 21.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 21.6 колесики – 5 шт.
- 21.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 21.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 20 шт.
- 21.9 руководство по эксплуатации - 1шт.

22.Модель КР12-В/П в составе:

- 22.1 стойка – 1шт.

- 22.2 сиденье – 1 шт.
- 22.3 опора – 1 шт.
- 22.4 спинка- 1 шт.
- 22.5 подлокотник – 2 шт.
- 22.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 22.7 колесики – 5 шт.
- 22.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 22.9 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 26 шт.
- 22.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

23. Модель КР15 в составе:

- 23.1 стойка – 1 шт.
- 23.2 сиденье – 1 шт.
- 23.3 опора – 1 шт.
- 23.4 спинка- 1 шт.
- 23.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 23.6 колесики – 5 шт.
- 23.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 23.8 фурнитура (саморез) – 8 шт.
- 23.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Модель КР15/П в составе:

- 24.1 стойка – 1 шт.
- 24.2 сиденье – 1 шт.
- 24.3 опора – 1 шт.
- 24.4 спинка- 1 шт.
- 24.5 подлокотник – 2 шт.
- 24.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 24.7 колесики – 5 шт.
- 24.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 24.9 фурнитура (саморез) – 12 шт.
- 24.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Модель КР19 в составе:

- 25.1 каркас – 1 шт.
- 25.2 сиденье – 1 шт.
- 25.3 опора – 1 шт.
- 25.4 подставка для ног - 1 шт.
- 25.5 заглушки – 4 шт.
- 25.6 фурнитура (винт, гайка) - 4 шт.
- 25.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

26. Модель КР20 в составе:

- 26.1 стойка – 1 шт.
- 26.2 сиденье – 1 шт.

- 26.3 опора – 1 шт.
- 26.4 спинка- 1 шт.
- 26.5 колесики – 5 шт.
- 26.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 26.7 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 26.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Модель КР22 в составе:

- 27.1 стойка – 1 шт.
- 27.2 сиденье – 1 шт.
- 27.3 опора– 1 шт.
- 27.4 спинка- 1 шт.
- 27.5 колесики – 5 шт.
- 27.6 кольцо (ножной подъем) - 1 шт.
- 27.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 27.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 27.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

28. Модель КР22/Н в составе:

- 28.1 стойка – 1 шт.
- 28.2 сиденье – 1 шт.
- 28.3 опора – 1 шт.
- 28.4 спинка- 1 шт.
- 28.5 колесики – 5 шт.
- 28.6 кольцо (ножной подъем) - 1 шт.
- 28.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 28.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 28.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

(далее по тексту – изделия или мебель).

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «Инмедикс», 192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38 корпус 2 лит. А, квартира 61

Место производства: 196240, город Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.6, лит.Ж, часть помещения 1-Н (часть пом.№22,23)

Телефон: 812 -408-49-31;
495-648-49-31

3. Область применения медицинского изделия.

в медицинских учреждениях, в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и социальных учреждениях.

4. Назначение медицинского изделия.

Предназначена для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.

Показания: Создание для пользователей функционального рабочего места, для удобства размещения пациентов.

Потенциальными потребителями медицинских изделий являются люди от 3 до 100 лет весом не более 120 кг.

5. Противопоказания при применении медицинского изделия.

Противопоказаний к применению нет.

6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Медицинской мебелью в лечебных учреждениях пользуется не только персонал, но и пациенты с различным состоянием здоровья, в том числе больные, страдающие инфекционными заболеваниями. Именно поэтому строгое соблюдение санитарных норм, поддержание порядка и чистоты в лечебных, лечебно – профилактических, социальных учреждениях является первоочередной задачей, поэтому мебель должна выдерживать частую влажную очистку и обработку дезинфицирующими средствами, не должна подвергаться гниению, коррозии, размножению паразитов.

7. Возможные побочные действия при использовании мебели.

Чрезмерно высокая нагрузка на мебель может привести к её поломке, в результате чего может быть нанесен ущерб здоровью. Нагрузка на изделие не более 120 кг.

8. Технические характеристики.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т01 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Табурет винтовой. Опора четырехлучевая на заглушках или колесиках, или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья: обивка, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан. Толщина обивки от 20 до 60 мм

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т02 и Т02/К (на колесиках) предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Табурет винтовой. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках изготовлена из стальной трубы Ø30, на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног, регулируемую по высоте. Варианты исполнения сиденья: обивка, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан. Толщина обивки от 20 до 60 мм

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т03 и Т03/К (на колесиках) предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Табурет винтовой. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках изготовлена из стальной трубы Ø30, на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное угловое кольцо – подставку

для ног, регулирующую по высоте. Варианты исполнения сиденья: обивка, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан. Толщина обивки от 20 до 60 мм

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

модель T05 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья: обивка, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

модель T06 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья: обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель T08 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Табурет винтовой. Опора четырехлучевая на заглушках или колесиках, или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

модель T09 и T09/К (на колесиках) предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Табурет винтовой. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках изготовлена из стальной трубы Ø30, на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног, регулирующую по высоте. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель T10 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из пластика разлет опоры 560 мм. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные. Также может быть обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель T10-B предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из пластика разлет опоры 560 мм. Комплектуется опорным кольцом-опорой для ног, регулируется по высоте. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные. Также может быть обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

модель T11 предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента. Стойка Ø50 мм.

Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø 30 мм. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные. Также может быть обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т11-В **предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента.** Стойка Ø50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø 30 мм. Комплектуется кольцом опорой для ног, регулируется по высоте. Варианты исполнения сиденья – литой полиуретан. Формы сидений круглые, прямоугольные, прямоугольные с вырезом под руку, сиденье седло, квадратные. Также может быть обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т16 (высота сиденья 580 до 730) и Т16/Н (высота сиденья 450 до 600) **предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента.** Стойка Ø50мм. Регулировка высоты – газлифт, регулировка высоты с помощью ножного кольца. Диаметр основания 600-650 мм. Варианты исполнения сиденья: обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т17 (высота сиденья 580 до 730) и Т17/Н (высота сиденья 450 до 600) **предназначен для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента.** Стойка Ø50мм. Регулировка высоты – газлифт, регулировка высоты с помощью ножного кольца. Может быть на колесиках, заглушках или регулируемых опорах. Диаметр основания 550-600 мм. Варианты исполнения сиденья: обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР01 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Опора четырехлучевая на заглушках или колесиках, или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья и спинки: обивка, фанера, литой полиуретан. Толщина сиденья от 20 до 60 мм

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР02 и КР02/К (на колесиках) **предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках изготовлена из стальной трубы Ø30, на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног, регулируемую по высоте. Варианты исполнения сиденья и спинки: обивка, фанера, литой полиуретан. Толщина сиденья от 20 до 60 мм

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР02-1 и КР02-1/Н **предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Стойка из стальной трубы Ø 51мм Опора пятилучевая на заглушках или колесиках, или регулируемых опорах, изготовленная из стальной трубы 40*25мм. Имеет кольцо – подставку для ног, регулируемое по высоте. Модель КР02-1 высота

сиденья от 600 до 740мм, и КР02-1/Н высота сиденья от 450 до 590 мм. Сиденье, спинка и подлокотники – обивка.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР03 и КР03/К (на колесиках) **предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках изготовлена из стальной трубы Ø30, на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное угловое кольцо – подставку для ног, регулируемую по высоте. Варианты исполнения сиденья и спинки: обивка, фанера, литой полиуретан. Толщина сиденья от 20 до 60 мм.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР04 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках, или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Варианты исполнения сиденья и спинки: обивка, фанера, литой полиуретан. Толщина сиденья от 20 до 60 мм

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР04/Б **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора плоское основание, изготовлено из алюминиевого сплава или стали Ø 385 мм. Варианты исполнения сиденья и спинки: обивка, фанера, литой полиуретан. Толщина сиденья от 20 до 60 мм

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР06 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора на заглушках или колесиках, или регулируемых опорах, изготовлена из трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Сиденье, спинка – обивка.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР09 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Опора четырехлучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы Ø25 мм. Имеет кольцо – подставку для ног. Сиденье, спинка и подлокотники – обивка.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР10-1 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Опора четырехлучевая на заглушках, или колесиках, или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы Ø25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье, спинка и подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР10-2 **предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур.** Кресло винтовое. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на заглушках

изготовлена из стальной трубы Ø30. Имеет специальное кольцо – подставку для ног, регулируемую по высоте. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье, спинка и подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР10-2К предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Кресло винтовое. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на колесиках или регулируемых опорах изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет специальное кольцо – подставку для ног, регулируемую по высоте. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье, спинка и подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР11 и КР11/П (с подлокотниками) предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из пластика разлет опоры 560 мм. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье – спинка, подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР11-В и КР11-В/П (с подлокотниками) предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках, или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из пластика разлет опоры 560 мм. Комплектуется опорным кольцом-опорой для ног, регулируется по высоте. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье – спинка, подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР12 и КР12/П (с подлокотниками) предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках, или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из литого алюминия или стали, разлет опоры 590 мм. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье – спинка, подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР12-В и КР12-В/П (с подлокотниками) предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø 50 мм. Регулировка высоты – газлифт. Опора пятилучевая на колесиках, или заглушках, или регулируемых опорах, изготовлена из литого алюминия или стали, разлет опоры 590 мм. Комплектуется кольцом опорой для ног, с регулировкой по высоте. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье – спинка, подлокотники – литой полиуретан.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР15 и КР15/П (с подлокотниками) предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Кресло винтовое. Стойка изготовлена из стальной трубы Ø51 мм. Опора пятилучевая на колесиках или заглушках, или регулируемых опорах

изготовлена из стальной трубы 40*25 мм. Имеет кольцо – подставку для ног. Может быть с подлокотниками и без. Сиденье, спинка и подлокотники – обивка.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР19 предназначено для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур, представляет собой цельнометаллический сварной каркас, установленный на четырех опорах с пластиковыми заглушками. Стойка из стальной трубы Ø51 мм. В механизме кресла используется подшипник, что позволяет легко вращать его вокруг своей оси. В задней части кресла установлена труба с ручкой для вращения пациента. Сиденье – обивка.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР20 (высота сиденья 580 до 730) и КР20/Н (высота сиденья 450 до 600) предназначены для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø50мм. Регулировка высоты – газлифт, регулировка высоты с помощью ножного кольца. Может быть на колесиках, на заглушках или регулируемых опорах. Диаметр основания 600- 650 мм. Сиденье и спинка обивка, фанера, полиуретан, толщина сиденья может быть от 20 до 60 мм.

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР22 (высота сиденья 580 до 730) и КР22/Н (высота сиденья 450 до 600) для медицинского персонала, который в сидячем положении производит медицинские процедуры/осмотр пациента, а также предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур. Стойка Ø50мм. Регулировка высоты – газ лифт, регулировка высоты с помощью ножного кольца. Диаметр основания 550-600 мм. Может быть на колесиках, на заглушках или регулируемых опорах. Варианты исполнения сиденья: обивка толщиной от 20 до 60 мм, МДФ, пластик, фанера, литой полиуретан.

Основные параметры и характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

Модели табуретов, кресел	Значение параметров					
	Габаритные размеры ШхГхВ (мах В), мм 1- на колесиках; 2- на заглушках; 3- на рег опоре.	Ма сса, кг	Высота подлокотников / кольцо для ног диаметр / диаметр основания, мм	Диапазон изменения высоты сиденья, мм	Диаметр сиденья или размер, мм (в зависимост и от типа сидения)	Тип сиденья *
T01	1- 500x500x440(560)	5,9	-/360/500	440-560	300 ÷ 400	кр
T01-1	1 -500x500x470(590)	6,1	-/360/500	470-590	300 ÷ 400	кр
T01-1(МДФ)	1- 500x500x440(560)	6,1	-/360/500	440-560	300 ÷ 400	кр
T01/3	2- 500x500x400(520)	5,7	-/360/500	400-520	300 ÷ 400	кр
T01-1/3	2- 500x500x430(550)	5,9	-/360/500	430-550	300 ÷ 400	кр
T01-1(МДФ)/3	2- 500x500x400(520)	5,9	-/360/500	400-520	300 ÷ 400	кр
T02	2- 590x590x510(650)	7,2	-/360/590	510-650	300 ÷ 400	Кр
T02-1	2- 590x590x540(680)	7,4	-/360/590	540-680	300 ÷ 400	Кр
T02-1(МДФ)	2- 590x590x510(650)	7,4	-/360/590	510-650	300 ÷ 400	Кр
T02/К	1- 590x590x560(700)	7,4	-/360/590	560-700	300 ÷ 400	Кр
T02-1/К	1- 590x590x590(730)	7,6	-/360/590	590-730	300 ÷ 400	Кр
T02-1(МДФ)/К	1- 590x590x560(700)	7,6	-/360/590	560-700	300 ÷ 400	Кр

T03	2- 590x590x510(650)	7,6	-/360/590	510-650	300 ÷ 400	кр
T03-1	2- 590x590x540(680)	7,8	-/360/590	540-680	300 ÷ 400	кр
T03-1(МДФ)	2- 590x590x510(650)	7,8	-/360/590	510-650	300 ÷ 400	кр
T03/К	1- 590x590x560(700)	7,8	-/360/590	560-700	300 ÷ 400	кр
T03-1/К	1- 590x590x590(730)	8	-/360/590	590-730	300 ÷ 400	кр
T03-1(МДФ)/К	1- 590x590x560(700)	8	-/360/590	560-700	300 ÷ 400	кр
T08	1- 500x500x420(540)	6,2	-/360/500	420-540	350 x 370	пр2
T08-1	1 -500x500x430(550)	6,1	-/360/500	430-550	330 ÷ 400	кр
T08-2	1- 500x500x420(540)	6,5	-/360/500	420-540	355 x 420	с
T08/3	2,3- 500x500x390(510)	6	-/360/500	390-510	350 x 370	пр2
T08-1/3	2,3- 500x500x400(520)	5,9	-/360/500	400-520	330 ÷ 400	кр
T08-2/3	2,3- 500x500x390(510)	6,3	-/360/500	390-510	355 x 420	с
T09	2- 590x590x510(650)	7,5	-/360/590	510-650	350 x 370	пр2
T09-1	2- 590x590x520(660)	7,4	-/360/590	520-660	330 ÷ 400	кр
T09-2	2- 590x590x510(650)	7,8	-/360/590	510-650	355 x 420	с
T09/К	1- 590x590x560(700)	7,3	-/360/590	560-700	350 x 370	пр2
T09-1/К	1- 590x590x570(710)	7,2	-/360/590	570-710	330 ÷ 400	кр
T09-2/К	1- 590x590x560(700)	7,6	-/360/590	560-700	355 x 420	с
T05	1- 430x430x450(610)	4,5	-/320/430	450-610	300 ÷ 400 (кр), 350 x 370 (пр2), 355 x 420 (C)	кр, пр2, с
T05	2,3- 430x430x410(570)	4,3	-/320/430	410-570		
T06	1- 430x430x480(640)	4,7	-/320/430	480-640	300 ÷ 400 (кр), 350 x 370 (пр2), 355 x 420 (C)	кр, пр2, с
T06	2,3- 430x430x440(600)	4,5	-/320/430	440-600		
T06/М	1- 430x430x440(600)	4,6	-/320/430	440-600		
T06/М	2,3- 430x430x400(560)	4,4	-/320/430	400-560		
T10	1- 560x560x400(530)	6	-/-/560	400-530	300 ÷ 400 (кр), 350 x 370 (пр2), 355 x 420 (C)	кр, пр2, с
T10-B	1- 560x560x560(800)	7	-/460/560	560-800		
T10	2,3- 560x560x360(490)	5,8	-/-/560	360-490		
T10-B	2,3- 560x560x520(760)	6,8	-/460/560	520-760		
T11	1- 520x520x440(570)	5,6	-/-/520	440-570	300 ÷ 400 (кр), 350 x 370 (пр2), 355 x 420 (C)	кр, пр2, с
T11-B	1- 520x520x580(830)	6,7	-/400/520	580-830		
T11	2,3- 520x520x400(530)	5,4	-/-/520	400-530		
T11-B	2,3- 520x520x540(790)	6,5	-/400/520	540-790		
T16	1- 550(600)x550(600)x580(730) 2,3- 550(600)x550(600)x540(690)	7,5 7,3 7,5 7,3	-/-/550(600)	580-730 540-690 450-600 410-560	300 ÷ 400 (кр), 350 x 370 (пр2), 355 x 420 (C)	кр, пр2, с
T16/H	1- 550(600)x550(600)x450(600) 2,3- 550(600)x550(600)x410(560)					
T17	1- 600x600x580(730)	7,5	-/-/600	580-730	300 ÷ 400	кр
T17/H	2,3- 600x600x540(690)	7,3		540-690		
	1- 600x600x450(600)	7,5		450-600		
	2,3- 600x600x410(560)	7,3		410-560		

КР01	1- 500x500x780(900), 2,3- 500x500x740(860)	7,1 6,9	-/360/500 -/360/500	440-560 400-520	350 ÷ 450 380 x 380	кр, кв
КР02	2- 590x590x850(990)	8,4	-/360/590	510-650	350 ÷ 450 380 x 380	кр,кв
КР02/К	1- 590x590x900(1040)	8,6	-/360/590	560-700	350 ÷ 450 380 x 380	кр,кв
КР02-1	1-590x590x1000(1140), 2,3-590x590x960 (1100)	11 10,8	800/360/590 760/360/590	600-740 560-700	395 (430) x 395 (430)	кв
КР02-1/Н	1-590x590x850(990), 2,3-590x590x810 (950)	10,8 10,6	650/360/590 610/360/590	450-590 410-550	395 (430) x 395 (430)	кв
КР03	2- 590x590x850(990)	8,6	-/360/590	510-650	350 ÷ 450 380 x 380	кр,кв
КР03/К	1- 590x590x900(1040)	8,8	-/360/590	560-700	350 ÷ 450 380 x 380	кр,кв
КР04 КР04-Б	1- 410x410x750(910) 2,3- 410x410x710(870) 2- 385x385x710(850)	5,4 5,2 4,8	-/370/410 -/370/410 -/410	450-610 410-610 410-550	330 ÷ 430	кр
КР06	1- 470x470x760(920) 2,3- 470x470x720(880)	6 5,8	-/370/470 -/370/470	450-610 410-570	330 ÷ 430	кр
КР09	1- 500x500x850(970) 2,3- 500x500x810(930)	8,6 8,4	650/360/500 610/360/500	450-570 410-530	395 (430) x 395 (430)	кв
КР10-1 КР10-1/П	1- 500x500x880(1000) 2,3-500x500x840(980) 1- 500x500x880(1000) 2,3-500x500x840(980)	8,4 8,2 9,4 9,2	-/360/500 / 360/500 650 (720)/360/500 610 (690)/360/500	440-560 400-520 440-560 400-520	450 x 470	пр
КР10-2 КР10-2/П	2- 590x590x950(1090) 2- 590x590x950(1090)	9,2 10,2	-/360/590 760(830)/360/590	550-690 550-690	450 x 470	пр
КР10-2К КР10-2К/П	1- 590x590x1000(1140) 1- 590x590x1000(1140)	9,6 10,6	-/360/590 810(880)/360/590	600-740 600-740	450 x 470	пр
КР11 КР11-В КР11/П КР11-В/П	1- 560x560x840(970) 2,3- 560x560x820(950) 1- 560x560x980(1220) 2,3- 560x560x955(1195)	8,5 8,3 11 10,8 9,5 12	-/-/560 -/560 -/460/560 -/460/560 630(700)/-/560 770(840)/460/560	420-550 400-530 560-800 535-775	450 x 470	пр
КР12 КР12-В КР12/П КР12-В/П	1- 590x590x870(1000) 2,3- 590x590x845(975) 1- 590x590x1020(1260) 2,3- 590x590x995(1235)	9,5 9,3 11 10,8 10,5 12	-/-/590 -/590 -/450/590 -/450/590 660(730)/-/560 810(880)/460/560	450-580 425-555 600-840 575-815	450 x 470	пр
КР15 КР15/П	1- 590x590x865(985) 2,3- 590x590x825(945) 1- 590x590x865(985) 2,3- 590x590x825(945)	8,8 8,6 9,8 9,6	-/ 360/590 -/360 /590 670/ 360/590 670/360 /590	470-590 430-550 470-590 430-550	390 (430) x 390 (430)	кв кв
КР19	2- 700x700x1700	9	-/-/	-	400 x 400	кв

KP20	1-600 x 600 x880(1030)	10,1	-/-/600	580-730	330 ÷ 430	кр, пр
KP20/Н	2,3-600 x 600x840(990)	9,8		540-690	330 (380) x	
	1-600 x 600 x750(900)	9,6		450-600	420 (480)	
	2,3-600 x 600x710(860)	9,4		410-560		
KP22	1- 600x600x580(730)	7,5	-/-/600	580-730	300 ÷ 400	кр
KP22/Н	2,3- 600x600x540(690)	7,3				
	1- 600x600x450(600)	7,5				
	2,3- 600x600x410(560)	7,3				

* тип сиденья: «кр» – круглое, «пр» – прямоугольное, «кв» – квадратное «пр2» - прямоугольные с вырезом под руку, «с» - сиденье седло, спинка – сиденье – «крс»
Нагрузочная способность табуретов и кресел не более 120 кг.
Погрешность параметров таблицы 1 составляет не более 5-10%.

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

Изделия не должны создавать в помещении специфического запаха – не более 2 баллов.

Наружные поверхности изделий не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов.

Спинка и сиденье изделий для сидения и лежания должны иметь следующие показатели мягкости: для табуретов и кресел – II-IV по ГОСТ 21640.

Поверхность табуретов и кресел должна быть изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий для сидения и лежания в условиях эксплуатации (при влажности воздуха помещения 50% – 60%) не должен превышать 15,0 кВ/м.

Допустимая удельная активность цезия – 137 в древесине и древесно-содержащих материалах, используемых для изготовления изделий, не должна превышать 300 Бк/кг.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах на минеральной основе для изготовления изделий не должна превышать 370 Бк/кг.

Каркас изделий должен быть изготовлен из стали (ГОСТ 3262 и ГОСТ 1050).

Прочностные показатели изделий и долговечность должны соответствовать требованиям ГОСТ 19917 и ГОСТ 16371.

Изделия должны быть устойчивы на горизонтальной поверхности и соответствовать ГОСТ 16371, а используемые на открытом воздухе должны соответствовать ГОСТ EN 581-1, ГОСТ EN 581-2.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303. Металлические поверхности изделий должны иметь защитно-декоративное покрытие в виде порошковой краски (лакокрасочного покрытия).

Покрытия изделий из искусственной кожи должно соответствовать ГОСТ 57019 и допускать влажную уборку поверхностей с применением моющих средств.

Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 должны быть устойчивы при группе условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

Система крепления отдельных частей в изделии представляет собой фурнитуру. Фурнитура должна соответствовать ГОСТ 16371.

Фурнитура изделий:

-для изделий, поставляемых в собранном виде:

- Винт с потайной головкой М6х20, М6х25, М6х35 по ГОСТ 17475
- Винты М6х20, М6х25, М6х35 по ГОСТ 17473.
- Гайка М6, М8, М10, М12 по ГОСТ 5927, ГОСТ 15521
- Гайка колпачковая М6 по ГОСТ 11860

- Гайка забивная мебельная М5, М6 DIN 1624
- Саморез: Шуруп М6х20, М6х25, М6х35 по ГОСТ 1145
- Шайба М6, М8, М10, М12 по ГОСТ 11371
- для изделий, поставляемых в разобранном виде:
- Винты М6х20, М6х25, М6х35 по ГОСТ 17473.

Для сборки изделий используется ключ для винтов ГОСТ Р 57981.

Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

Детали и сборочные единицы сборно-разборных изделий должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 6449.1, ГОСТ 6449.5, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

Изделия медицинские, упакованные в транспортную тару, должны сохранять работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

Изделия медицинские при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Изделия медицинские при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

Изделия медицинские при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

Средний срок службы медицинских изделий должен быть не менее 5 лет. Изделия медицинские являются ремонтпригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние медицинского изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

Требования к материалам и комплектующим изделиям.

При изготовлении изделий должны использоваться материалы и комплектующие, предназначенные для их изготовления, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или протоколом испытаний.

Поверхности деталей из древесных плитных материалов (лопасти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».

Для изготовления мягких элементов изделий для сидения и лежания не должны применяться легковоспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения обивочные текстильные и кожаные материалы. В сопроводительных документах к текстильным и кожаным материалам, предназначенным для изготовления изделий, должна указываться информация об их пожарной безопасности.

Сырье и материалы, используемые при изготовлении медицинских изделий, указаны в таблице 2.

Таблица 2

Часть изделия (кресло)	Материал	Марка, производитель / ГОСТ
Каркас, стойка	Труба стальная электросварная	Сталь марки 08пс, ОАО "Северсталь", Россия / ГОСТ 1050, ГОСТ 16523
	Труба стальная профильная	Сталь марки 10, ОАО "Северсталь", Россия / ГОСТ 1050

	Труба стальная водогазопроводная Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый Прокат тонколистовой холоднокатаный Подшипник стальной	Сталь марки Ст2пс, ОАО "Северсталь", Россия / ГОСТ 3262 Сталь марки 20К, ОАО "Северсталь", Россия / ГОСТ 1050 Сталь марки 08пс, ОАО "Северсталь", Россия / ГОСТ 1050 Подшипник № 60204 / ГОСТ 7242
Основание опоры хромированное	Сталь	110210-003 - хромированная крестовина из трубы с отверстием под газлифт 50 мм ООО "Заглушка.Ру", Россия/ ГОСТ 1050
Покрытие	Порошково полимерное покрытие	П-ЭПК-202 – черная, ЗАО "Эколон", Россия / ГОСТ 9.410 П-ЭП-ПЛ-2323 – белая, ЧУП "МАВ", Беларусь / ТУ РБ 600112981.032-2009
Колесики	Полиэтилен высокого давления (ПВД) со стальным резьбовым стержнем	9.2-р-01 – опора мебельная пластиковая со стальным резьбовым стержнем М10х15 ООО "Реал-С", Россия / ГОСТ 16337, ГОСТ 27017 или Колеса диаметром 50 мм, арт. КО50М10ЧС, ООО «Заглушка.ру», Россия или Caster APR.25, ANJI JUNWEI STEEL AND PLASTIC PRODUCTS FACTORY
Регулируемая опора	Полиэтилен высокого давления (ПВД) со стальным резьбовым стержнем	32М8-30ЧН – опора резьбовая с металлическим оцинкованным резьбовым стержнем М8х30 и круглым пластиковым основанием d32 мм, ООО "Заглушка.Ру", Россия / ГОСТ 16337, ГОСТ 27017
Заглушки	Полиэтилен высокого давления (ПВД)	Арт. 25Р18ЧК, ООО «Заглушка.ру», Россия / ГОСТ 16337
Карабин	Сталь	Китай / DIN 5299
Цепь	Сталь	Китай / DIN 766
Ручка	Неопрен	РЧ20-30ЧКС неопрен тип ННS, ООО "Заглушка.ру", Россия

Система газлифт	Хромированная сталь Пластик	Pw103, «Powerman», Китай или тип AN B2-3, 2,0 мм, ANDCOREA GAS SPRING CO.,Ltd. или GS80,GS100,GS140,GS200,GS260, ANDCOREA GAS SPRING CO.,Ltd. или GAS SPRING 330, CHANGZHOU ZHECHANG GAS SPRING CO,Ltd. или 217001100С – хромированный газлифт ООО "Заглушка.Ру", Россия
Сиденье, спинка подголовник	Плита древесностружечная Фанера 3 мм Фанера 8 мм Фанера 10мм МДФ Поливинилхлоридная декоративная отделочная пленка Литой полиуретан краситель- колеровочная паста «Полимер –L» по ТУ 2463-010-49630959-05	Тип Р2 (для использования внутри помещения, включая производство мебели), I сорта, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованная, класс эмиссии E1 – P2, I, M, III, E1 "Шекснинский комбинат древесных плит" / ГОСТ 10632/ Твёрдая ГОСТ4598 ФК, Ш2 / ГОСТ 3916.1 Твердая / ГОСТ 4598 Пленка ПВХ ПДО толщина 0,4 мм / ГОСТ 24944 Модель YT-A0103, Anji Yitai Furniture Co., Китай или PU, HEWEI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO, Ltd. или Модель PU-BS01, MAC Chairs and Components Co., Китай ООО «Новый дом», Ижевск

	Обивка: Кожзаменитель	Кожа искусственная на трикотажной основе ВИК-ТР мебельная, ОАО "Завод Искож", Россия / ГОСТ 23367, ТУ 8710-004-00300340-03 или Серия DOLLARO ОАО «Искож», Россия
	Наполнитель: Поролон	ППУ толщиной 10 мм, 20 мм, 30 мм ООО «Интерфом», Россия или ППУ 10 мм и 20 мм, ООО «Пеном», Россия
Подлокотники	Сталь Литой полиуретан колеровочная паста «Полимер –L» по ТУ 2463-010-49630959-05 Пластик INKULEN PE Обивка: Кожзаменитель Наполнитель: Поролон	Модель YT-A0103, Anji Yitai Furniture Co., Китай или PU, HEWEI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO, Ltd. или Модель PU-BS01, MAC Chairs and Components Co., Китай ООО «Новый дом», Ижевск ООО "ТД Пластмасс Групп",Россия Кожа искусственная на трикотажной основе ВИК-ТР мебельная, ОАО "Завод Искож", Россия / ГОСТ 23367, ТУ 8710-004-00300340-03 или Серия DOLLARO ОАО «Искож», Россия ППУ толщиной 10 мм, 20 мм, 30 мм ООО «Интерфом», Россия или ППУ 10 мм и 20 мм, ООО «Пеном», Россия
Фурнитура:		

Винт	Сталь	Винт с потайной головкой / ГОСТ 17475
Винт	Сталь	Винт с полукруглой головкой / ГОСТ 17473
Гайка	Сталь	Гайка М6, М8, М10, М12 / ГОСТ 5927, ГОСТ 15521
Гайка колпачковая	Сталь	Гайка колпачковая М6 / ГОСТ 11860
Гайка забивная	Сталь	Гайка забивная мебельная М5, М6, Китай / DIN 1624
Саморез	Сталь	Шуруп / ГОСТ 1145
Шайба	Сталь	Шайба / ГОСТ 11371
Механизм кресел и табуретов	Сталь	213047700F - металлическая пластина для кресла ООО "Заглушка.Ру", Россия или Pw005, механизм качания LUX, «Powerman», Китай

9. Комплект поставки

Медицинское изделие одного варианта исполнения в упаковке.

1. Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019,

варианты исполнения:

1. Модель Т01 в составе:

- 1.1 стойка – 1 шт.
- 1.2 сиденье – 1 шт.
- 1.3 опора – 1 шт.
- 1.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 1.5 колесики – 4 шт.
- 1.6 заглушки – 4 шт (при необходимости)
- 1.7 фурнитура (саморез) – 4 шт.
- 1.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Модель Т02 в составе:

- 2.1 стойка – 1 шт.
- 2.2 сиденье – 1 шт.
- 2.3 опора – 1 шт.
- 2.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 2.5 заглушки – 5 шт.
- 2.6 фурнитура (саморез, винт) – 7 шт.
- 2.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Модель Т02/К в составе:

- 3.1 стойка – 1 шт.
- 3.2 сиденье – 1 шт.

- 3.3 опора – 1 шт.
- 3.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 3.5 колесики – 5 шт.
- 3.6 фурнитура(саморез,винт) – 7 шт.
- 3.7 руководство по эксплуатации - 1шт.

4.Модель T03 в составе:

- 4.1 стойка – 1шт.
- 4.2 сиденье – 1 шт.
- 4.3 опора – 1 шт.
- 4.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 4.5 заглушки – 5 шт.
- 4.6 фурнитура (саморез. винт) –7 шт.
- 4.7 руководство по эксплуатации - 1шт.

5.Модель T03/К в составе:

- 5.1 стойка – 1шт.
- 5.2 сиденье – 1 шт.
- 5.3 опора – 1 шт.
- 5.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 5.5 колесики – 5 шт.
- 5.6 фурнитура (саморез, винт) – 7 шт.
- 5.7 руководство по эксплуатации - 1шт.

6.Модель T05 в составе:

- 6.1 стойка – 1шт.
- 6.2 сиденье – 1 шт.
- 6.3 опора – 1 шт.
- 6.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 6.5 колесики – 5 шт.
- 6.6 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 6.7 фурнитура: винт М6х20– 4 шт., ключ – 1 шт.
- 6.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

7.Модель T06 в составе:

- 7.1 стойка – 1шт.
- 7.2 сиденье – 1 шт.
- 7.3 опора – 1 шт.
- 7.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 7.5 колесики – 5 шт.
- 7.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 7.7 фурнитура: винт М6х20– 4 шт., ключ – 1 шт.
- 9.8 руководство по эксплуатации - 1шт.

8.Модель T08 в составе:

- 8.1 стойка – 1 шт.
- 8.2 сиденье – 1 шт.
- 8.3 опора – 1 шт.
- 8.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 8.5 колесики – 4 шт.
- 8.6 заглушки – 4 шт. (при необходимости)
- 8.7 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 8.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Модель T09 в составе:

- 9.1 стойка – 1 шт.
- 9.2 сиденье – 1 шт.
- 9.3 опора – 1 шт.
- 9.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 9.6 заглушки – 5 шт.
- 9.7 фурнитура (винт) – 7 шт.
- 9.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Модель T09/K в составе:

- 10.1 стойка – 1 шт.
- 10.2 сиденье – 1 шт.
- 10.3 опора – 1 шт.
- 10.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 10.5 колесики – 5 шт.
- 10.6 фурнитура (винт) – 12 шт.
- 10.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Модель T10 в составе:

- 11.1 стойка – 1 шт.
- 11.2 сиденье – 1 шт.
- 11.3 опора – 1 шт.
- 11.4 колесики – 5 шт.
- 11.5 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 11.6 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 11.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Модель T10-B в составе:

- 12.1 стойка – 1 шт.
- 12.2 сиденье – 1 шт.
- 12.3 опора – 1 шт.
- 12.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 12.5 колесики – 5 шт.
- 12.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 12.7 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 12.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Модель T11 в составе:

- 13.1 стойка – 1 шт.
- 13.2 сиденье – 1 шт.
- 13.3 опора – 1 шт.
- 13.4 колесики – 5 шт.
- 13.5 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 13.6 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 13.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Модель T11-B в составе:

- 14.1 стойка – 1 шт.
- 14.2 сиденье – 1 шт.
- 14.3 опора – 1 шт.
- 14.4 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 14.5 колесики – 5 шт.
- 14.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 14.7 фурнитура (винт) – 6 шт.
- 14.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Модель T16 в составе:

- 15.1 стойка – 1 шт.
- 15.2 сиденье – 1 шт.
- 15.3 опора – 1 шт.
- 15.4 колесики – 5 шт.
- 15.5 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 15.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Модель T16/H в составе:

- 16.1 стойка – 1 шт.
- 16.2 сиденье – 1 шт.
- 16.3 опора – 1 шт.
- 16.4 колесики – 5 шт.
- 16.5 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 16.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Модель T17 в составе:

- 17.1 стойка – 1 шт.
- 17.2 сиденье – 1 шт.
- 17.3 опора – 1 шт.
- 17.4 колесики – 5 шт.
- 17.5 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 17.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Модель T17/H в составе:

- 18.1 стойка – 1 шт.
- 18.2 сиденье – 1 шт.
- 18.3 опора – 1 шт.
- 18.4 колесики – 5 шт.
- 18.5 фурнитура (винт) – 5 шт.
- 18.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019, варианты исполнения:

1. Модель КР01 в составе:

- 1.1 стойка – 1 шт.
- 1.2 сиденье – 1 шт.
- 1.3 опора – 1 шт.
- 1.4 спинка- 1 шт.
- 1.5 колесики – 4 шт.
- 1.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 1.7 заглушки– 4 шт. (при необходимости)
- 1.8 фурнитура (саморез) – 8 шт.
- 1.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Модель КР02 в составе:

- 2.1 стойка – 1 шт.
- 2.2 сиденье – 1 шт.
- 2.3 опора – 1 шт.
- 2.4 спинка- 1 шт.
- 2.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 2.6 заглушки– 5 шт.
- 2.7 фурнитура (саморез) – 11 шт.
- 2.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Модель КР02/К в составе:

- 3.1 стойка – 1 шт.
- 3.2 сиденье – 1 шт.
- 3.3 опора – 1 шт.
- 3.4 спинка- 1 шт.
- 3.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 3.6 колесики – 5 шт.
- 3.7 фурнитура (саморез) – 11 шт.
- 3.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Модель КР02-1 в составе:

- 4.1 стойка – 1 шт.
- 4.2 сиденье – 1 шт.
- 4.3 опора – 1 шт.
- 4.4 спинка- 1 шт.

- 4.5 подлокотник – 2 шт.
- 4.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 4.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 4.8 колесики – 5 шт.
- 4.9 фурнитура (саморез, винт) – 17 шт.
- 4.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Модель КР02-1/Н в составе:

- 5.1 стойка – 1 шт.
- 5.2 сиденье – 1 шт.
- 5.3 опора – 1 шт.
- 5.4 спинка- 1 шт.
- 5.5 подлокотник – 2 шт.
- 5.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 5.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 5.8 колесики– 5 шт.
- 5.9 фурнитура (саморез, винт) – 17 шт.
- 5.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Модель КР03 в составе:

- 6.1 стойка – 1 шт.
- 6.2 сиденье – 1 шт.
- 6.3 опора – 1 шт.
- 6.4 спинка- 1 шт.
- 6.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 6.6 заглушки– 5 шт.
- 6.7 фурнитура (саморез, винт) – 11 шт.
- 6.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Модель КР03/К в составе:

- 7.1 стойка – 1 шт.
- 7.2 сиденье – 1 шт.
- 7.3 опора – 1 шт.
- 7.4 спинка- 1 шт.
- 7.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 7.6 колесики– 5 шт.
- 7.7 фурнитура (саморез, винт) – 11 шт.
- 7.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Модель КР04 в составе:

- 8.1 стойка – 1 шт.
- 8.2 сиденье – 1 шт.
- 8.3 опора – 1 шт.
- 8.4 спинка- 1 шт.
- 8.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.

- 8.6 колесики – 5 шт.
- 8.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 8.8 фурнитура: винт М6х25 – 4 шт., ключ – 1 шт.
- 8.9 руководство по эксплуатации - 1шт.

9. Модель КР04/Б в составе:

- 9.1 стойка – 1шт.
- 9.2 сиденье – 1 шт.
- 9.3 опора – 1 шт.
- 9.4 спинка- 1 шт.
- 9.5 фурнитура: винт М6х25- 4 шт., ключ – 1 шт.
- 9.6 руководство по эксплуатации – 1 шт.

10. Модель КР06 в составе:

- 10.1 стойка – 1шт.
- 10.2 сиденье – 1 шт.
- 10.3 опора – 1 шт.
- 10.4 спинка- 1 шт.
- 10.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 10.6 колесики – 5 шт.
- 10.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 10.8 фурнитура: винт М6х25 – 4 шт., ключ – 1 шт.
- 10.9 руководство по эксплуатации - 1шт.

11. Модель КР09 в составе:

- 11.1 стойка – 1шт.
- 11.2 сиденье – 1 шт.
- 11.3 опора – 1 шт.
- 11.4 спинка- 1 шт.
- 11.5 подлокотник – 2 шт.
- 11.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 11.7 колесики – 4 шт.
- 11.8 заглушки– 4 шт. (при необходимости)
- 11.9 фурнитура (саморез) – 12 шт.
- 11.10 руководство по эксплуатации - 1шт.

12. Модель КР10-1 в составе:

- 12.1 стойка – 1шт.
- 12.2 сиденье – 1 шт.
- 12.3 опора – 1 шт.
- 12.4 спинка- 1 шт.
- 12.5 подлокотник – 2 шт. (при необходимости)
- 12.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 12.7 колесики – 4 шт.
- 12.8 заглушки– 4 шт. (при необходимости)

12.9 фурнитура (винт) – от 8 до 14 шт.
12.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Модель КР10-2 в составе:

13.1 стойка – 1 шт.
13.2 сиденье – 1 шт.
13.3 опора – 1 шт.
13.4 спинка- 1 шт.
13.5 подлокотник – 2 шт. (при необходимости)
13.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
13.7 заглушки – 5 шт.
13.8 фурнитура (винт) – от 11 до 17 шт.
13.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Модель КР10-2К в составе:

14.1 стойка – 1 шт.
14.2 сиденье – 1 шт.
14.3 опора – 1 шт.
14.4 спинка- 1 шт.
14.5 подлокотник – 2 шт. (при необходимости)
14.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
14.7 колесики – 5 шт.
14.8 фурнитура (винт) – от 11 до 17 шт.
14.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Модель КР11 в составе:

15.1 стойка – 1 шт.
15.2 сиденье – 1 шт.
15.3 опора – 1 шт.
15.4 спинка- 1 шт.
15.5 колесики – 5 шт.
15.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
15.7 фурнитура (винт, гайка) – 15 шт.
15.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Модель КР11/П в составе:

16.1 стойка – 1 шт.
16.2 сиденье – 1 шт.
16.3 опора – 1 шт.
16.4 спинка- 1 шт.
16.5 подлокотник – 2 шт.
16.6 колесики – 5 шт.
16.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
16.8 фурнитура (винт, саморез, гайка) – 25 шт.
16.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Модель КР11-В в составе:

- 17.1 стойка – 1 шт.
- 17.2 сиденье – 1 шт.
- 17.3 опора – 1 шт.
- 17.4 спинка- 1 шт.
- 17.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 17.6 колесики – 5 шт.
- 17.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 17.8 фурнитура (винт, гайка) – 16 шт.
- 17.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Модель КР11-В/П в составе:

- 18.1 стойка – 1 шт.
- 18.2 сиденье – 1 шт.
- 18.3 опора – 1 шт.
- 18.4 спинка- 1 шт.
- 18.5 подлокотник – 2 шт.
- 18.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 18.7 колесики – 5 шт.
- 18.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 18.9 фурнитура (винт, саморез, гайка) – 26 шт.
- 18.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Модель КР12 в составе:

- 19.1 стойка– 1 шт.
- 19.2 сиденье – 1 шт.
- 19.3 опора – 1 шт.
- 19.4 спинка- 1 шт.
- 19.5 колесики – 5 шт.
- 19.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 19.7 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 19 шт.
- 19.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Модель КР12/П в составе:

- 20.1 стойка– 1 шт.
- 20.2 сиденье – 1 шт.
- 20.3 опора – 1 шт.
- 20.4 спинка- 1 шт.
- 20.6 подлокотник – 2 шт.
- 20.7 колесики – 5 шт.
- 20.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 20.9 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 25 шт.
- 20.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Модель КР12-В в составе:

- 21.1 стойка – 1 шт.
- 21.2 сиденье – 1 шт.
- 21.3 опора – 1 шт.
- 21.4 спинка- 1 шт.
- 21.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 21.6 колесики – 5 шт.
- 21.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 21.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 20 шт.
- 21.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Модель КР12-В/П в составе:

- 22.1 стойка – 1 шт.
- 22.2 сиденье – 1 шт.
- 22.3 опора – 1 шт.
- 22.4 спинка- 1 шт.
- 22.5 подлокотник – 2 шт.
- 22.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 22.7 колесики – 5 шт.
- 22.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 22.9 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 26 шт.
- 22.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

23. Модель КР15 в составе:

- 23.1 стойка – 1 шт.
- 23.2 сиденье – 1 шт.
- 23.3 опора – 1 шт.
- 23.4 спинка- 1 шт.
- 23.5 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 23.6 колесики – 5 шт.
- 23.7 заглушки– 5 шт. (при необходимости)
- 23.8 фурнитура (саморез) – 8 шт.
- 23.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Модель КР15/П в составе:

- 24.1 стойка – 1 шт.
- 24.2 сиденье – 1 шт.
- 24.3 опора – 1 шт.
- 24.4 спинка- 1 шт.
- 24.5 подлокотник – 2 шт.
- 24.6 кольцо (подставка для ног) - 1 шт.
- 24.7 колесики – 5 шт.
- 24.8 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 24.9 фурнитура (саморез) – 12 шт.
- 24.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Модель КР19 в составе:

- 25.1 каркас – 1 шт.
- 25.2 сиденье – 1 шт.
- 25.3 опора – 1 шт.
- 25.4 подставка для ног - 1 шт.
- 25.5 заглушки – 4 шт.
- 25.6 фурнитура (винт, гайка) - 4 шт.
- 25.6 руководство по эксплуатации - 1 шт.

26. Модель КР20 в составе:

- 26.1 стойка – 1 шт.
- 26.2 сиденье – 1 шт.
- 26.3 опора – 1 шт.
- 26.4 спинка- 1 шт.
- 26.5 колесики – 5 шт.
- 26.6 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 26.7 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 26.8 руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Модель КР22 в составе:

- 27.1 стойка – 1 шт.
- 27.2 сиденье – 1 шт.
- 27.3 опора – 1 шт.
- 27.4 спинка- 1 шт.
- 27.5 колесики – 5 шт.
- 27.6 кольцо (ножной подъем) - 1 шт.
- 27.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 27.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 27.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

28. Модель КР22/Н в составе:

- 28.1 стойка – 1 шт.
- 28.2 сиденье – 1 шт.
- 28.3 опора – 1 шт.
- 28.4 спинка- 1 шт.
- 28.5 колесики – 5 шт.
- 28.6 кольцо (ножной подъем) - 1 шт.
- 28.7 заглушки – 5 шт. (при необходимости)
- 28.8 фурнитура (винт, гайка, саморез) – 10 шт.
- 28.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.

Инструкция по сборке изделий для разобранных изделий представлена в Приложении 1.

10. Требования безопасности, в т.ч. охрана окружающей среды

- 10.1. Изделия не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей в процессе эксплуатации и после окончания срока эксплуатации. Мебель медицинская является мало-опасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 1 классу опасности (Приказ № 4Н от 06.06.2012).
- 10.2. Производственные и складские помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны, соответствующее требованиям ГОСТ 12.1.005.
- 10.3. Необходимый уровень пожарной безопасности текстильных и кожевенных материалов, применяемых в качестве обивочных при изготовлении мягких элементов изделий для сидения и лежаания.
- 10.3.1. Для изготовления мягких элементов изделий для сидения и лежаания не должны применяться легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения обивочные текстильные и кожевенные материалы.
- 10.3.2. В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам, предназначенным для изготовления изделий, должна указываться информация об их пожарной опасности.
- 10.4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.
- 10.4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия, указанному в маркировке, инструкции по применению, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 10.4.2. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий, соприкасающихся с полом.
- 10.4.3. При установке изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделий не должна превышать +40°C.
- 10.5. Условия труда рабочих должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.
- 10.6. Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань. Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека и должно соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1.
- 10.7. Химическая и санитарно-гигиеническая безопасность медицинских изделий обеспечивается отсутствием выделения в окружающую среду летучих химических веществ из изделий в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм человека с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ.
- 10.8. При эксплуатации изделий не выделяются химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает допустимые уровни миграции в воздушную среду. При выделении из изделий нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не превышает единицу.
- 10.9. Изделия медицинские не должны создавать в помещении специфического запаха – не более 2 баллов.
- 10.10. При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

10.11. Охрана окружающей среды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами РФ.

10.12. Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

10.13. Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.3684.

11. Подготовка к работе и порядок работы

Важная информация

Медицинский персонал низшего звена должен приходить не позднее, чем за 10 минут до начала смены, и производить подготовку рабочего места врача и мебели для пациентов.

Подготовка к работе и порядок работы

12.1 Подготовка рабочего места

12.2 Проверка исправности мебели

12.4 Использовать мебель по прямому назначению и не перегружать

12.3 Поддержание санитарно-гигиенического порядка на рабочем месте

12. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Срок службы – не менее 5 лет.

13. Условия хранения и транспортировки.

Изделия медицинские транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделий медицинских морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Вид отправки – контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

Условия при транспортировке изделий медицинских соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения изделий медицинских – по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

14. Техническое обслуживание.

В случае отказа мебели или его неисправности в течение гарантийного срока предприятие - «Владелец» должно направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона;
- гарантийный талон, оформленный, со своей стороны.

Все предоставленные рекламации регистрируются «Владельцем» в табл.3.

Таблица 3

Дата возник. неисправности.	Кол-во отработ.час. до возник. неспр.	Краткое описание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примеч.

--	--	--	--	--	--

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «Инмедикс»,
192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38 корпус 2 лит. А, квартира 61
по эл почте: info@inmedix.ru

Регулярный осмотр

Для более безопасного использования продукта пользователь может проводить регулярный осмотр в соответствии с инструкциями ниже.

План технического обслуживания пользователя:

Проверка/калибровка	Период
Внешний вид Проверить наличие физических повреждений	По необходимости

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры технического обслуживания. Для безопасной работы мебели требуется регулярное техническое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание проводится персоналом в соответствии с графиком в инструкции по обслуживанию. Описание и периодичность регулярного технического обслуживания представлены в руководстве, поставляемом с оборудованием. Периодичность проверок указана, исходя из расчета, что оборудование используется по 24 часа в день.

Чистка и дезинфекция

Владелец несет ответственность за техническое обслуживание на регулярной основе. Выполнение программы технического обслуживания – единственный способ предотвратить и определить потенциальные проблемы.

Для проведения технического обслуживания требуется персонал в области медицинского лабораторного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие регулярных проверок и технического обслуживания может стать причиной поломок. Ненадлежащее техническое обслуживание может стать причиной поломок оборудования, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации мебели.

Чистка и дезинфекция:

соблюдайте инструкции ниже для обеспечения надлежащей чистки и дезинфекции оборудования.

Инструменты для чистки: чистая вата или губка.

Моющее средство: раствор перекиси водорода с добавлением моющего средства (по МУ 287-113)

Процесс чистки: смочить чистую вату или губку раствором перекиси водорода с моющим средством и почистить внешние части мебели.

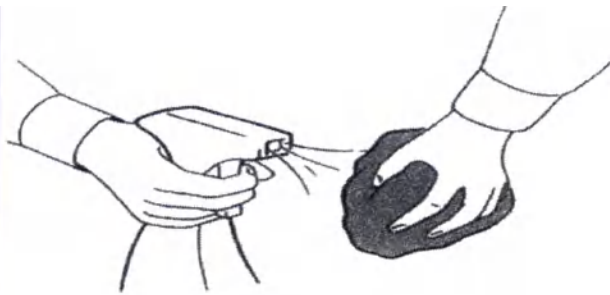


Рисунок 1. Как пользоваться дезинфицирующим аэрозолем.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбрызгивать дезинфицирующую жидкость непосредственно на мебель. Запрещается допускать проникновение любых жидкостей в оборудование через отверстия и зазоры. Запрещается игнорировать предупреждения. Игнорирование предупреждений может стать причиной поломок мебели, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации.

Необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной работы медицинского изделия в течение срока его службы: Не требуется

Методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техническим обслуживанием медицинского изделия:

Не требуется

15. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий (утилизация).

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

По степени опасности отходов – класс А, как эпидемиологические безопасные отходы и утилизируются как бытовые отходы.

Утилизация мебели, после окончания срока эксплуатации включает в себя; разборку, очистку от остатков рабочей среды и загрязнений, просушку и сортировку материалов.

При утилизации, к обеспечению безопасности предъявляются те же требования, что и при установке перед вводом в эксплуатацию (см. «Руководство по эксплуатации»).

16. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская для лечебных учреждений в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Вариант исполнения:

№ _____
(ЗАВОДСКОЙ НОМЕР)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «.....» 20.....г

Представитель ТК _____

МП

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

17. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

При вводе в эксплуатацию мебели действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается гарантийный срок эксплуатации.

Эксплуатация мебели должна сопровождаться обязательным техническим обслуживанием с периодичностью, предусмотренной в «Журнале технического обслуживания».

Техническое обслуживание, монтаж, пуско-наладочные работы и ремонт аппарата должны производить только специалисты завода-изготовителя или другие организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ и имеющие договор на проведение этих работ с заводом изготовителем.

Действие гарантии изготовителя прекращается:

- при отсутствии технического обслуживания (ТО) или невыполнения периодичности проведения ТО изложенной в «Журнале технического обслуживания»;
- при обнаружении дефектов, претензии к качеству работы мебели не принимаются, гарантийный ремонт не производится;
- при нарушении работоспособности и повреждениями, связанными с форс-мажорными обстоятельствами (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, теракты и т.п.);
- при истечении гарантийного срока эксплуатации.

В. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Мебель медицинская для лечебных учреждений в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Вариант исполнения:

№ Дата изготовления « .. » 20 .. г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен
(дата, подпись и штамп торгового предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....

4. Выполненные работы

.....
.....
.....

Руководитель
предприятия - «Владелец»

.....
« .. » 20 .. г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

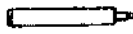
.....
« .. » 20 .. г.
М.П.

СХЕМА СБОРКИ




Инструкция по сборке.

Изделие поставляется в разобранном виде.
Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.
Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

A - 1 шт. 	E - 1 шт. 
B - 1 шт. 	F - 4 шт. 
C - 5 шт. 	G - 1 шт. 
D - 1 шт. 	H - 1 шт. 

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

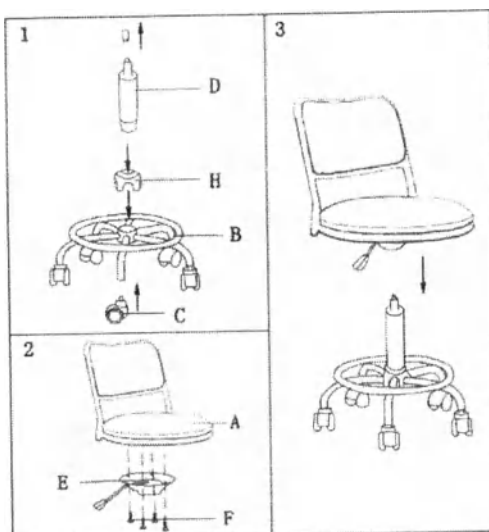

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель Т06




Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

A – 1 шт.	E – 1 шт.
B – 1 шт.	F – 4 шт.
C – 5 шт.	G – 1 шт.
D – 1 шт.	H – 1 шт.

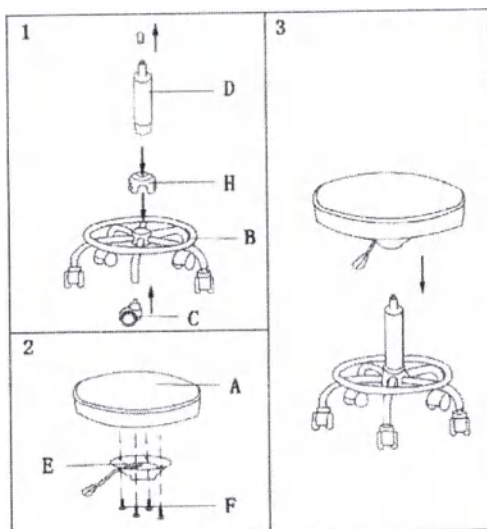

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

модель Т06 сиденье литой полиуретан



Изделие поставляется в разобранном виде.


Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

A - 1 шт. 	E - 1 шт.
B - 1 шт. 	F - 4 шт.
C - 5 шт. 	G - 1 шт.
D - 1 шт. 	H - 1 шт.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

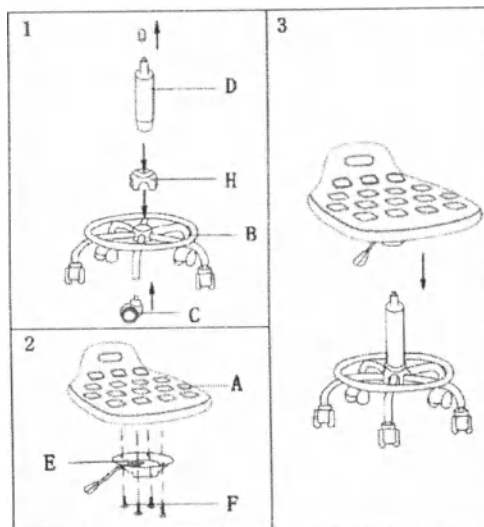

Кресло медицинское для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019 модель КР04




Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основании каркаса до характерного «щелчка».

A - 1 шт. 	E - 1 шт.
B - 1 шт. 	F - 4 шт.
C - 5 шт. 	G - 1 шт.
D - 1 шт. 	H - 1 шт.

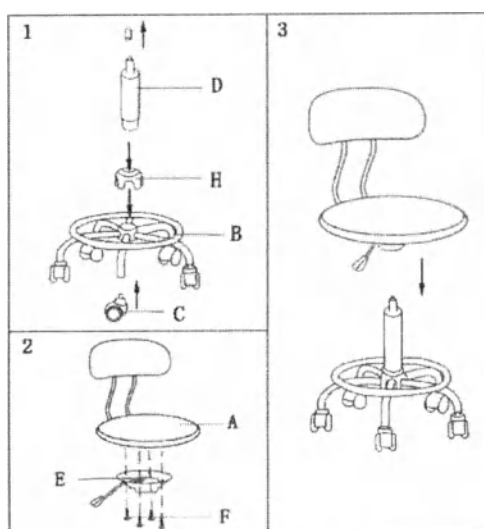

Модель может поставаться на неподвижных глайдерах – заглушках.

Табурет медицинский для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

модель Т05



Изделие поставляется в разобранном виде.


Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Деталь	Количество	Изображение
A	5	
B	1	
C	1	
D	1	
E	1	
F	4	
G	1	
H	1	

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

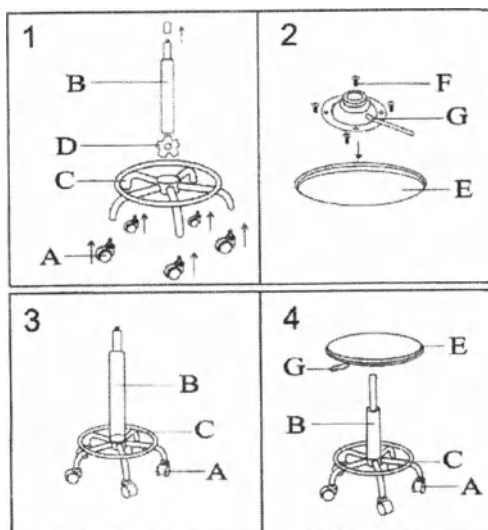

Прошито и пронумеровано 48 листов
Генеральный директор ООО «Инмедикс»
Костева М.В. 