

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»  
Польшицев Д.Г.  
2023 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnoLIA ТТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»,  
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения тиреотропного гормона «MagnoLIA ТТГ», по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»

Макет этикеток



## Вариант исполнения 1

Кат. № 1110001

На коробку:



192146, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Жуковское шоссе, пр. Д. 40, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 878 7773, 878 7782  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

### MagnoLIA ТТГ

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения тиреотропного гормона «MagnoLIA ТТГ», по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023

Комплект поставки: 1 картридж

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| МЧ | Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованными антителами к ТТГ |
| А* | Конъюгат анти-ТТГ с акридиновой меткой                          |

Инструкция  
Паспорт

LOT E003

2023-06-21

2024-06-21


1110001

IVD

$\Sigma_{100}$

+2<sup>+</sup>8<sup>+</sup>°C



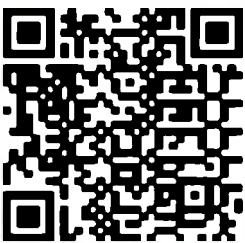

MagnoLIA ТТГ

Для профессионального применения  
ТУ 21.20.23-701-98539446-2023  
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

На картридж:



Готов к использованию  
Для профессионального применения  
ООО "Компания Алкор Био"

### MagnoLIA ТТГ

2024-06-21

LOT E003

IVD

$\Sigma_{100}$

↑↑

📖

⚠️

🧫

💡



MagnoLIA ТТГ



MagnoLIA  
ТТГ  
2024-06-21  
LOT E003

«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TТГ», по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ  
АЛКОР БИО

## Вариант исполнения 2

Кат. № 1110005

На коробку:



**MagnaLIA TТГ**

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TТГ», по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023

Комплект поставки: 5 картриджей

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| МЧ | Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованными антителами к ТТГ |
| А* | Конъюгат анти-ТТГ с акридиновой меткой                          |

Инструкция  
Паспорт

ТУ 21.20.23-701-98539446-2023  
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»,  
192146, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6787879, 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

LOT E003  
1110005

2023-06-21

2024-06-21

500

+2/+8 °C

Биобезопасность

Информация

Предупреждение

Защита от влаги



На картридж:



**MagnaLIA TТГ**

МЧ.....5 мл  
А\*.....10 мл

Готов к использованию  
Для профессионального применения  
ООО «Компания Алкор Био»

2024-06-21

LOT E003

IVD

100



MagnaLIA TТГ

MagnaLIA TТГ  
2024-06-21  
LOT E003

-5шт.

-5шт.

-5шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 ( ТМ ) лист 1

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Польинцев Д.Г.

2023 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnoLIA ТТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»,  
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023

Кат. № 1110001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



MagnaLIA TТГ

МЧ 5 мл  
А\* 10 мл

Готов к использованию  
Для профессионального применения  
ООО «Компания Алкор Био»

2024-06-21

LOT E003

IVD

100

11

1



MagnaLIA TТГ

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023

Комплект поставки:

1 картридж

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| МЧ | Параметрические микропласты с иммобилизованным реагентом к ТТГ |
| А* | Конъюгат антител-ТТГ с окислительной меткой                    |

Инструкция  
Паспорт

LOT E003

2023-06-21

REF 1110001

2024-06-21

IVD

100

11

1



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*



«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

**ПАСПОРТ № E003**

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnaLIA ТТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023

Кат. № 1110001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

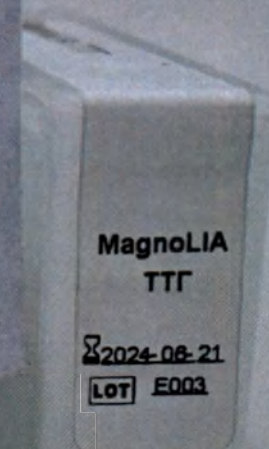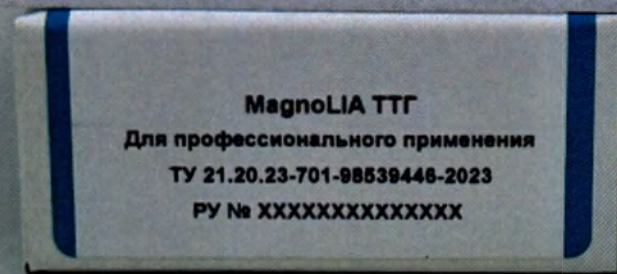

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

**П А С П О Р Т № E003**

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnaLIA TTT»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023**

Кат. № 1110001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ПАСПОРТ № E003  
Набор реагентов для количественного иммунохемилуминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagneLIA TIT»,  
по ТУ 21.20.23-7016-98S39446-2023  
Кат. № 1110005 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*  
«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного  
определения тиреотропного гормона «MagnoLIA ТТГ»,  
по ТУ 21.20.23-701-98539446-2023»











Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 ( 18.05.2020 ) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Польшинцев

