


Фотографические изображения

«Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems)»

Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems)

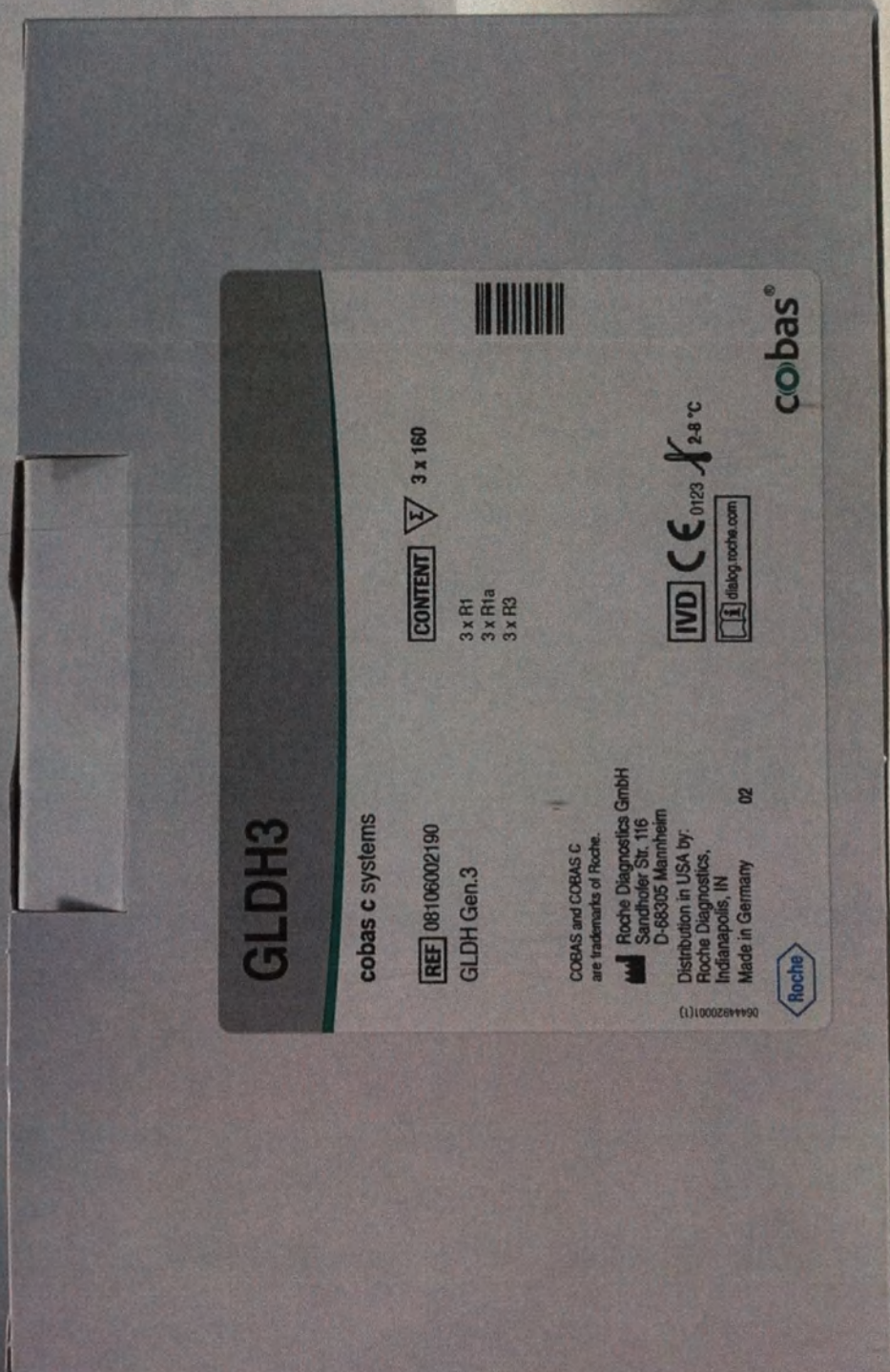

Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems)

GLDH₃

REF (240)08106002190

UDI



LOT (10)73055901



2024-06-30



2023-04-17

GTIN (01)07613336140758



For USA: Store upright



03

Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems)

For USA: **CONTENT**

R1: Triethanolamine buffer 60 mmol/L, pH 8.0;
EDTA 3.1 mmol/L; ammonium acetate 124 mmol/L
R1a: ADP ≥ 1.36 mmol/L; NADH (yeast) 0.27 mmol/L;
LDH (rabbit muscle) ≥ 45 μ kat/L
R3: Triethanolamine buffer 6.6 mmol/L, pH 7.9;
 α -ketoglutarate 48 mmol/L

Rx only

Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas с (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas с systems)



ор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems)



Набор реагентов для количественного определения глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (GLDH3/ GLDH Gen.3 cobas c systems), в составе:

1. Кассета на 2 отделения (флакона) GLDH3 – 3 шт.;
2. Реагент R1, флакон, 160 тестов, - 3 шт.;
3. Реагент R1a, флакон, 160 тестов, - 3 шт.;
4. Соединитель, 3 шт.;
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Использование предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 08106002190

Кассета на 2 отделения (флакона) GLDH3 – 3 шт.;

B
GLDH3

GLDH Gen.3
cobas c systems

REF 08106002190

System-ID 20 6100 1

CONTENT  160

 2-8 °C

IVD

 dialog.roche.com

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.



CE 0123



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

cobas⁰²[®]

04432002001(3)

GLDH3

REF 08106002190

For USA: Rx only



08106002190 ≥ V1
dialog.roche.com

LOT

73055901



2024-06-30



For USA: Store upright



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

GTIN

07613336140758



03

GLDH3

B: R1 + R1a
C: R3

LOT 73055901



2024-06-30



Реагент R1, флакон, 160 тестов, - 3 шт.;



Реагент R1a, флакон, 160 тестов, - 3 шт.;



Соединитель, 3 шт.;





08260021V2.0

GLDH3

GLDH Gen.3

Informazioni per ordini

REF	CONTENT	N. d'ident.	001
08106002 190	GLDH3 R1: 3 x 160 test R1a: 3 x 160 test R3: 3 x 160 test (posizione C del cobas c pack)	2061	001

Italiano

Informazioni relative al sistema

GLDH3: ACN 20610

Finalità d'uso

Test *in vitro* per la determinazione quantitativa della glutammato deidrogenasi nel siero e nel plasma umani, impiegando sistemi Roche/Hitachi cobas c.

Precauzioni e avvertenze

Per uso diagnostico *in vitro* per i professionisti del settore sanitario. Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di laboratorio.

Rifiuti infettivi e microbici

Avvertenza: trattare i rifiuti come materiale a potenziale rischio biologico. Smaltire i rifiuti a seconda delle istruzioni e procedure di laboratorio riconosciute.

Rischi ambientali

Per garantire uno smaltimento sicuro, applicare tutte le normative locali rilevanti in materia di rifiuti.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Procedimento

La metodica completa viene messa a disposizione tramite cobas link.

In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.

Simboli

Oltre a quelli indicati nello standard ISO 15223-1, Roche Diagnostics impiega i seguenti simboli (per gli USA: per la definizione dei simboli impiegati, vedere dialog.roche.com):

CONTENT	Contenuto della confezione
→	Volume dopo ricostituzione o miscelazione
GTIN	Global Trade Item Number

Le aggiunte, cancellazioni o modifiche sono indicate mediante una linea verticale posizionata al margine.
© 2021, Roche Diagnostics

CE 0123



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
+49 905 5505 6606

Roche

cobas®

Gen 3

diagnostica per laboratorio



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)



Косишова А.С.

по доверенности
от 30.01.2023 г.