

106471 1650

КОПИЯ

公 证 书

中华人民共和国山东省济宁市诚信公证处

证 明 书

(2024) 济诚信证字第 0033 号

兹证明 Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd 所提供的产品使用说明书
文件真实有效,符合中华人民共和国的法律法规。相关方的印鉴属实。

中华人民共和国山东省济宁市诚信公证处



公证员

温崇义

二零二四年三月十一日

CERTIFICATE

(Translation)

(2024) 济诚信证字第 0033 号

This is to certify that the Instructions For Use supplied by Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd is valid and comply with the Laws. And the signature and seal is found to be authentic.

Notary: Wen Xueyi

Jining Chengxin Notary Public Office (Seal)

Shandong Province

The People's Republic of China

Mar. 11th, 2024



APPROVED BY

CEO

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd

Liu Qingxiang



(stamp)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса

Редакция документа: 2. Дата документа: 02.02.2024

[Наименование медицинского изделия]

Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса.

[Назначение по применению]

Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса предназначены для контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

[Классификация медицинского изделия]

Продукт представляет собой презерватив из натурального каучукового латекса и относится к неактивным не имплантируемым неинвазивным нестерильным медицинским устройствам. Продукт используется мужчиной во время полового акта для профилактики беременности и инфекций, передающихся половым путем.

[Форма выпуска]

Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса, варианты исполнения:

I. Презервативы Like Me® Классические, в составе:

1. Презервативы Like Me® Классические - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

II. Презервативы Like Me® Увеличенного размера, в составе:

1. Презервативы Like Me® Увеличенного размера - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

III. Презервативы Like Me® С точками, в составе:

1. Презервативы Like Me® С точками - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

IV. Презервативы Like Me® Ребристые, в составе:

1. Презервативы Like Me® Ребристые - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

V. Презервативы Like Me® 3 в 1 (ребристые с точками, анатомические), в составе:

1. Презервативы Like Me® 3 в 1 (ребристые с точками, анатомические) - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

VI. Презервативы Like Me® Анатомические, в составе:

1. Презервативы Like Me® Анатомические - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

VII. Презервативы Like Me® Ультратонкие, в составе:

1. Презервативы Like Me® Ультратонкие - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

VIII. Презервативы Like Me® Суперпрочные, в составе:

1. Презервативы Like Me® Суперпрочные - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

IX. Презервативы Like Me® Продлевающие удовольствие, в составе:

1. Презервативы Like Me® Продлевающие удовольствие - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

X. Презервативы Like Me® Цветные ароматизированные (красный, жёлтый, зелёный), в составе:

1. Презервативы Like Me® Цветные ароматизированные (красный, жёлтый, зелёный) - 3 шт. (красный - 1 шт., жёлтый - 1 шт., зелёный - 1 шт.), 12 шт. (красный - 4 шт., жёлтый - 4 шт., зелёный - 4 шт.) или 30 шт. (красный - 10 шт., жёлтый - 10 шт., зелёный - 10 шт.)

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

XI. Презервативы Like Me® Чёрные, в составе:

1. Презервативы Like Me® Чёрные - 3 шт., 12 шт. или 30 шт.

2. Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

[Условия эксплуатации]

В период эксплуатации презерватив находится в организме человека.

Температура эксплуатации от +32 до +42°C.

[Фармакологическая группа]

Контрацептивы негормональные.

[Кратность применения]

Презервативы являются нестерильными медицинскими изделиями, предназначенными для однократного применения.

[Предназначенные пользователи]

Презерватив используется мужчинами для контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

[Область применения]

Для индивидуального использования в области контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

[Сведения о совместимости с другими медицинскими изделиями]

Лубриканты (за исключением лубрикантов на масляной основе, такие как вазелиновое масло, минеральное масло и крема для кожи, так как они могут снижать эффективность презерватива и привести к нарушению его целостности).

[Материал изготовления]

Презервативы произведены из натурального латекса с силиконовой смазкой.

Примечания:

1. Презервативы Like Me® Продлевающие удовольствие содержат смазку с добавлением анестетика (бензокаина).

[Вид контакта с организмом человека]

Презервативы - кратковременный контакт (менее 24 ч) со слизистой оболочкой (пениса, влагалища, прямой кишки) и неповрежденной кожей; индивидуальная упаковка - внутренняя часть упаковки: опосредованный контакт со слизистыми оболочками пениса, влагалища, прямой кишки; наружная часть упаковки: кратковременный контакт с неповрежденной кожей; потребительская упаковка - кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

[Упаковка]

Наименьшая единица упаковки продукта – упаковка из алюминиевой фольги.

Картонная упаковка, предназначенная для доставки товара потребителю, содержит 3, 12 или 30 шт. индивидуальных упаковок презервативов из фольги.

Для транспортирования и хранения изделия применяется третичная упаковка и транспортная упаковка.

[Основные параметры презервативов]

1. Презервативы изготавливают без красителя или окрашенными.
2. Презервативы изготавливают ароматизированными или не ароматизированными.
3. Презервативы изготавливают с анестетиком и без.
4. На поверхности презерватива не должно быть трещин, отверстий, пузырей, посторонних включений, коагулюмов, подтеков и наплывов, превышающих допуск по толщине.
5. Открытый конец презерватива должен быть закатан в венчик. Венчик должен быть без надрывов и ущемлений.
6. Поверхность презерватива с нанесенной на нее смазкой должны быть гладкими (классические) / текстурированными (ребристые и/или с точками) / тонкие / особо прочные / увеличенного размера, с накопителем для семенной жидкости.

№	Вариант исполнения медицинского изделия	Техническое описание
1	Презервативы Like Me® Классические	с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой
2	Презервативы Like Me® Увеличенного размера	с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой
3	Презервативы Like Me® С точками	с точечным рифлением, с накопителем, с силиконовой смазкой
4	Презервативы Like Me® Ребристые	с ребристой структурой, с накопителем, с силиконовой смазкой
5	Презервативы Like Me® 3 в 1 (ребристые с точками, анатомические)	ребристые с точками, анатомической формы, с накопителем, с силиконовой смазкой
6	Презервативы Like Me® Анатомические	с расширенным концом, с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой.
7	Презервативы Like Me® Ультратонкие	особо тонкие, гладкие, с накопителем, с силиконовой смазкой
8	Презервативы Like Me® Суперпрочные	с утолщенной стенкой, гладкие, с накопителем, с силиконовой смазкой.

№	Вариант исполнения медицинского изделия	Техническое описание
9	Презервативы Like Me® Продлевающие удовольствие	с анестетиком, с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой.
10	Презервативы Like Me® Цветные ароматизированные (красный, жёлтый, зелёный)	с накопителем, гладкие, с накопителем, цветные ароматизированные (красный, жёлтый, зелёный) с силиконовой смазкой. Красный с ароматом клубники, жёлтый с ароматом лимона, зелёный с ароматом мяты.
11	Презервативы Like Me® Чёрные	с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой

7. Презервативы должны быть герметичными.

8. Основные параметры презервативов, в зависимости от варианта исполнения, представлены в таблице ниже.

Параметр	Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса, вариант исполнения:					
	Классические, Продлевающие удовольствие, Цветные ароматизированные (красный, жёлтый, зелёный), Чёрные	Суперпрочные	Анатомические	Рёбристые, С точками, 3 в 1 (рёбристые с точками, анатомические)	Ультратонкие	Увеличенного размера
Размеры						
Длина (мм)	180 ⁺²⁰ ₋₀	180 ⁺²⁰ ₋₀	180 ⁺²⁰ ₋₀	180 ⁺²⁰ ₋₀	180 ⁺²⁰ ₋₀	190 ⁺¹⁵ ₋₀
Ширина (мм)	52±2	52±2	52±2	52±2	52±2	55±2
Толщина стенки (мм)	0,065±0,010	0,070±0,010	0,065±0,010	0,065±0,010	0,045±0,010	0,065±0,010
Длина накопителя (мм)	21±2	21±2	21±2	21±2	21±2	27±2
Толщина венчика (мм)	1,4±0,3	1,7±0,3	1,4±0,3	1,4±0,3	1,2±0,3	1,4±0,3
Масса презерватива в индивидуальной упаковке	2,5 г±10%	2,5 г±10%	3,5 г±10%	2,5 г±10%	2,5 г±10%	2,5 г±10%
Объём разрыва и давление разрыва	Разрывной объём = мин. 18,0 л. Разрывное давление = мин. 1,0 кПа					Разрывной объём = мин. 22,0 л Разрывное давление = мин. 1,0 кПа
Масса смазки	мин 400 мг					

9. По физико-механическим показателям презервативы должны соответствовать нормам, указанным в таблице ниже.

Наименование показателя	Значение показателя	
	до теплового старения	после теплового старения
1. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	20(200)	17(170)
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700	600

[Показания к применению]

Защита от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

[Противопоказания]

Индивидуальная непереносимость компонентов.

[Меры предосторожности]

- При необходимости в дополнительной смазке используйте лубриканты на водной основе.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛУБРИКАНТЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ, такие как вазелиновое масло, минеральное масло и крема для кожи, так как они могут снижать эффективность презерватива и привести к нарушению его целостности. Таким же эффектом могут обладать некоторые лекарственные средства для местного применения, если нанести их на половой член или ввести во влагалище. Если вы не уверены

на счёт подобного действия лекарственных препаратов, использующихся вместе с презервативом, уточните этот момент у вашего врача или фармацевта-провизора.

3. Запрещается использовать презерватив, если резина стала липкой или хрупкой, или если имеются явные признаки повреждения его индивидуальной упаковки. Вместо этого используйте новый презерватив из неповреждённой упаковки.

4. В случае нарушения целостности или разрыва презерватива во время полового акта как можно скорее обратитесь за медицинской помощью (как минимум в течение 72 часов).

5. Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное их использование может приводить к увеличению риска их разрыва и передачи инфекции.

6. При правильном использовании во время каждого полового акта презервативы из латекса помогают предупредить беременность, снизить риск заражения ВИЧ/СПИД, а также другими инфекциями, передающимися половым путём.

7. Ни один метод контрацепции не способен обеспечить 100% защиту от беременности или заражения ВИЧ/СПИД. Если вы подозреваете, что вы или ваш партнер может забеременеть или заразиться инфекцией, немедленно проконсультируйтесь с вашим врачом.

8. Презерватив изготовлен из натурального каучукового латекса, который может вызвать аллергические реакции, включая анафилактический шок.

9. Храните презервативы в прохладном сухом месте. Защищайте их от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и механических повреждений.

[Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты]

Возможны аллергические реакции на материалы, входящие в состав изделий: латекс, силиконовую смазку, ароматизатор и краситель (при наличии).

[ВНИМАНИЕ!]

Несмотря на то, что ни один из видов контрацепции не может обеспечить 100% эффективность, презервативы из латекса, при правильном использовании являются очень эффективным методом предотвращения беременности, не вызывая серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании других противозачаточных средств.

Презервативы главным образом предназначены для использования при вагинальном половом акте. При другом виде использования повышается риск повреждения презерватива. Презервативы из латекса, при правильном использовании, уменьшают риск распространения ВИЧ инфекций [СПИД] и других болезней, передающихся половым путем.

Каждый презерватив проходит 100% электронную проверку.

[Порядок применения]

1. Осторожно вскройте упаковку, убедившись, что Вы не повредили презерватив.

2. Доставая презерватив из фольгированной упаковки избегайте его повреждения ногтями, ювелирными изделиями и т.д.

3. Аккуратно зажмите резервуар для спермы на конце презерватива между большим и указательным пальцем, чтобы выдавить воздух из кончика презерватива, одновременно поместив презерватив на головку эрегированного члена. Данная процедура должна выполняться перед каким-либо контактом между половым членом и телом партнера, чтобы презерватив помог предупредить заражение инфекциями, передающимися половым путем, и наступление беременности.

4. Продолжая удерживать кончик презерватива с резервуаром для спермы, другой рукой раскатайте презерватив по всей длине эрегированного полового члена.

5. Остановитесь и проверьте презерватив, если он соскальзывает или слишком сильно обхватывает половой член, так как это может привести к нарушению его целостности.

6. После семяизвержения, пока поддерживается эрекция, медленно извлеките половой член, придерживая презерватив рукой за основание таким образом, чтобы он не соскользнул.

7. Снимите презерватив с полового члена, медленно свернув его обратно. Важно не касаться половым членом или использованным презервативом области промежности после того, как он был снят.

8. Заверните использованный презерватив и, соблюдая правила гигиены, выкиньте его в мусорное ведро.

9. Никогда не используйте презерватив более одного раза. Используйте презерватив во время каждого полового акта. НЕ используйте презерватив повторно. Повторное использование презерватива может повредить изделие, что, в свою очередь, может привести к беременностям и болезням.

[Консультация]

Если у Вас возникли вопросы по противозачаточным средствам с целью предотвращения нежелательной беременности или в связи с состоянием здоровья, - проконсультируйтесь с врачом.

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на то, что ни один из видов контрацепции не может обеспечить 100% эффективность, презервативы из латекса, при правильном использовании являются очень эффективным методом предотвращения беременности, не вызывая серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании других противозачаточных средств.

Презервативы главным образом предназначены для использования при вагинальном половом акте. При другом виде использования повышается риск повреждения презерватива. Презервативы из латекса, при правильном использовании, уменьшают риск распространения ВИЧ-инфекции (СПИД) и других болезней, передающихся половым путем.

[Предостережения]

- Не используйте презерватив повторно. При повторном использовании презерватива возможен повышенный риск разрыва или попадания инфекции.
- Храните презервативы в прохладном, сухом месте [Не выше 25С°], избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если оболочка презерватива стала липкой, непрочной или поврежденной, не используйте презерватив. Необходимо использование нового презерватива из неповрежденной упаковки.
- При обнаружении утечки или разрыва презерватива при использовании, требуется обращение к доктору (не позже 72 часов).
- Если цвет презерватива изменился, не используйте презерватив.

ВНИМАНИЕ!

- Если необходима дополнительная смазка, то используйте смазку, рекомендованную для презервативов, а не смазку на масляной основе (например, вазелин, детское масло, лосьоны для тела, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т.п.), потому что смазка на масляной основе негативно влияет на целостность презерватива.
- Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом на предмет переносимости медикаментов, которые могут контактировать с презервативом.
- Презерватив изготовлен из натурального латекса, который может привести к аллергическим реакциям, таким как анафилактический шок, если у пользователя аллергия на латекс.
- Если у вас есть сомнения в действенности вашего метода контрацепции, в том числе вследствие разрыва презерватива, или если вы имели незащищенный половой контакт, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрыва презерватива при использовании или обнаружении в нем отверстия рекомендуем обратиться за медицинской помощью как можно скорее, но не позже чем через 72 часа после случившегося.

[Утилизация]

Утилизация презерватива, если индивидуальная упаковка содержит явные повреждения, использованного презерватива, производится совместно с бытовыми отходами (отходы класса А, СанПиН 2.1.3684-21). Особых требований к утилизации нет. Не допускается слив использованных изделий в канализацию.

[Гарантии изготовителя]

Изготовитель гарантирует качество презервативов при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Срок годности презервативов - 5 лет с даты изготовления.

[Сведения о производителе]

Middle Licheng Road, Development Zone of Linyi County 251500 Dezhou City, Shandong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Центральное шоссе Личэн, Зона экономического развития округа Линьши, 251500, Дэчжоу, провинция Шаньдунь, Китайская народная республика)

Регистрационный No 913714246792219927

Телефон: +86-0534-2147767 / +86-0531-86018786

Факс: +86-0534-2147767

Электронная почта: sdmy@126.com

[Сведения о представителе производителя в РФ]

Наименование компании-представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Аванта» (ООО «Аванта»)

ИНН: 2310199654

Адрес местонахождения: Россия, 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.112, пом. 10

Телефон: 8 (861) 99 123 45

Электронная почта: advanta2020@mail.ru

[Условия хранения и транспортирования для поддержания стабильности]

Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Презервативы должны транспортироваться при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С (относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 °С).

При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течение 1 сут. с момента получения при нормальных климатических условиях.

Презервативы следует хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25°С вдали от прямых солнечных лучей.

[Стерильность]

Презерватив не является стерильным продуктом и не требует стерилизации перед применением.

[Стандарты соответствия]

Презервативы соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81; ГОСТ ИСО 4074-5-93; ГОСТ ИСО 4074-9-93; ГОСТ ИСО 4074-10-93; ГОСТ 29102.3-91; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; МУ 1.1.037-95.

[Глоссарий символов на маркировке]

Символ	Описание	Вид упаковки	Символ	Описание	Вид упаковки
	Запрет на повторное применение	Потребительская упаковка		Не использовать при повреждении упаковки	Потребительская упаковка
	Обратитесь к инструкции по применению	Потребительская упаковка Третичная упаковка		Температурный диапазон	Потребительская упаковка Третичная упаковка
	Дата изготовления	Индивидуальная упаковка Потребительская упаковка Третичная упаковка Транспортная упаковка		Не допускать воздействия солнечного света	Потребительская упаковка Третичная упаковка Транспортная упаковка
	Использовать до	Индивидуальная упаковка Потребительская упаковка Третичная упаковка Транспортная упаковка		Не допускать воздействия влаги	Потребительская упаковка Третичная упаковка Транспортная упаковка
	Код партии	Индивидуальная упаковка Потребительская упаковка Третичная упаковка Транспортная упаковка		Выбросить в урну	Потребительская упаковка
	Крюками не брать	Транспортная упаковка		Верх	Транспортная упаковка

НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ

Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции Шаньдун КНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

(2024) JCXZZ №0033

Настоящим подтверждается, что инструкция по применению изделия, предоставленная Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd. (Шандонг Минг Юань Латекс Ко., Лтд), является подлинной, действительной и соответствует законам и нормативным актам Китайской Народной Республики. Печати заинтересованных сторон являются подлинными.

Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции Шаньдун
КНР

Печать: «Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции
Шаньдун КНР»

Нотариус: /подпись/

11.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd
(Шандонг Минг Юань Латекс Ко., Лтд)

Лю Цинсян

/Подпись/

Дата: 02.02.2024

Печать: «Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd. (1)»

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 18-1802

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Корсик М. А.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 13 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 18-1801

Уплачено за совершение нотариального действия: 1800 руб. 00 коп.

М.А. Корсик

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 13 лист(а) (ов)

Нотариус

М.А. Корсик

公 证 书

中华人民共和国山东省济宁市诚信公证处

证 明 书

(2024) 济诚信证字第 0032 号

兹证明 Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd 所提供的产品使用说明书
文件真实有效,符合中华人民共和国的法律法规。相关方的印鉴属实。

中华人民共和国山东省济宁市诚信公证处

公证员



二零二四年三月十一日

CERTIFICATE

(Translation)

(2024) 济诚信证字第 0032 号

This is to certify that the Instructions For Use supplied by Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd is valid and comply with the Laws. And the signature and seal is found to be authentic.

Notary: Wen Xueyi

Jining Chengxin Notary Public Office (Seal)

Shandong Province

The People's Republic of China

Mar. 11th, 2024



APPROVED BY

CEO

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd

Lin Dongxiang



(stamp)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ВКЛАДЫШ)

Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса

Редакция документа: 2. Дата документа: 02.02.2024



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd (Шандонг Минг Юань Латекс Ко., Лтд)
Middle Licheng Road, Development Zone of Linyi County 251500 Dezhou City, Shandong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Китайская народная республика)

Инструкция по применению



Высокая степень защиты от болезней, передающихся половым путем.

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на то, что ни один из видов контрацепции не может обеспечить 100% эффективность, презервативы из латекса, при правильном использовании являются очень эффективным методом предотвращения беременности, не вызывая серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании других противозачаточных средств.

Презервативы главным образом предназначены для использования при вагинальном половом акте. При другом виде использования повышается риск повреждения презерватива. Презервативы из латекса, при правильном использовании, уменьшают риск распространения ВИЧ инфекции [СПИД] и других болезней, передающихся половым путем.

Каждый презерватив проходит 100% электронную проверку.

НАЗНАЧЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Презервативы Like Me® из натурального каучукового латекса» предназначены для контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

Контрацептивы негормональные.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Презервативы являются нестерильными медицинскими изделиями, предназначенными для однократного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для индивидуального использования в области контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Защита от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При необходимости в дополнительной смазке используйте лубриканты на водной основе.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛУБРИКАНТЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ, такие как вазелиновое масло, минеральное масло и крема для кожи, так как они могут снижать эффективность презерватива и привести к нарушению его целостности. Таким же эффектом могут обладать некоторые лекарственные средства для местного применения, если нанести их на половой член или ввести во влагалище. Если вы не уверены насчет подобного действия лекарственных препаратов, использующихся вместе с презервативом, уточните этот момент у вашего врача или фармацевта-провизора.
3. Запрещается использовать презерватив, если резина стала липкой или хрупкой, или если имеются явные признаки повреждения его индивидуальной упаковки. Вместо этого используйте новый презерватив из неповрежденной упаковки.
4. В случае нарушения целостности или разрыва презерватива во время полового акта как можно скорее обратитесь за медицинской помощью (как минимум в течение 72 часов).
5. Презервативы предназначены только для однократного использования. Повторное их использование может привести к увеличению риска их разрыва и передачи инфекции.
6. При правильном использовании во время каждого полового акта презервативы из латекса помогают предупредить беременность, снизить риск заражения ВИЧ/СПИД, а также другими инфекциями, передающимися половым путем.
7. Ни один метод контрацепции не способен обеспечить 100% защиту от беременности или заражения ВИЧ/СПИД. Если вы подозреваете, что вы или ваш партнер может забеременеть или заразиться инфекцией, немедленно проконсультируйтесь с вашим врачом.
8. Презерватив изготовлен из натурального каучукового латекса, который может вызвать аллергические реакции, включая анафилактический шок.
9. Храните презервативы в прохладном сухом месте. Защищайте их от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и механических повреждений.

ОЖИДАЕМЫЕ И ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможны аллергические реакции на материалы, входящие в состав изделий: латекс, силиконовую смазку, ароматизатор и краситель (при наличии).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если у Вас возникли вопросы по противозачаточным средствам с целью предотвращения нежелательной беременности или в связи с состоянием здоровья, - проконсультируйтесь с врачом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Осторожно вскройте упаковку, убедившись, что Вы не повредили презерватив.
2. Доставая презерватив из фольгированной упаковки избегайте его повреждения ногтями, ювелирными изделиями и т.д.
3. Аккуратно зажмите резервуар для спермы на конце презерватива между большим и указательным пальцем, чтобы выдавить воздух из кончика презерватива, одновременно поместив презерватив на головку эрегированного члена. Данная процедура должна выполняться перед каким-либо контактом между половым членом и телом партнера, чтобы презерватив помог предупредить заражение инфекциями, передающимися половым путем, и наступление беременности.
4. Продолжая удерживать кончик презерватива с резервуаром для спермы, другой рукой раскатайте презерватив по всей длине эрегированного полового члена.
5. Остановитесь и проверьте презерватив, если он соскальзывает или слишком сильно обхватывает половой член, так как это может привести к нарушению его целостности.
6. После семяизвержения, пока поддерживается эрекция, медленно извлеките половой член, придерживая презерватив рукой за основание таким образом, чтобы он не соскользнул.
7. Снимите презерватив с полового члена, медленно свернув его обратно. Важно не касаться половым членом или использованным презервативом области промежности после того, как он был снят.
8. Заверните использованный презерватив и, соблюдая правила гигиены, выкиньте его в мусорное ведро.
9. Никогда не используйте презерватив более одного раза. Используйте презерватив во время каждого полового акта. НЕ используйте презерватив повторно. Повторное использование презерватива может повредить изделие, что, в свою очередь, может привести к беременностям и болезням.

ВНИМАНИЕ

- Если необходима дополнительная смазка, то используйте смазку, рекомендованную для презервативов, а не смазку на масляной основе (например, вазелин, детское масло, лосьоны для тела, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т.п.), потому что смазка на масляной основе негативно влияет на целостность презерватива.
- Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом на предмет переносимости медикаментов, которые могут контактировать с презервативом.
- Презерватив изготовлен из натурального латекса, который может привести к аллергическим реакциям, таким как анафилактический шок, если у пользователя аллергия на латекс.
- Если у вас есть сомнения в действенности вашего метода контрацепции, в том числе вследствие разрыва презерватива, или если вы имели незащищенный половой контакт, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрыва презерватива при использовании или обнаружении в нем отверстия рекомендуем обратиться за медицинской помощью как можно скорее, но не позже чем через 72 часа после случившегося.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не используйте презерватив повторно. При повторном использовании презерватива возможен повышенный риск разрыва или попадания инфекции.
- Храните презервативы в прохладном, сухом месте [Не выше 25°C], избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если оболочка презерватива стала липкой, непрочной или поврежденной, не используйте презерватив. Необходимо использование нового презерватива из неповрежденной упаковки.
- При обнаружении утечки или разрыва презерватива при использовании, требуется обращение к доктору (не позже 72 часов).
- Если цвет презерватива изменился, не используйте презерватив.

СРОК ГОДНОСТИ ПРЕЗЕРВАТИВОВ

5 лет с даты изготовления.

СТАНДАРТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Презервативы соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81; ГОСТ ИСО 4074-5-93; ГОСТ ИСО 4074-9-93; ГОСТ ИСО 4074-10-93; ГОСТ 29102.3-91; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; МУ 1.1.037-95.

ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация презерватива, если индивидуальная упаковка содержит явные повреждения, использованного презерватива, производится совместно с бытовыми отходами (отходы класса А, СанПиН 2.1.3684-21). Особых требований к утилизации нет. Не допускается слив использованных изделий в канализацию.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ

Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции Шаньдун КНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

(2024) JCXZZN№0032

Настоящим подтверждается, что инструкция по применению изделия, предоставленная Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd. (Шандонг Минг Юань Латекс Ко., Лтд), является подлинной, действительной и соответствует законам и нормативным актам Китайской Народной Республики. Печати заинтересованных сторон являются подлинными.

Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции Шаньдун
КНР

Печать: «Нотариальная контора Чэнсинь городского округа Цзинин провинции
Шаньдун КНР»

Нотариус: /подпись/

11.03.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd
(Шандонг Минг Юань Латекс Ко., Лтд)

Лю Цинсян

/Подпись/

Дата: 02.02.2024

Печать: «Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd. (1)»

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024-18-1802

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



М.А. Корсик

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Корсик М. А.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 9 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Третьего апреля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024-18-1802

Уплачено за совершение нотариального действия: 1000 руб. 00 коп.

М.А. Корсик



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 лист(а) (ов)

Нотариус

М.А. Корсик