



медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НПКЦ «МИЗ»

А.А. Листков



«27» февраля 2024 г.

Столик медицинский манипуляционный

по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017

Руководство по эксплуатации

2024

Содержание

Раздел	стр.
1. Введение	3
2. Технические характеристики	3
3. Требования к персоналу	4
4. Назначение. Показания к применению	4
5. Противопоказания	4
6. Комплект поставки	4
7. Сборка столика	7
8. Предупреждения и предосторожности	7
9. Правила эксплуатации	7
10. Уход за столиком	8
11. Техническое обслуживание и текущий ремонт	8
12. Транспортирование и хранение	9
13. Порядок утилизации	9
14. Гарантийные обязательства	9
Приложение 1	10
Приложение 2	11
Приложение 3	25
Приложение 4	32

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 (далее - столик, столики, изделия). Столик медицинский манипуляционный выпускается в следующих исполнениях: (см. Приложение 1).

2. Технические характеристики.

2.1 Габаритные размеры приведены в приложении 2.

2.2 Масса приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Масса изделия, не более кг
	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017, варианты исполнения:	
1	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5	8,6
2	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1	8,6
3	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4	11,6
4	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1	11,6
5	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3	10,1
6	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1	10,1
7	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т	11
8	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т. 1	11
9	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т	15,8
10	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т. 1	15,8
11	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 1	15,8
12	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 2	21,5
13	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 3	27,2
14	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП	5,2

2.3 Несущие конструкции столика (рамы, каркасы, основания) должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы столика закреплены неподвижно.

2.4 Столики должны характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с его назначением, и должен отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

Конструкция столиков с отделениями для хранения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий должна обеспечивать свободный доступ к ним.

2.5 Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности столика не допускаются дефекты сварных соединений.

2.6 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.

2.7 Наружная поверхность столиков не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

2.8 Толщина стеклянных полок должна быть $5 \pm 0,2$ мм.

2.9 Толщина полок из нержавеющей стали должна быть $0,50 \pm 0,05$ мм.

2.10 Столик в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между полом и одним из колес (ножками- опорами) должен быть не более 3 мм.

2.11 Максимально допустимая нагрузка должна быть:

- на полку из нержавеющей стали 15 ± 1 кг;
- на полку стеклянную $3 \pm 0,5$ кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг.

2.12 Усилие выдвигания ящиков должно быть не более 4 даН.

2.13 Столик должен быть устойчив при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 4,5 даН.

2.14 Выдвижные элементы столиков ГР-СММ-1, ГР-СММ-2, ГР-СММ-3 должны иметь свободный ход, без заеданий и перекосов.

2.15 Ящики столиков ГР-СММ-1, ГР-СММ-2, ГР-СММ-3 должны иметь устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.16 Столики в любом из вариантов исполнения должны быть оснащены колесами диаметром: $\varnothing 50 \pm 0,5$ мм.

2.17 Колеса столиков в любом из вариантов исполнения должны вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания и должны быть самоориентирующимися.

2.18 У столиков в любом из вариантов исполнения два колеса из четырех должны быть оснащены механизмом стопора.

2.19 Столик в любом из вариантов исполнения должен перемещаться по ровному полу при усилии не более 5 даН. Усилие фиксации тормоза (расфиксации) столика в любом из вариантов исполнения должно быть не более 8 даН.

2.20 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства столика и ее составных частей, после падения.

2.21 На столике исполнения ГР-СИП высота должна регулироваться при помощи винтового зажима. После закрепления винтового зажима, столик должен быть устойчив приложению усилия менее 10 даН.

3. Требования к персоналу.

3.1 Персонал лечебно-профилактических учреждений широкого профиля.

4. Назначение. Показания к применению:

Столики медицинские манипуляционные по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 предназначены для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских

изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения, из которых:

Столики медицинские манипуляционные по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5, ГР-СИ-5.1, ГР-СИ-4, ГР-СИ-4.1, ГР-СИ-3, ГР-СИ-3.1, ГР-СИ-5т, ГР-СИ-5т.1, ГР-СИ-4т, ГР-СИ-4т.1, ГР-СММ-1, ГР-СММ-2, ГР-СММ-3 предназначены для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций в пределах лечебно-профилактического учреждения.

5. Противопоказания.

5.1 Противопоказания отсутствуют.

6. Комплект поставки. Упаковка.

6.1. Столики поставляются в разобранном виде. Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.	Наименование	Кол-во, Шт.
I	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802- 2017*	1
1	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5, в составе:	1
1.1	Ножка	2
1.2	Рамка	2
1.3	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
1.4	Колесо аппаратное Ф50	2
1.5	Винт М6х45 потайной	8
1.6	Гайка колпачковая М6	8
1.7	Полка из нержавеющей стали	2
2	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1, в составе:	1
2.1	Ножка	2
2.2	Рамка	2
2.3	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
2.4	Опора мебельная колесная Ф50	2
2.5	Винт М6х45 потайной	8
2.6	Гайка колпачковая М6	8
2.7	Полка из нержавеющей стали	2
3	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4, в составе:	1
3.1	Ножка	2
3.2	Рамка	2
3.3	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
3.4	Колесо аппаратное Ф50	2
3.5	Винт М6х45 потайной	8
3.6	Гайка колпачковая М6	8
3.7	Полка из стекла	2

4	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1, в составе:	1
Продолжение Таблицы 2		
4.1	Ножка	2
4.2	Рамка	2
4.3	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
4.4	Опора мебельная колесная Ф50	2
4.5	Винт М6х45 потайной	8
4.6	Гайка колпачковая М6	8
4.7	Полка из стекла	2
5	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3, в составе:	1
5.1	Ножка	2
5.2	Рамка	2
5.3	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
5.4	Колесо аппаратное Ф50	2
5.5	Винт М6х45 потайной	8
5.6	Гайка колпачковая М6	8
5.7	Полка из нержавеющей стали	1
5.8	Полка из стекла	1
6	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1, в составе:	1
6.1	Ножка	2
6.2	Рамка	2
6.3	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
6.4	Опора мебельная колесная Ф50	2
6.5	Винт М6х45 потайной	8
6.6	Гайка колпачковая М6	8
6.7	Полка из нержавеющей стали	1
6.8	Полка из стекла	1
7	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т, в составе:	1
7.1	Ножка	2
7.2	Рамка	3
7.3	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
7.4	Колесо аппаратное Ф50	2
7.5	Винт М6х45 потайной	12
7.6	Гайка колпачковая М6	12
7.7	Полка из нержавеющей стали	3
8	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т.1, в составе:	1
8.1	Ножка	2
8.2	Рамка	3
8.3	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
8.4	Опора мебельная колесная Ф50	2
8.5	Винт М6х45 потайной	12
8.6	Гайка колпачковая М6	12
8.7	Полка из нержавеющей стали	3
9	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т, в составе:	1
9.1	Ножка	2

9.2	Рамка	3
9.3	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
Окончание Таблицы 2		
9.4	Колесо аппаратное Ф50	2
9.5	Винт М6х45 потайной	12
9.6	Гайка колпачковая М6	12
9.7	Полка из стекла	3
10	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т.1, в составе:	1
10.1	Ножка	2
10.2	Рамка	3
10.3	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
10.4	Опора мебельная колесная Ф50	2
10.5	Винт М6х45 потайной	12
10.6	Гайка колпачковая М6	12
10.7	Полка из стекла	3
11	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-1, в составе:	1
11.1	Стол	1
11.2	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
11.3	Колесо аппаратное Ф50	2
11.4	Полка из нержавеющей стали	3
12	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-2, в составе:	1
12.1	Стол	1
12.2	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
12.3	Колесо аппаратное Ф50	2
12.4	Полка из нержавеющей стали	2
13	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-3, в составе:	1
13.1	Стол	1
13.2	Колесо аппаратное Ф50 с тормозом	2
13.3	Колесо аппаратное Ф50	2
13.4	Полка из нержавеющей стали	1
14	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП, в составе:	1
14.1	Основание	1
14.2	Стойка	1
14.3	Зажим	1
14.4	Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом	2
14.5	Опора мебельная колесная Ф50	2
14.6	Полка из нержавеющей стали	1
II	Руководство по эксплуатации	1
III	Паспорт	1

*- исполнение выбирается из числа представленных: (см. Приложение 1)

6.2 Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 20790-93 и настоящих ТУ.

6.3 Упаковка должна обеспечить полную сохранность столика, конструктивные элементы должны быть защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждения во время хранения и перевозки выбранным видом транспорта с учетом возможных перегрузок в пути.

6.4 По согласованию с потребителем допускаются разные виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

6.5 Временная противокоррозионная защита металлических частей должна быть выполнена по ГОСТ 9.014. Вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-10. Вариант внутренней упаковки ВУ-5. Срок консервации 1 год.

6.6 Каждая часть комплекта столика должна быть обернута пленкой термоусадочной по ГОСТ 25951.

6.7 Комплект столиков ГР-СИ-5, ГР-СИ-5.1, ГР-СИ-4, ГР-СИ-4.1, ГР-СИ-3, ГР-СИ-3.1, ГР-СИ-5т, ГР-СИ-5т.1, ГР-СИ-4т, ГР-СИ-4т.1, ГР-СММ-1, ГР-СММ-2, ГР-СММ-3 вместе с эксплуатационной документацией, упакованной в отдельный негерметичный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, должен быть уложен в коробки из картона по ГОСТ Р 52901. Комплект столика ГР-СИП вместе с эксплуатационной документацией упаковывается в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951.

Габаритные размеры упакованного изделия и масса упаковки:

№ п/п	Наименование изделия	Высота, см ± 5 мм	Ширина, см ± 5 мм	Длина сверху, см ± 5 мм	Длина снизу, см ± 5 мм	Масса упаковки, кг
1	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5	75,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
2	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1	75,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
3	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4	75,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
4	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1	77,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
5	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3	75,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
6	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1	75,5	47,5	4-6	10,5	0,8 - 1
7	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т	86	47	4-6	11	1-1,1
8	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т. 1	86	47	4-6	11	1-1,1
9	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т	86	47	4-6	11	1-1,1
10	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т. 1	86	47	4-6	11	1-1,1
11	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 1	91	55	45	45	1-1,1
12	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 2	91	55	45	45	1-1,1
13	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ - 3	91	55	45	45	1-1,1
14	Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП	60	50	77		0,5

6.8 В каждую транспортную тару должен быть вложен паспорт, который должен содержать следующую информацию:

- наименование столика по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- технические данные (габариты);
- сведения о комплекте поставки;
- инструкцию по сборке;
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
- дату изготовления;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- условный номер упаковщика и контролера;

6.9 На упаковке должна быть информация о:

- наименование изделия и обозначение настоящих ТУ;
- наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- манипуляционные знаки на упаковке столиков ГР-СИ-5, ГР-СИ-5.1, ГР-СИ-4, ГР-СИ-4.1, ГР-СИ-3, ГР-СИ-3.1, ГР-СИ-5т, ГР-СИ-5т.1, ГР-СИ-4т, ГР-СИ-4т.1, ГР-СММ-1, ГР-СММ-2, ГР-СММ-3 - «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192; столиков ГР-СИП «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

6.10 Расшифровка манипуляционных знаков, указанных на упаковке:

№	Информация	Изображение
1	Знак «Хрупкое. Осторожно»	
2	Знак «Верх»	
3	Знак «Беречь от влаги»	

6.10 Каждое изделие маркируется ярлыком, выполненным печатным способом, прочно приклеенным к изделию. Маркировка должна быть четкой. Комплект столика должен быть снабжен паспортом. Маркировка должна содержать:

- наименование столика по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
- дату изготовления;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем.

6.11 Макет маркировки:

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 _-_- Рег. удостоверение № РЗН 2018/6985 от _-_-20_ г. Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Александровская слобода, д. 241 Страна изготовителя: Россия Номер партии: _____
--

7. Сборка столика

Прежде, чем приступить к сборке столика, необходимо освободить все детали набора от упаковки, проверить комплектность пакетов и ознакомиться с инструкцией по сборке. Сборку производить на ровном полу. Пол можно застелить тканью, пленкой или картоном во избежание повреждений и загрязнения столика.

7.1 Инструкция по сборке столиков приведены в Приложении 3.

8. Предупреждения и предосторожности.

8.1 Используйте столик только в соответствии с его функциональным назначением. Сохранность и долговечность столика зависит не только от его качества, но и от условий эксплуатации. При транспортировке и хранении столика в упаковке он должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

9. Правила эксплуатации (порядок использования по назначению).

9.1. Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

9.2. Не допускайте воздействия на столик горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения).

9.3. Не допускайте воздействия на столик агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

9.4. Не проводите по поверхности и не ударяйте столик острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

9.5. При заполнении полок равномерно распределяйте нагрузку.

9.6. Не следует прилагать излишние усилия для открывания выдвижных ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки.

9.7. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь.

9.8. Во избежание опрокидывания изделий запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии выдвигать все ящики одновременно.

9.9. В процессе эксплуатации, при необходимости, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.

10. Уход за столиком. Дезинфекционная обработка медицинского изделия.

10.1. Поверхность столика рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

10.2. Очистка лакокрасочных покрытий производится увлажненной махровой или замшевой микроволокнутой салфеткой с использованием специальных полиролей для лакокрасочных покрытий. Допускается использование моющих средств (слабые мыльные растворы), а также слабого раствора этилового спирта. После протирки поверхности моющим средством, необходимо сразу протереть ее мягкой сухой салфеткой.

10.3. Для очистки стекла применяются специальные средства, рекомендованные для чистки

этих материалов. При необходимости обезжиривания рекомендуется пользоваться водным раствором денатурированного спирта. Протирка осуществляется салфеткой из микроволокна. Не допускается применение абразивных чистящих средств, попадание чистящих растворов в пазы рамок дверей. При попадании сразу же удалить сухой тканью.

10.4. Категорически недопустимо при чистке столиков применение твердых приспособлений (скребков, губок) с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала, а также агрессивных, абразивных материалов и моющих средств на кислотной и щелочной основе.

10.5. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за столиком, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.

10.6. Рекомендуется как можно скорее очищать любую часть столика от загрязнения. Если загрязнение остается на поверхности столика на некоторое время, то это заметно повышает опасность образования разводов, пятен и повреждения предметов столика.

10.7. Проведите дезинфекцию столика дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в Российской Федерации для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими приказами Минздрава РФ и методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Согласно п. 1.2.28 ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 наружные поверхности столика устойчивы к дезинфекции по МУ- 287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

10.8. После определённого периода эксплуатации, механические элементы (направляющие, подъёмные механизмы), утрачивают смазку и оптимальную регулировку. Это может проявиться в скрипе, затрудненном выдвигении ящиков и т.д. Если вы заметили подобные изменения в работе механизмов, не следует прилагать чрезмерных усилий для закрывания. Для надлежащей работы всех механизмов требуется своевременная регулировка петель и смазывание направляющих.

11. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

11.1. Столики подлежат техническому обслуживанию при использовании, а также периодическому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание при использовании и периодическое техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным или специализированным персоналом лечебно-профилактического учреждения.

Изготовитель в период гарантийного срока эксплуатации обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия в случае обнаружения дефектов производственного характера.

11.2. Техническое обслуживание включает в себя ежедневный осмотр целостности покрытий столика, его составных частей, уход и дезинфекцию согласно п. 10 настоящего Руководства. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления резьбовых соединений и колес. При необходимости их нужно затянуть.

11.3. Периодическое техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в месяц, в ходе которого необходимо прочищать колеса от грязи, производить смазку колес и затяжку винтов.

12. Транспортирование и хранение.

12.1 Транспортирование столика осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

В пределах одного населенного пункта столик допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

12.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

12.3 Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

13. Порядок утилизации.

13.1. Утилизация столиков должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.3684-21. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

13.2 Согласно СанПиН 2.1.7.3684-21 столики относятся к классу А — эпидемиологические безопасные отходы.




14. Гарантийные обязательства.

14.1. Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки и хранения.

14.2 Проект гарантийного талона представлен в Приложении 4.




Приложение 2

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ -5

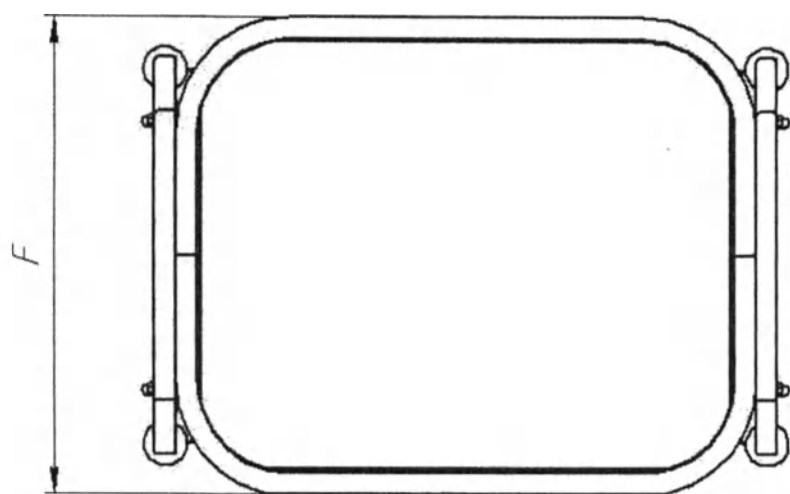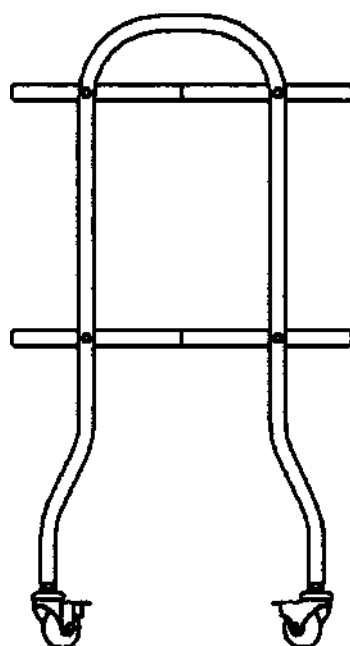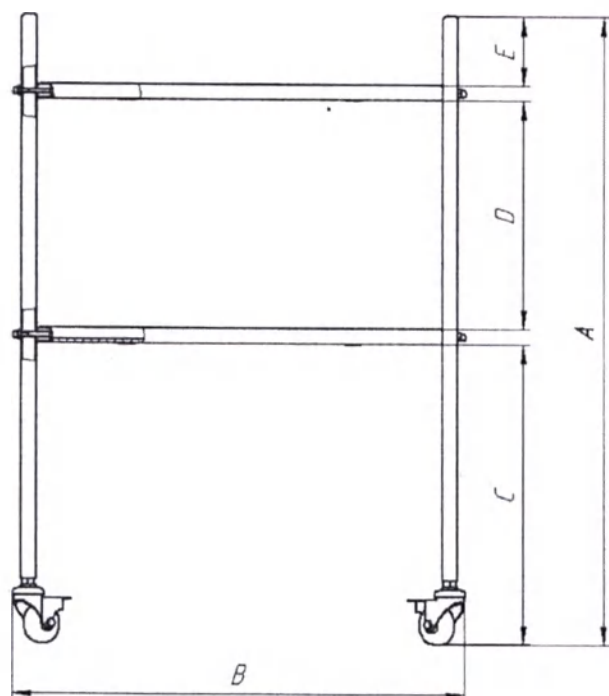




A	B	C	D	E	F
825±2 мм	605±2 мм	395±2 мм	300±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ -5.1

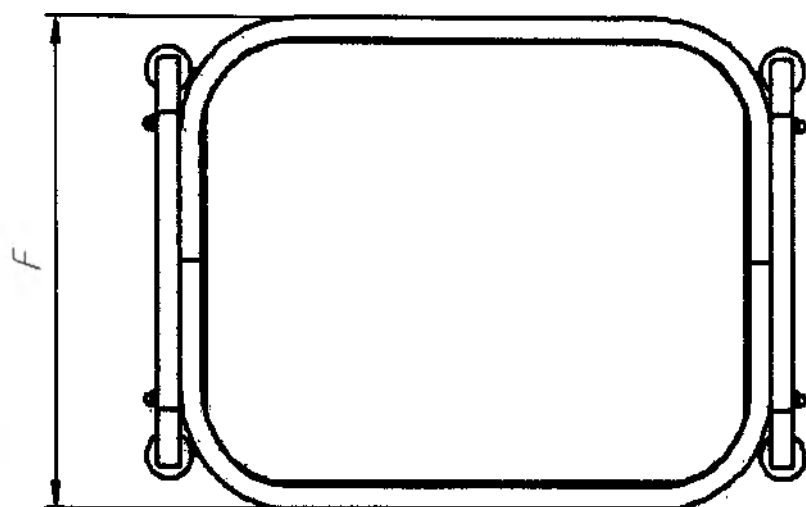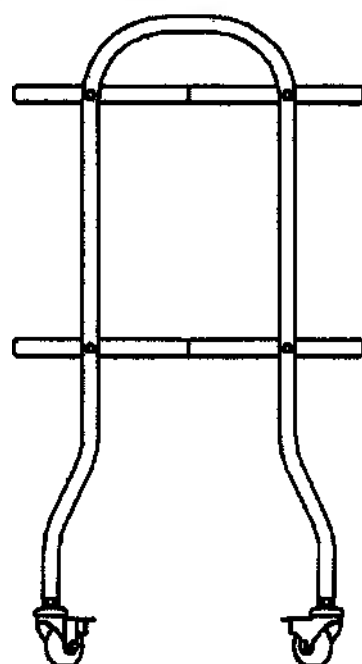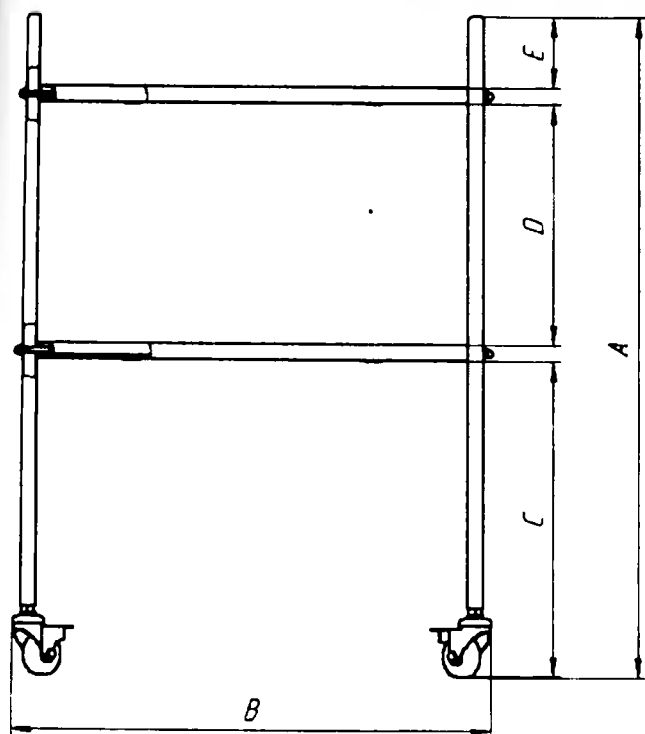


A	B	C	D	E	F
805±2 мм	605±2 мм	375±2 мм	300±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столлик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4

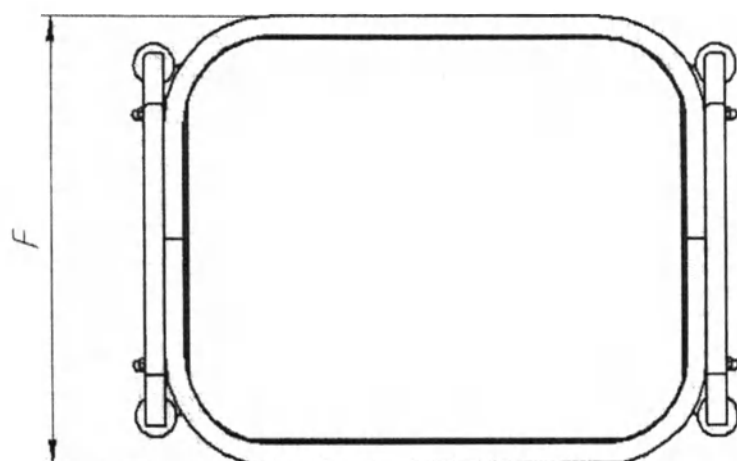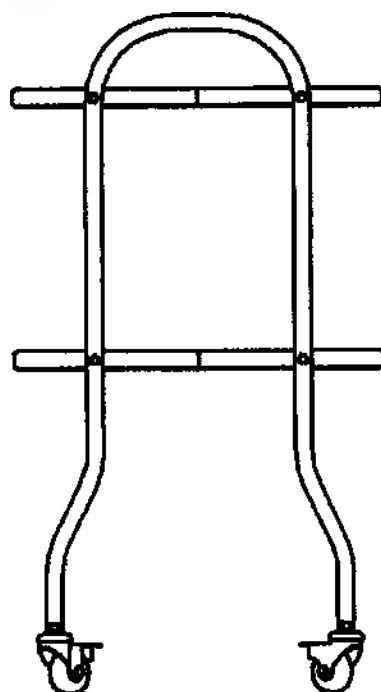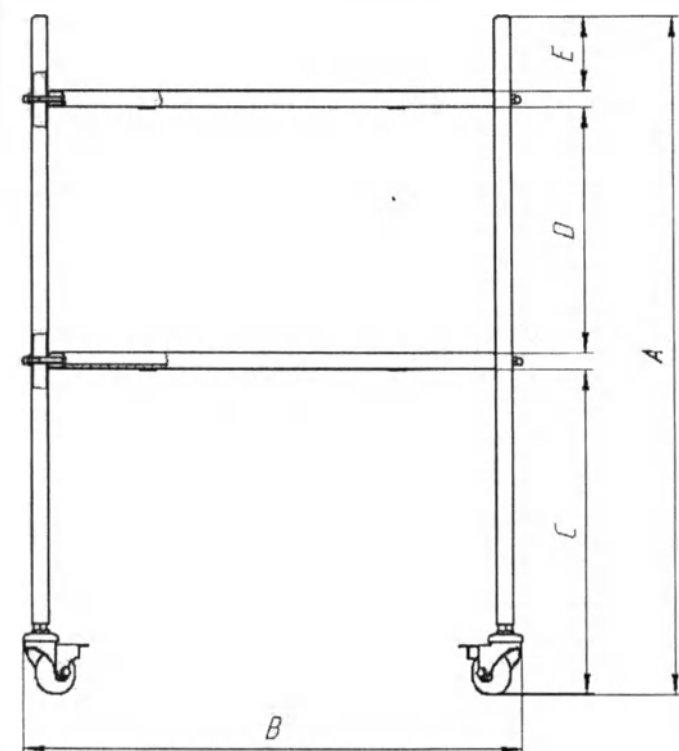


A	B	C	D	E	F
825±2 мм	605±2 мм	395±2 мм	300±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1

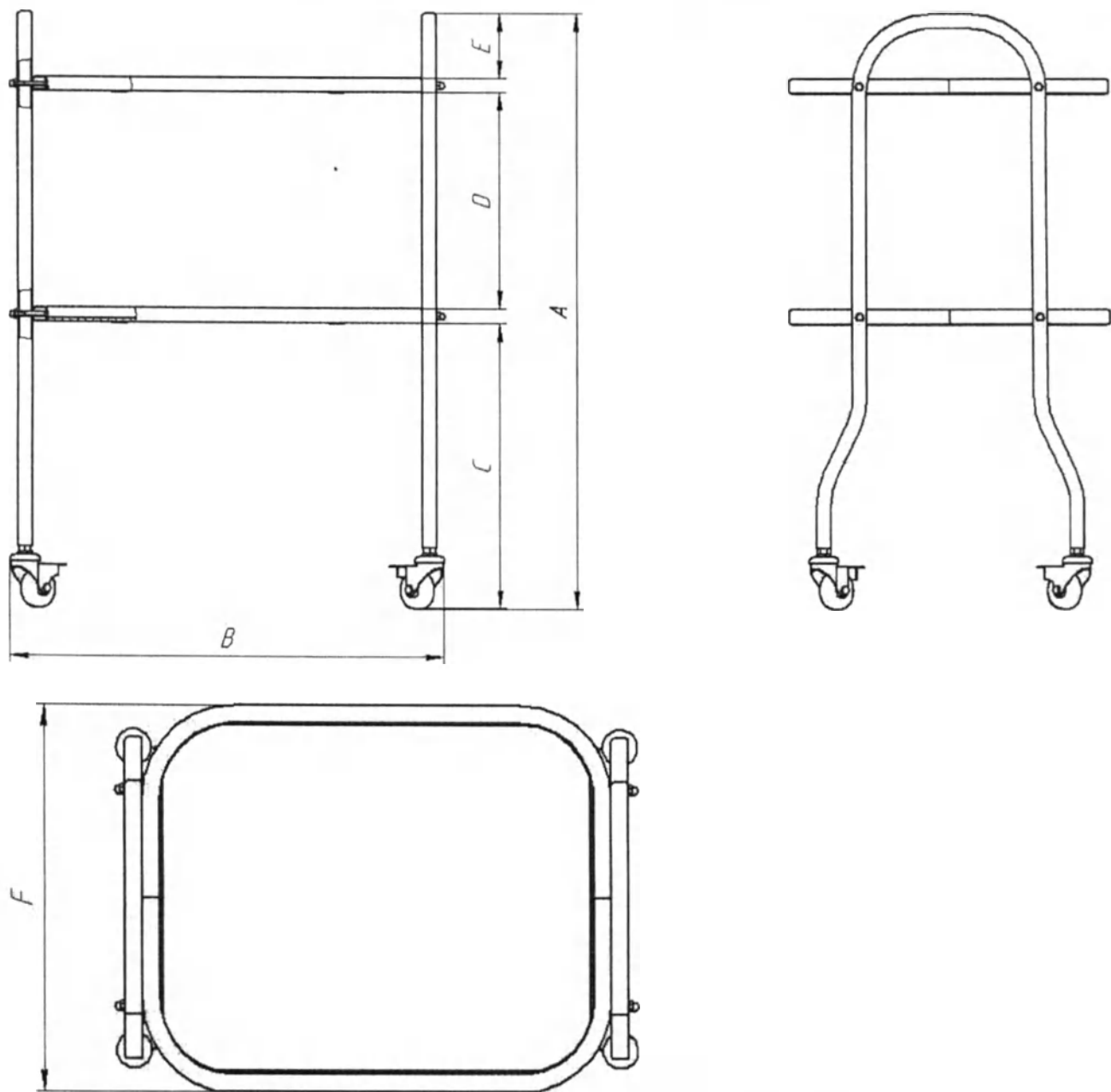




A	B	C	D	E	F
805±2 мм	605±2 мм	375±2 мм	300±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3

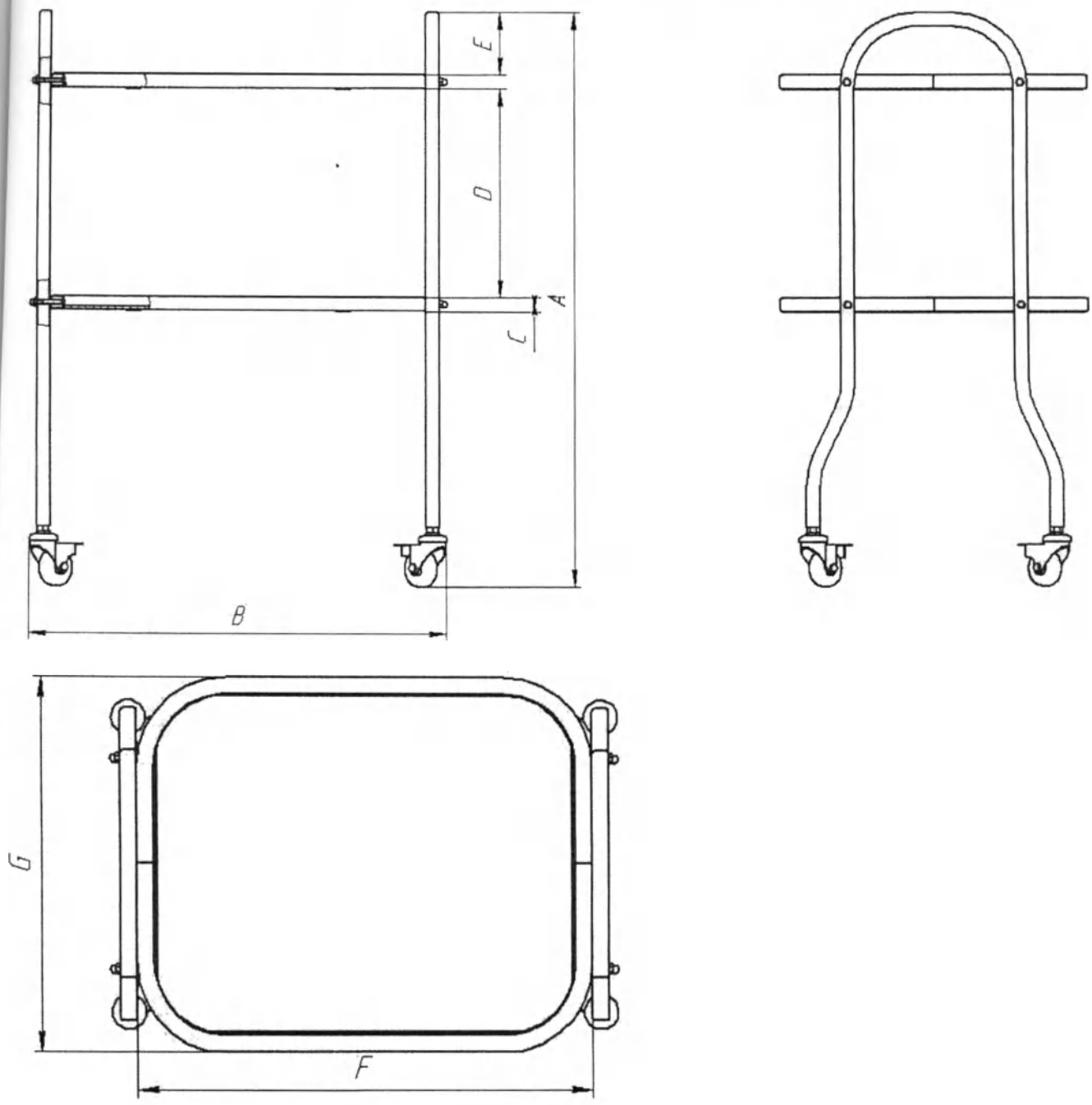




A	B	C	D	E	F	G
825±2 мм	605±2 мм	20±1 мм	300±2 мм	90±2 мм	454±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1

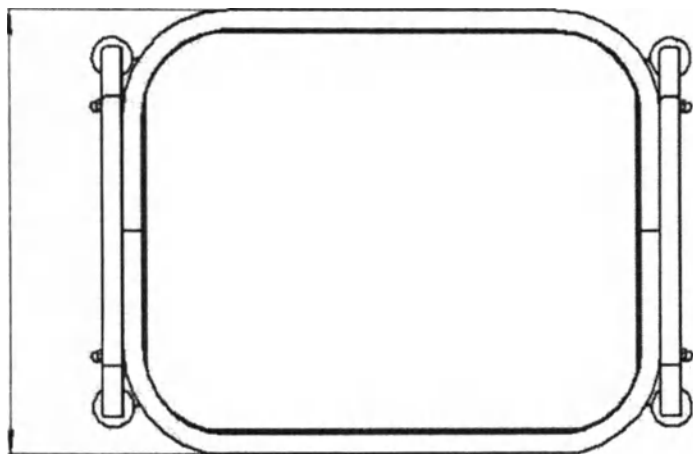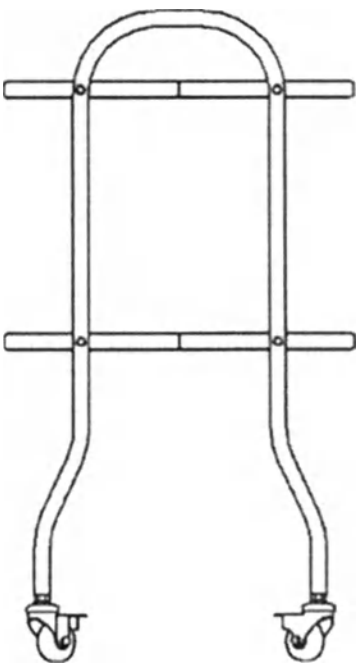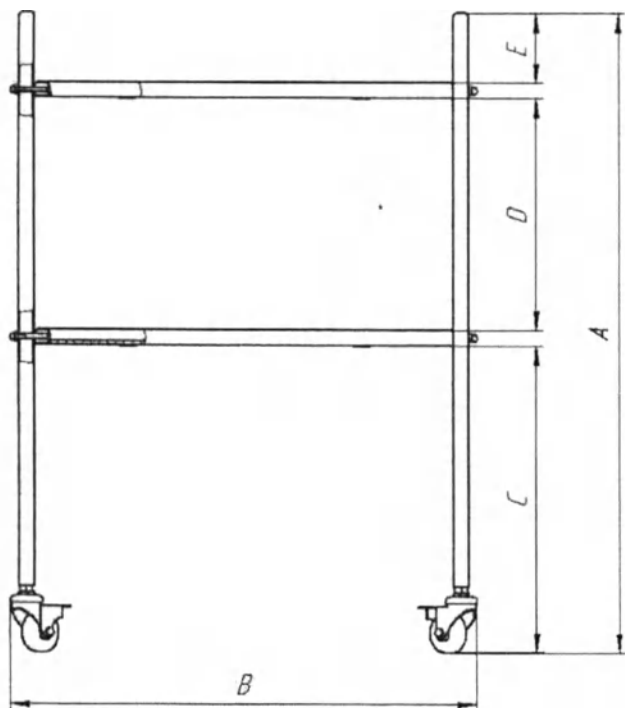


A	B	C	D	E	F
805±2 мм	605±2 мм	375±2 мм	300±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т

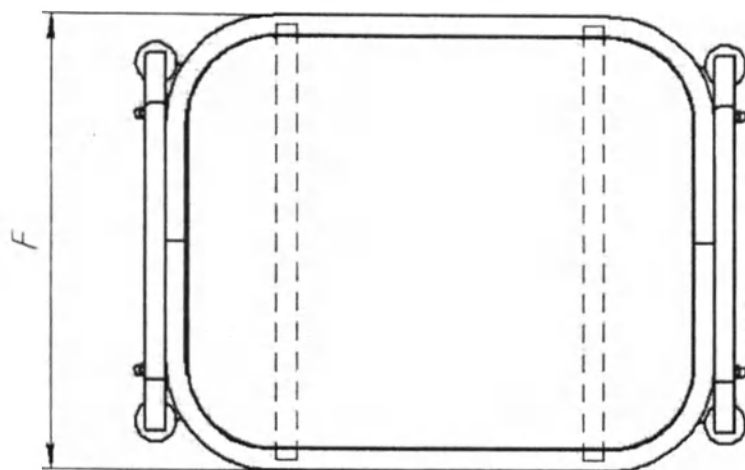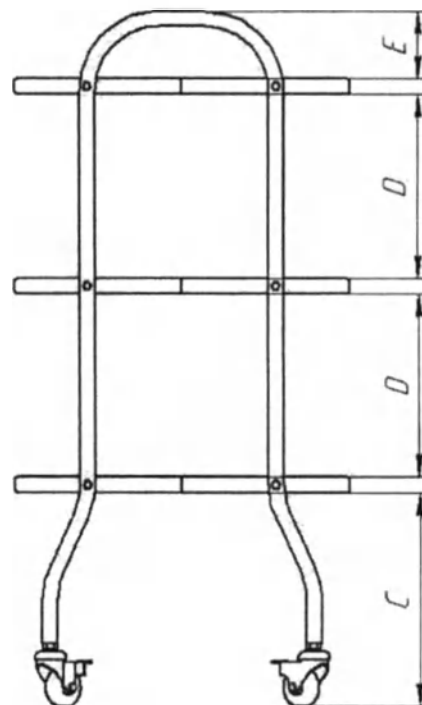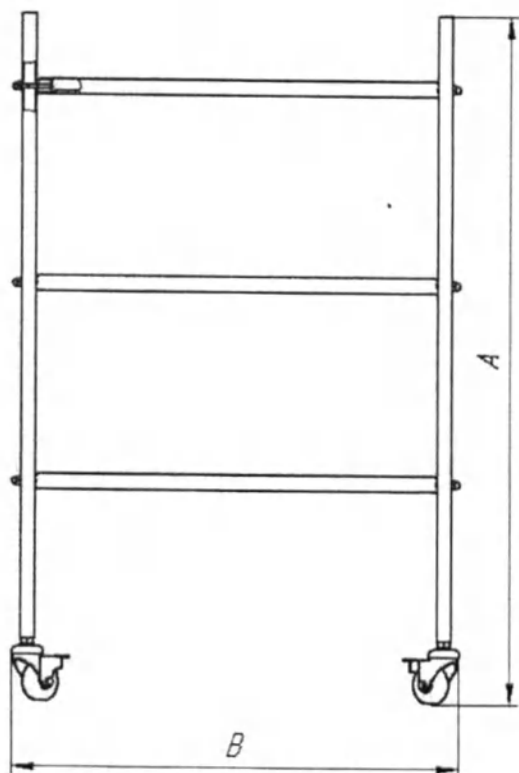




A	B	C	D	E	F
925±2 мм	605±2 мм	285±2 мм	245±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т.1

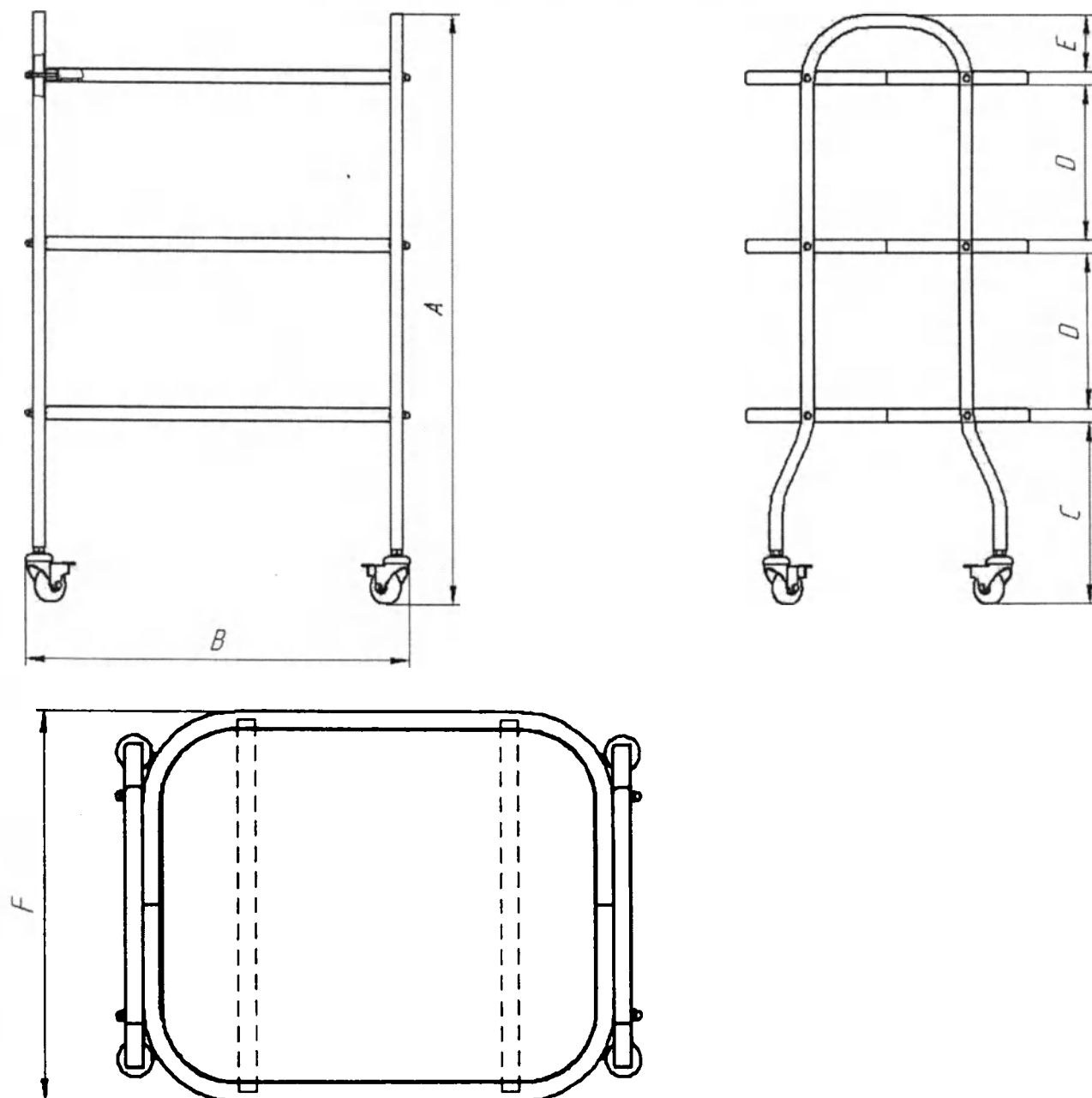




A	B	C	D	E	F
910±2 мм	605±2 мм	270±2 мм	245±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т

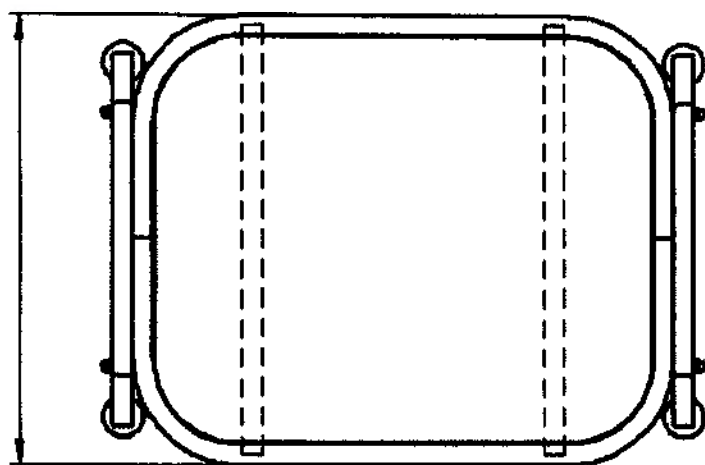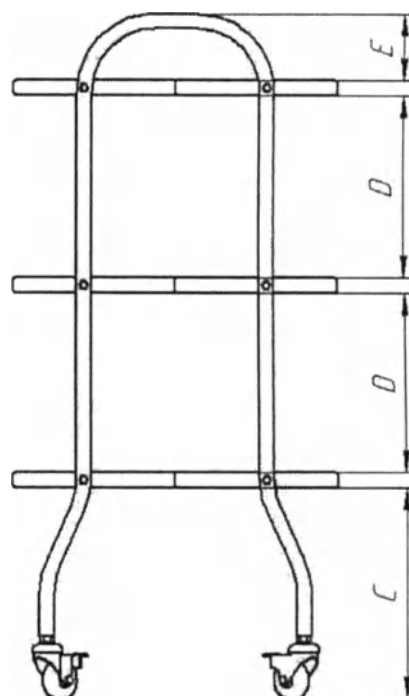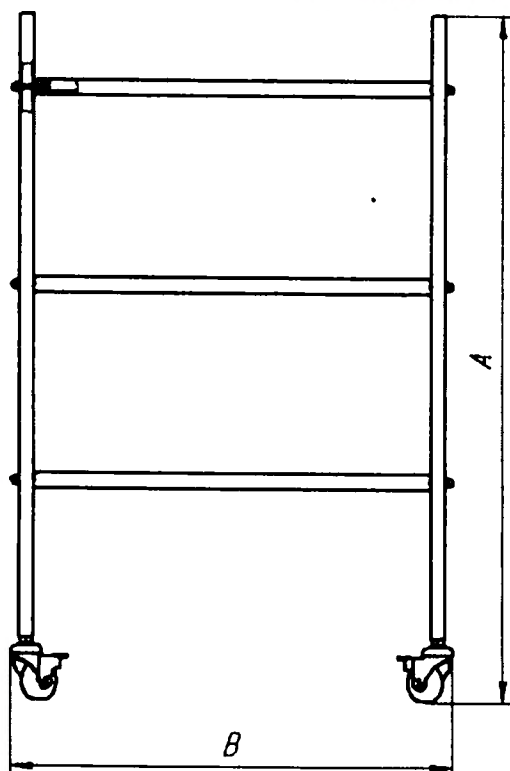




A	B	C	D	E	F
925±2 mm	605±2 mm	285±2 mm	245±2 mm	90±2 mm	445±2 mm

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т.1

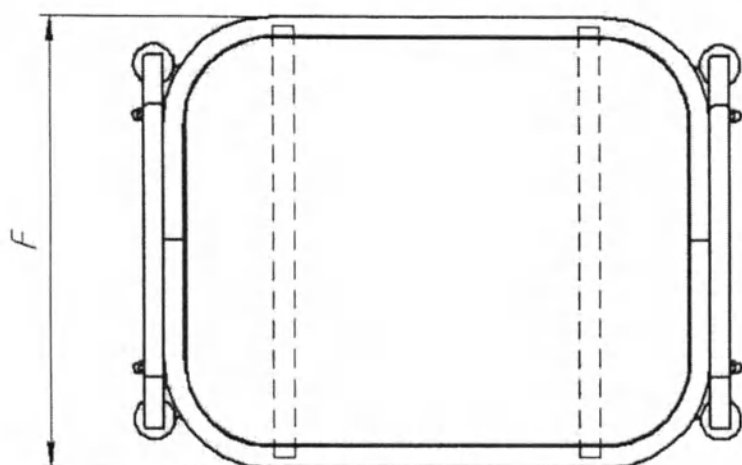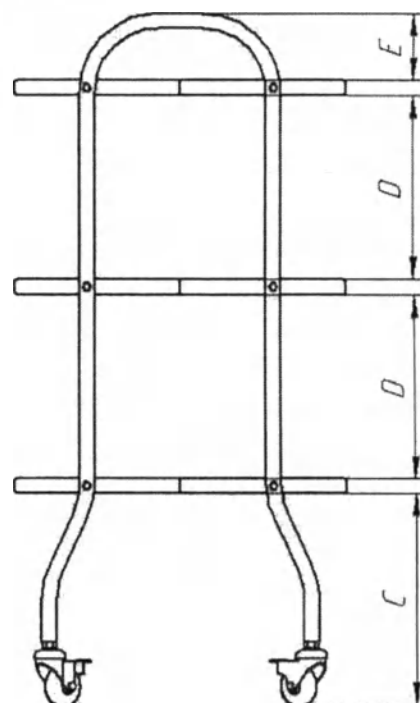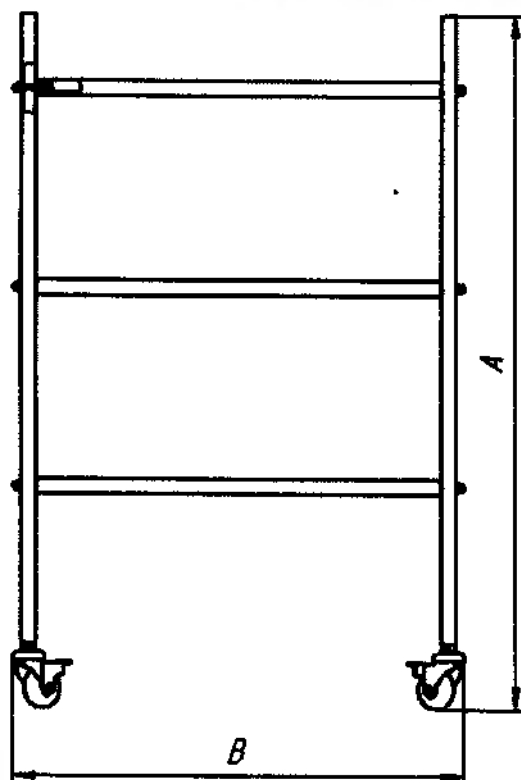




A	B	C	D	E	F
910±2 мм	605±2 мм	270±2 мм	245±2 мм	90±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-1

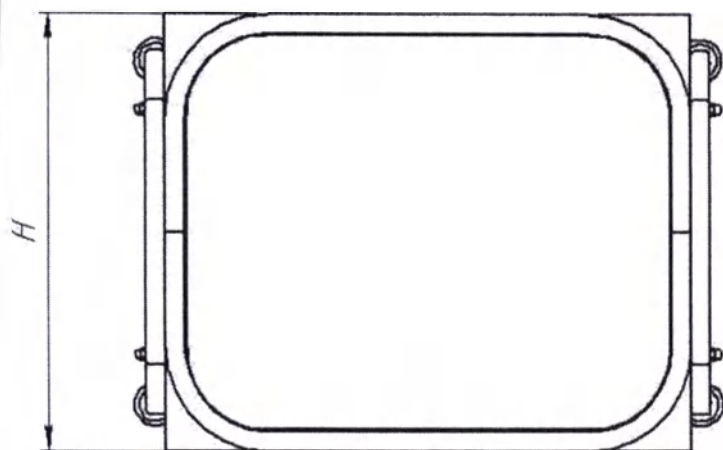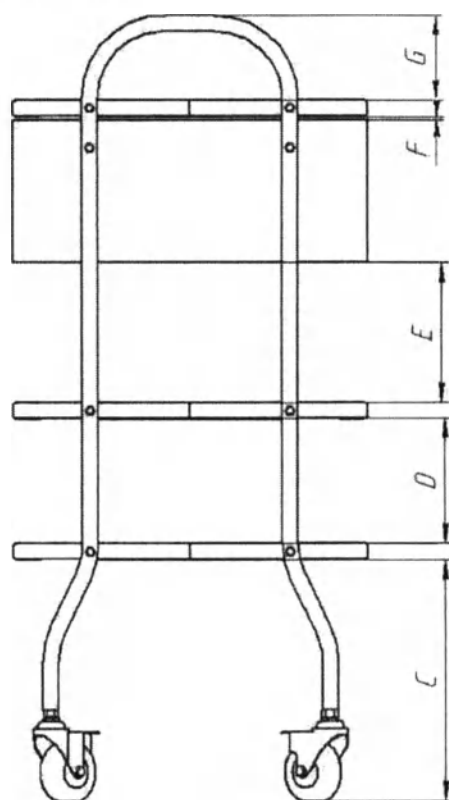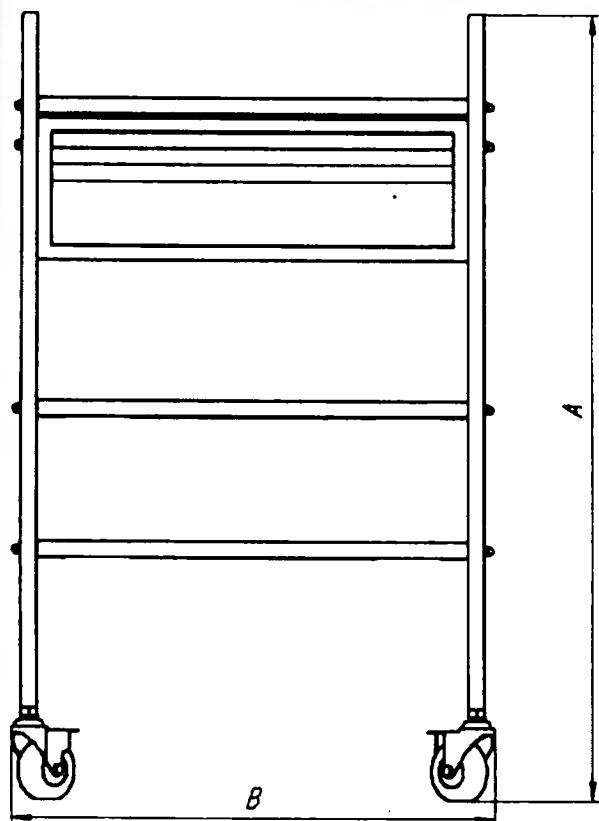




A	B	C	D	E	F	G	H
995±2 мм	610±2 мм	305±2 мм	160±2 мм	180±2 мм	5±0,1 мм	110±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-2

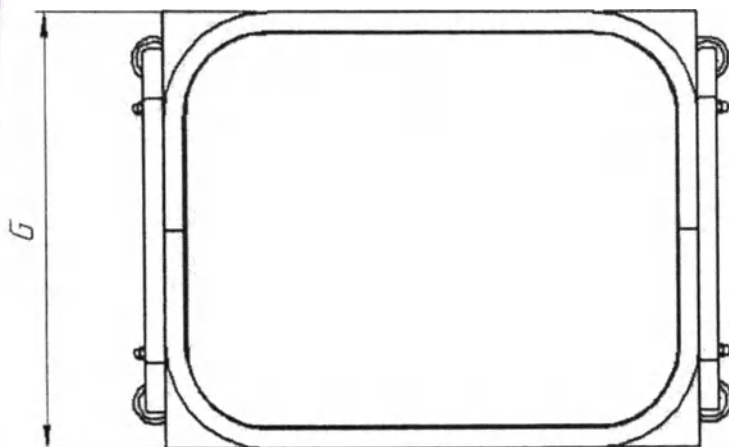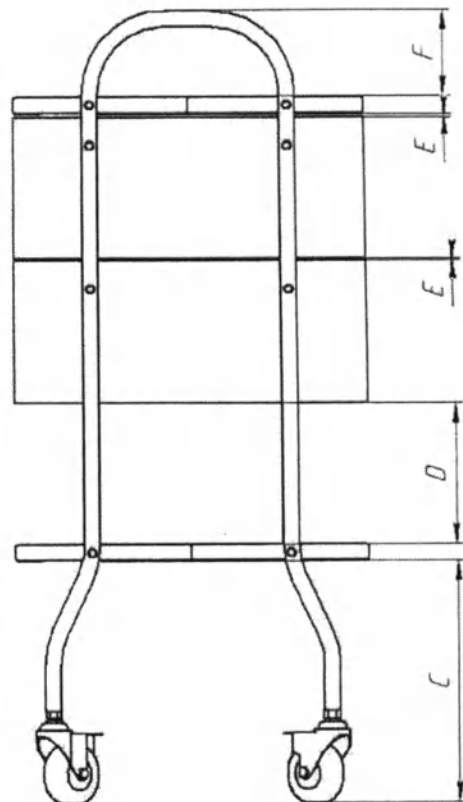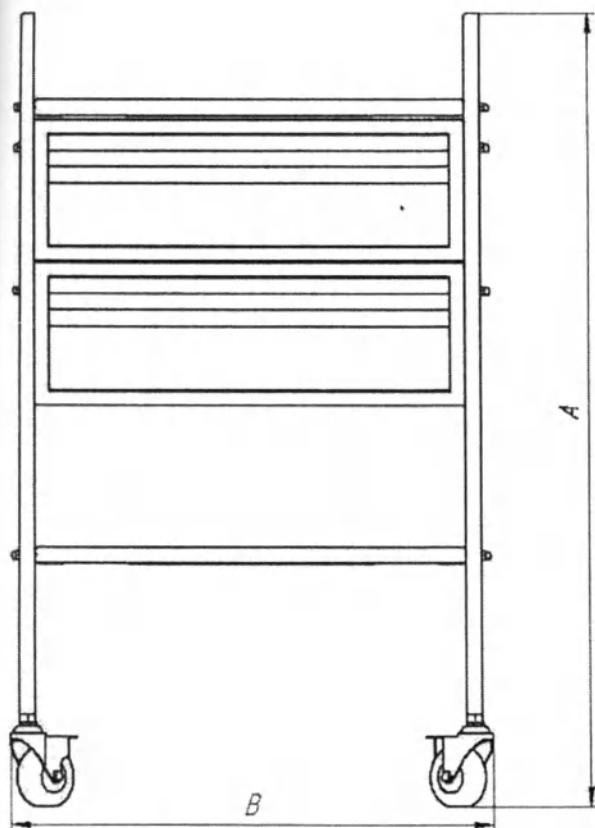


A	B	C	D	E	F	G
995±2 мм	610±2 мм	305±2 мм	180±2 мм	5±0,1 мм	110±2 мм	445±2 мм

Столик медицинский манипуляционный
по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-3

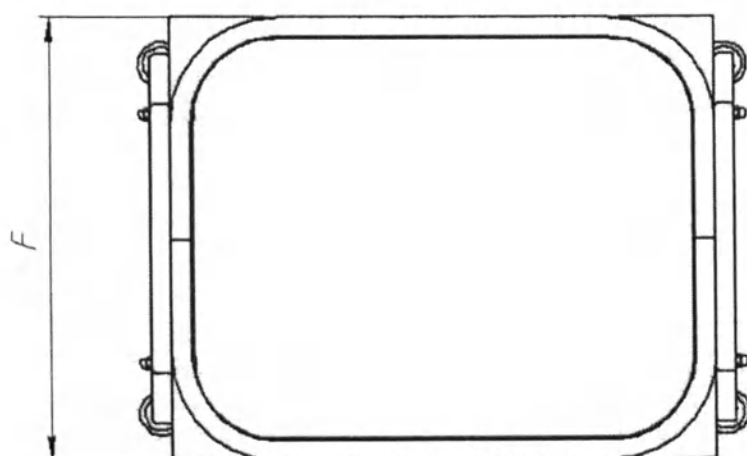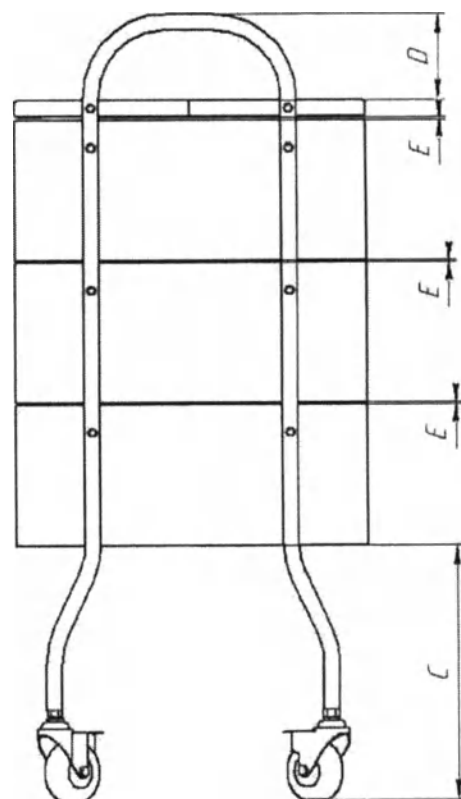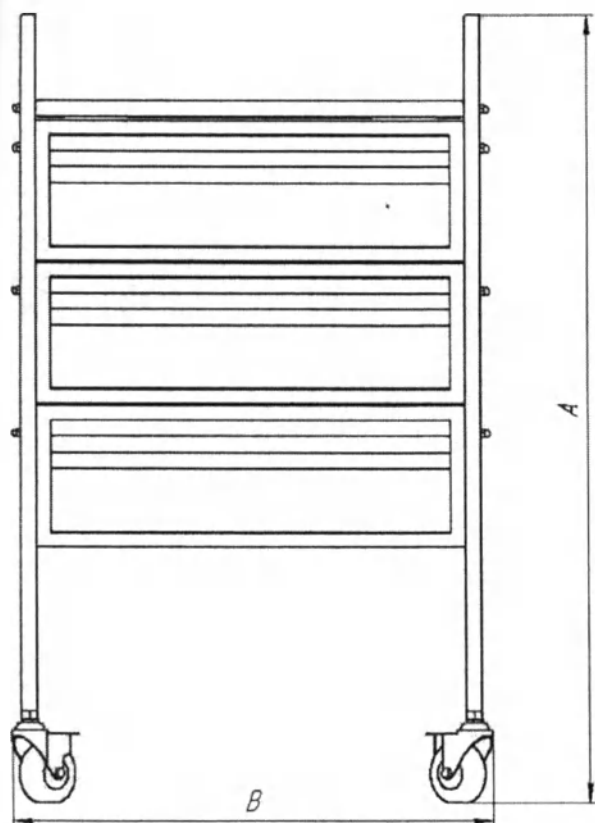

A	B	C	D	E	F
995±2 мм	610±2 мм	325±2 мм	110±2 мм	5±0,1 мм	445±2 мм

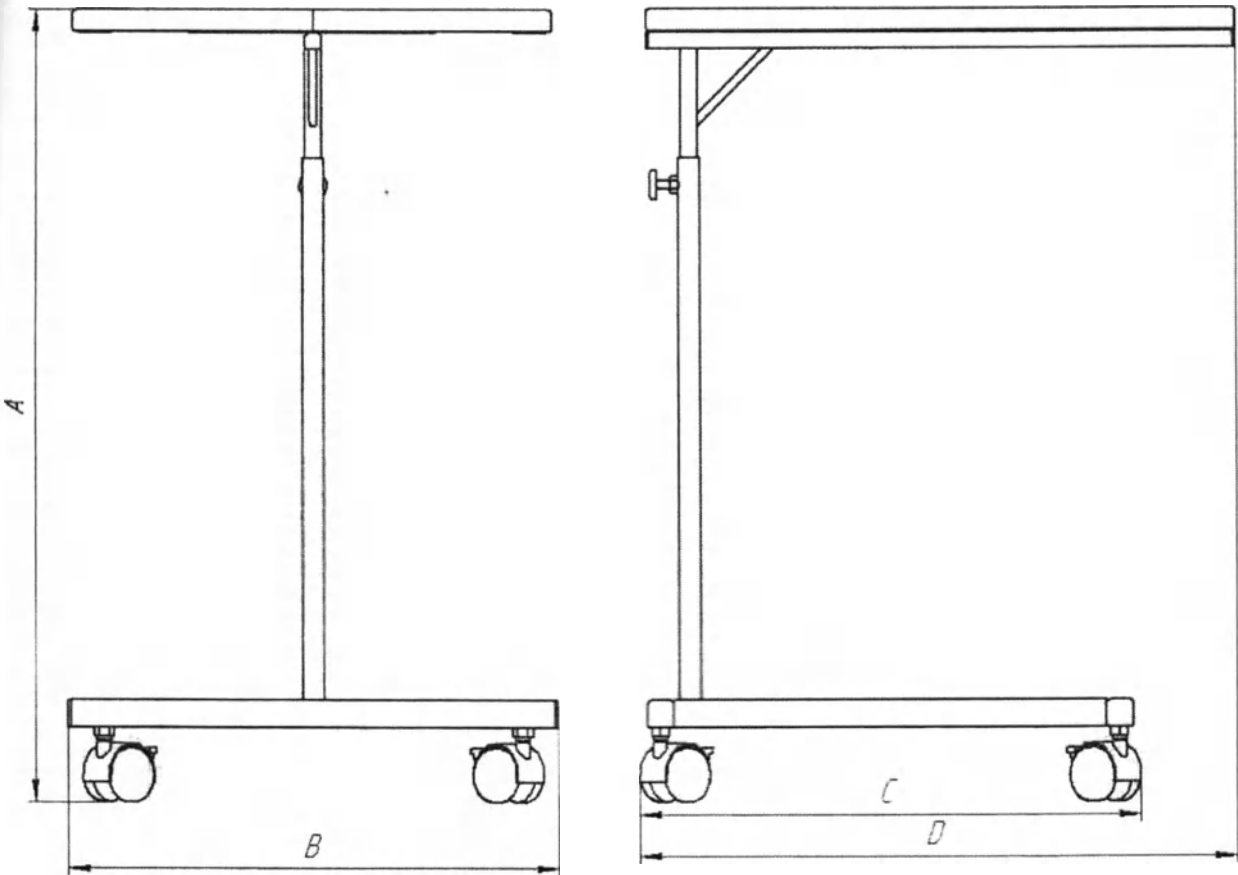


A	B	C	D
730/1200±2 мм	455±2 мм	545±2 мм	590±2 мм

Приложение 3
Инструкция по сборке

1 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017, варианты исполнения

1.1. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5

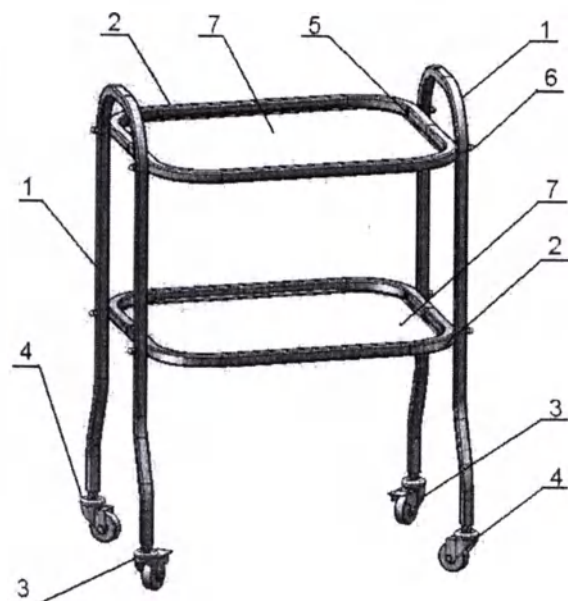

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз. 2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

1.2. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1

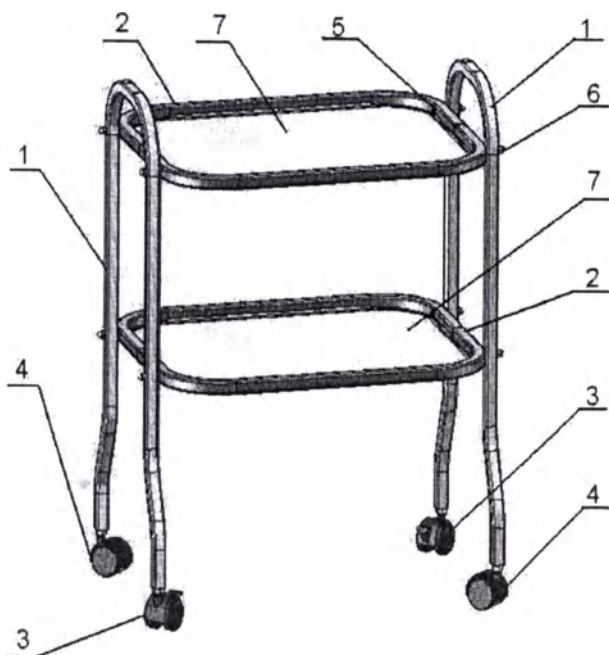

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при — необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

1.3. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4

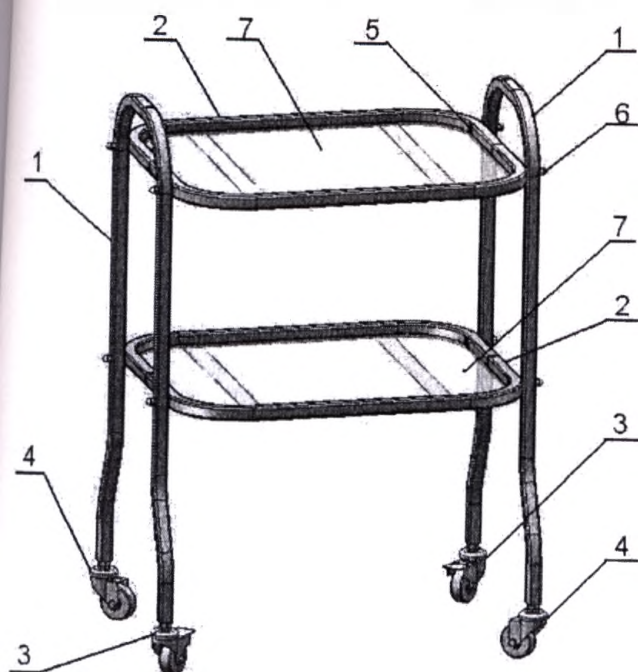

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз. 2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).

1.4. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1

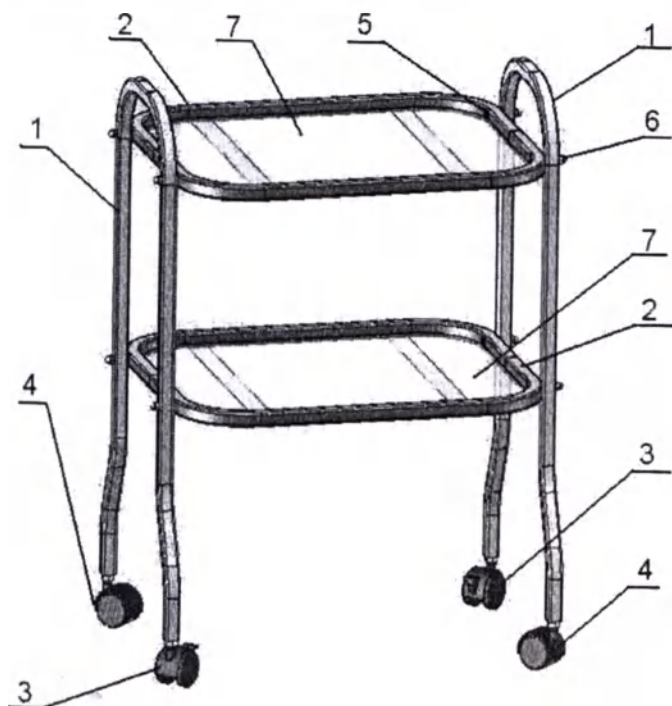

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).

Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при — необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).

1.5 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3



1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз. 2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полку из нержавеющей стали (поз.7) и полку из стекла (поз.8) в рамки (поз.2), положение — по усмотрению потребителя.

1.6. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1

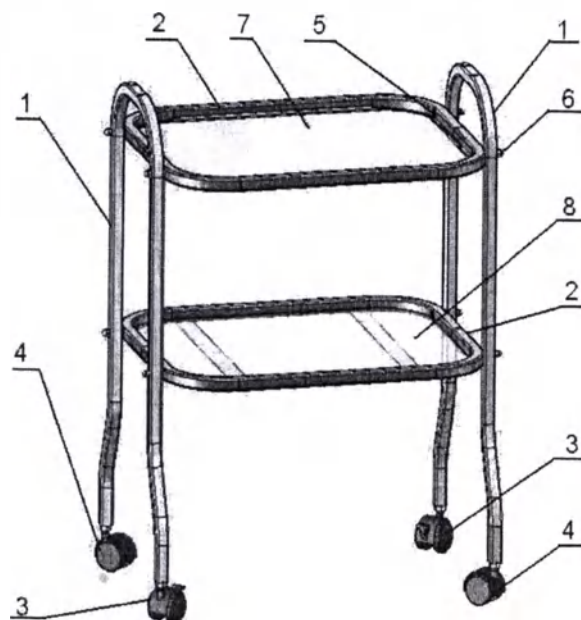

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при — необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) и полку из стекла (поз.8) в рамки (поз.2), положение — по усмотрению потребителя.

1.7 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т

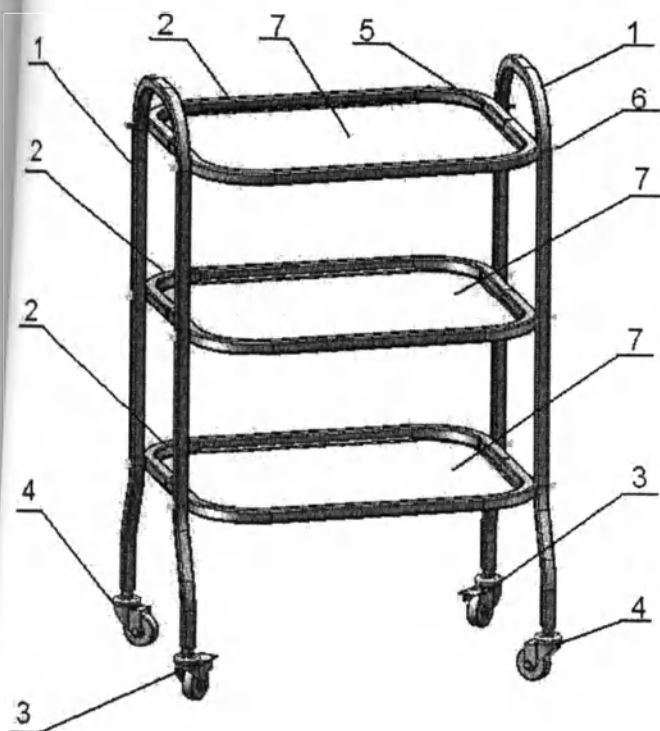

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз. 2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

1.8. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т.1

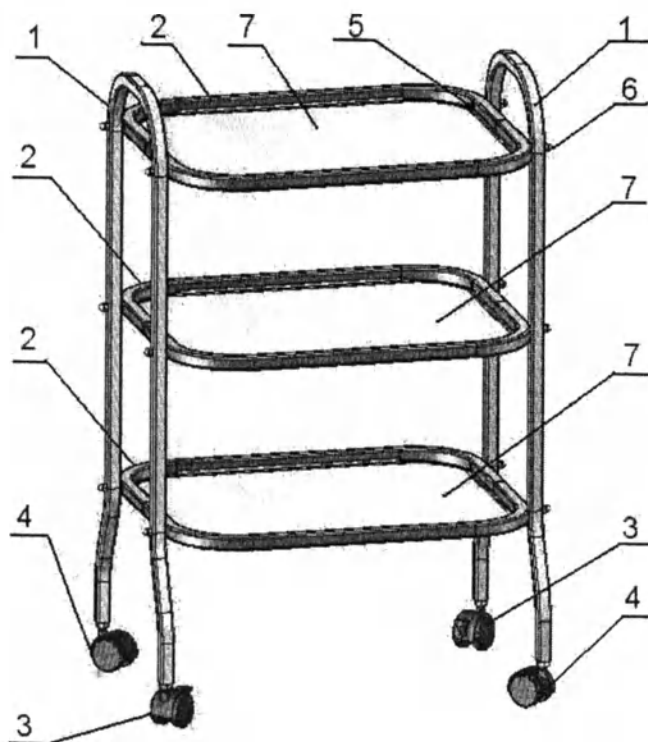

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).

Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

1.9 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т



1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз. 2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).

1.10. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т.1

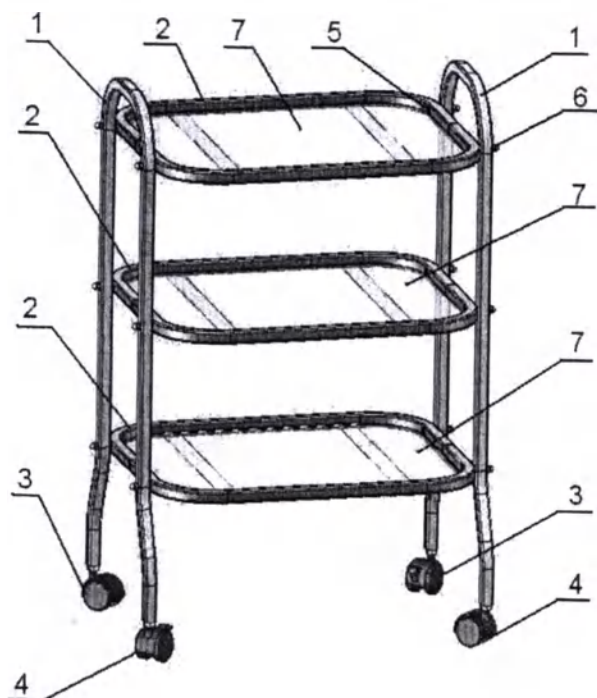

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).


Внимание — гайки располагаются с наружной стороны столика!

3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).


1.11 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-1

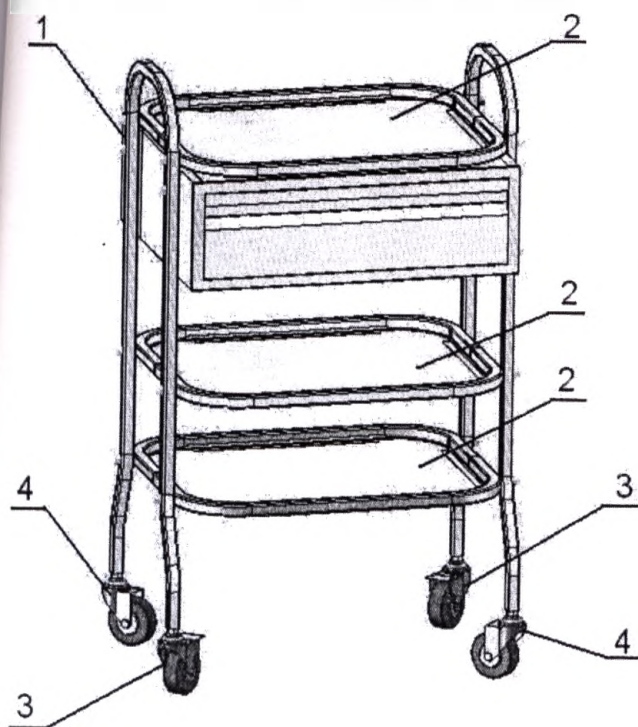

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.2) в рамки.


1.12. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-2

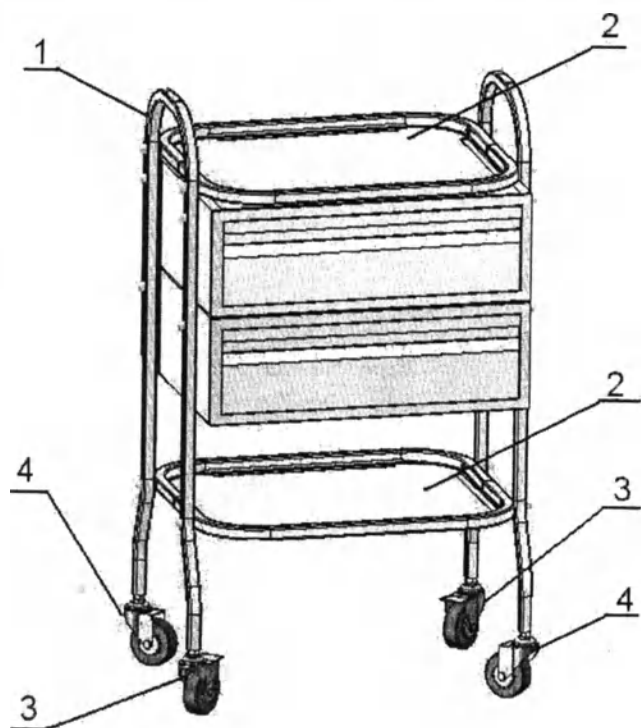

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».


2. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.2) в рамки.

1.13 Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-3

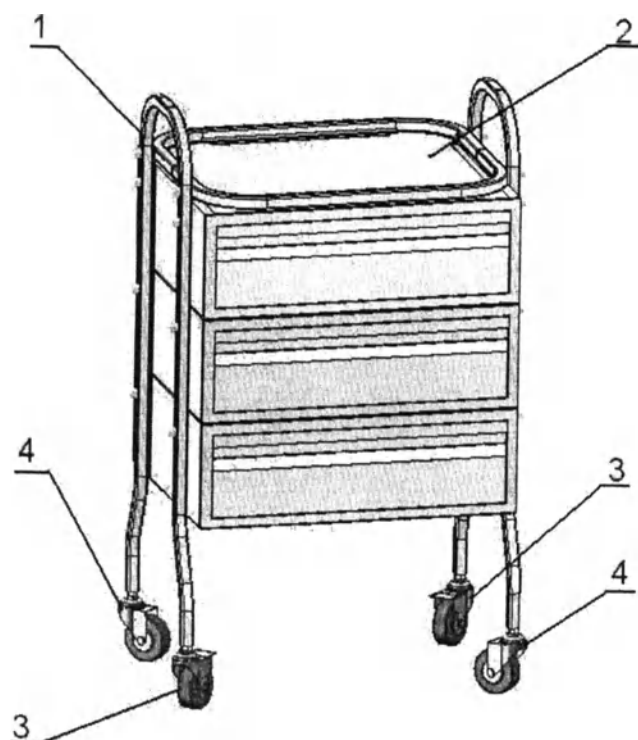

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.2) в рамки.

1.14. Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП

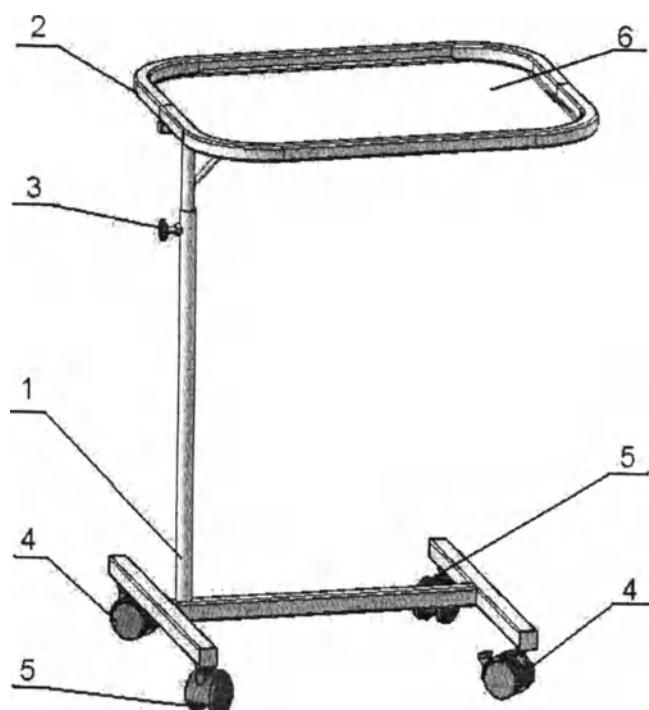

1. Завернуть в основание (поз.1) 2-е опоры мебельные колесные $\Phi 50$ с тормозом (поз.4) и 2-е опоры мебельные колесные $\Phi 50$ (поз.5) и протянуть ключом на «12».
2. Вставить в трубу основания (поз.1) стойку (поз.2).
3. В гайку М8 основания завернуть зажим (поз.3).
4. Выставить стойку (поз.2) на нужной высоте и зафиксировать её, затянув зажим (поз.3).
5. Установить полку из нержавеющей стали (поз.6) в рамку стойки (поз.2).

Приложение 4



медицинский инструменторий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НПКЦ «МИЗ»

_____ А.А. Листков

«__» _____ 20__ г.

**Гарантийный талон
(проект)**

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____._____ г.

Модель _____

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

штамп

Упаковщик:

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.

Прошито и скреплено печатью

35 (тридцать пять) /листов(-а)

Директор ООО «НПКЦ «МИЗ»

 А. А. Листков





медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НПКЦ «МИЗ»

А.А. Листков



«25» сентября 2023 г.

Паспорта на медицинское изделие:

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 825 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.


Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

Максимально допустимая нагрузка должна быть:

- на полку из нержавеющей стали 15±1 кг;

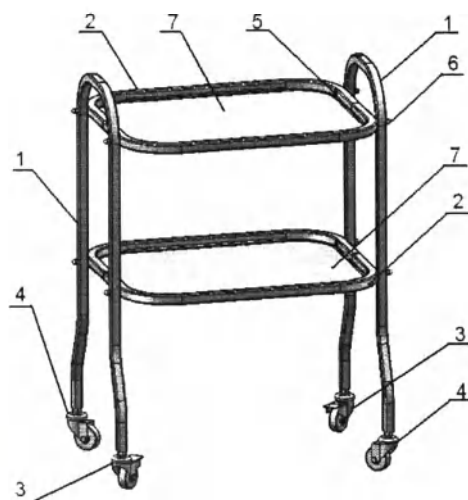

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ г.

Модель ГР-СИ-5

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5.1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 805 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.


Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

Максимально допустимая нагрузка должна быть:

- на полку из нержавеющей стали 15±1 кг;

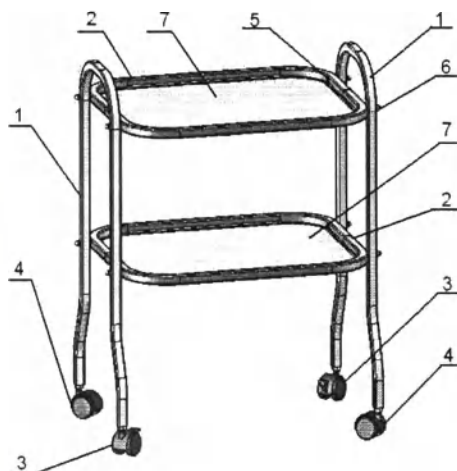

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ г.

Модель ГР-СИ-5.1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 825 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз. 4) - 2шт.


Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.

Полка из стекла (поз.7) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полку из стекла (поз.7) в рамки (поз.2.)

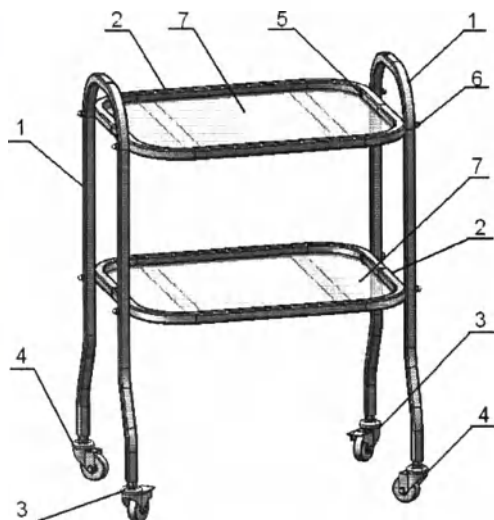

Максимально допустимая нагрузка должна быть:
- на полку стеклянную 3±0,5кг;

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____._____ г.

Модель ГР-СИ-4

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик: _____

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4.1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 805 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.

Полка из стекла (поз.7) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).



Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____.г.

Модель ГР-СИ-4.1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 825 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 1 шт.

Полка из стекла (поз.8) – 1 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полку из нержавеющей стали (поз.7) и полку из стекла (поз.8) в рамки (поз.2), положение – по усмотрению потребителя



Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____._____ г.

Модель ГР-СИ-3

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-3.1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 805 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 2 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 8 шт.


Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 8шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 1 шт.

Полка из стекла (поз.8) – 1 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полку из нержавеющей стали (поз.7) и полку из стекла (поз.8) в рамки (поз.2), положение – по усмотрению потребителя.

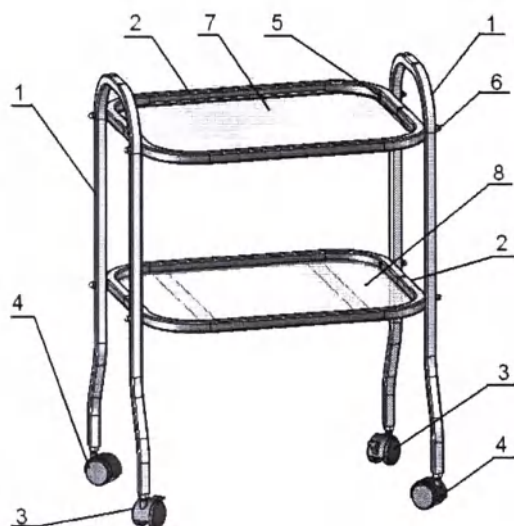

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____.г.

Модель ГР-СИ-3.1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 925 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 3 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 12 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 12 шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 3 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6) от руки. Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

Максимально допустимая нагрузка должна быть:
- на полку из нержавеющей стали 15±1 кг;

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____.____.____ г.

Модель ГР-СИ-5т

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т.1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-5т.1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 910 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 3 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 4) - 2шт.


Винт М6х45 потайной (поз.5) – 12 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 12 шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.7) – 3 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.7) в рамки (поз.2).

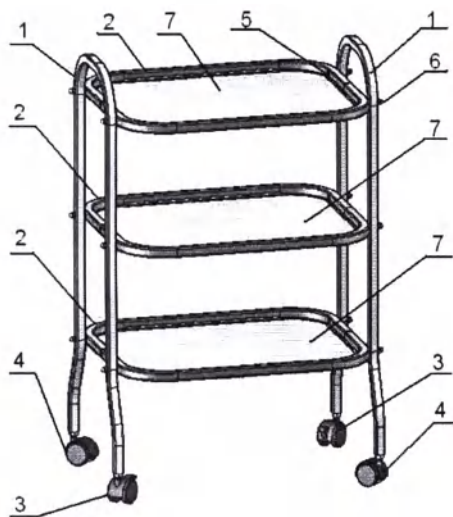

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____. г.

Модель ГР-СИ-5т.1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 925 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 3 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 12 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 12 шт.

Полка из стекла (поз.7) – 3 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).

Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!


3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.

4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».

5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).

Максимально допустимая нагрузка должна быть:

- на полку стеклянную 3±0,5кг;

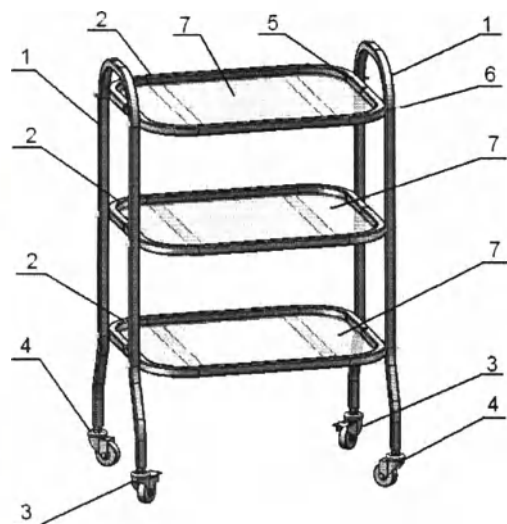

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____. г.

Модель ГР-СИ-4т

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т.1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИ-4т.1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 605 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 910 мм±2 мм

Комплект поставки:

Ножка (поз. 1) – 2шт.

Рамка (поз. 2) – 3 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 3)-2шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 4) - 2шт.

Винт М6х45 потайной (поз.5) – 12 шт.

Гайка колпачковая М6 (поз.6) – 12 шт.

Полка из стекла (поз.7) – 3 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку (поз.1) одну опору мебельную колесную с тормозом (поз.3) и одну опору мебельную колесную без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «12».
2. Привернуть к ножкам (поз.1) верхнюю рамку (поз.2) при помощи 4-х винтов М6х45 (поз.5) и 4-х колпачковых гаек (поз.6).
Внимание – гайки располагаются с наружной стороны столика!
3. Привернуть к ножкам (поз.1) нижнюю и среднюю рамки (поз.2) при помощи 8-и винтов М6х45 (поз.5) и 8-и колпачковых гаек (поз.6), при необходимости подогнуть ножку до совмещения отверстий.
4. Протянуть все соединения ножек (поз.1) и рамок (поз.2) при помощи отвертки и ключа на «10».
5. Вставить полки из стекла (поз.7) в рамки (поз.2).
6. Максимально допустимая нагрузка должна быть:
- на полку стеклянную 3±0,5кг;



Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от _____. г.

Модель ГР-СИ-4т.1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-1

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-1 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 610 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 995 мм±2 мм

Комплект поставки:

Стол (поз.1) – 1 шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.2) – 3 шт.


Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз.3) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз.4) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку стола передвижного (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.2) в рамки.

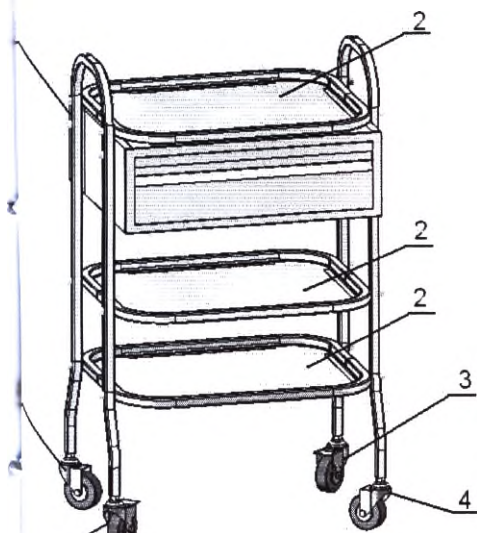

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ . ____ . ____ г.

Модель ГР-СММ-1

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-2

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-2 предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 610 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 995 мм±2 мм

Комплект поставки:

Стол (поз.1) – 1 шт.


Полка из нержавеющей стали (поз.2) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз.3) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз.4) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку стола передвижного (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».
2. Вставить полки из нержавеющей стали (поз.2) в рамки.

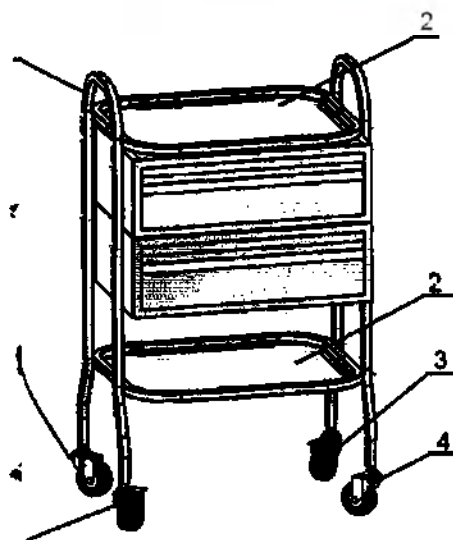

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ г.

Модель ГР-СММ-2

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-3

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СММ-3 предназначен размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций и их транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения.


Технические данные:

Габариты:

Длина: 610 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: 995 мм±2 мм

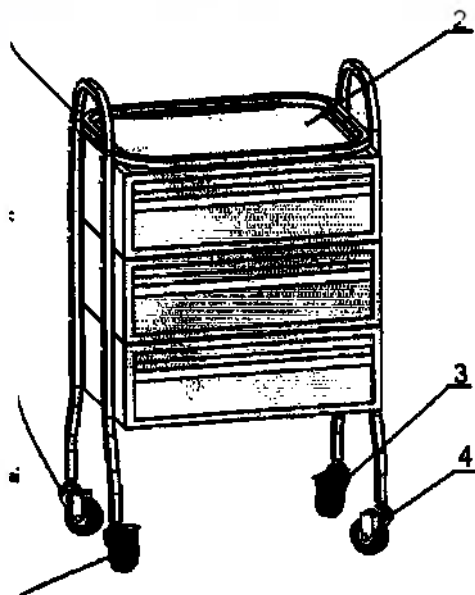**Комплект поставки:**

Стол (поз.1) – 1 шт.

Полка из нержавеющей стали (поз.2) – 1 шт.

Колесо аппаратное Ф50 с тормозом (поз.3) – 2 шт.

Колесо аппаратное Ф50 (поз.4) – 2 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в каждую ножку стола передвижного (поз.1) одно колесо аппаратное с тормозом (поз.3) и одно колесо аппаратное без тормоза (поз.4) и протянуть ключом на «17».

2. Вставить полку из нержавеющей стали (поз.2) в рамку.

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ г.

Модель ГР-СММ-3

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.



ПАСПОРТ

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП

Столик медицинский манипуляционный по ТУ 30.99.10-006-58588802-2017 ГР-СИП предназначен для размещения медицинских инструментов, медикаментов, медицинских изделий при проведении различных манипуляций в пределах лечебно-профилактического учреждения.

Технические данные:

Габариты:

Длина: 590 мм±2 мм

Ширина: 445 мм±2 мм

Высота: от 730 до 1200 мм±2 мм

Комплект поставки:

Основание (поз. 1) – 1 шт.

Стойка (поз. 2) – 1 шт.

Зажим (поз. 3) – 1 шт.


Опора мебельная колесная Ф50 с тормозом (поз. 4) – 2 шт.

Опора мебельная колесная Ф50 (поз. 5) – 2 шт.

Полка из нержавеющей стали (поз. 6) – 1 шт.

Инструкция по сборке:

1. Завернуть в основание (поз. 1) 2-е опоры мебельные колесные Ф50 с тормозом (поз. 4) и 2-е опоры мебельные колесные Ф50 (поз. 5) и протянуть их ключом на «12».
2. Вставить в трубу основания (поз. 1) стойку (поз. 2).
3. В гайку М8 основания завернуть зажим (поз. 3).
4. Выставить стойку (поз. 2) на нужной высоте и зафиксировать её, затянув зажим (поз. 3).
5. Установить полку из нержавеющей стали (поз. 6) в рамку стойки (поз. 2).

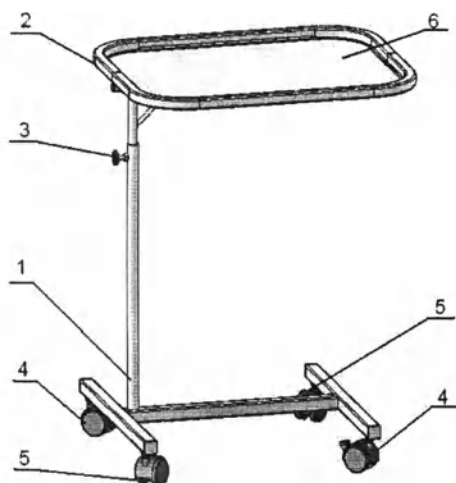

Гарантийный талон

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6985 от ____ . ____ . ____ г.

Модель ГР-СИП

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Страна изготовителя: Россия

Дата изготовления ММ.ГГГГ

Упаковщик:

штамп

Продавец: _____

Дата продажи ММ.ГГГГ

штамп

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения. Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.

А. А. Листков

