

ОКПД 2 32.50.13.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО НПО «ДЕОСТ»



Е.Л. Паклин

"15" января 2018 г.

Инструкция по применению

**Катетеры внутрисосудистые диагностические и проводниковые
одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-001-39795719-2018**

2018

1. Общая информация об изделиях

Изделия представляют собой катетеры диагностические и проводниковые.

Катетеры диагностические представляют собой гибкие одноканальные трубки из пластмассы, вводимые чрескожно в целевой сосуд сердца во время проведения диагностических (коронарографических) процедур для введения рентгеноконтрастного вещества с целью визуализации патологии исследуемого участка сосудистого русла. Имеют различные конфигурации дистального конца.

Катетеры проводниковые представляют собой гибкие одноканальные трубки из пластмассы, вводимые чрескожно в сосудистые русла для обеспечения проведения к устью целевого сосуда сердца объемных устройств для ангиопластики, таких как баллонные катетеры, проволочные направители или стент-системы. Имеют различные конфигурации дистального конца.

Схематические изображения изделий, с указанием геометрических размеров, а так же изображения различных конфигураций дистального конца представлены в Приложении 2.

Перечень применяемых производителем национальных стандартов представлен в Приложении 3.

1.1 Полное наименование изделий

Катетеры внутрисосудистые диагностические и проводниковые одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13–001–39795719–2018 в вариантах исполнения (см. Приложение 1)
(далее – изделия)

1.2 Производитель

Производитель:

ООО НПО «ДЕОСТ»

142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д.3, пом. 4, ком. 22, этаж 4

Тел.: 8 495 540 40 04

www.deost.ru

E-mail: deost@deost.ru

Разработчик:

ООО НПО «ДЕОСТ»

142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д.3, пом. 4, ком. 22, этаж 4

Тел.: 8 495 540 40 04

www.deost.ru

E-mail: deost@deost.ru

Адрес места производства медицинского изделия:

1. ООО НПО «Деост»

г. Пущино, пр-т Науки, д.3, пом. 4, ком. 22;

2. ООО «Модуль 42» г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, стр. 1, пом. 885 и 873;

3. ООО «СтериПак Сервис»

г. Москва, Научный пр., 10, ком. 319.

1.3 Назначение и область применения изделий и прочая информация

1.3.1 Назначение – изделия предназначены для введения контрастного вещества в выбранные кровеносные сосуды сердца во время коронарографий для обеспечения возможности четкой визуализации бассейна выбранного сосуда/сосудов или для чрескожного проведения и размещения проволочных направителей или объемных интервенционных/диагностических устройств (баллонные катетеры, стенты на системе доставки и т.п.) в русле выбранного сосуда сердца.

1.3.2 Область применения изделий – коронарография и ангиопластика.

Изделия предназначены для использования в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. Потенциальные пользователи – квалифицированные врачи с профильным медицинским образованием.

1.3.3 По способу применения изделия относятся к стерильным изделиям однократного применения.

1.3.4 Изделия стерилизованы газовым методом – этиленоксидом.

1.3.5 В составе изделия нет лекарственных средств.

1.3.6 В составе изделия нет материалов животного или человеческого происхождения.

1.3.7 Техническое обслуживание изделий не производится.

1.3.8 Показания и противопоказания к применению для изделий

Показания к применению изделия:

- необходимость проведения процедуры введения контрастного вещества в выбранные кровеносные сосуды сердца во время коронарографий для обеспечения возможности четкой визуализации бассейна выбранного сосуда/сосудов;
- необходимость проведения процедуры для чрескожного проведения и размещения проволочных направителей или объемных интервенционных/диагностических устройств (баллонные катетеры, стенты на системе доставки и т.п.) в русле выбранного сосуда сердца.

Противопоказания к применению изделия:

- нарушение свертываемости крови;
- воспалительные процессы кожи в области проведения процедуры;
- переливание больших объемов крови и ее компонентов.

Возможные побочные эффекты – отсутствуют при использовании в соответствии с инструкцией по применению.

2. Основные параметры и характеристики изделий

2.1 Схематические изображения изделий, с указанием геометрических размеров, а так же изображения различных конфигураций дистального конца указаны в Приложении 2.

2.2 Структура вариантов исполнения изделий представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура вариантов исполнения изделий

Тип катетера	Количество вариантов исполнения	Вид номинального наружного диаметра	Вид эффективных длин	Количество конфигураций дистального конца
Катетеры внутрисосудистые диагностические	152 шт.	1,35 мм (4F) 1,65 мм (5F) 2,00 мм (6F) 2,30 мм (7F)	80 см 100 см 110 см	38
Катетеры внутрисосудистые проводниковые	184 шт.	1,65 мм (5F) 2,00 мм (6F) 2,30 мм (7F) 2,60 мм (8F)	100 см	46

2.3 Перечень изделий в полной ассортиментной номенклатуре, наименования изделий, краткие наименования изделий и их основные характеристики указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Наименования медицинских изделий с указанием основных характеристик

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
I. Катетеры внутрисосудистые диагностические						
1.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-4F)	ДК-100-JL 3.0-4F	JUDKINS LEFT 3.0	4F	100 см	A.1
2.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-5F)	ДК-100-JL 3.0-5F	JUDKINS LEFT 3.0	5F	100 см	A.1
3.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-6F)	ДК-100-JL 3.0-6F	JUDKINS LEFT 3.0	6F	100 см	A.1
4.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-7F)	ДК-100-JL 3.0-7F	JUDKINS LEFT 3.0	7F	100 см	A.1
5.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-4F)	ДК-100-JL 3.5-4F	JUDKINS LEFT 3.5	4F	100 см	A.1
6.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-5F)	ДК-100-JL 3.5-5F	JUDKINS LEFT 3.5	5F	100 см	A.1
7.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-6F)	ДК-100-JL 3.5-6F	JUDKINS LEFT 3.5	6F	100 см	A.1
8.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-7F)	ДК-100-JL 3.5-7F	JUDKINS LEFT 3.5	7F	100 см	A.1
9.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-4F)	ДК-100-JL 4.0-4F	JUDKINS LEFT 4.0	4F	100 см	A.1
10.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-5F)	ДК-100-JL 4.0-5F	JUDKINS LEFT 4.0	5F	100 см	A.1
11.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-6F)	ДК-100-JL 4.0-6F	JUDKINS LEFT 4.0	6F	100 см	A.1
12.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-7F)	ДК-100-JL 4.0-7F	JUDKINS LEFT 4.0	7F	100 см	A.1
13.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-4F)	ДК-100-JL 4.5-4F	JUDKINS LEFT 4.5	4F	100 см	A.1
14.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-5F)	ДК-100-JL 4.5-5F	JUDKINS LEFT 4.5	5F	100 см	A.1
15.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-6F)	ДК-100-JL 4.5-6F	JUDKINS LEFT 4.5	6F	100 см	A.1

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
16.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-7F)	ДК-100-JL 4.5-7F	JUDKINS LEFT 4.5	7F	100 см	A.1
17.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-4F)	ДК-100-JL 5.0-4F	JUDKINS LEFT 5.0	4F	100 см	A.1
18.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-5F)	ДК-100-JL 5.0-5F	JUDKINS LEFT 5.0	5F	100 см	A.1
19.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-6F)	ДК-100-JL 5.0-6F	JUDKINS LEFT 5.0	6F	100 см	A.1
20.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-7F)	ДК-100-JL 5.0-7F	JUDKINS LEFT 5.0	7F	100 см	A.1
21.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-4F)	ДК-100-JL 6.0-4F	JUDKINS LEFT 6.0	4F	100 см	A.1
22.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-5F)	ДК-100-JL 6.0-5F	JUDKINS LEFT 6.0	5F	100 см	A.1
23.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-6F)	ДК-100-JL 6.0-6F	JUDKINS LEFT 6.0	6F	100 см	A.1
24.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-7F)	ДК-100-JL 6.0-7F	JUDKINS LEFT 6.0	7F	100 см	A.1
25.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-4F)	ДК-100-JR 3.0-4F	JUDKINS RIGHT 3.0	4F	100 см	A.2
26.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-5F)	ДК-100-JR 3.0-5F	JUDKINS RIGHT 3.0	5F	100 см	A.2
27.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-6F)	ДК-100-JR 3.0-6F	JUDKINS RIGHT 3.0	6F	100 см	A.2
28.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-7F)	ДК-100-JR 3.0-7F	JUDKINS RIGHT 3.0	7F	100 см	A.2
29.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-4F)	ДК-100-JR 3.5-4F	JUDKINS RIGHT 3.5	4F	100 см	A.2
30.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-5F)	ДК-100-JR 3.5-5F	JUDKINS RIGHT 3.5	5F	100 см	A.2

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
31.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-6F)	ДК-100-JR 3.5-6F	JUDKINS RIGHT 3.5	6F	100 см	A.2
32.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-7F)	ДК-100-JR 3.5-7F	JUDKINS RIGHT 3.5	7F	100 см	A.2
33.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-4F)	ДК-100-JR 4.0-4F	JUDKINS RIGHT 4.0	4F	100 см	A.2
34.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-5F)	ДК-100-JR 4.0-5F	JUDKINS RIGHT 4.0	5F	100 см	A.2
35.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-6F)	ДК-100-JR 4.0-6F	JUDKINS RIGHT 4.0	6F	100 см	A.2
36.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-7F)	ДК-100-JR 4.0-7F	JUDKINS RIGHT 4.0	7F	100 см	A.2
37.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-4F)	ДК-100-JR 4.5-4F	JUDKINS RIGHT 4.5	4F	100 см	A.2
38.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-5F)	ДК-100-JR 4.5-5F	JUDKINS RIGHT 4.5	5F	100 см	A.2
39.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-6F)	ДК-100-JR 4.5-6F	JUDKINS RIGHT 4.5	6F	100 см	A.2
40.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-7F)	ДК-100-JR 4.5-7F	JUDKINS RIGHT 4.5	7F	100 см	A.2
41.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-4F)	ДК-100-JR 5.0-4F	JUDKINS RIGHT 5.0	4F	100 см	A.2
42.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-5F)	ДК-100-JR 5.0-5F	JUDKINS RIGHT 5.0	5F	100 см	A.2
43.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-6F)	ДК-100-JR 5.0-6F	JUDKINS RIGHT 5.0	6F	100 см	A.2
44.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-7F)	ДК-100-JR 5.0-7F	JUDKINS RIGHT 5.0	7F	100 см	A.2
45.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-4F)	ДК-100-JR 6.0-4F	JUDKINS RIGHT 6.0	4F	100 см	A.2
46.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-5F)	ДК-100-JR 6.0-5F	JUDKINS RIGHT 6.0	5F	100 см	A.2

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-5F)					
47.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-6F)	ДК-100-JR 6.0-6F	JUDKINS RIGHT 6.0	6F	100 см	A.2
48.	Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-7F)	ДК-100-JR 6.0-7F	JUDKINS RIGHT 6.0	7F	100 см	A.2
49.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-4F)	ДК-100-AL I-4F	AMPLATZ LEFT I	4F	100 см	A.3
50.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-5F)	ДК-100-AL I-5F	AMPLATZ LEFT I	5F	100 см	A.3
51.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-6F)	ДК-100-AL I-6F	AMPLATZ LEFT I	6F	100 см	A.3
52.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-7F)	ДК-100-AL I-7F	AMPLATZ LEFT I	7F	100 см	A.3
53.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-4F)	ДК-100-AL II-4F	AMPLATZ LEFT II	4F	100 см	A.3
54.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-5F)	ДК-100-AL II-5F	AMPLATZ LEFT II	5F	100 см	A.3
55.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-6F)	ДК-100-AL II-6F	AMPLATZ LEFT II	6F	100 см	A.3
56.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-7F)	ДК-100-AL II-7F	AMPLATZ LEFT II	7F	100 см	A.3
57.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-4F)	ДК-100-AL III-4F	AMPLATZ LEFT III	4F	100 см	A.3
58.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-5F)	ДК-100-AL III-5F	AMPLATZ LEFT III	5F	100 см	A.3
59.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-6F)	ДК-100-AL III-6F	AMPLATZ LEFT III	6F	100 см	A.3
60.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-7F)	ДК-100-AL III-7F	AMPLATZ LEFT III	7F	100 см	A.3
61.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-4F)	ДК-100-AR I-4F	AMPLATZ RIGHT I	4F	100 см	A.4

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
62.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-5F)	ДК-100-AR I-5F	AMPLATZ RIGHT I	5F	100 см	A.4
63.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-6F)	ДК-100-AR I-6F	AMPLATZ RIGHT I	6F	100 см	A.4
64.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-7F)	ДК-100-AR I-7F	AMPLATZ RIGHT I	7F	100 см	A.4
65.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-4F)	ДК-100-AR II-4F	AMPLATZ RIGHT II	4F	100 см	A.4
66.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-5F)	ДК-100-AR II-5F	AMPLATZ RIGHT II	5F	100 см	A.4
67.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-6F)	ДК-100-AR II-6F	AMPLATZ RIGHT II	6F	100 см	A.4
68.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-7F)	ДК-100-AR II-7F	AMPLATZ RIGHT II	7F	100 см	A.4
69.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-4F)	ДК-100-AR III-4F	AMPLATZ RIGHT III	4F	100 см	A.4
70.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-5F)	ДК-100-AR III-5F	AMPLATZ RIGHT III	5F	100 см	A.4
71.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-6F)	ДК-100-AR III-6F	AMPLATZ RIGHT III	6F	100 см	A.4
72.	Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-7F)	ДК-100-AR III-7F	AMPLATZ RIGHT III	7F	100 см	A.4
73.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-4F)	ДК-100-LCB-4F	CORONARY BYPASS LEFT	4F	100 см	A.5
74.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-5F)	ДК-100-LCB-5F	CORONARY BYPASS LEFT	5F	100 см	A.5
75.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-6F)	ДК-100-LCB-6F	CORONARY BYPASS LEFT	6F	100 см	A.5
76.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 7F, длина: 100 см	ДК-100-LCB-7F	CORONARY BYPASS LEFT	7F	100 см	A.5

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	(ДК-100- LCB-7F)					
77.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-4F)	ДК-100-RCB-4F	CORONARY BYPASS RIGHT	4F	100 см	A.6
78.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-5F)	ДК-100-RCB-5F	CORONARY BYPASS RIGHT	5F	100 см	A.6
79.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-6F)	ДК-100-RCB-6F	CORONARY BYPASS RIGHT	6F	100 см	A.6
80.	Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-7F)	ДК-100-RCB-7F	CORONARY BYPASS RIGHT	7F	100 см	A.6
81.	Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-4F)	ДК-100-IMA-4F	INTERNAL MAMMARY	4F	100 см	A.7
82.	Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-5F)	ДК-100-IMA-5F	INTERNAL MAMMARY	5F	100 см	A.7
83.	Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-6F)	ДК-100-IMA-6F	INTERNAL MAMMARY	6F	100 см	A.7
84.	Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-7F)	ДК-100-IMA-7F	INTERNAL MAMMARY	7F	100 см	A.7
85.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-4F);	ДК-100-MP A-4F	MULTIPURPOSE A	4F	100 см	A.8
86.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-5F)	ДК-100-MP A-5F	MULTIPURPOSE A	5F	100 см	A.8
87.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-6F)	ДК-100-MP A-6F	MULTIPURPOSE A	6F	100 см	A.8
88.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-7F)	ДК-100-MP A-7F	MULTIPURPOSE A	7F	100 см	A.8
89.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-4F)	ДК-100-MP B-4F	MULTIPURPOSE B	4F	100 см	A.9
90.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-5F)	ДК-100-MP B-5F	MULTIPURPOSE B	5F	100 см	A.9

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-МР В-5F)					
91.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE В, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-МР В-6F)	ДК-100-МР В-6F	MULTIPURPOSE В	6F	100 см	А.9
92.	Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE В, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-МР В-7F)	ДК-100-МР В-7F	MULTIPURPOSE В	7F	100 см	А.9
93.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-4F)	ДК-100-SON I-4F	SONES I	4F	100 см	А.10
94.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-5F)	ДК-100-SON I-5F	SONES I	5F	100 см	А.10
95.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-6F)	ДК-100-SON I-6F	SONES I	6F	100 см	А.10
96.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-7F)	ДК-100-SON I-7F	SONES I	7F	100 см	А.10
97.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-4F)	ДК-80-SON I-4F	SONES I	4F	80 см	А.10
98.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-5F)	ДК-80-SON I-5F	SONES I	5F	80 см	А.10
99.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-6F)	ДК-80-SON I-6F	SONES I	6F	80 см	А.10
100.	Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-7F)	ДК-80-SON I-7F	SONES I	7F	80 см	А.10
101.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SON II-4F)	ДК-100-SON II-4F	SONES II	4F	100 см	А.10
102.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SON II-5F)	ДК-100-SON II-5F	SONES II	5F	100 см	А.10
103.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SON II-6F)	ДК-100-SON II-6F	SONES II	6F	100 см	А.10
104.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SON II-7F)	ДК-100-SON II-7F	SONES II	7F	100 см	А.10
105.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SON II-4F)	ДК-80-SON II-4F	SONES II	4F	80 см	А.10
106.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SON II-5F)	ДК-80-SON II-5F	SONES II	5F	80 см	А.10

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	5F, длина: 80 см (ДК-80-SON II-5F)					
107.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SON II-6F)	ДК-80-SON II-6F	SONES II	6F	80 см	A.10
108.	Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SON II-7F)	ДК-80-SON II-7F	SONES II	7F	80 см	A.10
109.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SON III-4F)	ДК-100-SON III-4F	SONES III	4F	100 см	A.10
110.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SON III-5F)	ДК-100-SON III-5F	SONES III	5F	100 см	A.10
111.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SON III-6F)	ДК-100-SON III-6F	SONES III	6F	100 см	A.10
112.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SON III-7F)	ДК-100-SON III-7F	SONES III	7F	100 см	A.10
113.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SON III-4F)	ДК-80-SON III-4F	SONES III	4F	80 см	A.10
114.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SON III-5F)	ДК-80-SON III-5F	SONES III	5F	80 см	A.10
115.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SON III-6F)	ДК-80-SON III-6F	SONES III	6F	80 см	A.10
116.	Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SON III-7F)	ДК-80-SON III-7F	SONES III	7F	80 см	A.10
117.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-110-PIG.STR-4F)	ДК-110-PIG.STR-4F	PIGTAL STRAIGHT	4F	110 см	A.11
118.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-110-PIG.STR-5F)	ДК-110-PIG.STR-5F	PIGTAL STRAIGHT	5F	110 см	A.11
119.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-110-PIG.STR-6F)	ДК-110-PIG.STR-6F	PIGTAL STRAIGHT	6F	110 см	A.11
120.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 7F, длина: 110 см	ДК-110-PIG.STR-7F	PIGTAL STRAIGHT	7F	110 см	A.11

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	(ДК-110-PIG-STR-7F)					
121.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 145°-4F)	ДК-110-PIG 145°-4F	PIGTAL 145°	4F	110 см	A.12
122.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 145°-5F)	ДК-110-PIG 145°-5F	PIGTAL 145°	5F	110 см	A.12
123.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 145°-6F)	ДК-110-PIG 145°-6F	PIGTAL 145°	6F	110 см	A.12
124.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 7F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 145°-7F)	ДК-110-PIG 145°-7F	PIGTAL 145°	7F	110 см	A.12
125.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-4F)	ДК-110-PIG 155°-4F	PIGTAL 155°	4F	110 см	A.12
126.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-5F)	ДК-110-PIG 155°-5F	PIGTAL 155°	5F	110 см	A.12
127.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-6F)	ДК-110-PIG 155°-6F	PIGTAL 155°	6F	110 см	A.12
128.	Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 7F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-7F)	ДК-110-PIG 155°-7F	PIGTAL 155°	7F	110 см	A.12
129.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-4F)	ДК-100-ASL 3.5-4F	ATESAL 3.5	4F	100 см	A.13
130.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-5F)	ДК-100-ASL 3.5-5F	ATESAL 3.5	5F	100 см	A.13
131.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-6F)	ДК-100-ASL 3.5-6F	ATESAL 3.5	6F	100 см	A.13
132.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-7F)	ДК-100-ASL 3.5-7F	ATESAL 3.5	7F	100 см	A.13
133.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-4F)	ДК-100-ASL 4.0-4F	ATESAL 4.0	4F	100 см	A.13
134.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-5F)	ДК-100-ASL 4.0-5F	ATESAL 4.0	5F	100 см	A.13
135.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-6F)	ДК-100-ASL 4.0-6F	ATESAL 4.0	6F	100 см	A.13
136.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-7F)	ДК-100-ASL 4.0-7F	ATESAL 4.0	7F	100 см	A.13

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-7F)					
137.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-4F)	ДК-100-ASL 4.5-4F	ATESAL 4.5	4F	100 см	A.13
138.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-5F)	ДК-100-ASL 4.5-5F	ATESAL 4.5	5F	100 см	A.13
139.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-6F)	ДК-100-ASL 4.5-6F	ATESAL 4.5	6F	100 см	A.13
140.	Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-7F)	ДК-100-ASL 4.5-7F	ATESAL 4.5	7F	100 см	A.13
141.	Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-4F)	ДК-100-MOD.EBU- 4F	MOD.EXTRA BACK UP	4F	100 см	A.16
142.	Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-5F)	ДК-100-MOD.EBU- 5F	MOD.EXTRA BACK UP	5F	100 см	A.16
143.	Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-6F)	ДК-100-MOD.EBU- 6F	MOD.EXTRA BACK UP	6F	100 см	A.16
144.	Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-7F)	ДК-100-MOD.EBU- 7F	MOD.EXTRA BACK UP	7F	100 см	A.16
145.	Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-4F)	ДК-100-Q4-4F	Q4	4F	100 см	A.17
146.	Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-5F)	ДК-100-Q4-5F	Q4	5F	100 см	A.17
147.	Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-6F)	ДК-100-Q4-6F	Q4	6F	100 см	A.17
148.	Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-7F)	ДК-100-Q4-7F	Q4	7F	100 см	A.17
149.	Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-HS-4F)	ДК-100-HS-4F	HOCKEY STICK	4F	100 см	A.18
150.	Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-HS-5F)	ДК-100-HS-5F	HOCKEY STICK	5F	100 см	A.18
151.	Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-HS-6F)	ДК-100-HS-6F	HOCKEY STICK	6F	100 см	A.18
152.	Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-HS-7F)	ДК-100-HS-7F	HOCKEY STICK	7F	100 см	A.18

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-HS-7F)					
II. Катетеры внутрисосудистые проводниковые						
153.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-5F)	ПК-100-JL 3.0-5F	JUDKINS LEFT 3.0	5F	100 см	A.1
154.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-6F)	ПК-100-JL 3.0-6F	JUDKINS LEFT 3.0	6F	100 см	A.1
155.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-7F)	ПК-100-JL 3.0-7F	JUDKINS LEFT 3.0	7F	100 см	A.1
156.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-8F)	ПК-100-JL 3.0-8F	JUDKINS LEFT 3.0	8F	100 см	A.1
157.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-5F)	ПК-100-JL 3.5-5F	JUDKINS LEFT 3.5	5F	100 см	A.1
158.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-6F)	ПК-100-JL 3.5-6F	JUDKINS LEFT 3.5	6F	100 см	A.1
159.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-7F)	ПК-100-JL 3.5-7F	JUDKINS LEFT 3.5	7F	100 см	A.1
160.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-8F)	ПК-100-JL 3.5-8F	JUDKINS LEFT 3.5	8F	100 см	A.1
161.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-5F)	ПК-100-JL 4.0-5F	JUDKINS LEFT 4.0	5F	100 см	A.1
162.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-6F)	ПК-100-JL 4.0-6F	JUDKINS LEFT 4.0	6F	100 см	A.1
163.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-7F)	ПК-100-JL 4.0-7F	JUDKINS LEFT 4.0	7F	100 см	A.1
164.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-8F)	ПК-100-JL 4.0-8F	JUDKINS LEFT 4.0	8F	100 см	A.1
165.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-5F)	ПК-100-JL 4.5-5F	JUDKINS LEFT 4.5	5F	100 см	A.1
166.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-6F)	ПК-100-JL 4.5-6F	JUDKINS LEFT 4.5	6F	100 см	A.1
167.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-7F)	ПК-100-JL 4.5-7F	JUDKINS LEFT 4.5	7F	100 см	A.1

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-7F)					
168.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-8F)	ПК-100-JL 4.5-8F	JUDKINS LEFT 4.5	8F	100 см	A.1
169.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-5F)	ПК-100-JL 5.0-5F	JUDKINS LEFT 5.0	5F	100 см	A.1
170.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-6F)	ПК-100-JL 5.0-6F	JUDKINS LEFT 5.0	6F	100 см	A.1
171.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-7F)	ПК-100-JL 5.0-7F	JUDKINS LEFT 5.0	7F	100 см	A.1
172.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-8F)	ПК-100-JL 5.0-8F	JUDKINS LEFT 5.0	8F	100 см	A.1
173.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-5F)	ПК-100-JL 6.0-5F	JUDKINS LEFT 6.0	5F	100 см	A.1
174.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-6F)	ПК-100-JL 6.0-6F	JUDKINS LEFT 6.0	6F	100 см	A.1
175.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-7F)	ПК-100-JL 6.0-7F	JUDKINS LEFT 6.0	7F	100 см	A.1
176.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-8F)	ПК-100-JL 6.0-8F	JUDKINS LEFT 6.0	8F	100 см	A.1
177.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-5F)	ПК-100-JL 4.0 MOD- 5F	JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD	5F	100 см	A.1
178.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-6F)	ПК-100-JL 4.0 MOD- 6F	JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD	6F	100 см	A.1
179.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-7F)	ПК-100-JL 4.0 MOD- 7F	JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD	7F	100 см	A.1
180.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-8F)	ПК-100-JL 4.0 MOD- 8F	JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD	8F	100 см	A.1

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
181.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-5F)	ПК-100-JLC 3.5-5F	JUDKINS LEFT CURVED 3.5	5F	100 см	A.19
182.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-6F)	ПК-100-JLC 3.5-6F	JUDKINS LEFT CURVED 3.5	6F	100 см	A.19
183.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-7F)	ПК-100-JLC 3.5-7F	JUDKINS LEFT CURVED 3.5	7F	100 см	A.19
184.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-8F)	ПК-100-JLC 3.5-8F	JUDKINS LEFT CURVED 3.5	8F	100 см	A.19
185.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-5F)	ПК-100-JLC 4.0-5F	JUDKINS LEFT CURVED 4.0	5F	100 см	A.19
186.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-6F)	ПК-100-JLC 4.0-6F	JUDKINS LEFT CURVED 4.0	6F	100 см	A.19
187.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-7F)	ПК-100-JLC 4.0-7F	JUDKINS LEFT CURVED 4.0	7F	100 см	A.19
188.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-8F)	ПК-100-JLC 4.0-8F	JUDKINS LEFT CURVED 4.0	8F	100 см	A.19
189.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-5F)	ПК-100-JLC 4.5-5F	JUDKINS LEFT CURVED 4.5	5F	100 см	A.19
190.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-6F)	ПК-100-JLC 4.5-6F	JUDKINS LEFT CURVED 4.5	6F	100 см	A.19
191.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-7F)	ПК-100-JLC 4.5-7F	JUDKINS LEFT CURVED 4.5	7F	100 см	A.19
192.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-8F)	ПК-100-JLC 4.5-8F	JUDKINS LEFT CURVED 4.5	8F	100 см	A.19
193.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-5F)	ПК-100-JLC 5.0-5F	JUDKINS LEFT CURVED 5.0	5F	100 см	A.19
194.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-6F)	ПК-100-JLC 5.0-6F	JUDKINS LEFT CURVED 5.0	6F	100 см	A.19
195.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-7F)	ПК-100-JLC 5.0-7F	JUDKINS LEFT CURVED 5.0	7F	100 см	A.19
196.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-8F)	ПК-100-JLC 5.0-8F	JUDKINS LEFT CURVED 5.0	8F	100 см	A.19
197.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT 3.5,	ПК-100-JR 3.5-5F	JUDKINS RIGHT 3.5	5F	100 см	A.2

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-5F)					
198.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-6F)	ПК-100-JR 3.5-6F	JUDKINS RIGHT 3.5	6F	100 см	A.2
199.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-7F)	ПК-100-JR 3.5-7F	JUDKINS RIGHT 3.5	7F	100 см	A.2
200.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-8F)	ПК-100-JR 3.5-8F	JUDKINS RIGHT 3.5	8F	100 см	A.2
201.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-5F)	ПК-100-JR 4.0-5F	JUDKINS RIGHT 4.0	5F	100 см	A.2
202.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-6F)	ПК-100-JR 4.0-6F	JUDKINS RIGHT 4.0	6F	100 см	A.2
203.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-7F)	ПК-100-JR 4.0-7F	JUDKINS RIGHT 4.0	7F	100 см	A.2
204.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-8F)	ПК-100-JR 4.0-8F	JUDKINS RIGHT 4.0	8F	100 см	A.2
205.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-5F)	ПК-100-JR 4.5-5F	JUDKINS RIGHT 4.5	5F	100 см	A.2
206.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-6F)	ПК-100-JR 4.5-6F	JUDKINS RIGHT 4.5	6F	100 см	A.2
207.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-7F)	ПК-100-JR 4.5-7F	JUDKINS RIGHT 4.5	7F	100 см	A.2
208.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-8F)	ПК-100-JR 4.5-8F	JUDKINS RIGHT 4.5	8F	100 см	A.2
209.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-5F)	ПК-100-JR 5.0-5F	JUDKINS RIGHT 5.0	5F	100 см	A.2
210.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-6F)	ПК-100-JR 5.0-6F	JUDKINS RIGHT 5.0	6F	100 см	A.2
211.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-7F)	ПК-100-JR 5.0-7F	JUDKINS RIGHT 5.0	7F	100 см	A.2
212.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-8F)	ПК-100-JR 5.0-8F	JUDKINS RIGHT 5.0	8F	100 см	A.2
213.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-5F)	ПК-100-JR 6.0-5F	JUDKINS RIGHT 6.0	5F	100 см	A.2

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-5F)					
214.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-6F)	ПК-100-JR 6.0-6F	JUDKINS RIGHT 6.0	6F	100 см	A.2
215.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-7F)	ПК-100-JR 6.0-7F	JUDKINS RIGHT 6.0	7F	100 см	A.2
216.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-8F)	ПК-100-JR 6.0-8F	JUDKINS RIGHT 6.0	8F	100 см	A.2
217.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 3.5-5F)	ПК-100-JRC 3.5-5F	JUDKINS RIGHT CURVED 3.5	5F	100 см	A.20
218.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 3.5-6F)	ПК-100-JRC 3.5-6F	JUDKINS RIGHT CURVED 3.5	6F	100 см	A.20
219.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 3.5-7F)	ПК-100-JRC 3.5-7F	JUDKINS RIGHT CURVED 3.5	7F	100 см	A.20
220.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 3.5-8F)	ПК-100-JRC 3.5-8F	JUDKINS RIGHT CURVED 3.5	8F	100 см	A.20
221.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.0-5F)	ПК-100-JRC 4.0-5F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.0	5F	100 см	A.20
222.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.0-6F)	ПК-100-JRC 4.0-6F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.0	6F	100 см	A.20
223.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.0-7F)	ПК-100-JRC 4.0-7F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.0	7F	100 см	A.20
224.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.0-8F)	ПК-100-JRC 4.0-8F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.0	8F	100 см	A.20
225.	Катетер проводниковый АККОРД JUDKINS RIGHT	ПК-100-JRC 4.5-5F	JUDKINS RIGHT	5F	100 см	A.20

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	CURVED 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.5-5F)		CURVED 4.5			
226.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.5-6F)	ПК-100-JRC 4.5-6F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.5	6F	100 см	A.20
227.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.5-7F)	ПК-100-JRC 4.5-7F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.5	7F	100 см	A.20
228.	Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JRC 4.5-8F)	ПК-100-JRC 4.5-8F	JUDKINS RIGHT CURVED 4.5	8F	100 см	A.20
229.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-5F)	ПК-100-AL 0.75-5F	AMPLATZ LEFT 0.75	5F	100 см	A.3
230.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-6F)	ПК-100-AL 0.75-6F	AMPLATZ LEFT 0.75	6F	100 см	A.3
231.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-7F)	ПК-100-AL 0.75-7F	AMPLATZ LEFT 0.75	7F	100 см	A.3
232.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-8F)	ПК-100-AL 0.75-8F	AMPLATZ LEFT 0.75	8F	100 см	A.3
233.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-5F)	ПК-100-AL 1.0-5F	AMPLATZ LEFT 1.0	5F	100 см	A.3
234.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-6F)	ПК-100-AL 1.0-6F	AMPLATZ LEFT 1.0	6F	100 см	A.3
235.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-7F)	ПК-100-AL 1.0-7F	AMPLATZ LEFT 1.0	7F	100 см	A.3
236.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-8F)	ПК-100-AL 1.0-8F	AMPLATZ LEFT 1.0	8F	100 см	A.3
237.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-5F)	ПК-100-AL 1.2-5F	AMPLATZ LEFT 1.2	5F	100 см	A.3
238.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-6F)	ПК-100-AL 1.2-6F	AMPLATZ LEFT 1.2	6F	100 см	A.3
239.	Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-7F)	ПК-100-AL 1.2-7F	AMPLATZ LEFT 1.2	7F	100 см	A.3

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-7F)					
240.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-8F)	ПК-100-AL 1.2-8F	AMPLATZ LEFT 1.2	8F	100 см	A.3
241.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-5F)	ПК-100-AL 1.5-5F	AMPLATZ LEFT 1.5	5F	100 см	A.3
242.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-6F)	ПК-100-AL 1.5-6F	AMPLATZ LEFT 1.5	6F	100 см	A.3
243.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-7F)	ПК-100-AL 1.5-7F	AMPLATZ LEFT 1.5	7F	100 см	A.3
244.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-8F)	ПК-100-AL 1.5-8F	AMPLATZ LEFT 1.5	8F	100 см	A.3
245.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-5F)	ПК-100-AL 2.0-5F	AMPLATZ LEFT 2.0	5F	100 см	A.3
246.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-6F)	ПК-100-AL 2.0-6F	AMPLATZ LEFT 2.0	6F	100 см	A.3
247.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-7F)	ПК-100-AL 2.0-7F	AMPLATZ LEFT 2.0	7F	100 см	A.3
248.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-8F)	ПК-100-AL 2.0-8F	AMPLATZ LEFT 2.0	8F	100 см	A.3
249.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-5F)	ПК-100-AL 3.0-5F	AMPLATZ LEFT 3.0	5F	100 см	A.3
250.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-6F)	ПК-100-AL 3.0-6F	AMPLATZ LEFT 3.0	6F	100 см	A.3
251.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-7F)	ПК-100-AL 3.0-7F	AMPLATZ LEFT 3.0	7F	100 см	A.3
252.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-8F)	ПК-100-AL 3.0-8F	AMPLATZ LEFT 3.0	8F	100 см	A.3
253.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-5F)	ПК-100-AR 1.0-5F	AMPLATZ RIGHT 1.0	5F	100 см	A.4
254.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-6F)	ПК-100-AR 1.0-6F	AMPLATZ RIGHT 1.0	6F	100 см	A.4
255.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-7F)	ПК-100-AR 1.0-7F	AMPLATZ RIGHT 1.0	7F	100 см	A.4

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-7F)					
256.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-8F)	ПК-100-AR 1.0-8F	AMPLATZ RIGHT 1.0	8F	100 см	A.4
257.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-5F)	ПК-100-AR 2.0-5F	AMPLATZ RIGHT 2.0	5F	100 см	A.4
258.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-6F)	ПК-100-AR 2.0-6F	AMPLATZ RIGHT 2.0	6F	100 см	A.4
259.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-7F)	ПК-100-AR 2.0-7F	AMPLATZ RIGHT 2.0	7F	100 см	A.4
260.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-8F)	ПК-100-AR 2.0-8F	AMPLATZ RIGHT 2.0	8F	100 см	A.4
261.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-5F)	ПК-100-AR 3.0-5F	AMPLATZ RIGHT 3.0	5F	100 см	A.4
262.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-6F)	ПК-100-AR 3.0-6F	AMPLATZ RIGHT 3.0	6F	100 см	A.4
263.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-7F)	ПК-100-AR 3.0-7F	AMPLATZ RIGHT 3.0	7F	100 см	A.4
264.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-8F)	ПК-100-AR 3.0-8F	AMPLATZ RIGHT 3.0	8F	100 см	A.4
265.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-5F)	ПК-100-ALR 1.2-5F	AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2	5F	100 см	A.4
266.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-6F)	ПК-100-ALR 1.2-6F	AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2	6F	100 см	A.4
267.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-7F)	ПК-100-ALR 1.2-7F	AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2	7F	100 см	A.4
268.	Катетер проводниковый АККОРД AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-8F)	ПК-100-ALR 1.2-8F	AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2	8F	100 см	A.4
269.	Катетер проводниковый АККОРД LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-5F)	ПК-100-LES 3.0-5F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0	5F	100 см	A.14
270.	Катетер проводниковый АККОРД LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-6F)	ПК-100-LES 3.0-6F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0	6F	100 см	A.14
271.	Катетер проводниковый АККОРД LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-7F)	ПК-100-LES 3.0-7F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0	7F	100 см	A.14

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	LES 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-7F)		SUPPORT LES 3.0			
272.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-8F)	ПК-100-LES 3.0-8F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0	8F	100 см	A.14
273.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-5F)	ПК-100-LES 3.5-5F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5	5F	100 см	A.14
274.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-6F)	ПК-100-LES 3.5-6F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5	6F	100 см	A.14
275.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-7F)	ПК-100-LES 3.5-7F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5	7F	100 см	A.14
276.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-8F)	ПК-100-LES 3.5-8F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5	8F	100 см	A.14
277.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-5F)	ПК-100-LES 4.0-5F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0	5F	100 см	A.14
278.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-6F)	ПК-100-LES 4.0-6F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0	6F	100 см	A.14
279.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-7F)	ПК-100-LES 4.0-7F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0	7F	100 см	A.14
280.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-8F)	ПК-100-LES 4.0-8F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0	8F	100 см	A.14
281.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-5F)	ПК-100-LES 4.5-5F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5	5F	100 см	A.14
282.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-6F)	ПК-100-LES 4.5-6F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5	6F	100 см	A.14
283.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-7F)	ПК-100-LES 4.5-7F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5	7F	100 см	A.14
284.	Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-8F)	ПК-100-LES 4.5-8F	LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5	8F	100 см	A.14
285.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-5F)	ПК-100-RES 3.5-5F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5	5F	100 см	A.15
286.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см	ПК-100-RES 3.5-6F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5	6F	100 см	A.15

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	(ПК-100-RES 3.5-6F)					
287.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-7F)	ПК-100-RES 3.5-7F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5	7F	100 см	A.15
288.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-8F)	ПК-100-RES 3.5-8F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5	8F	100 см	A.15
289.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-5F)	ПК-100-RES 4.0-5F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0	5F	100 см	A.15
290.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-6F)	ПК-100-RES 4.0-6F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0	6F	100 см	A.15
291.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-7F)	ПК-100-RES 4.0-7F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0	7F	100 см	A.15
292.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-8F)	ПК-100-RES 4.0-8F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0	8F	100 см	A.15
293.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-5F)	ПК-100-RES 4.5-5F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5	5F	100 см	A.15
294.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-6F)	ПК-100-RES 4.5-6F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5	6F	100 см	A.15
295.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-7F)	ПК-100-RES 4.5-7F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5	7F	100 см	A.15
296.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-8F)	ПК-100-RES 4.5-8F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5	8F	100 см	A.15
297.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA	ПК-100-RES 5.0-5F	RIGHT EXTRA	5F	100 см	A.15

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	SUPPORT RES 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-5F)		SUPPORT RES 5.0			
298.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-6F)	ПК-100-RES 5.0-6F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0	6F	100 см	A.15
299.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-7F)	ПК-100-RES 5.0-7F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0	7F	100 см	A.15
300.	Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-8F)	ПК-100-RES 5.0-8F	RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0	8F	100 см	A.15
301.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-5F)	ПК-100-LCB-5F	CORONARY BYPASS LEFT	5F	100 см	A.5
302.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-6F)	ПК-100-LCB-6F	CORONARY BYPASS LEFT	6F	100 см	A.5
303.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-7F)	ПК-100-LCB-7F	CORONARY BYPASS LEFT	7F	100 см	A.5
304.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-8F)	ПК-100-LCB-8F	CORONARY BYPASS LEFT	8F	100 см	A.5
305.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-5F)	ПК-100-RCB-5F	CORONARY BYPASS RIGHT	5F	100 см	A.6
306.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-6F)	ПК-100-RCB-6F	CORONARY BYPASS RIGHT	6F	100 см	A.6
307.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-7F)	ПК-100-RCB-7F	CORONARY BYPASS RIGHT	7F	100 см	A.6
308.	Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-8F)	ПК-100-RCB-8F	CORONARY BYPASS RIGHT	8F	100 см	A.6
309.	Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-5F)	ПК-100-IMA-5F	INTERNAL MAMMARY	5F	100 см	A.7
310.	Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-6F)	ПК-100-IMA-6F	INTERNAL MAMMARY	6F	100 см	A.7
311.	Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL	ПК-100-IMA-7F	INTERNAL	7F	100 см	A.7

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	MAMMARY, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-7F)		MAMMARY			
312.	Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-8F)	ПК-100-IMA-8F	INTERNAL MAMMARY	8F	100 см	A.7
313.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-5F)	ПК-100-MP A1-5F	MULTIPURPOSE A1	5F	100 см	A.8
314.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-6F)	ПК-100-MP A1-6F	MULTIPURPOSE A1	6F	100 см	A.8
315.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-7F)	ПК-100-MP A1-7F	MULTIPURPOSE A1	7F	100 см	A.8
316.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-8F)	ПК-100-MP A1-8F	MULTIPURPOSE A1	8F	100 см	A.8
317.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-5F)	ПК-100-MP B1-5F	MULTIPURPOSE B1	5F	100 см	A.9
318.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-6F)	ПК-100-MP B1-6F	MULTIPURPOSE B1	6F	100 см	A.9
319.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-7F)	ПК-100-MP B1-7F	MULTIPURPOSE B1	7F	100 см	A.9
320.	Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-8F)	ПК-100-MP B1-8F	MULTIPURPOSE B1	8F	100 см	A.9
321.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-5F)	ПК-100-SON 1-5F	SONES CURVES 1	5F	100 см	A.10
322.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-6F)	ПК-100-SON 1-6F	SONES CURVES 1	6F	100 см	A.10
323.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-7F)	ПК-100-SON 1-7F	SONES CURVES 1	7F	100 см	A.10
324.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-8F)	ПК-100-SON 1-8F	SONES CURVES 1	8F	100 см	A.10
325.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-5F)	ПК-100-SON 2-5F	SONES CURVES 2	5F	100 см	A.10
326.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-6F)	ПК-100-SON 2-6F	SONES CURVES 2	6F	100 см	A.10
327.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-7F)	ПК-100-SON 2-7F	SONES CURVES 2	7F	100 см	A.10

№ п/п	Наименование изделия	Краткое наименование изделия	Конфигурация дистального конца	Номинальный наружный диаметр	Эффективная длина	Номер рисунка
	диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-7F)					
328.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-8F)	ПК-100-SON 2-8F	SONES CURVES 2	8F	100 см	A.10
329.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-5F)	ПК-100-SON 3-5F	SONES CURVES 3	5F	100 см	A.10
330.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-6F)	ПК-100-SON 3-6F	SONES CURVES 3	6F	100 см	A.10
331.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-7F)	ПК-100-SON 3-7F	SONES CURVES 3	7F	100 см	A.10
332.	Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-8F)	ПК-100-SON 3-8F	SONES CURVES 3	8F	100 см	A.10
333.	Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-5F)	ПК-100-MOD.EBU- 5F	MOD. EXTRA BACK UP	5F	100 см	A.16
334.	Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-6F)	ПК-100-MOD.EBU- 6F	MOD. EXTRA BACK UP	6F	100 см	A.16
335.	Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-7F)	ПК-100-MOD.EBU- 7F	MOD. EXTRA BACK UP	7F	100 см	A.16
336.	Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-8F)	ПК-100-MOD.EBU- 8F	MOD. EXTRA BACK UP	8F	100 см	A.16

2. Общие технические характеристики

2.1 В зависимости от потенциального риска применения изделие относится к классу 3 по ГОСТ 31508 и в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 4н от 06.06.2012 г.

2.2 Номинальный наружный диаметр всех типов катетеров соответствует значениям, указанным в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 3 – Виды номинального наружного диаметра катетеров

Номинальный наружный диаметр катетеров	
по французской шкале (шкале Шарьера)	в миллиметрах
4 F	1,35±0,05 мм
5 F	1,65±0,05 мм
6 F	2,00±0,1 мм
7 F	2,30±0,1 мм
8 F	2,60±0,1 мм

2.3 Эффективная длина всех вариантов исполнения катетеров представлена следующими видами: 80±0,5 см, 100±0,5 см и 110±0,5 см и должна соответствовать указанному в таблице 2.

2.4 Масса изделия в индивидуальной упаковке не должна превышать 45 грамм.

2.5 Поверхность изделий не должна иметь технологических и посторонних дефектов, посторонних включений: трещин, раковин, царапин, заусенцев, расслоений и так далее.

2.6 Атравматический кончик дистального конца катетера должен быть гладким, атравматичным, закругленным.

2.7 Усилие на разрыв каждого участка катетера должно быть: для катетеров диаметром 4F и 5F – не менее 10 Н, для катетеров диаметром 6F, 7F, 8F – не менее 15 Н.

2.8 Катетеры устойчивы к утечке жидкости под давлением.

2.9 Максимальное допустимое давление протекающей жидкости для катетеров должно быть не более 8274 кПа.

2.10 Соединение порта Луер и шприца герметично и не допускает утечку жидкости.

2.11 Диаметры наибольших совместимых устройств для проводниковых катетеров должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Соотношение диаметров совместимых устройств и проводниковых катетеров

Номинальный наружный диаметр катетера по французской шкале (шкале Шарьера)	Диаметры наибольшего совместимого проводника в миллиметрах	Диаметры наибольшего совместимого проводника в дюймах
5 F	1,4±0,08 мм	0,056
6 F	1,8±0,08 мм	0,070
7 F	2,0±0,08 мм	0,078

Номинальный наружный диаметр катетера по французской шкале (шкале Шарьера)	Диаметры наибольшего совместимого проводника в миллиметрах	Диаметры наибольшего совместимого проводника в дюймах
8 F	2,3±0,08 мм	0,090

2.12 Цветовое кодирование портов Луер проводниковых катетеров должно соответствовать таблице 5.

Таблица 5 – Цветовое кодирование портов Луер проводниковых катетеров

Номинальный наружный диаметр катетеров по французской шкале (шкале Шарьера)	Цвет порта Луер
5 F	Серый
6 F	Зеленый
7 F	Рыжий
8 F	Синий

Порты Луер диагностических катетеров должны быть белого цвета.

2.13 Катетеры рентгеноконтрастные.

3. Комплектность поставки

3.1 Комплект поставки изделий должен соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность поставки изделий

Наименование	Количество, шт.
1. Изделие одного варианта исполнения в стерилизационной упаковке	1
2. Инструкция по применению	1

4. Маркировка

4.1 Маркировка изделия выполнена на бумажной этикетке, закрепленной на стерилизационную упаковку.

На этикетке должна быть указано:

- наименование производителя;
- адрес места производства;
- полное наименование изделия;
- краткое наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- номинальный наружный диаметр изделия в мм, дополнительно по шкале Шарьера;
- диаметр наибольшего совместимого проводника в мм (для проводниковых катетеров);
- эффективная длина изделия в см;
- максимальное допускаемое давление протекающей жидкости, кПа;
- схематическое изображение конфигурации дистального конца;
- количество изделий в упаковке;
- символы по ГОСТ Р ИСО 15223.1:
 - номер партии;
 - дата производства;
 - использовать до (год, месяц);
 - стерилизация газовым методом – этиленоксидом;

- не стерилизовать повторно;
- не применять при повреждении упаковки;
- не допускать попадания солнечного света;
- беречь от влаги;
- запрет на повторное применение;
- обратитесь к инструкции по применению;
- температурный диапазон хранения;
- надпись "Апирогенно";
- надпись "Рентгенонепрозрачный";
- надпись "Нетоксично внутри";
- способ утилизации и уничтожения отходов;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи.

4.2 Маркировка портов Луер выполнена лазерным методом и должна содержать следующую информацию:

- эффективная длина изделия в см;
- номинальный наружный диаметр изделия по шкале Шарьера;
- вид конфигурации дистального конца изделия.

4.3 Условные обозначения, применяемые на этикетке указаны в таблице 7.

Таблица 7 - Условные обозначения, применяемые на этикетке

Символ	Значение символа
	- Изготовитель.
	- Номер партии.
	- Дата производства.
	- Использовать до (год, месяц).
	- Изделия стерилизованы газовым методом – этиленоксидом.
	- Не стерилизовать повторно.
	- Не применять при повреждении упаковки.
	- Не допускать попадания солнечного света.
	- Беречь от влаги.
	- Запрет на повторное применение.
	- Обратитесь к руководству по эксплуатации.
	- Температурный диапазон хранения.

5. Указание по применению

ВНИМАНИЕ!!! Изделия не подлежат повторной стерилизации.

ВНИМАНИЕ!!! Не применять изделия при повреждении стерилизационной упаковки.

ВНИМАНИЕ!!! Не применять изделия повторно.

ВНИМАНИЕ!!! Не применять изделия при обнаружении нарушения целостности изделия.

ВНИМАНИЕ!!! Не применять изделия после истечения срока годности.

ВНИМАНИЕ!!! Изделия должны применяться квалифицированными врачами с профильным медицинским образованием.

ВНИМАНИЕ!!! При применении изделий нельзя допускать их контакта с нестерильными поверхностями.

ВНИМАНИЕ!!! Положение изделия в организме пациента при проведении манипуляций может определяться в процессе рентгенографии.

ВНИМАНИЕ!!! Радиация, электромагнитные и магнитные поля на изделие и его работу не влияют.

ВНИМАНИЕ!!! Выбор варианта исполнения изделия выполняет квалифицированный врач с профильным медицинским образованием на основании показаний, типа и особенностей предстоящих манипуляций с изделием.

ВНИМАНИЕ!!! При необходимости проведения манипуляций с изделием в непосредственной близости с ранее имплантированными в организме человека медицинскими изделиями квалифицированный врач (или группа врачей) с профильным медицинским образованием должна определить соотношение эффективности проведения манипуляции с изделием (его применения) с возможным риском его применения.

Подготовка к применению изделия:

1. Визуально проверить целостность стерилизационной упаковки, срок годности и дату стерилизации.
2. Вскрыть стерилизационную упаковку, потянув края упаковки в разные стороны или разрезав ножницами.
3. Извлечь стерильным инструментом изделие, не допуская его контакта с нестерильной поверхностью или с уже использованными изделиями.
4. Визуально проверить целостность изделия.
5. Изделие готово к применению по показаниям.

Порядок применения изделия:

1. Изделие применяется в соответствии с планом проведения манипуляций, подготовленным квалифицированным врачом (или группой врачей) с профильным медицинским образованием на основании показаний, типа и особенностей предстоящей манипуляции с изделием.

6. Условия хранения и транспортирования

6.1 Изделия в транспортной таре транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150 (при температурах от минус 50 °С до плюс 50 °С).

6.3 Изделия в транспортной таре хранят в закрытых отапливаемых помещениях по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150, при температурах от плюс 10 °С до плюс 25 °С на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, без воздействия прямых солнечных лучей. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий применения, транспортировании и хранения.

7.2 Срок годности изделий – 3 года с даты стерилизации.

8. Утилизация и уничтожение

8.1 Изделия с истекшим сроком годности, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

8.2 Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

Катетеры внутрисосудистые диагностические и проводниковые одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-001-39795719-2018 в вариантах исполнения:

1. Катетеры внутрисосудистые диагностические (Вид 238780):

1. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-4F);
2. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-5F);
3. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-6F);
4. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.0-7F);
5. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-4F);
6. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-5F);
7. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-6F);
8. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 3.5-7F);
9. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-4F);
10. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-5F);
11. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-6F);
12. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.0-7F);
13. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-4F);
14. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-5F);
15. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-6F);
16. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 4.5-7F);
17. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-4F);
18. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-5F);
19. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-6F);
20. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 5.0-7F);
21. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-4F);
22. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-5F);
23. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-6F);

24. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JL 6.0-7F);
25. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-4F);
26. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-5F);
27. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-6F);
28. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.0-7F);
29. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-4F);
30. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-5F);
31. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-6F);
32. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 3.5-7F);
33. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-4F);
34. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-5F);
35. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-6F);
36. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.0-7F);
37. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-4F);
38. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-5F);
39. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-6F);
40. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 4.5-7F);
41. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-4F);
42. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-5F);
43. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-6F);
44. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 5.0-7F);
45. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-4F);
46. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-5F);
47. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-6F);
48. Катетер диагностический PANORAMA JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-JR 6.0-7F);

49. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-4F);
50. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-5F);
51. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-6F);
52. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL I-7F);
53. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-4F);
54. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-5F);
55. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-6F);
56. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL II-7F);
57. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-4F);
58. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-5F);
59. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-6F);
60. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ LEFT III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AL III-7F);
61. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-4F);
62. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-5F);
63. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-6F);
64. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR I-7F);
65. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-4F);
66. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-5F);
67. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-6F);
68. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR II-7F);
69. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-4F);
70. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-5F);
71. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-6F);
72. Катетер диагностический PANORAMA AMPLATZ RIGHT III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-AR III-7F);
73. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-4F);
74. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-5F);

75. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-6F);
76. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100- LCB-7F);
77. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-4F);
78. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-5F);
79. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-6F);
80. Катетер диагностический PANORAMA CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100- RCB-7F);
81. Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-4F);
82. Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-5F);
83. Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-6F);
84. Катетер диагностический PANORAMA INTERNAL MAMMARY, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-IMA-7F);
85. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-4F);
86. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-5F);
87. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-6F);
88. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE A, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-MP A-7F);
89. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-4F);
90. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-5F);
91. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-6F);
92. Катетер диагностический PANORAMA MULTIPURPOSE B, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-MP B-7F);
93. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-4F);
94. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-5F);
95. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-6F);
96. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SON I-7F);
97. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-4F);
98. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-5F);
99. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-6F);
100. Катетер диагностический PANORAMA SONES I, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SON I-7F);

101. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SO
II-4F);
102. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SO
II-5F);
103. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SO
II-6F);
104. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SO
II-7F);
105. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SO II-
4F);
106. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SO II-
5F);
107. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SO II-
6F);
108. Катетер диагностический PANORAMA SONES II, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SO II-
7F);
109. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-SO
III-4F);
110. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-SO
III-5F);
111. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-SO
III-6F);
112. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-SO
III-7F);
113. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 4F, длина: 80 см (ДК-80-SO III-
4F);
114. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 5F, длина: 80 см (ДК-80-SO III-
5F);
115. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 6F, длина: 80 см (ДК-80-SO III-
6F);
116. Катетер диагностический PANORAMA SONES III, диаметр: 7F, длина: 80 см (ДК-80-SO III-
7F);
117. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-
110-PIG.STR-4F);
118. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-
110-PIG.STR-5F);
119. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-
110-PIG.STR-6F);
120. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL STRAIGHT, диаметр: 7F, длина: 110 см (ДК-
110-PIG.STR-7F);
121. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
145°-4F);
122. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
145°-5F);
123. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
145°-6F);
124. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 145°, диаметр: 7F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
145°-7F);
125. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 4F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
155°-4F);
126. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 5F, длина: 110 см (ДК-110-PIG
155°-5F);

127. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 6F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-6F);
128. Катетер диагностический PANORAMA PIGTAL 155°, диаметр: 7F, длина: 110 см (ДК-110-PIG 155°-7F);
129. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-4F);
130. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-5F);
131. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-6F);
132. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 3.5-7F);
133. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-4F);
134. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-5F);
135. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-6F);
136. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.0-7F);
137. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-4F);
138. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-5F);
139. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-6F);
140. Катетер диагностический PANORAMA ATESAL 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-ASL 4.5-7F);
141. Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-4F);
142. Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-5F);
143. Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-6F);
144. Катетер диагностический PANORAMA MOD.EXTRA BACK UP, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-MOD.EBU-7F);
145. Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-4F);
146. Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-5F);
147. Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-6F);
148. Катетер диагностический PANORAMA Q4, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-Q4-7F);
149. Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 4F, длина: 100 см (ДК-100-HS-4F);
150. Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 5F, длина: 100 см (ДК-100-HS-5F);
151. Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 6F, длина: 100 см (ДК-100-HS-6F);
152. Катетер диагностический PANORAMA HOCKEY STICK, диаметр: 7F, длина: 100 см (ДК-100-HS-7F).

II. Катетеры внутрисосудистые проводниковые (Вид 228240):

153. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-5F);
154. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-6F);
155. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-7F);
156. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.0-8F);
157. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-5F);
158. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-6F);
159. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-7F);
160. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 3.5-8F);
161. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-5F);
162. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-6F);
163. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-7F);
164. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0-8F);
165. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-5F);
166. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-6F);
167. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-7F);
168. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.5-8F);
169. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-5F);
170. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-6F);
171. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-7F);
172. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 5.0-8F);
173. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-5F);
174. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-6F);
175. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-7F);
176. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT 6.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 6.0-8F);

177. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-5F);
178. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-6F);
179. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-7F);
180. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT MOD.JL 4.0 MOD, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JL 4.0 MOD-8F);
181. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-5F);
182. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-6F);
183. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-7F);
184. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 3.5-8F);
185. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-5F);
186. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-6F);
187. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-7F);
188. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.0-8F);
189. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-5F);
190. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-6F);
191. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-7F);
192. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 4.5-8F);
193. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-5F);
194. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-6F);
195. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-7F);
196. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS LEFT CURVED 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JLC 5.0-8F);
197. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-5F);
198. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-6F);
199. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-7F);
200. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 3.5-8F);
201. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-5F);
202. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-6F);

203. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-7F);
204. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.0-8F);
205. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-5F);
206. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-6F);
207. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-7F);
208. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 4.5-8F);
209. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-5F);
210. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-6F);
211. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-7F);
212. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 5.0-8F);
213. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-5F);
214. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-6F);
215. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-7F);
216. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT 6.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-JR 6.0-8F);
217. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 3.5-5F);
218. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 3.5-6F);
219. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 3.5-7F);
220. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 3.5-8F);
221. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.0-5F);
222. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.0-6F);
223. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.0-7F);
224. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.0-8F);
225. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.5-5F);
226. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.5-6F);
227. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.5-7F);
228. Катетер проводниковый AKKORD JUDKINS RIGHT CURVED 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100- JRC 4.5-8F);

229. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-5F);
230. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-6F);
231. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-7F);
232. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 0.75, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 0.75-8F);
233. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-5F);
234. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-6F);
235. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-7F);
236. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.0-8F);
237. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-5F);
238. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-6F);
239. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-7F);
240. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.2-8F);
241. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-5F);
242. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-6F);
243. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-7F);
244. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 1.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 1.5-8F);
245. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-5F);
246. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-6F);
247. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-7F);
248. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 2.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 2.0-8F);
249. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-5F);
250. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-6F);
251. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-7F);
252. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AL 3.0-8F);
253. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-5F);
254. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-

- 100-AR 1.0-6F);
255. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-7F);
256. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 1.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 1.0-8F);
257. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-5F);
258. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-6F);
259. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-7F);
260. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 2.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 2.0-8F);
261. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-5F);
262. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-6F);
263. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-7F);
264. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ RIGHT 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-AR 3.0-8F);
265. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-5F);
266. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-6F);
267. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-7F);
268. Катетер проводниковый AKKORD AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-ALR 1.2-8F);
269. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-5F);
270. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-6F);
271. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-7F);
272. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.0-8F);
273. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-5F);
274. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-6F);
275. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-7F);
276. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 3.5-8F);
277. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-5F);
278. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-6F);
279. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-7F);
280. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.0-8F);

см (ПК-100-LES 4.0-8F);

281. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-5F);

282. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-6F);

283. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-7F);

284. Катетер проводниковый AKKORD LEFT EXTRA SUPPORT LES 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LES 4.5-8F);

285. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-5F);

286. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-6F);

287. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-7F);

288. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 3.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 3.5-8F);

289. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-5F);

290. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-6F);

291. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-7F);

292. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.0-8F);

293. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-5F);

294. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-6F);

295. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-7F);

296. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 4.5, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 4.5-8F);

297. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-5F);

298. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-6F);

299. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-7F);

300. Катетер проводниковый AKKORD RIGHT EXTRA SUPPORT RES 5.0, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RES 5.0-8F);

301. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-5F);

302. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-6F);

303. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-7F);

304. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS LEFT, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-LCB-8F);

305. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-5F);
306. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-6F);
307. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-7F);
308. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY BYPASS RIGHT, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-RCB-8F);
309. Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-5F);
310. Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-6F);
311. Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-7F);
312. Катетер проводниковый AKKORD INTERNAL MAMMARY, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-IMA-8F);
313. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-5F);
314. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-6F);
315. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-7F);
316. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE A1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MP A1-8F);
317. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-5F);
318. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-6F);
319. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-7F);
320. Катетер проводниковый AKKORD MULTIPURPOSE B1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MP B1-8F);
321. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-5F);
322. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-6F);
323. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-7F);
324. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 1, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 1-8F);
325. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-5F);
326. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-6F);
327. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-7F);
328. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 2, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 2-8F);
329. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-5F);
330. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-6F);

331. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-7F);
332. Катетер проводниковый AKKORD SONES CURVES 3, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-SON 3-8F);
333. Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 5F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-5F);
334. Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 6F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-6F);
335. Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 7F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-7F);
336. Катетер проводниковый AKKORD MOD. EXTRA BACK UP, диаметр: 8F, длина: 100 см (ПК-100-MOD.EBU-8F).

Схематические изображения изделий, с указанием геометрических размеров, а так же изображения различных конфигураций дистального конца

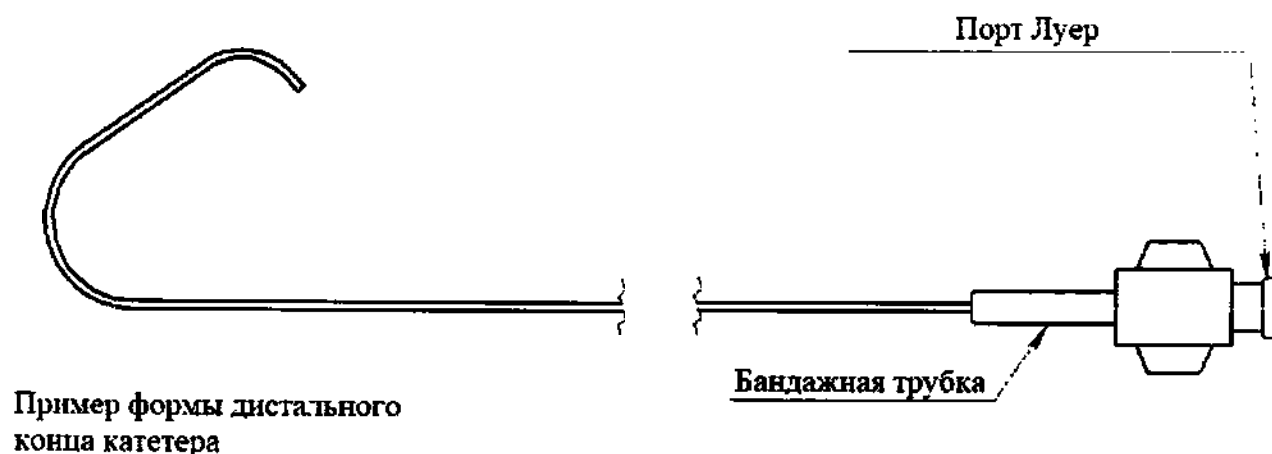


Рисунок А.1.1 – Общий вид любого варианта исполнения катетера

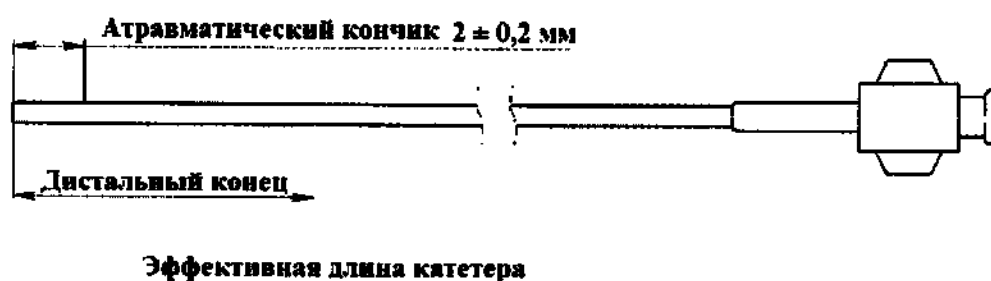


Рисунок А.1.2 – Общий вид дистального конца и его атравматического кончика любого варианта исполнения катетера

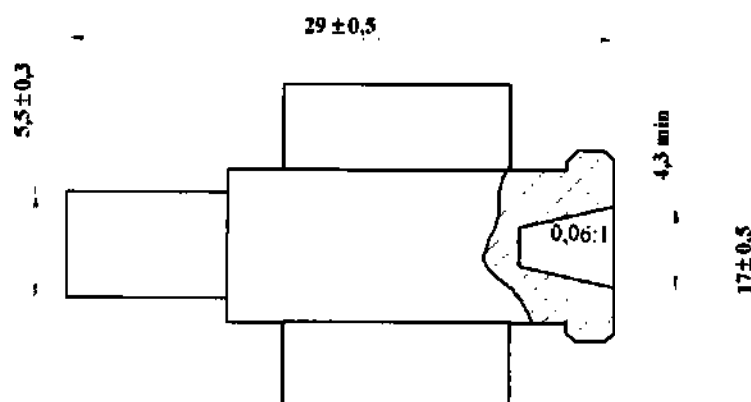


Рисунок А.1.3 – Вид порта Луер (значения приведены в миллиметрах)

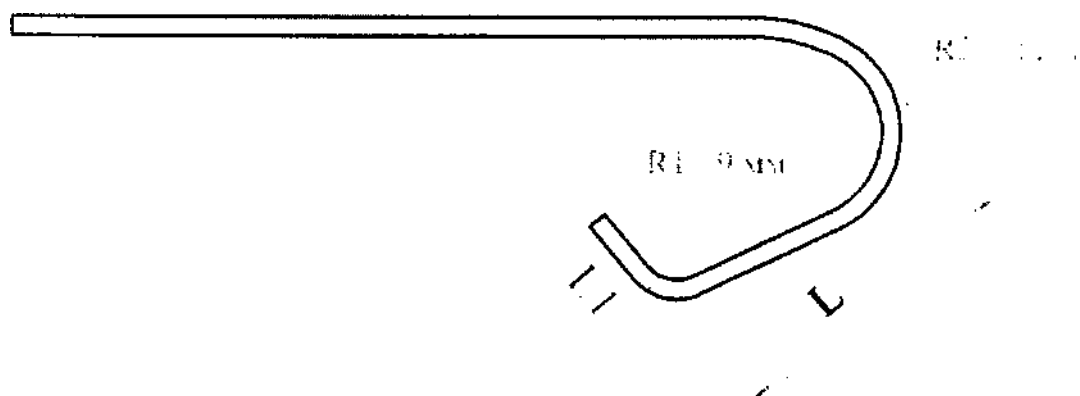


Рисунок А.1– Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT: JL 3.0, JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0 и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT: JL 3.0, JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0; JUDKINS LEFT MOD: JL 4.0 MOD: JL 4.0 MOD.

Таблица А.1 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT: JL 3.0, JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0 и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT: JL 3.0, JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0; JUDKINS LEFT MOD: JL 4.0 MOD: JL 4.0 MOD.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	R1, мм	R2, мм
JL 3.0	30±1,5	15±0,75	9±0,45	11±0,55
JL 3.5	35±1,75	15±0,75		
JL 4.0	40±2	15±0,75		
JL 4.5	45±2,25	15±0,75		
JL 5.0	50±2,5	15±0,75		
JL 6.0	60±3	15±0,75		
JL 4.0 MOD	40±2	15±0,75		

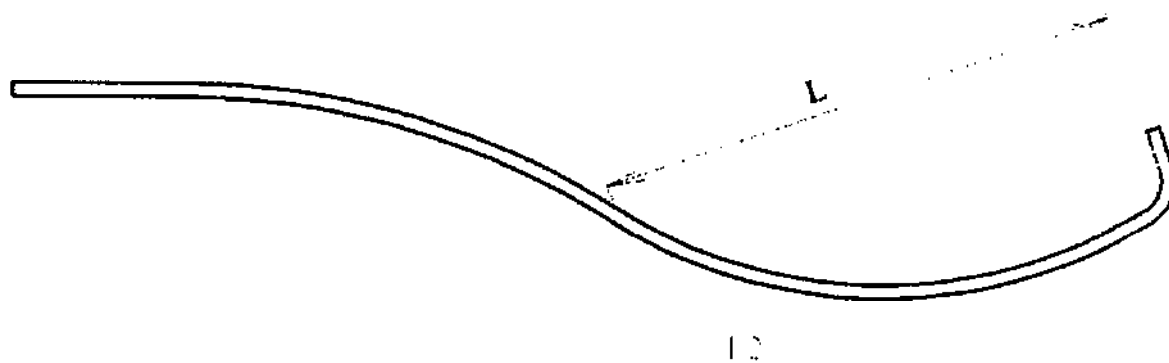


Рисунок А.2 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT: JR 3.0, JR 3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 6.0 и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT: JR 3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 6.0.

Таблица А.2 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT: JR 3.0, JR 3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 6.0 и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT: JR 3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 6.0.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	L2, мм	R, мм
JR 3.0	30±1,5	15±0,75	115±5,75	7±0,35
JR 3.5	35±1,75	15±0,75	125±6,25	
JR 4.0	40±2	15±0,75	135±6,75	
JR 4.5	45±2,25	15±0,75	140±7	
JR 5.0	50±2,5	15±0,75	140±7	
JR 6.0	60±3	15±0,75	145±7,25	

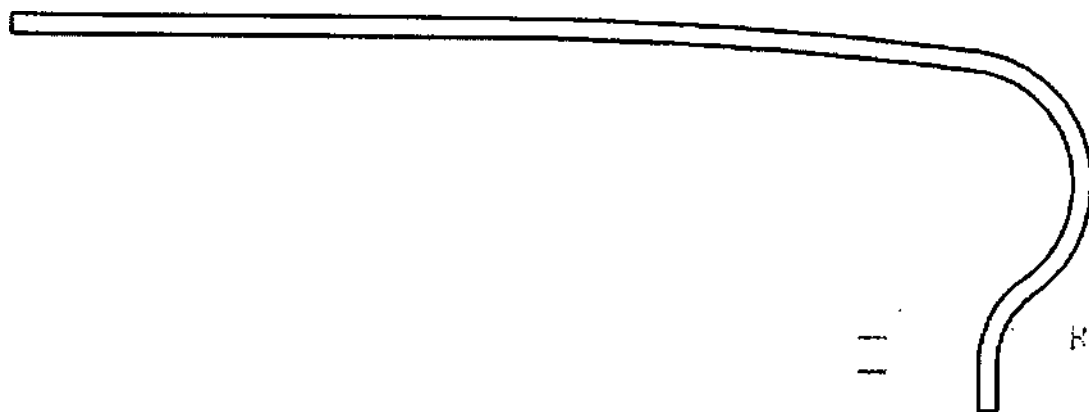


Рисунок А.3 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ LEFT: AL I, AL II, AL III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ LEFT: AL 0.75, AL 1.0, AL 1.2, AL 1.5, AL 2.0, AL 3.0.

Таблица А.3 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ LEFT: AL I, AL II, AL III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ LEFT: AL 0.75, AL 1.0, AL 1.2, AL 1.5, AL 2.0, AL 3.0.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	R, мм
AL I	40±2	11±0,55	9±0,45
AL II	50±2,5	11±0,55	
AL III	50±2,5	11±0,55	
AL 0.75	20±1	8±0,4	
AL 1.0	23±1,15	8±0,4	
AL 1.2	25±1,25	8±0,4	
AL 1.5	30±1,5	8±0,4	
AL 2.0	40±2	8±0,4	
AL 3.0	50±2,5	11±0,55	



Рисунок А.4 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ RIGHT: AR I, AR II, AR III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ RIGHT: AR 1.0, AR 2.0, AR 3.0; AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2: ALR 1.2.

Таблица А.4 – Размеры дистального диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ RIGHT: AR I, AR II, AR III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: AMPLATZ RIGHT: AR 1.0, AR 2.0, AR 3.0; AMPLATZ LEFT RIGHT 1.2: ALR 1.2.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	L2, мм	R, мм
AR I, AR 1.0	23±1,15	8±0,4	100±5	10±0,5
AR II, AR 2.0	30±1,5	11±0,55	130±6,5	
AR III, AR 3.0	40±2	13±0,65	145±7,25	
ALR 1.2	25±1,25	11±0,55	100±5	

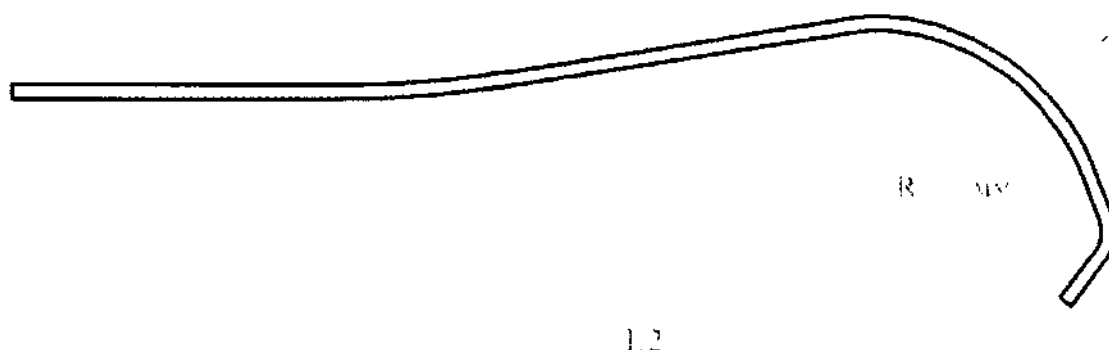


Рисунок А.5 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS LEFT: LCB и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS LEFT: LCB.

Таблица А.5 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS LEFT: LCB и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS LEFT: LCB.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	L2, мм	R, мм
LCB	55±2,75	10±0,5	110±5,5	7±0,35



Рисунок А.6 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS RIGHT: RCB и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS RIGHT: RCB.

Таблица А.6 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS RIGHT: RCB и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: CORONARY BYPASS RIGHT: RCB.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	R1, мм	R2, мм
RCB	45±2,25	5±0,25	30±1,5	5±0,25

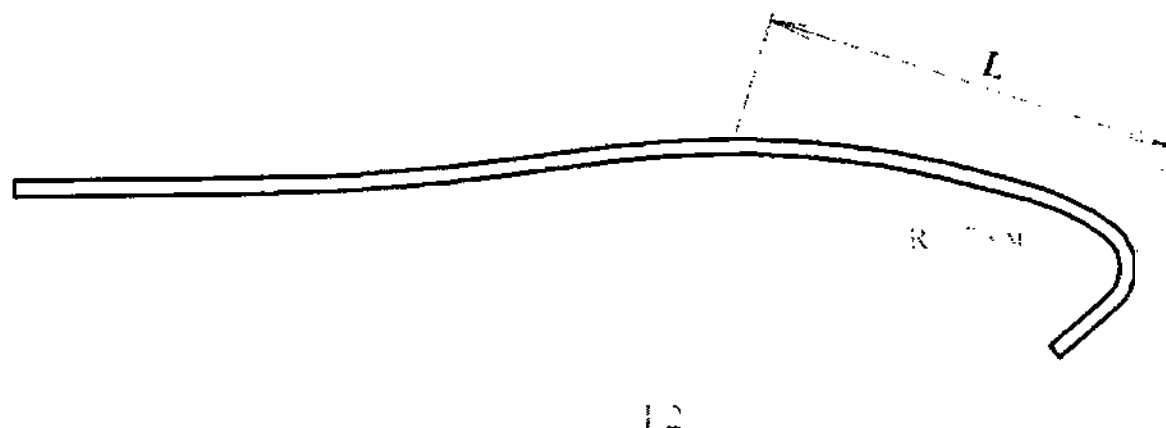


Рисунок А.7 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: INTERNAL MAMMARY: IMA и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: INTERNAL MAMMARY: IMA.

Таблица А.7 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: INTERNAL MAMMARY: IMA и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: INTERNAL MAMMARY: IMA.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	L2, мм	R, мм
IMA	40±2	15±0,75	125±6,25	7±0,35

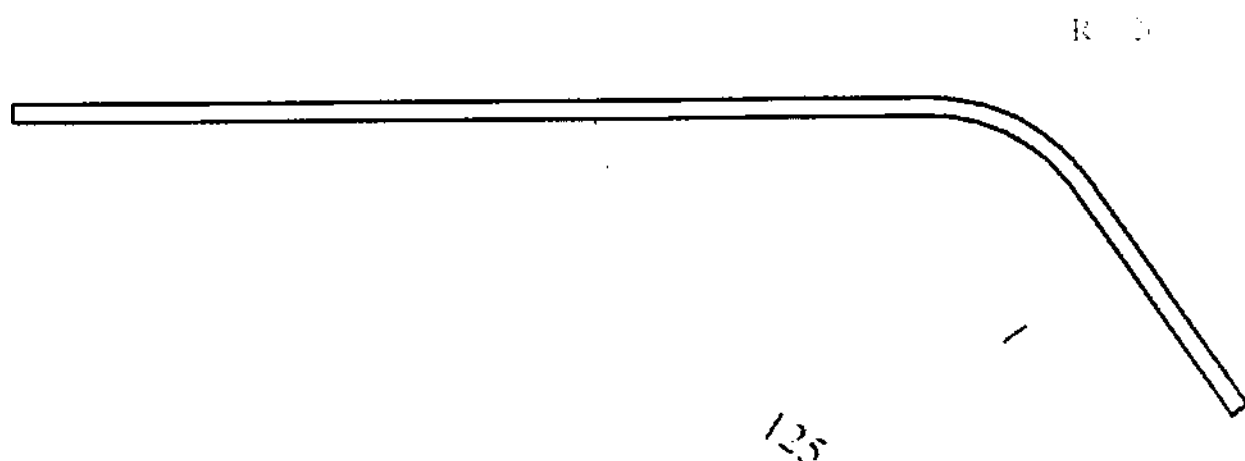


Рисунок А.8 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE A: MP A и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE A1: MP A1.

Таблица А.8 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE A: MP A и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE A1: MP A1.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	R, мм
MP A	38±1,9	20±1
MP A1	40±2	

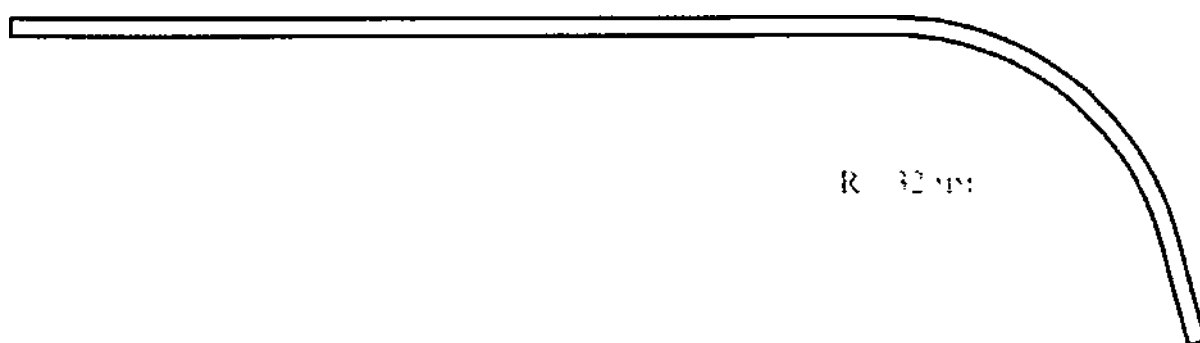


Рисунок А.9 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE B: MP B и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE B1: MP B1.

Таблица А.9 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE B: MP B и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MULTIPURPOSE B1: MP B1.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	R, мм
MP B, MP B1	40 ± 2	$32 \pm 1,6$



Рисунок А.10 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: SONES I, SONES II, SONES III: SON I, SON II, SON III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: SONES CURVES 1, SONES CURVES 2, SONES CURVES 3: SON 1, SON 2, SON 3.

Таблица А.10 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: SONES I, SONES II, SONES III: SON I, SON II, SON III и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: SONES CURVES 1, SONES CURVES 2, SONES CURVES 3: SON 1, SON 2, SON 3.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	α, °
SON I, SON 1	30±1,5	35±1,75	110±5,5°
SON II, SON 2	15±0,75	30±1,5	120±6°
SON III, SON 3	10±0,5	40±2	130±6,5°

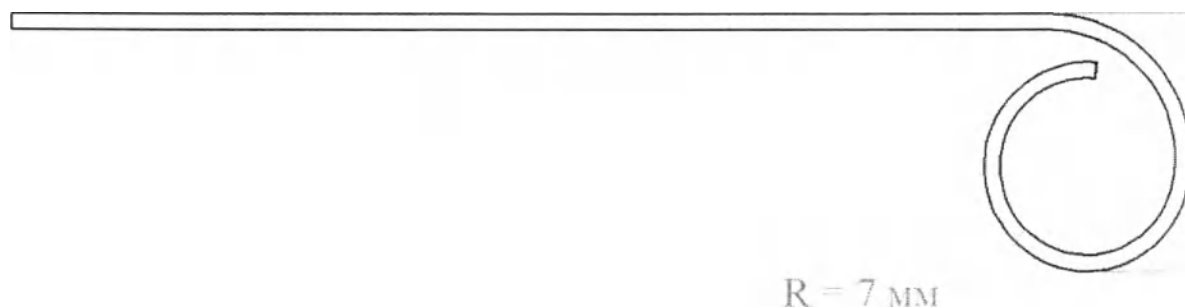


Рисунок А.11 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца PIGTAL STRAIGHT: PIG.STR.

Таблица А.11 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: PIGTAL STRAIGHT: PIG.STR.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм
PIG.STR	$7 \pm 0,35$	$16 \pm 0,8$

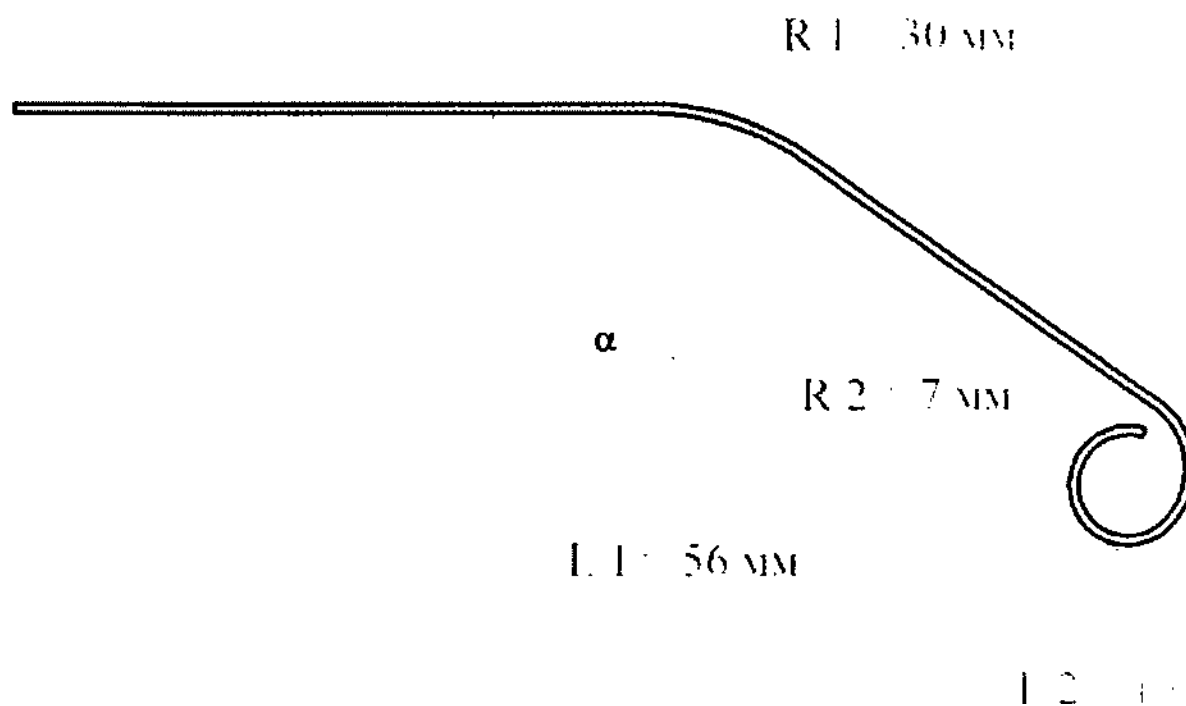


Рисунок А.12 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: PIGTAL 145°, PIGTAL 155° : PIG 145°, PIG 155°.

Таблица А.12 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: PIGTAL 145°, PIGTAL 155° : PIG 145°, PIG 155°.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R 1, мм	R 2, мм	L 1, мм	L 2, мм	α
PIG 145°	$30 \pm 1,5$	$7 \pm 0,35$	$56 \pm 2,8$	$16 \pm 0,8$	$145 \pm 7,25^\circ$
PIG 155°	$30 \pm 1,5$	$7 \pm 0,35$	$56 \pm 2,8$	$16 \pm 0,8$	$155 \pm 7,75^\circ$

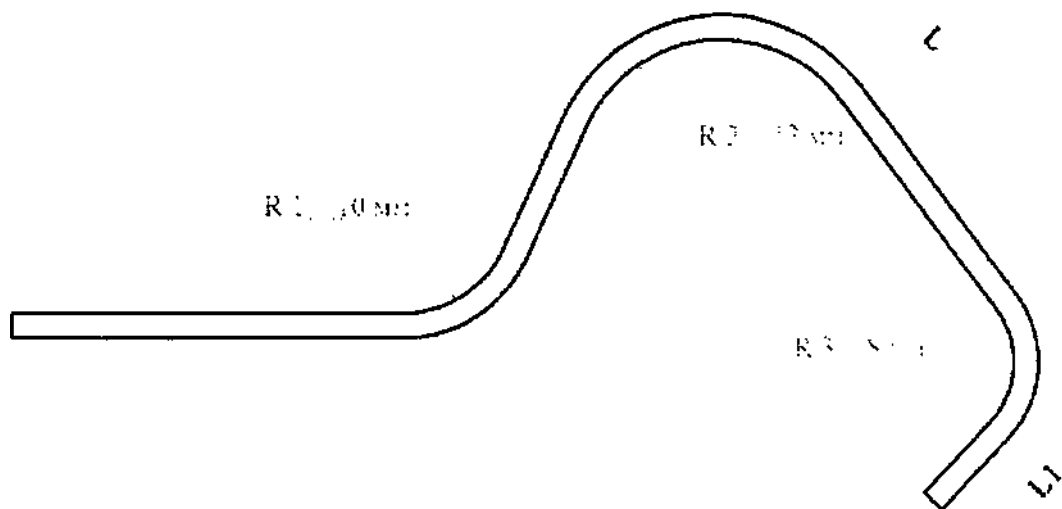


Рисунок А.13 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: ATESAL 3.5, ATESAL 4.0, ATESAL 4.5: ASL 3.5, ASL 4.0, ASL 4.5.

Таблица А.13 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: ATESAL 3.5, ATESAL 4.0, ATESAL 4.5: ASL 3.5, ASL 4.0, ASL 4.5.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R 1, мм	R 2, мм	R 3, мм	L, мм	L 1, мм
ASL 3.5	$10 \pm 0,5$	$13 \pm 0,65$	$8 \pm 0,4$	40 ± 2	$15 \pm 0,75$
ASL 4.0	$10 \pm 0,5$	$13 \pm 0,65$	$8 \pm 0,4$	$44 \pm 2,2$	$15 \pm 0,75$
ASL 4.5	$10 \pm 0,5$	$13 \pm 0,65$	$8 \pm 0,4$	$48 \pm 2,4$	$15 \pm 0,75$


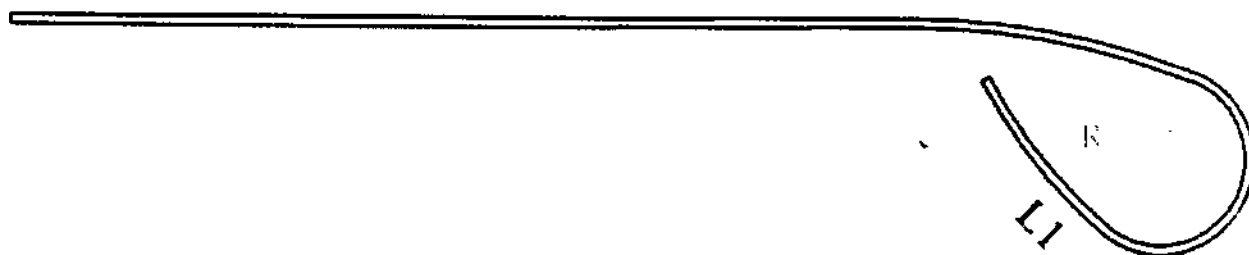


Рисунок А.14 – Вид дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: LEFT EXTRA SUPPORT LES: LES 3.0, LES 3.5, LES 4.0, LES 4.5.

Таблица А.14 – Размеры дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: LEFT EXTRA SUPPORT LES: LES 3.0, LES 3.5, LES 4.0, LES 4.5.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	L 1, мм
LES 3.0	10±0,5	40±2	27±1,35
LES 3.5	10±0,5	44±2,2	32±1,6
LES 4.0	10±0,5	33±1,65	37±1,85
LES 4.5	10±0,5	50±2,5	42±2,1

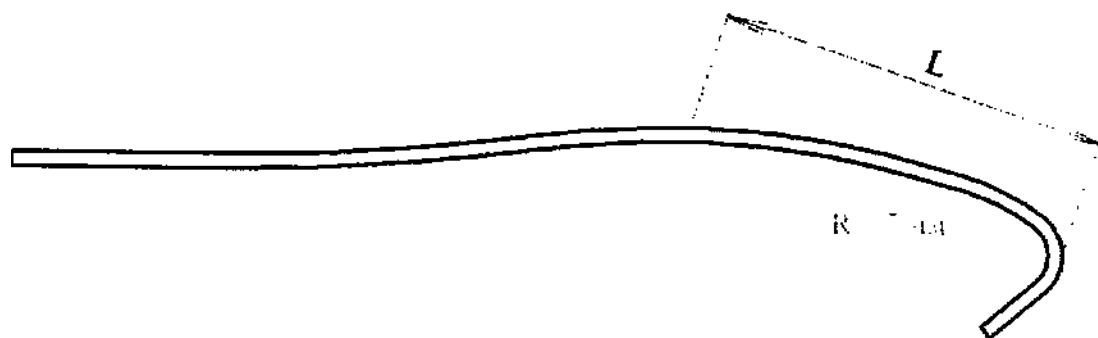

12

Рисунок А.15 – Вид дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: RIGHT EXTRA SUPPORT RES: RES 3.5, RES 4.0, RES 4.5, RES 5.0.

Таблица А.15 – Размеры дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: RIGHT EXTRA SUPPORT RES: RES 3.5, RES 4.0, RES 4.5, RES 5.0.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	L 1, мм	L 2, мм
RES 3.5	7±0,35	40±2	15±0,75	80±4
RES 4.0	7±0,35	45±2,25	15±0,75	95±4,75
RES 4.5	7±0,35	50±2,5	15±0,75	110±5,5
RES 5.0	7±0,35	50±2,5	20±1	120±6

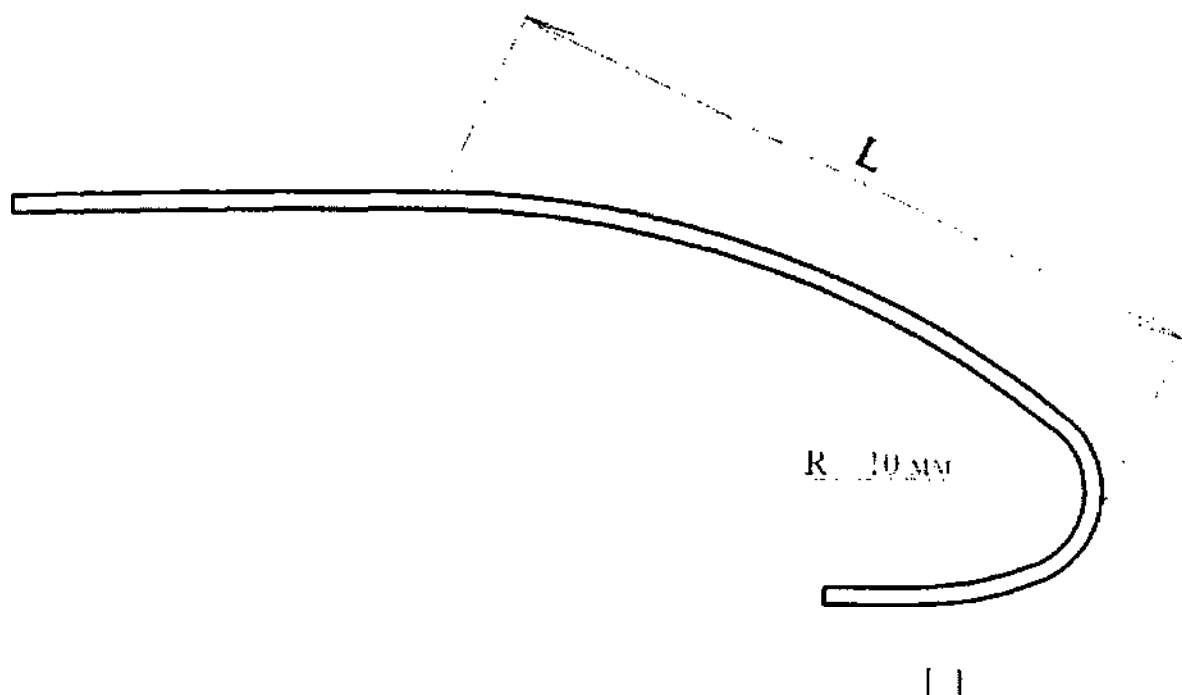


Рисунок А.16 – Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MOD.EXTRA BACK UP: MOD.EBU и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MOD.EXTRA BACK UP: MOD.EBU.

Таблица А.16 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: MOD.EXTRA BACK UP: MOD.EBU и проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: MOD.EXTRA BACK UP: MOD.EBU.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	L 1, мм
MOD.EBU	10±0,5	90±4,5	30±1,5

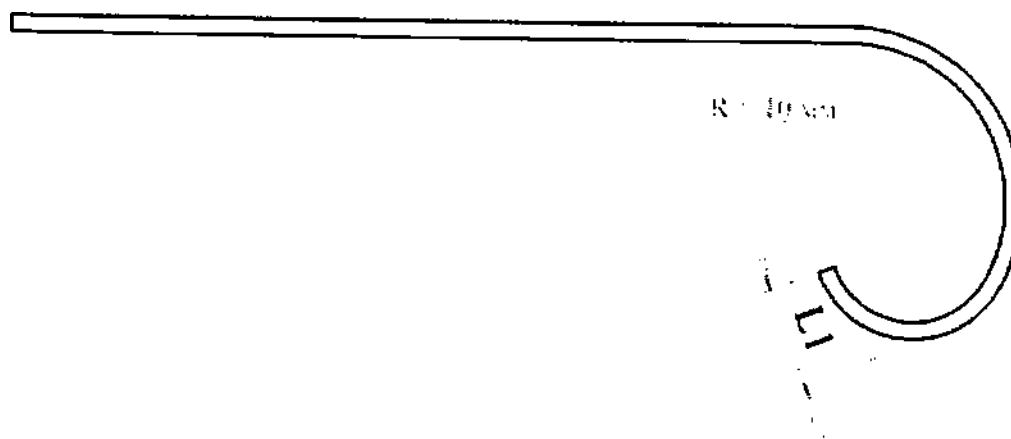


Рисунок А.17– Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: Q4.

Таблица А.17 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: Q4.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	L 1, мм
Q4	10±0,5	40±2	12±0,6

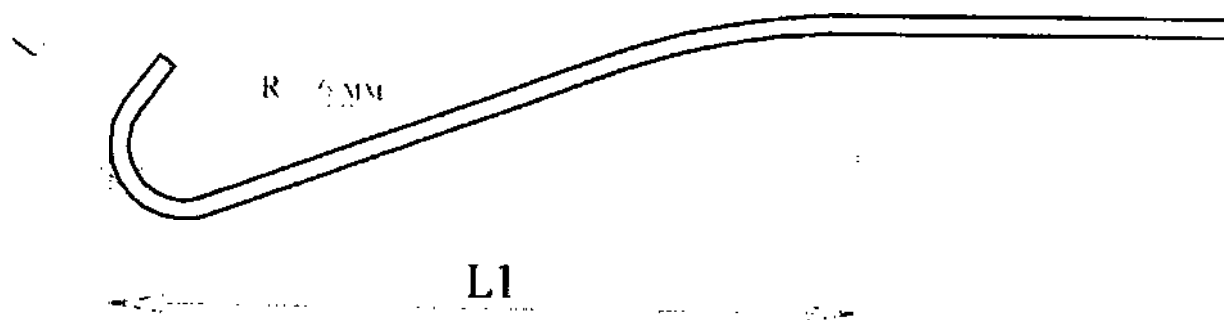


Рисунок А.18– Вид дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: HOCKEY STICK: HS.

Таблица А.18 – Размеры дистального конца диагностических катетеров с конфигурацией дистального конца: HOCKEY STICK: HS.

Вид конфигурации дистального конца катетера	R, мм	L, мм	L 1, мм
HS	$6 \pm 0,3$	$15 \pm 0,75$	80 ± 4



Рисунок А.19 – Вид дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT CURVED: JLC 3.5, JLC 4.0, JLC 4.5, JLC 5.0.

Таблица А.19 – Размеры дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS LEFT CURVED: JLC 3.5, JLC 4.0, JLC 4.5, JLC 5.0.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	R, мм
JLC 3.5	15±0,75	15±0,75	15±0,75
JLC 4.0	20±1	20±1	
JLC 4.5	25±1,25	20±1	
JLC 5.0	30±1,5	20±1	



Рисунок А.20 – Вид дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT CURVED: JRC 3.5, JRC 4.0, JRC 4.5.


Таблица А.20 – Размеры дистального конца проводниковых катетеров с конфигурацией дистального конца: JUDKINS RIGHT CURVED: JRC 3.5, JRC 4.0, JRC 4.5.

Вид конфигурации дистального конца катетера	L, мм	L1, мм	R, мм
JRC 3.5	125±6,25	30±1,5	20±1
JRC 4.0	130±6,5	25±1,25	
JRC 4.5	135±6,75	30±1,5	

Перечень применяемых производителем национальных стандартов.

Таблица 3.1 – Перечень применяемых производителем национальных стандартов.

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
РД-50-707	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ ISO 10555-1-2011	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования.
ГОСТ ISO 10555-2-2011	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 2. Катетеры ангиографические.
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
ГОСТ ISO 11135-2017	Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена.
ГОСТ ISO 10993-7-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества.
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
МУ 287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний.
ГОСТ Р 53417-2009	Упаковка. Методы испытаний на вибрацию при постоянной низкой частоте.
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

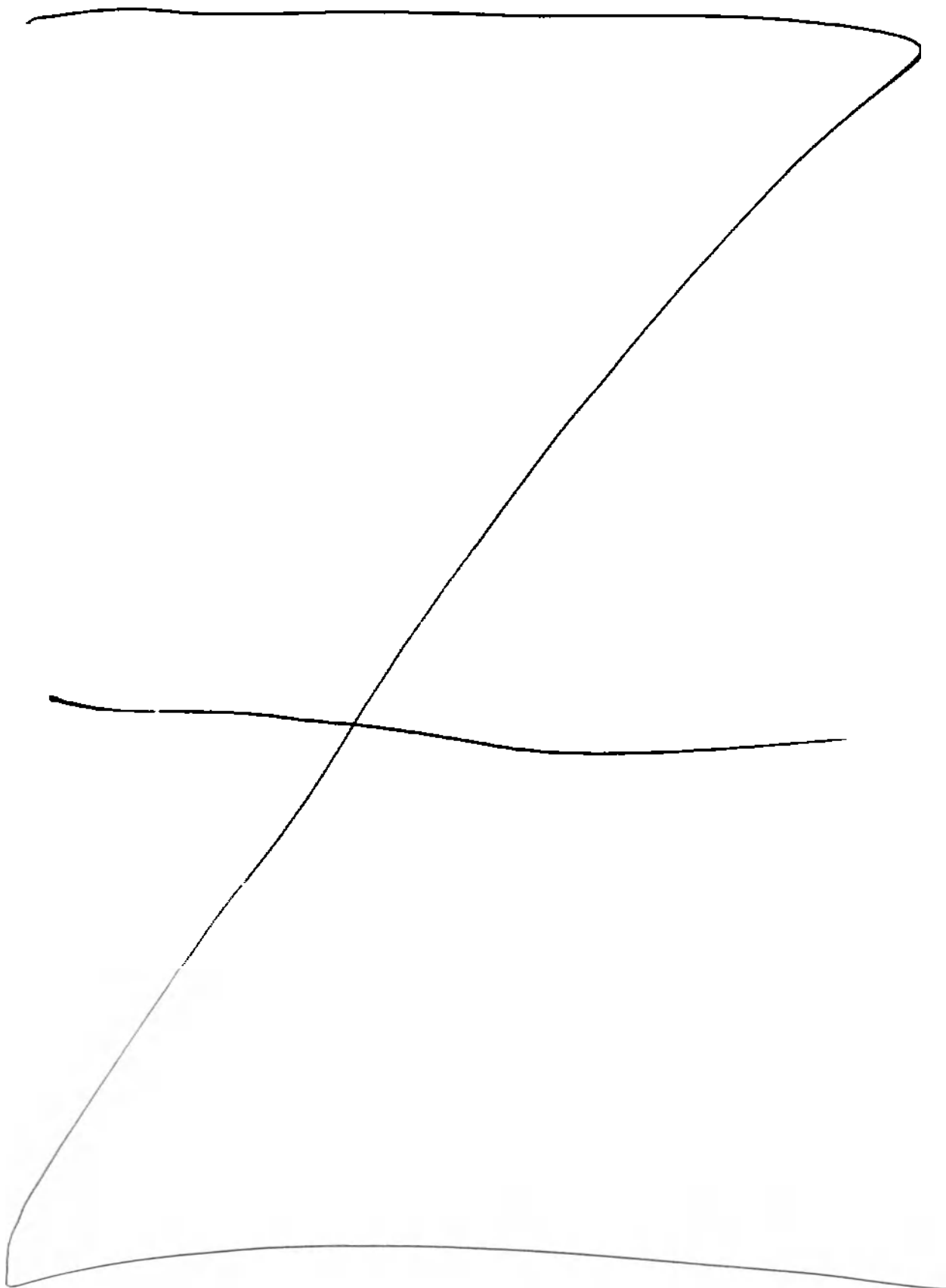

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 69 (шестьдесят девять) листов
Генеральный директор
ООО НПО «Деост»



Паклин Е. Л.