

УТВЕРЖДАЮ


Индивидуальный предприниматель

03.10.2023 г. Духарев А.А.
Антон Андреевич
ИНН 770300749066
МОСКВА

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**НАБОР ГАЗОТВОДНЫЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

по ТУ 22.21.29-001-0150408218-2020

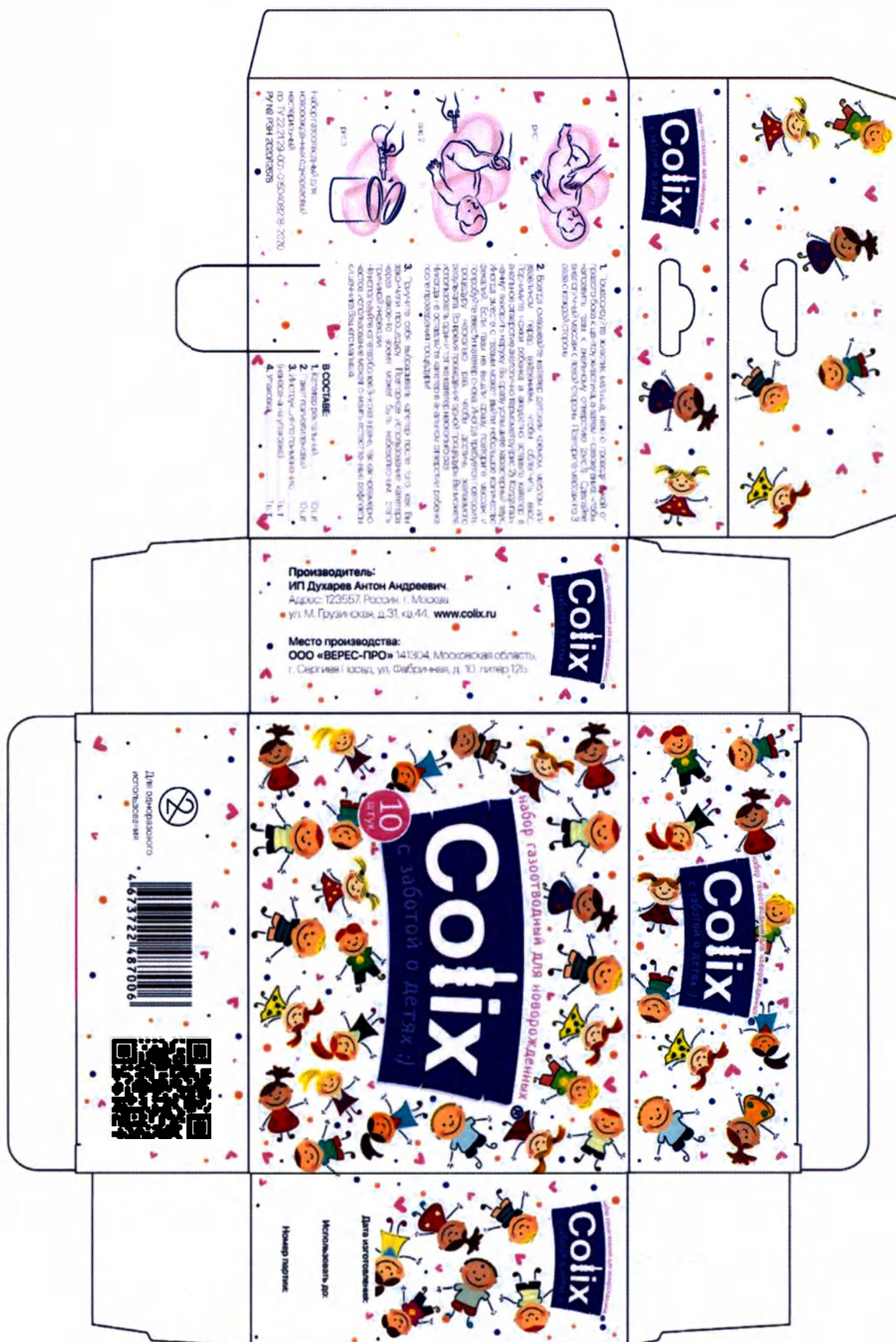

I Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный Colix® вариант 10 шт



рис.1



рис.2

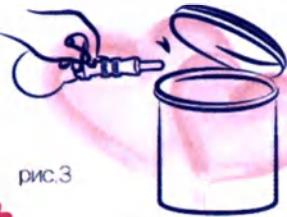


рис.3

Набор газоотводный для
новорожденных одноразовый
нестерильный
по ТУ 22.21.29-001-0150408218-2020
РУ № РЗН 2020/12678

1. Помассируйте животик малыша, нежно проводя рукой от правого бока к центру животика, а затем – сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию (рис.1). Сделайте аналогичный массаж с левой стороны. Повторите массаж по 3 раза с каждой стороны.

2. Всегда смазывайте катетер детским кремом, маслом или вазелином перед введением, чтобы облегчить ввод. Поднимите ножки ребенка и аккуратно вставьте катетер в анальное отверстие аналогично термометру (рис.2). Когда газы начнут выходить наружу, Вы сразу услышите характерный звук. Иногда вместе с газами может выйти небольшое количество фекалий. Если газы не вышли сразу, повторите массаж и попробуйте ввести катетер снова. Иногда требуется повторить процедуру несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Во время проведения одной процедуры Вы можете использовать один и тот же катетер несколько раз. Никогда не оставляйте катетер в анальном отверстии ребенка после проведения процедуры!

3. Приучите себя выбрасывать катетер после того, как Вы закончили процедуру. Повторное использование катетера через какое-то время может быть небезопасным, стать причиной инфекции. Не используйте катетер более 3-х раз в день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексы кишечника Вашего малыша.

В СОСТАВЕ:

- | | |
|--|-------|
| 1. Катетер ректальный..... | 10 шт |
| 2. Пакет полиэтиленовый..... | 10 шт |
| 3. Инструкция по применению
(нанесена на упаковке)..... | 1 шт |
| 4. Упаковка..... | 1 шт |

набор газоотводный для новорожденных

Colix
с заботой о детях :)

Производитель:
ИП Духарев Антон Андреевич,
Адрес: 123557, Россия, г. Москва,
ул. М. Грузинская, д.31, кв.44, www.colix.ru

Место производства:
ООО «ВЕРЕС-ПРО» 141304, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 10, литер 125





набор газоотводный для новорожденных

Colix

с заботой о детях :)







рис.1



рис.2



рис.3

1. Помассируйте животик малыша, нежно проведя рукой от правого бока к центру животика, а затем – сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию (рис.1). Сделайте аналогичный массаж с левой стороны. Повторите массаж по 3 раза с каждой стороны.
2. Всегда смазывайте катетер детским кремом, маслом или вазелином перед введением, чтобы облегчить ввод. Поднимите ножки ребенка и аккуратно вставьте катетер в анальное отверстие аналогично термометру (рис.2). Когда газы начнут выходить наружу, Вы сразу услышите характерный звук. Иногда вместе с газами может выйти небольшое количество фекалий. Если газы не вышли сразу, повторите массаж и попробуйте ввести катетер снова. Иногда требуется повторить процедуру несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Во время проведения одной процедуры Вы можете использовать один и тот же катетер несколько раз. **Никогда не оставляйте катетер в анальном отверстии ребенка после проведения процедуры!**
3. Приучите себя выбрасывать катетер после того, как Вы закончили процедуру. Повторное использование катетера через какое-то время может быть небезопасным, стать причиной инфекции. Не используйте катетер более 3-х раз в день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексы кишечника Вашего малыша.

Набор газоотводный для новорожденных одноразовый нестерильный
по ТУ 22.21.29-001-0150408218-2020
РУ № РЗН 2020/12678

В СОСТАВЕ:

1. Катетер ректальный.....	2 шт
2. Пакет полиэтиленовый.....	2 шт
3. Инструкция по применению (нанесена на упаковке).....	1 шт
4. Упаковка.....	1 шт

II Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный Colix® вариант 2 шт
(увеличенный вид)



III Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный Lubby вариант 10 шт

Быть мамой – это lubby

Горячая линия
8 800 775 80 86

www.lubby.com
lubby@lubby.com

@lubby

1. Помассируйте животик малыша, нежно проведя рукой от правого бока к центру животика, а затем — сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию (рис.1). Сделайте аналогичный массаж с левой стороны. Повторите массаж по 3 раза с каждой стороны.

2. Всегда смазывайте катетер детским кремом, маслом или вазелином перед введением, чтобы облегчить ввод. Поднимите ножки ребенка и аккуратно вставьте катетер в анальное отверстие аналогично термометру (рис.2). Когда газы начнут выходить наружу, Вы сразу услышите характерный звук. Иногда вместе с газами может выйти небольшое количество фекалий. Если газы не вышли сразу повторите массаж и попробуйте ввести катетер снова. Иногда требуется повторить процедуру несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Во время проведения одной процедуры Вы можете использовать один и тот же катетер несколько раз.

Никогда не оставляйте катетер в анальном отверстии ребенка после проведения процедуры!

3. Приучите себя выбрасывать катетер после того, как Вы закончили процедуру. Повторное использование катетера через какое-то время может быть небезопасным, стать причиной инфекции.

Не используйте катетер более 3-х раз в день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексы кишечника Вашего малыша.

В составе: катетер ректальный - 10шт., пакет полиэтиленовый - 10шт., инструкция по применению (нанесена на упаковку) - 1 шт., упаковка - 1 шт.

Набор газоотводный для новорожденных одноразовый нестерильный по ТУ 22.21.29-001-0150408218-2020, РУ №РЭН 2020/12678.

Производитель: ИП Духарев А. А. Адрес: 123557, Россия, г.Москва, ул. М. Грузинская, д.31, кв.44. Место производства: ООО «ВЕРЕС-ПРО» 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д.10, литер 125. Страна изготовления: Россия. Продавец/Организация принимающая претензии от потребителей: ООО «Лабби». Адрес: 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1, лит. Ж., пом. 301.

34404

Изготовлено и упаковано

(ММ/ГГГГ):

Использовать до:

Номер партии:



lubby



рис.1

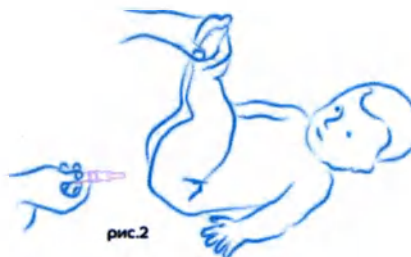


рис.2

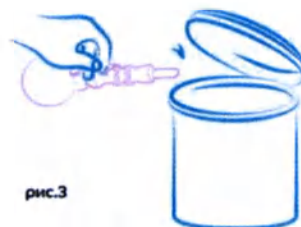


рис.3

арт. 31084



4 660054 493133

III Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный Lubby вариант 10 шт
(увеличенный вид)



IV Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный Lubby вариант 2 шт

I. Набор газоотводный для новорождённых одноразовый нестерильный в составе:



- Катетер ректальный



- Пакет полиэтиленовый



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 11 (одиннадцать) лист(ов)

Индивидуальный предприниматель

ДУХАРЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

Духарев А. А.

«03» 15 сентября 2023г.

