

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Бергус»**



Р.М. Гурбанов

« 10 » апреля **2023** г.

**Инструкция
по применению
(введена впервые)**

**Презервативы с анестетиком
по ТУ 22.19.71-009-01716953-2019**

**производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО«Бергус»),
Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово,
ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com, www.bergus24.ru**

НАИМЕНОВАНИЕ:

Презервативы с анестетиком по ТУ 22.19.71-009-01716953-2019.

Варианты исполнения:

I. Вариант 1.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Вариант 2.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Вариант 3.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

IV. Вариант 4.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 3 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

V. Вариант 5.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 6 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Вариант 6.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 12 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

I. Вариант 1.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Вариант 2.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Вариант 3.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

IV. Вариант 4.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 3 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

V. Вариант 5.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 6 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Вариант 6.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.;
2. Одноразовые пакеты для утилизации – 12 шт./уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»).

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»), Россия. Адрес: Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.14.

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Потребителями являются мужчины достигшие половой зрелости, живущие сексуальной жизнью. Для использования непрофессионалами.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА:

Категория изделия в зависимости от вида контакта организма с человеком: Группа изделий: Изделие, контактирующее с поверхностью тела человека - изделие поверхностного контакта. Вид контакта – презервативы: слизистые оболочки (изделия, контактирующие с неповрежденными слизистыми оболочками); одноразовые пакеты для утилизации: - кожа (изделия, контактирующие только с неповрежденной кожей). Классификация изделия по продолжительности контакта – категория А (изделия кратковременного контакта). Продолжительность контакта – однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых в общей сложности составляет менее 24ч.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяются как профилактическое и противозачаточное средство, для предохранения от нежелательной беременности и для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Изделие одноразового применения, нестерильно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 1

Наименование	Длина L (мм)	Ширина B (мм)	Толщина стенки S (мм)	Толщина ободка s (мм)	Длина резер- вуара l (мм)	Масса (г)	
						в сухом виде	со смазкой
Презервативы с анестетиком	190±10	55±2	0,05±0,005	1,5±0,3	18 ±2	1,48±0,3	1,7±0,3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

Таблица 2

Наименование	Размер	Материал	Краситель	Швы	Статистическая нагрузка при растяжении
Пакеты одноразовые для утилизации	Длина (мм) 95±5 Ширина (мм) 70±5 Ширина клапана (мм) 20±2	полиэтилен низкого давления (ПНД) марка FL 7000 по ТУ 22.22.11- 001-54644604- 2017	суперконцен- трат черный марка KRITILEN BLACK 340	герметичные, по всей длине ровные, без прожженных мест и складок, воду не пропускают.	0,71 Н

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Презервативы из натурального латекса в силиконовой смазке, прозрачные, гладкие, с накопителем. Силиконовая смазка содержит анестетик – анестезин (МНН:бензокаин)*.

*Анестетик – вещество, оказывающее местноанестезирующее действие (уменьшение чувствительности) в месте его контакта с кожей или слизистыми оболочками.

Состав силиконовой смазки: силиконовое масло (MIRASIL® DM 350), 1,2-Пропиленгликоль (1,2 Propylene Glycol USP), анестезин (ФС 001585-291216, МНН: Бензокаин). Содержание фармацевтической субстанции анестезин (не менее 99,0% и не более 101,0%) в изделии - $0,007\text{г} \pm 10\%$.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Таблица 3

Наименование сырья и материалы	Наименование производителя, страна	Наименование поставщика, страна
Составной натуральный латекс (презерватив резиновый латексный/латексная заготовка)	Дунян Согпу Латекс. (Цзиньчжоу) Ко., Лтд, Китай/ Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) CO., Ltd., China	Дунян Согпу Латекс. (Цзиньчжоу) Ко., Лтд, Китай/ Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) CO., Ltd., China, Китай
Анестезин (ФС 001585-291216, МНН: Бензокаин)	АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод», Россия	ООО «Экофид», Россия
Силиконовое масло (MIRASIL® DM 350)	ELKEM Silicones France, Франция	ООО «Руссо Хеми» Россия
Пропиленгликоль (1,2 Propylene Glycol USP)	ООО BASF, Россия	ЗАО «Русхимсеть» Россия
Первичная (индивидуальная) упаковка: материал: ПЭТФ +Ф+ПЭ с рисунком (без рисунка)	АО «Тико Пластик», Россия	АО «Тико Пластик», Россия
Картонные коробки: материал – картон марки Нева, 320 г/м ²	ООО «Новые технологии», Россия	ООО «Новые технологии», Россия
Картонные коробки : материал-металлизированный картон Aegle Pro 210 г/м ²	ООО «Черноголовская типография», Россия	ООО «Черноголовская типография», Россия
Упаковка полимерная для пищевой продукции: пленка с печатью и без нее. Тип: BOPP (БОПП)двухосноориентированная полипропиленовая пленка	ООО «ПОЛИПАК», Россия	ООО «ПОЛИПАК», Россия
Пакеты для утилизации (для вариантов исполнения с принадлежностями)	ООО «Владупак», Россия	ООО «Владупак», Россия
Гофрокороб	ООО «Ирбис»	ООО «Ирбис», Россия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Контрацепция (предотвращение нежелательной беременности);
- Защита от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Воспалительные процессы слизистой оболочки (у женщин) и кожных покровов (у мужчин).

Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕЗЕРВАТИВОВ С АНЕСТЕТИКОМ:

1. Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
 2. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
 3. Надевайте презерватив на половой член до начала полового акта.
- Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена. Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух.

Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива.

Расправьте презерватив вниз до основания полового члена

4. Сразу после эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
(при использовании варианта исполнения медицинского изделия, включающего одноразовые пакеты для утилизации):

1. Сверните использованный презерватив и уберите в одноразовый пакет для утилизации использованных презервативов.
2. Пакет поместите в емкость для отходов.
3. Никогда не бросайте презерватив с пакетом для утилизации в унитаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ✓ Никогда не используйте презерватив, если срок годности истек, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.
- ✓ Не используйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, лосьоны и вазелин.
- ✓ Если необходимо используйте смазывающие вещества (лубриканты; интимные гели-смазки).

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Компоненты, входящие в состав изделия могут вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии повышенной чувствительности или аллергии на компоненты, входящие в состав изделия необходимо прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0°C до + 25 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Презервативы.

1. Изделие одноразового использования.
2. Изделия эксплуатируют при температуре +10°C до +35 °C и влажности воздуха 60 - 80%.
3. Температура эксплуатации (температура внутри влагалища, в котором находится презерватив при применении) от +32 °C до +42 °C.
4. Перед использованием изделий необходимо убедиться в том, что не нарушена целостность первичной упаковки. Запрещается использовать изделие при нарушении целостности первичной упаковки.
5. Необходимо убедиться в том, что срок годности изделия не закончился. Запрещается использовать изделие при окончании срока годности.

Одноразовые пакеты для утилизации:

1. В комплект поставки медицинского изделия в зависимости от варианта исполнения входят одноразовые пакеты для утилизации, которые предназначены для утилизации использованных презервативов.
2. Одноразового использования.

3. Одноразовые пакеты для утилизации эксплуатируют при температуре окружающей среды от +10 °С до +35 °С и влажности воздуха 60 – 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования в диапазоне температур от – 50°С до + 50 °С (относительная влажность воздуха 100% при температуре +25°С).

Транспортирование изделий следует проводить в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течение 1 суток с момента получения при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

температура окружающей среды

УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

Презервативы:

1. Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании, осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

В случае использования потребителем варианта исполнения изделия, включающего в себя одноразовые пакеты для утилизации – утилизация использованных изделий осуществляется в одноразовые пакеты для утилизации совместно с бытовыми отходами.

2. Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

3. При утилизации отходов материалов должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 58577.

4. Презервативы с принадлежностями после использования подлежат уничтожению путем захоронения (как нетоксичные промышленные отходы).

5. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

6. Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

7. Образующиеся отходы для использованных, неиспользованных, с истекшим сроком годности изделий относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

8. Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируются в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 1.2.3685.

Одноразовые пакеты для утилизации (при использовании варианта исполнения медицинского изделия, включающего одноразовые пакеты для утилизации):

9. Утилизация одноразовых пакетов для утилизации потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

10. Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

11. Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

12. Образующиеся отходы для использованных, неиспользованных одноразовых пакетов для утилизации относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

13. Выбросы вредных веществ в атмосферу – по ГОСТ Р 58577.

14. Одноразовые пакеты для утилизации после использования подлежат уничтожению путем захоронения (как нетоксичные промышленные отходы).

15. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:

ГОСТ 4645-81, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ИСО 4074-10-93, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.3685-21.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Обо всех случаях возникновения нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) необходимо немедленно сообщить организации-производителю по адресу: ООО «Бергус», Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголобово, ул. Ленина, д.14., т. 8 800 500 79 85, эл. почта: director@bergus.ru.com

Генеральный директор
ООО «Бергус»

" 10 " апреля 2023 г.

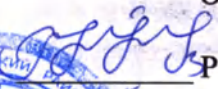
Гурбанов Рза Мамедага оглы



М.П. (Подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Бергус»


Р.М. Гурбанов



« 10 » апреля 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Бергус»

**Инструкция-вкладыш для потребителей
(инструкция по применению)**

Р.М. Гурбанов

« 10 » апреля 2023 г.

**Презервативы с анестетиком
по ТУ 22.19.71-009-01716953-2019**

производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО«Бергус»),
Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово,
ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com, www.bergus24.ru

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Презервативы с анестетиком по ТУ 22.19.71-009-01716953-2019.

Варианты исполнения:

I. Вариант 1.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Вариант 2.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Вариант 3.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.

IV. Вариант 4.

1. Презервативы с анестетиком – 3 шт./уп.; 2. Одноразовые пакеты для утилизации – 3 шт./уп. 3. Инструкция по применению – 1 шт.

V. Вариант 5.

1. Презервативы с анестетиком – 6 шт./уп.; 2. Одноразовые пакеты для утилизации – 6 шт./уп. 3. Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Вариант 6.

1. Презервативы с анестетиком – 12 шт./уп.; 2. Одноразовые пакеты для утилизации – 12 шт./уп. 3. Инструкция по применению – 1 шт.

Примечание: Вариант исполнения - см. на боковой стороне упаковке медицинского изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»)

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Бергус» (ООО «Бергус»), Россия. Адрес: Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.14.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Обо всех случаях возникновения нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) необходимо немедленно сообщить организации-производителю по адресу: ООО «Бергус», Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.14., т. 8 800 500 79 85, эл. почта: director@bergus.ru.com

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяются как профилактическое и противозачаточное средство, для предохранения от нежелательной беременности и для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Изделие одноразового применения, нестерильно.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Презервативы из натурального латекса в силиконовой смазке, прозрачные, гладкие, с накопителем. Силиконовая смазка содержит анестетик – анестезин (МНН:бензокаин)*.

*Анестетик – вещество, оказывающее местноанестезирующее действие (уменьшение чувствительности) в месте его контакта с кожей или слизистыми оболочками.

Состав силиконовой смазки: силиконовое масло (MIRASIL® DM 350), 1,2-Пропиленгликоль (1,2 Propylene Glycol USP), анестезин (ФС 001585-291216, МНН: Бензокаин). Содержание фармацевтической субстанции анестезин (не менее 99,0% и не более 101,0%) в изделии - 0,007г ±10%.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Контрацепция (предотвращение нежелательной беременности);
- Защита от заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Воспалительные процессы слизистой оболочки (у женщин) и кожных покровов (у мужчин).

Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕЗЕРВАТИВОВ С АНЕСТЕТИКОМ:

1. Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.

2. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.

3. Надевайте презерватив на половой член до начала полового акта.

Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.

Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух.

Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива.

Расправьте презерватив вниз до основания полового члена

4. Сразу после эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (при использовании варианта исполнения медицинского изделия, включающего одноразовые пакеты для утилизации):

1. Сверните использованный презерватив и уберите в одноразовый пакет для утилизации использованных презервативов.

5. Пакет поместите в емкость для отходов.

6. Никогда не бросайте презерватив с пакетом для утилизации в унитаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Никогда не используйте презерватив, если срок годности истек, упаковка (фольга) помята, распечатана или имеет внешние повреждения.

2. Не используйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, лосьоны и вазелин.

3. Если необходимо используйте смазывающие вещества (лубриканты; интимные гели-смазки).

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Компоненты, входящие в состав изделия могут вызвать аллергические реакции у отдельных лиц.

При наличии повышенной чувствительности или аллергии на компоненты, входящие в состав изделия необходимо прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0°C до + 25 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании, осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами.

В случае использования потребителем варианта исполнения изделия, включающего в себя одноразовые пакеты для утилизации – утилизация использованных изделий осуществляется в одноразовые пакеты для утилизации совместно с бытовыми отходами.

НИ ОДНО ИЗ СРЕДСТВ КОНТРАЦЕПЦИИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 100% ЗАЩИТЫ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.

Номер и дату выдачи регистрационного удостоверения см. на оборотной стороне упаковки медицинского изделия.

Генеральный директор
ООО «Бергус»

" 10 " апреля 2023 г.

Гурбанов Рза Мамедага оглы

М.П. (Подпись)

ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов листа (ов)

Генеральный директор Гурбанов Р.М.

