

«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Н. Е. Полякова

«09» ноября 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Инструменты колющие для проведения артроскопических операций

Инструменты колющие для проведения артроскопических операций

1. игла-проводник
2. игла к сшивающему аппарату
3. троакар
4. обтуратор
5. шило

Срок службы ортопедического инструментария не бесконечен. Все повторно используемые инструменты подвержены повторяющимся стрессовым воздействиям при контакте с костью, соударении, стандартной процедуре очистки, а также в процессе стерилизации. Перед каждым использованием инструменты подлежат тщательному осмотру на предмет их полной функциональной пригодности. Царапины и зазубрины могут привести к поломке инструмента в процессе его применения. Притупление режущих кромок может снизить эффективность работы таким инструментом. Во избежание потенциальной возможности нанесения травмы пациенту, оставления металлических фрагментов в операционной ране, поврежденный инструментарий требует ремонта или замены. С поверхности инструмента необходимо тщательно удалять загрязнение и остатки тканей.

Большинство инструментальных наборов поставляются вместе со вставками/лотками и контейнером (контейнерами). Многие инструменты предназначены для использования с определенным имплантатом. Важно, чтобы хирург и персонал операционной были хорошо знакомы с соответствующей хирургической техникой – как с инструментарием, применяемым при ее выполнении, так и с используемым имплантатом.

ОЧИСТКА

Очистка микрохирургического инструментария должна проводиться отдельно от других инструментов.

Надлежащим образом разберите инструменты на части и проведите их осмотр на предмет повреждений. Сломанные и погнутые инструменты должны быть переданы на обслуживание или ремонт. Приготовьте ферментативный промывочный раствор в соответствии с инструкцией производителя. Замочите загрязненный инструментарий на 5 минут. Используя мягкую щетинистую щетку, удалите следы крови и остатки тканей, уделяя особое внимание резьбовым частям, бороздкам, стыковочным швам (шлицам) и трудно доступным частям инструмента. Если инструмент имеет скользящие механизмы и шарнирные соединения, приведите их в движение, чтобы высвободить попавшие в них кровь и обрывки тканей. В случае канюлированного инструмента, удалите детрит из канюли мягкой нейлоновой щеткой или ершиком.

Тщательно промойте инструменты теплой проточной водой. Промойте все просветы, внутренние полости, скользящие механизмы и шарнирные механизмы, приводя их при этом в движение. После окончательного

промывания сразу просушите инструменты, особенно внутренние полости, если возможно – сжатым воздухом. Смажьте, если требует подвижные элементы водорастворимой смазкой. Убедитесь в пригодности инструментов к использованию, осмотрев их перед стерилизацией и передачей на хранение.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизуйте автоклавированием. На основании проверки процедуры применением одиночного завернутого контейнера с множественными лотками инструментов, помещенных в правильно функционирующий автоклав, рекомендуются следующие циклы паровой стерилизации. Важно чтобы параметры процесса были проверены и утверждены для каждого отдельного стерилизатора в учреждении и каждой конфигурации загрузочного материала.

Тип цикла	Температура	Время воздействия / время сушки
Предварительное вакуумирование (4 импульса)	132-134°C	8 минут / 20 минут сушки для металлических изделий и металлполимерных лотков; 45 минут для всех полимерных лотков
	134-137°C	5 минут / 20 минут сушки для металлических изделий и металлполимерных лотков; 45 минут для всех полимерных лотков

Специалистами учреждения может быть применен другой цикл автоклавирования вместо предложенных, при условии, что этот другой метод стерилизации получил одобрение, и позволяет добиться достаточного проникновения пара и его контакта со стерилизационным контейнером для инструментов.

Для получения дальнейшей информации, связанной с использованием данного инструментария, свяжитесь с представителем компании DePuy или дистрибьютором.

Специалист по регистрации



Полякова Н. Е.

