



240218817-001 1/1 ⑦
俄罗斯 E S C
2024/06/19 705

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce



证明书 CERTIFICATE



号码 No. 241100B0/H23264

兹证明：在所附文件上的无锡贝恩外科器械有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of WUXI BEIEN SURGERY
DEVICE CO.,LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

签证员：

Authorized
Official:

Chen Yao

日期：2024年06月14日
(Date: Jun. 14, 2024)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”


Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd

General Director

(должность/position)

Xu Weidong

(имя/name)

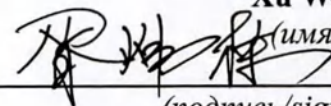

(подпись/signature)

02/04/2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Степлер одноразовый, в наборе, в вариантах исполнения»

1.Описание медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия

Степлер одноразовый, в наборе, в вариантах исполнения:

1. Степлер режущий эндоскопический, в наборе, в вариантах исполнения:

1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E, в составе:

1.1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E – 1 шт.

1.1.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения - 1-54 шт.:

1.1.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.CR30W

1.1.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.CR45W

1.1.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.CR60W

1.1.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.CR30B

1.1.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.CR45B

1.1.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.CR60B

1.1.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.CR30J

1.1.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.CR45J

1.1.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.CR60J

1.1.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.CR30G

1.1.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.CR45G

1.1.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.CR60G

1.1.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TL30H

1.1.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TL45H

1.1.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TL60H

1.1.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TL30W

1.1.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TL45W

1.1.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TL60W

1.1.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TL30B

1.1.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TL45B

1.1.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TL60B

1.1.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TL30J

1.1.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TL45J

1.1.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TL60J

1.1.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TL30G

1.1.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TL45G

1.1.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TL60G

1.1.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.TS30T

1.1.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.TS45T

1.1.2.30.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.TS60T

1.1.2.31.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.TS30P

1.1.2.32.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.TS45P

1.1.2.33.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TS60P

1.1.2.34.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.TS30D

1.1.2.35.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D

1.1.2.36.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D

- 1.1.2.37.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TF30H
- 1.1.2.38.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TF45H
- 1.1.2.39.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TF60H
- 1.1.2.40.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TF30W
- 1.1.2.41.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TF45W
- 1.1.2.42.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TF60W
- 1.1.2.43.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TF30B
- 1.1.2.44.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TF45B
- 1.1.2.45.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TF60B
- 1.1.2.46.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TF30J
- 1.1.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.1.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.1.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.1.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.1.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.1.2.52. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Белый арт. WS45
- 1.1.2.53. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм - Золотой арт. PR60J
- 1.1.2.54. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт. PR30M
- 1.1.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.2.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELS12-С, в составе (при необходимости):

- 1.2.1 Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELS12-С-1 шт.
- 1.2.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.2.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
 - 1.2.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30
 - 1.2.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
 - 1.2.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
 - 1.2.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
 - 1.2.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
 - 1.2.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
 - 1.2.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
 - 1.2.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.2.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 - 1.2.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 - 1.2.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 - 1.2.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.2.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.2.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.2.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.2.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.2.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.2.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.2.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 - 1.2.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TC60P
 - 1.2.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P

- [illegible]

- 5

- 1.2.2.111.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.WR30
- 1.2.2.112.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.GS60
- 1.2.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.3. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELS12-Е, в составе (при необходимости):

- 1.3.1 Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELS12-Е – 1 шт.
- 1.3.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.3.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
 - 1.3.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30
 - 1.3.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
 - 1.3.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
 - 1.3.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
 - 1.3.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
 - 1.3.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
 - 1.3.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
 - 1.3.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.3.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 - 1.3.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 - 1.3.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 - 1.3.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.3.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.3.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.3.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.3.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.3.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.3.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.3.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 - 1.3.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TC60P
 - 1.3.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.3.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
 - 1.3.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
 - 1.3.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
 - 1.3.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
 - 1.3.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T
 - 1.3.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D
 - 1.3.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D
 - 1.3.2.30.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.TS30D
 - 1.3.2.31.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
 - 1.3.2.32.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G

- [illegible]

- [illegible]

- 10

- 1.7.2.46.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TF30J
- 1.7.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.7.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.7.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.7.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.7.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.7.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.8.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELST-C, в составе (при необходимости):

1.8.1. Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELST-C – 1шт.

1.8.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

- 1.8.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.CR30W
- 1.8.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.CR45W
- 1.8.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.CR60W
- 1.8.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.CR30B
- 1.8.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.CR45B
- 1.8.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.CR60B
- 1.8.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.CR30J
- 1.8.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.CR45J
- 1.8.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.CR60J
- 1.8.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.CR30G
- 1.8.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.CR45G
- 1.8.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.CR60G
- 1.8.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TL30H
- 1.8.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TL45H
- 1.8.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TL60H
- 1.8.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TL30W
- 1.8.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TL45W
- 1.8.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TL60W
- 1.8.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TL30B
- 1.8.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TL45B
- 1.8.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TL60B
- 1.8.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TL30J
- 1.8.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TL45J
- 1.8.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TL60J
- 1.8.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TL30G
- 1.8.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TL45G
- 1.8.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TL60G
- 1.8.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.TS30T
- 1.8.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.TS45T
- 1.8.2.30.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.TS60T
- 1.8.2.31.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.TS30P
- 1.8.2.32.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.TS45P
- 1.8.2.33.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TS60P
- 1.8.2.34.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.TS30D
- 1.8.2.35.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D

- 1.8.2.36.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D
- 1.8.2.37.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TF30H
- 1.8.2.38.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TF45H
- 1.8.2.39.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TF60H
- 1.8.2.40.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TF30W
- 1.8.2.41.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TF45W
- 1.8.2.42.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TF60W
- 1.8.2.43.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TF30B
- 1.8.2.44.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TF45B
- 1.8.2.45.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TF60B
- 1.8.2.46.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TF30J
- 1.8.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.8.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.8.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.8.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.8.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.8.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.9.Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S, в составе (при необходимости):

- 1.9.1. Степлер режущий эндоскопический - Короткий арт.ELS12-S -1 шт.
- 1.9.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.9.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
 - 1.9.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30
 - 1.9.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
 - 1.9.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
 - 1.9.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
 - 1.9.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
 - 1.9.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
 - 1.9.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
 - 1.9.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.9.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 - 1.9.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 - 1.9.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 - 1.9.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.9.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.9.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.9.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.9.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.9.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.9.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.9.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 - 1.9.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TC60P
 - 1.9.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.9.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P

- [illegible]

- [illegible]

1.9.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.10. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSJ-S, в составе (при необходимости):

1.10.1. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSJ-S – 1 шт.

1.10.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.10.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T

1.10.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T

1.10.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T

1.10.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P

1.10.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P

1.10.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P

1.10.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D

1.10.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D

1.10.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D

1.10.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T

1.10.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T

1.10.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T

1.10.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P

1.10.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P

1.10.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P

1.10.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D

1.10.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D

1.10.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D

1.10.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.11.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELSJ-C, в составе (при необходимости):

1.11.1. Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELSJ-C – 1 шт.

1.11.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.11.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T

1.11.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T

1.11.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T

1.11.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P

1.11.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P

- 1.11.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
- 1.11.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
- 1.11.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
- 1.11.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
- 1.11.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
- 1.11.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
- 1.11.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
- 1.11.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
- 1.11.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
- 1.11.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
- 1.11.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
- 1.11.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
- 1.11.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
- 1.11.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.12.Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELSJ-E, в составе (при необходимости):

- 1.12.1 Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELSJ-E – 1 шт.
- 1.12.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.12.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T
 - 1.12.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
 - 1.12.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
 - 1.12.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
 - 1.12.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
 - 1.12.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.12.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.12.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.12.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.12.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.12.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.12.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.12.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.12.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P

1.12.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P

1.12.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D

1.12.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D

1.12.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D

1.12.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.13.Степлер режущий эндоскопический -45мм – Короткий арт.ELSQ-45S, в составе (при необходимости):

1.1.3.1 Степлер режущий эндоскопический -45мм – Короткий арт.ELSQ-45S – 1 шт.

1.13.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.13.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.ER60G

1.13.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.ER60J

1.13.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.ER60B

1.13.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.ER60W

1.13.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.ER60H

1.13.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.ER45G

1.13.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.ER45J

1.13.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.ER45B

1.13.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.ER45W

1.13.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.ER45H

1.13.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.QR60J

1.13.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.QR60G

1.13.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.QR60D

1.13.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.QR45G

1.13.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.QR45D

1.13.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.QR60H

1.13.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.QR60W

1.13.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.QR60B

1.13.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D

1.13.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт. QR45H

1.13.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.QR45W

1.13.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.QR45B

1.13.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.QR45J

1.13.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.14.Степлер режущий эндоскопический -45мм – Обычный арт.ELSQ-45C, в составе (при необходимости):

1.14.1 Степлер режущий эндоскопический -45мм – Обычный арт.ELSQ-45C – 1 шт.

1.14.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.14.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.ER60G

1.14.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.ER60J

1.14.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.ER60B

1.14.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.ER60W

1.14.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.ER60H

1.14.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.ER45G

1.14.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.ER45J

1.14.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.ER45B

1.14.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.ER45W

1.14.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.ER45H

1.18.Степлер режущий эндоскопический -60мм – Дополнительный арт.ELSQ-60E, в составе (при необходимости):

1.18.1 Степлер режущий эндоскопический -60мм – Дополнительный арт.ELSQ-60E – 1 шт.

1.18.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.18.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.ER60G

1.18.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.ER60J

1.18.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.ER60B

1.18.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.ER60W

1.18.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.ER60H

1.18.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.ER45G

1.18.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.ER45J

1.18.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.ER45B

1.18.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.ER45W

1.18.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.ER45H

1.18.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.QR60J

1.18.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.QR60G

1.18.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.QR60D

1.18.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.QR45G

1.18.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.QR45D

1.18.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.QR60H

1.18.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.QR60W

1.18.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.QR60B

1.18.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D

1.18.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт. QR45H

1.18.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.QR45W

1.18.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.QR45B

1.18.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.QR45J

1.18.3. Инструкция по применению — 1 шт.

2.Степлер линейный режущий, в наборе, в вариантах исполнения:

2.1.Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B, в составе:

2.1.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B – 1 шт.

2.1.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего, в вариантах исполнения, 1-2 шт.:

2.1.2.1 Сменная кассета для степлера линейного режущего - 80мм – Синий арт.ZQ80B

2.1.2.2 Сменная кассета для степлера линейного режущего-80мм – Зеленый арт. ZQ80G

2.1.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.2. Степлер линейный режущий- 60мм - Синий арт.BLC60, в составе (при необходимости):

2.2.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.BLC60 – 1 шт.

2.2.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.BCA60 - 1 шт.

2.2.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.3.Степлер линейный режущий- 60мм - Зеленый арт.GLC60, в составе (при необходимости):

2.3.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.GLC60 – 1шт.

2.3.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.GCA60 - 1 шт.

2.3.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.4.Степлер линейный режущий- 80мм - Белый арт.WLC80, в составе (при необходимости):

2.4.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.WLC80 – 1 шт.

2.4.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.WCA80 - 1 шт.

2.4.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.5. Степлер линейный режущий- 80мм - Синий арт.BLC80, в составе(при необходимости):

2.5.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.BLC80 – 1 шт.

2.5.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Синий арт.BCA80 - 1 шт.

2.5.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.6. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.GLC80, в составе (при необходимости):

2.6.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.GLC80 – 1 шт.

2.6.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.GCA80 - 1 шт.

2.6.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.7. Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.WLC100, в составе (при необходимости):

2.7.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.WLC100 – 1 шт.

2.7.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.WCA100 - 1 шт.

2.7.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.8. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.BLC100, в составе (при необходимости):

2.8.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.BLC100 – 1 шт.

2.8.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.BCA100 - 1 шт.

2.8.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.9. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.GLC100, в составе (при необходимости):

2.9.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.GLC100 – 1 шт.

2.9.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.GCA100 - 1 шт.

2.9.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.10. Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.LQ60W, в составе (при необходимости):

2.10.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.LQ60W – 1 шт.

2.10.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.ZQ60W - 1 шт.

2.10.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.11. Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.LQ60B, в составе (при необходимости):

2.11.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.LQ60B – 1 шт.

2.11.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.ZQ60B - 1 шт.

2.11.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.12. Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.LQ60G, в составе (при необходимости):

2.12.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.LQ60G – 1 шт.

2.12.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.ZQ60G - 1 шт.

2.12.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.13. Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.LQ80W, в составе:

2.13.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.LQ80W – 1 шт.

2.13.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.ZQ80W - 1 шт.

2.13.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.14. Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60, в составе (при необходимости):

2.14.1 Степлер линейный режущий - 60мм – Белый арт.WLC60 – 1 шт.

2.14.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.WCA60 - 1 шт.

2.14.3 Инструкция по применению — 1 шт.

- 2.15. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.LQ80G, в составе (при необходимости):
2.15.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.LQ80G – 1 шт.
2.15.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.ZQ80G - 1 шт.
2.15.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.16. Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.LQ100W, в составе (при необходимости):
2.16.1. Степлер линейный режущий- 100мм - Белый арт.LQ100W – 1шт.
2.16.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.ZQ100W - 1 шт.
2.16.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.17. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.LQ100B, в составе (при необходимости):
2.17.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.LQ100B – 1шт.
2.17.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.ZQ100B (при необходимости) - 1 шт.
2.17.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.18. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.LQ100G, в составе (при необходимости):
2.18.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.LQ100G - 1шт.
2.18.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.ZQ100G (при необходимости) - 1 шт.
2.18.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.19. Степлер линейный режущий – 60мм – Белый арт.SQ60W, в составе (при необходимости):
2.19.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Белый арт.SQ60W – 1 шт.
2.19.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.ZQ60W (при необходимости) - 1 шт.
2.19.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.20. Степлер линейный режущий – 60мм – Синий арт.SQ60B, в составе (при необходимости):
2.20.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Синий арт.SQ60B – 1шт.
2.20.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.ZQ60B (при необходимости) - 1 шт.
2.20.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.21. Степлер линейный режущий – 60мм – Зеленый арт.SQ60G, в составе (при необходимости):
2.21.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Зеленый арт.SQ60G – 1шт.
2.21.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.ZQ60G (при необходимости) - 1 шт.
2.21.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.22. Степлер линейный режущий – 80мм – Белый арт.SQ80W(при необходимости):
2.22.1. Степлер линейный режущий – 80мм – Белый арт.SQ80W – 1шт.
2.22.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.ZQ80W (при необходимости) - 1 шт.
2.22.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.23. Степлер линейный режущий – 80мм – Синий арт.SQ80B, в составе (при необходимости):
2.23.1. Степлер линейный режущий – 80мм – Синий арт.SQ80B – 1 шт.
2.23.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Синий арт.ZQ80B (при необходимости) - 1 шт.
2.23.3. Инструкция по применению — 1 шт.

- 2.24.Степлер линейный режущий – 80мм – Зеленый арт.SQ80G, в составе (при необходимости):
- 2.24.1. Степлер линейный режущий – 80мм – Зеленый арт.SQ80G – 1 шт.
- 2.24.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.ZQ80G (при необходимости) - 1 шт.
- 2.24.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.25.Степлер линейный режущий – 100мм – Белый арт.SQ100W, в составе (при необходимости):
- 2.25.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Белый арт.SQ100W – 1 шт.
- 2.25.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.ZQ100W (при необходимости) - 1 шт.
- 2.25.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.26.Степлер линейный режущий – 100мм – Синий арт.SQ100B, в составе (при необходимости):
- 2.26.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Синий арт.SQ100B – 1 шт.
- 2.26.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.ZQ100B (при необходимости) - 1 шт.
- 2.26.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.27.Степлер линейный режущий – 100мм – Зеленый арт.SQ100G, в составе (при необходимости):
- 2.27.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Зеленый арт.SQ100G – 1 шт.
- 2.27.2.Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.ZQ100G (при необходимости) - 1 шт.
- 2.27.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 3.Степлер хирургический геморроидальный, в наборе, в вариантах исполнения:
- 3.1.Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32, в составе:
- 3.1.1 Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32 – 1шт.
- 3.1.2. Аноскоп - 1 шт.
- 3.1.3. Анальный расширитель – 1шт.
- 3.1.4. Внутренний канал – 1 шт.
- 3.1.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.
- 3.1.6. Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.2.Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPH34, в составе (при необходимости):
- 3.2.1 Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPH34 – 1шт.
- 3.2.2. Аноскоп - 1 шт.
- 3.2.3. Анальный расширитель – 1шт.
- 3.2.4. Внутренний канал – 1 шт.
- 3.2.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.
- 3.2.6. Инструкция по применению - 1 шт.
- 3.3.Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPH32, в составе (при необходимости):
- 3.3.1 Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPH32 – 1 шт.
- 3.3.2. Аноскоп - 1 шт.
- 3.3.3. Анальный расширитель – 1шт.
- 3.3.4. Внутренний канал – 1 шт.
- 3.3.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.
- 3.3.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.4.Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.РРНJ34, в составе (при необходимости):

3.4.1 Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.РРНJ34— 1шт.

3.4.2. Аноскоп - 1 шт.

3.4.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.4.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.4.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.4.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.5.Степлер хирургический геморроидальный-36мм-Черный арт.РРНJ36, в составе (при необходимости):

3.5.1.Степлер хирургический геморроидальный-36мм-Черный арт.РРНJ36 – 1шт.

3.5.2. Аноскоп - 1 шт.

3.5.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.5.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.5.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.5.6. Инструкция по применению - 1 шт.

(по тексту инструмент, степлер, изделие)

1.2. Назначение медицинского изделия

Набор предназначен для наложения хирургических скоб на ткани анального канала с целью лечения геморроя, в частности, для проведения процедуры лечения пролапса и геморроя (изменения положения слизистой оболочки анального канала для снижения притока крови к внутренним геморроидальным узлам), для использования во время открытых хирургических операций (включая абдоминальную, педиатрическую или торакальную хирургию) для быстрого рассечения/резекции тканей и создания анастомозов и эндоскопических операций для быстрого рассечения/резекции тканей и создания анастомоза

Степлер хирургический геморроидальный предназначен для наложения хирургических скоб на ткани анального канала с целью лечения геморроя, в частности, для проведения процедуры лечения пролапса и геморроя (изменения положения слизистой оболочки анального канала для снижения притока крови к внутренним геморроидальным узлам)

Степлер режущий эндоскопический предназначен для использования во время открытых хирургических операций или эндоскопических операций для быстрой резекции и рассечения тканей и создания анастомоза

Степлер линейный режущий предназначен для использования во время открытых хирургических операций (включая абдоминальную, педиатрическую или торакальную хирургию) для быстрого рассечения/резекции тканей и создания анастомозов

1.3. Область применения медицинского изделия

В медицинских учреждениях в отделениях хирургии, эндоскопии, проктологии

1.4. Условия эксплуатации медицинского изделия

• При температуре 10-42 °С, постоянной с погрешностью до $\pm 0,5$ °С.

1.5. Показания к применению

Степлер хирургический геморроидальный:

- Наложения хирургических скоб на ткани анального канала с целью лечения геморроя, в частности, для проведения процедуры лечения пролапса и геморроя

Степлер режущий эндоскопический:

- Быстрое рассечение/резекция тканей и создания анастомоза во время эндоскопической операции

Степлер линейный режущий:

- Быстрое рассечение/резекция тканей и создания анастомозов во время открытых хирургических операций

1.6. Противопоказания

- Изделие не применяется в случаях сильного отека слизистой оболочки, тяжелого фиброза геморроидальных тканей и повторных инъекций склерозанта в геморроидальные ткани.
- Протечка анастомоза.
- Сужение анастомоза.
- Анастомотическое кровотечение или инфекция.
- Не используйте для тканей с ишемией или некрозом.
- Изделие не следует использовать на тканях, таких как печень или селезенка, сжимаемость которых такова, что закрытие инструмента может быть разрушительным.
- Не используйте степлер режущий эндоскопический, если адекватность гемостаза невозможно проверить визуально после применения.
- Изделия не предназначены для применения в тех случаях, когда хирургическое сшивание скобами противопоказано

Побочные эффекты:

Неправильное использование изделия может привести к серьёзным хирургическим последствиям, таким как не герметичность или расхождение шва.

1.7. Предупреждения

1.7.1. Не используйте изделие если упаковка повреждена.

1.7.2. Любое изделие с визуальными и/или сомнительными дефектами следует выбросить и связаться с представителем производителя.

1.7.3. Изделие предназначено для одноразового использования, не используйте и не дезинфицируйте повторно, в противном случае это может привести к неисправности изделия, а затем может стать причиной травмы, заражения или смерти пациента. Повторное использование может вызвать риск заражения пациента.

1.7.4. Неправильное использование изделия, хранение, очистка, стерилизация и другие факторы, не соответствующие инструкции по применению могут влиять на эксплуатационные характеристики изделия.

1.7.5. Изделие должно использоваться только профессиональным хирургом, прошедшим обучение технике сшивания и анастомотической резекции слизистой оболочки, или под руководством лица с соответствующим опытом.

1.7.6. Не пытайтесь использовать изделие, пока не прочтете инструкцию полностью. Любая неосторожность может вызвать риск не успешности операции.

1.7.7. После использования изделие подлежит утилизации.

1.7.8. Если зажимной механизм перестаёт работать и бранши не зажимают ткань, не выполняйте прошивание. (Извлеките инструмент и сменную кассету и утилизируйте.)

1.7.9. Изделие не следует использовать на тканях, таких как печень или селезенка, сжимаемость которых такова, что закрытие инструмента может быть разрушительным.

1.7.10. Не используйте степлер режущий эндоскопический, если адекватность гемостаза невозможно проверить визуально после применения.

1.7.11. Изделие не следует использовать у пациентов с отеком слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, толстыми слоями мышц или плохой способностью к заживлению.

1.7.12. Изделие не следует использовать у пациентов с подозрением на наличие остаточной раковой ткани на краях разреза.

1.7.13. Запрещается использовать изделие для обработки сосудистой ткани

1.7.14 Сменные кассеты с высотой скобы 25 мм подходит для тканей с толщиной сжатия 0,7-1,0 мм. Сменные кассеты со скобами 35 и 38 мм подходят для тканей с толщиной сжатия 1,0-1,7 мм. Сменные кассеты с высотой скобы 45 мм подходит для тканей с толщиной сжатия 1,6-2,4 мм.

1.7.14 Диаметр сменных кассет для минимально инвазивного вмешательства может различаться в зависимости от изготовителя. Когда в ходе процедуры применяются минимально инвазивные инструменты и сменные составляющие разных изготовителей, убедитесь в их совместимости до начала процедуры. Рекомендуем использовать оригинальные сменные составляющие.

1.7.15 Перед артикуляцией и наложением браншей инструмента на ткань убедитесь, что бранши находятся в открытом положении.

1.7.16 Перед прошиванием любым сшивающим степлером необходимо тщательно оценить толщину ткани. Если ткань не поддается без особых усилий к сжатию до высоты закрытой скобы, или же легко сжимается до толщины меньшей, чем высота закрытой скобы, такая ткань не показана для прошивания скобами выбранного размера, так как она может оказаться слишком толстой или тонкой.

1.8. Инструкция по безопасности

- Использовать изделие только в соответствии с инструкцией по применению

- Изделия поставляются стерильными и предназначены для использования только в одной процедуре. После использования изделия необходимо утилизировать. Повторная стерилизация запрещена.

- Перед использованием изделия проверьте, действительны ли сроки годности изделия. Категорически запрещается использовать изделие по истечению срока годности.

- Пожалуйста, проверьте упаковку перед использованием. Не используйте, если упаковка повреждена

- Изделие не применяется при наличии отека, воспаления, опухолей желудка и стенки кишечника.

- Перед использованием изделия проверить стенки желудочно-кишечного тракта. Стенка желудочно-кишечного тракта слишком толстая. Общая толщина двух слоев стенки желудочно-кишечного тракта после сжатия составляет более 2,5~3 мм. Если просвет слишком мал или стенка желудочно-кишечного тракта слишком тонкая, ткань может порваться при установке скобки.

- Сменные кассеты могут быть заменены во время одной и той же операции, каждая сменная кассета упаковывается отдельно.

- Данное изделие могут использовать только квалифицированные врачи (хирурги), прошедшие полную подготовку и имеющие операционные навыки.

- После снятия скоб необходимо проверить наложенную ткань на предмет кровотечения. Если кровотечение обнаружено, необходимо использовать соответствующие методы его остановки.

- Данное изделие является одноразовым, и его повторное использование строго запрещено.

- Перед использованием удалите колпачок, удерживающий скобы, и осмотрите поверхность сменной кассеты. Кассету необходимо заменить, если видны цветные толкатели.

- Бранши степлера должны быть закрыты, чтобы ввести его в полость через троакар соответствующего размера.

- При установке степлера в месте вмешательства убедитесь в том, что между браншами инструмента нет никаких препятствий, таких как зажимы, стенты, проводники и т.д. Прошивание

через препятствие может привести к неполному разрезанию, неправильному формированию скоб и/или невозможности открыть бранши инструмента.

- Убедитесь, что ткань лежит ровно и занимает правильное положение между браншами. «Сморщивание» ткани в складки вдоль сменной кассеты, особенно в месте схождения браншей, может привести к образованию несплошного скобочного шва. Дистальные чёрные линии на верхней бранше и нижней бранше (кассетной) указывают на концы скобочного шва. Линия на кассетной бранше, помеченная как «разрез», указывает на линию разреза изделием.

- Прежде, чем перезарядить инструмент, держите его в вертикальном положении, причём бранши должны быть полностью погружены в стерильный раствор. Энергично встряхните инструмент, а затем протрите внутренние и внешние поверхности бранши, чтобы удалить с инструмента все неиспользованные скобы. Не используйте инструмент до того, пока осмотр не подтвердит отсутствие скоб на бранше.

- Перед тем, как извлечь инструмент, убедитесь, что бранши не захватывают ткань, а затем закройте бранши.

1.9. Класс риска и применимые классификационные правила

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	312980 Степлер режущий эндоскопический 312980 Степлер линейный режущий 248160 Степлер хирургический геморроидальный
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Решение ЕЭК № 173 от 22.12.2015)	26
Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности	32.50.13.190

1.10. Разработчик медицинского изделия

Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
(Бухи Беиен Сургеры Девике Цо., Лтд)
No. 26 Youshen Road, Xishan District
Wuxi, Jiangsu
P.R. China

тел.+86-510-83782500
service@beien-surgery.com

1.11. Производитель медицинского изделия

Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
(Бухи Беиен Сургеры Девике Цо., Лтд)
No. 26 Youshen Road, Xishan District
Wuxi, Jiangsu
P.R. China

тел.+86-510-83782500
service@beien-surgery.com

Место производства: Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
 No. 26 Youshen Road, Xishan District
 Wuxi, 214192 Jiangsu
 P.R. China

1.12. Состав медицинского изделия, перечень исполнений

Степлер режущий эндоскопический

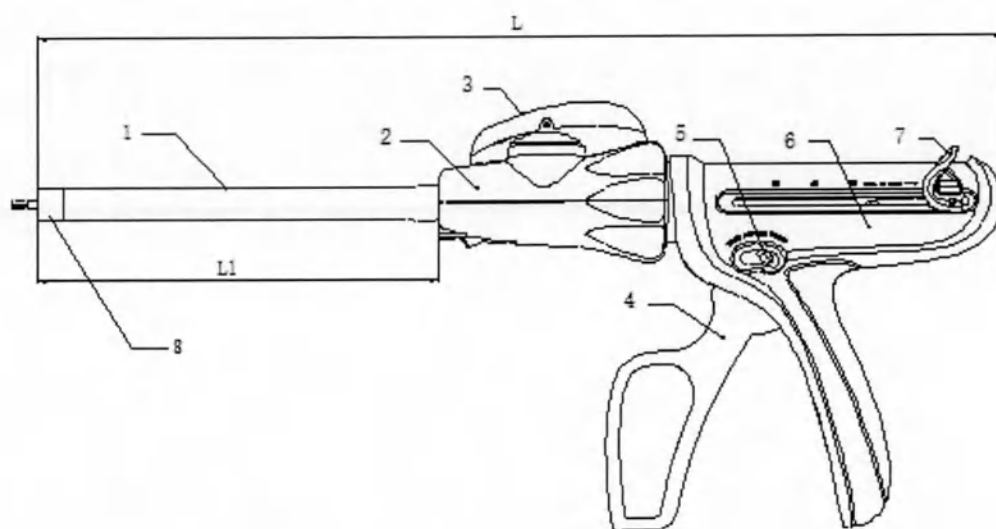


Рисунок 1- Степлер режущий эндоскопический (ELS12, ELSC, ELST, ELSJ)

1.Ствол степлера 2. Корпус ручки регулировки величины зазора скоб 3. Ручка поворота сменной кассеты 4. Ручка для сшивания(закрытия) 5. Предохранитель 6. Корпус ручки степлера 7. Ползунок раскрытия бранши 8. Соединительное кольцо



Степлер режущий эндоскопический (ELS12, ELSC, ELST, ELSJ)	длина ствола (L1)	Допуск
Короткий	60 мм	±3 мм
Обычный	160 мм	
Дополнительный	260 мм	

L-общая длина, L1- длина ствола

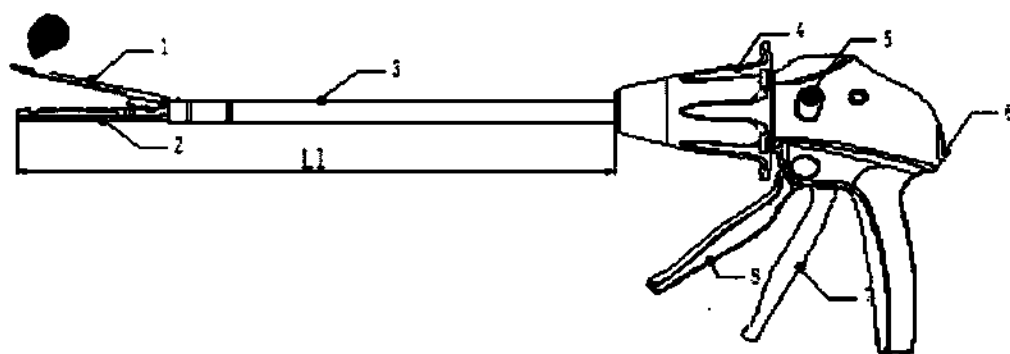


Рисунок 2- Степлер режущий эндоскопический (ELSQ)

1. Верхняя бранша 2. Нижняя бранша 3.Ствол степлера 4. Ручка регулировки величины зазора скоб 5.Реверс ножа 6. Ползунок раскрытия бранши 7. Ручка для сшивания(закрытия) 8. Спусковой крючок

L1- длина блока перезарядки

Степлер режущий эндоскопический	Длина блока перезарядки (L1), мм	Допуск
ELSQ-45S (Короткий)	270	±10 мм
ELSQ-45C (Обычный)	330	
ELSQ-45E (Дополнительный)	430	
ELSQ-60S (Короткий)	280	
ELSQ-60C (Обычный)	340	
ELSQ-60E (Дополнительный)	440	

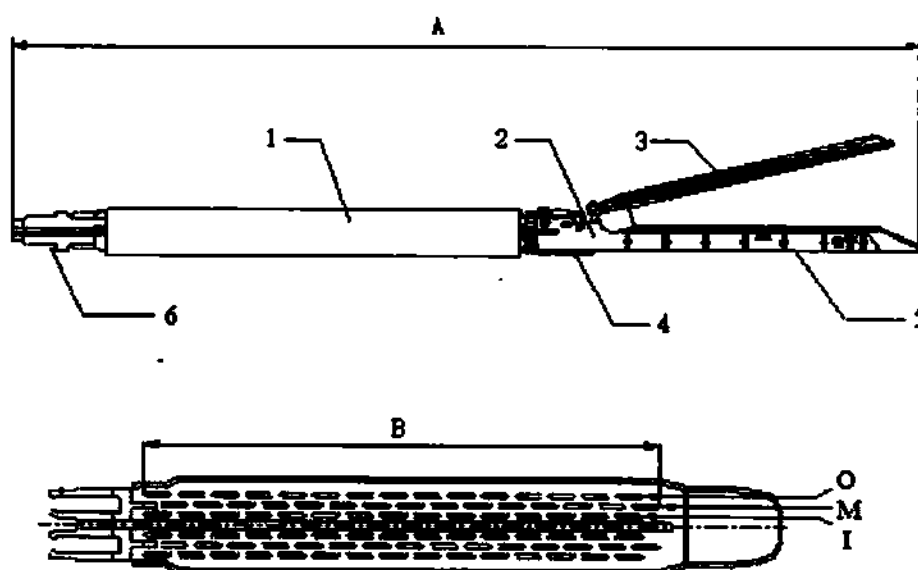


Рисунок 3 - Сменная кассета

1.Ствол степлера 2. Отсек для сменной кассеты 3. Верхняя бранша 4.Крепление сменной кассеты к стволу степлера 5. Нижняя бранша 6. Соединительная часть сменной кассеты

А- длина сменной кассеты
 В- длина сменной кассеты со скобами
 О – скоба наружная
 М – скоба средняя
 ● – внутренняя скоба

Степлер линейный режущий

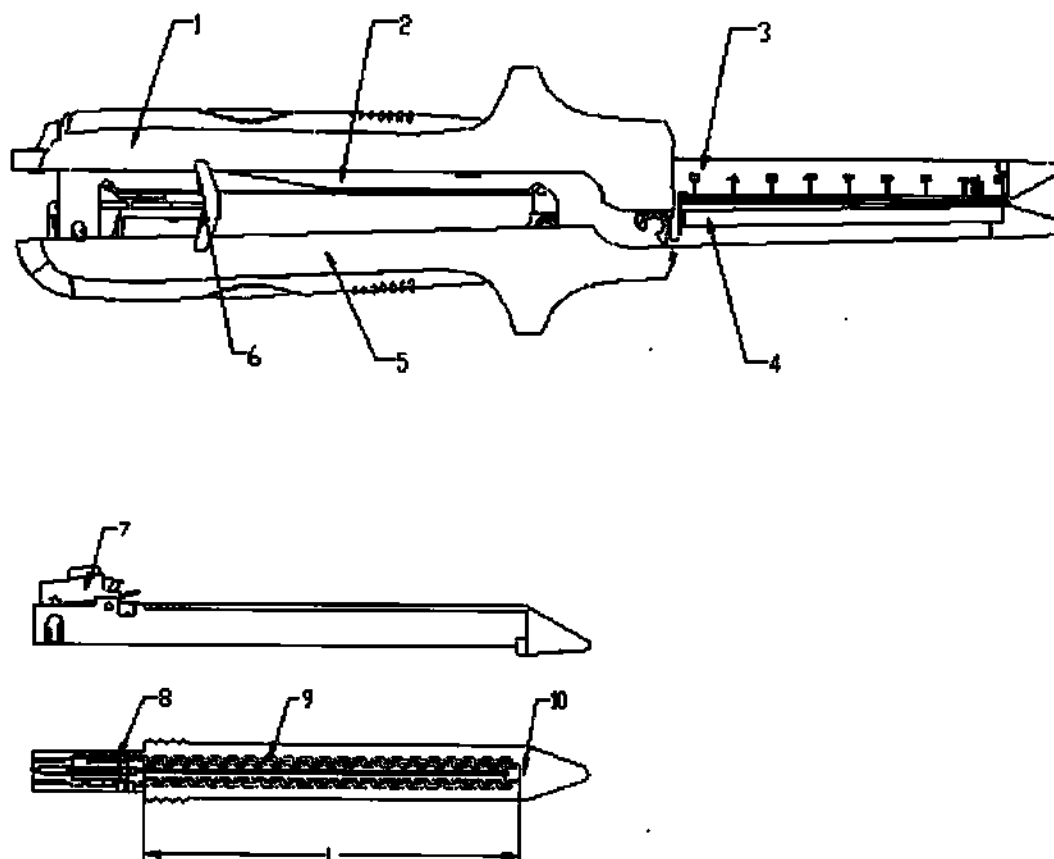


Рисунок 4- Степлер линейный режущий и сменная кассета

1. Верхняя часть степлера 2. Блок-заглушка 3. Верхняя бранша 4.Наковальня нижней бранши
 5. Нижняя часть степлера 6.Ползунок прошивания 7. Нож 8. Поверхность захвата сменной кассеты. 9. Скоба 10.Сменная кассета

Степлер хирургический геморроидальный

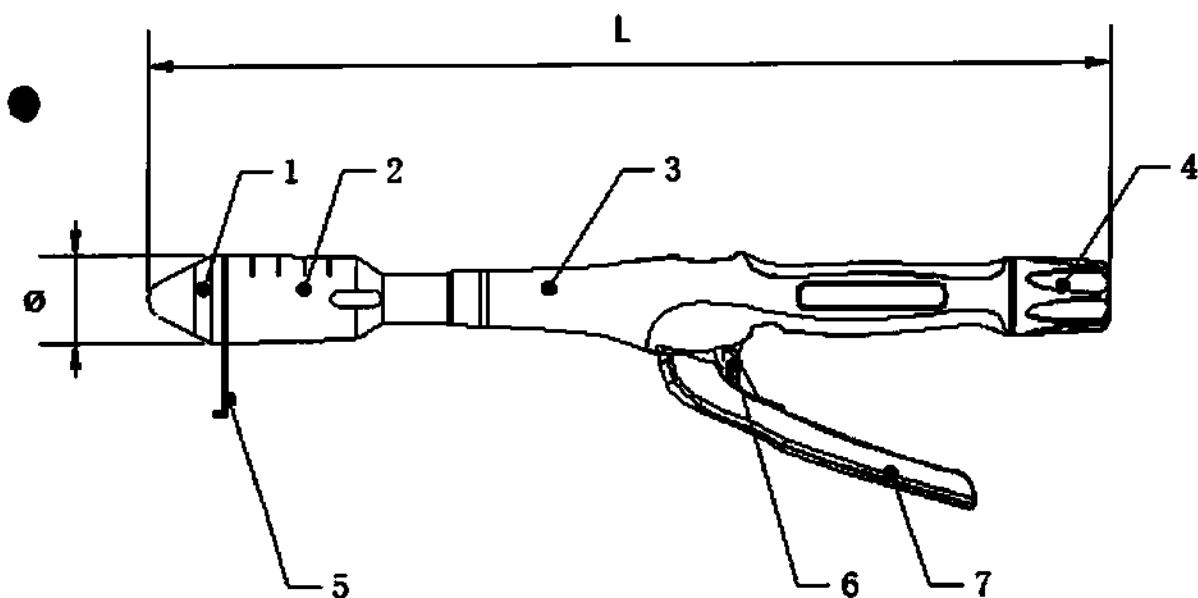


Рисунок 5- Степлер хирургический геморроидальный

1. Головка 2.Сменная кассета со скобами 3. Корпус рукоятки 4. Ручка регулировки величины зазора скоб 5. Колпачок, удерживающий скобы 6. Предохранитель 7. Ручка для сшивания

L- общая длина степлера, Ø- диаметр головки

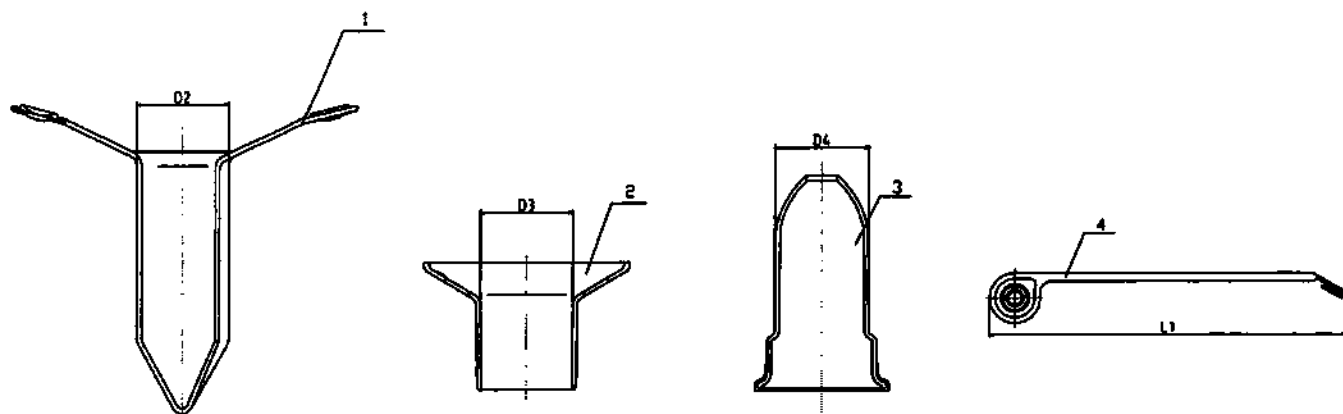


Рисунок 6 – Составляющие степлера хирургического геморроидального

1. Аноскоп 2. Анальный расширитель 3. Внутренний канал 4. Крючковая игла (шовный продвигатель)

Комплектность:

Степлер одноразовый, в наборе, в вариантах исполнения:

1. Степлер режущий эндоскопический, в наборе, в вариантах исполнения:

1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E, в составе:

1.1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E – 1 шт.

1.1.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения - 1-54 шт.:

- [illegible]

- 1.1.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.1.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.1.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.1.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.1.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.1.2.52. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Белый арт. WS45
- 1.1.2.53. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм - Золотой арт. PR60J
- 1.1.2.54. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт. PR30M
- 1.1.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.2.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELS12-С, в составе (при необходимости):

- 1.2.1 Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELS12-С-1 шт.
- 1.2.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.2.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
 - 1.2.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30
 - 1.2.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
 - 1.2.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
 - 1.2.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
 - 1.2.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
 - 1.2.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
 - 1.2.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
 - 1.2.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.2.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 - 1.2.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 - 1.2.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 - 1.2.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.2.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.2.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.2.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.2.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.2.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.2.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.2.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 - 1.2.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TC60P
 - 1.2.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.2.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
 - 1.2.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
 - 1.2.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
 - 1.2.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
 - 1.2.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T

- [illegible]

- [illegible]

- 1.3.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELS12-E – 1 шт.
1.3.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
1.3.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
1.3.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30

- 1.3.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
- 1.3.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
- 1.3.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
- 1.3.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
- 1.3.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
- 1.3.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
- 1.3.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
- 1.3.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
- 1.3.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
- 1.3.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
- 1.3.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
- 1.3.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
- 1.3.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
- 1.3.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
- 1.3.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
- 1.3.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
- 1.3.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
- 1.3.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
- 1.3.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TC60P
- 1.3.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
- 1.3.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
- 1.3.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
- 1.3.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
- 1.3.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
- 1.3.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T
- 1.3.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D
- 1.3.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D
- 1.3.2.30.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.TS30D
- 1.3.2.31.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.3.2.32.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.3.2.33.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.3.2.34.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.3.2.35.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.TC30T
- 1.3.2.36.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.TC45T
- 1.3.2.37.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.TC60T
- 1.3.2.38.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.TC30P

- [illegible]

- 1.3.2.84.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.PR30B
- 1.3.2.85.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.PR60W
- 1.3.2.86.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.PR45W
- 1.3.2.87.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.PR30W
- 1.3.2.88.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.PR60M
- 1.3.2.89.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.PR45M
- 1.3.2.90.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.PR30M
- 1.3.2.91.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.CR60G
- 1.3.2.92.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.CR45G
- 1.3.2.93.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.CR30G
- 1.3.2.94.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.CR30W
- 1.3.2.95.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.CR45J
- 1.3.2.96.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.CR30J
- 1.3.2.97.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.CR60B
- 1.3.2.98.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.CR45B
- 1.3.2.99.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.CR30B
- 1.3.2.100.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.CR60W
- 1.3.2.101.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.CR45W
- 1.3.2.102.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.GS45
- 1.3.2.103.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.GR60
- 1.3.2.104.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.GR45
- 1.3.2.105.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.GR30
- 1.3.2.106.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.BR60
- 1.3.2.107.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.BR45
- 1.3.2.108.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.BR30
- 1.3.2.109.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.WR60
- 1.3.2.110.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.WR45
- 1.3.2.111.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.WR30
- 1.3.2.112.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.GS60
- 1.3.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.4. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSC-S, в составе (при необходимости):

- 1.4.1. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSC-S- 1 шт.
- 1.4.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.4.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.PR30M
 - 1.4.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.PR45M
 - 1.4.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.PR60M
 - 1.4.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.PR30W
 - 1.4.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.PR45W
 - 1.4.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.PR60W
 - 1.4.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.PR30B
 - 1.4.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.PR45B
 - 1.4.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.PR60B
 - 1.4.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.PR30J
 - 1.4.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.PR45J
 - 1.4.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.PR60J
 - 1.4.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.PR30G
 - 1.4.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.PR45G
 - 1.4.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.PR60G
- 1.4.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.5. Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELSC-C, в составе (при необходимости):

- 1.7.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.CR30G
- 1.7.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.CR45G
- 1.7.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.CR60G
- 1.7.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TL30H
- 1.7.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TL45H
- 1.7.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TL60H
- 1.7.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TL30W
- 1.7.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TL45W
- 1.7.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TL60W
- 1.7.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TL30B
- 1.7.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TL45B
- 1.7.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TL60B
- 1.7.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TL30J
- 1.7.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TL45J
- 1.7.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TL60J
- 1.7.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TL30G
- 1.7.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TL45G
- 1.7.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TL60G
- 1.7.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.TS30T
- 1.7.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.TS45T
- 1.7.2.30.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.TS60T
- 1.7.2.31.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.TS30P
- 1.7.2.32.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.TS45P
- 1.7.2.33.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.TS60P
- 1.7.2.34.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.TS30D
- 1.7.2.35.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D
- 1.7.2.36.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D
- 1.7.2.37.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TF30H
- 1.7.2.38.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TF45H
- 1.7.2.39.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TF60H
- 1.7.2.40.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TF30W
- 1.7.2.41.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TF45W
- 1.7.2.42.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.TF60W
- 1.7.2.43.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.TF30B
- 1.7.2.44.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.TF45B
- 1.7.2.45.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.TF60B
- 1.7.2.46.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TF30J
- 1.7.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.7.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.7.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.7.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.7.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.7.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.8.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELST-C, в составе (при необходимости):

1.8.1. Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELST-C – 1 шт.

- [illegible]

- 1.8.2.46.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.TF30J
- 1.8.2.47.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.TF45J
- 1.8.2.48.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.TF60J
- 1.8.2.49.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.TF30G
- 1.8.2.50.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.TF45G
- 1.8.2.51.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.TF60G
- 1.8.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.9.Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S, в составе (при необходимости):

- 1.9.1. Степлер режущий эндоскопический - Короткий арт.ELS12-S -1 шт.
- 1.9.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.9.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.MS30
 - 1.9.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.WS30
 - 1.9.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.WS45
 - 1.9.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.WS60
 - 1.9.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.BS30
 - 1.9.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.BS45
 - 1.9.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.BS60
 - 1.9.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического - 30мм – Зеленый арт.GS30
 - 1.9.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.9.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 - 1.9.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 - 1.9.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 - 1.9.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.9.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.9.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.9.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.9.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
 - 1.9.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 - 1.9.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 - 1.9.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 - 1.9.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 - 1.9.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.9.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
 - 1.9.2.24.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
 - 1.9.2.25.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
 - 1.9.2.26.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
 - 1.9.2.27.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T
 - 1.9.2.28.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.TS60D
 - 1.9.2.29.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.TS45D

- [illegible]

- 1.9.2.71.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.TL45W
- 1.9.2.72.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.TL30W
- 1.9.2.73.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.TL60H
- 1.9.2.74.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.TL45H
- 1.9.2.75.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.TL30H
- 1.9.2.76.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.PR60G
- 1.9.2.77.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.PR45G
- 1.9.2.78.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.CR60J
- 1.9.2.79.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.PR60J
- 1.9.2.80.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.PR45J
- 1.9.2.81.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.PR30J
- 1.9.2.82.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.PR60B
- 1.9.2.83.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.PR45B
- 1.9.2.84.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.PR30B
- 1.9.2.85.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.PR60W
- 1.9.2.86.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.PR45W
- 1.9.2.87.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.PR30W
- 1.9.2.88.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.PR60M
- 1.9.2.89.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.PR45M
- 1.9.2.90.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт.PR30M
- 1.9.2.91.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.CR60G
- 1.9.2.92.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.CR45G
- 1.9.2.93.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.CR30G
- 1.9.2.94.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Белый арт.CR30W
- 1.9.2.95.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.CR45J
- 1.9.2.96.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Золотой арт.CR30J
- 1.9.2.97.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.CR60B
- 1.9.2.98.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Синий арт.CR45B
- 1.9.2.99.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Синий арт.CR30B
- 1.9.2.100.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.CR60W
- 1.9.2.101.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.CR45W
- 1.9.2.102.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.GS45
- 1.9.2.103.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.GR60
- 1.9.2.104.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.GR45
- 1.9.2.105.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.GR30
- 1.9.2.106.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.BR60
- 1.9.2.107.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.BR45
- 1.9.2.108.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.BR30
- 1.9.2.109.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.WR60
- 1.9.2.110.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.WR45
- 1.9.2.111.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Зеленый арт.WR30
- 1.9.2.112.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.GS60
- 1.9.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.10. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSJ-S, в составе (при необходимости):

1.10.1. Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELSJ-S – 1 шт.

1.10.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.10.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T

1.10.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T

- 1.10.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
- 1.10.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
- 1.10.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
- 1.10.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
- 1.10.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
- 1.10.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
- 1.10.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
- 1.10.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
- 1.10.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T
- 1.10.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
- 1.10.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
- 1.10.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
- 1.10.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
- 1.10.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
- 1.10.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
- 1.10.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
- 1.10.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 1.11.Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELSJ-C, в составе (при необходимости):
 - 1.11.1. Степлер режущий эндоскопический – Обычный арт.ELSJ-C – 1 шт.
 - 1.11.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:
 - 1.11.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T
 - 1.11.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T
 - 1.11.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T
 - 1.11.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P
 - 1.11.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P
 - 1.11.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P
 - 1.11.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D
 - 1.11.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D
 - 1.11.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D
 - 1.11.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T
 - 1.11.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T

1.11.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T
 1.11.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P
 1.11.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P
 1.11.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P
 1.11.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D
 1.11.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D
 1.11.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
 1.11.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.12.Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELSJ-E, в составе (при необходимости):

1.12.1 Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELSJ-E – 1 шт.

1.12.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического, в вариантах исполнения -1 шт.:

1.12.2.1.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JS30T

1.12.2.2.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JS45T

1.12.2.3.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JS60T

1.12.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JS30P

1.12.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JS45P

1.12.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JS60P

1.12.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JS30D

1.12.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JS45D

1.12.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JS60D

1.12.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Коричневый арт.JC30T

1.12.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Коричневый арт.JC45T

1.12.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Коричневый арт.JC60T

1.12.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Фиолетовый арт.JC30P

1.12.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Фиолетовый арт.JC45P

1.12.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Фиолетовый арт.JC60P

1.12.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Черный арт.JC30D

1.12.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.JC45D

1.12.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D

1.12.3. Инструкция по применению — 1 шт.

1.13.Степлер режущий эндоскопический –45мм – Короткий арт.ELSQ-45S, в составе (при необходимости):

- 1.18.2.4.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.ER60W
- 1.18.2.5.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.ER60H
- 1.18.2.6.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.ER45G
- 1.18.2.7.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.ER45J
- 1.18.2.8.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.ER45B
- 1.18.2.9.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.ER45W
- 1.18.2.10.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт.ER45H
- 1.18.2.11.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Золотой арт.QR60J
- 1.18.2.12.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Зеленый арт.QR60G
- 1.18.2.13.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.QR60D
- 1.18.2.14.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Зеленый арт.QR45G
- 1.18.2.15.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Черный арт.QR45D
- 1.18.2.16.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Серый арт.QR60H
- 1.18.2.17.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Белый арт.QR60W
- 1.18.2.18.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Синий арт.QR60B
- 1.18.2.19.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм – Черный арт.JC60D
- 1.18.2.20.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Серый арт. QR45H
- 1.18.2.21.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Белый арт.QR45W
- 1.18.2.22.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм - Синий арт.QR45B
- 1.18.2.23.Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-45мм – Золотой арт.QR45J
- 1.18.3. Инструкция по применению — 1 шт.

2.Степлер линейный режущий, в наборе, в вариантах исполнения:

2.1.Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B, в составе:

- 2.1.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B – 1 шт.
- 2.1.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего, в вариантах исполнения. 1-2 шт.:
 - 2.1.2.1 Сменная кассета для степлера линейного режущего - 80мм – Синий арт.ZQ80B
 - 2.1.2.2 Сменная кассета для степлера линейного режущего-80мм – Зеленый арт. ZQ80G
- 2.1.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.2. Степлер линейный режущий- 60мм - Синий арт.BLC60, в составе (при необходимости):

- 2.2.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.BLC60 – 1 шт.
- 2.2.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.BCA60 - 1 шт.
- 2.2.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.3.Степлер линейный режущий- 60мм - Зеленый арт.GLC60, в составе (при необходимости):

- 2.3.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.GLC60 – 1шт.
- 2.3.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.GCA60 - 1 шт.
- 2.3.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.4.Степлер линейный режущий- 80мм - Белый арт.WLC80, в составе (при необходимости):

- 2.4.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.WLC80 – 1 шт.
- 2.4.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.WCA80 - 1 шт.
- 2.4.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.5.Степлер линейный режущий- 80мм - Синий арт.BLC80, в составе(при необходимости):

- 2.5.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.BLC80 – 1 шт.
- 2.5.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Синий арт.BCA80 - 1 шт.
- 2.5.3 Инструкция по применению — 1 шт.

2.6.Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.GLC80, в составе (при необходимости):

- 2.6.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.GLC80 – 1 шт.

- 2.6.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.GCA80 - 1 шт.
- 2.6.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.7.Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.WLC100, в составе (при необходимости):
- 2.7.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.WLC100 – 1 шт.
- 2.7.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.WCA100 - 1 шт.
- 2.7.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.8.Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.BLC100, в составе (при необходимости):
- 2.8.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.BLC100 – 1 шт.
- 2.8.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.BCA100 - 1 шт.
- 2.8.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.9.Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.GLC100, в составе (при необходимости):
- 2.9.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.GLC100 – 1 шт.
- 2.9.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.GCA100 - 1 шт.
- 2.9.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.10. Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.LQ60W, в составе (при необходимости):
- 2.10.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.LQ60W – 1 шт.
- 2.10.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.ZQ60W - 1 шт.
- 2.10.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.11.Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.LQ60B, в составе (при необходимости):
- 2.11.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Синий арт.LQ60B – 1 шт.
- 2.11.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.ZQ60B - 1 шт.
- 2.11.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.12.Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.LQ60G, в составе (при необходимости):
- 2.12.1. Степлер линейный режущий- 60мм – Зеленый арт.LQ60G – 1 шт.
- 2.12.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.ZQ60G - 1 шт.
- 2.12.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.13.Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.LQ80W, в составе:
- 2.13.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Белый арт.LQ80W – 1 шт.
- 2.13.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.ZQ80W - 1 шт.
- 2.13.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.14.Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60, в составе (при необходимости):
- 2.14.1 Степлер линейный режущий - 60мм – Белый арт.WLC60 – 1 шт.
- 2.14.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.WCA60 - 1 шт.
- 2.14.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.15.Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.LQ80G, в составе (при необходимости):
- 2.15.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Зеленый арт.LQ80G – 1 шт.
- 2.15.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.ZQ80G - 1 шт.
- 2.15.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.16.Степлер линейный режущий- 100мм – Белый арт.LQ100W, в составе (при необходимости):
- 2.16.1. Степлер линейный режущий- 100мм - Белый арт.LQ100W – 1шт.
- 2.16.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.ZQ100W - 1 шт.
- 2.16.3 Инструкция по применению — 1 шт.

- 2.17.Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.LQ100B, в составе (при необходимости):
2.17.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Синий арт.LQ100B – 1шт.
2.17.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.ZQ100B (при необходимости) - 1 шт.
2.17.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.18.Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.LQ100G, в составе (при необходимости):
2.18.1. Степлер линейный режущий- 100мм – Зеленый арт.LQ100G - 1шт.
2.18.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.ZQ100G (при необходимости) - 1 шт.
2.18.3 Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.19.Степлер линейный режущий – 60мм – Белый арт.SQ60W, в составе (при необходимости):
2.19.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Белый арт.SQ60W – 1 шт.
2.19.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.ZQ60W (при необходимости) - 1 шт.
2.19.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.20.Степлер линейный режущий – 60мм – Синий арт.SQ60B, в составе (при необходимости):
2.20.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Синий арт.SQ60B – 1шт.
2.20.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Синий арт.ZQ60B (при необходимости) - 1 шт.
2.20.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.21.Степлер линейный режущий – 60мм – Зеленый арт.SQ60G, в составе (при необходимости):
2.21.1. Степлер линейный режущий – 60мм – Зеленый арт.SQ60G – 1шт.
2.21.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Зеленый арт.ZQ60G (при необходимости) - 1 шт.
2.21.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.22.Степлер линейный режущий – 80мм – Белый арт.SQ80W(при необходимости):
2.22.1. Степлер линейный режущий – 80мм – Белый арт.SQ80W – 1шт.
2.22.2.Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Белый арт.ZQ80W (при необходимости) - 1 шт.
2.22.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.23.Степлер линейный режущий – 80мм – Синий арт.SQ80B, в составе (при необходимости):
2.23.1.Степлер линейный режущий – 80мм – Синий арт.SQ80B – 1 шт.
2.23.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Синий арт.ZQ80B (при необходимости) - 1 шт.
2.23.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.24.Степлер линейный режущий – 80мм – Зеленый арт.SQ80G, в составе (при необходимости):
2.24.1. Степлер линейный режущий – 80мм – Зеленый арт.SQ80G – 1 шт.
2.24.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 80мм – Зеленый арт.ZQ80G (при необходимости) - 1 шт.
2.24.3. Инструкция по применению — 1 шт.
- 2.25.Степлер линейный режущий – 100мм – Белый арт.SQ100W, в составе (при необходимости):
2.25.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Белый арт.SQ100W – 1 шт.

2.25.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Белый арт.ZQ100W (при необходимости) - 1 шт.

2.25.3. Инструкция по применению — 1 шт.

2.26.Степлер линейный режущий – 100мм – Синий арт.SQ100B, в составе (при необходимости):

2.26.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Синий арт.SQ100B – 1 шт.

2.26.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Синий арт.ZQ100B (при необходимости) - 1 шт.

2.26.3. Инструкция по применению — 1 шт.

2.27.Степлер линейный режущий – 100мм – Зеленый арт.SQ100G, в составе (при необходимости):

2.27.1.Степлер линейный режущий – 100мм – Зеленый арт.SQ100G – 1 шт.

2.27.2.Сменная кассета для степлера линейного режущего- 100мм – Зеленый арт.ZQ100G (при необходимости) - 1 шт.

2.27.3. Инструкция по применению — 1 шт.

3.Степлер хирургический геморроидальный, в наборе, в вариантах исполнения:

3.1.Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32, в составе:

3.1.1 Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32 – 1шт.

3.1.2. Аноскоп - 1 шт.

3.1.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.1.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.1.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.1.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.2.Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPH34, в составе (при необходимости):

3.2.1 Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPH34 – 1шт.

3.2.2. Аноскоп - 1 шт.

3.2.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.2.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.2.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.2.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.3.Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPH32, в составе (при необходимости):

3.3.1 Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPH32 – 1 шт.

3.3.2. Аноскоп - 1 шт.

3.3.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.3.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.3.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.3.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.4.Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPHJ34, в составе (при необходимости):

3.4.1 Степлер хирургический геморроидальный-34мм-Зеленый арт.PPHJ34– 1шт.

3.4.2. Аноскоп - 1 шт.

3.4.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.4.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.4.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.4.6. Инструкция по применению - 1 шт.

3.5.Степлер хирургический геморроидальный-36мм-Черный арт.РРНJ36, в составе (при необходимости):

3.5.1.Степлер хирургический геморроидальный-36мм-Черный арт.РРНJ36 – 1шт.

3.5.2. Аноскоп - 1 шт.

3.5.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.5.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.5.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.

3.5.6. Инструкция по применению - 1 шт.

1.13. Перечень принадлежностей

-

1.14. Общее описание основных функциональных элементов, частей, состав, функциональные возможности

Степлер хирургический геморроидальный

Общий вид изделия представлен на рисунке 5. Два ступенчатых ряда скоб, расположенных в шахматном порядке, создают замкнутый шов в виде круга. В головку интегрирован нож для одновременной резекции ткани во время прошивания. Характеристики изделия представлены в таблице 1.

Аноскоп, представляющий собой пластиковую трубку. С его помощью можно удобно провести манипуляции и осмотреть область операционного поля. (см. рис. 6(1)).

Анальный расширитель и внутренний канал представляют собой пластиковое изделие для расширения анального отверстия (см. рис.6 (2,3)). Крючковая игла (шовный продеватель) представляет собой пластиковую иглу с крючком для захвата шовного материала (см. рис.6(4)).

Таблица 1.1. - Характеристики изделия

Артикул	Диаметр рабочей части, мм/допуск, мм	Диаметр ножа, мм ±5%	Внутренний диаметр, мм/допуск, мм	Цветовая кодировка магазина со скобами (сменной кассеты)	Высота скоб до прошивания, мм ±0,5 мм	Размеры зазоров прошивания, мм ±5%	Общая длина степлера, мм ±5%	Масса, г ±5%
арт.РРНJ32	32/± 0,8	24	23/± 0,5	Фиолетовый	4	4	394	330
арт.РРНJ34	34/± 0,8	26	25/± 0,5	Зеленый	4	4	394	330
арт. РРНJ32	32/± 2	23	23/± 1	Фиолетовый	3.8	3.2	394	350
арт.РРНJ34	34/± 2	25	25/± 1	Зеленый	3.9	3.2	394	350
арт.РРНJ36	36/± 2	27	27/± 1	Черный	3.9	3.2	394	350

Таблица 1.2- Характеристики составляющих степлера

Наименование	Диаметр, мм ± 2 мм	Общая длина, мм ± 10 мм	Масса,г±5%
Аноскоп	34.5	110	12
Анальный расширитель	38.5	46	12

Внутренний канал	35.5	80	16
Крючковая игла (шовный продеватель)	3	130	1,5

Степлер линейный режущий

Общий вид изделия представлен на рисунке 4. Обеспечивают формирование четырехрядного линейного скобочного шва с одномоментным рассечением ткани.

Состоит из двух частей – верхней бранши и нижней бранши с кассетой, встроенной в степлер. Сведение/разведение двух половин инструмента осуществляется при помощи блока-заглушки. Прошивание производится с одновременным рассечением ткани при помощи специального ползунка. Скобы в кассете расположены в шахматном порядке для равномерного распределения давления на ткань после прошивания и герметичности их соединения. Сменная кассета, имеет цветовую кодировку в зависимости от толщины ткани, которую возможно сменить в течение одной операции у одного пациента до 7 раз и произвести до 8 прошиваний.

Таблица 2.1- Характеристики степлеров

Артикул	Цвет кассеты	Длина шва, мм (допуск ±2 мм)	Высота открытой скобы, мм (допуск ±2 мм)	Высота закрытой скобы, мм ±5%	Габаритные размеры степлера, мм ±5%	Масса, г ±5%
арт. WLC60	Белый	61	2.5	1.0	252	340
арт. BLC60	Синий	61	3.8	1.7	252	340
арт. GLC60	Зеленый	61	4.5	1.9	252	340
арт. WLC80	Белый	81	2.5	1.0	272	360
арт. BLC80	Синий	81	3.8	1.7	272	360
арт. GLC80	Зеленый	81	4.5	1.9	272	360
арт. WLC100	Белый	101	2.5	1.0	316	470
арт. BLC100	Синий	101	3.8	1.7	316	470
арт. GLC100	Зеленый	101	4.5	1.9	316	470
арт. LQ60W	Белый	63	2.5	1.0	252	340
арт. LQ60B	Синий	63	3.8	1.7	252	340
арт. LQ60G	Зеленый	63	4.8	2.0	252	340
арт. LQ80W	Белый	83	2.5	1.0	272	360
арт. LQ80B	Синий	83	3.8	1.7	272	360
арт. LQ80G	Зеленый	83	4.8	2.0	272	360
арт. LQ100W	Белый	103	2.5	1.0	316	470
арт. LQ100B	Синий	103	3.8	1.7	316	470
арт. LQ100G	Зеленый	103	4.8	2.0	316	470
арт. SQ60W	Белый	61	2.5	1.0	252	340
арт. SQ60B	Синий	61	3.8	1.7	252	340
арт. SQ60G	Зеленый	61	4.8	2.0	252	340
арт. SQ80W	Белый	81	2.5	1.0	272	360
арт. SQ80B	Синий	81	3.8	1.7	272	360
арт. SQ80G	Зеленый	81	4.8	2.0	272	360
арт. SQ100W	Белый	101	2.5	1.0	316	470
арт. SQ100B	Синий	101	3.8	1.7	316	470
арт. SQ100G	Зеленый	101	4.8	2.0	316	470

Таблица 2.2- Характеристики сменной кассеты

Артикул	Цвет кассеты	Длина шва, мм (допуск ± 2 мм)	Высота открытой скобы, мм $\pm 5\%$	Высота закрытой скобы, мм (допуск $\pm 0,2$ мм)	Общая длина сменной кассеты, мм $\pm 5\%$	Масса, г $\pm 5\%$
арт. WCA60	Белый	61	2.5	1.0	100	16
арт. BCA60	Синий	61	3.8	1.7	100	16
арт. GCA60	Зеленый	61	4.5	1.9	100	16
арт. WCA80	Белый	81	2.5	1.0	120	18
арт. BCA80	Синий	81	3.8	1.7	120	18
арт. GCA80	Зеленый	81	4.5	1.9	120	18
арт. WCA100	Белый	101	2.5	1.0	135	20
арт. BCA100	Синий	101	3.8	1.7	135	20
арт. GCA100	Зеленый	101	4.5	1.9	135	20
арт. ZQ60W	Белый	63	2.5	1.0	103	20
арт. ZQ60B	Синий	63	3.8	1.7	103	20
арт. ZQ60G	Зеленый	63	4.8	2.0	103	20
арт. ZQ80W	Белый	83	2.5	1.0	123	23
арт. ZQ80B	Синий	83	3.8	1.7	123	23
арт. ZQ80G	Зеленый	83	4.8	2.0	123	23
арт. ZQ100W	Белый	103	2.5	1.0	143	25
арт. ZQ100B	Синий	103	3.8	1.7	143	25
арт. ZQ100G	Зеленый	103	4.8	2.0	143	25

Степлер режущий эндоскопический и блок перезагрузки

Общий вид представлен на рисунке 1-3. Ствол рабочей части степлера вращается на 360° позволяя расположить кассету в необходимой плоскости. Сменные кассеты с одинаковым и разным уровнем скоб с длиной шва 30, 45, 60 мм для тканей различной толщины: от сосудистой до сверхутолщенной. Блокирующий предохранитель инструментов не допускает работу с использованной кассетой.

Таблица 3.1- Характеристики степлеров

Артикул	Тип степлера	Длина шва, мм $\pm 5\%$	Длина ствола, мм $\pm 5\%$	Масса, г $\pm 5\%$
арт. ELS12-S	Короткий	-	278	206
арт. ELS12-C	Обычный	-	378	242
арт. ELS12-E	Дополнительный	-	478	271
арт. ELSC-S	Короткий	-	286	206
арт. ELSC-C	Обычный	-	378	242
арт. ELSC-E	Дополнительный	-	478	271
арт. ELST-S	Короткий	-	285	236
арт. ELST-C	Обычный	-	377	272
арт. ELST-E	Дополнительный	-	477	315
арт. ELSJ-S	Короткий	-	286	226
арт. ELSJ-C	Обычный	-	378	260
арт. ELSJ-E	Дополнительный	-	478	303
арт. ELSQ-45S	Короткий	45	270	530

арт.ELSQ-45C	Обычный	44	330	590
арт.ELSQ-45E	Дополнительный	45	430	650
арт.ELSQ-60S	Короткий	60	280	530
арт.ELSQ-60C	Обычный	60	278	206
арт.ELSQ-60E	Дополнительный	60	378	242

Таблица 3.2- Характеристики сменной кассеты

Артикул	Цвет кассеты	Длина шва, мм ±5%	Кол-во рядов	Высота открытой скобы, мм ±5%	Высота закрытой скобы, мм ±5%	Длина сменной кассеты, мм ±5%	Масса, г ±5%
MS30	Серый	30	6	2.0	0.75	170	30
WS30	Белый	30	6	2.5	1.0	170	31
WS45	Белый	45	6	2.5	1.0	185	37
WS60	Белый	60	6	2.5	1.0	200	37
BS30	Синий	30	6	3.5	1.5	170	31
BS45	Синий	45	6	3.5	1.5	185	34
BS60	Синий	60	6	3.5	1.5	200	37
GS30	Зеленый	30	6	4.8	2.0	178	32
GS45	Зеленый	45	6	4.8	2.0	193	35
GS60	Зеленый	60	6	4.8	2.0	208	38
WR30	Зеленый	30	6	2.5	1.0	202	44
WR45	Зеленый	45	6	2.5	1.0	217	48
WR60	Зеленый	60	6	2.5	1.0	233	52
BR30	Зеленый	30	6	3.5	1.5	202	44
BR45	Зеленый	45	6	3.5	1.5	217	48
BR60	Зеленый	60	6	3.5	1.5	233	52
GR30	Зеленый	30	6	4.8	2.0	210	44
GR45	Зеленый	45	6	4.8	2.0	225	48
GR60	Зеленый	60	6	4.8	2.0	241	52
CR30W	Белый	30	6	2.5	1.0	202	44
CR45W	Белый	45	6	2.5	1.0	217	48
CR60W	Белый	60	6	2.5	1.0	233	52
CR30B	Синий	30	6	3.5	1.5	202	44
CR45B	Синий	45	6	3.5	1.5	217	48
CR60B	Синий	60	6	3.5	1.5	233	52
CR30J	Золотой	30	6	4.0	1.8	205	44
CR45J	Золотой	45	6	4.0	1.8	217	48
CR60J	Золотой	60	6	4.0	1.8	233	52
CR30G	Зеленый	30	6	4.8	2.0	210	45
CR45G	Зеленый	45	6	4.8	2.0	225	49
CR60G	Зеленый	60	6	4.8	2.0	241	52
PR30M	Серый	33	6	2.0	0.75	205	46
PR45M	Серый	45	6	2.0	0.75	217	48
PR60M	Серый	60	6	2.0	0.75	233	52
PR30W	Белый	30	6	2.5	1.0	205	44
PR45W	Белый	45	6	2.5	1.0	217	48
PR60W	Белый	60	6	2.5	1.0	233	52

PR30B	Синий	30	6	3.5	1.5	205	44
PR45B	Синий	45	6	3.5	1.5	217	48
PR60B	Синий	60	6	3.5	1.5	233	52
PR30J	Золотой	30	6	4.0	1.8	205	44
PR45J	Золотой	45	6	4.0	1.8	217	48
PR60J	Золотой	60	6	4.0	1.8	233	52
PR30G	Зеленый	30	6	4.8	2.0	213	45
PR45G	Зеленый	45	6	4.8	2.0	225	49
PR60G	Зеленый	60	6	4.8	2.0	241	52
TL30H	Серый	30	6	2.0	0.75	204	50
TL45H	Серый	45	6	2.0	0.75	216	54
TL60H	Серый	60	6	2.0	0.75	232	58
TL30W	Белый	30	6	2.5	1.0	204	50
TL45W	Белый	45	6	2.5	1.0	216	55
TL60W	Белый	60	6	2.5	1.0	232	58
TL30B	Синий	30	6	3.5	1.5	204	50
TL45B	Синий	45	6	3.5	1.5	216	54
TL60B	Синий	60	6	3.5	1.5	232	58
TL30J	Золотой	30	6	4.0	1.8	204	50
TL45J	Золотой	45	6	4.0	1.8	216	54
TL60J	Золотой	60	6	4.0	1.8	232	58
TL30G	Зеленый	30	6	4.8	2.0	204	46
TL45G	Зеленый	45	6	4.8	2.0	216	59
TL60G	Зеленый	60	6	4.8	2.0	232	72
TS30T	Коричневый	30	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	204	50
TS45T	Коричневый	45	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	216	54
TS60T	Коричневый	60	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	232	58
TS30P	Фиолетовый	30	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	204	50
TS45P	Фиолетовый	45	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	216	54
TS60P	Фиолетовый	60	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	232	58
TS30D	Черный	30	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	204	46
TS45D	Черный	45	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	216	59
TS60D	Черный	60	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	232	74
TF30H	Серый	30	6	2.0	0.75	204	52
TF45H	Серый	45	6	2.0	0.75	216	56
TF60H	Серый	60	6	2.0	0.75	232	60
TF30W	Белый	30	6	2.5	1.0	204	52
TF45W	Белый	45	6	2.5	1.0	216	56
TF60W	Белый	60	6	2.5	1.0	232	60
TF30B	Синий	30	6	3.5	1.5	204	52
TF45B	Синий	45	6	3.5	1.5	216	56
TF60B	Синий	60	6	3.5	1.5	232	60
TF30J	Золотой	30	6	4.0	1.8	204	52
TF45J	Золотой	45	6	4.0	1.8	216	56
TF60J	Золотой	60	6	4.0	1.8	232	60
TF30G	Зеленый	30	6	4.8	2.0	204	52
TF45G	Зеленый	45	6	4.8	2.0	216	56
TF60G	Зеленый	60	6	4.8	2.0	232	60
TC30T	Коричневый	30	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	204	52
TC45T	Коричневый	45	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	216	56

TC60T	Коричневый	60	6	2.0/2.5/3.0	0.75/1.0/1.25	232	60
TC30P	Фиолетовый	30	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	204	52
TC45P	Фиолетовый	45	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	216	56
TC60P	Фиолетовый	60	6	3.0/3.5/4.0	1.25/1.5/1.75	232	60
TS30D	Черный	30	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	204	52
TS45D	Черный	45	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	216	62
TS60D	Черный	60	6	4.0/4.5/5.0	1.55/1.8/2.05	232	74
JS30T	Коричневый	30	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	204	50
JS45T	Коричневый	45	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	216	54
JS60T	Коричневый	60	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	232	58
JS30P	Фиолетовый	30	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	204	50
JS45P	Фиолетовый	45	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	216	54
JS60P	Фиолетовый	60	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	232	58
JS30D	Черный	30	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	204	52
JS45D	Черный	45	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	216	62
JS60D	Черный	60	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	232	74
JC30T	Коричневый	30	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	216	52
JC45T	Коричневый	45	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	228	56
JC60T	Коричневый	60	6	2.5/2.5/3.0	1.0/1.0/1.25	244	60
JC30P	Фиолетовый	30	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	216	52
JC45P	Фиолетовый	45	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	228	56
JC60P	Фиолетовый	60	6	3.5/3.5/4.0	1.5/1.5/1.75	244	60
JC30D	Черный	30	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	216	54
JC45D	Черный	45	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	228	64
JC60D	Черный	60	6	4.5/4.5/4.8	1.8/1.8/2.05	244	76
QR45H	Серый	45	6	2.0	0.75	/	11
QR45W	Белый	45	6	2.5	1.0	/	11
QR45B	Синий	45	6	3.5	1.5	/	11
QR45J	Золотой	45	6	3.8	1.8	/	11
QR45G	Зеленый	45	6	4.1	2.0	/	11
QR45D	Черный	45	6	4.2	2.3	/	11
QR60H	Серый	60	6	2.0	0.75	/	13
QR60W	Белый	60	6	2.5	1.0	/	13
QR60B	Синий	60	6	3.5	1.5	/	13
QR60J	Золотой	60	6	3.8	1.8	/	13
QR60G	Зеленый	60	6	4.1	2.0	/	13
QR60D	Черный	60	6	4.2	2.3	/	13
ER45H	Серый	45	6	2.0	0.75	/	11
ER45W	Белый	45	6	2.5	1.0	/	11
ER45B	Синий	45	6	3.5	1.5	/	11
ER45J	Золотой	45	6	3.8	1.8	/	11
ER45G	Зеленый	45	6	4.1	2.0	/	11
ER60H	Серый	60	6	2.0	0.75	/	13
ER60W	Белый	60	6	2.5	1.0	/	13
ER60B	Синий	60	6	3.5	1.5	/	13
ER60J	Золотой	60	6	3.8	1.8	/	13
ER60G	Зеленый	60	6	4.1	2.0	/	13

На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки,

полировки и следов смазки). Твердость рабочих частей и отдельных деталей инструментов в зависимости от материала, назначения и конструктивного исполнения следует выбирать из значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Марка материала (стандарт, устанавливающий марку)	Твердость инструментов	
	режущих	не режущих
GB/T 1220-2007	377HV ₀₂	130HV ₀₂

Радиусы притупления рабочих частей инструментов должны соответствовать, мм:

- не более 0,03 - колющих;
- не более 0,1 - зажимных (с зубчатой рабочей частью).

Инструменты должны быть коррозионно-стойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения. Инструменты должны быть стерильными, нетоксичными и апиrogenными.

1.15. Описание материалов

Инструменты должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.

Наименование изделия	Часть изделия	Материал	Производитель, страна	Контакт
Степлер хирургический геморроидальный	Ствол степлера	Алюминий AL6061	FORT WAYNE METALS, США	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Головка	металлическая часть - сталь X4CrNi18-10,	Yuan Bai Yi, Китай	
		Поликарбонат 3414R, цвет зеленый, фиолетовый, черный - краситель красный Precolor® Combi Toner Red, желтый Precolor® Combi Toner Yellow, синий Precolor® Combi Toner Blue	Subic Japan LLC., Япония Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	
		Поликарбонат 3412R цвет зеленый, фиолетовый, черный - краситель красный Precolor® Combi Toner Red, желтый Precolor® Combi Toner Yellow, синий Precolor® Combi Toner Blue	Subic Japan LLC., Япония Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	

Шток головки	сталь X4CrNi18-10	Yuan Bai Yi, Китай	
Рычаг головки	сталь X4CrNi18-10	Yuan Bai Yi, Китай	
Сменная кассета со скобами	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	
Нож (лезвие)	сталь X30Cr13, опора ножа- PPR-MT30(M250E) краситель желтый Precolor® Combi Toner Yellow	Yuan Bai Yi, Китай Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. China Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	
Корпус рукоятки	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	-
Ручка регулировки величины зазора скоб	Поликарбонат 3414R, краситель черный Precolor® Combi Toner Black	Subic Japan LLC., Япония Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	-
Колпачок, удерживающий скобы	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	-
Предохранитель	Поликарбонат 3414R краситель красный Precolor® Combi Toner Red	Subic Japan LLC., Япония Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	-
Ручка для спливания	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	-
Аноскоп	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
Анальный расширитель	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	
Внутренний канал	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	
Крючковая игла (шовный продеватель)	Поликарбонат 3414R	Subic Japan LLC., Япония	
Скоба	Титановый сплав TA1G/TA2G/Ti-6Al-4V	FORT WAYNE METALS, США	Длительный контакт, более 30 дней с внутренней средой и тканями

				пациента
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-
Степлер режущий эндоскопический (варианты исполнения ELS12, ELSC, ELST, ELSJ)	Ствол степлера	сталь 06Cr19Ni10, Полифталамид черный HTN51G35HSL	Yuan Bai Yi, Китай DUPONT, США	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Верхняя бранша	Полифталамид HTN51G35HSL, сталь 06Cr19Ni10	DUPONT, США Yuan Bai Yi, Китай	
	Нижняя бранша	Полифталамид HTN51G35HSL, сталь 06Cr19Ni10	DUPONT, США Yuan Bai Yi, Китай	
	Соединительное кольцо	Полифталамид черный HTN51G35HSL	DUPONT, США	
	Корпус ручки регулировки величины зазора скоб	Термопластический эластомер TPE	Suzhou Suchen New Material Co., Ltd. China	
	3. Ручка шарнирная	Поликарбонат 3010GX	STAR PLASTICS	-
	4. Крючок	Полифталамид черный HTN51G35HSL	DUPONT, США	-
	5. Кнопка	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	-
	6. Оболочка ручки	Поликарбонат 3010GX	STAR PLASTICS	-
	7. Крышка	Поликарбонат 144R	Subic Japan LLC., Япония	-
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-

Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического (варианты исполнения степлера ELS12, ELSC, ELST, ELSJ)	Отсек для сменной кассеты	Полифталамид черный HTN51G35HSL	DUPONT, США	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Верхняя бранша	Полифталамид HTN51G35HSL, сталь 06Cr19Ni10 ползунок – АБС 500R	DUPONT, США Yuan Bai Yi, Китай Subic Japan LLC., Япония	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Нижняя бранша	Полифталамид HTN51G35HSL, сталь 06Cr19Ni10	DUPONT, США Yuan Bai Yi, Китай	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Соединительная часть блока перезагрузки	Полифталамид черный HTN51G35HSL	DUPONT, США	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Нож (лезвие)	сталь 20Cr13	Yuan Bai Yi, Китай	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Пружина предохранителя	сталь 06Cr19Ni10	Yuan Bai Yi, Китай	
	Часть режущей площадки, часть узла нижней бранши, соединительная часть блока перезагрузки	сталь 05Cr17Ni4Cu4Nb	Yuan Bai Yi, Китай	
	Крепление сменной кассеты к стволу степлера	сталь 12Cr17Ni7	Yuan Bai Yi, Китай	
	Сменная кассета	Полифталамид HTN51G35HSL <i>краситель желтый</i> HP 211401 YELLOW, <i>синий</i> HP 513621 BLUE,	DUPONT, США Gabriel-Chemie GmbH, Австрия	

		красный HP 411211 RED, золотой HP 22321 YELLOW, черный HP 99591 BLACK		
	Режущий вспомогательный нож	сталь 12Cr17Ni7	Yuan Bai Yi, Китай	
	Скоба	Титановый сплав TA1G/TA2G/Ti- 3Al-2.5V	FORT WAYNE METALS, США	Длительный контакт, более 30 дней с внутренней средой и тканями пациента
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-
Степлер режущий эндоскопический (вариант исполнения ELSQ)	Верхняя бранша	сталь Y12Cr13	Yuan Bai Yi, Китай	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Нижняя бранша	сталь O5Cr17Ni4Cu4Nb	Yuan Bai Yi, Китай	
	Ствол степлера	сталь O6Cr19Ni10	Yuan Bai Yi, Китай	
	Ручка регулировки величины зазора скоб	Поликарбонат 3412R-131, краситель черный	Subic Japan LLC., Япония	
	Реверс ножа	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	
	Ползунок раскрытия бранши	A3GF60	Celanese USA	-
	Ручка для сшивания (закрытия)	A3GF60	Celanese USA	-
	Соединительная часть	Термопластический эластомер TPU	Huafon Thermo- plastic Polyure- thane Elastomer Co., Ltd. China	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Спусковой крючок	Поликарбонат 3412R-131	Subic Japan LLC., Япония	-
Сменная кассета для степлера	Отсек для сменной кассеты	Полифталамид HTN51G35HSL	DUPONT, США	Кратковременный контакт с кровью

режущего эндоскопического (вариант исполнения степлера ELSQ)	Верхняя бранша	сталь Y12Cr13	Yuan Bai Yi, Китай	и тканями пациента
		ползунок – АБС 500R	Subic Japan LLC., Япония	
	Нижняя бранша	сталь O5Cr17Ni4Cu4Nb	Yuan Bai Yi, Китай	
	Пружина предохранителя	сталь 06Cr19Ni10	Yuan Bai Yi, Китай	
	Часть режущей площадки, часть узла нижней бранши, соединительная часть блока перезагрузки	сталь 05Cr17Ni4Cu4Nb	Yuan Bai Yi, Китай	
	Крепление сменной кассеты к стволу степлера	сталь 12Cr17Ni7	Yuan Bai Yi, Китай	
	Сменная кассета	АБС, LCP+30%GF <i>краситель желтый</i> HP 211401 YELLOW, синий HP 513621 BLUE, красный HP 411211 RED, золотой HP 22321 YELLOW, черный HP 99591 BLACK	PetroChina Com- pany Limited. China Polyplastics Ja- pan Gabriel-Chemie GmbH, Австрия	
	Нож (лезвие)	сталь 30Cr13	Yuan Bai Yi, Китай	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Режущий вспомогательный нож	сталь 12Cr17Ni7	Yuan Bai Yi, Китай	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Скоба	Титановый сплав TA1G/TA2G/Ti-	FORT WAYNE METALS, США	Длительный контакт, более 30

		3Al-2.5V		дней с внутренней средой и тканями пациента
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-
Степлер линейный режущий	Верхняя часть степлера	Поликарбонат 3412R, краситель белый	Subic Japan LLC., Япония	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Блок-заглушка	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	
	Верхняя бранша	Поликарбонат 3412R, краситель белый, сталь 06Cr19Ni10	Subic Japan LLC., Япония	
	Нижняя бранша	корпус- Поликарбонат 3412R наковальня – сталь 06Cr19Ni10	Subic Japan LLC., Япония Yuan Bai Yi, Китай	
	Пружина	сталь 06Cr19Ni10	Yuan Bai Yi, Китай	
	Нижняя часть степлера	Поликарбонат 3412R, краситель белый Прокладка- Термопластический эластомер TPE	Subic Japan LLC., Япония Chuzhou Ruixing Co., Ltd. China	
	Ползунок прошивания	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	
	Нож	сталь 20Cr13	Yuan Bai Yi, Китай	
	Поверхность захвата сменной кассеты	Поликарбонат 3412R	Subic Japan LLC., Япония	-
	Скоба	Титановый сплав TA1G/TA2G/Ti- 6Al-4V	FORT WAYNE METALS, США	Длительный контакт, более 30 дней с внутренней средой и тканями пациента
	Сменная кассета	Поликарбонат 3414R, цвет белый, синий	Subic Japan LLC., Япония	Кратковременный контакт с кровью и тканями

		зеленый - краситель желтый Precolor® Combi Toner Yellow, синий Precolor® Combi Toner Blue, белый Precolor® Combi Toner White	Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	пациента
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-
Сменная кассета для степлера линейного режущего (идентична материалам сменной кассеты и скобам степлера линейного режущего)	Сменная кассета	Поликарбонат 3414R, цвет белый, синий зеленый - краситель желтый Precolor® Combi Toner Yellow, синий Precolor® Combi Toner Blue, белый Precolor® Combi Toner White	Subic Japan LLC., Япония Farbenwerke Wunsiedel GmbH., Германия	Кратковременный контакт с кровью и тканями пациента
	Скоба	Титановый сплав TA1G/TA2G/Ti- 6Al-4V	FORT WAYNE METALS, США	Длительный контакт, более 30 дней с внутренней средой и тканями пациента
	Упаковка первичная (индивидуальная)	блистерная крышка Easman PETG6763, блистерная бумага Dupont 1073B	DUPONT, США	-
	Упаковка вторичная	Картон	DUPONT, США	-
Упаковка транспортная		Картон	DUPONT, США	-

1.16 Порядок применения

【 Предупреждения 】

1. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.
2. Перед использованием проверьте целостность изделия и упаковки и проверьте срок годности.

3. Используйте изделие сразу после вскрытия упаковки.
4. Изделие может использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
5. Не стерилизуйте снова. Данное изделие является одноразовым, и его повторное использование строго запрещено.
6. Бракованное изделие должно быть заменено на новое.
7. Выберите необходимый вариант исполнения изделия.

Порядок применения:

Степлер режущий эндоскопический и сменная кассета

【 Противопоказания 】

- 1 Не используйте степлер эндоскопический и сменную кассету на 2,5 мм на ткани, сжимающейся до толщины менее 1,0 мм, а также на любой ткани, не сжимаемой до 1,5 мм на комфортном уровне, или на аорте.
- 2 Не используйте степлер эндоскопический и сменную кассету на 3,5 мм на ткани, сжимающейся до толщины менее 1,5 мм, а также на любой ткани, не сжимаемой до 2,0 мм на комфортном уровне, или на аорте.
- 3 Не используйте степлер эндоскопический и сменную кассету на 4,8 мм на ткани, сжимающейся до толщины менее 2,0 мм, а также на любой ткани, не сжимаемой до 2,5 мм на комфортном уровне, или на аорте.
- 4 Изделие не следует использовать на тканях, таких как печень или селезенка, сжимаемость которых такова, что закрытие инструмента может быть разрушительным для органа.
- 5 Не используйте степлеры эндоскопические, если адекватность гемостаза невозможно проверить визуально после применения.
- 6 Изделия поставляются стерильными и предназначены для использования только в одной процедуре. После использования утилизируйте. Не стерилизовать повторно.
- 7 Изделие не следует использовать у пациентов с отеком слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, толстыми слоями мышц или плохой способностью к заживлению.
- 8 Изделие не следует использовать у пациентов с подозрением на наличие остаточной раковой ткани на краях разреза.
- 9 Запрещается использовать изделие для сосудистой ткани.

【 Инструкция по применению 】

1 Загрузка

- 1.1 Бранши (по тексту тиски) находятся в открытом состоянии, когда сменная кассета извлекается из упаковки, не закрывайте их.

Предупреждение: следует выбирать сменную кассету со скобой размера, подходящего для толщины ткани. Если ткани слишком толстые или тонкие, это может привести к неправильной форме скоб. При выборе подходящей сменной кассеты необходимо учитывать общую толщину ткани и любого армирующего материал анастомоза.

Внимание: перед загрузкой не снимайте защиту (1) со сменной кассеты. (Рис. 1)

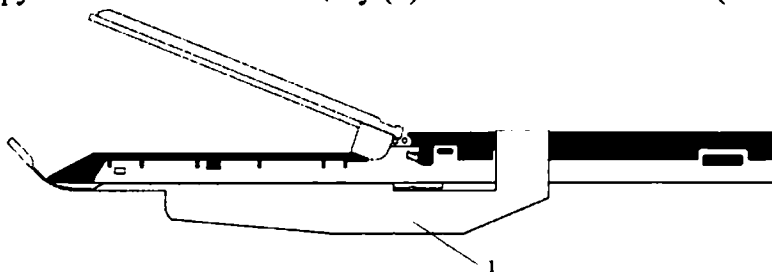


Рис.1

1.2 Убедитесь, что черный колпачок сброса (Н) оттянут полностью, ручка ручки регулировки величины зазора скоб (Е) находится в "свободном" положении (Рис. 2).

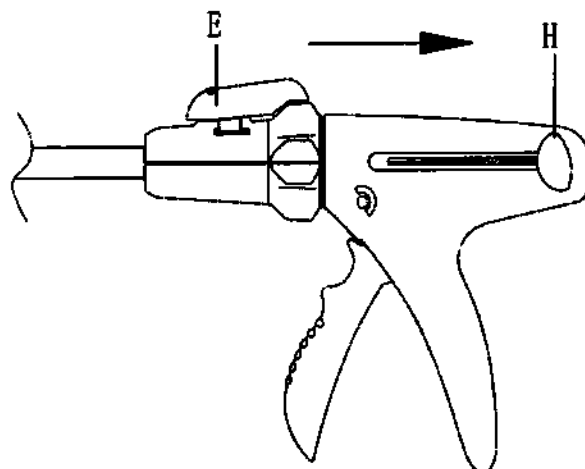


Рис. 2

1.3 Соберите степлер с подходящей сменной кассетой, вставьте сочлененный шарнирный шток в сменную кассету. Убедитесь, что знак совмещения LOAD (загрузки) (J1) на перезаряжающем устройстве и знак совмещения LOAD (загрузки) (J2) на внутреннем стержне ствола степлера совмещены (Рис. 7). Нажмите на сменную кассету и поверните степлер по часовой стрелке на 45°, пока не услышите щелчок, указывающий, что сменная кассета находится в заблокированном положении. В это время знак совмещения LOAD (загрузки) (J2) на внутреннем стержне ствола степлера и знак совмещения LOAD (загрузки) (J1) на сменной кассете совмещены. В этот момент LOAD (загрузка) на стволе (J2) совмещена с LOAD (загрузка) на сменной кассете (Рисунок 4).

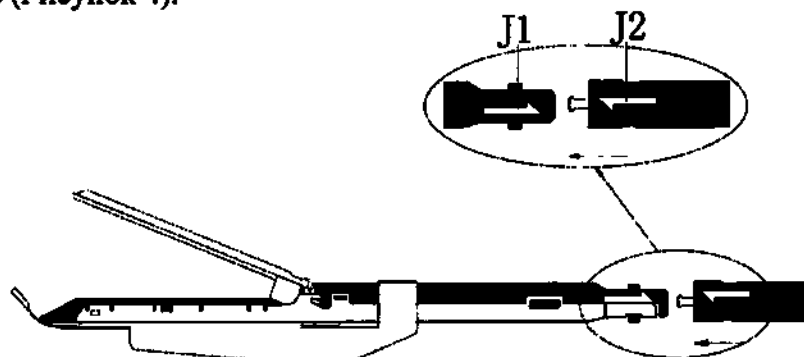


Рис. 3

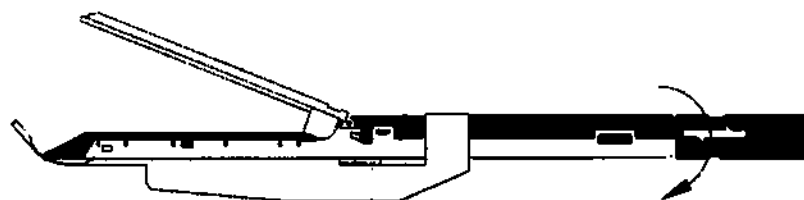


Рис. 4

1.4 Перед тем, как ввести бранши, снимите защиту со сменной кассеты. Внимание: не закрывайте изделие перед тем как снять блокировку.

1.5 Убедитесь, что загрузка правильная, проверьте изделие. Сожмите ручку для сшивания один раз, чтобы закрыть бранши. Затем снимите черный колпачок и убедитесь, что бранши полностью открываются.

2. Разгрузка

Ручка поворота сменной кассеты (Е) должна находиться в положении "Free" (свободное положение) для извлечения сменной кассеты из степлера. Полностью оттяните кнопку сброса, чтобы убедиться, что бранши открыты. Оттяните кнопку разблокировки назад (на стволе степлера, С), поверните ручку поворота по часовой стрелке на 45°, затем снимите предохранитель со степлера (см. Рис. 5).

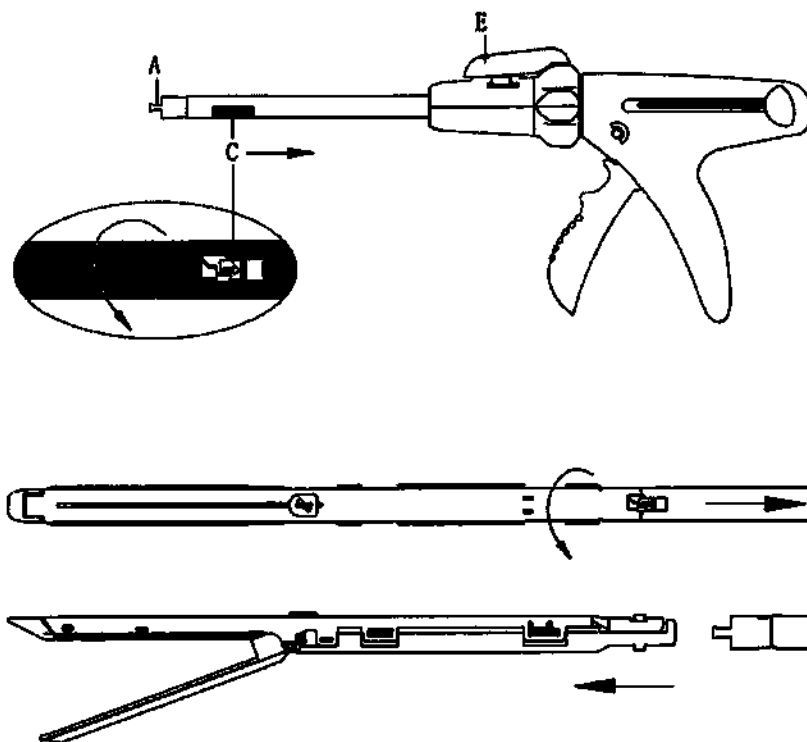


Рис. 5

【 Процедура 】

ПРИМЕЧАНИЕ: Бранши должны быть закрыты перед введением изделия в наконечник троакара. Для этого сожмите ручку степлера.

1. Для закрытия бранши нажмите на ручку степлера. Вставьте блок ручки эндоскопического степлера в наконечник троакара подходящего или большего размера (как показано на Рис. 6).

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1) Перед открытием сменной кассеты (вводится в полость тела через наконечник троакара) убедитесь, что бранши полностью видны. Вал инструмента вращается на 360° и поворачивается на 22° и 45° в обоих направлениях с помощью ручки регулировки величины зазора скоб.
- 2) При использовании степлера эндоскопического со сменной кассетой 4,8 мм изделие необходимо вставить в троакар 15 мм. Троакар меньшего размера не подходит для сменной кассеты 4,8 мм.

2. Когда изделие внутри полости, откройте бранши сменной кассеты, потянув ползунок степлера полностью назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не сжимайте ручку изделия, оттягивая назад ползунок раскрытия бранши (как показано на Рис. 7).

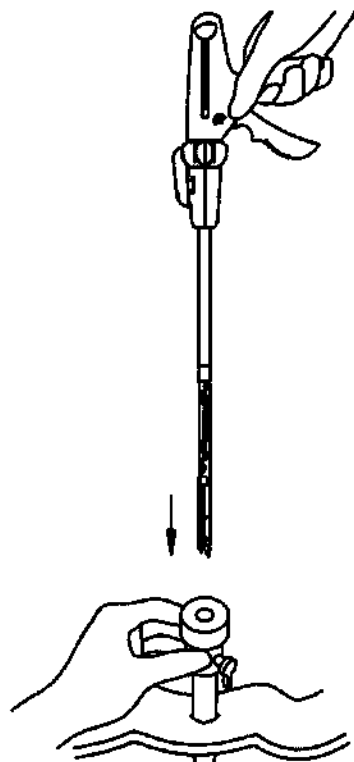


Рис. 6

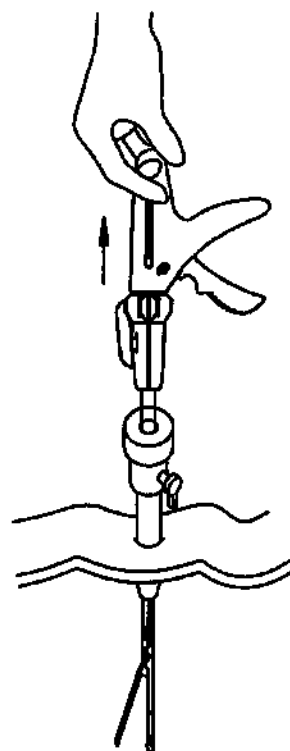



Рис. 7

3. Отрегулируйте регулировки величины зазора скоб и приложите степлер к ткани, подлежащей рассечению (как показано на Рис. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Убедитесь, что между скобами и браншей нет препятствий (например, зажимов). Сшивание через препятствие может привести к неполному разрезу и/или неправильной форме скоб. Изделие не разрезает ткань за пределами черной отметки на сменной кассете. Для ткани, длина которой превышает длину сменной кассеты (30 мм, 45 мм или 60 мм), может потребоваться более одной кассеты.

2) Размещение ткани проксимальнее ограничителей (на сменной кассете) может привести к неисправности шивателя (степлера). Любые области ткани, выходящие за отметку разреза, не будут рассечены.

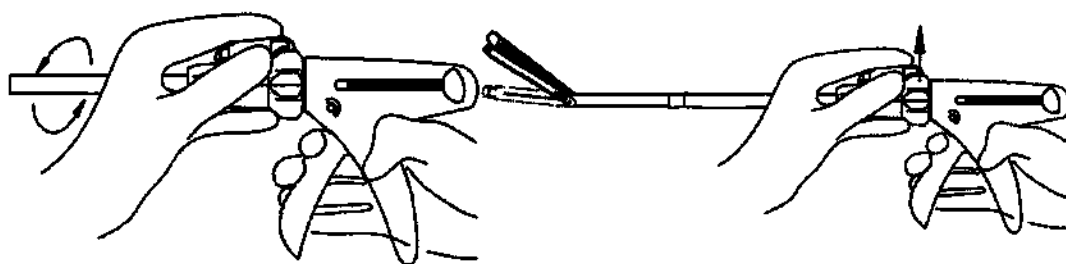

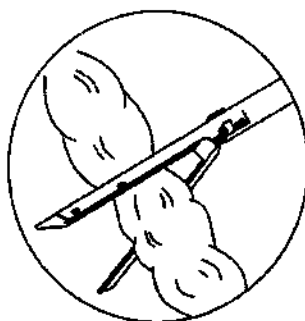


Рис. 8

4. Закройте бранши, закрепленные на ткани, подлежащей рассечению, полностью сжав ручку (как показано на Рис. 9). Степлер оснащен предохранительной блокировкой (предохранителем): ткань не будет разрезана и сшита, пока не будет нажата кнопка предохранителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрена защитная блокировка, предотвращающая повторный выпуск скоб из пустого блока сменной кассеты. Не пытайтесь отключить защитную блокировку. Положение браншей на ткани можно изменить перед сшиванием, полностью потянув назад черный колпачок сброса, позволяя зажиму раскрыться.

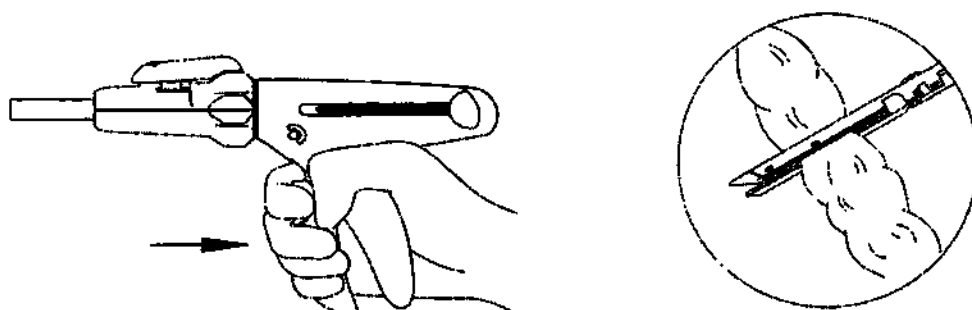


Рис. 9

5. Для начала работы нажмите кнопку предохранителя. Последовательно сжимайте ручку, пока нож не достигнет дистального конца скоб и ручка не зафиксируется. Для полного срабатывания сшивания требуются последовательные нажатия рукоятки степлера. Общее количество нажатий зависит от длины сменной кассеты (30, 45 или 60). Если степлер не сработал полностью, это приведет к неполному разрезанию и/или неполному формированию скоб, что в свою очередь может привести к плохому гемостазу (как показано на Рис. 10).

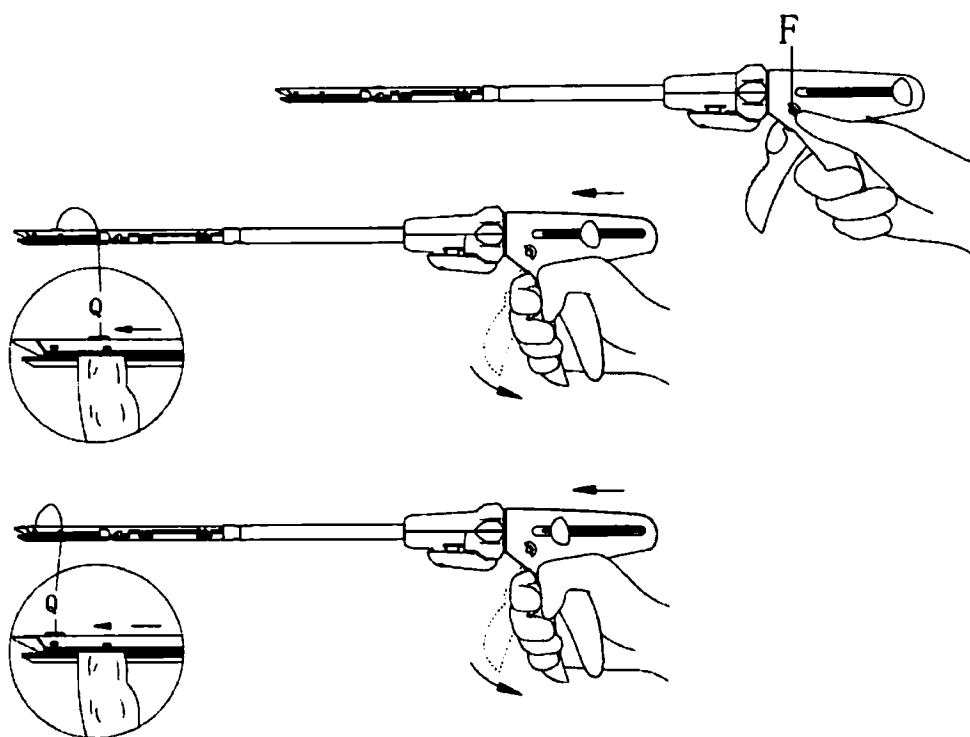


Рис. 10

6. После полного срабатывания степлера откройте бранши, потянув черный ползунок раскрытия бранши до конца. Осторожно извлеките изделие из ткани. После извлечения проверьте гемостаз всех участков. Незначительное кровотечение можно устранить с помощью электрокоагуляции или ручного наложения швов (как показано на Рис. 11).

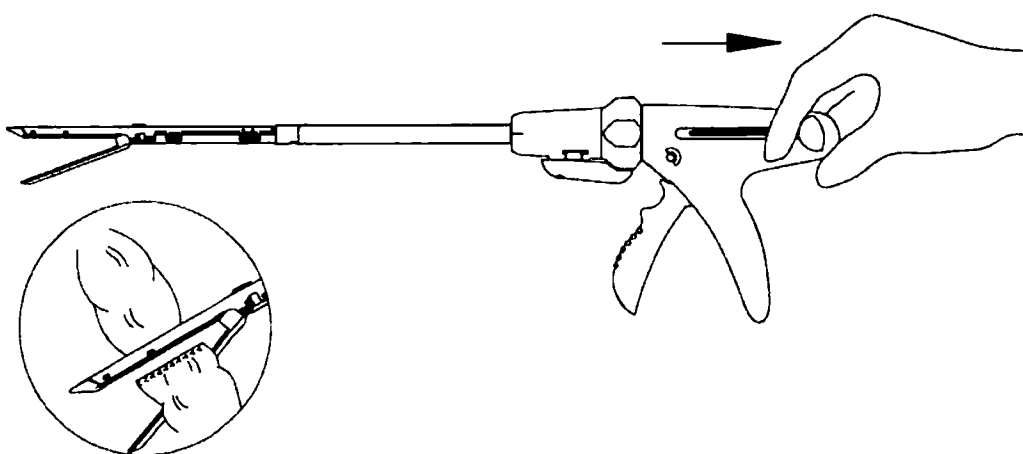


Рис. 11

7. После извлечения браншей из ткани закройте бранши изделия и извлеките ствол степлера из полости тела для удаления сменной кассеты из инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь вставлять или извлекать изделие из наконечника троакара, если бранши находятся в открытом положении.

【 Предупреждение и меры предосторожности 】

1. Предоперационная лучевая терапия может привести к изменениям тканей. Подобные изменения могут, например, привести к тому, что толщина ткани превысит указанный диапазон

- для выбранного размера скоб. Следует внимательно рассмотреть любое предоперационное вмешательство, которому может подвергнуться пациент, для выбора правильного размера скоб.
2. При выборе подходящей сменной кассеты со скобами всегда учитывайте общую толщину ткани и любого используемого армирующего материала скобок.
 3. При использовании степлера эндоскопического сшивателя со сменной кассетой 4,8 мм изделие необходимо вставить в троакар 15 мм. Троакар меньшего размера не подходит для сменной кассеты 4,8 мм.
 4. Всегда проверяйте толщину ткани и выбирайте скобу подходящего размера перед наложением ручки эндоскопического сшивателя.
 5. Всегда закрывайте предохранитель степлера перед тем, как вставлять и извлекать степлер из втулки троакара.
 6. После сшивания всегда проверяйте линию скобок на предмет гемостаза. Незначительное кровотечение можно остановить с помощью электрокоагуляции или наложением швов вручную.
 7. Размещение ткани проксимальнее ограничителей на сменной кассете может привести к неисправности степлера. Любые области ткани, выходящие за отметку разреза, не будут рассечены.
 8. При использовании более одного степлера во время одной хирургической процедуры обязательно извлеките пустую сменную кассету и загрузите новую. Предусмотрена защитная блокировка, предотвращающая повторный выпуск скоб из пустой сменной кассеты. Не пытайтесь отключить защитную блокировку. Не пытайтесь тянуть ручку перед нажатием предохранителя, иначе это приведет к повреждению изделия.
 9. При размещении степлера на участке сшивания убедитесь, что нет никаких препятствий, таких как зажимов, сшивание через препятствие может привести к неполному разрезу и/или неправильной форме скоб.
 10. Перед тем, как выгрузить сменную кассету из изделия, убедитесь, что бранши открыты, потянув ручку открытия бранш назад до конца. Если принудительная разгрузка приведет к повреждению изделия, его нельзя будет снова использовать в той же операции.
 11. Эндоскопические процедуры должны выполняться только врачами, имеющими соответствующую подготовку и обученными эндоскопическим методам. Перед выполнением любых эндоскопических процедур ознакомьтесь с медицинской литературой относительно методов, осложнений и опасностей.
 12. При одновременном использовании разных эндоскопических инструментов от разных производителей в эндоскопической процедуре, проверьте не нарушена ли совместимость.
 13. Бранши должны быть полностью видны (за наконечником троакара) до открытия сменной кассеты в полости тела.
 14. При использовании скрепляющего материала для сшивающей линии следуйте инструкциям, предоставленным производителем соответствующего материала, так как их использование может повлиять на производительность степлера.
 15. Изделие и сменная кассета поставляются стерильными и предназначены для использования только в одной процедуре. После использования утилизируйте. Не стерилизовать повторно.
 16. Не пытайтесь осуществить загрузки, сжимая ручку степлера. После использования изделия, пожалуйста, выбросьте его в специально отведенные для этого мусорные контейнеры.

Степлер линейный режущий

Не используйте изделие для тканей с ишемией или некрозом.

【 Предупреждения 】

1. В соответствии с эксплуатационными требованиями, сменные кассеты на 1-5 шт. могут быть заменены во время одной и той же операции, каждая сменная кассета упаковывается отдельно.

2. Данное изделие могут использовать только хирурги, прошедшие полную подготовку и имеющие операционные навыки.
3. Изделие с высотой скобы 2,5 подходит для тканей с толщиной сжатия 0,7-1,0 мм. Изделие с высотой скобы 3,5 и 3,8 подходит для тканей с толщиной сжатия 1,0-1,7 мм. Изделие с высотой скоб 4,5 подходит для тканей с толщиной сжатия 1,6-2,4 мм.
4. После снятия изделия необходимо проверить наложенную ткань на предмет кровотечения. Если кровотечение обнаружено, необходимо использовать соответствующие методы его остановки.
5. Перед использованием изделия проверьте совместимость всех инструментов и принадлежностей.




Предупреждения и меры предосторожности.

1. Достаньте изделие из упаковки в стерильной зоне. Необходимо бережно обращаться с изделием во избежание поломок.
2. Отпустите переключатель блокировки, затем разделите верхнюю и нижнюю бранши и снимите защиту со сменной кассеты.
3. Поместите требуемую ткань между верхней и нижней браншами и нажмите на изделие, пока они не будут хорошо зафиксированы и закрыты.
4. Удерживая режуще-сшивающее изделие, продвиньте большой и указательный пальцы другой руки вперед в положение надавливания (режущая плоскость еще не начала разрезать, и рука не под нагрузкой), а затем равномерно и с силой нажмите вперед к переднему концу (рука чувствует явную нагрузку, что указывает на то, началось разрезание ткани и одновременное сшивание левой и правой части);
5. Верните кнопку запуска в исходное положение (как показано на Рис. 1). Учтите, что степлер нельзя вытащить непосредственно в данный момент. Выключатель блокировки должен быть в положении "вкл.", а нижняя и верхняя бранши должны быть разделены. Операция завершается после извлечения изделия.

【Порядок применения】


Порядок перезарядки степлера: Убедитесь, что кнопка запуска возвращается в исходное положение (как показано на Рис. 1), отпустите переключатель блокировки, извлеките использованные сменные кассеты и выбросьте их (как показано на Рис. 2), замените их новыми режущими элементами, вставьте новую сменную кассету, зафиксируйте положение, снимите защитную крышку (как показано на Рис.3) и затем используйте изделие в той же операции. В каждом степлере можно заменить до 5 сменных кассет за одну операцию.

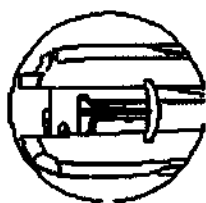

(Рис. 1)



(Рис. 2)

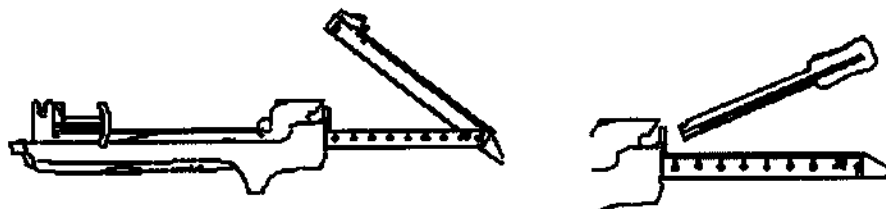

(Рис. 3)

Степлер хирургический геморроидальный

【 Противопоказания 】

Изделие не применяется в случаях сильного отека слизистой оболочки, тяжелого фиброза геморроидальных тканей и повторных инъекций склерозанта в геморроидальные ткани.

【 Осложнения 】


Может вызвать инфекцию, разрыв анастомоза или кровотечение из него.

【 Меры предосторожности 】

Изделие должно использоваться только профессиональным хирургом, прошедшим обучение технике сшивания и анастомотической резекции слизистой оболочки при анальном геморрое, или под руководством лица с соответствующим опытом.

【 Процедура 】

1. Следуя общему принципу работы степлера, пользователь (врач) должен хорошо разбираться в хирургической процедуре.
2. Перед использованием внимательно проверьте, нет ли повреждений упаковки единичного изделия, и внимательно проверьте изделия в упаковке:
3. Если вы обнаружите повреждения и/или сомневаетесь в том, что изделие, составляющие или упаковка повреждены, не используйте их и свяжитесь с представителем компании производителя.
4. Порядок действий:

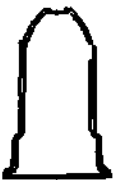● Соберите анальный расширитель (вставьте внутренний канал  в анальный

расширитель ) и введите в анальный канал пациента, зафиксируйте положение анального расширителя (для фиксации можно использовать нить).

4.2 Снимите внутренний контур анального расширителя . Вставьте аноскоп для наложения кисетного шва.

4.3 Шов накладывается выше зубчатой линии на 3,5-4 см (скрытый шов под слизистую оболочку).

Предупреждение: не допускайте наложения швов на слизистую задней стенки влагалища пациенток.

4.4 Степлер раскрыт в максимальное положение (около 5,5 мм). Вставьте головку проксимальнее места наложения шва, затем завяжите закрывающим узлом. Необходимо, чтобы ткань была равномерно закреплена на головке.

4.5 С помощью крючковой иглы протяните веревку через два отверстия с двух сторон степлера и завяжите узел (длина подходящая, если фигуру можно обхватить).

4.6 Сохраняйте положение конца головки степлера, расположите степлер и анальный расширитель в одном направлении, поверните регулировочную ручку, чтобы закрыть степлер, одновременно растягивая ткань соответствующим образом (используйте анальный расширитель, чтобы натянуть нить и расположить ткань внутри изделия на средней скорости. Не прилагайте силу).

Предупреждение: сохраняйте конечное положение головки степлера, изделие должно двигаться вперед при закрытии.

4.7 Когда на индикаторе видна красная линия, растяжение и удержание необходимо прекратить.

4.8 Продолжайте вращать регулировочную ручку, чтобы красная линия переместилась в зеленую зону, проверьте положение степлера в соответствии с толщиной слизистой ткани (обязательно должна быть в зеленой зоне).

4.9 Сохраняйте положение конца головки степлера, сделайте отметку на стержне (последняя отметка) для сохранения определенного положения с торцом внутренней стороны анального расширителя.

- 4.10 Просмотрите и еще раз проверьте вышеуказанные шаги (у пациенток повторно проверьте влагалище).
- 4.11 Закройте предохранитель от срабатывания, возьмите изделие двумя руками (для стабилизации), и начинайте сшивание.
- 4.12 После того, как вы услышите соответствующий звук и почувствуете ослабление, сшивание окончено, удерживайте изделие примерно 20-30 секунд (для содействия гемостазу).
- 4.13 Закончите сшивание, переустановите ручку, обновите кнопку предохранителя.
- 4.14 Поверните (ослабьте) регулировочную ручку на 3/4-1 оборот, сохраните положение отметки, слегка встряхните слева направо, слегка нажмите на степлер (излишнее усилие может иметь неприятные последствия).
- 4.15 Проверьте, нет ли кровотечения в анастомотической стоме, если кровотечение присутствует, необходимо наложить восьмиобразный шов, покрывающий кисетный шов (советуем использовать рассасывающийся шовный материал).
- 4.16 Удалите анальный расширитель, вставьте отрез марли с титанореином или вазелином.
- 4.17 Утилизируйте изделие после использования.

2. Техническое описание медицинского изделия

2.1. Условия безопасного применения

- 2.1.1 Изделие необходимо использовать строго согласно инструкции.
- 2.1.2 К пользованию изделий допускаются квалифицированные специалисты (врачи) имеющие соответствующие навыки в хирургии.
- 2.1.3 Не использовать изделие при противопоказаниях.
- 2.1.4 Перед использованием инструмента убедитесь в совместимости всех инструментов и сменных составляющих
- 2.1.5 Пользуясь стерильным методом, извлеките инструмент и сменную кассету из соответствующих упаковок. Чтобы избежать повреждений, не вбрасывайте инструмент или сменную кассету в стерильное поле.
- 2.1.6 Перед тем, как зарядить инструмент кассетой, убедитесь, что он находится в открытом положении.
- 2.1.7 При использовании материала, упрочняющего ткань или скобочный шов, соблюдайте инструкции изготовителя упрочняющего материала. Использование с инструментом материалов, упрочняющих скобочный шов, может потребовать применения дополнительного усилия для закрывания, дополнительного усилия для прошивания и сократить количество прошиваний на инструмент.
- 2.1.8 Выбор соответствующей кассеты со скобами должен основываться на суммарной толщине ткани и материала, упрочняющего скобочный шов
- 2.1.9 Перед перезарядкой степлера убедитесь, что инструмент находится в открытом положении.
- 2.1.10 Удаляйте в отходы любые извлечённые из упаковки инструменты, как использованные, так и неиспользованные. Настоящее изделие упаковано и стерилизовано исключительно для однократного применения. Не используйте повторно, не подвергайте повторной обработке или стерилизации. Повторное использование, обработка или стерилизация могут нарушить структурную целостность инструмента и/или привести к отказу изделия, что в свою очередь может привести к травме, заболеванию и смерти пациента. Кроме того, повторная обработка или стерилизация одноразовых устройств может создать риск загрязнения и/или привести к

инфицированию или перекрёстному инфицированию пациента, в том числе, но не исключительно, передаче инфекционного заболевания (заболеваний) от одного пациента к другому.

2.2. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание не предусмотрено. Изделие одноразового пользования.

2.3. Чистка и дезинфекция

Не подлежит. Одноразового пользования.

Стерилизация:

Наборы поставляются стерильными в герметичной упаковке. Стерилизация проводится газовым методом с применением этиленоксида по ISO 11607-1. Процесс стерилизации валидирован в соответствии с требованиями ISO 11135.

2.5. Данные по сроку годности

Срок годности- 3 года с даты стерилизации

2.6. Требования охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации. Защита окружающей среды

- Данное медицинское изделие предназначено для использования исключительно по назначению и только квалифицированным лицензированным врачом или иным практикующим медицинским специалистом по назначению и под контролем такого врача.
- Следует всегда соблюдать стерильность.
- Не используйте в случае вскрытой или поврежденной упаковки.
- Не используйте в случае обнаружения каких-либо повреждений или дефектов.
- В ходе использования соблюдайте общие меры предосторожности.

Требования к охране окружающей среды

Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду. Специальной защиты персонала и пациента при применении изделия не требуется.

Все процессы изготовления изделия осуществляются в помещениях, оснащенных местной приточно-вытяжной вентиляцией.

Использование источников открытого огня в этих помещениях запрещено. Производство изделия осуществляется в контролируемых условиях: чистая комната класса 6 в соответствии со стандартом ISO 14644-1:2015. Помещение оборудовано высокоэффективным противозрозольным фильтром (HEPA), влажность и температура контролируются. Периодически проводится валидация среды в комнате в целях проверки эффективности фильтра HEPA.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами производителя. Утилизация неиспользованных изделий осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А. Утилизировать как отходы класса Б - эпидемиологически опасные отходы. Утилизируйте медицинские изделия по истечении срока их службы в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительной информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

2.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировку изделий осуществляют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта, при соблюдении температурного режима.

Транспортировку осуществляют при температуре -39° С до +60 ° С.

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности от 30 до 75%.

Гарантированный срок хранения – 3 года.

2.8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет 3 года со дня их приобретения при условии эксплуатации и обслуживания в соответствии с требованиями настоящей инструкции. В течение гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно или производится замена дозаторов, если дефект изделия возник в результате скрытого дефекта материалов, либо некачественной заводской сборки изделия.

2.9. Утилизация

Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б, скобы утилизируют как отходы класса В. Запрещается неорганизованное захоронение и сжигание бывших в употреблении изделий. Неиспользованные изделия, с истекшим сроком годности и пришедшие в негодность подлежат утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 по классу А – эпидемиологически безопасные отходы.

Для получения дополнительной информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

Допускается утилизацию отходов и материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

3. Маркировка и упаковка изделия


3.1. Описание маркировки МИ

Маркировка первичной упаковки (индивидуальной упаковки) включает следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя
- наименование производителя с указанием адреса
- наименование изделия и обозначение модели изделия
- номер по каталогу (обозначено символом или текстом)
- дата изготовления (обозначено символом)
- срок годности (обозначено символом «Использовать до»)
- символы: «Запрет на повторное применение», «Осторожно», «Стерилизация оксидом этилена», «Не стерилизовать повторно», «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению», «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»
- надпись: «Не токсично»
- штрих код
- индикатор стерилизации*
- уполномоченный представитель производителя в РФ
- знак соответствия (при необходимости).

* Цветной индикатор стерилизации - красного цвета, когда изделие не стерильно, зеленого цвета после стерилизации.

Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки производителя
(на примере степлер линейный режущий)

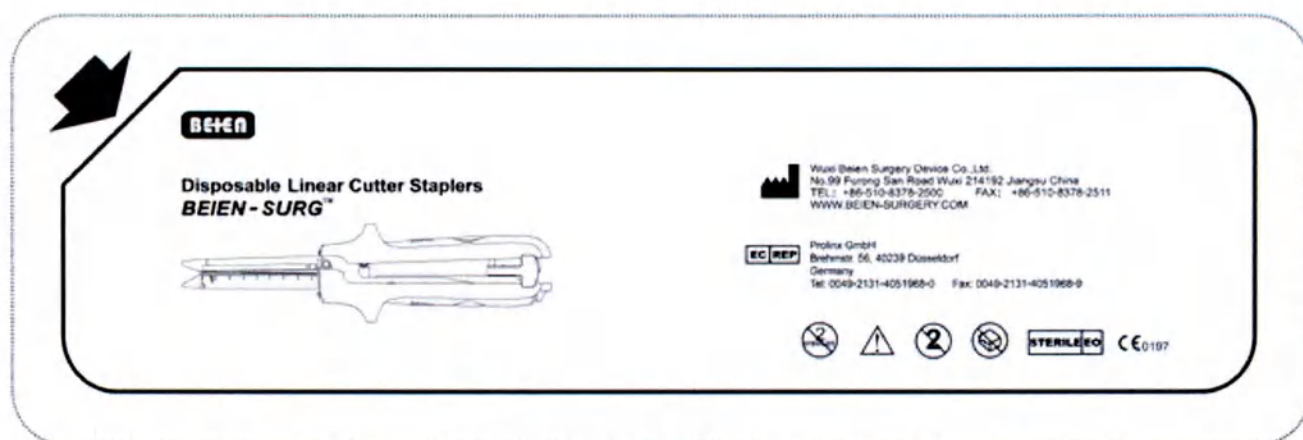

Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки для РФ:

Макет маркировки степлера хирургического геморроидального, в наборе, на примере: степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.РРН32



Макет маркировки степлера линейного режущего, в наборе на примере: степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60


Wuxi Beien Surgery Device Co.,Ltd.
Степлер одноразовый, в наборе
Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

**Уполномоченный представитель
производителя в РФ:**

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2


XX.XX.XXXX


XX.XX.XXXX

REF

WLC60

LOT

XXXXXX



STERILE










(01)06971767870455

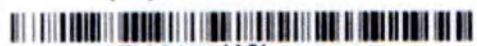


(17)231119(10)FA0325

Не токсично




Степлер одноразовый, в наборе
Степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60

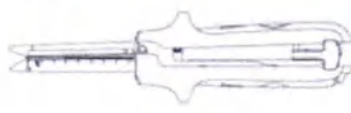



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

**Уполномоченный представитель
производителя в РФ:**

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2






STERILE

Не токсично

BEIEN Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd.

Степлер одноразовый, в наборе

Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.WCA60



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



REF WCA60



LOT XXXXX



STERILE EO

Не токсично



(01)069717678780787



(17)231119(10)FK0347



BEIEN

Степлер одноразовый, в наборе

Сменная кассета для степлера линейного режущего- 60мм – Белый арт.WCA60



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2



STERILE EO

Не токсично

Макет маркировки степлера режущего эндоскопического, в наборе, на примере: Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S


Wuxi Beien Surgery Device Co.,Ltd.

Степлер одноразовый, в наборе
Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
 No. 26 Youshen Road, Xishan
 District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

**Уполномоченный представитель
 производителя в РФ:**
 ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
 город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
 пом/оф 17/2


XX.XX.XXXX


XX.XX.XXXX

REF

ELS12-S

LOT

XXXXX



STERILE EO









(01)06971767870325



(17)230927(10)KC0272

Не токсично







Степлер одноразовый, в наборе
Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S





Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
 No. 26 Youshen Road, Xishan
 District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

**Уполномоченный представитель
 производителя в РФ:**
 ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
 город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
 пом/оф 17/2









STERILE EO

Не токсично

BEIEN Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd.

Степлер одноразовый, в наборе

Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм - Золотой арт. PR60J



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

REF

PR60J


LOT

XXXXXX



STERILE EO

Не токсично

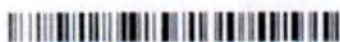

(01)069717678782206



(17)240819(10)LJ1232



BEIEN

Степлер одноразовый, в наборе

Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм - Золотой арт. PR60J



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2




STERILE EO Не токсично


- товарный знак предприятия-изготовителя
- наименование производителя с указанием адреса
- наименование изделия и обозначение модели изделия
- номер по каталогу
- количество изделий в упаковке (указано символом)
- дата изготовления (обозначено символом)
- срок годности (обозначено символом «Использовать до»)
- символы: «Запрет на повторное применение», «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде», «Осторожно», «Стерилизация оксидом этилена», «Не стерилизовать повторно», «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению», «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»
- надпись: «Не токсично»
- штрих код
- индикатор стерилизации*
- уполномоченный представитель производителя в РФ
- знак соответствия (при необходимости).

Макет маркировка вторичной упаковки производителя:
Макет маркировки степлера линейного режущего, в наборе



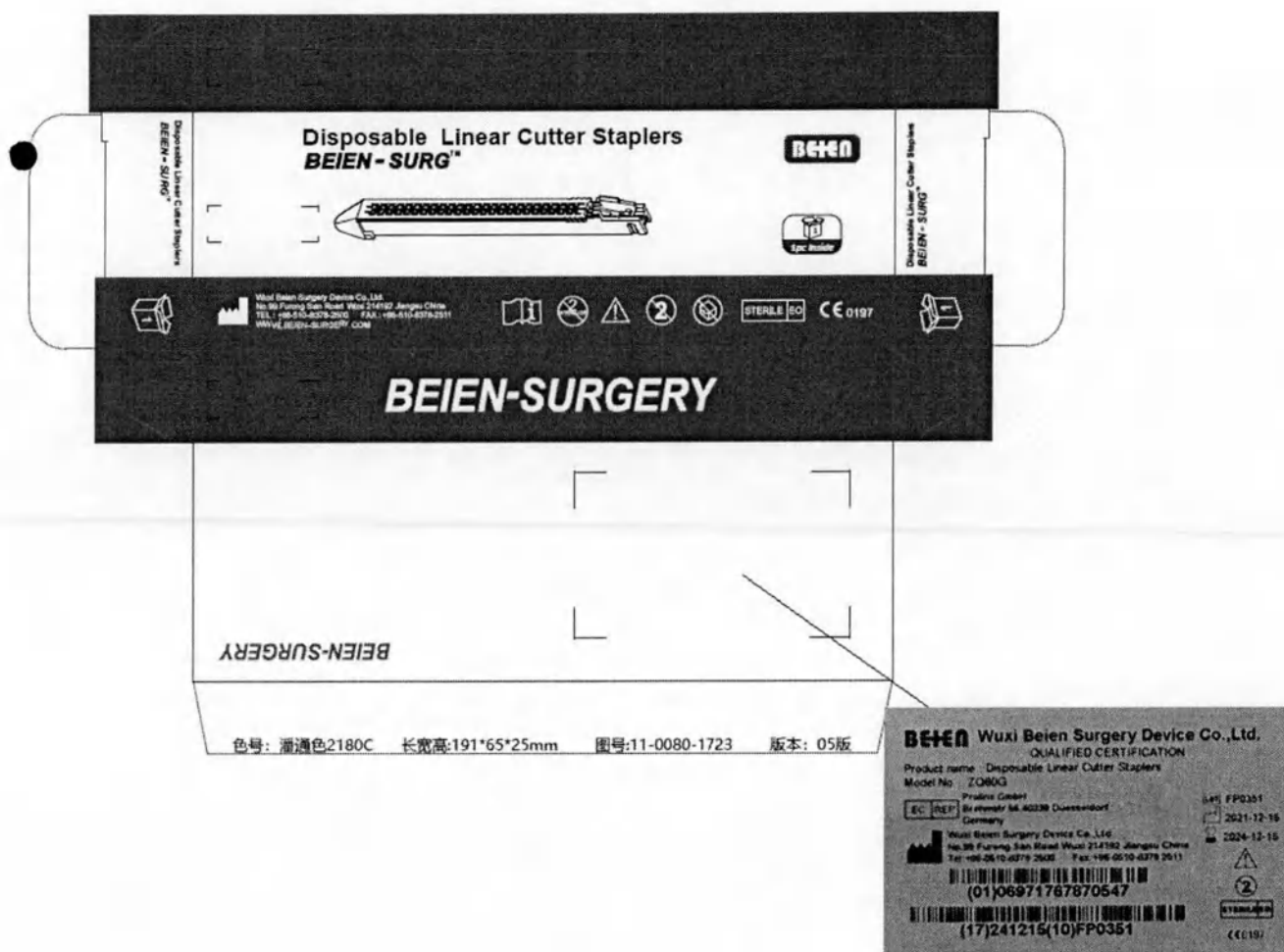

Сменная кассета для степлера линейного режущего


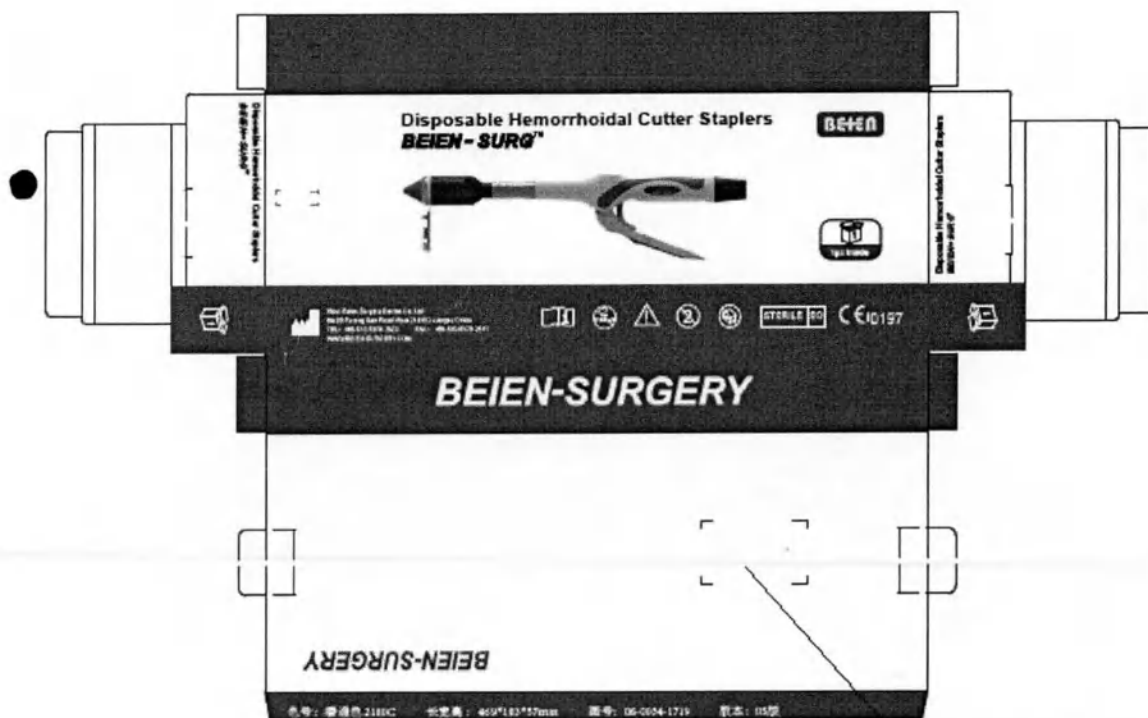


Степлер хирургический геморроидальный

Макет маркировки степлера режущего эндоскопического, в наборе




Степлер режущий эндоскопический

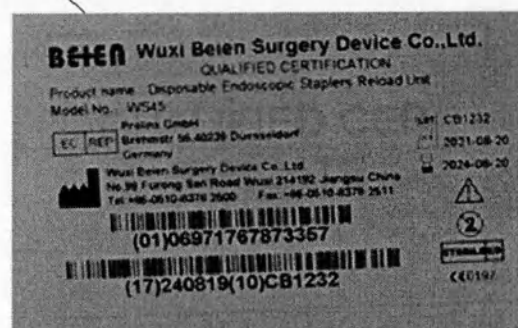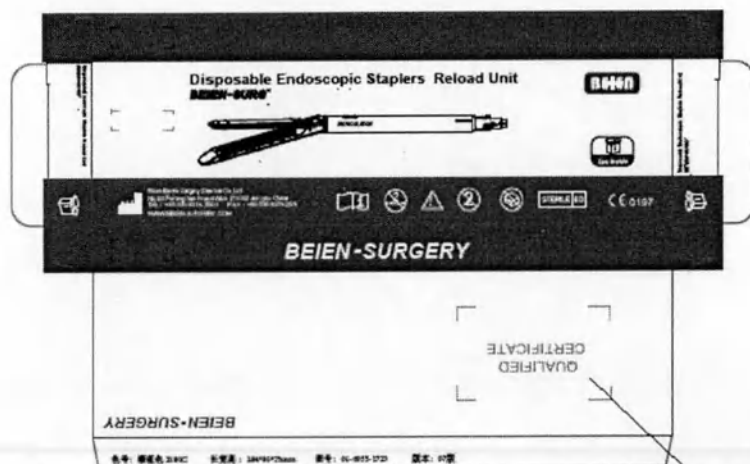


Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического

Макет маркировки вторичной упаковки для РФ:


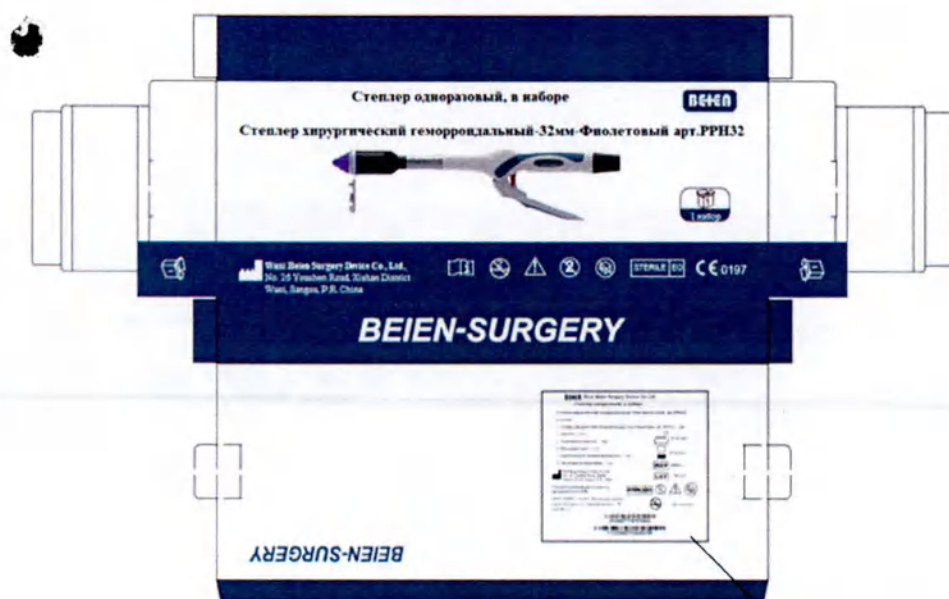


Степлер хирургический геморроидальный, в наборе, на примере: степлер хирургический гемор-
роидальный-32мм-Фиолетовый арт.РРН32

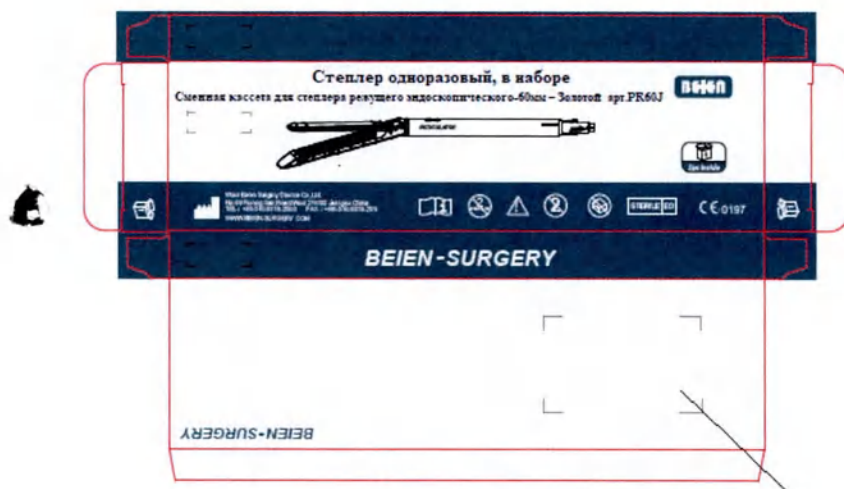

Степлер режущий эндоскопический, в наборе, на примере: Степлер режущий эндоскопический – Короткий арт.ELS12-S



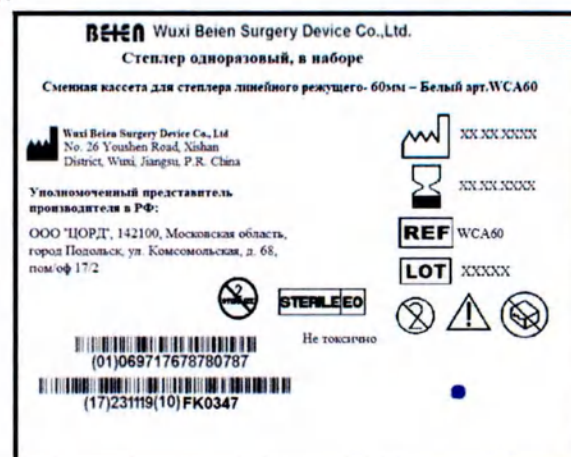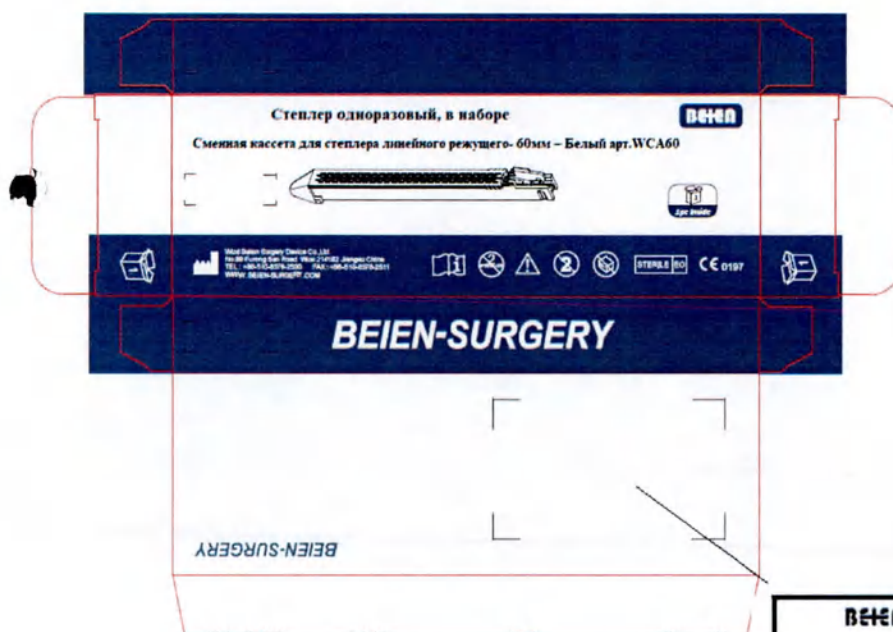

Степлер линейный режущий, в наборе на примере: степлер линейный режущий- 60мм – Белый арт.WLC60

Маркировка транспортной упаковки включает следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя
- наименование производителя с указанием адреса
- наименование изделия и состав
- количество наборов в упаковке
- дата изготовления (обозначено символом)
- срок годности (обозначено символом «Использовать до»)
- символы: «Запрет на повторное применение», «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде», «Осторожно», «Стерилизация оксидом этилена», «Не стерилизовать повторно», «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»
- штрих код
- уполномоченный представитель производителя в РФ
- знак соответствия (при необходимости).

Маркировка транспортной картонной коробки выполняется с нанесением дополнительных символов о правильной транспортировке и хранении изделий, таких как:

- Не допускать воздействия влаги



- Не допускать воздействия солнечного света



Фотографическое изображение транспортной упаковки

Степлер одноразовый, в наборе

1. Степлер режущий эндоскопический, в наборе:

1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E, в составе:

1.1.1. Степлер режущий эндоскопический – Дополнительный арт.ELST-E – 1 шт.

1.1.2. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-60мм - Золотой арт. PR60J- 1 шт.

1.1.3. Сменная кассета для степлера режущего эндоскопического-30мм – Серый арт. PR30M – 1 шт.

1.1.4. Инструкция по применению — 1 шт.

2.Степлер линейный режущий, в наборе:

2.1.Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B, в составе:

2.1.1. Степлер линейный режущий- 80мм – Синий арт.LQ80B – 1 шт.

2.1.2. Сменная кассета для степлера линейного режущего - 80мм – Синий арт.ZQ80B- 1 шт.

2.1.3 Инструкция по применению — 1 шт.

3.Степлер хирургический геморроидальный, в наборе:

3.1.Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32, в составе:

3.1.1 Степлер хирургический геморроидальный-32мм-Фиолетовый арт.PPHJ32 – 1шт.

3.1.2. Аноскоп - 1 шт.

3.1.3. Анальный расширитель – 1шт.

3.1.4. Внутренний канал – 1 шт.

3.1.5. Крючковая игла (шовный продеватель) – 1шт.


3.1.6. Инструкция по применению - 1 шт.



Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd
No. 26 Youshen Road, Xishan
District, Wuxi, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "ЦОРД", 142100, Московская область,
город Подольск, ул. Комсомольская, д. 68,
пом/оф 17/2

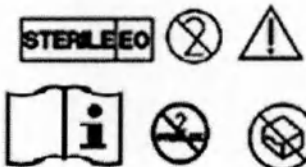

10 наборов



Макет маркировки транспортной упаковки для РФ

3.2. Описание символов, наносимых на упаковку медицинского изделия

3.2. Описание символов, нанесенных на маркировку МИ

	Запрет на повторное применение
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Осторожно
	Использовать до
	Номер по каталогу
	Код партии
	Стерилизация оксидом этилена
	Количество изделий в упаковке

	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Не допускать воздействия влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Индикатор стерилизации (изделие не стерильно)
	Индикатор стерилизации (изделие стерильно)
	Индикатор стерилизации (изделие стерильно)
Надпись:	Не токсично

3.3. Процесс упаковки изделия

Изделия упаковывают в 3 упаковки: первичная упаковка (индивидуальная упаковка), вторичная упаковка (цветная коробка) и транспортная упаковка (коробка из гофрированного картона).

Степлер хирургический геморроидальный упаковывают в первичную упаковку (индивидуальную упаковку), затем во вторичную упаковку в количестве по 1 шт.

Степлер линейный режущий и сменную кассету для степлера линейного режущего по отдельности упаковывают в первичную упаковку (индивидуальную упаковку), затем упаковывают по отдельности во вторичную упаковку в количестве по 1 шт.

Степлер режущий эндоскопический и сменную кассету для степлера режущего эндоскопического по отдельности упаковывают в первичную упаковку (индивидуальную упаковку), затем упаковывают по отдельности во вторичную упаковку в количестве по 1 шт.

В транспортную упаковку упаковывают степлер одноразовый в наборе согласно комплектности п.1.12.


Для индивидуальной упаковки одноразовых изделий используется блистерная крышка Easman PETG6763 и блистерная бумага Dupont 1073B. Эти две части запечатываются горячим способом. После горячего запечатывания наклеивают этикетки. Затем индивидуальную упаковку помещают во вторичную упаковку (цветную коробку). Далее наборы упаковывают в транспортную упаковку (коробку).

4. Информация по проектированию и производству

4.1. Проектирование медицинского изделия



4.2. Производственные процессы

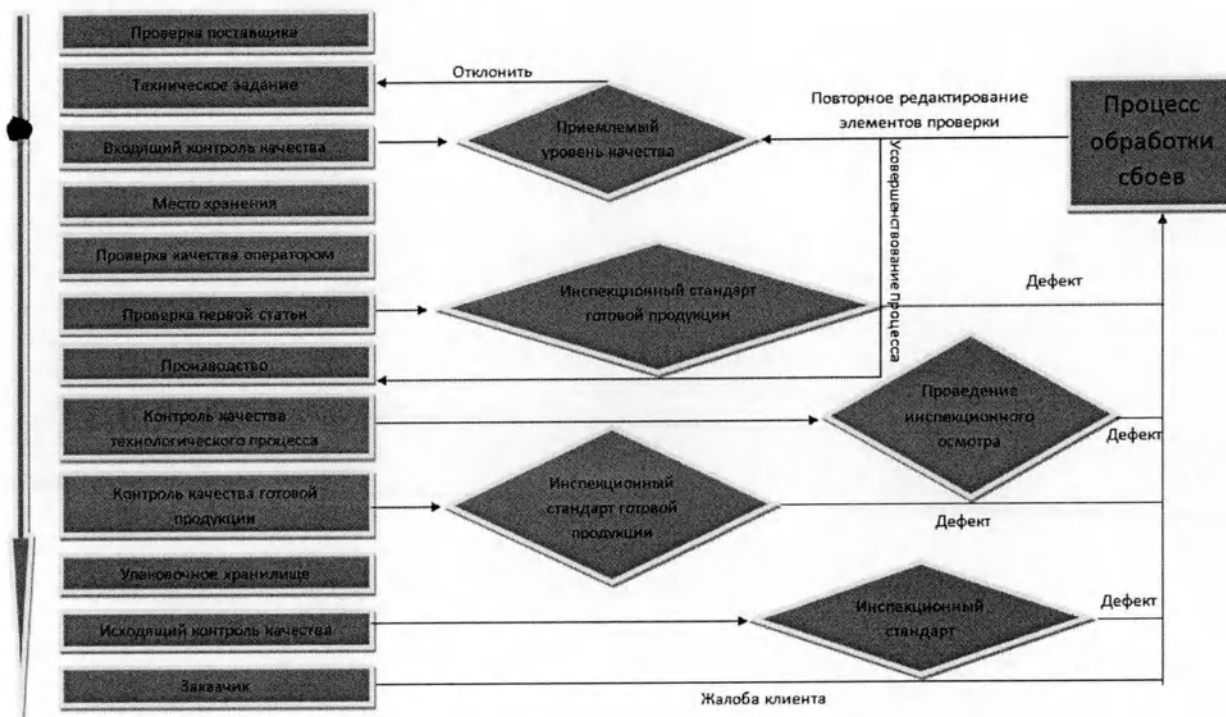

4.3. Производственные площадки

Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd

No. 26 Youshen Road, Xishan District Wuxi, 214192 Jiangsu P.R. China

5. Таблица соответствия существенным принципам

5. Перечень применяемых национальных и международных стандартов с целью обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинского изделия

Стандарт	Описание
EN ISO 10993-1:2009 +AC:2017	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
EN ISO 10993-4:2017	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 4: Выбор тестов для взаимодействий с кровью
EN ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 5: Анализы на в пробирке цитотоксичность
EN ISO 10993-7:2008/AC:2010	Биологическая оценка медицинских устройств — Часть 7: остатки стерилизации Оксидом этилена
EN ISO 10993-10:2013	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
EN ISO 10993-11:2018	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 11: Тесты для системной токсичности

EN ISO 10993-12:2012	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 12: Подготовка пробы и справочные материалы
EN ISO 10993-18:2009	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 18: Химическая характеристика материалов
EN 556-1:2001+Cor 1:2006	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям, обозначаемым как «СТЕРИЛЬНЫЕ». Часть 1. Требования к окончательно стерилизованным медицинским устройствам
EN ISO 11135:2014+A1-2019	Стерилизация медицинских изделий - окись этилена - требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
EN ISO 11138-2:2017	Стерилизация изделий медицинского назначения - индикаторов - Часть 2: Биологические индикаторы для процессов стерилизации оксида этилена
EN ISO 11140-1-2014+AC-2015	Стерилизация изделий медицинского назначения - индикаторов Biological - Часть 2: Биологические индикаторы для процессов стерилизации оксида этилена
EN ISO 11737-1:2018+AC-2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN ISO 11737-2:2019	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
ASTM F 1980-2016	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских изделий
EN ISO 11607-1:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
EN ISO 11607-2:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
EN 62366-1:2015+AC-2016	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
IEC TR 62366-2:2016	Изделия медицинские. Часть 2. Руководство по применению проектирования с учетом эксплуатационной пригодности к медицинским изделиям
EN ISO 13485:2016+AC-2017	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
EN ISO 14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-2:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.

	Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-3:2019	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
EN ISO 14644-4:2001+COR 1:2003	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
EN ISO 14644-5:2004	Чистые помещения и связанный управляли Частью 5 сред: Операции
EN ISO 14644-6:2007	Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 6. Словарь
EN ISO 14644-7:2004	Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7. Разделительные устройства (навесы, перчаточные камеры, разъединители и мини окружение)
EN ISO 14644-8:2013	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - часть 8. Классификация чистоты воздуха по концентрации химических веществ (ППК) - второе издание
EN ISO 14698-1:2003+COR 1:2003	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы
EN ISO14698-2:2003/AC:2006	Чистые помещения и связанный управляли средами — контролем за Загрязнением биосферы — Часть 2: Оценка и интерпретация данных о загрязнении биосферы
EN ISO 14971: 2019	Изделия медицинские. Применение управления рисками к медицинским изделиям
EN ISO 15223-1: 2016+AC-2017	Медицинские устройства – Символы, которые будут использоваться с метками медицинского устройства, маркировкой и информацией, которая будет поставляться – Часть 1: Общие требования
EN 1041:2008+A 1:2013	Информация предоставляется производителем медицинских устройств
ISO 5832-2: 2018	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 2. Нелегированный титан
EN ISO 7153-1:2016	Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь
EN ISO 14630:2012	Неактивные хирургические имплантаты - Общие требования

6. Уполномоченный представитель производителя в РФ (наименование, адрес, телефон, почта)

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица с транслитерацией, или фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "ЦОРД"
Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	ООО "ЦОРД"
Фирменное наименование юридического лица (при наличии)	-
Идентификационный номер налогоплательщика	5036131197
Адрес места нахождения юридического лица	142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 68, ПОМ/ОФ 17/2
Номера телефонов	8-495-764-17-09

В составе медицинских изделий нет лекарственных средств.



本附加证明书仅证明公文上的签名、签署人签名时的身份,必要时可证明公文上的印章属实。附加证明书不对公文内容予以证明。
This Apostille only certifies the authenticity of the signature, the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
Visit <https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/> and scan the QR code to verify the issuance of this Apostille.



10890938



附加证明书
APOSTILLE

(1961年10月5日海牙公约)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. 文书出具国: 中华人民共和国
Country: People's Republic of China
- 本公文 This public document
2. 签署人
has been
signed by 陈焱
Chen Yao
3. 签署人身份
acting in the
capacity of 签证员
Authorized Official
4. 印鉴名称
bears the
seal/stamp of 中国国际贸易促进委员会
China Council for the Promotion of International Trade

证明 Certified

5. 签发地 北京
at Beijing
6. 签发日期 2024年06月18日
the June 18, 2024
7. 签发人 石玉丰, 一等秘书/ Shi Yufeng, First Secretary
by 外交部领事司
Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs

8. 附加证明书编号 认字第240000244084号
No

9. 签发机关印鉴:
Seal/Stamp:
10. 签名:
Signature:



石玉丰

Сертификат

/тип: ССРІТ Китайский совет по государственному управлению /

Китайский совет по содействию международной торговле / Китайская международная
торговая палата

/Голограмма/

Китайский совет по содействию международной торговле / Китайская международная
торговая палата

СЕРТИФИКАТ

(QR- код)

№ 241100B0/H23264

Настоящим удостоверяю, что: печать компании WUXI BEIEN SURGERY DEVICE
CO., LTD. /УСИ БЕЙЕН СУРГЕРУ ДЕВИСЕ КО. ЛТД. на приложенном
ДОКУМЕНТЕ являются подлинными.

*Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговли**
ССРІТ Сертификация**

Китайский совет по содействию международной торговли

Подпись уполномоченного лица /подпись/

Чэнь Яо

Дата: 14 июня 2024

Сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

*Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговли**
ССРІТ Сертификация**

/печать: WUXI BEIEN SURGERY DEVICE CO., LTD.
/УСИ БЕЙЕН СУРГЕРУ ДЕВИСЕ КО., ЛТД

Сюй Вейдун
(Генеральный директор)
/подпись/
02.04.2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Степлер одноразовый, в наборе, в вариантах исполнения»

/текст документа на русском языке/

/QR-код/

/штрих-код/ 10890938

Настоящий апостиль подтверждает только подлинность подписи и должность лица, подписью которого скреплен прилагаемый официальный документ, а также, в соответствующих случаях, подлинность печати или штампа, которыми был скреплен прилагаемый официальный документ.

Апостиль не подтверждает содержание официального документа.

Перейдите на сайт <https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/> и отсканируйте QR-код, чтобы проверить выдачу данного апостиля.

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Китайская Народная Республика

Настоящий официальный документ

2. был подписан: Сюй Вейдун

3. выступающим(-ей) в качестве: Уполномоченного специалиста

4. скреплен печатью/штампом Китайского совета по развитию международной торговли

Удостоверено

5. в Пекине

6. 18 июня 2024 г.

7. (кем) Ши Юфенг, первый секретарь.
Департамент по консульским вопросам Министерства иностранных дел

8. За № 240000244084

9. Печать/ штамп: 10. Подпись:

/Подпись/

/Печать: Министерство Иностранных Дел КНР /

Переводчик  Анган Татьяна Юрьевна

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого июля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Давыдова Галина Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Анган Татьяны Юрьевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/832-н/77-2024-3- *301*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Г.А. Давыдова

Г.А. Давыдова



Всего пронумеровано,
пронумеровано и приложено
печатью 1 лист
Нотариус *Г.А. Давыдова*