

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий - индивидуальный
предприниматель
ООО «МЕДЛАЙН»



Чернобаев В.В.

17 апреля 2024 г.

Руководство по эксплуатации

ШТОРЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ LINÉSTA®

ПО ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

г. Омск

2024

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Шторы антибактериальные медицинские LINESTA®, варианты исполнения (далее – шторы, изделие), предназначенные для создания временной изоляции внутри медицинских помещений для обеспечения конфиденциальности при осмотре пациентов и осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния пациентов, для профилактики инфекционной контаминации между пациентами.

Принцип действия – шторы выполняют функцию механического барьера.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Условия применения – в больничных палатах, процедурных, смотровых кабинетах и других медицинских помещениях.

Информация о потенциальных потребителях – медицинские работники, пациенты.

Показания – для создания временной изоляции внутри медицинских помещений для обеспечения конфиденциальности при осмотре пациентов и осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния пациентов, для профилактики инфекционной контаминации между пациентами.

Противопоказания – не выявлены

Побочные эффекты – не выявлены

Меры предосторожности

Не использовать изделие вблизи открытого огня.

Описание изделия

Подвесной экран, который применяется для разделения помещения или части помещения или отсека и обеспечивает временное уединение. Он используется вокруг кровати, впереди отсека или окна. Это приспособление многократного использования.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами, наличие сетки улучшает вентиляцию и светопропускаемость. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами, наличие сетки улучшает вентиляцию и светопропускаемость. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Наименование медицинского изделия:

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® по ТУ 14.12.30-003-11903952-2023

Материалы изготовления

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE - из полиэстера

Состав	Материал
Штора	Полиэстер
Пропитка антибактериальная	Ultra-Fresh CA-16
Липучка	Полиамид, нейлон
Фурнитура металлическая: Кольца, Крючки	Сталь, покрытая ПВХ
Нитки	Полиэстер Gala 40/2

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS и Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE из полипропилена,

Состав	Материал
Штора, сетка, тесьма	Полипропилен
Фурнитура пластиковая Кольца, Крючки-гвоздики	Полипропилен
Пропитка антибактериальная	Ultra-Fresh CA-16
Нитки	Полиэстер Gala 40/2

Красители

Наименование	Марка
Серый	Gray #18099
Зеленый (светлый и темный)	Green 7
Красный	RED 101
Бледно - розовый	№076105
Желтый	Yellow 180 2T
Сиреневый, фиолетовый (светлый и темный)	Violet 3
Голубой	Blue 15:0
Синий (светлый и темный)	Aldrich 546674
Белый	BLR-500
Коричневый (светлый и темный), бежевый	Brown 43

Пропитка антибактериальная

Наименование	Состав (активный ингредиент/продукт)
Пропитка антибактериальная Ultra-Fresh CA-16	Фосфатное стекло с серебром

Поставляемые материалы должны соответствовать ГОСТ 20743*, что подтверждается поставщиком материалов предоставлением отчетов о проведенных испытаниях на соответствие ИСО 20743.

Изделие не имеет контакта с пациентом, медицинский персонал контактирует с изделием в средствах индивидуальной защиты (в перчатках).

Комплектность

Комплект поставки должен соответствовать, указанному.

1. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-синий, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-синий, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-синий, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-синий, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-синий, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-синий, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-синий, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководство по эксплуатации ШТОРЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ LINESTA®
ПО ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Страница 4 из 36

8. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно -синий, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
9. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно -синий, размер 3,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
10. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно -синий, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
11. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно -синий, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
12. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно -синий, размер 3,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
13. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет голубой, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
14. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет голубой, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
15. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет голубой, размер 3,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
16. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет голубой, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
17. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет голубой, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
18. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет голубой, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
19. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
21. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
22. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-зеленый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-зеленый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-зеленый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
26. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
27. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
28. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-зеленый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
29. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-зеленый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
30. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-зеленый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
31. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бежевый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
32. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бежевый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
33. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бежевый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
34. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бежевый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
35. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бежевый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
36. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бежевый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
37. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет белый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
38. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет белый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
39. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет белый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
40. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет белый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
41. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет белый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
42. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет белый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
43. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-коричневый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
44. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-коричневый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
45. Шторы antibактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло-коричневый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

46. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-коричневый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
47. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-коричневый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
48. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло-коричневый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
49. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-коричневый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
50. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-коричневый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
51. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-коричневый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
52. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-коричневый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
53. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-коричневый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
54. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-коричневый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

55. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло- фиолетовый, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

56. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло- фиолетовый, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

57. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет светло- фиолетовый, размер 3,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

58. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло- фиолетовый, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

59. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло- фиолетовый, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

60. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет светло- фиолетовый, размер 3,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

61. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-фиолетовый, размер 8,50 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

62. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-фиолетовый, размер 5,40 х 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

63. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет темно-фиолетовый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
64. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-фиолетовый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
65. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-фиолетовый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
66. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет темно-фиолетовый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
67. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бледно розовый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
68. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бледно розовый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
69. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет бледно розовый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
70. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бледно розовый, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
71. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бледно розовый, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
72. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет бледно розовый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
73. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет разноцветный, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
74. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет разноцветный, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
75. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет разноцветный, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
76. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет разноцветный, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
77. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет разноцветный, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
78. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет разноцветный, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
79. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет - детский с рисунками, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

80. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет - детский с рисунками, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
81. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление кольцо, цвет - детский с рисунками, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
82. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет цвет - детский с рисунками, размер 8,50 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
83. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет - детский с рисунками, размер 5,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
84. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок цвет - детский с рисунками, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
85. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет серый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
86. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет серый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
87. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет серый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
88. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.

89. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
90. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
91. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
92. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
93. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
94. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет красный, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
95. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет красный, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
96. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет красный, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

97. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
98. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
99. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
100. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет желтый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
101. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет желтый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
102. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет желтый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
103. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
104. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
105. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.

- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
106. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
107. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
108. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
109. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет голубой, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
110. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет голубой, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
111. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет голубой, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
112. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
113. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

114. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
115. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет синий, размер 7,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
116. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет синий, размер 4,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
117. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет синий, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
118. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет серый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
119. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет серый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
120. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет серый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
121. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет серый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
122. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет серый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

123. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет серый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
124. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
125. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
126. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет светло-зеленый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
127. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет светло-зеленый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
128. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет светло-зеленый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
129. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет светло-зеленый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
130. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт.
131. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.

- Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
132. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет темно-зеленый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
133. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет темно-зеленый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
134. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет темно-зеленый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
135. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет темно-зеленый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
136. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет красный, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
137. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет красный, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
138. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет красный, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
139. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет красный, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
140. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет красный, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

141. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет красный, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
142. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
143. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
144. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бледно-розовый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
145. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бледно-розовый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
146. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бледно-розовый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
147. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бледно-розовый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
148. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет желтый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
149. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет желтый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

150. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет желтый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
151. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет желтый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
152. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет желтый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
153. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет желтый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
154. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
155. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
156. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет бежевый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
157. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бежевый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
158. Штора антибактериальная медицинские LINESTA[®] JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бежевый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

159. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет бежевый, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
160. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 7,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
161. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 4,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
162. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет сиреневый, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
163. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет сиреневый, размер 7,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
164. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет сиреневый, размер 4,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
165. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет сиреневый, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
166. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет голубой, размер 7,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
167. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет голубой, размер 4,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

168. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет голубой, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
169. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет голубой, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
170. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет голубой, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
171. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет голубой, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
172. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
173. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
174. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет фиолетовый, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
175. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет фиолетовый, размер 7,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
176. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет фиолетовый, размер 4,5 x 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

177. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет фиолетовый, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
178. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет синий, размер 7,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
179. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет синий, размер 4,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
180. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет синий, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
181. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет синий, размер 7,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
182. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет синий, размер 4,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
183. Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление крючок-гвоздик, цвет синий, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, адрес, номер телефона, товарный знак
- символ «Изготовитель»
- наименование изделия;
- размеры (длина/ширина);

Руководство по эксплуатации ШТОРЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ LINESTA®
ПО ТУ 32.50.50-003-1 1903952-2023 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Страница 24 из 36

- символ или надпись «Код партии»
- символ или надпись «Дата изготовления»
- надпись срок годности или символ «Использовать до»
- символ «Температурный диапазон»
- штрих-код (при наличии)
- номер настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения
- QR-код (при наличии)
- совместимые направляющие с изделием
- возможные методы очистки изделия

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

- наименование предприятия-изготовителя, адрес, номер телефона, товарный знак
- символ «Изготовитель»
- наименование изделия ;
- размеры (длина/ширина);
- символ или надпись «Код партии»
- количество потребительских упаковок
- символ или надпись «Дата изготовления»
- надпись срок годности или символ «Использовать до»
- символ «Температурный диапазон»
- штрих-код (при наличии)
- номер настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения
- QR-код (при наличии)
- Символ «Беречь от влаги»
- Символ «Не допускать воздействия солнечного света».

Упаковка

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Изделие должно быть упаковано в потребительскую упаковку - индивидуальный полиэтиленовый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 марки М. Изделие в потребительской упаковке должно быть уложено в групповую упаковку (транспортную тару) – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 7933, или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики должны быть оклеены лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Эксплуатационная документация (Инструкция по применению) должна быть помещена в пакет (из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354) или без пакета и уложена в ящик (транспортную тару).

Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

Масса брутто транспортной упаковки должна быть не более 25 кг.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение изделия должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

Условия хранения изделия в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21

Изделия, не загрязненные биологической жидкостью после использования, относятся к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21

Изделия, загрязненные биологической жидкостью после использования, относятся к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованное изделие так же подлежит утилизации как отходы класса А в случаях:
– окончания срока годности;

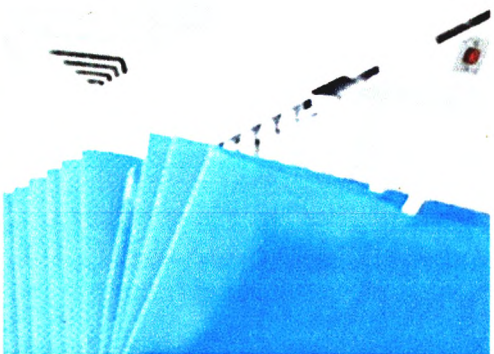
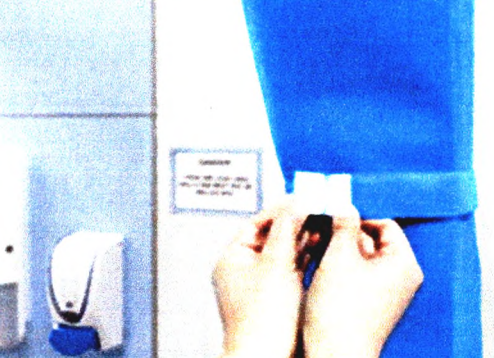
– повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.
Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

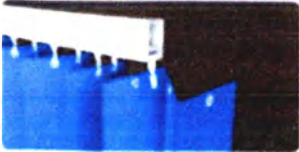
Использование изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Способ применения

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой
Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки.

	Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола Крепление крючок-гвоздик – просто закрепите штору на рейке. Крепление кольцо – вставьте кольцо в крючок для штор (в комплект не входит) и закрепите штору на рейке.
	Как только штора будет повешена, снимите защитную полиэтиленовую упаковку. Когда штора не используется, откиньте ее к стене и зафиксируйте с помощью подхвата для штор.

Крепление кольцо и крючок-гвоздик подходят для направляющих с указанными в таблице профилями:

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протиранием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой



Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола.

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Очистку проводят способом стирки

Стирка вручную

Вручную постирайте в теплой воде (прибл. 35 °С) с использованием мыла или моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 .

Тщательно прополощите в холодной воде и просушите на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей

Машинная стирка

Можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С в течение 1 часа с использованием мягкого моющего средства. После этого просушите изделие на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

После каждой стирки необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Антибактериальная пропитка сохраняется до 5 стирок.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности и хранения – 5 лет.

Срок эксплуатации изделий – шторы из полипропилена 6 месяцев, шторы из полиэстера – 3 года.

Необходимо направлять сообщения производителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
МУ-287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ТУ 6-01-4689387-16	Хлорамин Б технический
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.3.02-2014	Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
ГОСТ 8.051-81	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 28073-89	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ 30157.1-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
ГОСТ 29104.1-91	Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3816-81	Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 29150-91	Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля
ГОСТ Р ИСО 20743-2012	Материалы текстильные. Определение антибактериальной активности изделий с антибактериальной обработкой

Общая руководство по эксплуатации для изделия может быть представлена в сопроводительной документации по требованию заказчика.

Объем представленной информации в руководстве по эксплуатации, входящей в комплект поставки (приложения 1,2,3), достаточен для применения медицинского изделия 1 класса риска по назначению и такое применение безопасно.

Руководство по эксплуатации

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA[®]
по ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 вариант исполнения
Шторы антибактериальные медицинские LINESTA[®] SAGE
из полиэстера, с сеткой

Назначение - для создания временной изоляции внутри медицинских помещений для обеспечения конфиденциальности при осмотре пациентов и осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния пациентов, для профилактики инфекционной контаминации между пациентами.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Условия применения – в больничных палатах, процедурных, смотровых кабинетах и других медицинских помещениях.

Показания – для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности, а также для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции, защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, для разделения палат на зоны, для использования в медицинских помещениях, требующих высокой чистоты.

Противопоказания – не выявлены

Побочные эффекты – не выявлены

Меры предосторожности - не использовать изделие вблизи открытого огня.

Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Транспортирование и хранение изделия должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Способ применения

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA[®] SAGE, из полиэстера, с сеткой
Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола.

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Очистку проводят способом стирки

Стирка вручную

Вручную постирайте в теплой воде (прибл. 35 °С) с использованием мыла или моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

Руководство по эксплуатации ШТОРЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ LINESTA[®]
ПО ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Страница 31 из 36

Тщательно прополощите в холодной воде и просушите на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей

Машинная стирка

Можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С в течение 1 часа с использованием мягкого моющего средства. После этого просушите изделие на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

После каждой стирки необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Антибактериальная пропитка сохраняется до 5 стирок.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности и хранения – 5 лет.

Срок эксплуатации изделий – шторы из полиэстера – 3 года.

Необходимо направлять сообщения производителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

Производитель

ООО "МедЛайн", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305

Телефон: 7 (3812) 53-65-37. info@medline-rus.ru

Руководство по эксплуатации

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA®
по ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 вариант исполнения
Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS
из полипропилена, с сеткой

Назначение - для создания временной изоляции внутри медицинских помещений для обеспечения конфиденциальности при осмотре пациентов и осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния пациентов, для профилактики инфекционной контаминации между пациентами.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Условия применения – в больничных палатах, процедурных, смотровых кабинетах и других медицинских помещениях.

Показания – для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности, а также для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции, защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, для разделения палат на зоны, для использования в медицинских помещениях, требующих высокой чистоты.

Противопоказания – не выявлены

Побочные эффекты – не выявлены

Меры предосторожности - не использовать изделие вблизи открытого огня.

Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Транспортирование и хранение изделия должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Способ применения

Крепление кольцо – вставьте кольцо в крючок для штор (в комплект не входит) и закрепите штору на рейке.

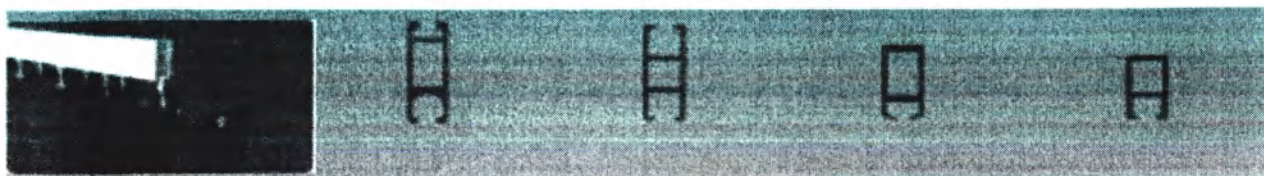
Как только штора будет повешена, снимите защитную полиэтиленовую упаковку.

Когда штора не используется, откиньте ее к стене и зафиксируйте с помощью подхвата для штор.

Крепление кольцо подходят для направляющих с указанными в таблице профилями:

Руководство по эксплуатации ШТОРЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ LINESTA®
ПО ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Страница 33 из 36



Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протиранием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности и хранения – 5 лет.

Срок эксплуатации изделий – шторы из полипропилена 6 месяцев.

Необходимо направлять сообщения производителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

Производитель

ООО "МедЛайн ", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305

Телефон: 7 (3812) 53-65-37, info@medline-rus.ru

Руководство по эксплуатации**Шторы антибактериальные медицинские LINESTA®**

по ТУ 32.50.50-003-11903952-2023 вариант исполнения

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE.

из полипропилена, без сетки.

Назначение - для создания временной изоляции внутри медицинских помещений для обеспечения конфиденциальности при осмотре пациентов и осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния пациентов, для профилактики инфекционной контаминации между пациентами.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Условия применения – в больничных палатах, процедурных, смотровых кабинетах и других медицинских помещениях.

Показания – для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности, а так же для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции, защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, для разделения палат на зоны, для использования в медицинских помещениях, требующих высокой чистоты.

Противопоказания – не выявлены

Побочные эффекты – не выявлены

Меры предосторожности - не использовать изделие вблизи открытого огня.

Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Транспортирование и хранение изделия должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Способ применения

Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола

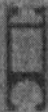
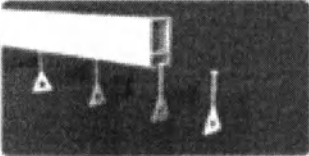
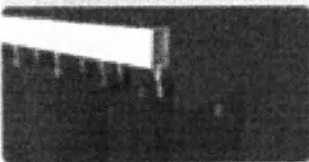
Крепление крючок-гвоздик – просто закрепите штору на рейке.

Крепление кольцо – вставьте кольцо в крючок для штор (в комплект не входит) и закрепите штору на рейке.

Как только штора будет повешена, снимите защитную полиэтиленовую упаковку.

Когда штора не используется, откиньте ее к стене и зафиксируйте с помощью подхвата для штор.

Крепление кольцо и крючок-гвоздик подходят для направляющих с указанными в таблице профилями:

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протираанием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности и хранения – 5 лет.

Срок эксплуатации изделий – шторы из полипропилена 6 месяцев.

Необходимо направлять сообщения производителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

Производитель

ООО "МедЛайн", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305

Телефон: 7 (3812) 53-65-37, info@medline-rus.ru

Прошито 36 листов
Тридцать шесть
Управляющий – индивидуальный
предприниматель
подпись _____ /Чернобаев В.В./



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий - индивидуальный
предприниматель
ООО «МЕДЛАЙН»



Чернобаев В.В.

Инструкция по применению

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA®

по ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

варианты исполнения

Редакция 2

г. Омск

2024

Настоящая инструкция по применению распространяется на Шторы антибактериальные медицинские LINESTA®, варианты исполнения (далее – шторы, изделие), предназначены для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе, защиты от возможного инфицирования, для разделения помещения или части помещения или отсека и обеспечивает временное уединение.

Принцип действия – шторы выполняют функцию механического барьера.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Условия применения – изделие для профессионального применения, используется только в условиях медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Информация о потенциальных потребителях – медицинские работники, пациенты.

Показания – для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности, а так же для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции, защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, для разделения палат на зоны, для использования в медицинских помещениях, требующих высокой чистоты.

Противопоказания – не выявлены

Побочные эффекты – не выявлены

Меры предосторожности

Не использовать изделие вблизи открытого огня.

Описание изделия

Подвесной экран, который применяется для разделения помещения или части помещения или отсека и обеспечивает временное уединение. Он используется вокруг кровати, впереди отсека или окна. Это приспособление многократного использования.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами, наличие сетки улучшает вентиляцию и светопрозрачность. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами, наличие сетки улучшает вентиляцию и светопрозрачность. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки – позволяет быстро создавать перегородки между пациентами. Материал изготовления штор является огнестойким, также имеет антибактериальную пропитку.

Наименование медицинского изделия:

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® по ТУ 14.12.30-003-11903952-2023

Варианты исполнения:

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки

Материалы изготовления

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE - из полиэстера

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS и Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE из полипропилена,

Комплектность

- 1. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой – 1 шт./уп.**
- 2. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой – 1 шт./уп.**
- 3. Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки – 1 шт./уп.**

Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444.

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Транспортирование и хранение изделия должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

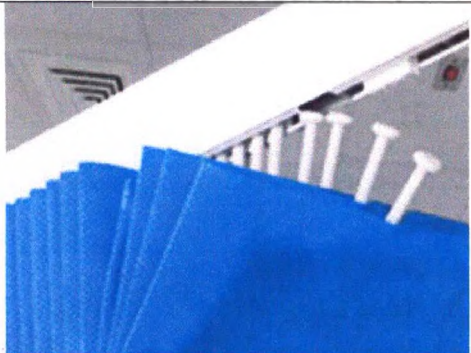
Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

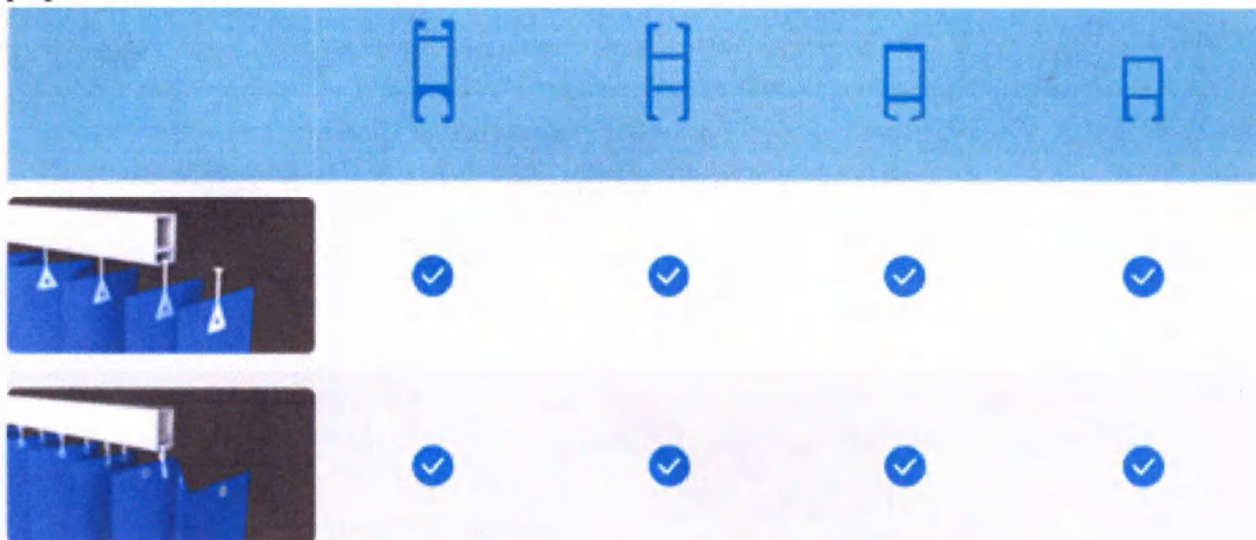
Использование изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

Способ применения

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой
 Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки.

	Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола Крепление крючок-гвоздик – просто закрепите штору на рейке. Крепление кольцо – вставьте кольцо в крючок для штор (в комплект не входит) и закрепите штору на рейке.
	Как только штора будет повешена, снимите защитную полиэтиленовую упаковку. Когда штора не используется, откиньте ее к стене и зафиксируйте с помощью подхвата для штор.

Крепление кольцо и крючок-гвоздик подходят для направляющих с указанными в таблице профилями:



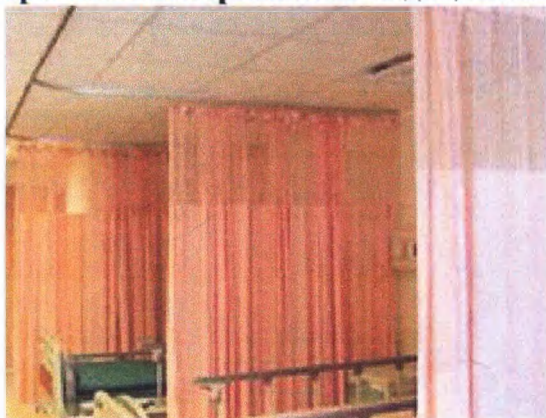
Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протиранием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой



Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола.

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Очистку проводят способом стирки

Стирка вручную

Вручную постирайте в теплой воде (прибл. 35 °С) с использованием мыла или моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

Тщательно прополощите в холодной воде и просушите на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей

Машинная стирка

Можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С в течение 1 часа с использованием мягкого моющего средства. После этого просушите изделие на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

После каждой стирки необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Антибактериальная пропитка сохраняется до 5 стирок.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности и хранения – 5 лет.

Срок эксплуатации изделий – шторы из полипропилена 6 месяцев, шторы из полиэстера – 3 года.

Необходимо направлять сообщения производителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

Производитель

ООО "МедЛайн", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305

Телефон: 7 (3812) 53-65-37, info@medline-rus.ru

Прошито 5 листов

(подпись)

Управляющий – индивидуальный

предприниматель

/Чернобаев В

(подпись)
подпись

