

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав готового к употреблению гемодиализного раствора: Указан на этикетке кислотного концентрата для бикарбонатного гемодиализа.

Тип применения: для экстракорпорального бикарбонатного гемодиализа или бикарбонатной гемодиализации (включая процедуру on-line только в сочетании с оборудованием Fresenius) в соответствии с назначением врача. Используется только в сочетании с готовым к использованию бикарбонатным концентратом 8.4 % или с сухим бикарбонатом для бикарбонатного гемодиализа в заданном разведении. Другие разведения могут подвергать опасности пациента. Для соблюдения безопасности, гемодиализные процедуры должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию в гемодиализе, ознакомленным с обеими инструкциями по использованию и с руководством для диализного аппарата.

Противопоказания: Гиперкалиемия (только для гемодиализных концентратов с концентрацией калия в готовой к применению диализной жидкости 4 ммоль/л или выше), гипокалиемия (только для гемодиализных концентратов с концентрацией калия в готовой к применению диализной жидкости 3 ммоль/л или ниже). При выборе концентрации калия в диализной жидкости должны быть приняты во внимание возможные негативные последствия быстрого изменения концентрации калия в плазме. Неконтролируемые нарушения коагуляции.

Побочные эффекты: Гипотензия, тошнота, рвота, мышечные судороги, головокружение, головная боль и потеря сознания наблюдались в ходе лечения гемодиализом.

Примечание: Кислотный и основной концентраты для бикарбонатного гемодиализа должны быть разведены немедленно перед использованием водой соответствующего качества. Не использовать если упаковка повреждена. Использовать только прозрачные растворы. Всегда проверять состав готового к использованию гемодиализного раствора. Избавиться от остатков. Для процедуры гемодиализации (включая процедуру on-line) основное внимание должно уделяться качеству воды в соответствии с предписываемыми стандартами и/или Европейской Фармокопеи для растворов для гемодиализации.

Условия хранения: Следует хранить при температуре от +5°C до +30°C. Контейнеры хранить запечатанными до момента использования.

Апирогенно.

Генеральный директор
ЗАО «Фрезениус СП»



А.В. Мяков