

ООО "МЕДИН - Н" г. Екатеринбург

УТВЕРЖДАЮ



ИГЛЫ
АТРАВМАТИЧЕСКИЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
АХИ .100.005 ПИ

2000 г.

413-004г

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Форма 3 ОСТ 92-1.4-72

Копировал

Формат А4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы атравматические офтальмологические стерильные, однократного применения используются для сшивания тканей при хирургических операциях. Область применения – офтальмология.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Шовная нить:

материал нити -
усл. № (метрич. размер) -
длина нити, см -

Игольный наконечник:

диаметр исходной проволоки, мм -
развернутая длина, мм -
степень изгиба - 3/8
форма сечения острия - шпательная
количество наконечников -

Способ стерилизации – радиационный.

3. ПОДГОТОВКА ИГЛЫ К РАБОТЕ

- Вскрыть групповую упаковку и извлечь иглу в потребительской упаковке;
- Убедиться в целостности потребительской упаковки и отсутствии механических повреждений.
- В стерильном помещении непосредственно перед операцией вскрыть наружный пакет, а затем внутренний путем разрыва в месте надсечек на упаковке.
- Снять иглу со шпули.

Применение игл должно осуществляться специально подготовленным медперсоналом.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Иглы допускается транспортировать любым видом крытого транспорта при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

У потребителя иглы должны храниться в закрытом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% без воздействия солнечных лучей. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Соколов	С.А.	15.03.00
Пров.		Горелышев	В.А.	15.03.00
Н.-контр.		Горелышев	В.А.	15.03.00
Утв.		Жданов	В.А.	15.03.00

АХИ.100.005 ПИ

Паспорт -
- инструкция

Лит.	Лист	Листов
А	2	8
000 "Медцин-Н"		

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие игл требованиям ТУ 9432-003-52318770-00 при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия- изготовителя 3 года со дня стерилизации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Партия игл № _____ прошла стерилизацию радиационным способом (паспорт № _____ от "_____" 200 г.) и признана стерильной, апиrogenной, нетоксичной (Заключение Свердловской облСЭС № 10/10- _____ от "_____" 200 г.).


Партия игл № _____ атравматических офтальмологических АХИ.100.005 С6 изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9432-003-52318770-00 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

"_____" 200 г

Директор ООО "МЕДИН-Н" _____

"_____" 200 г

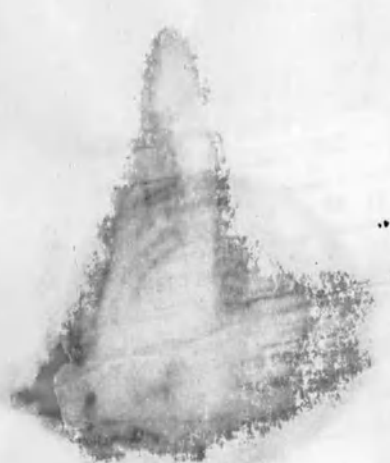

АХИ.100.005 пи

Лист

3

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Форма 5а ГОСТ 2.106-68

413-015

Копировал

Формат А4

Ковалев Борис
Исполнительный директор
ЗАО
ЗАО "Спецстрой"
ЗАО "Спецстрой"

