

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА GRANUMIX 107S.

1. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ.

- Присоединить разъёмный коннектор к резервуару.
- Оранжевый выключатель на задней панели перевести в положение "ON".
- Синий выключатель перевести в положение "RUN".
- Открыть кран подачи воды.

2. ЧАСТОТА ДЕЗИНФЕКЦИЙ.

- | | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| - Гранудил AF+XN | - | без дезинфекции. |
| - Гранудил AT | - | ежемесячно. |
| - Гранудил VI и BC | - | по результатам теста. |

Перед каждой дезинфекцией необходимо сменить фильтр !

3. ПРОГРАММА ПРОМЫВКИ (20 МИНУТ).

- Установить фильтр в фильтродержатель.
- Убедиться, что крышка бака плотно закрыта.
- Присоединить разъёмный коннектор к резервуару.
- Нажать кнопку открытия клапана входной воды.
- Заполнить бак до нижнего уровня (автоматически).
- Нажать кнопку закрытия клапана входной воды.
- Задать время работы помпы 10 минут.
- По окончании работы помпы присоединить разъёмный коннектор к сливу.
- Задать время работы помпы 5 минут.
- Если бак опорожнён не полностью задать дополнительно 2-3 минуты работы помпы.
- После опорожнения бака присоединить разъёмный коннектор к резервуару.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ (40 МИНУТ).

Дезинфектант: PURISTERIL 340 или аналог.

Объём дезинфектанта : 500 мл для получения рабочей концентрации 0.02%.

- Провести программу промывки.
- Провести программу промывки с добавлением дезинфектанта после заполнения бака.
- Провести программу промывки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА GRANUMIX 107S.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА (40 МИНУТ).

- Провести промывку перед приготовлением концентрата !
- Присоединить разъёмный коннектор к резервуару.
- Нажать кнопку открытия клапана входной воды.
- Заполнить бак до нижнего уровня (автоматически).
- Нажать кнопку закрытия клапана входной воды.
- Открыть крышку бака.
- Засыпать в бак необходимое количество сухого концентрата.
- Закрыть крышку бака.
- Нажать кнопку открытия клапана входной воды.
- Подождать, пока клапан входной воды не закроется автоматически.
- Задать время работы пропеллера 20 минут.
- После остановки пропеллера задать время работы помпы 5 минут.
- После остановки помпы выдержать паузу 5 минут.
- Нажать кнопку открытия клапана входной воды.
- Подождать, пока клапан входной воды не закроется автоматически.
- Задать время работы пропеллера 10 минут.
- Задать время работы помпы 10 минут.
- Концентрат приготовлен.

6. РАЗЛИВ КОНЦЕНТРАТА.

- Присоединить разъёмный коннектор к разливочному пистолету.
- Задать необходимое время работы помпы.
- Слить первые 500 мл концентрата.
- Разлить концентрат в приготовленные ёмкости.
- Выключить помпу.
- Закрыть кран входной воды.
- Перевести выключатель на задней панели в положение "OFF".
- Присоединить разъёмный коннектор к резервуару.

