

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"
Пак И.Т.



«01» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система инфузионная стерильная однократного применения с
инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм)**

2023 г.

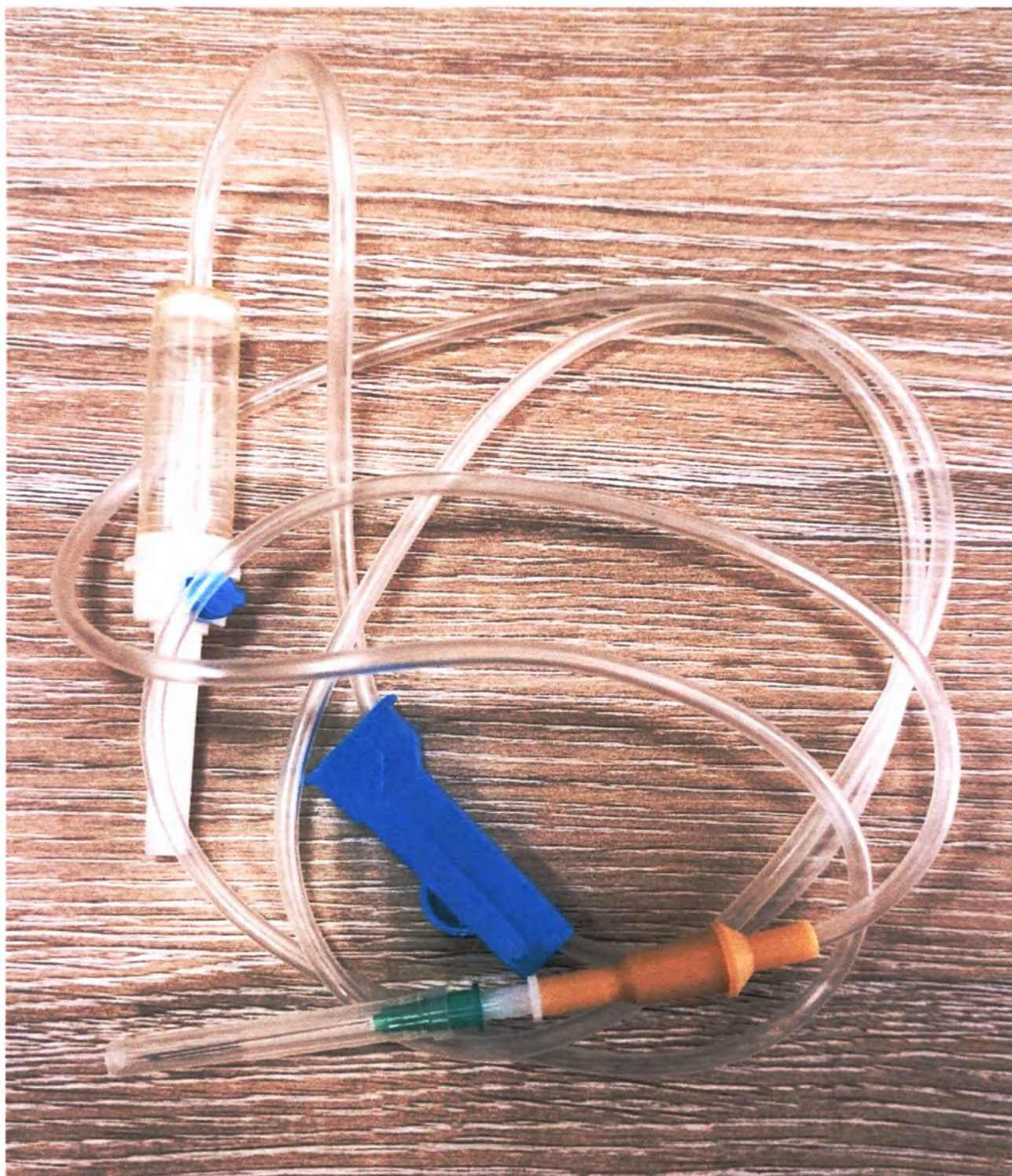


Рисунок 1 - Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Общий вид.

[illegible]

- Только для подачи самотеком.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 1. Внимательно осмотрите индивидуальную (специализированную) упаковку и убедитесь в том, что она не повреждена.
 2. Проверьте при помощи инфузионного раствора (применения). Обработайте гребень контейнера спиртом, дождитесь его высыхания.
 3. Вскройте индивидуальную (специализированную) упаковку, после чего вскройте систему.
 4. Отрегулируйте регулятор скорости потока по высоте и плотно закройте его.
 5. Снимите защитный колпачок с прокалывающего устройства (гиподермического шпала), введите прокалывающее устройство на всю длину в контейнер с инфузионным раствором.
 6. Переведите контейнер с инфузионным раствором и установите его на штатив.
 7. Сделайте нагнетание воздуха и заполните ве на половину объема.
 8. Откройте заглушку воздушного клапана.

Внимание! Если инфузионный раствор упакован в емкость из мягкого материала (полимерный контейнер), то всасывание можно не открывать!

9. Определите регулятор скорости потока инфузионной системы и медленно закройте иглу.
10. Зафиксируйте иглу скорости потока в «обливающей» позиции.
11. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в трубке.
12. Соедините насос венотрубки антирефлюксом.
13. Соедините насос с инфузионной иглой и введите иглу в вену пациента.
14. Отрегулируйте скорость потока инфузионного раствора регулятором скорости потока инфузионной системы.
15. Зафиксируйте иглу иглу стерильной инфузионной повязкой на теле пациента.
16. Проверьте соответствие инфузионной иглы с соединением типа Лув-Слип.
17. Произведите вентуляцию.
18. Импортируйте систему утилизируйте в установленном порядке.

Полное постоянное инфузии пациент может нуждаться в дополнительных инфузиях. Для этого система имеет приспособление для дополнительного введения инфузий - латексный инъекционный узел. Для введения дополнительной инфузии следует проколоть инъекционный узел иголкой со шприцем и ввести дополнительный раствор/лекарственное средство в систему.

Py № _____ OT _____ F.

Использование по назначению изделий утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия истекшего срока годности, с поврежденными упаковками утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Проживающие совместно, родственники в форме общества: - гражданское общество "HEALTH LINE" создано в форме общества с предельно малым количеством участников "HEALTH LINE" от 000 "HEALTH LINE" (от 000 "HEALTH LINE"). Адрес: муниципальное образование "Самарское" в Самарской области; Республика Татарстан, 111902 г. Ташкино, Рязанский район, Угличский ул. №100, д. 238. Тел.: (39378) 150-64-77, (44784) 153-74-39, (99878) 150-74-27; Факс: (39378) 150-74-27. E-mail: info@healthline.ru. Web: www.healthline.ru. Медицинская информация подается от 000 "HEALTH LINE". Республика Татарстан, 111902 г. Ташкино, Рязанский район, Угличский ул. №100, д. 238.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН РУС"
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС". Юридический адрес: Россия, 111250, г. Москва,
ВНТРЕП. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБОРДОВО, ул. Леонова-Мухоморова Вал.
д. 16А, этаж/помещение 1/1, кон./офис 218/52. Тел.: +7(499)4555519;
E-mail: office@helsline.ru

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН



Рисунок 2 - Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G 1 x 1 1/2" (0,8x38 mm). Маркировка индивидуальной (стерилизационной) упаковки (вид спереди).

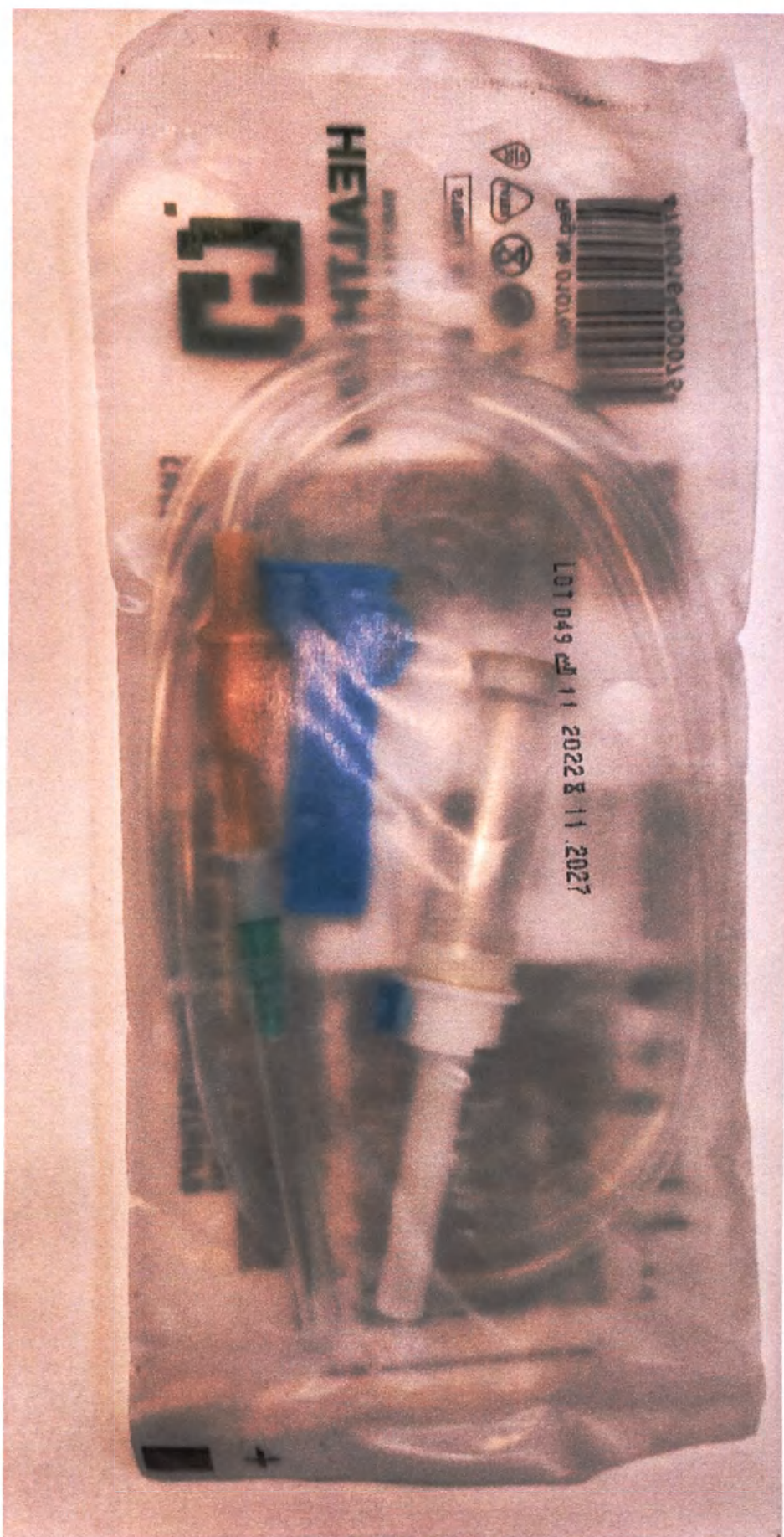


Рисунок 3 - Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Маркировка индивидуальной (стерилизационной) упаковки (вид сзади).

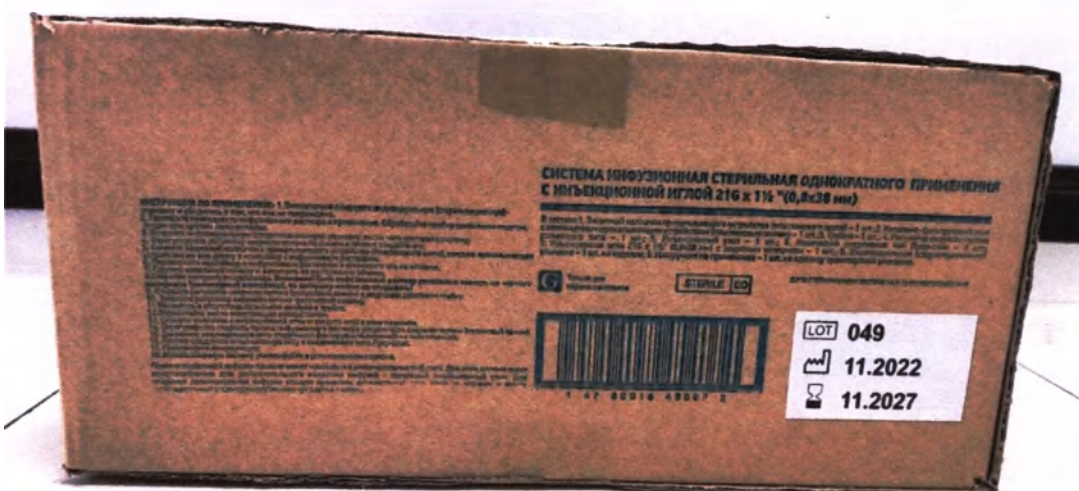


Рисунок 4 - Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Транспортная упаковка.



Всего прошнуровано и скреплено печатью
5 (17.8.2016) лист 26

Генеральный директор
ООО "ХЕЛПС ЛАЙН РУС"

Пак Ирина Тимофеевна