


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУЗМ «Институт скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского» профессор

27.06.2007 г

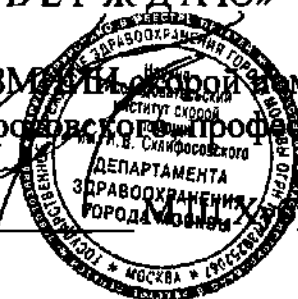

**Инструкция по применению
аллоимплантатов на основе твердой мозговой оболочки,
лиофилизированных стерильных**

В.И.
М

Аллоимплантаты на основе твердой мозговой оболочки, лиофилизированные стерильные предназначены для устранения дефектов твердой мозговой оболочки и других мягких тканей.

Рекомендации по применению:

1. Перед употреблением проверить целостность внешней упаковки аллоимплантата.
2. Упаковка перед вскрытием обрабатывается раствором антисептика.
3. Упаковка вскрывается в условиях операционной, аллоимплантат погружается на 10-15 минут в стерильный раствор (физиологический, анестетика, антисептика) для восстановления эластичности.

Условия и срок хранения.

Аллоимплантат храниться при температуре не выше + 25° С в защищенном от света месте.

Срок годности указан на упаковке.