

2.4 Внешний вид изделия

2.4.1 Передняя панель и компоненты экрана

Передняя и боковая панели

Рисунок 2-1. Компоненты передней и боковой панели



- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Кнопка паузы звукового сигнала тревоги | Нажать, чтобы включить либо выключить звуковой сигнал тревоги (см. раздел <i>Навигация по позициям меню</i> , стр. 28). |
| 2 |  | Кнопка возврата | Нажать, чтобы выйти из экрана меню и перейти к основному экрану (см. раздел <i>Навигация по позициям меню</i> , стр. 28). |
| 3 |  | Кнопка включения/выключения питания | Нажать и удерживать для включения либо выключения системы мониторинга при питании от сети переменного тока или литий-ионных аккумуляторов (см. раздел <i>Навигация по позициям меню</i> , стр. 28). |
| 4 |  | USB-порт (разъем USB типа A) | Разъем USB, предназначенный для обновления программного обеспечения. |
| 5 |  | USB-порт (разъем USB типа B) | Разъем мини-USB, предназначенный для загрузки динамических данных. |
| 6 | | Поворотный переключатель | Используется для навигации и контроля функций экрана и системы мониторинга. |
| 7 | | Панель жидкокристаллического экрана | Предназначена для отображения всей графической и числовой информации о пациенте, а также состояния устройства и тревожных сообщений. |
| 8 | | Разъем датчика SpO ₂ | Используется для подключения интерфейсного кабеля и датчика SpO ₂ . |