

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

Директор НИИ скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского

_____ Хубутия М.Ш.
«__» _____ 2008 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению повязки на основе коллагена типа I, лиофилизированной, стерильной

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязка предназначена для стимуляции эпителизации асептических ран, различной этиологии (ожоги, ссадины, мацерации, начальная стадия пролежня, трофические язвы и пр.)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка представляет двухслойную композицию из полисилаксан-поликарбонатной пленки с перфорационными отверстиями и тонкого слоя лиофилизированного коллагена типа I. Стерилизована радиационным способом.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов повязки.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед употреблением проверить сохранность упаковки. Смочить повязку стерильным раствором 0,9% NaCl.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Влажная повязка накладывается коллагеновым слоем на раневую поверхность, обработанную антисептиком, и фиксируется бинтом.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Срок годности 3 года.

Должность ответственного за
производство

Должность руководителя ЛПУ,
проводившего медицинские
испытания

_____ В.Б.Хватов
(подпись)
_____ М.Ш.Хубутия
(подпись, печать)


УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

Директор НИИ скорой помощи
им.Н.В.Склифосовского

_____ Хубутия М.Ш.
«__» _____ 2008 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению повязки на основе коллагена типа I, лиофилизированной, стерильной

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязка предназначена для стимуляции эпителизации асептических ран, различной этиологии (ожоги, ссадины, мацерации, начальная стадия пролежня, трофические язвы и пр.)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка представляет двухслойную композицию из полисилаксан-поликарбонатной пленки с перфорационными отверстиями и тонкого слоя лиофилизированного коллагена типа I. Стерилизована радиационным способом.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов повязки.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед употреблением проверить сохранность упаковки. Смочить повязку стерильным раствором 0,9% NaCl.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Влажная повязка накладывается коллагеновым слоем на раневую поверхность, обработанную антисептиком, и фиксируется бинтом.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Срок годности 3 года.

Должность ответственного за
производство

Должность руководителя ЛПУ,
проводившего медицинские
испытания

_____ В.Б.Хватов
(подпись)



_____ (подпись, печать)

М.Ш.Хубутия