



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СДС»

Е.Б. Новикова

«22» апреля 2024г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения:

1. Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения:

1. Дилуэнт Диатон-ШИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

2. Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

3. Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

4. Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

5. Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

6. Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

7. Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

8. Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

9. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

10. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

11. Дилуэнт ДиаШис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

12. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;

13. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л;

14. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л;

15. Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;

16. Дилуэнт ДМ-30Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

17. Дилуэнт ДМ-50Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

18. Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

19. Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;
20. Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;
21. Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л;
22. Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л;
23. Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;
24. Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л.

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.

(далее по тексту – реагент, изделие, медицинское изделие).

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»);

Юридический адрес: 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А;

Адрес места производства: АО «СДС», 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А;

Телефон: +7 (495) 963-72-16, +7 (495) 963-73-60, +7 (495) 963-73-62;

E-mail: info@udsys.ru

Официальный сайт: www.udsys.ru

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ.

Назначение.

Дилуэнт - это реагент, предназначенный для разбавления проб крови (венозной/капиллярной, собранной в пробирки с антикоагулянтами К2ЭДТА, К3ЭДТА или Na2ЭДТА) и/или проб спинномозговой жидкости (СМЖ) человека во время общего анализа крови и/или общего анализа СМЖ, при количественном определении параметров: количества эритроцитов, тромбоцитов, количества и дифференциала лейкоцитов, эритроцитарных индексов, тромбоцитарных индексов, гематокрита, концентрации гемоглобина, а также для промывки жидкостных магистралей анализатора во время работы и после каждого анализа на автоматических гематологических анализаторах различных серий, оснащенных функцией дифференциации трех субпопуляций лейкоцитов с использованием методов электрического импеданса или пяти субпопуляций лейкоцитов с использованием методов проточной лазерной цитометрии с применением флуоресцентных красителей. Для диагностики in vitro. Изделие является вспомогательным средством в диагностике. Медицинское изделие может применяться для любых групп пациентов, за исключением доноров.

Область применения.

Клиническая лабораторная диагностика. Для диагностики in vitro.

Потенциальный потребитель.

Квалифицированные сотрудники клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений и лабораторий службы крови.

4. ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПОПУЛЯЦИОННЫЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Показания.

Применяется в качестве вспомогательного реагента при работе на гематологических анализаторах.

Противопоказания: Неприменимо.

Возможные побочные действия при применении медицинского изделия: Неприменимо.

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия: Медицинское изделие может применяться для любых групп пациентов, за исключением доноров.

5. ПРИНЦИП МЕТОДА

Реагент представляет собой готовый к использованию раствор, выполняющий функцию разбавителя, который обеспечивает разбавление пробы, поддержание кислотно-щелочного баланса и стабилизацию клеточного компонента (т.е., являясь изотоническим раствором, стабилизирует объем клеток крови и снижает мутность при измерении гемоглобина), используется при подсчете клеток крови, дифференциации лейкоцитов на субпопуляции, измерении содержания гемоглобина. А также используется в качестве промывающего раствора для гидродинамической системы анализатора между прогонами.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА

№	Вариант исполнения (фирменное название)	Номинальный объем реагента, л	Каталожный номер	Показатель активности водородных ионов, pH	Осмоляльность, мОсмоль/кг	Относительная плотность, г/мл	Количество первичных упаковок	Состав реагента
1.	Дилуэнт Диатон-ШИС-СД 3.2	20±0,05	h12501-R	7,4±0,2	308±20	1,005±0,003	1 канистра	Хлорид натрия 0,5 %, Сульфат натрия 0,6 %, Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 0,4 %, 2-феноксизанол 0,01 %, Вода очищенная деионизированная 98,49 %
2.	Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф	10±0,03	h15331-R	6,75±0,35	315±20	1,006 ± 0,004	1 канистра	Сульфат натрия 0,99 %, Хлорид натрия 0,41 %, Проквина гидрохлорид 0,011 %, Вода очищенная деионизированная 98,589 %
		20±0,05	h15301-R					
3.	Дилуэнт Диатон-НК Дифф	20±0,05	h19201-R	7,2 ±0,3	315±30	1,0085±0,003	1 канистра	Хлорид натрия 0,5 %, Сульфат натрия 1,2 %, Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 1,2 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,3 %, Вода очищенная деионизированная 96,8 %
4.	Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ	20±0,05	h20201-R	7,5 ± 0,5	320 ± 45	1,003 ± 0,003	1 канистра	Трис-фосфатный буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан, ортофосфорная кислота, ЭДТА) 4 %, Дигидрат дикальевой соли ЭДТА 0,03 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,1 %, Вода очищенная деионизированная 95,87 %
5.	Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра	20±0,05	h20301P-R	8,0 ± 0,2	340 ± 45	1,002 ± 0,003	1 канистра	Трис-фосфатный буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан, ортофосфорная кислота, ЭДТА) 4 %, Дигидрат дикальевой соли ЭДТА 0,03 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,1 %, 2-феноксизанол 0,02 %, Вода очищенная деионизированная 95,85 %
6.	Дилуэнт универсальный Диатон-СИС	10±0,03	h23111-R	7,3 ± 0,4	250 ± 50	1,003 ± 0,005	1 канистра	Хлорид натрия - 0,64 %, Борная кислота - 0,10 %, Тетраборат натрия - 0,02 %, Дигидрат дикальевой соли ЭДТА- 0,02 %, Вода очищенная деионизированная 99,22 %
		20±0,05	h23101-R					
7.	Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП	10±0,03	h231011-XN	7,3 ± 0,4	250 ± 50	1,003 ± 0,005	1 канистра	Хлорид натрия - 0,64 %, Борная кислота - 0,10 %, Тетраборат натрия - 0,02 %, Дигидрат дикальевой соли ЭДТА- 0,02 %, Вода очищенная деионизированная 99,22 %
		20±0,05	h231012-XN					

№	Вариант исполнения (фирменное название)	Номинальный объем реагента, л	Каталожный номер	Показатель активности водородных ионов, pH	Осмоляльность, мОсмоль/кг	Относительная плотность, г/мл	Количество первичных упаковок	Состав реагента
8.	Дилуэнт Диашис-СИС	20±0,05	h23202-R	7,7 ± 0,5	275 ± 40	1,004 ± 0,003	1 канистра	Хлорид натрия 0,71 %, Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 0,2 %, Дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,02 %, 2-феноксизтанол 0,08 %, Вода очищенная деионизированная 98,99 %
9.	Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ	1±0,005	h236061-XN	8,80 ± 0,15	200 ± 15	1,008 ± 0,003	1 флакон	Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 0,17 %, Вода очищенная деионизированная 99,83 %
		1,5±0,005	h236062-XN				1 канистра	
		5±0,001	h236064-XN					
10.	Дилуэнт Диарсф-Сearч-II-СИС-Буффер	1±0,005	h23606-R	8,80±0,15	200±15	1,008±0,005	1 флакон	Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 0,17 %, Вода очищенная деионизированная 99,83 %
11.	Дилуэнт ДМ-30Д	20±0,05	DM-30D-R	6,9 ± 0,2	320 ± 30	1,005±0,003	1 канистра	Сульфат натрия 2,1 %, Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 1,1 %, Дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, Вода очищенная деионизированная 96,79 %
12.	Дилуэнт ДМ-50Д	20±0,05	DM-50D-R	7,2 ± 0,3	315 ± 30	1,008±0,005	1 канистра	Сульфат натрия 2,1 %, Борная кислота 0,5 %, Дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, Вода очищенная деионизированная 97,39 %
13.	Дилуэнт ДМ-53Д	20±0,05	DM-53D-R	6,9 ± 0,2	330 ± 30	1,008±0,005	1 канистра	Сульфат натрия 2,1 %, Борная кислота 0,5 %, Дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, Вода очищенная деионизированная 97,39 %
14.	Дилуэнт ДМ-68ДС	20±0,05	DM-68DS-R	7,25 ± 0,1	275 ± 30	1,008±0,003	1 канистра	Сульфат натрия 2,1 %, Борная кислота 0,5 %, Дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, Вода очищенная деионизированная 97,39 %
15.	Дилуэнт ДМ-68ДР	1±0,005	DM-68DR-R	9,30±0,5	200±10	1,008±0,005	1 флакон	Сульфат натрия 1,7 %, Трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан; соляная кислота) 0,3 %, Дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,1 %, Вода очищенная деионизированная 97,9 %
16.	Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120	2,725±0,05	h24314-R	6,0 ± 2,0	НП	1,023±0,008	1 флакон	Пропан-1,2-диол 27,7 %, Лаурилсульфат натрия 0,1%, Вода очищенная деионизированная 72,2 %
17.	Дилуэнт Дефоамер	0,1±0,01	h24122-R	7,0 ± 2,5	НП	1,046±0,005	1 флакон	Силиконовая эмульсия, 100%

№	Вариант исполнения (фирменное название)	Номинальный объем реагента, л	Каталожный номер	Показатель активности ионов, pH	Осмоляльность, мОсмоль/кг	Относительная плотность, г/мл	Количество первичных упаковок	Состав реагента
18.	Дилуэнт ДиаШис Ринз А120	20±0,05	h24321-R	7,3 ± 0,2	280 ± 20	1,005±0,003	1 канистра	Фосфат натрия, двухосновный 3%, Алкилбензолсульфонат натрия 0,0003%, Азид натрия 0,01%, Вода очищенная деионизированная 96,9897 %
19.	Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ	15±0,05	h15310-R	6,75±0,35	315±20	1,006±0,003	1 канистра	Сульфат натрия 0,99 % Хлорид натрия 0,41 % Прокаина гидрохлорид 0,011 % Вода очищенная деионизированная 98,589 %

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок
Наличие осадка или хлопьев: Не допускается

7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА

Аналитические характеристики реагента соответствуют аналитическим характеристикам анализатора, которые указаны в эксплуатационной документации к анализатору.

7.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ

В процессе разработки реагента проведён анализ рисков применения медицинского изделия и способ управления рисками в процессе применения реагента в части влияния интерферирующих веществ.

В ходе анализа литературы были выделены основные интерферирующие компоненты, которые в пределах своих концентрациях прогнозируемо влияют на результаты анализа, вызывая определённую погрешность.

Экспериментально исследовано, что вещества из приведенного перечня в указанной концентрации способны исказить результаты анализа:

Параметр	Источник интерференции	
	Билирубин 433,1 мкмоль/л	Триглицериды 15,39 ммоль/л
	Влияние на результат анализа	
WBC	$\leq \pm 15\%$	$\leq \pm 15\%$
RBC	$\leq \pm 6,0\%$	$\leq \pm 6,0\%$
HGB	$\leq \pm 7,0\%$	$\leq \pm 7,0\%$
HCT	$\leq \pm 6,0\%$	$\leq \pm 6,0\%$
PLT	$\leq \pm 25\%$	$\leq \pm 25\%$

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения реагента – класс 2а.

Реагент должен использоваться квалифицированными сотрудниками клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений и лабораторий службы крови.

При работе с реагентом необходимо соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 3.3686-21, а также ГОСТ Р ИСО 15190.

При работе с реагентом следует использовать средства индивидуальной защиты (блузон, брюки, халат, шапочку, тапочки или сабо, очки защитные, полумаску, одноразовые перчатки). Все использованные материалы, инструменты и оборудование, рабочие поверхности следует дезинфицировать в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 и методическими указаниями МУ 287-113.

Материалы, подлежащие обеззараживанию, следует подвергать обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения на территории РФ, например, раствором перекиси водорода с массовой долей 6 % при температуре от 17 до 27°C не менее 2 ч.

Инструменты и оборудование, а также поверхности, на которых проводился анализ, следует обрабатывать дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения на территории РФ, например, раствором этилового спирта с объемной долей 70 % в течение 10 секунд.

При работе с образцами крови и биологическими жидкостями пациентов необходимо следовать требованиям охраны труда при работе с кровью и другими материалами биологического происхождения, указанным в Приказе Минтруда России от 18.12.2020 № 928н.

Утилизацию всех анализируемых образцов, компонентов и отходов реагента, несущих потенциальную биологическую опасность, необходимо проводить в соответствии с разделом «МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ»

9. НЕОБХОДИМОЕ СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (не входят в комплект поставки)

Вариант исполнения (фирменное название)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
Дилуэнт Диатон-ШИС-СД 3.2, канистра 20 л	Гематологический анализатор CELL-DYN Ruby для in vitro диагностики с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/04961, производства «Эбботт Лэбораториз, Диагностическое подразделение», США (Abbott Laboratories Diagnostics Division)	1) Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л.
Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф, канистра 10 л; Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф, канистра 20 л	1) Анализатор гематологический AcT diff 2 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08493, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических

		гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
	2) Гематологический анализатор DxH 500 с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8651, «Бекмен Култер Айзленд, Инк.», Ирландия (Beckman Coulter Ireland Inc.)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л..

	3) Система клеточного анализа UniCel DxH 600 Coulter в составе и с принадлежностями, РУ № РЗН 2015/2710, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.); 4) Система клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/07108, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.), вариант исполнения UniCel DxH 800 Coulter Cellular Analysis System (with a floorstand)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л; 8) Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л; 9) Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л; 10) Моющий раствор Днакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л;
--	---	--

		11) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 12) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет А для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,38 л; 14) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет Б для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 1,9 л
Дилуэнт Диатон-НК Дифф, канистра 20 л	1) Автоматический гематологический анализатор «МЕК», модель 7300К с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2200, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (NIHON KONDEN CORPORATION); 2) Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2131, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (NIHON KONDEN CORPORATION). 3) Автоматический гематологический анализатор «МЕК-9100» с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8508, производства «Нихон Кодэн Корпорейшн», Япония (Nihon Kohden Corporation)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л.

Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ, канистра 20 л	1) Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS 60, варианты исполнения ABX MICROS 60 OT, ABX MICROS 60 CT, с принадлежностями, РУ № РЗН 2016/5128, производства «ХОРИБА АБХ САС», Франция (HORIBA ABX SAS), вариант исполнения: ABX MICROS 60 OT; 2) Анализатор гематологический автоматический с дифференцировкой лейкоцитов по трем популяциям ABX MICROS ES 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11769, производства «ХОРИБА АБХ САС», Франция (HORIBA ABX SAS) вариант исполнения ABX MICROS ES 60 OT	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л
Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра, канистра 20 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБХ САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель Pentra 80	1) Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических

		гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; 8) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; 9) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Дилуэнт универсальный Диатон-СИС, канистра 10 л; Дилуэнт универсальный Диатон-СИС, канистра 20 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F]	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов

		ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л;
--	--	--

		18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 22) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 23) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов
--	--	--

		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови

		Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л;
--	--	--

		13) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 14) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
	5) Анализатор гематологический ХР-300, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/812, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 6) Анализатор гематологический КХ-21N с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2011/11182, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 2) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 3) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 4) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 5) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	7) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;

		4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л;
--	--	--

		14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л
	8) Анализатор гематологический XS-500i, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/516, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION); 9) Анализатор гематологический XS моделей 800i, 1000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00167, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), модель XS 1000i	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических

		гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	10) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИCMEКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEХ CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови

		Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДнаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-11-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДнаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л;
--	--	---

		16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л.
Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ, канистра 10 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ, канистра 20 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F]	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов

		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для
--	--	---

		анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 22) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л;
--	--	--

		23) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003- 66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических

		гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов
--	--	--

		ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов

		Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 14) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
	5) Анализатор гематологический ХР-300, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/812, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 6) Анализатор гематологический КХ-21N с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2011/11182, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 2) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 3) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л;

		4) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 5) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	7) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л;

		9) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л
	8) Анализатор гематологический XS-500i, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/516, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION); 9) Анализатор гематологический XS моделей 800i, 1000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00167, «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation): модель XS 1000i	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
--	--	--

	10) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEХ CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л;
--	--	---

		11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 20) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ
--	--	---

		20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 21) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003- 66418557-2021, пакетик 0,042 л.
Дилуэнт Диашис-СИС, канистра 20 л	Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ- 5000, анализатор гематологический ХЕ-2100	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для

		анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 12) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 13) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л;
--	--	---

		19) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ, флакон 1 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ, флакон 1,5 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ, канистра 5 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F]	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов
--	--	--

		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 22) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 23) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови

		Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л;
--	--	---

		14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических
--	--	---

		гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 14) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
	5) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических

		гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л
--	--	---

	6) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEХ CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л;
--	---	---

		11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л;
--	--	--

		20) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004- 66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л.
--	--	--

Дилуэнт Диариф-Сепар-II-СИС-Буффер, флакон 1л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F]	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ
--	---	---

		20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов
--	--	--

		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 21) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 22) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 23) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10;	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов

		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов
--	--	---

		Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-Н-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550.	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;

		6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 8) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 11) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 12) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 14) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
--	--	--

	5) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л;
--	--	---

		11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л
	6) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEK CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100	1) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; 5) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; 6) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 7) Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 9) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 10) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 11) Моющий раствор Диаclin-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 13) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 14) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 15) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических
--	--	---

		гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 18) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 19) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 20) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Реагент для подсчета эритроцитов ДнаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л.
Дилуэнт ДМ-30Д, канистра 20 л	Анализатор гематологический, варианты исполнения: ВС-3600, ВС-6800, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12468, производства «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., вариант исполнения: ВС-3600	1) Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л.

Дилуэнт ДМ-50Д, канистра 20 л	Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: ВС-5150, ВС-5000 с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/5523, производства «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), вариант исполнения: ВС-5000.	1) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 3) Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л
Дилуэнт ДМ-53Д, канистра 20 л	Анализаторы гематологические автоматические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/03107, производства «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), варианты исполнения: ВС-5300; ВС-5380	1) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 4) Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л
Дилуэнт ДМ-68ДС, канистра 20 л	Анализатор гематологический автоматический, варианты исполнения: ВС-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.), варианты исполнения: ВС-6800Plus, ВС-6200.	1) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л. 6) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФН ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л. 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л.
Дилуэнт ДМ-68ДР, флакон 1 л	Анализатор гематологический автоматический, варианты исполнения: ВС-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.), варианты исполнения: ВС-6800Plus, ВС-6200.	1) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л. 6) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФН ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-

		66418557-2021, пакетик 0,012 л. 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л
Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120, флакон 2,725 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностикас Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический модель «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями	1) Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчгб А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови ДиаРБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,65 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,305 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л. 9) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

		20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л
Дилуэнт Дефоамер, флакон 0,1 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностикс Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический модель «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями	1) Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчГБ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови ДиаРБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,65 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,305 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-

		66418557-2021, флакон 0,81 л. 9) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л
Дилуэнт ДиаШис Ринз А120, канистра 20 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Diagnostix Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический модель «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями	1) Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчГБ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. 5) Реагент для подсчета лейкоцитов

		ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,65 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,305 л; 7) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л. 9) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л
Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ, канистра 15 л	Анализатор гематологический AcT diff 2 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08493, производства «Бекмен Култер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.)	1) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; 2) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; 4) Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л;

		6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
Примечание: * - Медицинские изделия производства АО «СДС» проходят процесс государственной регистрации.		

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- реагент в первичной упаковке в зависимости от варианта исполнения в соответствии с разделом «ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА»;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- паспорт (при необходимости по ГОСТ 51088) предоставляется по запросу пользователя – 1 шт.

11. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом проведения анализа образцов необходимо подготовить гематологический анализатор в соответствии с его эксплуатационной документацией и провести процедуру внутрилабораторного контроля качества.

12. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Вид анализируемого биологического материала

Реагент предназначен для использования с образцами крови (венозной/капиллярной, собранной в пробирки с антикоагулянтами K2ЭДТА, K3ЭДТА или Na2ЭДТА) и пробами спинномозговой жидкости (СМЖ).

Подготовку образцов следует проводить в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации гематологического анализатора.

Условия хранения биологического материала

Пробы следует анализировать в течение 4 часов после забора. Если анализ пробы невозможно выполнить в течение 4 часов после забора, то следует поместить образец в холодильник и хранить его до выполнения анализа при температуре 2 - 8°C. В случае анализа охлажденной пробы, выньте ее из холодильника не менее чем за 15 минут до анализа, чтобы она приняла комнатную температуру. После восстановления комнатной температуры хорошо перемешайте кровь перед выполнением анализа.

Анализ биологических жидкостей следует провести как можно скорее, так как разрушение клеток начинается в течение одного часа после сбора*.

Ограничения по использованию биологического материала

- Используйте только антикоагулянт указанного типа.
- В зависимости от применяемого антикоагулянта возможны гемолиз и агрегация тромбоцитов, вызывающие ошибки в результатах анализа.
- Антикоагулянт Na2ЭДТА трудно растворяется в крови и может вызывать образование фибрина или агрегацию тромбоцитов в некоторых образцах. Необходимо тщательное перемешивание образцов до полного растворения сухого антикоагулянта.
- При использовании разбавленных проб: пробу следует анализировать немедленно после разбавления, поскольку в разбавленных пробах легко происходит агрегация тромбоцитов. Кроме того, добавленный разбавитель может вызывать ошибки в данных анализа вследствие испарения или загрязнения. Поэтому для каждого анализа следует готовить новые разбавленные пробы.
- Чрезмерное перемешивание пробы биологической жидкости может привести к неправильному определению величин WBC-BF и TC-BF#.*

* Если в приборе предусмотрен режим анализа биологических жидкостей.

13. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Реагент является готовым реагентом для проведения анализа.

Каждую упаковку реагентов перед использованием необходимо осмотреть. Осмотрите упаковку на наличие протечек или влаги. Не используйте реагент при наличии признаков протечки или неправильной упаковки.

Проведите установку реагента в соответствии с эксплуатационной документацией к гематологическому анализатору.

14. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией гематологического анализатора для проведения соответствующих тестов.

15. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В гематологических анализаторах предусмотрена автоматическая регистрация результатов и размещение данных в базе рабочей станции. Для детальной информации по работе с базой данных результатов анализов обратитесь к эксплуатационной документации гематологического анализатора.

16. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В гематологических анализаторах предусмотрен контроль качества. Применяйте метод, соответствующий Вашим нуждам. Для детальной информации по проведению контроля качества обратитесь к эксплуатационной документации Вашего гематологического анализатора.

17. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент должен транспортироваться и храниться в пределах значений температуры окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Допускается кратковременное замораживание. Если реагент был заморожен, его необходимо нагреть до комнатной температуры, а затем перемешать, аккуратно переворачивая упаковку, перед использованием.

Реагент транспортируется всеми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

Изделия, транспортированные с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Хранение реагента должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Реагент следует применять в соответствии с инструкцией по применению.

Реагент с истекшим сроком годности применению не подлежит. Срок годности реагента смотрите на упаковке.

18. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности реагента - 24 месяца с даты производства при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности реагента после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора не более 60 суток при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

19. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реагента требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных в инструкции по применению.

Гарантийный срок годности составляет 24 месяца и указан на этикетке реагента.

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться в Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), по адресу: 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А.

Тел.: +7 (495) 963-72-16, +7 (495) 963-73-60, +7 (495) 963-73-62; E-mail: info@udsys.ru

20. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация отходов от работы с реагентом с использованием образцов крови пациентов должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, класс Б и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Утилизация реагента, не подлежащего использованию, и с истекшим сроком годности, должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, класс А и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

21. СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ

Символ	Наименование символа
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Дата изготовления
	Код партии
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не допускать воздействия влаги
	Верх
	Крюками не брать
	Обращаться с осторожностью
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности

22. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования»;

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения»;


ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»;


ГОСТ Р ИСО 23640-2015 «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro».

23. ДАТА ВЫПУСКА ИЛИ ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИИ

Версия 2 от 22.04.2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 69 листов (-а)
Генеральный директор АО «СДС»
Новикова Е. Б.

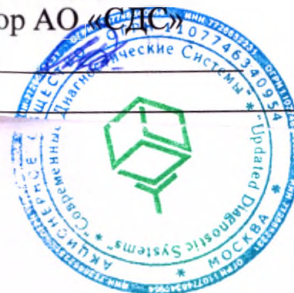

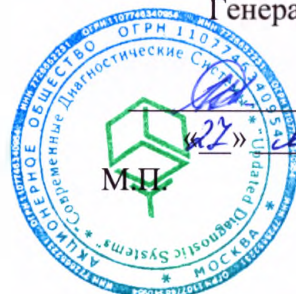

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СДС»

Е.Б. Новикова

2024 года

Паспорта

на медицинское изделие

«Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ

20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения»

2024 г.

ПАСПОРТ № h12501-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диатон-ШИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л h12501-R

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,4±0,2	7,3
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	308±20	289
5. Относительная плотность, г/мл	1,005±0,003	1,005
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20042 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: хлорид натрия 0,5 %, сульфат натрия 0,6 %, трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 0,4 %, 2-феноксизтанол 0,01 %, вода очищенная деионизированная 98,49 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

Диллюент Диатон-СТ-Дифф

ПАСПОРТ № h15301-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л h15301-R

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75±0,35	6,83
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	315±20	295
5. Относительная плотность, г/мл	1,006 ± 0,004	1,008
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20017 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Сульфат натрия 0,99 %, хлорид натрия 0,41 %, прокаина гидрохлорид 0,011 %, вода очищенная деионизированная 98,589 %

Хранить при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

Диллюент Диатон-НК Дифф

ПАСПОРТ № h15331-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л h15331-R

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75±0,35	6,85
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	315±20	295
5. Относительная плотность, г/мл	1,006 ± 0,004	1,009
6. Номинальный объем	10±0,03 л	10009 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Сульфат натрия 0,99 %, хлорид натрия 0,41 %, прокаина гидрохлорид 0,011 %, вода очищенная деионизированная 98,589 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Начальник ОТК
Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	7,2
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,2 ± 0,3	295
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	315±30	1,009
5. Относительная плотность, г/мл	1,0085±0,003	1
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20028 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия 0,5 %, сульфат натрия 1,2 %, трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 1,2 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,3 %, вода очищенная деионизированная 96,8 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

ПАСПОРТ № h20201-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
h20201-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,5 ± 0,5	7,8
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	320 ± 45	317
5. Относительная плотность, г/мл	1,003 ± 0,003	1,005
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20011 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Трис-фосфатный буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, ортофосфорная кислота, ЭДТА) 4 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,03 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,1 %, вода очищенная деионизированная 95,87 %

Хранить при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20301P-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
h20301P-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	8,0 ± 0,2	7,8
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	340 ± 45	316
5. Относительная плотность, г/мл	1,002 ± 0,003	1,004
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20016 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Трис-фосфатный буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, ортофосфорная кислота, ЭДТА) 4 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,03 %, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,1 %, 2-феноксизтанол 0,02 %, вода очищенная деионизированная 95,85 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПАСПОРТ № h23101-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
h23101-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,3 ± 0,4	7,25
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	250 ± 50	245
5. Относительная плотность, г/мл	1,003 ± 0,005	1,002
6. Номинальный объем	20±0,05л	20040 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия - 0,64 %, борная кислота - 0,10 %, тетраборат натрия - 0,02 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА - 0,02 %, вода очищенная деионизированная 99,22 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h23111-R /1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л

h23111-R

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,3 ± 0,4	7,31
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	250 ± 50	294
5. Относительная плотность, г/мл	1,003 ± 0,005	1,008
6. Номинальный объем	10±0,03 л	10011 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия - 0,64 %, борная кислота - 0,10 %, тетраборат натрия - 0,02 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА - 0,02 %, вода очищенная деионизированная 99,22 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

ПАСПОРТ № h231011-XN/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л

h231011-XN

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,3 ± 0,4	8,91
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	250 ± 50	192
5. Относительная плотность, г/мл	1,003 ± 0,005	1,011
6. Номинальный объем	10±0,03 л	1005 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия - 0,64 %, борная кислота - 0,10 %, тетраборат натрия - 0,02 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА - 0,02 %, вода очищенная деионизированная 99,22 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

ПАСПОРТ № h231012-XN/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л

h231012-XN

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,3 ± 0,4	7,31
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	250 ± 50	244
5. Относительная плотность, г/мл	1,003 ± 0,005	1,002
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20035 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия - 0,64 %, борная кислота - 0,10 %, тетраборат натрия - 0,02 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА - 0,02 %, вода очищенная деионизированная 99,22 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

ПАСПОРТ № h23202-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л

h23202-R

LOT: 1800501224

Годеи до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,7 ± 0,5	7,2
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	275 ± 40	235
5. Относительная плотность, г/мл	1,004 ± 0,003	1,003
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20022 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Хлорид натрия 0,71 %, трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 0,2 %, дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,02 %, 2-феноксизтанол 0,08 %, вода очищенная деионизированная 98,99 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

ПАСПОРТ № h236061-XN/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л h236061-XN

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$8,80 \pm 0,15$	8,91
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	200 ± 15	192
5. Относительная плотность, г/мл	$1,008 \pm 0,003$	1,011
5. Номинальный объем	$1 \pm 0,005$ л	1005 мл
6. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 0,17 %, вода очищенная деионизированная 99,83 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.



ПАСПОРТ № h23606-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л h23606-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$8,80 \pm 0,15$	8,92
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	200 ± 15	191
5. Относительная плотность, г/мл	$1,008 \pm 0,005$	1,011
5. Номинальный объем	$1 \pm 0,005$ л	1003 мл
6. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 0,17 %, вода очищенная деионизированная 99,83 %


Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.

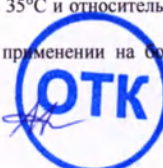

Дилуэнт ДМ-30Д

ПАСПОРТ № DM-30D-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт ДМ-30Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л DM-30D-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$6,9 \pm 0,2$	7,0
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	320 ± 30	304
5. Относительная плотность, г/мл	$1,005 \pm 0,003$	1,008
6. Номинальный объем	$20 \pm 0,05$ л	20027 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: сульфат натрия 2,1 %, трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 1,1 %, дигидрат двуназиевой соли ЭДТА 0,01 %, вода очищенная деионизированная 96,79 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.



ПАСПОРТ № ДМ-50Д-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт ДМ-50Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
ДМ-50Д-R

LOT: 1800501224

Голен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$7,2 \pm 0,3$	7,2
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	315 ± 30	293
5. Относительная плотность, г/мл	$1,008 \pm 0,005$	1,009
6. Номинальный объем	$20 \pm 0,05$ л	20014 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: сульфат натрия 2,1 %, борная кислота 0,5 %, дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, вода очищенная деионизированная 97,39 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.



ПАСПОРТ № ДМ-53Д-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
ДМ-53Д-R

LOT: 1800501224

Голен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$6,9 \pm 0,2$	6,9
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	330 ± 30	307
5. Относительная плотность, г/мл	$1,008 \pm 0,005$	1,009 г/мл
6. Номинальный объем	$20 \pm 0,05$ л	20024 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: сульфат натрия 2,1 %, борная кислота 0,5 %, дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, вода очищенная деионизированная 97,39 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Подгурский Г.М.



ПАСПОРТ № ДМ-68ДС-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
ДМ-68ДС-R

LOT: 1800501224

Голен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	$7,25 \pm 0,1$	7,22
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	275 ± 30	276
5. Относительная плотность, г/мл	$1,008 \pm 0,003$	1,008
6. Номинальный объем	$20 \pm 0,05$ л	20024 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: сульфат натрия 2,1 %, борная кислота 0,5 %, дигидрат двуназриевой соли ЭДТА 0,01 %, вода очищенная деионизированная 97,39 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.



ПАСПОРТ № DM-68DR-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л
DM-68DR-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,30±0,5	8,88
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	200±10	190
5. Относительная плотность, г/мл	1,008±0,005	1,010
6. Номинальный объем	1±0,005 л	1004 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Сульфат натрия 1,7 %, трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан; соляная кислота) 0,3 %, дигидрат двуназиевой соли ЭДТА 0,1 %, вода очищенная деионизированная 97,9 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Диллюент Дефоамер

Диллюент ДилШис Ринз А120

ПАСПОРТ № h24122-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л
h24122-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,0 ± 2,5	6,7
4. Относительная плотность, г/мл	1,046±0,005	1,051
5. Номинальный объем	0,1±0,01 л	94 мл
6. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Силиконовая эмульсия, 100%

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

ПАСПОРТ № h24314-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент ДилПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л
h24314-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,0 ± 2,0	4,7
4. Относительная плотность, г/мл	1,023±0,008	1,025
5. Номинальный объем	2,725±0,05 л	2751 мл
6. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Пропан-1,2-диол 27,7 %, лаурилсульфат натрия, 0,1%, вода очищенная деионизированная 72,2 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h24321-R/1800501224

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в варианте исполнения: Диллюент ДилШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л
h24321-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,3 ± 0,2	7,2
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	280 ± 20	264
5. Относительная плотность, г/мл	1,005±0,003	1,006
6. Номинальный объем	20±0,05 л	20011 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Фосфат натрия, двухосновный 3%, алкилбензолсульфонат натрия - 0,0003%, азид натрия - 0,01%, вода очищенная деионизированная - 96,9897 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15310-R/1800501224

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-01-66418557-2021 в варианте исполнения: Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л
h15310-R

LOT: 1800501224

Годен до: 05.12.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость, допускается слабый желтый оттенок	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75±0,35	6,79
4. Осмоляльность, мОсмоль/кг	315±20	297
5. Относительная плотность, г/мл	1,006±0,003	1,008
6. Номинальный объем	15±0,05 л	15026 мл
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: Сульфат натрия 0,99 %, хлорид натрия 0,41 %, прокаина гидрохлорид 0,011 %, вода очищенная деионизированная 98,589 %

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 60 суток.

Начальник ОТК

Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



Всего прошито, пронумеровано и скреп
печатью 6 листов (-а)

Генеральный директор АО «СДС»

Новикова Е. Б. 