



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «СДС»

Е.Б. Новикова

«22» апреля 2024г.



**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

I. Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения:

1. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
2. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
3. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
4. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
5. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л;
6. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л;
7. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л;
8. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
9. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
10. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
11. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
12. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л;
13. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
14. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
15. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
16. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;



17. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
18. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
19. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
20. Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
21. Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
22. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
23. Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
24. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л;
25. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
26. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
27. Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
28. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
29. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
30. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;
31. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
32. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л;
33. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л;
34. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
35. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л;
36. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л;
37. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л;
38. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
39. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;



40. Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
41. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;
42. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;
43. Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л;
44. Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчгб А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л;
45. Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л;
46. Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л.

II. Эксплуатационная документация

1. Инструкция по применению

(далее по тексту – реагент, изделие, медицинское изделие).

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»);

Юридический адрес: 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А;

Адрес места производства: АО «СДС», 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А;

Телефон: +7 (495) 963-72-16, +7 (495) 963-73-60, +7 (495) 963-73-62;

E-mail: info@udsys.ru

Официальный сайт: www.udsys.ru

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Назначение.

Реагент предназначен для лизиса (разрыва клеточной мембраны в целях выделения содержимого цитоплазмы) эритроцитов и подготовки к последующему клиническому анализу крови (венозной/ капиллярной, собранной в пробирки с антикоагулянтами К2ЭДТА, К3ЭДТА или Na2ЭДТА) и/или анализу спинномозговой жидкости (СМЖ) человека при совместном использовании с автоматическими гематологическими анализаторами различных серий, оснащенных функцией дифференциации трех субпопуляций лейкоцитов с использованием методов электрического импеданса или пяти субпопуляций лейкоцитов с использованием методов проточной лазерной цитометрии с применением флуоресцентных красителей, для количественного определения гемоглобина, количественного определения и дифференциации лейкоцитов во время общего анализа крови, а также для количественного определения и дифференциации лейкоцитов во время общего анализа СМЖ. Для диагностики *in vitro*. Изделие является вспомогательным средством в диагностике. Медицинское изделие может применяться для любых групп пациентов, за исключением доноров.

Область применения.

Клиническая лабораторная диагностика. Для диагностики *in vitro*.

Потенциальный потребитель.



Квалифицированные сотрудники клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений и лабораторий службы крови.

4. ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПОПУЛЯЦИОННЫЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показания.

Применяется в качестве вспомогательного реагента при работе на гематологических анализаторах.

Противопоказания: Неприменимо.

Возможные побочные действия при применении медицинского изделия: Неприменимо.

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия: Медицинское изделие может применяться для любых групп пациентов, за исключением доноров.

5. ПРИНЦИП МЕТОДА

Реагент для лизиса клеток крови представляет собой готовый к использованию реагент, применяемый для анализа количества и размеров лейкоцитов и вычисления субпопуляций лейкоцитов с применением методов гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) и проточной лазерной цитометрии, а также для количественного определения гемоглобина методом прямой фотометрии.



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА

№	Вариант исполнения (фирменное название)	Номинальный объем, л	Показатель активности водородных ионов, pH	Осмоляльность, мОсмоль/кг	Относительная плотность, г/мл	Количество первичных упаковок	Каталожный номер	Состав реагента	Внешний вид	Наличие осадка или хлопьев
1.	Диастромлайзер-СИС-Вэйч	0,5±0,01	5,60 ± 0,15	265 ± 15	1,003±0,003	1 флакон	h23401-R	Хлорид натрия 0,06 % Тетраметиламмония бромид 0,85 % Вода очищенная деионизированная 99,09 %	Прозрачная бесцветная жидкость	
2.	Диастромлайзер-СИС-ФБА	5±0,1	3,3 ± 0,2	20±15	0,987±0,008	1 канистра	h23303-R	Лаурет-2 сульфат натрия 0,4% Вода очищенная деионизированная 99,6 %		
3.	Диастромлайзер-СИС-4ДЛ	5±0,15	6,90 ± 0,20	55 ± 5	1,003±0,003	1 канистра	h23601-R	2-феноксиэтанол 0,18 % Тетраметиламмония бромид 0,08 % Вода очищенная деионизированная 99,74 %		
4.	Диалайзер-ДФ	5±0,1	6,90 ± 0,20	55 ± 5	1,003±0,003	1 канистра	h23601-XN	2-феноксиэтанол 0,17 % Тетраметиламмония бромид 0,07 % Вода очищенная деионизированная 99,76 %	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается синеватый оттенок.	Не допускается
		4±0,1				1 флакон	h236012-XN			
		1,5±0,05				1 флакон	h236013-XN			
5.	Диалайзер-ВПС	1,5±0,05	6,75 ± 0,15	345±15	1,013±0,005	1 флакон	h23630-R	Лаурилсульфат натрия, 0,03% 2-феноксиэтанол, 0,12%, Вода очищенная деионизированная, 99,85 %	Прозрачная бесцветная жидкость	



6.	Диализер-СИС-СЭЙЧБ	0,5±0,05	6,5±1,5	45±15	1,001±0,003	1 флакон	h23125-R	Лаурилсульфат натрия, 0,18 % Вода очищенная деионизированная 99,82 %	Прозрачная бесцветная жидкость	Не допускается
		5±0,1				1 канистра	h23105-R			
7.	ДМ-30 ЛАЙЗ	0,5±0,01	8,95±0,15	168±20	1,000±0,008	1 флакона	DM-30L-R	Лаурил триметиламмония хлорид 20 %, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 1,1 %, Имидазол 0,5%, Вода очищенная деионизированная 78,4 %		
8.	ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ	1±0,05	5,05±0,10	370±20	1,005±0,006	1 флакон	DM-53LEO I-R	Лаурилсульфат натрия 2,5 %, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,06 %, Вода очищенная деионизированная 97,44 %	Прозрачная коричневая жидкость	
9.	ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ	0,4±0,05	5,6±0,20	150±20	1±0,003	1 флакон	DM-53LEO II-R	Лаурилсульфат натрия 2,5 %, 2-феноксиэтанол 0,5%, Вода очищенная деионизированная 97 %	Прозрачная бесцветная жидкость	
10.	ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ	1±0,05	2,2±0,1	555±30	1,003±0,007	1 флакон	DM-53LH-R	Тетраметиламмония бромид 2,5 %, 2-пропанол 0,5%, Вода очищенная деионизированная 97 %		
11.	ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ	1±0,05	5,4±0,1	800±50	0,998±0,003	1 флакон	DM-50LEO I-R	Метанол 10%, Лаурилсульфат натрия 2,5 %, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,06 %, Вода очищенная деионизированная 87,44 %	Прозрачная коричневая жидкость	
12.	ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ	0,5±0,01	9,1±0,2	105±20	1,003±0,003	1 флакон	DM-50LH-R	Лаурилсульфат натрия 10 %, Имидазол 0,5%, Вода очищенная деионизированная 89,5 %	Прозрачная бесцветная жидкость	



13.	ДМ-68ЛД ЛАЙЗ	1±0,05	7,25 ±0,05	90±20	1,003±0,003	1 флакон	DM-68LD-R	Лаурилсульфат натрия 12 %, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 2,2%, Вода очищенная деионизированная 85,8 %	Прозрачная бесцветная жидкость	Не допускается
14.	ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ	1±0,05	3,30±0,20	20±15	0,987±0,009	1 флакон	DM-68LB-R	Лаурилсульфат натрия 3,1 %, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 2,2%, Вода очищенная деионизированная 94,7 %		
15.	ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ	1±0,05	6,5±1,5	45±15	1,001±0,003	1 флакон	DM-68LH-R	Лаурил триметиламмония хлорид 10 %, Имидазол 0,5%, Вода очищенная деионизированная 89,5 %		
16.	ДМ-68ЛН ЛАЙЗ	1±0,05	2,63±0,05	30±5	1,006±0,005	1 флакон	DM-68LN-R	Лаурилсульфат натрия 12 %, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 2,2%, Вода очищенная деионизированная 85,8 %		
17.	ДИАЛАЙЗ-СД 3.2	5±0,1	8,5 ± 0,4	50 ± 25	0,998±0,003	1 канистра	h12502-R	Лаурилсульфат натрия 10 %, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 0,5 % Тетраметиламмония бромид 0,4 %, Вода очищенная деионизированная 89,1 %		
18.	ДИАГЛОБИН-СД 3.2	5±0,1	4,0 ± 0,6	540 ± 100	0,995±0,003	1 канистра	h12503-R	Лаурил триметиламмония хлорид 20 %, Гидроксил-аммония хлорид 10%, Центримониум хлорид 5%, Вода очищенная деионизированная 65 %		



19.	Диализ-Дифф-ЛМЖ	1±0,05	9,0±2,0	250±200	0,998±0,005	1 флакон	h20212-R	Тетраметиламмония бромид 0,09 % 2-феноксизтанол 4,9 % Вода очищенная деионизированная 95,01 %		
20.	Диафикс ЕО 5 Дифф.П60	1±0,05	6,75±0,15	2800±200	1,001±0,005	1 флакон	h20314/P60-R	Пропан-1,2-диол 2,9 % 2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль 0,0039 % Вода очищенная деионизированная 97,0961 %	Прозрачная синяя жидкость	
21.	Диализ-Аргос Пентра	0,4±0,01	9,9 ±0,6	65±15	0,998±0,005	1 флакон	h20312 P-R	Цианид калия 0,029 % Тетраметиламмония бромид 2,66 % Вода очищенная деионизированная 97,311 %	Прозрачная бесцветная жидкость	Не допускается
		1±0,05				1 флакон	h20322P-R			
22.	Диализ-Базо II	1±0,05	2,16±0,03	315±30	1,001±0,003	1 флакон	h20313/P-R	Соляная кислота 0,029 % 2-феноксизтанол 0,49 % Вода очищенная деионизированная 99,481 %		
23.	Диафикс ЭО 5 Дифф.П120	1±0,05	6,75±0,15	2800±200	1,001±0,005	1 флакон	h20314/P120-R	Пропан-1,2-диол 2,9 % 2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль 0,0039 % Вода очищенная деионизированная 97,0961 %	Прозрачная синяя жидкость	
24.	Диализ-Базо 5Дифф	5±0,1	2,6±0,3	20±10	1,001±0,003	1 канистра	H20313/P120-R	Соляная кислота 0,029 % 2-феноксизтанол 0,49 % Вода очищенная деионизированная 99,481 %	Прозрачная бесцветная жидкость	
25.	Диализ-СТ-Дифф-СФ	5±0,1	9,25±0,50	190±30	0,998±0,003	1 канистра	h15309-R	Тетраметиламмония бромид 0,8 % Сульфит натрия 0,5 % Дигидрат дикалиевой соли	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается	



		1±0,05				1 флакон	h15319-R	ЭДТА* 0,1 % Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 0,1 % Вода очищенная деионизированная 98,5 %	желтоватый оттенек.	
		0,5±0,01				1 флакон	h15339-R			
		0,3±0,01				1 флакон	h15349-R			
26.	Диа-Эритролайзер	1,9±0,1	2,6±0,3	60±50	0,997±0,004	1 флакон	h15325-R	Карбонат натрия 0,6%, Хлорид натрия 1,45%, Сульфат натрия 3,13%, Вода очищенная деионизированная 94,82 %	Прозрачная желтая жидкость	
		1,3±0,1				1 флакон	h15335-R			
27.	Диа-Стабилайзер	0,85±0,02	10,6±1,0	930 ±100	1,036±0,006	1 флакон	h15314-R	Муравьиная кислота 0,12%, Диазолидинилмочевина 0,1%, 5-хлоро-2-метил-4- изотиазолин-3-он 0,007%, 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%, Вода очищенная деионизированная 99,766 %	Прозрачная бесцветная жидкость	Не допускается
		0,5±0,01				1 флакон	h15324-R			
		0,35±0,01				1 флакон	h15334-R			
28.	Диалайз-НК Дифф	5±0,1	7,90±0,20	110±20	0,998±0,005	1 канистра	h19202-R	Тетраметиламмония бромид 5,0%, Азид натрия 1,0 %, Цианид калия 0,05%, Лаурилсульфат натрия 6,3%, Вода очищенная деионизированная 87,65 %	Прозрачная бесцветная жидкость	
		0,5±0,01				1 флакон	h19222-R			
29.	Диатерг-НК	5±0,1	7,35±0,15	340±45	1,007±0,005	1 канистра	h19102-R	Хлорид натрия 0,9%, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 0,3 %, Лаурилсульфат натрия 1,0%, 2-феноксиэтанол 0,4 %, Вода очищенная деионизированная 97,4%	Прозрачная зеленая жидкость	Не допускается
30.	Диалайз-НК 5Дифф	0,5±0,02	8,30±0,35	338±45	1,006±0,004	1 флакон	h19312-R	Лаурилсульфат натрия 2 %, Сульфат натрия 1,2 %,	Прозрачная бесцветная	



		5±0,1				1 канистра	h19322-R	Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота) 0,6%, Вода очищенная деионизированная 96,2 %	жидкость	
31.	Диабазо А120	1,1±0,05	2,05±0,10	40±20	0,996±0,003	1 флакон	h24301-R	Соляная кислота, 0,08%, Фталевая кислота, 0,25%, 2-феноксизанол 0,01%, Лаурилсульфат натрия 2%, Вода очищенная деионизированная 97,66 %		
32.	ДиаЭйчгб А120	1,1±0,05	11,0±0,05	420±30	1,007±0,008	1 флакон	h24302-R	Оксид диметиллауриламины, 2,0%, Вода очищенная деионизированная 98 %		
33.	Диа-РБЦ/ПЛТ А120	2,7±0,1	7,35±0,25	275±15	0,999±0,003	1 флакон	h24303-R	Лаурилсульфат натрия, 0,01%, Дигидрат двуназиевой соли ЭДТА*, 0,15%, Дигидрат тетраназиевой соли ЭДТА*, 0,125%, Хлорид натрия, 0,64%, Глютаральдегид, 0,11%, Трис-буфер (трис(гидроксиметил)амино метан, соляная кислота), 0,4%, Вода очищенная деионизированная 98,565 %	Прозрачная светло- желтая жидкость.	
34.	ЭйчГБ-Рear-ЦФ лизер	1,1±0,05	11,0±1,0	350±40	1,009±0,005	1 флакон	h24352-R	Оксид лауридиметиламина, 2,0%, Вода очищенная деионизированная 98 %	Прозрачная бесцветная жидкость	
*Примечание: ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота										



7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА

Аналитические характеристики реагента соответствуют аналитическим характеристикам анализатора, которые указаны в эксплуатационной документации к анализатору.

7.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ

В процессе разработки реагента проведён анализ рисков применения МИ и способ управления рисками в процессе применения реагента в части влияния интерферирующих веществ.

В ходе анализа литературы были выделены основные интерферирующие компоненты, которые в пределах своих концентраций прогнозируемо влияют на результаты анализа, вызывая определённую погрешность.

Экспериментально исследовано, что вещества из приведенного перечня в указанной концентрации способны исказить результаты анализа.

Параметр	Источник интерференции	
	Билирубин 433,1 мкмоль/л	Триглицериды 15,39 ммоль/л
	Влияние на результат анализа	
WBC	<±15,0%	<±15,0%
RBC	<±6,0%	<±6,0%
HGB	<±7,0%	<±7,0%
HCT	<±6,0%	<±6,0%
PLT	<±25,0%	<±25,0%

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения реагента – класс 2а.

Реагент должен использоваться квалифицированными сотрудниками клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений и лабораторий службы крови.

При работе с реагентом необходимо соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 3.3686-21, а также ГОСТ Р ИСО 15190.

При работе с реагентом следует использовать средства индивидуальной защиты (блузон, брюки, халат, шапочку, тапочки или сабо, очки защитные, полумаску, одноразовые перчатки). Все использованные материалы, инструменты и оборудование, рабочие поверхности следует дезинфицировать в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 и методическими указаниями МУ 287-113.

Материалы, подлежащие обеззараживанию, следует подвергать обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения на территории РФ, например, раствором перекиси водорода с массовой долей 6 % при температуре от 17 до 27°C не менее 2 ч.

Инструменты и оборудование, а также поверхности, на которых проводился анализ, следует обрабатывать дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения на территории РФ, например, раствором этилового спирта с объемной долей 70 % в течение 10 секунд.

При работе с образцами крови и биологическими жидкостями пациентов необходимо следовать требованиям охраны труда при работе с кровью и другими материалами биологического происхождения, указанным в Приказе Минтруда России от 18.12.2020 № 928н.

Утилизацию всех анализируемых образцов, компонентов и отходов реагента, несущих потенциальную биологическую опасность, необходимо проводить в соответствии с разделом «МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ».



9. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ (не входят в комплект поставки)

Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч, флакон 0,5 л	1) Анализатор гематологический ХР-300, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/812, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 2) Анализатор гематологический КХ-21N с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2011/11182, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 6) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 7) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА, канистра 5 л	1) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation)	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сеарч-П-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		15) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 16) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	2) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100.	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт Диашис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 8) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 9) Дилуэнт Диареф-Скарч-П-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		11) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ, канистра 5 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F];	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сеарч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021,



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 24) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 17) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550; 5) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation);	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 15) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		16) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	6) Анализатор гематологический XS-500i, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/516, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 7) Анализатор гематологический XS моделей 800i, 1000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00167, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), модель: XS 1000i;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 7) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	8) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100.	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт Диашис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 8) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 9) Дилуэнт Диареф-Сеарч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ флакон 4 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ флакон 1,5 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F];	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		11) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 24) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Ссарч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 17) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550;		1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;
5) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation);		3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 15) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 16) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	6) Анализатор гематологический XS-500i, с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/516, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 7) Анализатор гематологический XS моделей 800i, 1000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00167, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), модель: XS 1000i;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 7) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	8) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	гематологический ХЕ-2100.	2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт Диашис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 8) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 9) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС, флакон 1,5 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2233, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F].	ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л. 1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 24) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ, канистра 5 л	1) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-2000 [WPC]; 2) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № РЗП 2014/2233, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), вариант исполнения: XN-9000 IV WB [WPC/PLT-F];	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сепарч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 20) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 24) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	3) Анализатор гематологический XN, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12754, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: XN-1000 [RET/PLT-F] SA-10;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		15) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 17) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-ПЛТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-П-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	4) Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L, РУ № РЗН 2019/9227, производства «SYSMEX CORPORATION», Япония (SYSMEX CORPORATION), вариант исполнения: анализатор гематологический автоматический XN-550;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;
	5) Анализатор гематологический ХТ-4000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05094, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation);	2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 8) Дилуэнт Диареф-Ссарч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 9) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 11) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 12) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 13) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 14) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 15) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 16) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	6) Анализатор гематологический XS-500i, с принадлежностями, РУ № РЗП 2013/516, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation); 7) Анализатор гематологический XS моделей 800i, 1000i с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00167, производства «Сисмекс Корпорейшн», Япония (Sysmex Corporation), модель: XS 1000i;	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-Ц1 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-Ц1 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		7) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 8) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 9) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 10) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
	8) Анализатор гематологический автоматический ХЕ с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/1525, производства «СИСМЕКС КОРПОРЕЙШН», Япония (SYSMEX CORPORATION), варианты исполнения: анализатор гематологический ХЕ-5000, анализатор гематологический ХЕ-2100.	1) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 4) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 5) Дилуэнт Диашис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 6) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		7) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; 8) Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л; 9) Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; 10) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаФлуор-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,042 л; 11) Реагент для подсчета лейкоцитов Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,042 л; 12) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 1 л; 13) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 14) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, канистра 5 л; 15) Реагент для подсчета эритроцитов Диалайзер-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 4 л; 16) Реагент для подсчета эритроцитов Диастромлайзер-СИС-НР-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		17) Реагент для подсчета эритроцитов ДиаФлуор-НР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, флакон 0,082 л; 18) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДиаФлуор-РЕТ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,012 л; 19) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик-II-СИС-Дай для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 20) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; 21) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; 22) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; 23) Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ, флакон 0,5 л	Анализатор гематологический, варианты исполнения: ВС-3600, ВС-6800, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12468, производства «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР, Дальнее зарубежье, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., вариант исполнения: ВС-3600.	1) Дилуэнт ДМ-30Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 20 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализаторы гематологические автоматические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/03107, производства «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd), варианты исполнения: ВС-5300; ВС-5380.	1) Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-	Анализаторы гематологические автоматические с	1) Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
53ЛЕО II ЛАЙЗ, флакон 0,4 л	принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/03107, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd), варианты исполнения: BC-5300; BC-5380.	автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализаторы гематологические автоматические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/03107, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd), варианты исполнения: BC-5300; BC-5380.	1) Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: BC-5150, BC-5000 с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/5523, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), вариант исполнения: BC-5000.	1) Дилуэнт ДМ-50Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ, флакон 0,5 л	Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: BC-5150, BC-5000 с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/5523, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), вариант исполнения: BC-5000.	1) Дилуэнт ДМ-50Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализатор гематологический автоматический, варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай, (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.), варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200.	1) Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 4) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФН ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 5) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализатор гематологический автоматический, варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай, (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.), варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200.	1) Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 4) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФН ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 5) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ, флакон 1 л	Анализатор гематологический автоматический, варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай, (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.), варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200.	1) Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 4) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФН ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 5) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-	Анализатор гематологический автоматический,	1) Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
68ЛН ЛАЙЗ, флакон 1 л	варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000, РУ № РЗН 2019/9120, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай, (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.), варианты исполнения: BC-6800Plus, BC-6200.	автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Реагент для подсчета лейкоцитов ДМ-68ФД ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 4) Реагент для подсчета эритроцитов ДМ-68ФП ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-004-66418557-2021, пакетик 0,012 л; 5) Реагент для подсчета ретикулоцитов ДМ-68ФР ДАЙ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, пакетик 0,012 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2, канистра 5 л	Гематологический анализатор CELL-DYN Ruby для in vitro диагностики с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/04961, производства «Эбботт Лэбораториз, Диагностическое подразделение», США (Abbott Laboratories Diagnostics Division).	1) Дилуэнт Диатон-ПИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2, канистра 5 л	Гематологический анализатор CELL-DYN Ruby для in vitro диагностики с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/04961, производства «Эбботт Лэбораториз, Диагностическое подразделение», США (Abbott Laboratories Diagnostics Division).	1) Дилуэнт Диатон-ПИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ, флакон 1 л	1) Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS 60, варианты исполнения ABX MICROS 60 ОТ, ABX MICROS 60 СТ, с принадлежностями, РУ № 2016/5128, производства «ХОРИБА АБХ САС», Франция (HORIBA ABX SAS), вариант исполнения: ABX MICROS 60 ОТ; 2) Анализатор гематологический автоматический с дифференцировкой лейкоцитов по трем популяциям ABX MICROS ES 60 с	1) Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11769, производства «ХОРИБА АБХ САС», Франция (HORIBA ABX SAS), вариант исполнения: ABX MICROS ES 60 OT.	
Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60, флакон 1 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБИкс САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель: 80	1) Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; 4) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра, флакон 0,4 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра, флакон 1 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБИкс САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель: 80	1) Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; 4) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II, флакон 1 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБИкс САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель: 80.	1) Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; 4) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120, флакон 1 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С.», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБИкс САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель: 80	1) Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л, флакон 1 л с резиновой вставкой; 3) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф, канистра 5 л	1) Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11637, производства «ХОРИБА АБХ С.А.С.», Франция, (HORIBA ABX S.A.S), вариант исполнения: PENTRA 60; 2) Анализатор гематологический автоматический Pentra, модели 80 и XL 80, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08115, производства «ХОРИБА АБИкс САС», Франция, (HORIBA ABX SAS), модель: 80	1) Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; 3) Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; 4) Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ, флакон 0,3 л	1) Анализатор гематологический AcT diff 2 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08493, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.).	1) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л; 4) Моющий раствор Диакленз для анализаторов



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
	3) Гематологический анализатор DxH 500 с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8651, «Бекмен Культер Айэленд, Инк.», Ирландия (Beckman Coulter Ireland);	1) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 4) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
	4) Система клеточного анализа UniCel DxH 600 Coulter в составе и с принадлежностями, РУ № РЗН 2015/2710, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.); 5) Система клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/07108, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.), вариант исполнения UniCel DxH 800 Coulter Cellular Analysis System (with a floorstand)	1) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет А для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,38 л; 4) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет Б для анализаторов автоматических гематологических по



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 1,9 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер, флакон 0,85 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер, флакон 0,35 л	1) Система клеточного анализа UniCel DxH 600 Coulter в составе и с принадлежностями, РУ № РЗН 2015/2710, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.); 2) Система клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/07108, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.), вариант исполнения UniCel DxH 800 Coulter Cellular Analysis System (with a floorstand)	1) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет А для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,38 л; 4) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет Б для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 1,9 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер, флакон 1,9 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер, флакон 1,3 л	1) Система клеточного анализа UniCel DxH 600 Coulter в составе и с принадлежностями, РУ № РЗН 2015/2710, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.); 2) Система клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/07108, производства «Бекмен Культер, Инк.», США (Beckman Coulter, Inc.), вариант исполнения UniCel DxH 800 Coulter Cellular Analysis System (with a floorstand).	1) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; 2) Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 3) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет А для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,38 л; 4) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диа-Рет Б для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 1,9 л; 5) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; 6) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; 7) Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф, флакон 0,5 л	1) Автоматический гематологический анализатор "МЕК", модель 7300К с принадлежностями, РУ №РЗН 2014/2200, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (NIHON KONDEN CORPORATION); 2) Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2131, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (NIHON KONDEN CORPORATION); 3) Автоматический гематологический анализатор "МЕК-9100" с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8508, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (NIHON KONDEN CORPORATION).	1) Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л.



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК, канистра 5 л	1) Автоматический гематологический анализатор "МЕК", модель 7300К с принадлежностями, РУ №РЗН 2014/2200, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation); 2) Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2131, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation); 3) Автоматический гематологический анализатор "МЕК-9100" с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8508, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation).	1) Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф, канистра 5 л	1) Автоматический гематологический анализатор "МЕК", модель 7300К с принадлежностями, РУ №РЗН 2014/2200, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation); 2) Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К с принадлежностями, РУ № РЗН 2014/2131, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation); 3) Автоматический гематологический анализатор "МЕК-9100" с принадлежностями, РУ № РЗН 2019/8508, производства «НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН», Япония (Nihon Kohden Corporation).	1) Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 2) Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120, флакон 1,1 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностикас Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический	1) Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л; 2) Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л; 3) Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
	«Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями.	автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 4) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,65 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,305 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л; 8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л.
Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчгб А120, флакон 1,1 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностика Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями.	1) Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л; 2) Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л; 3) Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 4) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0.65 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0.305 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0.585 л; 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0.82 л; 8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0.81 л.
Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120, флакон 2.7 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностика Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями.	1) Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2.725 л; 2) Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0.1 л; 3) Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 4) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0.65 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0.305 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л; 8) Моющий раствор Диаclin ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л.
Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер, флакон 1,1 л	Анализатор автоматический гематологический моделей "Адвия 2120i" (Advia 2120i), "Адвия 2120i" (Advia 2120i) с модулем окраски мазков, с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2007/00581, производства «Сименс Хэлскеа Диагностикас Инк.», США (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), модель: анализатор автоматический гематологический «Адвия 2120i» (Advia 2120i) с принадлежностями.	1) Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л; 2) Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л; 3) Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; 4) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-1 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,65 л; 5) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-2 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,305 л; 6) Реагент для подсчета лейкоцитов ДиаПерокс-3 А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-003-66418557-2021, флакон 0,585 л; 7) Реагент для подсчета ретикулоцитов Диаретик Авто А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-005-66418557-2021, флакон 0,82 л;



Вариант исполнения (фирменное наименование)	Совместимые медицинские изделия	
	Совместимые анализаторы	Совместимые реагенты*
		8) Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л.
Примечание: * - Медицинские изделия производства АО "СДС" проходят процесс государственной регистрации.		



10. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом проведения анализа образцов необходимо подготовить гематологический анализатор в соответствии с его эксплуатационной документацией и провести процедуру внутрилабораторного контроля качества.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должны входить:

- реагент в первичной упаковке в зависимости от варианта исполнения в соответствии с разделом ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- паспорт (при необходимости по ГОСТ 51088) предоставляется по запросу пользователя – 1 шт.

12. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Вид анализируемого биологического материала

Реагент предназначен для использования с образцами крови (венозной/капиллярной, собранной в пробирки с антикоагулянтами К2ЭДТА, К3ЭДТА или Na2ЭДТА) и пробами спинномозговой жидкости (СМЖ).

Подготовку образцов следует проводить в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации гематологического анализатора.

Условия хранения биологического материала

Пробы следует анализировать в течение 4 часов после забора. Если анализ пробы невозможно выполнить в течение 4 часов после забора, то следует поместить образец в холодильник и хранить его до выполнения анализа при температуре 2 - 8°C. В случае анализа охлажденной пробы, выньте ее из холодильника не менее чем за 15 минут до анализа, чтобы она приняла комнатную температуру. После восстановления комнатной температуры хорошо перемешайте кровь перед выполнением анализа.

Анализ биологических жидкостей следует провести как можно скорее, так как разрушение клеток начинается в течение одного часа после сбора*.

Ограничения по использованию биологического материала

- Используйте только антикоагулянт указанного типа.
- В зависимости от применяемого антикоагулянта возможны гемолиз и агрегация тромбоцитов, вызывающие ошибки в результатах анализа.
- Антикоагулянт Na2ЭДТА трудно растворяется в крови и может вызывать образование фибрина или агрегацию тромбоцитов в некоторых образцах. Необходимо тщательное перемешивание образцов до полного растворения сухого антикоагулянта.
- При использовании разбавленных проб: пробу следует анализировать немедленно после разбавления, поскольку в разбавленных пробах легко происходит агрегация тромбоцитов. Кроме того, добавленный разбавитель может вызывать ошибки в данных анализа вследствие испарения или загрязнения. Поэтому для каждого анализа следует готовить новые разбавленные пробы.
- Чрезмерное перемешивание пробы биологической жидкости может привести к неправильному определению величин WBC-BF и TC-BF#.*

* Если в приборе предусмотрен режим анализа биологических жидкостей.

13. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Реагент является готовым реагентом для проведения анализа.

Каждую упаковку реагентов перед использованием необходимо осмотреть. Осмотрите упаковку на наличие протечек или влаги. Не используйте реагент при наличии признаков протечки или неправильной упаковки.

Проведите установку реагента в соответствии с эксплуатационной документацией к гематологическому анализатору.



14. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией гематологического анализатора для проведения соответствующих тестов.

15. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В гематологических анализаторах предусмотрена автоматическая регистрация результатов и размещение данных в базе рабочей станции. Для детальной информации по работе с базой данных результатов анализов обратитесь к эксплуатационной документации гематологического анализатора.

16. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В гематологических анализаторах предусмотрен контроль качества. Применяйте метод, соответствующий Вашим needs.

Для детальной информации по проведению контроля качества обратитесь к эксплуатационной документации гематологического анализатора.

17. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент должен транспортироваться и храниться в пределах значений температуры окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Допускается кратковременное замораживание. Если реагент был заморожен, его необходимо нагреть до комнатной температуры, а затем перемешать, аккуратно переворачивая упаковку, перед использованием.

Реагент транспортируется всеми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

Изделия, транспортированные с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Хранение реагента должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Реагент следует применять в соответствии с инструкцией по применению.

Реагент с истекшим сроком годности применению не подлежит. Срок годности реагента смотрите на упаковке.

18. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности реагента – 18 месяцев с даты производства при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности реагента после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора не более 90 суток при температуре от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

19. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реагента требованиям Технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных в инструкции по применению.

Гарантийный срок годности составляет 18 месяцев и указан на этикетке реагента.

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться в Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), по адресу: 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А.

Тел.: +7 (495) 963-72-16, +7 (495) 963-73-60, +7 (495) 963-73-62;

E-mail: info@udsys.ru

Официальный сайт: www.udsys.ru



20. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация отходов от работы с реагентом с использованием образцов крови пациентов должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, класс Б и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Утилизация реагента, не подлежащего использованию, и с истекшим сроком годности, должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, класс А и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

21. СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ

Символ	Наименование символа
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Код партии
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не допускать воздействия влаги
	Верх
	Крюками не брать
	Обращаться с осторожностью
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности

22. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования»;




ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения»;


ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»;


ГОСТ Р ИСО 23640-2015 «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro».

23. ДАТА ВЫПУСКА ИЛИ ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИИ

Версия 2 от 22.04.2024 г.

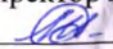Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 62 листов (-а)
Генеральный директор АО «СДС»
Новикова Е. Б. 

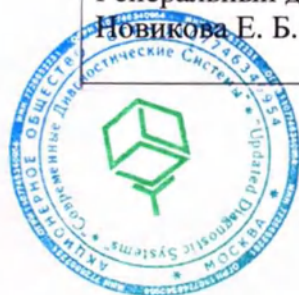

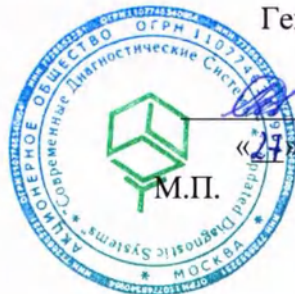

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «СДС»
Е.Б. Новикова
«27» мая 2024 года

Паспорта
на медицинское изделие
«Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах
исполнения»

2024 г.

ПАСПОРТ № h23401-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л h23401-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	5,60 ± 0,15	5,74
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	265 ± 15	256
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,003	1,005
6. Номинальный объем, л	0,5±0,01	0,505
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: хлорид натрия 0,06 %; тетраметиламмония бромид 0,85 %; вода очищенная деионизированная 99,09 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Диастромлайзер-СИС-4ДЛ

ПАСПОРТ № h23303-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h23303-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	3,3 ± 0,2	3,4
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	20±15	17
5. Относительная плотность, г/мл	0,987±0,008	0,995
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,018
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурет-2 сульфат натрия 0,4%; вода очищенная деионизированная 99,6 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Диалайзер-ДФ

ПАСПОРТ № h23601-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h23601-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,90 ± 0,20	6,99
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	55 ± 5	50
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,003	1,001
6. Номинальный объем, л	5±0,15	4,984
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: 2-феноксиэтанол 0,18 %; тетраметиламмония бромид 0,08 %; вода очищенная деионизированная 99,74 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Диастромлайзер-СИС-4ДЛ

ПАСПОРТ № h23601-XN/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h23601-XN

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается синеватый оттенок	Прозрачная жидкость с синеватым оттенком
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,90 ± 0,20	6,94
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	55 ± 5	50
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,003	1,001
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,029
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: 2-феноксиэтанол 0,17 %; тетраметиламмония бромид 0,07 %; вода очищенная деионизированная 99,76 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

Диалайзер-ДФ

ПАСПОРТ № h23630-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л h23630-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75 ± 0,15	6,81
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	345 ± 15	351
5. Относительная плотность, г/мл	1,013 ± 0,005	1,009
6. Номинальный объем, л	1,5 ± 0,05	1,509
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия, 0,03%; 2-феноксиэтанол, 0,12%; вода очищенная деионизированная 99,85 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h23105-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h23105-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,5 ± 1,5	7,94
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	45 ± 15	43
5. Относительная плотность, г/мл	1,001 ± 0,003	1,000
6. Номинальный объем, л	5 ± 0,1	5,022
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия, 0,18 %; вода очищенная деионизированная 99,82 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h23125-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л h23125-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,5 ± 1,5	7,96
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	45 ± 15	46
5. Относительная плотность, г/мл	1,001 ± 0,003	1,001
6. Номинальный объем, л	0,5 ± 0,05	0,511
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия, 0,18 %; вода очищенная деионизированная 99,82 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № DM-30L-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л DM-30L-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	8,95 ± 0,15	8,92
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	168 ± 20	148
5. Относительная плотность, г/мл	1,000 ± 0,008	0,992
6. Номинальный объем, л	0,5 ± 0,01	0,510
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурил триметиламмония хлорид 20 %; трис-буфер(трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 1,1 %; имидазол 0,5%; вода очищенная деионизированная 78,4 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-53ЛЕО I-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-53ЛЕО I-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная коричневая жидкость	Прозрачная коричневая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	5,05±0,10	5,15
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	370±20	354
5. Относительная плотность, г/мл	1,005±0,006	1,011
6. Номинальный объем, л	1±0,05	0,990
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 2,5 %; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,06 %; вода очищенная деионизированная 97,44 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-53ЛХ-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-53ЛХ-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,2±0,1	2,2
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	555±30	530
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,007	1,010
6. Номинальный объем, л	1±0,05	0,993
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 2,5 %; 2-пропанол 0,5%; вода очищенная деионизированная 97 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-53ЛЕО II-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л
ДМ-53ЛЕО II-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	5,6±0,20	5,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	150±20	140
5. Относительная плотность, г/мл	1±0,003	1,003
6. Номинальный объем, л	0,4±0,05	0,411
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 2,5 %; 2-феноксиэтанол 0,5%; вода очищенная деионизированная 97 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-50ЛЕО I-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-50ЛЕО I-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная коричневая жидкость	Прозрачная коричневая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	5,4±0,1	5,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	800±50	758
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,999
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,012
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: метанол 10%; лаурилсульфат натрия 2,5 %; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,06 %; вода очищенная деионизированная 87,44 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-50ЛН-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л
ДМ-50ЛН-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,1±0,2	9,0
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	105±20	101
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,003	1,001
6. Номинальный объем, л	0,5±0,01	0,510
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 10 %; имидазол 0,5%; вода очищенная деионизированная 89,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-68ЛБ-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-68ЛБ-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	3,30±0,20	3,31
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	20±15	17
5. Относительная плотность, г/мл	0,987±0,009	0,996
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,033
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 3,1 %; трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан, соляная кислота) 2,2%; вода очищенная деионизированная 94,7 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-68ЛД-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-68ЛД-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,25 ±0,05	7,30
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	90±20	89
5. Относительная плотность, г/мл	1,003±0,003	1,003
6. Номинальный объем, л	1±0,05	0,994
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 12 %; трис-буфер (трис(гидроксиэтил)аминометан, соляная кислота) 2,2%; вода очищенная деионизированная 85,8 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-68ЛН-R/180050062

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-68ЛН-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,5±1,5	7,7
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	45±15	41
5. Относительная плотность, г/мл	1,001±0,003	1,001
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,012
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурил триметиламмония хлорид 10 %; имидазол 0,5%; вода очищенная деионизированная 89,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № ДМ-68ЛН-Р/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
ДМ-68ЛН-Р

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,63±0,05	2,68
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	30±5	30
5. Относительная плотность, г/мл	1,006±0,005	1,001
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,024
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 12 %; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 2,2%; вода очищенная деионизированная 85,8 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.
Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h12503-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л
h12503-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	4,0 ± 0,6	4,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	540 ± 100	471
5. Относительная плотность, г/мл	0,995±0,003	0,997
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,023
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурил триметиламмония хлорид 20 %; гидроксил-аммония хлорид 10%; центримониум хлорид 5%; вода очищенная деионизированная 65 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.
Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h12502-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л
h12502-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	8,5 ± 0,4	8,1
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	50 ± 25	27
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,998
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,021
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 10 %; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,5 %; тетраметиламмония бромид 0,4 %; вода очищенная деионизированная 89,1 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.
Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20212-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л
h20212-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,0±2,0	9,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	250±200	63
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,005	0,993
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,036
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 0,09 %; 2-феноксиэтанол 4,9 %; вода очищенная деионизированная 95,01 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.
Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20314/P60-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л h20314/P60-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная синяя жидкость	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75±0,15	6,62
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	2800±200	2971
5. Относительная плотность, г/мл	1,001±0,005	1,006
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,010
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: пропан-1,2-диол 2,9 %; 2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль 0,0039 %; вода очищенная деионизированная 97,0961 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20312 P-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л h20312 P-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,9 ±0,6	9,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	65±15	65
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,005	0,993
6. Номинальный объем, л	0,4±0,01	0,408
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: цианид калия 0,029 %; тетраметиламмония бромид 2,66 %; вода очищенная деионизированная 97,311 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20322P-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л h20322P-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,9 ±0,6	9,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	65±15	63
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,005	0,993
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,028
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: цианид калия 0,029 %; тетраметиламмония бромид 2,66 %; вода очищенная деионизированная 97,311 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20313/P-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л h20313/P-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,16±0,03	2,17
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	315±30	309
5. Относительная плотность, г/мл	1,001±0,003	1,000
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,024
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: соляная кислота 0,029 %; 2-феноксиэтанол 0,49 %; вода очищенная деионизированная 99,481 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h20314/P120-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л h20314/P120-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная синяя жидкость	Прозрачная синяя жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	6,75±0,15	6,66
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	2800±200	2892
5. Относительная плотность, г/мл	1,001±0,005	1,006
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,016
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: пропан-1,2-диол 2,9 %; 2-[(5-Хлор-2-оксифенил)азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль 0,0039 %; вода очищенная деионизированная 97,0961 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°С и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15309-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h15309-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается желтоватый оттенок	Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,25±0,50	8,83
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	190±30	182
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,995
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,036
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 0,8 %; сульфит натрия 0,5 %; дигидрат дикальевой соли ЭДТА 0,1 %; трис-буфер трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,1 %; вода очищенная деионизированная 98,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°С и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № H20313/P120-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л H20313/P120-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,6±0,3	2,5
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	20±10	21
5. Относительная плотность, г/мл	1,001±0,003	0,999
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,026
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: соляная кислота 0,029 %; 2-феноксизтанол 0,49 %; вода очищенная деионизированная 99,481 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°С и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15319-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л h15319-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается желтоватый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,25±0,50	9,10
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	190±30	180
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,995
6. Номинальный объем, л	1±0,05	1,026
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 0,8 %; сульфит натрия 0,5 %; дигидрат дикальевой соли ЭДТА 0,1 %; трис-буфер трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,1 %; вода очищенная деионизированная 98,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°С и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15339-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диализ-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л
h15339-R

LOT: 1800500624

Голен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается желтоватый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,25±0,50	9,13
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	190±30	174
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,995
6. Номинальный объем, л	0,5±0,01	0,504
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 0,8 %; сульфит натрия 0,5 %; дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,1 %; трис-буфер трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,1 %; вода очищенная деионизированная 98,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15314-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л
h15314-R

LOT: 1800500624

Голен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	10,6 ± 1,0	10,9
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	930 ±100	831
5. Относительная плотность, г/мл	1,036±0,006	1,042
6. Номинальный объем, л	0,85±0,02	0,870
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: муравьиная кислота 0,12%; диазолидинилмочевина 0,1%, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; вода очищенная деионизированная 99,766 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Д. 000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПАСПОРТ № h15349-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диализ-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л
h15349-R

LOT: 1800500624

Голен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость. Допускается желтоватый оттенок	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	9,25±0,50	8,99
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	190±30	180
5. Относительная плотность, г/мл	0,998±0,003	0,995
6. Номинальный объем, л	0,3±0,01	0,304
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 0,8 %; сульфит натрия 0,5 %; дигидрат дикалиевой соли ЭДТА 0,1 %; трис-буфер трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,1 %; вода очищенная деионизированная 98,5 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15324-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л
h15324-R

LOT: 1800500624

Голен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	10,6 ± 1,0	10,8
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	930 ±100	934
5. Относительная плотность, г/мл	1,036±0,006	1,039
6. Номинальный объем, л	0,5±0,01	0,499
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: муравьиная кислота 0,12%; диазолидинилмочевина 0,1%, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; вода очищенная деионизированная 99,766 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15334-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л h15334-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	10,6 ± 1,0	10,6
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	930 ± 100	924
5. Относительная плотность, г/мл	1,036 ± 0,006	1,039
6. Номинальный объем, л	0,35 ± 0,01	0,351
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: муравьиная кислота 0,12%; диазолидинилмочевина 0,1%, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; 2-метил-4-изотиазолин-3-он 0,007%; вода очищенная деионизированная 99,766 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15335-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л h15335-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная желтая жидкость	Прозрачная желтая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,6 ± 0,3	2,8
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	60 ± 50	36
5. Относительная плотность, г/мл	0,997 ± 0,004	0,994
6. Номинальный объем, л	1,3 ± 0,1	1,308
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: карбонат натрия 0,6%; хлорид натрия 1,45%; сульфат натрия 3,13%; вода очищенная деионизированная 94,82 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h15325-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л h15325-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная желтая жидкость	Прозрачная желтая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,6 ± 0,3	2,8
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	60 ± 50	38
5. Относительная плотность, г/мл	0,997 ± 0,004	0,994
6. Номинальный объем, л	1,9 ± 0,1	1,914
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: карбонат натрия 0,6%; хлорид натрия 1,45%; сульфат натрия 3,13%; вода очищенная деионизированная 94,82 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h19202-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диализ-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л h19202-R

LOT: 1800500624

Годеи до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,90 ± 0,20	8,00
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	110 ± 20	92
5. Относительная плотность, г/мл	0,998 ± 0,005	0,993
6. Номинальный объем, л	5 ± 0,1	4,995
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: тетраметиламмония бромид 5,0%; азид натрия 1,0 %; цианид калия 0,05%; лаурилсульфат натрия 6,3%; вода очищенная деионизированная 87,65 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

ПАСПОРТ № h19102-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л
h19102-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная зеленая жидкость	Прозрачная зеленая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,35 ± 0,15	7,33
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	340 ± 45	311
5. Относительная плотность, г/мл	1,007±0,005	1,006
6. Номинальный объем, л	5±0,1	4,978
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: хлорид натрия 0,9%; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,3 %; лаурилсульфат натрия 1,0%; 2-феноксизанол 0,4 %; вода очищенная деионизированная 97,4%.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



Диалайз-НК 5Дифф

ПАСПОРТ № h19322-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л
h19322-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	8,30±0,35	7,99
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	338±45	320
5. Относительная плотность, г/мл	1,006±0,004	1,008
6. Номинальный объем, л	5±0,1	5,003
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 2 %; сульфат натрия 1,2 %; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,6%; вода очищенная деионизированная 96,2 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



ПАСПОРТ № h19312-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л
h19312-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	8,30±0,35	8,15
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	338±45	364
5. Относительная плотность, г/мл	1,006±0,004	1,009
6. Номинальный объем, л	0,5±0,02	0,480
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия 2 %; сульфат натрия 1,2 %; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота) 0,6%; вода очищенная деионизированная 96,2 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



Диабазо А120

ПАСПОРТ № h24301-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л
h24301-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	2,05±0,10	2,11
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	40±20	34
5. Относительная плотность, г/мл	0,996±0,003	0,996
6. Номинальный объем, л	1,1±0,05	1,099
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: соляная кислота, 0,08%; фталевая кислота, 0,25%; 2-феноксизанол 0,01%; лаурилсульфат натрия 2%; вода очищенная деионизированная 97,66 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



ПАСПОРТ № h24302-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчГБ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л h24302-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	11,0 ± 0,05	10,99
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	420±30	400
5. Относительная плотность, г/мл	1,007±0,008	1,015
6. Номинальный объем, л	1,1±0,05	1,144
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: оксид диметиллауриламида, 2,0%; вода очищенная деионизированная 98 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



ПАСПОРТ № h24352-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Рear-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л h24352-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	11,0±1,0	10,7
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	350±40	335
5. Относительная плотность, г/мл	1,009±0,005	1,013
6. Номинальный объем, л	1,1±0,05	1,101
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ


Химический состав: оксид лауридиметиламина, 2,0%; вода очищенная деионизированная 98 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.

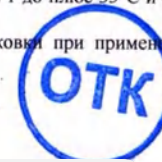

ПАСПОРТ № h24303-R/1800500624

Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л h24303-R

LOT: 1800500624

Годен до: 05.06.2024

Дата изготовления: 05.12.2022

Наименование показателя	Требование ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жидкость	Прозрачная светло-желтая жидкость
2. Наличие осадка или хлопьев	Не допускается	Осадок и хлопья отсутствуют
3. Показатель активности водородных ионов, pH	7,35 ± 0,25	7,11
4. Осмоляльность, мОсмоль/ кг	275±15	264
5. Относительная плотность, г/мл	0,999±0,003	1,002
6. Номинальный объем, л	2,7±0,1	2,694
7. Герметичность первичной упаковки	Герметично	Герметично

ТОЛЬКО ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Химический состав: лаурилсульфат натрия, 0,01%; дигидрат двуназиевой соли ЭДТА, 0,15%; дигидрат тетраназиевой соли ЭДТА, 0,125%; хлорид натрия, 0,64%; глутаральдегид, 0,11%; трис-буфер (трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота), 0,4%; вода очищенная деионизированная 98,565 %.

Условия хранения и транспортирования: от плюс 1 до плюс 35°C и относительной влажности от 30 до 80%.

Срок годности после вскрытия первичной упаковки при применении на борту анализатора: 90 суток.

Начальник ОТК Подгурский Г.М.

Дата выдачи паспорта: 05.12.2022 г.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 листов (-а)

Генеральный директор АО «СДС»

Новикова Е. Б.

