

Салфетки «CombiMedica Line» марлевые медицинские антибактериальные, с хлоргексидином



 **CombiMedica** *Line*

Медицинское изделие.

Салфетки "CombiMedica Line" марлевые медицинские антибактериальные, с хлоргексидином (10см x 10см).
Перевязочное средство. Не стерильно.

Состав: 100% хлопок, ковалентно связанный с диглюконатом хлоргексидина.

Назначение изделия: Салфетки "CombiMedica Line" марлевые медицинские антибактериальные, с хлоргексидином предназначены для перевязки и самостоятельной обработки хирургических и травматических ран, а также кожных порезов, натертостей, эритем.

Способ применения: Очистить и продезинфицировать поврежденный участок кожи или рану. Наложить салфетку на рану. Зафиксировать с помощью пластыря или бинта. Изделие может находиться на ране 3 дня без необходимости замены.

Предупреждения: Каждая салфетка является одноразовой. Помыть руки перед обработкой раны. Прекратить использование продукта в случае покраснения поврежденного участка кожи и, если оно сохраняется, обратиться к врачу. Не использовать изделие, если упаковка открыта или повреждена. Не использовать изделие после даты срока годности, указанной на упаковке. Целостность упаковки гарантирует качество продукта. Хранить в прохладном и сухом месте, при комнатной температуре и вдали от источников тепла. После открытия упаковки продукт должен быть использован и после использования утилизирован. Не применять повторно. Хранить в недоступном для детей месте.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость хлоргексидина.

Производитель: «Franzoni Medical Device s.r.l.», piazza Vittoria, 9 - 25122 Brescia (BS), Italia\«Франзони Медикал Девайс С.р.л.», piazza Vittoria 9 - 25122 Брешиа, Италия.

Место производства: «Ormed srl», Италия, via Pisa 2 - 21050 Cairate (VA), Italia\виа Пиза, 2 - 21050 Кайрате (ВА).

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Дата изготовления: 09\2010

Lotto: 208950

 09\2010 ②

LOT 208950   09\2015

