

Бинты «CombiMedica Line» марлевые медицинские антибактериальные с хлоргексидином



Медицинское изделие.

«Бинты "CombiMedica Line" марлевые медицинские антибактериальные, с хлоргексидином (5м x 5см). Перевязочное средство. Не стерильно.

Состав: 100% хлопок, ковалентно связанный с диглюконатом хлоргексидина.

Назначение изделия: «Бинты "CombiMedica Line" марлевые медицинские антибактериальные, с хлоргексидином предназначены для перевязки и самостоятельной обработки хирургических и травматических ран, а также кожных порезов, натертостей, зритем.

Способ применения: После очистки и дезинфекции поврежденного участка кожи или раны, накладывается повязка или салфетка, которая фиксируется бинтом. Бинт может применяться как самостоятельное изделие непосредственно на раны и закрепляется с помощью пластыря или специальных скоб. Одноразового применения.

Предупреждения: Не затягивать очень сильно бинт во избежание затруднения кровообращения. Не использовать изделие, если упаковка открыта или повреждена. Не использовать изделие после даты срока годности, указанной на упаковке. Не использовать изделие, если заметны какие-то загрязнения. Целостность упаковки гарантирует качество продукта. Хранить в прохладном и сухом месте, при температуре +5 °C до +30° C +/-2°С вдали от источников тепла. После открытия упаковки продукт должен быть использован и после использования утилизирован. Не применять повторно. Хранить в недоступном для детей месте.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость хлоргексидина диглюконата. Производитель: «Franzoni Medical Device s.r.l.», piazza Vittoria, 9 – 25122 Brescia (BS), Italia\ «Франзони Медикал Девайс С.р.л.», piazza Vittoria 9 – 25122 Брешиа, Италия.

Место производства: «Previs S.r.l.» (Превис С.р.л.), Италия, via Dell'Industria, 10A – 36070 Trissino (VI), Italia.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Дата изготовления: 11/2010

Lot: 83042



11\2010



83042



11\2015

