

Фотографические изображения медицинского изделия

«Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10 – 272 – 10973749 – 2022», в составе:

- Носилки – 1 шт.;
- Чехол – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт..



Общий вид:
Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022



Чехол с маркировкой:
Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022

Руководство по эксплуатации носилок бескаркасных «ФЭСТ» тактических по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022

1. Порядок применения:

- развернуть носилки на горизонтальной поверхности;
- уложить пострадавшего на носилки, закрепив его двумя фиксирующими ремнями;
- взявшись за мягкие ручки носилок, поднять их. При переноске пострадавшего необходимо оберегать его от столкновения с препятствиями во избежание вторичного травмирования;
- после завершения переноски пострадавшего осторожно опустить носилки на горизонтальную поверхность и освободить фиксирующие ремни;

Для обеспечения безопасности транспортируемого и транспортирующих необходимо при первой возможности переместить пострадавшего на каркасное средство перемещения.

Внимание! Носилки не обладают необходимой жесткостью, поэтому не допускается перемещение больных с травмами позвоночника, таза и бедра без дополнительной фиксации.

2. Правила эксплуатации и хранения:

- перед эксплуатацией носилок проведите осмотр лент и швов на предмет отсутствия их повреждения;
- запрещается использование носилок при повреждениях ленты, разлохмачиваниях и надрывах швов;
- оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении;
- храните носилки сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов;

- оберегайте ленты и швы носилок от повреждений;
- не храните носилки в полиэтиленовом пакете или в прорезиненных сумках;
- очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой;
- дезинфекцию носилок производят после очистки путем протирания их щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1-3 % раствором хлорамина, перед применением другого дезраствора посоветуйтесь со специалистом.

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156025,
г. Кострома, Рабочий проспект, д. 7

ФЭСТ®

Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические
по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022
ПУ №



Партия № 01
СКК 02
Дата изготовления 03.2023

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия:
«Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022»



Транспортная упаковка с маркировкой:
Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия:
«Носилки бескаркасные «ФЭСТ» тактические по ТУ 30.99.10-272-10973749-2022»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

4/летопри/ ЛИСТОК

Директор Шахов Д.А.

