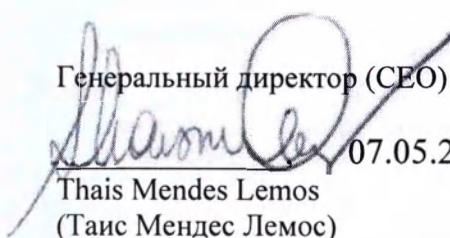


ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА)

Инструкция по применению медицинского изделия
Замки-трубки металлические BRACANIC ID-LOGICAL

Генеральный директор (CEO)



07.05.2024 г.

Thais Mendes Lemos
(Таис Мендес Лемос)

THAIS MENDES LEMOS
ID-LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.621.065/0001-10

Наименование изделия

Наименование медицинского изделия.

Замки-трубки металлические BRACANIC ID-LOGICAL, варианты исполнения:

1. Замки-трубки одинарные, варианты исполнения:

1.1. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приклеивания:

1.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

1.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

1.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

1.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

1.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

1.2. Замки-трубки одинарные: с крючком для приклеивания:

1.2.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

1.2.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

1.2.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

1.2.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт

- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт
- 1.2.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):
 - верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт
- 1.3. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приваривания:
 - 1.3.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):
 - верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт
 - 1.3.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):
 - верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт
 - 1.3.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):
 - верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт
 - 1.3.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):
 - верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт
 - 1.3.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):
 - верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт
- 1.4. Замки-трубки одинарные: с крючком для приваривания:
 - 1.4.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):
 - верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт
 - 1.4.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):
 - верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт
 - 1.4.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):
 - верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
 - верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
 - нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
 - нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

1.4.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

1.4.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый второй моляр U7R – от 1 до 10 шт
- верхний левый второй моляр U7L – от 1 до 10 шт
- нижний правый второй моляр L7R – от 1 до 10 шт
- нижний левый второй моляр L7L – от 1 до 10 шт

2. Замки-трубки двойные, варианты исполнения:

2.1. Замки-трубки двойные: конвертируемые с крючком для приваривания:

2.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

2.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

2.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

2.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

2.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт
- верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт
- нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт
- нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт

3. Замки-трубки самолигирующие, варианты исполнения:

3.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний первый моляр U6RL – от 1 до 10 шт
- нижний первый моляр L6RL – от 1 до 10 шт

3.2. Замки-трубки прописи DAMON HIGH паза 0.022" (0,56 мм):

- верхний первый моляр U6RL – от 1 до 10 шт
- нижний первый моляр L6RL – от 1 до 10 шт

Описание

Обязательной частью ортодонтических аппаратов являются замки-трубки (их также называют щечные трубки). Они устанавливаются на моляры (6-ой и 7-ой зубы) – там, где оканчивается ортодонтическая дуга. Замки-трубки – это механизм, являющийся опорой для концевой части дуги, в отличие от брекетов, через пазы которых проходит центральная часть дуги. Замки-трубки для приклеивания имеют сетчатое основание, замки-трубки для приваривания – гладкое.

Назначение медицинского изделия

Замки-трубки предназначены для воздействия на форму зубочелюстной системы.

Показания к применению медицинского изделия

Замки-трубки металлические BRACANIC показаны для применения у пациентов при наличии аномалий зубочелюстной системы, для создания опоры концевой части дуги.

Противопоказания к применению медицинского изделия

Изделие содержит никель. Индивидуальная непереносимость никеля.

Условия применения медицинского изделия

Изделие может быть использовано в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах.

Изделие применяется высококвалифицированным медицинским персоналом.

Техническое описание медицинского изделия

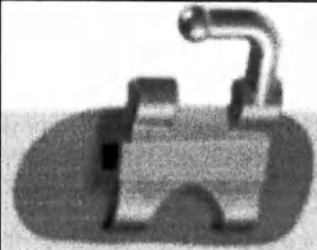
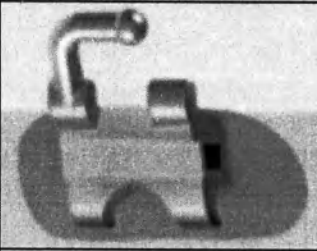
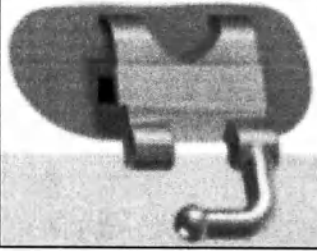
Изображение медицинского изделия.

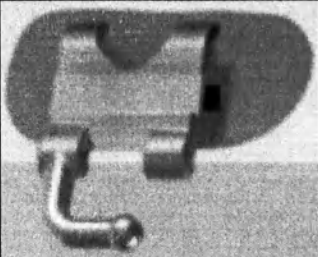
Общий вид

1. Замки-трубки одинарные

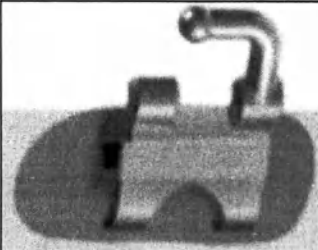
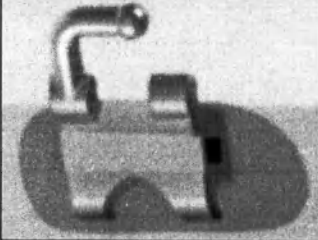
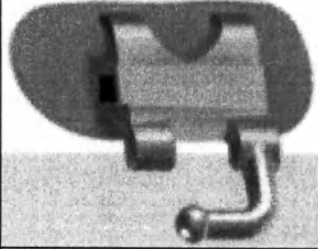
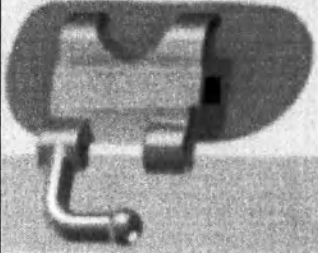
1.1 Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приклеивания:

1.1.1 Прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

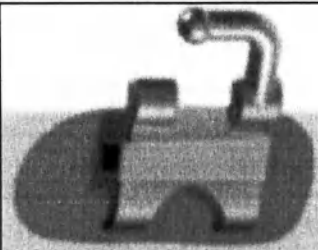
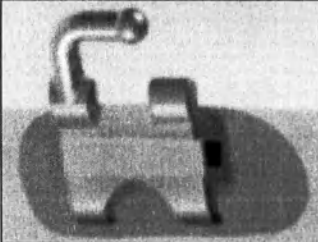
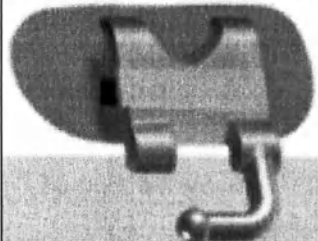
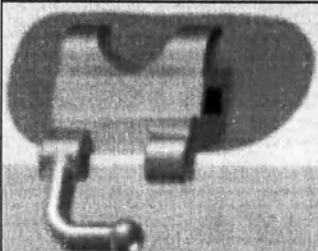
	1. Верхний правый первый моляр U6R
	2. Верхний левый первый моляр U6L
	3. Нижний правый первый моляр L6R

	4. Нижний левый первый моляр L6L
---	---

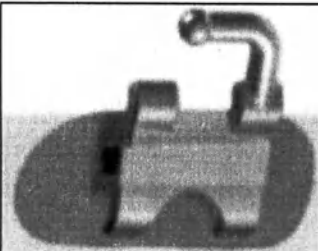
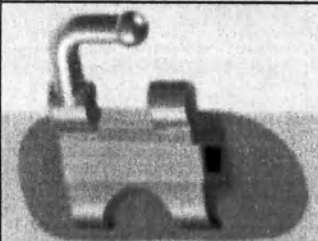
1.1.2 Прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

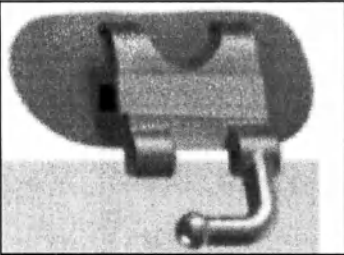
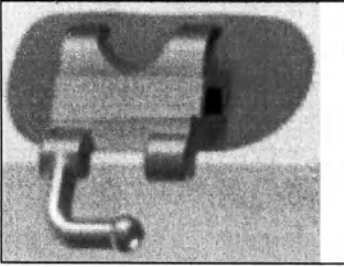
	1. Верхний правый первый моляр U6R
	2. Верхний левый первый моляр U6L
	3. Нижний правый первый моляр L6R
	4. Нижний левый первый моляр L6L

1.1.3 Прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

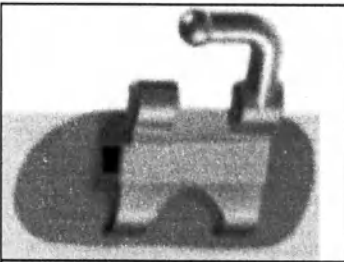
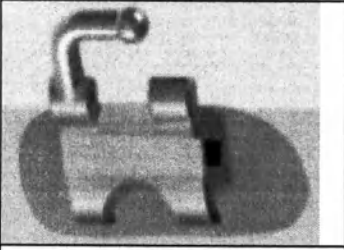
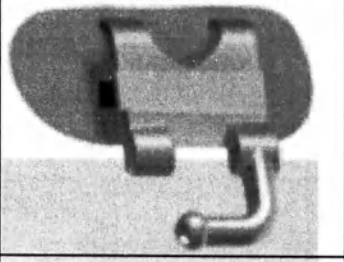
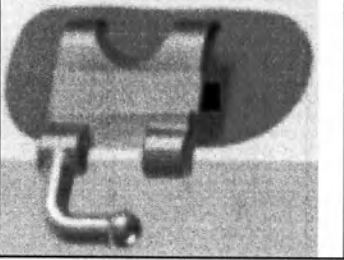
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.1.4 Прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	

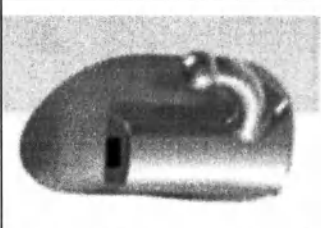
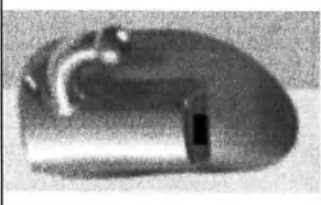
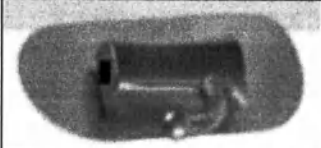
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.1.5 Прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

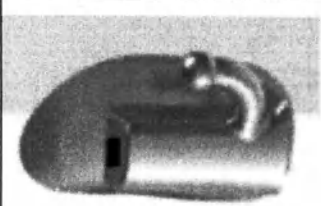
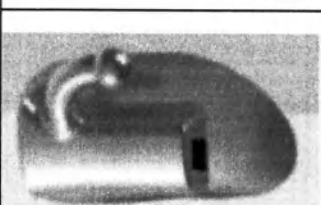
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.2 Замки-трубки одинарные: с крючком для приклеивания

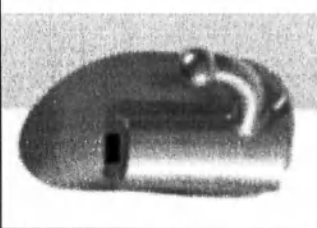
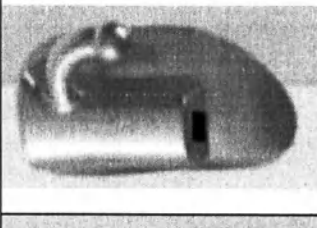
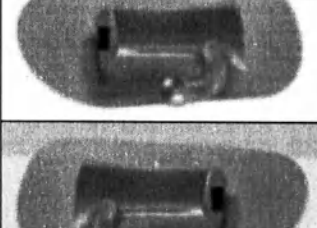
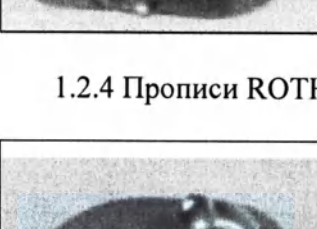
1.2.1 Прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R
	2. Верхний левый второй моляр U7L
	3. Нижний правый второй моляр L7R
	4. Нижний левый второй моляр L7L

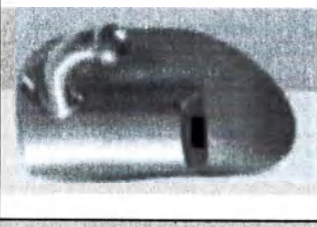
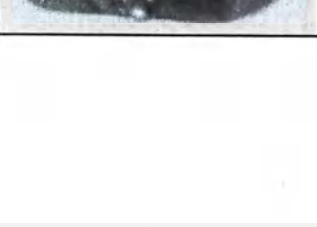
1.2.2 Прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R
	2. Верхний левый второй моляр U7L
	3. Нижний правый второй моляр L7R
	4. Нижний левый второй моляр L7L

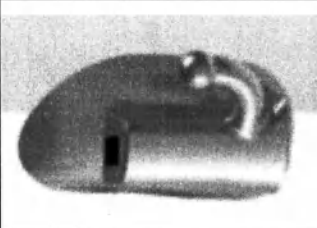
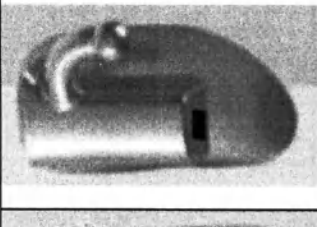
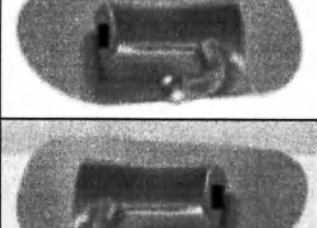
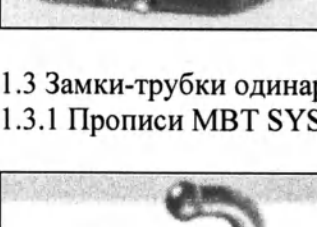
1.2.3 Прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

1.2.4 Прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

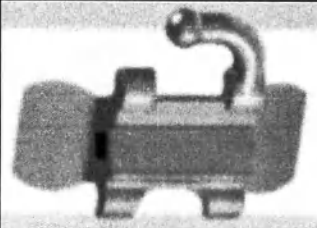
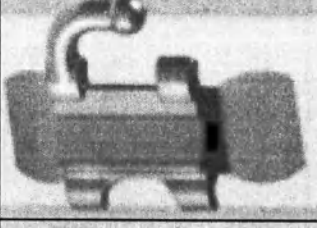
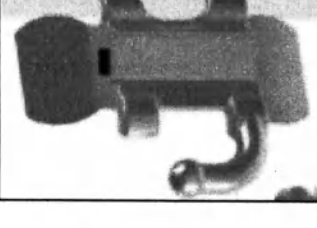
	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

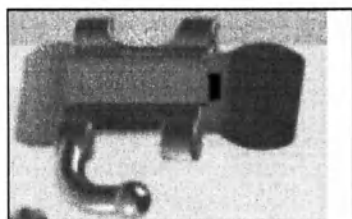
1.2.5 Прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

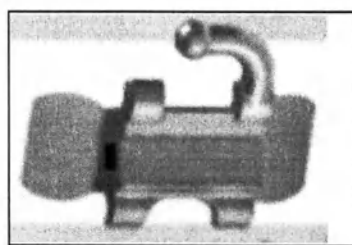
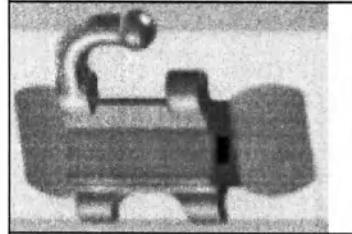
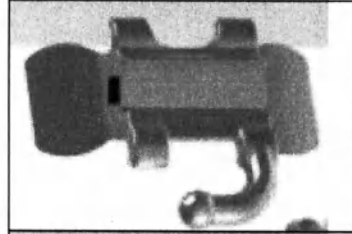
1.3 Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приваривания

1.3.1 Прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

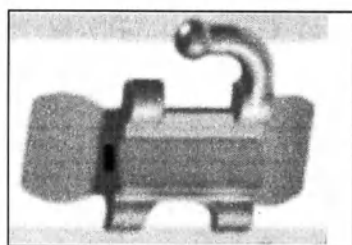
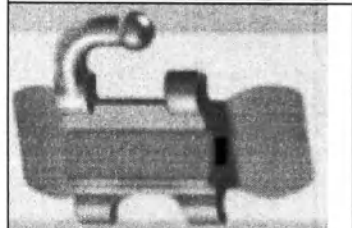
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	

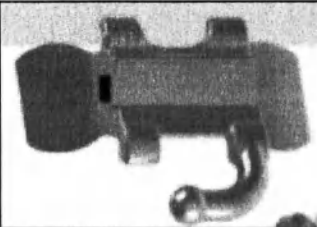
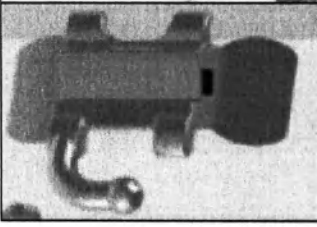
	4. Нижний левый первый моляр L6L	
---	----------------------------------	--

1.3.2 Прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

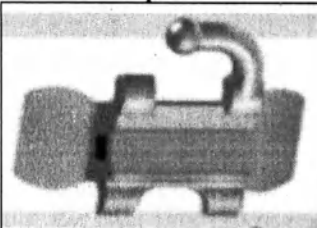
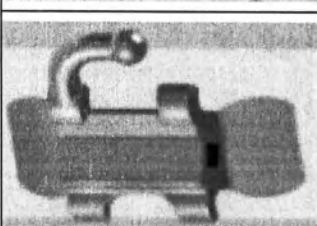
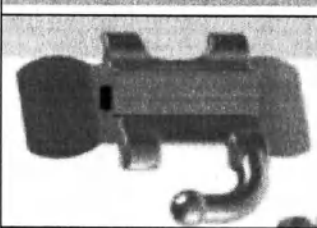
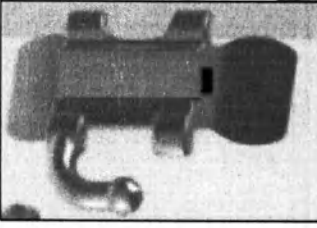
	2. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.3.3 Прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

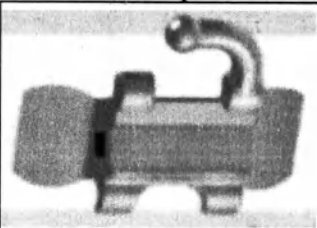
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	

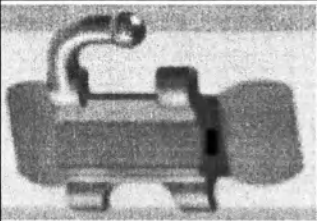
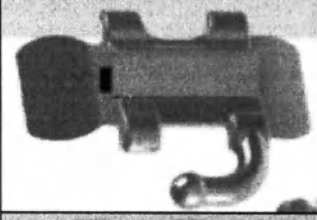
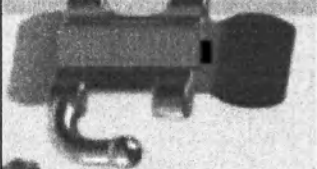
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.3.4 Прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

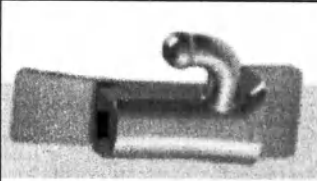
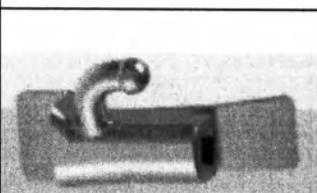
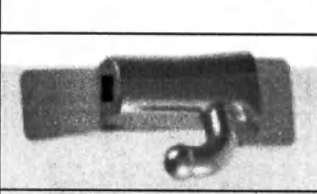
1.3.5 Прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый первый моляр U6R	
---	------------------------------------	--

	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

1.4 Замки-трубки одинарные: с крючком для приваривания

1.4.1 Прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

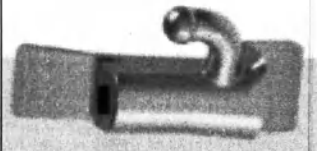
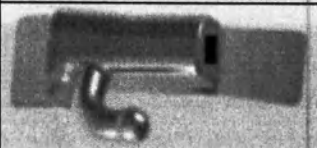
	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

1.4.2 Прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R	
---	------------------------------------	--

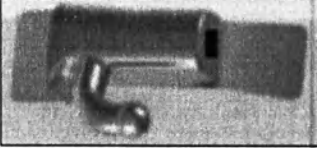
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

1.4.3 Прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

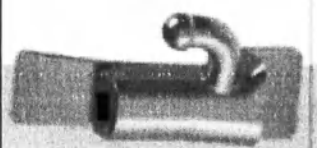
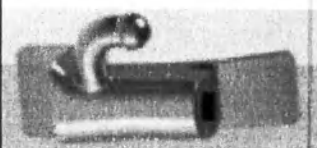
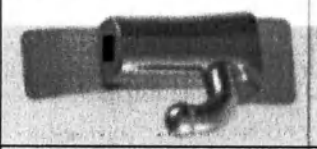
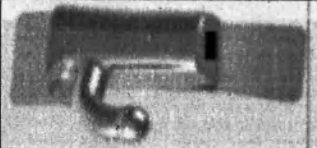
	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

1.4.4 Прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый второй моляр U7R	
---	------------------------------------	--

	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

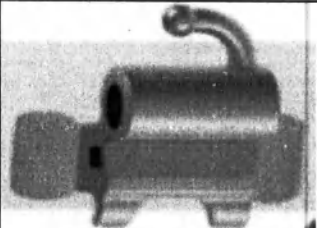
1.4.5 Прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

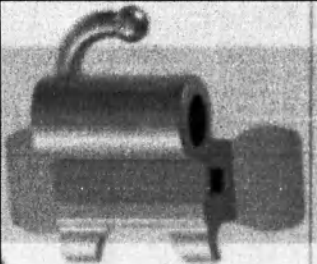
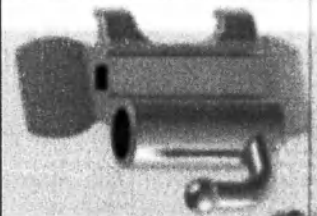
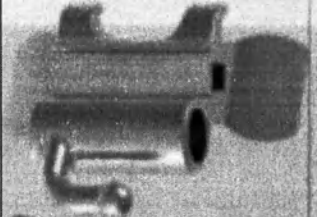
	1. Верхний правый второй моляр U7R	
	2. Верхний левый второй моляр U7L	
	3. Нижний правый второй моляр L7R	
	4. Нижний левый второй моляр L7L	

2. Замки-трубки двойные

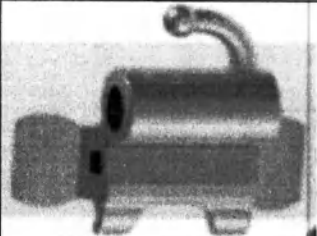
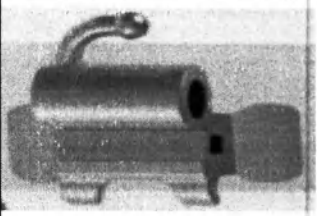
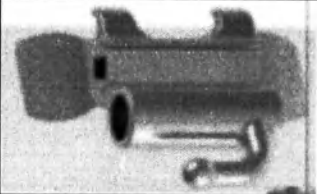
2.1 Замки-трубки двойные конвертируемые с крючком для приваривания:

2.1.1 Прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм):

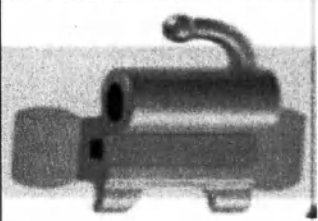
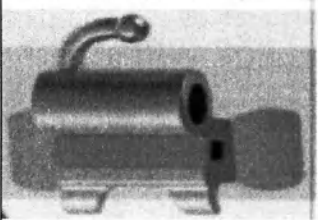
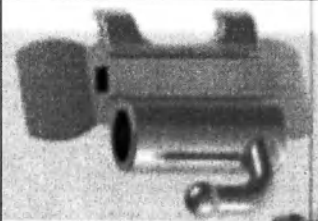
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
---	------------------------------------	--

	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

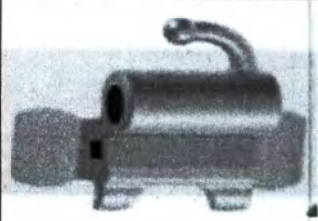
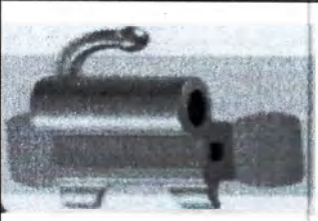
2.1.2 Прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

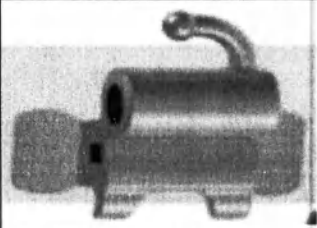
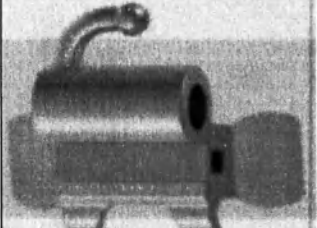
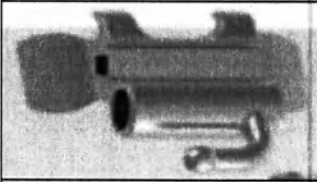
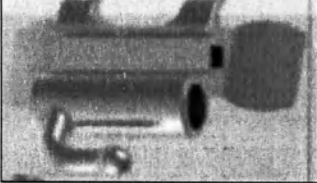
2.1.3 Прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм):

	1. Верхний правый первый моляр U6R
	2. Верхний левый первый моляр U6L
	3. Нижний правый первый моляр L6R
	4. Нижний левый первый моляр L6L

2.1.4 Прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм):

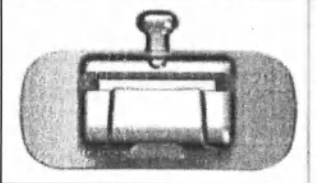
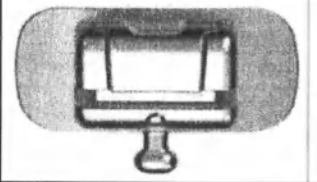
	1. Верхний правый первый моляр U6R
	2. Верхний левый первый моляр U6L
	3. Нижний правый первый моляр L6R
	4. Нижний левый первый моляр L6L

2.1.5 Прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):

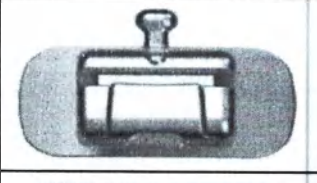
	1. Верхний правый первый моляр U6R	
	2. Верхний левый первый моляр U6L	
	3. Нижний правый первый моляр L6R	
	4. Нижний левый первый моляр L6L	

3. Замки-трубки самолигирующие

3.1 Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний первый моляр U6RL	
	2. Нижний первый моляр L6RL	

3.2 Замки-трубки прописи DAMON HIGH паза 0.022" (0,56 мм):

	1. Верхний первый моляр U6RL	
	2. Нижний первый моляр L6RL	

Внешний вид:

Замок-трубка представляет собой небольшую металлическую скобу (из нержавеющей стали) с прорезью, называемую «пазом». Через этот паз проходит проволока или ортодонтическая дуга, которая создает усилие для перемещения зубов. Также замок-трубка имеет крючок, который помогает создавать дополнительное усилие на зуб. В замок-трубку заложены углы наклона, которые индивидуальны для каждого зуба. Таким образом, есть разные замки-трубки для каждого зуба. Замки существуют для 1-х и 2-х моляров верхней и нижней челюсти.

Технические характеристики медицинского изделия

Размеры и масса:

Исполнение	Масса одного замка-трубки	Размер одного замка-трубки	Просвет паза должен обеспечивать свободный проход проволоки:	
			для паза 0.022" (0,56 мм)	для паза 0.018" (0,46 мм)
1. Замки-трубки одинарные: 1.1. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приклеивания: 1.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт	0,09 г ± 10,0 %	– длина: 3,4 мм ± 10,0 % – ширина: 3,0 мм ± 10,0 % – высота: 1,7 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
1. Замки-трубки одинарные: 1.1. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приклеивания: 1.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм):	0,09 г ± 10,0 %	– длина: 3,4 мм ± 10,0 % – ширина: 3,0 мм ± 10,0 % – высота: 2,1 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%

– нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт				
1. Замки-трубки одинарные: 1.2. Замки-трубки одинарные: с крючком для приклеивания: 1.2.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.2.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.2.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.2.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.2.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт	0,08 г ± 10,0 %	– длина: 3,2 мм ± 10,0 % – ширина: 2,0 мм ± 10,0 % – высота: 1,9 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
1. Замки-трубки одинарные: 1.2. Замки-трубки одинарные: с крючком для приклеивания: 1.2.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до	0,08 г ± 10,0 %	– длина: 3,4 мм ± 10,0 % – ширина: 2,2 мм ± 10,0 % – высота: 1,5 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%

10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.2.2. Замки-трубки пропиев MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.2.3. Замки-трубки пропиев ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.2.4. Замки-трубки пропиев ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.2.5. Замки-трубки пропиев CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт				
1. Замки-трубки одинарные: 1.3. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приваривания: 1.3.1. Замки-трубки пропиев MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.3.2. Замки-трубки пропиев MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.3.3. Замки-трубки пропиев ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.3.4. Замки-трубки пропиев ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.3.5. Замки-трубки пропиев CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт	0,12 г ± 10,0 %	– длина: 3,8 мм ± 10,0 % – ширина: 3,5 мм ± 10,0 % – высота: 1,6 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
1. Замки-трубки одинарные:	0,13 г ± 10,0 %	– длина:	проволока	проволока

1.3. Замки-трубки одинарные: конвертируемые с крючком для приваривания: 1.3.1. Замки-трубки пропием MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.3.2. Замки-трубки пропием MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.3.3. Замки-трубки пропием ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.3.4. Замки-трубки пропием ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.3.5. Замки-трубки пропием CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт		3,7 мм ± 10,0 % – ширина: 3,4 мм ± 10,0 % – высота: 2,4 мм ± 10,0 %	диаметром 0,56 мм ± 10%	диаметром 0,46 мм ± 10%
1.4. Замки-трубки одинарные: с крючком для приваривания: 1.4.1. Замки-трубки пропием MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.4.2. Замки-трубки пропием MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.4.3. Замки-трубки пропием ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.4.4. Замки-трубки пропием ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 1.4.5. Замки-трубки пропием CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм):	0,07 г ± 10,0 %	– длина: 3,2 мм ± 10,0 % – ширина: 2,1 мм ± 10,0 % – высота: 1,4 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%

– верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт				
1.Замки-трубки одинарные: 1.4. Замки-трубки одинарные: с крючком для приваривания: 1.4.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.4.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.4.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.4.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 1.4.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022" (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт	0,06 г ± 10,0 %	– длина: 3,3 мм ± 10,0 % – ширина: 2,1 мм ± 10,0 % – высота: 1,2 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
2.Замки-трубки двойные 2.1. Замки-трубки двойные: конвертируемые с крючком для приваривания: 2.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 2.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 2.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018" (0,46 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт 2.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022" (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт	0,19 г ± 10,0 %	– длина: 4,7 мм ± 10,0 % – ширина: 3,8 мм ± 10,0 % – высота: [REDACTED]	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%

10 шт – верхний левый первый моляр U6L– от 1 до 10 шт 2.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022” (0,56 мм): – верхний правый первый моляр U6R – от 1 до 10 шт – верхний левый первый моляр U6L – от 1 до 10 шт				
2.Замки-трубки двойные 2.1. Замки-трубки двойные: конвертируемые с крючком для приваривания: 2.1.1. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.018” (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 2.1.2. Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022” (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 2.1.3. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.018” (0,46 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 2.1.4. Замки-трубки прописи ROTH паза 0.022” (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт 2.1.5. Замки-трубки прописи CAPELOZZA паза 0.022” (0,56 мм): – нижний правый первый моляр L6R – от 1 до 10 шт – нижний левый первый моляр L6L – от 1 до 10 шт	0,16 г ± 10,0 %	- длина: 4,6 мм ± 10,0 % - ширина: 3,8 мм ± 10,0 % - высота: 2,3 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
3.Замки-трубки самолигирующие 3.1 Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022” (0,56 мм): – верхний первый моляр U6RL – от 1 до 10 шт 3.2 Замки-трубки прописи DAMON HIGH паза 0.022” (0,56 мм): – верхний первый моляр U6RL – от 1 до 10 шт	0,18 г ± 10,0 %	- длина: 4,0 мм ± 10,0 % - ширина: 3,4 мм ± 10,0 % - высота: 2,5 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%
3.Замки-трубки самолигирующие 3.1 Замки-трубки прописи MBT SYSTEM паза 0.022” (0,56 мм): – нижний первый моляр L6RL – от 1 до 10 шт 3.2 Замки-трубки прописи DAMON HIGH паза 0.022” (0,56 мм): – нижний первый моляр L6RL – от 1 до 10 шт	0,18 г ± 10,0 %	- длина: 4,0 мм ± 10,0 % - ширина: 3,4 мм ± 10,0 % - высота: 2,5 мм ± 10,0 %	проволока диаметром 0,56 мм ± 10%	проволока диаметром 0,46 мм ± 10%

Запах: не имеет запаха

Плотность: 7660 кг/м³ ± 10,0 %

Предел прочности: 1070 МПа ± 10,0 %

Твердость по Роквеллу С: 41 HRC ± 10,0 %

Устойчивость к коррозии - изделия должны быть устойчивы к коррозии.

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие

Замки-трубки: нержавеющая сталь марки 17-4PH, производитель: SANDVIK OSPREY LTD (САНДВИК ОСПРЕЙ ЛТД), Швеция

Химический состав (номинальные значения), %:

C (Углерод) $\leq 0,07\%$; Mn (Марганец) = 0,7%; Si (Кремний) = 0,7%; Cr (Хром) = 16,5%; S (Сера) $\leq 0,03\%$; P (Фосфор) $\leq 0,04\%$; Cu (Медь) = 4%; Nb (Ниобий) = 0,3%; Ni (Никель) = 4,5%; Fe (Железо) - остальное

Сведения об упаковке медицинского изделия

Потребительская упаковка	Полимерный пакет с застежкой: полиэтилен марки IB - 203 X (100% полиэтилен высокой плотности) производитель: ULINE (УЛИНЕ), США.
Транспортная упаковка	Картонная коробка: картон марки CARDBOARD PRNT, производитель: ULINE (УЛИНЕ), США.

Расшифровка аббревиатуры

Аббревиатура	Расшифровка
U	Верхняя челюсть
L	Нижняя челюсть / Левая сторона
R	Правая сторона
6	Первый моляр
7	Второй моляр

Условные обозначения

	Номер по каталогу
	Использовать до
	Код партии
	Европейское соответствие
	Продукт содержит никель
	Продукт предназначен для профессионального использования
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия влаги
	Не стерильно
	Осторожно

Комплект поставки медицинского изделия

- замок-трубка одного исполнения и размера, уложенная в потребительскую упаковку с маркировкой - в количестве от 1 до 10 шт.
- инструкция по применению – 1 экземпляр на транспортную упаковку.

Способ применения медицинского изделия

Вскрыть упаковку, достать замок-трубку и зафиксировать его на зуб.

Вид контакта медицинского изделия с организмом человека

Категория С - долговременный контакт (превышает 30 сут.), с неповрежденными слизистыми оболочками полости рта.

Информацию о стерильном состоянии медицинского изделия

Изделие нестерильно

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

- Аллергическая реакция при непереносимости используемых материалов. Направьте пациента к врачу при возникновении аллергической реакции.

- Атрофия корня.

- Образование язв (язвенных поражений) в слизистой оболочки полости рта.*

* квалифицированный персонал предусматривает варианты профилактики язв, а именно:

- рекомендации пациенту строго соблюдать гигиену полости рта;
- информирование пациента, что при появлении симптомов язвенных поражений слизистой оболочки полости рта незамедлительно обратиться к врачу.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации медицинского изделия

Хранение

Медицинское изделие следует хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %.

Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортирование

Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

Эксплуатация

Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- одноразовое, нестерильное изделие
- запрещено повторное использование изделия
- в изделии не используются продукты животного происхождения

Порядок утилизации медицинского изделия

Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б.

Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям, указанных в настоящем техническом файле, при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования указанных в настоящем техническом файле.

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования, и сохранения целостности упаковки.

Срок годности медицинского изделия, и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока годности

Гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования, и сохранения целостности упаковки.

Не использовать медицинское изделие по истечении срока годности.

Срок эксплуатации - срок эксплуатации не более 3 лет с момента начала использования, в зависимости от степени аномалии зубочелюстной системы.

Применяемые стандарты

93/42 / EWG Medical Device Directive / 93/42 Медицинские приборы, устройства, оборудование
ISO 14971: 2009 Medical devices Application of Risk Management to health products / ИСО 14971:2009 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISO 13485: 2016 Quality for medical products / ИСО 13485: 2016 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 15223-1: 2012 Medical product labels / ИСО 15223-1: 2012 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ISO 10993-1: 2011 Biological evaluation of medical products ИСО 10993-1: 2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ISO 14155: 2012 Clinical testing of medical products / ИСО 14155: 2012 Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика
ISO 27020:2012 Dentistry- brackets and tubes for orthodontic use / ИСО 27020:2012 Стоматология. Брекеты и трубки, используемые в ортодонтии

Сведения о производителях медицинского изделия

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица с транслитерацией, или фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя	ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (ИД - ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛИМИТАДА)
Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА)
Фирменное наименование юридического лица (при наличии)	—
Идентификационный номер налогоплательщика	—
Адрес места нахождения юридического лица	R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИМ МАРАКАНА, САН-

		ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ)
Номера телефонов		+55 17 4009-3000
Адрес электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)		vendas@id-logical.com

Сведения об уполномоченном представителе производителя медицинского изделия по вопросам, касающимся обращения медицинского изделия «Замки-трубки металлические BRACANIC ID-LOGICAL», производства: "ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA" ((ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА)) R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ)

обращаться по адресу:

ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 53, этаж 4, помещение 11
Тел. +7-499-505-50-25, e-mail: info@dentalprogress.ru

Este documento para produzir efeito no Brasil
e para valer contra terceiros, deverá ser vertido
em vernáculo e registrada a tradução. Normas
de serviços dos cartórios extrajudiciais.
Tomo II Cap. XVI Item 191.

1º CARTÓRIO DE NOTAS E OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Rua General Glicério, 3578 - CEP: 13015-400 - São José do Rio Preto - SP - CNPJ: 52.817.621/0001-66
Tel.: (17) 3301-0010 - e-mail: atendimento@1cartoriojrp.com.br
Tabelião: Leandro Utiyama

Reconheço por semelhança SEM valor econômico, a(s) firma(s) de: THAIS MENDES
LENDOS(532868). Dou fé.
São José do Rio Preto-SP, 07 de maio de 2024. Em Teste da verdade.
NOEMIA MARIA DIAS LIMA RAMOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO
Código Segurança : 244 48505049505539485355152 Valor: R\$ 8,37
Válido somente com o selo de autenticidade.



1.º TABELIÃO DE NOTAS
Noemia Maria Dias Lima Ramos
Substituta do Tabelião
São José do Rio Preto - SP.

ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА

**Инструкция по применению медицинского
изделия**

Замки-трубки металлические BRACANIC ID-LOGICAL

/штамп/

Таис Мендес Лемос

ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА

СНПГ: 18.621.065/0001-10

ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для того, чтобы настоящий документ имел силу в Бразилии и действовал в отношении третьих лиц, он должен быть переведен и заверен. Положение о внесудебных нотариальных услугах. Том II, глава XVI, пункт 191/

1-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИУ-ПРЕТУ - САН-ПАУЛУ Руа Женерал Глисеру, 3578 – индекс 15015-400 - г. Сан-Жозе-ду-Риу-Прету - Сан-Паулу – номер в Реестре юридических лиц: 52.817.621/0001-66 Тел.: (17) 3301-0910 – эл. почта: atendimento@cartorioriopreto.com.br Нотариус: Леандро Утияма Я свидетельствую подлинность подписи(ей) БЕЗ экономической ценности путем ее(их) сличения. Подпись принадлежит: Таис Мендес Лемос (532868). Засвидетельствовано. г. Сан-Жозе-ду-Риу-Прету - Сан-Паулу, 07 мая 2024 г. В подтверждение _____ подлинности. /подпись/ НОЭМИЯ МАРИЯ ДИАЗ ЛИМА РАМУС – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НОТАРИУСА Защитный код: 2449485050485055394853555152 Сумма: 8,37 реалов /подпись/ Действительно только при наличии марки для удостоверения подлинности.	/Наклейка Нотариальная коллегия Бразилии 122333 ПОДПИСЬ 1 S10999AA0589458 QR-код/ /Штамп: 1-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА Ноземия Мария Диаз Лима Рамус Заместитель нотариуса Сан-Жозе-ду-Риу-Прету – Сан-Паулу/
---	--

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем



Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого мая две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Якубова Татьяна Олеговна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2024-11-1844.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 32 лист(а)(ов)

Нотариус

Т.О. Якубова

